


Musesimulator

- Bluetooth forbindelse til computeren

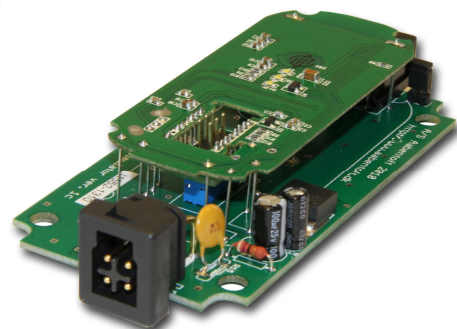

Kompatibel med alle
Dynamic DX master og
secondary remotes



- Bluetooth forbindelse for trådløs styring af musemarkør fra stolens joystick.
- Mulighed for at benytte intern Bluetooth modul i PC, hvis et sådan er til rådighed, hvis ikke bruges varenr.: TUSB2BT
- Kompatibel med DYNAMIC DX¹, samt ROLTEC Vision plus²
- Tilsluttes direkte til kørestolens bussystem og kræver ingen yderligere opsætning.
- Musesfunktioner kan styres fra tilsluttet 0/1-kontakt, men det er også muligt at udføre højre/venstreklik, samt at markere/trække et objekt alene fra joysticket, uden brug af kontakt.
- En kontakt eller anden slutfunktion er dog nødvendig for at tænde og slukke for musesimulatoren.
- Én programmerbar musfunktion fra medfølgende software.
- Proportional markørvandring / variabel markørhastighed.
- Musesimulatoren er kompatibel med PC, Mac og Netbook.
- Ved flere joystick på stolen er det profilens dedikerede joystick, der styrer musesimulatoren

¹: Kræver dog DX-CLAM Modul er til stede på stolen

²: Adapterkabel (AMSCDX2ROLTEC) nødvendig for tilslutning til stolen bussystem.



A/S Aabentoft
Løgtelvej 93
DK-8541 Skødstrup
Tlf 86 97 53 00
Fax 86 97 53 02

email: mail@aabentoft.dk
Website: www.aabentoft.dk

Musesimulator – AMSDXBT

Bluetooth v2.0 class2 specifikation kompatibel

Forsyning:	24VDC
Forbrug:	250mW
Dimensioner:	(H x B x D) 31 x 137 x 61mm
Elektrisk tilslutning:	Dynamic DX bus Jack 3,5mm

En musesimulator gør det muligt at styre musemarkøren på PC skærmen fra stolens joystick. Denne udgave tilsluttes direkte til Dynamic **DX** Bus-systemet og kræver ingen videre opsætning. Musesimulatoren forbindes til computeren via en Bluetooth forbindelse. Denne forbindelse giver mulighed for at styre musemarkøren, højre- og venstreklik, rullehjul for scroll, samt yderligere en programmér musfunktion. Med Bluetooth forbindelsen opnås en meget stabil og tabfri trådløs forbindelse med en rækkevidde på minimum 10m. Det er således ikke nødvendigt at sender og modtager kan "se hinanden". Ydermere kan PC'ens indbyggede Bluetooth modul anvendes, hvis et således er til rådighed og derved undgås yderligere USB adaptere. Hvis ikke anvendes en ekstern Bluetooth adapter, Varenr.: TUSB2BT Markørens hastighed er variabel og proportional med joystickets afstand fra centrum. Det er fra musens opsætningsmenu muligt at "vende" joysticket, således at der byttes rundt på højre/venstre eller op/ned eller rotere joysticket 90 grader.

Der er også fra menuen at musesimulatoren opsættes, således at musens "klik"-funktioner, så som højre- og venstreklik betjenes udelukkende fra joysticket, altså uden brug af tilsluttet 0/1-kontakt.

Varenr.: AMSDXBT