



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS**

**LM-450 - LM-700
+ CITY KABINE**

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG ELSCOOTER

Denne brugermanual indeholder de mest nødvendige oplysninger for at du får glæde af alle de funktioner elscooteren har. Derudover er der en trin for trin guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

Lindebjerg



INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhed/Forholdsregler	Side 4
Sådan betjener du din elscooter	Side 5
Opladning	Side 5
Kørsel	Side 5
Friløb	Side 5
Instrumentbord	Side 6
Display	Side 7
Indstilling af ur, Vedligehold & batteri	Side 8
Få mere ud af dit batteri	Side 9
Sædetype	Side 10
City kabine	Side 11
Nøglefri betjening (LM650-LM700)	Side 12
Fejlsøgning	Side 13
Garanti og service	Side 14
Serviceskema	Side 15

SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

Denne manual skal læses igennem før køretøjet tages i brug. Manualen indeholder vigtige informationer omkring vedligeholdelse, opladning af køretøjet m.m.

1

Sikkerhedsinstruktioner

- Kør ikke køretøjet hvis du er påvirket af alkohol og eller andre stoffer, som kan have indflydelse på kørslen.
- Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farlige for dig selv og andre i nærheden af køretøjet.
- Kør altid køretøjet sikre steder, herunder hold altid til højre for at skabe sikker trafik.
- Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, som gør kørslen farlig.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Før kørsel, tjek køretøjet for fejl og mangler, herunder dækkene og deres dæktryk.

2

Batteri instruktioner og vedligeholdelse:

Læs opladnings instruktionerne på side 9 før køretøjet oplades. Køretøjet bør sættes til opladning, når det ikke benyttes. Hvis køretøjet ikke benyttes i længere tid, skal opladeren min. sættes til hver 14. dag.

Hvis scooters batterier aflades helt, tager batterierne skade og levetiden forkortes væsentligt. Se yderligere information omkring opladning og batteri på side 9 og 11.

SÅDAN BETJENER DU DIN LINDEBJERG ELSCOOTER

3

Opladning

For at genoplade scooterens batteri skal du benytte den medfølgende batterioplader, som du finder i frontkurven ved levering.

Monter den løse ledning i batteriopladeren og forbind dens anden ende i en almindelig stikkontakt. Forbind opladerens runde stik i scooterens ladestik. Forsikrer dig at stikket er skubbet helt i. Tryk på "I" på opladerens tænd/sluknap. Opladningen er nu i gang. Du vil se opladerens lysdioder blive henholdsvis Rød og Gul.

Når opladningen er fuldstændt vil den gule lysdiode skifte til grøn. Vi anbefaler at sætte scooteren til opladning efter hver køretur. Opladeren stopper selv, når batteriet er fuldt opladt. Skal scooteren ikke benyttes i længere tid, eller opmagasineres, skal der stadig tilsluttes oplader, således batteriet ikke tager skade. Hvis ikke dette er muligt skal batterierne tages fra systemet. Dette anbefales at få gjort af en Lindebjerg tekniker.

Vi anbefaler at lader tilsluttes efter endt kørsel hver gang. Under opladning skal du blot slukke for din scooter. Scooterens batteriindikator vil ikke informere dig om ladestatus under opladning, men kun under kørsel.

BEMÆRK: Oplades der i fugtige miljøer, skal der tilvælges en vejrbestandig oplader, for at garantien på opladeren vil gælde.

4

Kørsel

Det er vigtigt at lære scooteren godt at kende inden du bevæger dig ud i trafikken. Start med lav hastighed indtil du føler dig tryk med scooterens funktioner. Bemærk – hvis du trykker stille og roligt vil du opnå en mere jævn kørsel. Undgå at trykke speederen hurtigt helt i

bund eller slippe den i en hurtig bevægelse. Dette vil opleves som en kraftig acceleration og en kraftig nedbremsning.

Undgå at lave skarpe sving ved høj hastighed. Ved op og ned kørsel af f.eks. fortov bør du altid køre lige på op/nedkørslen.

Din scooter anses som værende en cykel i færdselsloven. Du skal derfor agere som cyklist i trafikken. Forefindes der en cykelsti skal denne benyttes, hvis ikke skal du køre i vejsiden. Kører du med samme fart som en gående, under 6 km/t, må du køre på fortovet og gågade.

Når du skal dreje, anbefaler vi at man giver tegn med hånden. Dette ses bedre af andre trafikanter end scooterens blinklys.

5


Friløb

Skulle der opstå en situation hvor det bliver nødvendigt at skubbe med din scooter, skal du først frikoble scooterens motor. Dette gøres ved at trække op i frikoblingshåndtaget der findes under scooterens bagkåbe. På scootere med 400W motor er håndtaget gult og findes på scooterens bagende ved højre baghjul. På scootere med 800 eller 1200W motor sidder håndtaget under kåben og er markeret med et "Open/Close" klistermærke på rammen/stellet.


I tilfælde af, at der er strøm på din scooter, kan modeller med 800W eller 1200W motor skubbes ved hjælp af frikoblingsknappen (12) på instrumentbordet.

Vigtigt! Håndtaget skal være trykket i bund, for at scooteren kan køre. Er håndtaget ikke i bund vil batteriindikatoren blinke. Sluk da scooteren, tryk håndtaget i bund og tænd igen for scooteren.

INSTRUMENTBORD

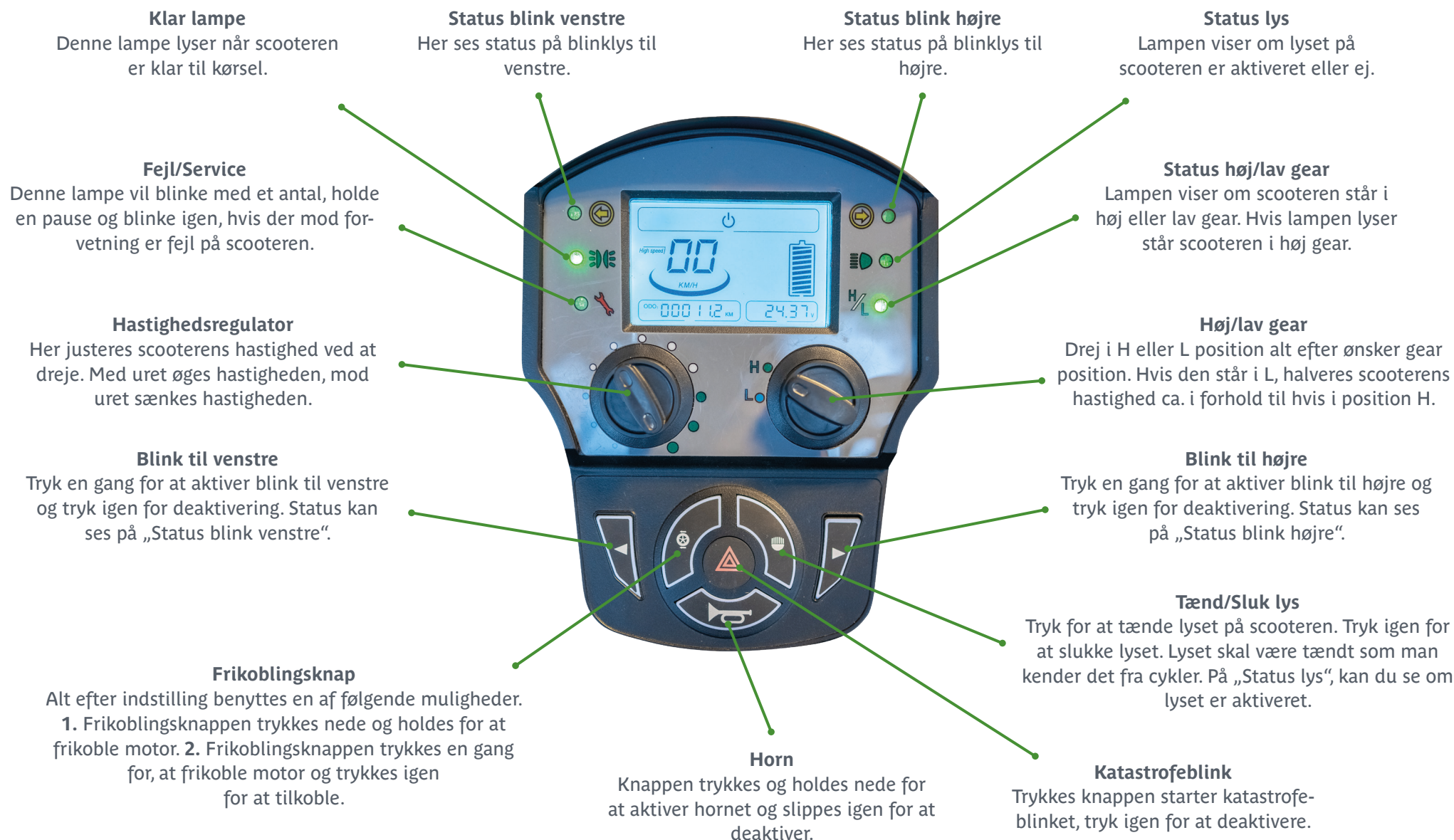

DISPLAY

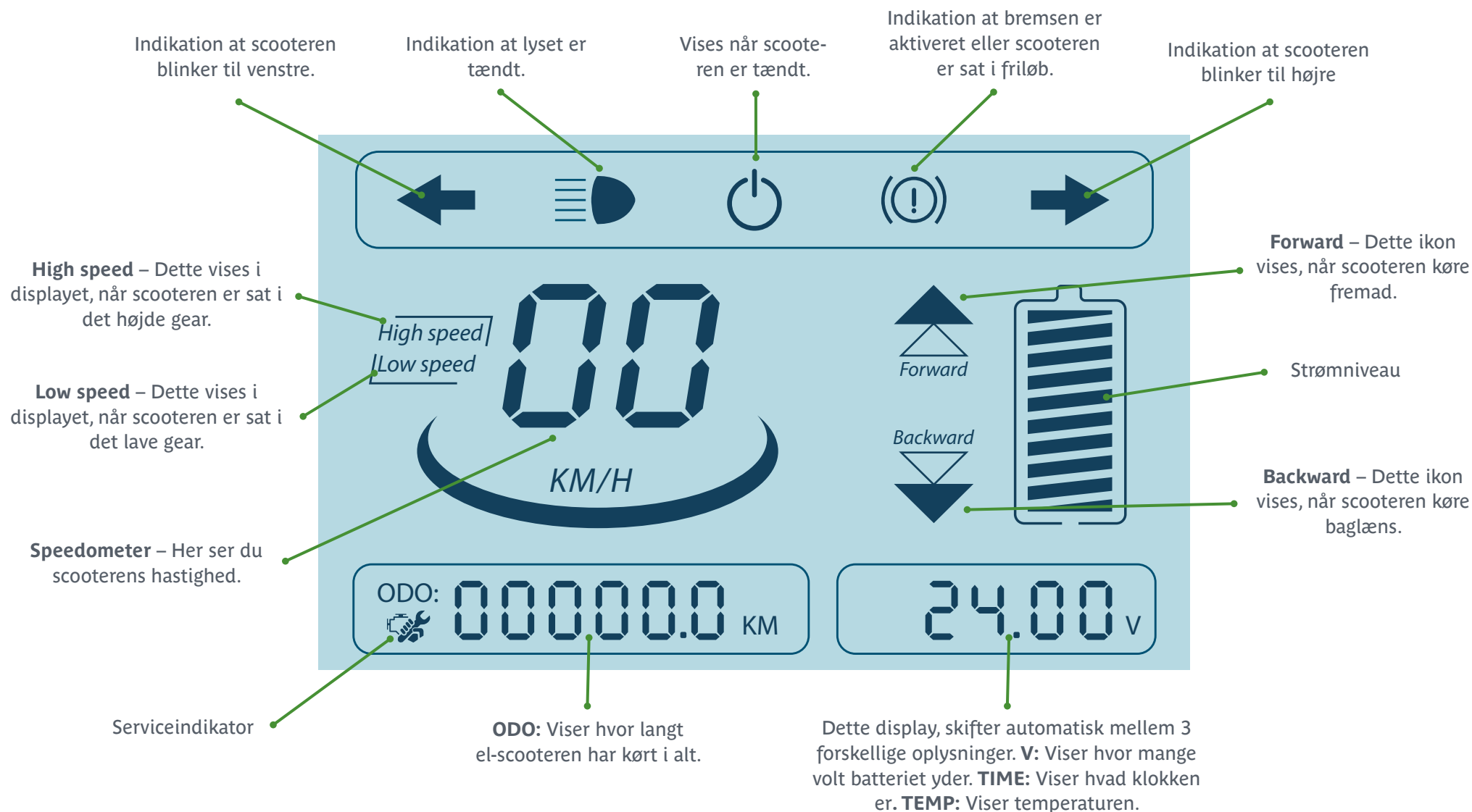

INDSTILLING AF UR, VEDLIGEHOOLD & BATTERI

6 Indstilling af ur

Her er en kort guide til hvordan du indstiller uret på din elscooter.

Trin 1 - Hold „Tænd/sluk lys“ knappen nede, indtil timeviseren begynder at blinke. Brug „Blink til venstre“ og „Blink til højre“ knappen til at ændre timerne.

Trin 2 - Når timerne står korrekt, skal du trykke en gang på „Tænd/sluk lys“ knappen, så minutviseren begynder at blinke. Brug „Blink til venstre“ og „Blink til højre“ knappen til at ændre minutterne.

Trin 3 - Når minutterne står korrekt, skal du igen holde „Tænd/sluk lys“ knappen inde, indtil minutviseren stopper med at blinke. Så er du færdig med at indstille dit ur.

7 Vedligehold

For at opretholde en lang og problemfri levetid på din scooter, er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

Dagligt:

Forsikre dig at bremserne virker optimalt.

Forsikre dig at scooteren er ladet helt op.

Hver måned:

Tjek hjulenes lufttryk. Trykket skal være ca 2,5 – 3 bar.

Rengør sæde og plastikskjold med en fugtig klud. Undgå at sprøjte vand direkte på scooteren.

Årligt:

Det anbefales at få serviceret din scooter af en Lindebjerg tekniker hver 12. måned. Se dit service og garantibevis. Bemærk at hvis din scooter er ny, skal din scooter serviceres efter 9. måneder for at op-

retholde garantien på scooteren, herefter med 12 måneders interval.

8 Batteri informationer

Din scooter er forsynet med 2 stk. 12V vedligeholdesfrie batterier. Disse batterier er af forskellig størrelse afhængig af model. Når batteriet er slidt og skal udskiftes, er det vigtigt at få de rigtige batterier i igen. Kontakt da Lindebjerg for mere information.

Batteriet er en sliddel der slides kontinuerligt fra den dag, du starter med at køre på din scooter. Stille og roligt vil batteriet slides og din maksimale distance vil blive kortere og kortere, indtil du til sidst må udskifte batterierne til nye. Batteriets levetid er afhængig af hvor meget scooteren bliver brugt og hvordan. Levetiden kan variere fra 6 måneder til 3-4 år alt efter type af brug. Undgå at aflade dit batteri helt. Dette nedsætter batteriets levetid kraftigt. Oplad altid din scooter efter hver tur. Din maksimale rækkevidde afhænger af din kørsel. Kører du af landevej med konstant fart vil du opnå scooterens maks rækkevidde, som du kan læse i scooterens specifikationer. Kører du derimod i byen med meget start og stop, vil scooteren bruge mere strøm og din rækkevidde vil blive nedsat. Meget start og stop, som f.eks. ved hundeluftning vil nedsætte rækkevidden markant og skabe et større slid på batteriet. Andre faktorer som spiller ind er kulde, som påvirker batteriets kapacitet. Et temperaturfald fra 20 grader til 0 grader vil ca. halvere batteriets kapacitet og dermed din rækkevidde. Blødt underlag, så som græs, grus o.lign. vil kræve mere strøm, og dermed nedsættes scooterens rækkevidde.

HUSK - Kør aldrig scooteren helt tør for strøm, dette kan ydelægge batterierne og kræve en udskiftning. Oplad altid efter endt kørsel.

Få mere ud af dit batteri

Når du begynder din kørsel og dermed begynder, at bruge af kapaciteten på batteriet vil du se de farvede felter begynder at slukke, startende med de grønne. Når kun de røde er tilbage skal du søge mod et sted hvor du kan genoplade batteriet. Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Derfor anbefaler vi, at du genoplader batteriet efter hver køretur. Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu
klar til
at køre



SÆDETYPER

Kaptjan sæde:



Tilbehørsmontering

Kaptjansæde har mulighed for at få monteret Lindebjerg's originale tilbehørs dele, via det integreret beslag i sædet. Lindebjergs aktuelle tilbehørs program kan ses i vores brochure og på www.lindebjerg.dk

CITY KABINESCOOTER

Lindebjerg's kabinescooter har yderligere funktioner udover de før nævnte i denne manual. De yderligere funktioner er vist herunder.

9 Påfyldning af sprinklervæske

Beholderen til sprinklervæske sidder placeret inde i kabinen, til venstre for styrret. Her kan du nemt skue låget af og påfylde sprinklervæske. Kabinescooteren bruger samme sprinklervæske som biler, det kan købes på din lokale tanksation eller supermarked.

10 El-varme, Vinduesvisker & Sprinklervæske

El-varmen tændes og slukkes ved, at trykke på knappen til højre for styrret. Vinduesviskerne tændes ved, at dreje på knappen placeret til højre for styrret. Sprinklervæsken aktiveres, ved at holde „Sprinkler“ knappen inde, indtil du vurderer ruden er tilpas fyldt med sprinklervæske. Bemærk: Ved brug af El-varme nedsættes den normale kørerækkevidden væsentligt.

11 Fjernbetjent centrallås

Til kabinescooteren, medfølger en fjernbetjening til at låse og åbne dørene. Tryk på knappen markeret med „Lås op“ for at låse dørene op. Tryk på knappen markeret med „Lås“ for at låse drønene igen.



- Knap 1 – Lås
- Knap 2 – Lås op

Påfyldning af
sprinklervæske

Sprinklervæske



Tænd/sluk af varme

Vinduesvisker



NØGLEFRI BETJENING (LM650-LM700)

10 Nøglefri betjening

LM650-LM700, er udstyret med nøglefri betjening. Hvilket betyder, at der ikke følger en nøgle med. Scooteren er i stedet udstyret med en fjernbetjening. For at scooteren kan tænde, skal fjernbetjeningen være tæt på scooteren. Når fjernbetjening er et stykke væk fra scooteren, kan den ikke tænde.

11 Fjernbetjening

Her ser du fjernbetjeningen til scooteren. Den skal vi bruge til at låse din scooter op og låse den igen.



12 Alarm

Scooteren er udstyret med et alarmsystem. Når du trykker „Lås“ på din fjernbetjening, slår alarmeren også til. Hvis der er nogle som prøve at tænde eller skubbe i din scooter, så vil alarmeren gå igang (Hvis alarmeren går igang, kan du slå den fra ved at trykke på „Lås op“). Når du låser den op igen, vil alarmeren automatisk slå fra. Husk at lås din scooter op, før du sætter dig på den, så alarmeren ikke går igang.

13 Tænd scooteren

Når du har låst din scooter op, så er du klar til at tænde den. Det kan du gøre på 2 måder. Du kan trykke et kort tryk på „Tænd scooteren“ knappen på din fjernbetjening, eller trykke på start/stop, som sidder under styret på højre side.

For at slukke den din scooter, kan du trykke på „Tænd/stop“ på scooteren, eller trykke på „Lås op“ knappen på fjernbetjeningen. Så slukker scooteren.



FEJLSØGNING

Problem	Fejl	Løsning
Scooteren kan ikke køre. Den blinker en gang.	Batterispændingen er for lav.	Sæt scooteren til opladning.
Scooteren kan ikke køre. Den blinker 4 gange.	Motoren er frikoblet, så du kan skubbe med scooteren.	Sluk scooteren - Tryk håndtaget til frikobling af motor i bund. Tænd scooteren igen.
Scooteren kan ikke køre. Den blinker 6 gange.	Opladeren er forbundet til scooteren.	Sluk scooteren - Træk stikket ud af scooteren. Vent 2 sek. og tænd igen.
Scooteren kan ikke køre. Den blinker 7 gange.	Speederen er aktiveret for hurtigt eller står ikke neutral.	Sluk scooteren. Tænd herefter igen og vent ca. 2 sek. før speederen aktiveres.
Scooteren stopper pludseligt under kørsel.	Dårlig batteriforbindelse.	Tjek batteristik. Evt. kontakt Lindebjerg.
Scooteren taber fart under kørsel.	Dårlig forbindelse i fartpotentiometer.	Drej hastighedsjusteringsknap frem og tilbage, da forbindelsen kan forringes ved sjælden brug.
Scooteren kører kort på en opladning.	Batteriet aflades for hurtigt pga. slitage, blødt underlag, kulde, eller meget start og stop.	Genoplad batterierne. Kør en tur på hårdt underlag. Skift evt. batterierne.
Scooteren vil ikke lade op.	Aflæsningsfejl.	Ladestatus skal ses på selve opladeren.
Scooteren vil ikke lade op, men kører fint.	Sikring er sprunget i opladeren.	Tjek sikring i oplader, evt. kontakt Lindebjerg.
Opladeren virker ikke.	Opladeren får ikke noget strøm.	Tjek stikkontakten og evt. sikring i oplader.
Scooteren kører for langsomt.	Scooterens lave gear er aktiveret.	Tryk på gearkontakten.
Scooteren holder konstant med baglys.	Lyset er parkeringslys og slukkes under kørsel.	Der er ikke tale om en fejl.

GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige el-scooter til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne service-teknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikre dig, at du ikke skal undvære din el-scooter i længere tid.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet, af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremses, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået, som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning

Din el-scooter leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes, skal scooterens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet.

Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores teknikere din el-scooter for at sikre lang levetid.

Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

- Motorophæng
- Bagaksel
- Elnet
- Sædet
- Styretøj
- Dæktryk
- Lysnettet
- Motorbremse
- Parkeringsbremse
- Instrumentbordet
- Affedringen

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

SERVICESKEMA

Første service ligger 9 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Købsdato: _____

▼ 1 år ▼ SERVICE 1 9 måneder efter køb Dato/stempel	▼ 1 år ▼ SERVICE 4 45 måneder efter køb Dato/stempel
▼ 1 år ▼ SERVICE 2 21 måneder efter køb Dato/stempel	▼ 1 år ▼ SERVICE 5 57 måneder efter køb Dato/stempel
▼ 1 år ▼ SERVICE 3 33 måneder efter køb Dato/stempel	▼ 1 år ▼ SERVICE 6 69 måneder efter køb Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.