

Manual

Denne manual er gældende for artikelnr 7400 - Handybar




Beskrivelse:

Handybar er et støttehåndgreb beregnet til at hjælpe bevægelseshæmmede med at komme ind og ud af bilen. Håndgrebet er beregnet til placering i dørkarmens låsebøjle på bilen. Handybar kan også anvendes som seleskærer og nødhammer!

Anvendelse:

1. Lokaliser låsebøjlen i dørkarmen på din bil. Sikre sig at den er af den rigtige type. (se afsnit om begrænsninger)
2. Sæt støttehåndgrebet let på skrå ned i låsebøjlen med metalspidsen først.
3. Vip støttehåndgrebet fremad og mærk at det låser fast.
4. Brug støttehåndgrebet som støtte ved ind og udstigning af bilen.
5. Fjern støttehåndgrebet ved at vippe det let bagud og trække det op ad låsebøjlen. **HUSK altid at fjerne håndgrebet før bildøren lukkes!**
6. Opbevar håndgrebet inden for rækkevidde i bilen.

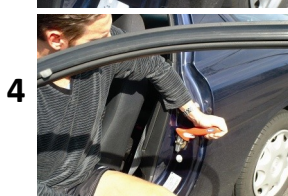

Seleskærer:

Støttehåndgrebet kan anvendes som seleskærer, ved at selen skæres over med den indbyggede kniv.





Nødhammer:

Støttehåndgrebet kan anvendes som nødhammer, ved at metalspidsen slås hårdt mod sideruden til den knuses.



Begrænsninger:

For at anvende Handybar kræves en U-formet låsebøjle som er monteret med minimum 2 bolte. Det frarådes at anvende Handybar i låsebøjler med indbygget lyskontakt. Følgende billeder er kun eksempler på nogle låsebøjler:

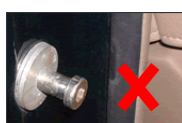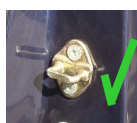

Ikke U-format

Kun 1 bolt

Lyskontakt