



Instruktionsguide til DressBuddy KOMBI PÅ/AF

DressBuddy Kombi er beregnet til på- og aftagning af korte og lange kompressionsstrømper med åben og lukket tå.

- De gule kugler anvendes til påtagning
- De blå kugler anvendes til aftagning.

Velegnet til borgere der ikke kan bukke sig frem og nå ned til sine fødder eller til borgere, der har nedsatte kræfter i arme eller ben.

Med DressBuddy Kombi er det muligt at tage kompressionsstrømper på med brug af kun én arm.

DressBuddy Kombi kan købes som et enkelt-stativ eller som et sæt. I sættet medfølger friktionsplade og Slip-Perfect glidestykke som tilbehør.



HMI-nr. Varenr. Varetekst			Person mål		Stativ mål	
			Personhøjde i cm	Lægomkreds i cm	Bredde i cm	Længde i cm
72478	1000	SÆT - 3 dele - KOMBI - KORT	Op til 160	Op til 40	16	55
72496	1001	SÆT - 3 dele - KOMBI - MELLEM	160 - 185	Op til 40	16	60
72497	1002	SÆT - 3 dele - KOMBI - LANG	Over 185	Op til 40	16	70
72498	1003	SÆT - 3 dele - KOMBI - KORT OG BRED	Op til 160	Over 40	19	55
72500	1004	SÆT - 3 dele - KOMBI - MELLEM OG BRED	160 - 185	Over 40	19	60
72502	1005	SÆT - 3 dele - KOMBI - LANG OG BRED	Over 185	Over 40	19	70

72506	2000	ENKELT - KOMBI - KORT	Op til 160	Op til 40	16	55
72507	2001	ENKELT - KOMBI - MELLEM	160 - 185	Op til 40	16	60
72510	2002	ENKELT - KOMBI - LANG	Over 185	Op til 40	16	70
72509	2003	ENKELT - KOMBI - KORT OG BRED	Op til 160	Over 40	19	55
72512	2004	ENKELT - KOMBI - MELLEM OG BRED	160 - 185	Over 40	19	60
72514	2005	ENKELT - KOMBI - LANG OG BRED	Over 185	Over 40	19	70

Materiale: Rustfri stål.

Rengøring: DressBuddy kan afvaskes med sprit, i autoklave eller ved håndvask. Glidestykke og friktionsplade kan vaskes i hånden ved max 30° C.



Youtube
Video



HMI-Basen
Manual



Danish **CARE** Supply
- fremtidens hjælpemidler

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere

Påtagning



1. Læg friktionspladen på gulvet mellem dine fødder.



5. Placer DressBuddy vinkelret på friktionspladen og før foden ind i strømpen. Pres ned indtil kantbåndet kommer op omkring hælen.



2. Læg DressBuddy på dine lår med de gule kugler opad og med strømpehælen opad.



6. Træk strømpen halvt op på læggen.



3. Sæt strømpehælen på én kugle ad gangen.



7. Gnid hælen fremad på friktionspladen med små korte ryk, så strømpen kommer på plads ved hælen. Træk lidt i stativet samtidig.



4. Put glidestykket ned i strømpen med en lille fold/åbning, som din fod kan komme ned i.



8. Træk i DressBuddy indtil strømpen er helt på. Tag så kantbåndet af kuglerne og træk glidestykket ud af strømpen, ved at trække først i den grønne slip og derefter det grå. Træk mellem benene.





1. Hælen hviler naturligt på friktionspladen.



2. Sæt de blå kugler på DressBuddy kombi indenfor kantbåndet bag på læggen.



3. Skub DressBuddy kombi ned langs benet, så langt det er muligt, og hold den fast på friktionspladen.



4. Træk benet ind mod dig selv, indtil strømpen sidder nede ved anklen.



5. Gnid hælen mod friktionspladen med små korte ryk, indtil strømpen glider af.

Hvem er vi?

Danish Care Supply A/S er blandt Danmarks førende leverandører af småhjælpemidler. Vi sælger hjælpemidler til private borgere, virksomheder, kommuner og regioner.

Vi tilbyder et bredt udvalg af hjælpemidler, der dækker behov inden for:

- På- og afklædning
- Køkkenredskaber og spisning
- Personlig pleje, bade- og toilethjælp
- Dagligstuen og soveværelset
- Rollatorer, krykker og stokke
- Inkontinens
- Brandhæmmende produkter
- Medicinhåndtering

Derudover tilbyder vi hjælpemidler, der effektivt aflaster plejepersonalet i deres arbejde med borgere.

Sådan handler du hos os:

Du kan bestille vores hjælpemidler direkte på vores hjemmeside, via e-mail, på telefon eller ved et besøg i vores fysiske butik.

Vores erfarne team står altid klar med gode råd og professionel vejledning, så du får mest muligt ud af vores hjælpemidler.

Påtagning

1. Hvis borgeren ikke kan krænge strømpen ud over de gule kugler, så kan du bruge en connector som kan samle kuglerne (varenr. 2999).



2. Hvis borgeren har svært ved at få foden helt ned i strømpen, skyldes det ofte, at de gule kugler sidder for langt nede eller for langt fremme i strømpen og derved mindsker elasticiteten. Husk at de gule kugler skal sidde på kantbåndet for størst mulig elasticitet.




3. Hvis borgeren ikke kan få foden ned i strømpen eks. pga. for få kræfter i benene eller har nedsat bevægelighed i fodleddet, anbefaler vi at afprøve DressBuddy påtager, idet den kan anvendes af borgere, der ikke kan vinkle fodleddet.




Aftagning

1. Hvis borgeren har sårbar hud, så lav en fold på strømpen ved aftagning, så kuglerne ikke kommer i berøring med huden.

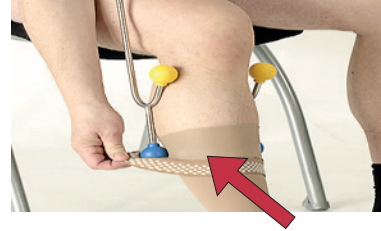

2. Hvis borgeren har svært ved at få foden ud af strømpen, så skyldes det ofte, at de blå kugler sidder for langt nede i strømpen og for langt fremme på benet. Derved mindskes elasticiteten. Husk at de blå kugler skal sidde på kantbåndet for at få den størst mulige elasticitet (se billedet).

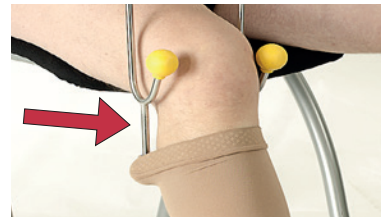

3. Hvis borgeren har svært ved at anvende friktionspladen eksempelvis pga. for få kræfter i benet eller vanskeligheder ved at koordinere bevægelsen, så anvend evt. DressBuddy aftager på hjul.

