



Aktivt pandebånd, voksen, barn 77101 / 77102

## Montering:

- 1) Sikre dig at hovedstøtten er korrekt tilpasset, inden du monterer pandebåndet.
- 2) Begynd med at montere pandebåndet på beslaget til den øvre støttepude. Se pos. C  
Spænd skruen.

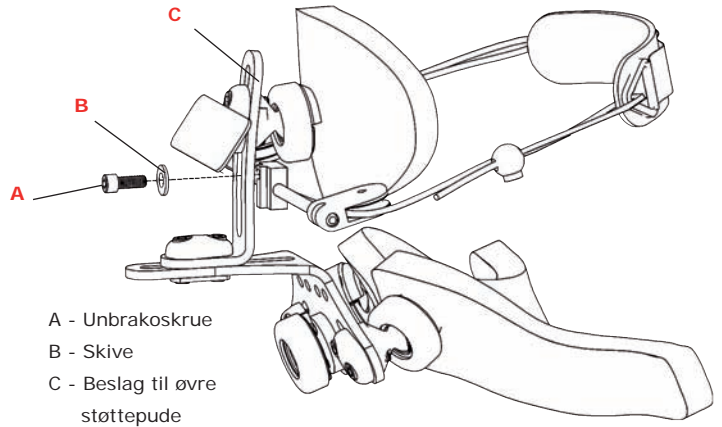


A - Unbrakoskrue  
B - Skive  
C - Beslag til øvre støttepude

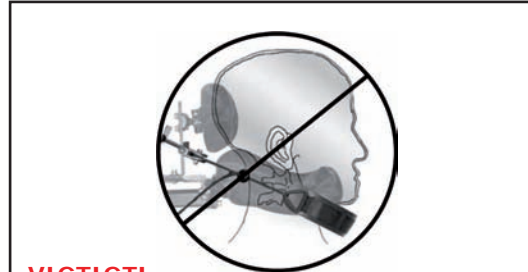

## VIGTIGT!


- \* Montering og justering skal foretages af fag personale.
- \* Det er meget vigtigt at pandebåndet er korrekt justeret, det må aldrig glide ned over næsen.
- \* Alle personer som kommer i kontakt med brugeren af pandebåndet skal være instruerede i, hvordan pandebåndet sidder korrekt.
- \* Brugeren skal efter montering og justering fortsat observeres for at afgøre om yderligere justeringer er nødvendige.

A - Unbrakoskrue  
B - Hjul  
C - Rem  
D - Justeringskugle  
E - Pandebånd

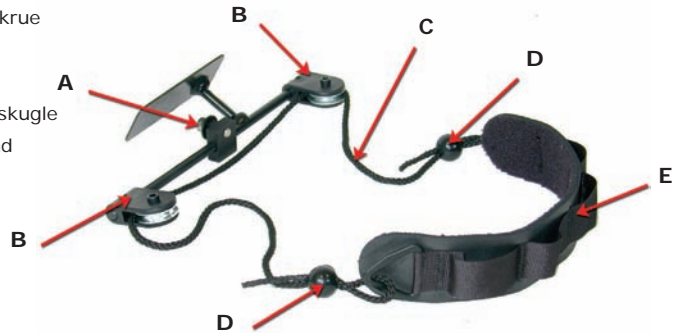

## Afprøvning af aktivt pandebånd


### Monteret for lavt

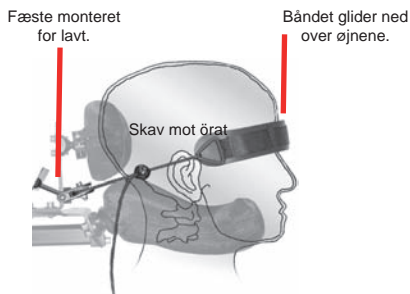

### OBS!

Hvis beslaget monteres for lavt kan det forårsage, at remmen glider ned over øjnene, næsen og måske ned omkring halsen.


### Monteret for højt

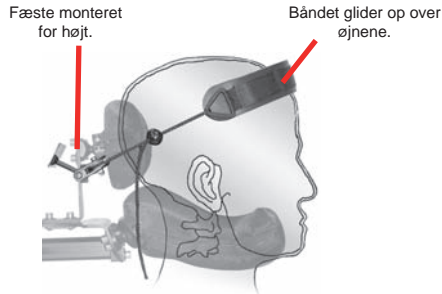

### OBS!

Hvis beslaget monteres for højt, kan det forårsage, at pandebåndet glider op over hovedet.

Korrekt afstand ca. en fingers bredde

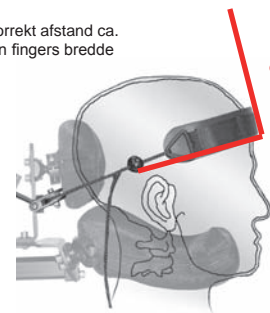

90°

Pandebåndet placeres ovenover øjenbrynene

### Monteret korrekt



- 1) Placer brugeren i sædet. Løft pandebåndet over hovedet og placer det i en behagelig position over øjenbrynene.



- 2) Juster tykket på båndet ved hjælp af "trykjusteren". Trykket skal ikke være så stort, at det giver rødmen på panden. Det bør heller ikke være så løst, at det glider ned over øjnene eller næsen.



- 3) Løsn skruen. Juster derefter monteringsbeslaget op eller ned, indtil den ideelle vinkel på remmen opnåes. Spænd skruen 90 grader mod pandens hældning.

