



CARELINE



BRUGERVEJLEDNING CARELINE TWIST

Art. No. 2120BC – CARELINE TWIST –Hjul med central bremse

Art. No. 2120 – CARELINE TWIST –Hjul uden bremse

Art. No. 2120B – CARELINE TWIST –Hjul med bremse på 2 hjul



Forord

Tak for dit valg af Careline Twist. Alle kendetegn ved dette produkt er et nemt og brugervenligt designet. Hvis du har ideer eller spørgsmål / problemer der ikke løses i brugervejledning så kontakt Faaborg Rehab Technic eller besøg os på internettet: www.faaborg-rehab.dk

Sikkerhed Instruktion

Før ibrugtagning af Careline Twist læs da venligst brugervejledning igennem. Den indeholder VIGTIGT anvisninger for korrekt anvendelse og vedligeholdelse af TWIST. Producenten hæfter ikke for skader, der udspringer af forkert brug.

Formål

Robust og rengøringsvenlig TWIST, med stel af stål og aluminium. Den lave indstigningshøjde gør det nemt for brugeren at placere fødderne korrekt på platformen. TWIST aktiverer og støtter samtidig personer med nedsat styrke i ben eller med nedsat balance i at rejse og sætte sig, og til sikker kort forflytning mellem stol, kørestol, toilet eller seng.


CE mærket

Følgende produkt er CE mærket i overensstemmelse med:
Announcement regarding Medical Equipment No. 225 of March the 11th 2011. And The European Communities Council Directive 93/42/EEC of 14th July 1993

Garanti og ansvar

Hvis en fejl eller defekt til stede ved modtagelse af Careline Twist, er det Faaborg Rehab Technic ansvar at reparere eller erstatte enheden. Udskiftning af dele er Faaborg Rehab Technic ejendom. Garanti periode er 2 år og starter ved modtagelse. Din faktura er garantibevis. Skulle din Twist kræve service kontakt da Faaborg Rehab Erstatning vil ikke blive accepteret hvis fejlen er: Ukorrekt eller upassende brug, ukorrekt installation af ejer eller 3 part, ukorrekt brug af kemikalier eller fugtighed i enheden.

Produkt display

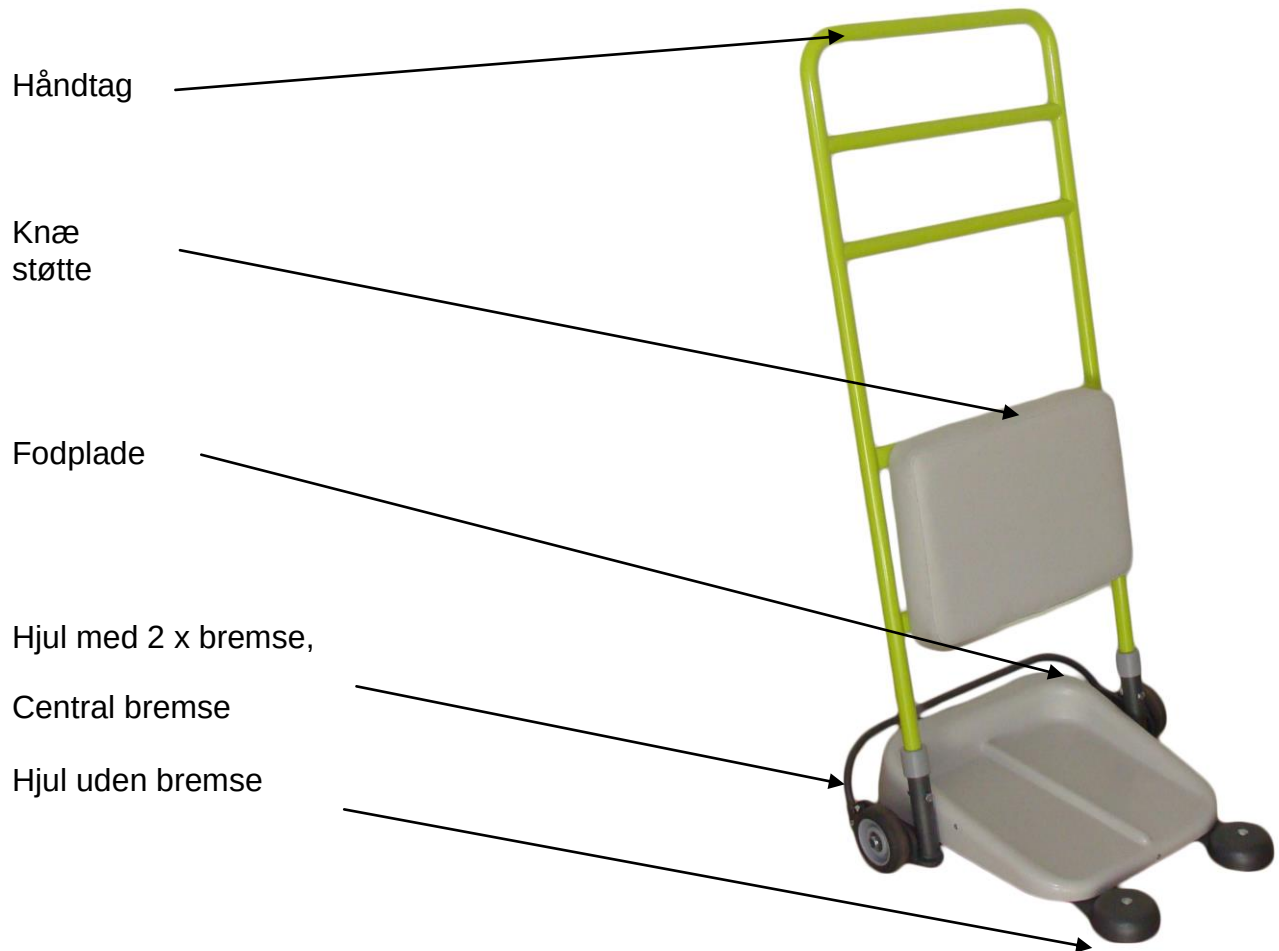

Teknisk information

Bredde:	558 mm
Længde:	670 mm
Højde:	1180 mm
Vægt Twist:	16,6 kg
Max bruger vægt:	150 kg

Brug af Twist:

TWIST køres ind under brugernes fødder før denne rejser sig op, og brugerens knæ støttes imod knæpuden.

Hjælperen låser bremsen ved at trykke på denne. Det er dog ikke alle modeller der har bremse.

Brugeren holder fast i håndtagene under forflytningen, og ved endt flytning slippes bremsen igen (hvis der er bremse), og TWIST kan rulles væk.

Leveres uden bremse, med enkelt bremsen eller central bremse.

Se billeder under:



Advarelse

Husk at bruge bremse



Rengøring og vedligeholdelse

Knæ og sæde støtter er lavet af et materiale, der er let at vedligeholde, kunstlæder testet i henhold til DIN 54020

Brug en tør eller fugtig fiberklud til rengøring af TWIST, hvis det er nødvendigt, kan milde rengøringsmidler anvendes, derefter skylles med varmt vand.

Brug ikke opløsningsmidler, alkohol-baserede desinfektionsmidler, grove rensedmidler.

Service og teknisk kontrol

Skal foretages en gang om året.

Reparation, service og teknisk support

Ved problemer eller spørgsmål kontakt:

Faaborg Rehab Technic
Smedemestervej 9, DK-5600 Faaborg.

Tlf. + 45 70 20 55 53

E-mail: fr@faaborg-rehab.dk www.faaborg-rehab.dk

FAABORG REHAB TECHNIC

