



## Brugsanvisning til FOD I HOSE

FOD I HOSE er en hjælp til strømpepåtagning af kompressionsstrømper og almindelige strømper



**1.** Strømpepåtager i lige model.



**2.** Strømpen trækkes nedover bøjlen – hælen skal vende bagud.



**3.** Foden føres ned i strømpen.



**4.** Strømpen sidder perfekt med FOD I HOSE.

HMI-nr.	Varenr.	Varenavn	Plademål
22554	170190	Fod i hose - Skrå	35 x 19 cm
22553	170195	Fod i hose - Lige	35 x 19 cm

På glatte underlag anbefaler vi at placere strømpepåtageren oven på en non-slip plade for at sikre, at den står fast under påtagningen.



Danish **CARE** Supply

- fremtidens hjælpemidler

Telefon: +45 2211 8616 • E-mail: [dcs@danishcaresupply.dk](mailto:dcs@danishcaresupply.dk) • [www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk)

