

BRUGSANVISNING 3- OG 4-PUNKTS GANGSTAV

H87139	3-Punkts stok	L64348	4-Punkts stok med centrerede ben
L29324	4-Punkts stok med small base	L29312	4-Punkts stok med small base



Sørg for at læse og følge disse instruktioner omhyggeligt. Manglende overholdelse kan medføre personskade. Opbevar disse instruktioner på et sikkert sted til senere brug.

1.0 TILSIGTET BRUG

Tripods og Tetrapods er ganghjælpemidler med 3 eller flere ben, der er designet til at give brugeren større stabilitet og støtte end en enkelt stok.



Figur 1: Tetrapod Walking Stick Stor Base

2.0 SIKKERHED

1. Den maksimale brugervægt må ikke overstige 127 kg.
2. Vær opmærksom på glatte og ujævne overflader, når du bevæger dig.
3. Produktet skal inspiceres med jævne mellemrum for tegn på skader eller betydelige tegn på slitage.

Maximum Brugervægt



Kontroller for:

- Løse eller revnede håndtag.
- Slidte, revnede eller beskadigede ferruler (gummifødder).
- Bøjede eller beskadigede rør eller revner ved rørsvejsninger eller samlinger.
- Knapfjederklemmen er til stede og er ikke slidt eller løs.
- Aflange justeringshuller.

3.0 UDPAKNING

Fjern emballagen og kontroller alle dele omhyggeligt. Kontakt straks din leverandør, hvis der mangler eller er beskadigede dele, og forsøg ikke at samle produktet.

4.0 JUSTERING AF GANGHJÆLPEMIDDELET

Ganghjælpen skal være korrekt justeret til brugeren inden brug. En ganghjælp i forkert højde belaster dine hænder, håndled, skuldre og nakke.

For at måle den korrekte højde for din ganghjælp skal du stå oprejst med hænderne afslappet langs siden. Den øverste del af din ganghjælp skal være på højde med dit håndled.

Din albue skal være let bøjet, når du holder på stokken.