

CareBidets

Betjenings- og installations
manual model Jasmin Care_{2.0}

JHC511/512



Læs denne manual grundigt før brug

Vigtige sikkerhedsregler...	3
Grundlæggende instruktioner...	4
Sikkerhedsforanstaltninger ...	5-6
Udpakning af dit bidet...	7
Beskrivelse af fjernbetjeningen...	8
Således benyttes bidetsædet ...	9-10
Multifunktionsknap	10
Tilslutning af ekstern O/I kontakt...	10
Indstilling af automatisk vaske- og tørrecyklus...	11
Vær opmærksom på følgende...	12
Rengøring...	13-14
Vedligeholdelse...	14-15
Før du ringer efter service...	16-17
Tekniske specifikationer...	18
Monteringsvejledning...	19-21

Model nr. _____

Serie nr. _____

Købs dato _____

Installatørs navn/telefon _____

Serienummeret findes på bidet "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne manual.

Vigtige sikkerhedsregler

Ved brug af elektriske produkter, specielt med børn i nærheden, bør de basale sikkerhedsregler altid blive fulgt, hvilket inkluderer det følgende:

Læs alle instruktionerne før ibrugtagning

FARE

For at reducere risikoen for elektrisk stød bør følgende iagttages:

1. Bruges ikke under bad og må ikke oversprøjtes med vand.
2. Sid ikke på bidetsædet med fødder på vådt gulv
3. Såfremt en strømførende genstand falder i vand, f.eks. toiletkumme skal strømforsyningen straks afbrydes. Først når strømmen er afbrudt kan genstanden taget op af vandet. Send genstanden til reparation hos autoriseret værksted før brug.

ADVARSEL

For at reducere faren for brandsår, elektrisk stød, ild eller anden skade på personer eller genstande bør følgende desuden iagttages:

1. Brug kun produktet til det der er forskrevet i denne manual. Anvend ikke andet tilbehør, end det der anbefales af producenten.
2. Anvend aldrig produktet hvis et af følgende er opstået/sket:
 - Ødelagt ledning eller stik
 - Bidet ikke fungerer korrekt

Afbrud straks strømforsyning og kontakt os for service check og/eller reparation

3. Hold ledningen væk fra varme overflader
4. Bloker aldrig lufthullerne på produktet og stil det aldrig på en blød overflade. Hold produktet fri for hår og andre støvpartikler.
5. Indsæt ikke objekter i nogen åbninger eller slanger.
6. Brug ikke produktet udendørs, eller hvor spraydåser/oxygen flasker bliver anvendt og opbevaret.
7. Tilslut kun dette produkt til stikkontakt med jord.

Grundlæggende instruktioner

Dette er et elektrisk produkt der er forbundet til en vandkilde.

For produkter der benytter sig af ledninger med et integreret jordstik:

Dette produkt skal have en jordforbindelse. I tilfælde af en elektrisk kortslutning, vil jordforbindelsen reducere risikoen for elektrisk stød ved, at sørge for, at strømmen kan slippe ud via jord forbindelsen. Dette bidet er udstyret med en ledning med jordstik. Stikket må kun isættes i en stikkontakt der er korrekt installeret og jordet.

FARE: Forkert anvendelse af ledning og stik kan give en øget risiko for elektrisk stød.


Hvis reparation eller udskiftning af stikproppen er nødvendigt, skal bidetets spændingsforsyning afbrydes. Ledningen der er grøn med gule striber er jordledningen.

Kontroller med en autoriseret elinstallatør hvis den grundlæggende information ikke helt er forstået, eller hvis der er tvivl om produktet er korrekt jordet.


LÆS OG GEM DENNE INSTRUKTION

Sikkerhedsforanstaltninger

Hæld aldrig vand udover produktet (Fig.1)

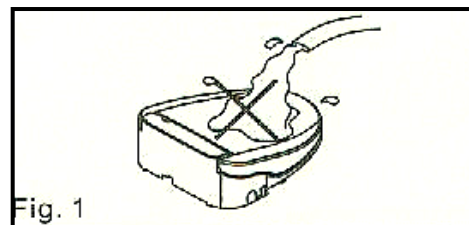


Læg aldrig ledning eller stik ned i toilettet (Fig.2)

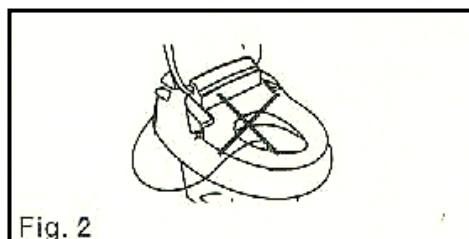


Benyt ikke låget som rygstøtte (Fig.5)



Indstil sædetemperaturen til passende niveau...(Fig. 6)

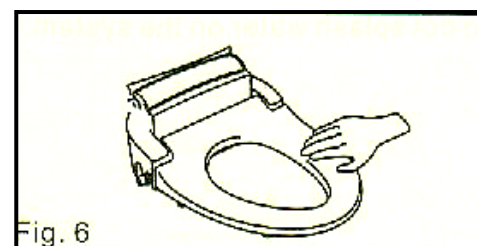

**Tildæk aldrig et opvarmet sæde...(Fig. 7)
Låget må gerne være lukket...**

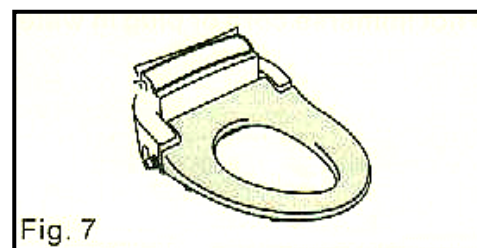

Såfremt toiletsædet ikke skal benyttes i længere periode, skal strømmen slås fra.

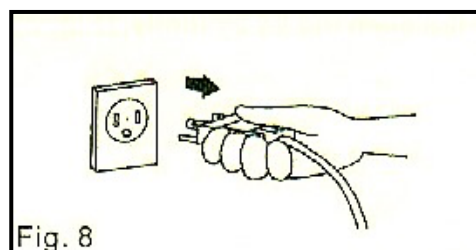


Fig. 8

**Tøm bidet for vand såfremt det ikke skal benyttes i en længere periode (Fig. 9)
Se beskrivelse heraf på side 15**

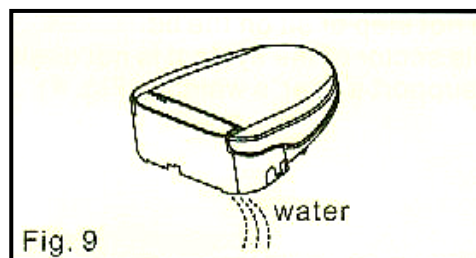


Fig. 9

Bidet må ikke udsættes for frost eller direkte sollys da dette kan beskadige plast overfladen. (Fig.10)

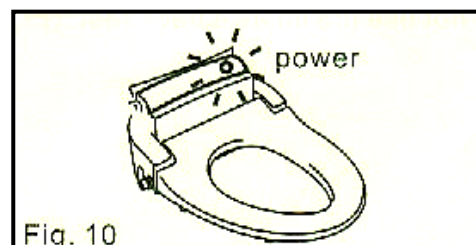


Fig. 10

Tilslut aldrig systemet til en løs eller defekt kontakt – ved tvivl kontakt din autoriserede El-installatør. (Fig.12)

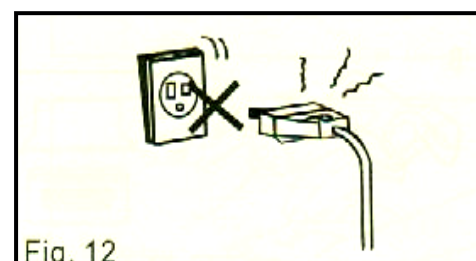


Fig. 12

Udsæt ikke vandtilslutningen for voldsom behandling, da dette kan medføre lækage (Fig.13)

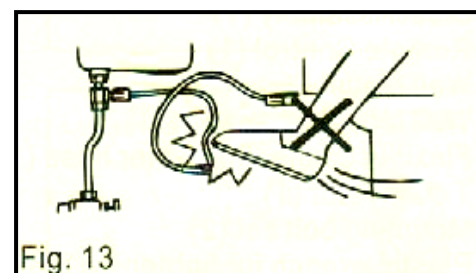


Fig. 13

Udsæt ikke vaskearmene for voldsom behandling da dette kan ødelægge disse. (Fig. 14)

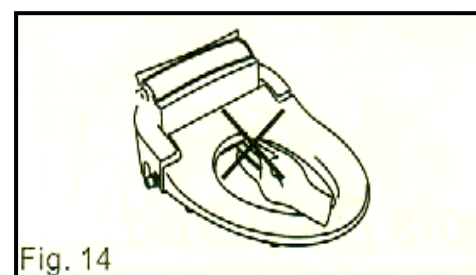


Fig. 14

OBS !!!!!

**Brug ikke toiletreng, acetone eller stærke rengøringsmidler.
VIGTIGT: Læs rengøring side 13-14 grundigt.**

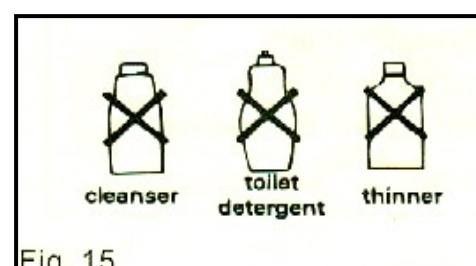



Fig. 15

Udpakning af dit bidet





- * Elektronisk bidet (ikke afbilledet)
- * Fjernbetjening
- * Vægmonteringsplade til fjernbetjening
- * Flexslange til vandtilslutning
- * T-stykke
- * Monteringskonsol med bolte, spændeskiver, vinge møtrikker samt *click on* beslag.
- * Batterier 2 stk. (AA)

Følgende værktøj benyttes ved montering

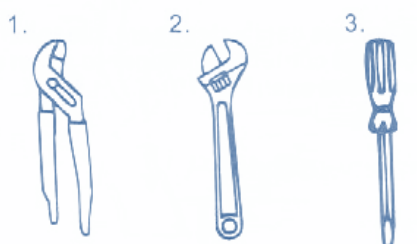

Beskrivelse af fjernbetjeningen.

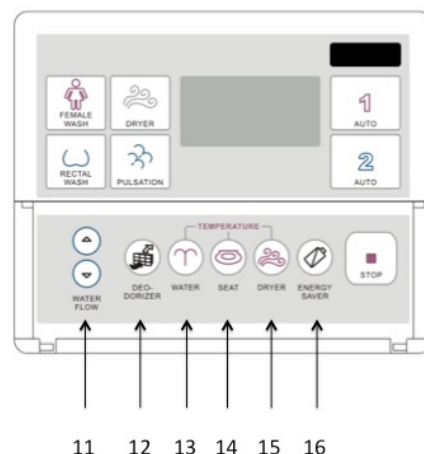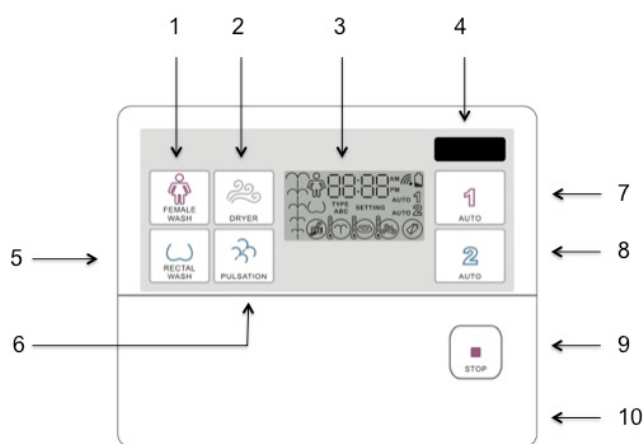

1. Skyl fortil
2. Luft tørring
3. Display vindue
4. IR sender
5. Skyl bagtil
6. Pulserende vandstråle

7. Auto program 1
8. Auto program 2
9. Stop
10. Børnesikring

- Aktiverer dysen med feminin skyl
- Aktiverer tørre funktion
- Viser funktionsstatus
- Infrarød sender
- Aktiverer dysen med rektal skyl
- Aktiverer pulserende vandstråle (kan først aktiveres når skyl er aktiv)
- Aktiverer personlig vaskecyklus
- Aktiverer personlig vaskecyklus
- Afslutter igangværende funktion
- Børnesikre indstillinger mulighederne

Indstillinger (gemt bag klappen)


11. Vaskestyrke
12. Deodorizer
13. Vandtemperatur
14. Sædetemperatur
15. Tørretemperatur
16. Eco standby mode (standard indstilling)

- Regulerer vaskestyrken i 5 trin
- Luftrensere aktiveres
- Regulerer vandtemperatur i 4 trin ved gentagende tryk
- Regulerer sædetemperatur i 4 trin ved gentagende tryk
- Regulerer tørretemperatur i 4 trin ved gentagende tryk
- Sæde- og vandtemperatur sænkes. (når du sætter dig på sædet opvarmes sæde og vand til de valgte indstillinger automatisk)

De valgte indstillinger kan aflæses i display vinduet og er automatisk gemt i bidetsædets hukommelse.

Således benyttes bidetsædet

Sæt dig godt tilbage på sædet og læn dig lidt frem i overkroppen før du aktiverer bidetsædets funktioner som beskrevet nedenfor. Bemærk, at bidetfunktionerne først kan aktiveres, når du sidder på sædet og fjernbetjeningen virker derfor kun, hvis du sidder på sædet eller trykker sædet ned i højre side bagerst.

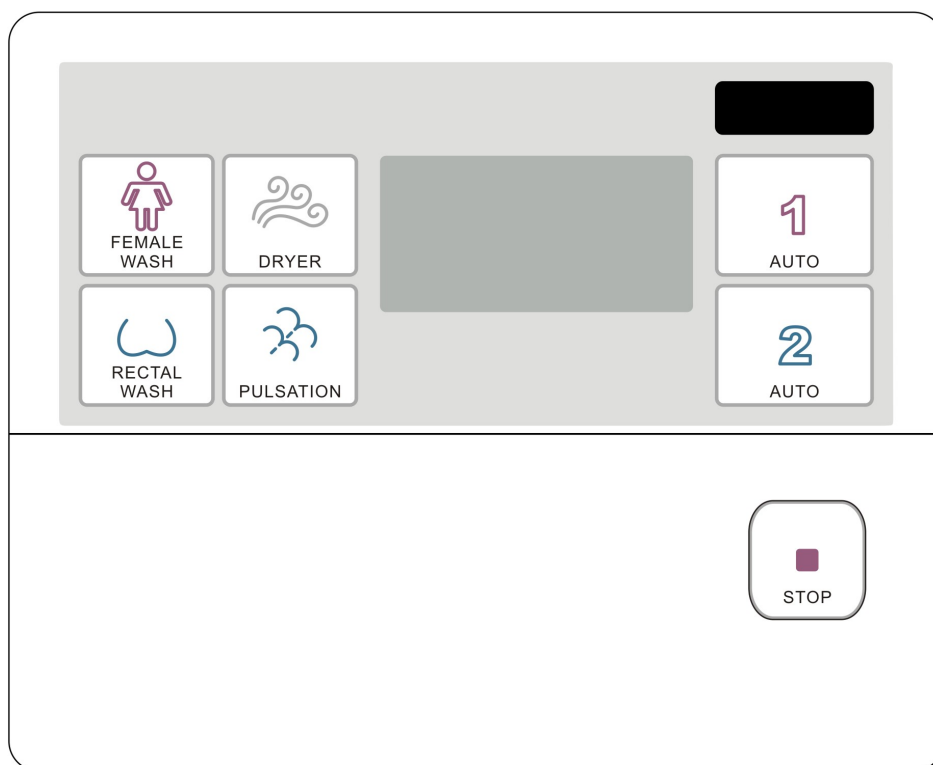

FEMALE
WASH

Aktiverer feminin skyl. Anbefalet vasketid: 10 sekunder



RECTAL
WASH

Aktiverer rektal skyl. Anbefalet vasketid: 30 – 40 sekunder



DRYER

Aktiverer tørrefunktion. Anbefalet tørretid 3 – 5 min.



PULSATION

Aktiverer pulserende vask når feminin eller rektal vask benyttes



Standser igangværende funktion

1
AUTO

Aktiverer automatisk vaske- og tørrecyklus. Denne vaskecyklus kan indstilles efter dine ønsker. Se side 11

2
AUTO

Aktiverer automatisk vaske- og tørrecyklus. Denne kan indstilles efter dine ønsker. Se side 11

Når du er færdig forlader du blot sædet og det går automatisk i dvalestatus, klar til næste gang det skal anvendes.

Multifunktionsknap på bidetsædet

På bidetsædets venstre side er placeret en multifunktionsknap. Med denne kan følgende funktioner udføres:

Når du IKKE sidder på sædet

- * Et tryk - dyserne renses automatisk
- * Tryk og hold trykket i ca. 10 sek. og bidet slukkes


Når du sidder på sædet

- * Et tryk – rektal vask starter – et tryk standser vask
- * To tryk – feminin vask starter – et tryk standser vask



Tilslutning af ekstern O/1 kontakt

Jasmin Care bidetsædet kan betjenes vha. en ekstern O/1 kontakt der tilsluttes bidetsædets fjernbetjening via et mini jackstik. (mono)

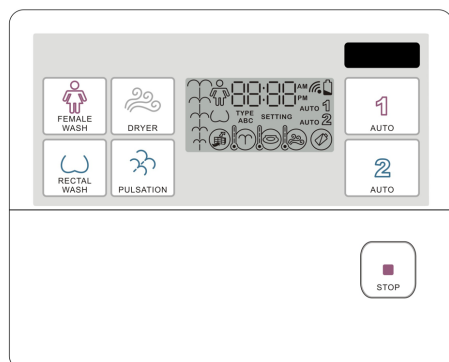

← tilslutning af mini jackstik (mono)

Et tryk på O/I kontakten aktiverer det vaske- og tørreprogram som er indstillet og lagret under  programmet. Med andre ord udfører bidetsædet den vaske- og tørrecyklus, som opfylder dine personlige ønsker og lagret i bidetsædets hukommelse. (se side 11)

J. Honoré Care forhandler O/I kontakter der kan placeres på væg, gulv og armlæn. Herudover er der integreret O/I kontakt i vores armlæn (Armlæn med One Touch) samt i vores toiletsædeløfter.

Indstilling af automatisk vaske- og tørrecyklus

Bidetsædet er udstyret med en unik autofunktion, der starter en vaske- og tørrecyklus blot ved, at trykke på én knap. Der er mulighed for, at lagre to personlige vaske- og tørrecykluser i bidetsædets hukommelse.

Sådan foretager du indstilling og lagring af autofunktionerne

* Tryk på  eller  og hold trykket i ca. 5 sekunder. I displayvinduet blinker nu symbolet for feminin vask samt vasketryks symbolet. Du kan nu indstille det vaske-tryk som du ønsker på det feminine skyl ved, at trykke på  til det ønske vandtryk vises i displayet.

* Tryk herefter på  knappen og symbolet for feminin vask samt skylletid blinker. Du kan nu ændre den ønskede skylletid fra 0 til 25 sekunder ved, at trykke på  til den ønskede skylletid vises i displayet.

* Tryk herefter på  knappen, og symbolet for rektal vask samt vasketryks symbolet blinker. Du kan nu indstille det vasketryk, som du ønsker på det rektale skyl ved, at trykke på  til det ønske vandtryk vises i displayet.

* Tryk igen på  knappen, og symbolet for rektal vask samt skylletid blinker. Du kan nu ændre den ønskede skylletid fra 0 til 50 sekunder ved, at trykke på  til den ønskede skylletid vises i displayet.

- * Tryk på  knappen, og symbolet for tørre temperaturen blinker. Du kan nu indstille temperaturen på lufttørrer ved, at trykke på  til den ønskede temperatur vises i displayet
- * Tryk igen på  knappen og tørretiden blinker nu i displayet. Du kan ændre den ønskede tørretid fra 0 til 6 minutter ved at trykke på  til den ønskede tørretid vises i displayet.
- * Tryk på  og bidetsædet afgiver et kort bip. Indstillingerne er nu lagret og autofunktionen er klar til brug.

Indstilling af Uret (på fjernbetjeningen)

Slå klappen ned på fjernbetjeningen, så alle indstillinger er synlige. Hold STOP knappen inde indtil der står SETTING i displayet og tiden blinker, "pil op" indstiller timerne og "pil ned" indstiller minutterne. Tryk på stop når du har indstillet tiden korrekt og indstillingen er gemt.

Sluk for blåt lys i kummen

Det blå nat lys i kummen er standard. Dette lys kan slukkes ved at trykke én gang på stop knappen, når sædet ikke er aktiveret. Det vil sige når der ikke sidder nogle på sædet.

Vær opmærksom på følgende:

Dyserne skylles automatisk efter, når du har rejst dig fra sædet

Da det kan tage lidt tid for sædet og vandet at varme op – anbefaler vi, at du forudindstiller sæde- og vandtemperatur til den ønskede temperatur.

Såfremt sædet ikke bliver brugt over en længere periode anbefaler vi, at du slukker for strømmen til sædet og lukker for vandforsyningen. Herefter tømmes sædet for vand (se side 15)

Toiletsædet kan løsnes i venstre side når det skal rengøres ekstra grundigt. Lad være med at trække i højre side, da du derved kan ødelægge ledningerne der går ind i sædet. **Sørg altid for, at klikke sædelåsen grundigt fast igen.**

Brug f.eks. passende mønt til at skrue vandfilteret ud, da en skruetrækker eller andet værktøj kan ødelægge plastikken

Rengøring

Når du skal rengøre dit bidet, brug da udelukkende milde rengøringsmidler. Benyt ikke skrappe rengøringsmidler så som acetone, stærke syreholdige produkter eller skuremidler, de vil ødelægge plastikoverfladen.


- **Rengøring af sæde, låg og hoveddelen**



Tør delene med en **hårdt** opvredet klud med lidt mildt rengøringsmiddel og tør evt. efter med en tør klud. Benyt ikke mikrofiberklude, da de kan beskadige overfladen.

Træk forsigtigt vaskearmene ud til stop:

Ugentligt eller efter behov: Vask dyserne og dysearme af, brug mildt rengøringsmiddel.

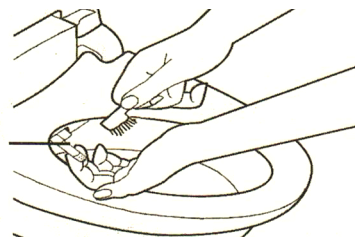

Hver 2. eller 3. måned (afhænger af vandhårdhed)

Hæld eddike eller mild citronopløsning over dyserne og dysearme, Lad dette sidde ca. 2 minutter og brug da en gammel tandbørste for at rengøre og løsne kalk. Tør evt. efter med en opvreden klud.


Ved grundig rengøring kan låget tages helt af og sædet kan løsnes:

(Læs først hele vejledningen grundigt)


Låget på sædet kan tages helt af ved at slå sædet op og derefter trække ud i den ene side til det løsnes. Derefter kan den anden side let frigøres.

1. Mens sædet er oppe, fjern først den sorte gummi sikkerhedssplit, skub derefter låseringen i venstre side op og du kan nu forsigtigt frigøre sædet fra hoveddelen og derved komme til, at gøre rent under sædet.

Skub låse ring opad

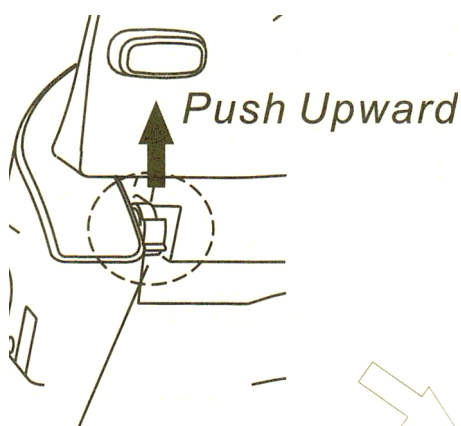

Løft sædet opad

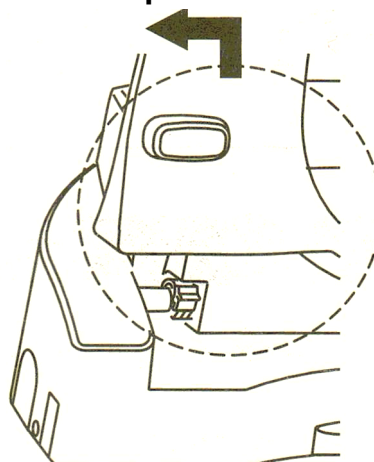

Pas på ikke at trække for meget i ledningen i højre side, når du løfter sædet. Såfremt ledningen beskadiges skal sædet tages fra strøm og sendes til reparation.

VIGTIG INFORMATION:

Når sædet skal sættes på igen, er det yderst vigtigt, at dette gøres forsigtigt, nede fra og op i hullet - uden brug af kræfter. Hvis ikke sædet efterfølgende kan trykkes ned i højre side, er det ikke sat korrekt på og sædet virker ikke. Forsøg igen, der må ikke være modstand.

HUSK OGSÅ AT SKUBBE LÅSE RINGEN HELT NED IGEN TIL – klik - SÅLEDES, AT SÆDET ER RIGTIGT MONTERET IGEN EFTER RENGØRING.

Vedligeholdelse



Tag først strømmen fra sædet

Rensning af vandfilter

1. Sluk for vandtilførslen og strøm

2. Fjern gummidækslet og bruge en mønt for at fjerne filteret. Drej mod uret

3. Rengør filteret forsigtig med lidt vand og en tandbørste. Genindsæt filteret og kontroller, at det sidder korrekt.

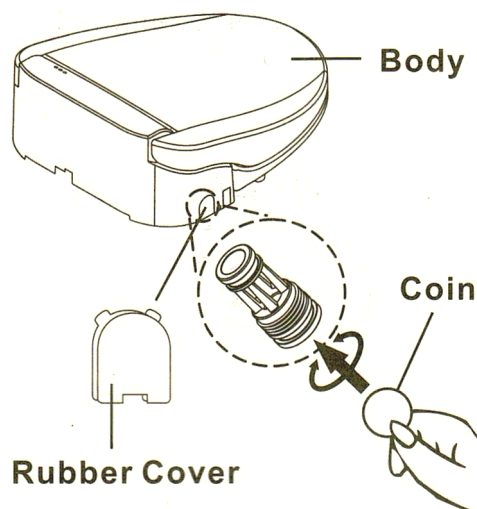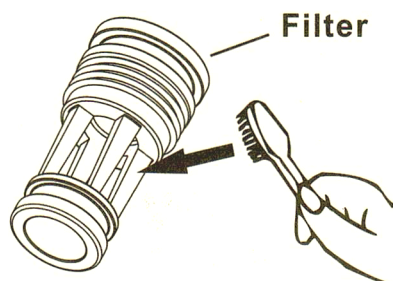

4. Tænd for vandtilførsel og strøm igen.

Tømning af bidet for vand

Hvis du ikke skal bruge dit bidet igennem en længere periode, skal du tømme det for vand som følger:

Sluk for vandtilførsel og strøm.

Afmonter vandtilslutning, tryk udløserknap på højre side af bidetet ind og hold denne inde imedens sædet forsigtigt trækkes af monteringsskinnen.

Fjern drænkapslen i bunden, bagerst på sædet med en passende mønt og alt vand tømmes ud. Derefter sættes drænkapslen på igen. Skub forsigtigt sædet på plads i monteringsskinnen og det er nu klar til, at blive tilsluttet vand og strøm når du igen skal bruge det.



Før du ringer efter service

Problem	Årsag	Løsning
Vandtrykket er lavt	Indstilling på fjernbetjener er sat til lavt skylle tryk	Foretag indstilling på fjernbetjening som beskrevet på side 8 og 11.
Dysearmen kommer ikke ud	Der sidder snavs på dysearm. Du sidder for langt fremme på sædet	Rengør forsigtigt dyse arm og hoved Sæt dig ordentlig tilbage på sædet
Dysen kommer kun halvt ud	Dyse arm er snavset	Rengør forsigtigt dyse arm og hoved
Dyserne kommer slet ikke ud eller holder op med at skylle inden vaske cyklus er afsluttet.	Du sidder for langt fremme på sædet. Sæde censor kan ikke registrere at du sidder på sædet	Sæt sig godt tilbage på sædet til tryk censor er aktiveret
Dyserne holder pludselig op med at skylle	Du sætter for langt fremme på sædet	Genstart vaskefunktionen eller Tag stikket ud og vent 15 sekunder med at tilslutte igen
Sæde temperaturen er lav	Har ikke nået at varme op endnu. Hav tålmodighed Forkert indstilling på fjernbetjening	Lad sædetemperatur stå på tempereret. Kontroller indstillingen på fjernbetjeningen.
Vandtemperaturen er for lav	Har ikke haft tid nok til opvarmning (3-4 min) Forkert indstilling på fjernbetjening	Forudindstil vandtemperatur på fjernbetjening. Hold en lille pause så er vandet varmet igen

Problem	Årsag	Løsning
Fjernbetjeningen virker ikke	Batteri niveau er lavt (displayet viser når det skal udskiftes.) Fjernbetjeningen er for langt fra sæde.	Skift batteri. Placer fjernbetjening i nærheden af sædet

Hvis der stadig er problemer med at få sædet til at virke, efter at have fulgt ovenstående vejledninger er De velkommen til at kontakte os på tlf. 75 56 32 44

Bemærk: Funktionerne virker kun når sædet er aktiveret dvs. trykket ned i højre side, når du står foran sædet og venstre side når du sidder på sædet.

J. Honoré Care Aps, Karetmagervej 19b, 7000 Fredericia


www.honorecare.dk
mail@toilet-bidet.dk

Tekniske specifikationer

Model nr.	Jasmin Care (jhc – 511/512)
Spænding	230 V
Netfrekvens	50 – 60 Hz
Ledningens længde	1,5 meter
Kapslingsklasse	IPX4
Varmvandstank	0,9 L
Vandtemperatur	Justeres i 4 trin Rumtemperatur/ 35°/37,5°/40°
Sikkerhedsanordning	Termisk afbryder, flyderudstyr med stop ventil og vakuum afbryder
Vandgennemstrømning i vaske dyser	Justerbar i 4 trin: Ca. 1,2 l / min
Sædevarme	Justerbar i 4 trin: Rumtemperatur/35°/37,5°/40°
Effektforbrug	60 W
Sikkerhedsanordning	Indbygget termisk afbryder
Vandforsyningstryk	1 – 10 bar
Sikkerhedsanordning	Jordfejldetektor, automatisk afbryder, sædeafbryder
Net vægt	3,6 kg
Max brugervægt	125 kg/jhc-511 150 kg/jhc-512

Mål på model Jasmin Care

Model nr.	JHC-511	JHC-512
A	46 cm	49 cm
B	43 cm	46 cm
C	14-17 cm	
D	41 cm	

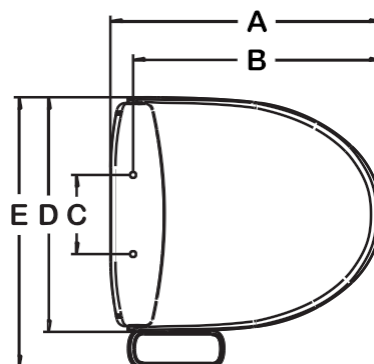

Monteringsvejledning

CareBidets skal placeres så det ikke oversprøjtes med vand i vådområde 2 eller 3. Ved placering i vådområde 2 skal kvikkobling anvendes. (ekstraudstyr som kan købes hos os på tlf. 75 56 32 44)

1) Afmonter det eksisterende toiletsæde

2) Monteringskonsollen fastgøres til kummen med de forud monterede bolte, spændeskiver samt vinge møtrikker.

Kontroller, at konsollen er centreret samt møtrikker hårdt spændt.



3) Juster *click on*-skinnen vha. de 2 forud monterede stjerne skruer således, at afstand fra bagkant skinne til forkant cisterne udgør ca. 2 mm. Herefter spændes de 2 stjerne skruer.




4) Monter bidetsædet ved forsigtigt, at glide sædet indover **click on**- skinnen indtil sædet er helt tilbage på skinnen og der høres et lille **Klik**.



5) Kontroller at sæde sidder ordentlig fast samt, at sædeudløserknappen nu er i neutral position. Udløserknappen skal være helt ud således, at denne er plan med resten af kabinettet.



6) Sluk for vandtilførsel ved stophanen.

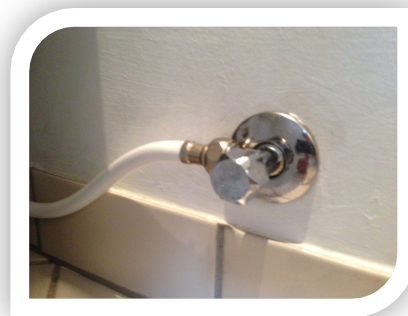

7) Afmonter vandtilførslen under toiletcisternen. Monter det medfølgende T-Stykke på toiletcisternens vandtilførsel. Monter vandtilførselsslangen fra stophanen til T-stykkets bundtilkobling. Monter den medfølgende fødeslange på T-stykket.

Spænd alle monteringer efter.



TILSLUT ALTID **VAND FØR STRØM**

8) Monter fødeslangen til bidetsædets vandindtag på venstre side. Åben herefter for vandforsyning ved stophanen og kontroller, at installationen er tæt.



9) Opsæt fjernbetjeningsenheden på passende sted vha. det nedfølgende beslag.



10) Indsæt den 3-polede stikprop i stikkontakt m/jord og tænd for strømmen.



11) Nu fyldes vandtanken automatisk med vand. Foretag de ønske indstillinger på fjernbetjeningen og bidetsædet er nu klar til brug.



BEMÆRK: Hvis bidetsædet blinker og ikke starter – så er strømmen tilsluttet før vandet. Ta' stikket ud og vent, derefter tilslut strømmen igen.

BEMÆRK: Bidetsædet virker kun, når man aktiverer sædet ved enten at sidde på sædet eller trykker det ned i højre side (når du står foran sædet).

