

Service- & instruktionsbog

BACH delux 26 & BACH 25



BACH ASSP - Danish Electric Vehicle
Kabinescooter.dk

Version 1

Om BACH-kabinescooteren

Model:

- BACH 25 ☐
- BACH delux 26 ☐

Hastighed:

- 25 km/t ☐
- 45 km/t ☐

Batteritype og størrelse:

- Lead-acid: A85 ☐
- Litium: S90 ☐
- S100 ☐
- S125 ☐
- S200 ☐
- S400 ☐

VIN/stelnummer:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Farve:

- Dark Metallic Red ☐
- Dark Metallic Grey ☐
- Dark Metallic Blue ☐
- Silk White ☐

Registreringsnummer:

Dato for indregistrering:

D	D	M	M	Å	Å

OBS - til forhandler:

Vedlæg bevis på garantiaktivering
(print bekræftelsesmailen, som er
modtaget efter den online garan-
tiaktivering).

Online garantiaktivering:

<http://forhandler.kabinescooter.dk>

☐

JA

Forhandlerstempel

Dato - dd/mm/åååå

1. Indledning

Kære kunde.

Tillykke med din nye BACH Kabinescooter!

Vi håber, at du bliver glad for din nye BACH Kabinescooter, BACH 25/BACH delux 26.

Inden du kører i din kabinescooter, vil vi bede dig læse instruktionsbogen grundigt igennem, så du har god forståelse omkring køretøjet.

Denne instruktionsbog gennemgår de nødvendige trin, som du skal vide og gennemgå, før du er klar til at køre i din kabinescooter. Vi vil med instruktionsbogen sikre, at du har den nødvendige viden omkring køretøjet, inden du tager det i brug, og hvordan du efterfølgende skal behandle det for at sikre, at det fungerer optimalt. Forkert brug af køretøjet kan medføre fejl, skader eller kvæstelser.

Instruktionsbogen er at betragte som en del af køretøjet, og vi opfordrer derfor til, at den altid følger køretøjet. Kabinescooter.dk forbeholder sig ret til at ændre tekniske specifikationer i instruktionsbogen uden forudgående varsel, ligesom enkelte illustrationer, beskrivelser eller ekstraudstyr kan afvige fra model til model.

Hvis du har spørgsmål, der rækker ud over instruktionsbogen, er du velkommen til at kontakte forhandleren, hvor du har købt køretøjet.

Du ønskes god fornøjelse med din nye kabinescooter.

Med venlig hilsen



Lupinvej 5, 9500 Hobro
Tlf. 30 742 743
info@kabinescooter.dk
www.kabinescooter.dk

Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	3
2. Tjek kabinescooteren inden første tur.....	6
3. Betjening af kabinescooteren.....	6
3.1. Sådan tænder du og kører.....	6
3.2. Sådan regulerer du farten.....	6
3.3. Sådan bremser du.....	7
3.4. Sådan parkerer du og slukker.....	7
4. Sikkerhed og lovgivning.....	7
4.1. Sikkerhedsinstruktioner.....	7
4.2. Kørekort og færdselsregler.....	8
4.3. Bagage og last.....	9
4.4. Kørsel med passager.....	9
4.5. Forsikring.....	9
5. Oversigt, betjeningsvejledning og ekstraudstyr.....	9
5.1. Kabinescooteren set udefra.....	9
5.2. Fronten inde i kabinen.....	10
5.3. Display.....	11
5.4. Bakkamera.....	12
5.5. Venstre håndtag.....	12
5.6. Højre håndtag.....	12
5.7. Bremsen.....	13
5.8. Parkeringsbremse.....	13
5.9. Automatgear.....	14
5.10. Kabinevarmer.....	15
5.11. Vinduesvisker.....	15
5.12. Katastrofeblink.....	15
5.13. Musikafspiller.....	16
5.14. Døre.....	16
5.15. Soltag.....	16
5.16. Bagrude.....	17
5.17. Førersæde.....	18
5.18. Bagsæde.....	19
5.19. Sidespejle.....	20
5.20. 12V udtag.....	20
5.21. Hovedafbryder / sikring.....	20
5.22. Typeplade og stelnummer.....	21
5.23. Fjernbetjent centrallås.....	21
6. Info om batterierne.....	22
6.1. Opladeren.....	22
6.2. Ladeinstruktion.....	22
6.3. Sådan sikrer du lang levetid på batterierne.....	23
6.4. Gode råd ved nye batterier.....	24
6.5. Informationer om batterierne.....	25

7. Tekniske specifikationer.....	25
7.1. Dæk.....	26
7.1.1. Dækstørrelse.....	26
7.1.2. Dæktryk.....	26
7.1.3. Slid på dækkene.....	27
8. Gode råd til vedligeholdelse.....	27
8.1. Følg serviceanbefalingerne.....	27
9. Gode råd til rengøring.....	27
10. Gode råd til opbevaring.....	28
10.1. Opbevaring i det daglige.....	28
10.2. Stillestående opbevaring over længere tid.....	28
11. Gode råd til kørsel i særligt vejr.....	28
11.1. Regnvejr.....	28
11.2. Tåge.....	28
11.3. Frostvejr, is eller sne.....	28
12. Ekstraudstyr.....	29
13. Reklamation og garanti.....	29
13.1. Reklamationsretten gælder.....	30
13.2. Begrænsninger i reklamationsretten.....	30
14. Service.....	31
14.1. Service ved autoriseret serviceværksted.....	32
14.2. Beskrivelse af klargøringen.....	32
14.3. Beskrivelse af serviceeftersynet.....	32
15. Ofte stillede spørgsmål.....	33
16. Afsluttende.....	34
17. Illustrationer.....	35
18. Servicehæfte.....	44

2. Tjek kabinescooteren inden første tur

Inden du kører den første tur i kabinescooteren, anbefaler vi, at du tjekker følgende:

- Er førersædet indstillet korrekt og fastlåst?
- Er kørelyset tændt, og virker det?
- Virker bremserne?
- Er der frit udsyn fra alle ruder, og er spejlene indstillet korrekt?
- Er der tilstrækkeligt strøm på køretøjet til din køretur?
- Er der det korrekte dæktryk?
- Er dødmandsknappen på højre håndtag slået fra?
- Er sikkerhedsselen spændt?

I forbindelse med indregistrering af kabinescooteren modtager du som ejer et registreringsbevis fra Motorregistret inden 5 uger og en forsikringspolice. Tjek, om disse passer til køretøjet.

3. Betjening af kabinescooteren

3.1. Sådan tænder du og kører

Inden du starter, skal du sikre dig, at håndbremserne er aktiveret, så kabinescooteren holder stille. Derefter drejer du nøglen til højre, sæt gearet i D (drive), deaktiver håndbremserne, drej på gashåndtaget med højre hånd, og kabinescooteren kører frem.



OBS: Kabinescooteren kan **ikke** køre, hvis du har fingrene på håndbremsen.

3.2. Sådan regulerer du farten

Du regulerer farten med gashåndtaget, som sidder i højre side (se afsnit 5.6.). Farten øges ved at dreje håndtaget mod dig selv og sænkes ved at dreje håndtaget tilbage eller slippe det.

NB: Farten bør reguleres langsomt, da reaktionstid kan forekomme.



3.3. Sådan bremser du

Bagbremsen og forbremsen aktiveres ved at trække ind i hhv. venstre og højre bremsegreb (se afsnit 5.7).

NB: Når du skal bremse, er det vigtigt altid at bruge bagbremsen (venstre) først og supplere med forbremsen, da kabinescooteren ellers kan risikere at skride ud på forhjulet. Træk langsomt i bremsen og derefter hårdere, når du skal bremse helt ned og standse.

Bremselysene tænder, når én eller begge bremsen trækkes ind. Elmotoren bliver afbrudt, når bremsene trækkes.



NB: Sørg altid for at bremse ned inden sving. Hvis du bremser og svinger på samme tid, er der risiko for, at kabinescooteren kan vælte/tippe.

3.4. Sådan parkerer du og slukker

Når du vil parkere, skal du aktivere håndbremsene ved både bag- og forbremsen.

Det gør du ved at trække bremsehåndtagene ind og dermed aktivere håndbremsen på håndtagene (se afsnit 5.8.). Nu kan du trygt forlade køretøjet. Brug altid begge parkeringsbremsen, når du forlader kabinescooteren, eller den er uden opsyn.

NB: Når du vil slukke kabinescooteren, efter du har parkeret, skal du sætte gearet i frigeare (N) og derefter dreje nøglen tilbage på 'OFF'.

NB: Kabinescooteren kan holde på en bakke med en stigning på max 12 grader.



Max 12 %

4. Sikkerhed og lovgivning

Når du kører i vores kabinescooter, er det vigtigt, at du til enhver tid er fornuftig og forudseende omkring din kørsel samt opmærksom på dine omgivelser.

4.1. Sikkerhedsinstruktioner

- Kør altid med begge hænder på styret.
- Brug altid sikkerhedsselen.
- Undgå at lave et skarpt sving eller et pludseligt stop, når du kører.
- Kør med nedsat hastighed og gerne lige på (vinkelret), når du kører over kantsten o.lign. Det reducerer risikoen for, at køretøjet vælter.
- Nedsæt hastigheden og oprethold et stabilt tyngdepunkt, hvis du svinger kraftigt.
- Kør ikke, hvis du er påvirket af alkohol, medicin el.lign.
- Tal ikke i håndholdt mobiltelefon under kørsel.
- Aktivér altid bagbremsen med venstre hånd. Bagbremsen er bremsen på venstre

håndtag. Forbremsen på højre håndtag bruges som ekstra bremse ved hårdere opbremsninger. På den måde kan højre hånd bruges til gashåndtaget.

- Kør forsigtigt eller undgå at køre i sne, isglat eller tåget vejr, så risiko for uheld minimeres.
- Brug altid parkeringsbremserne, når du forlader køretøjet.
- Sørg altid for, at køretøjet er slukket, når du stiger ind eller ud af det.
- Lad ikke børn lege uden opsyn, hvis kabinescooteren står til opladning.
- Du kan risikere at komme til skade eller ødelægge kabinescooteren, hvis du ved egen kraft skubber eller løfter kabinescooteren.
- Belast aldrig kabinescooteren til andet eller mere end det, som den ifølge denne manual kan holde til.



NB: Kabinescooter.dk kan ikke drages til ansvar for eventuelle uheld og/eller skader hvis dette skyldes overtrædelse af sikkerhedsrådene, forkert brug af køretøjet eller mangel på køre- eller vurderingsevne. Vi anbefaler, at du kontakter din kommune for at få knallertundervisning, ligesom du også kan tage en øveprøve til knallertkørekort på www.sikkertrafik.dk/knallert.

4.2. Kørekort og færdselsregler

En 3-hjulet kabinescooter som denne BACH delux 26 hører under Færdselsstyrelsens kategori 'knallert'. Derfor skal du i en BACH delux 26 følge færdselsreglerne for lille knallert. Scooteren må anvendes på offentlige veje og skal føres i henhold til gældende færdselsregler.

Knallert 30 (lille knallert)

- Må køre 30 km/t.
- Aldersgrænse 15 år.
- Du kan tage kørekort til lille knallert på ungdomsskolen, når du er under 18 år.
- Hvis du har kørekort til bil, motorcykel eller stor knallert, gælder dit kørekort også til lille knallert.
- Hvis du er fyldt 18 år før 19. januar 2013, behøver du ikke noget kørekort til lille knallert.
- Du skal som hovedregel følge færdselsreglerne for cyklister.

Kilde: Sikkertrafik.dk

Knallert 45 (stor knallert)

- Må køre 45 km/t.
- Du må køre stor knallert, når du er fyldt 18 år og har taget kørekort til enten stor knallert, bil eller motorcykel.
- Du skal følge færdselsreglerne for bil og motorcykel. Men du må ikke køre på motorvej eller motortrafikvej.

Kilde: Sikkertrafik.dk

Nummerplade

Ved indregistrering monteres der en knallertnummerplade bagpå kabinescooteren.

Nummerplade på knallert 30:



Nummerplade på knallert 45:



4.3. Bagage og last

Køretøjets samlede maksimale lasteevne må ikke overskrides. Lasteevnen fremgår af køretøjets registreringsattest. Overvægt kan skade køretøjet, og der er risiko for, at det kan vælte. Overskridelse af den maksimale vægtgrænse betyder, at du ikke har ret til reklamation/garanti. Kabinescooter.dk kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller materielle skader, der er opstået pga. manglende overholdelse af den maksimale lasteevne. Der må være én passager på bagsædet.

NB: Vær opmærksom på den maksimale lasteevne.

4.4. Kørsel med passager

BACH 25 og BACH delux 26 er begge godkendt til kørsel med to personer (en fører og en passager på bagsædet), og de installerede sikkerhedsseler skal være spændt under hele kørslen. Er der ingen sikkerhedsseler, skal man køre med styrthjelm. Kørsel med to personer kan påvirke tyngdepunktet, hvorfor ekstra påpasselighed skal udvises.


Bemærk: Hvis kabinescooteren er indregistreret til handicapkørsel og max. kører 15 km/t, må der ikke medbringes passager på bagsædet.

4.5. Forsikring

Kabinescooteren skal som minimum være ansvarsforsikret hos et dansk forsikringsselskab. Det er muligt at tegne kaskoforsikring, som giver udvidet skadesdækning. Kontakt dit forsikringsselskab for information om forsikring af din kabinescooter eller læs mere på www.kabinescooter.dk.


5. Oversigt, betjeningsvejledning og ekstra-udstyr

5.1. Kabinescooteren set udefra

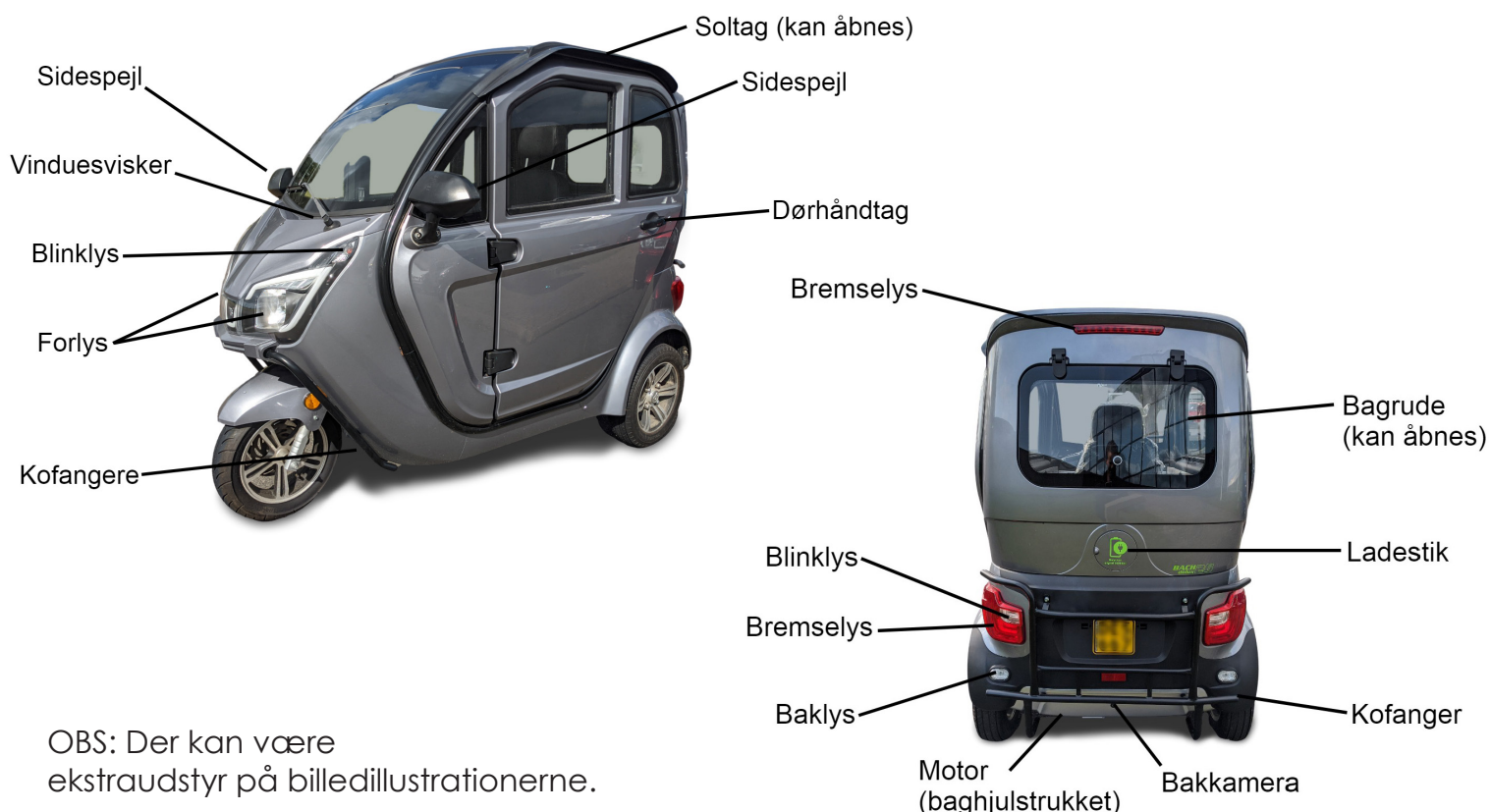

OBS: Der kan være ekstraudstyr på billedillustrationerne.


5.2. Fronten inde i kabinen

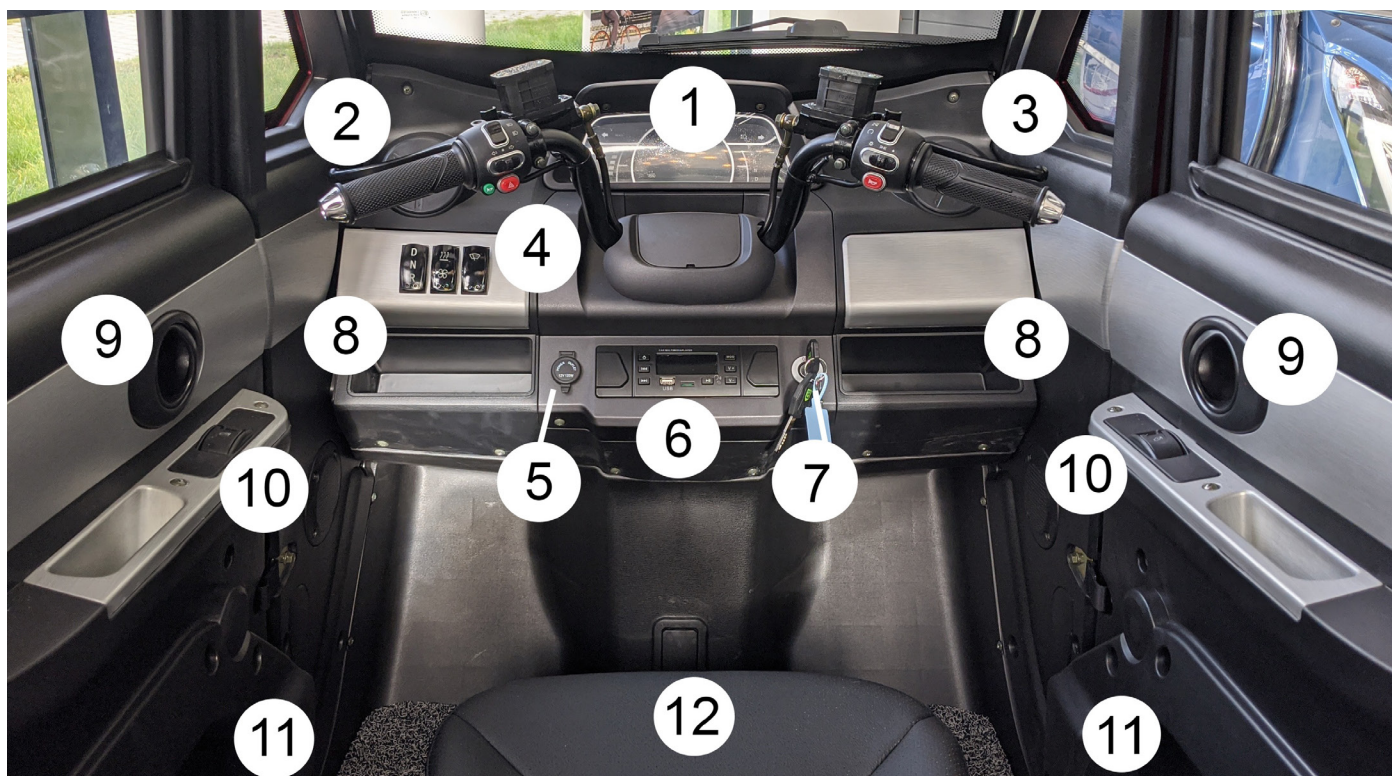

Nr.	Beskrivelse	Læs mere her
1	Display med bakkamera	Afsnit 5.3. og 5.4., s. 11-12
2	Venstre håndtag	Afsnit 5.5., s. 12
3	Højre håndtag	Afsnit 5.6., s. 12
4	Gear	Afsnit 5.9., s. 14
4	Kabinevarme	Afsnit 5.10., s. 15
4	Vinduesvisker	Afsnit 5.11., s. 15
5	12V udtag	Afsnit 5.20., s. 20
6	Radio	Afsnit 5.13., s. 16
7	Tænding	Afsnit 3.1., s. 6
8	Handskerum	Afsnit 5.14., s. 16
9	Dørhåndtag	Afsnit 5.14., s. 16
10	Vinduesåbner	Afsnit 5.14., s. 16
11	Dørhylde	Afsnit 5.14., s. 16
12	Sæde	Afsnit 5.17., s. 18

5.3. Display

Displayet angiver bl.a. hastighed, gearpositionen, blinklys, batterikapaciteten m.m.

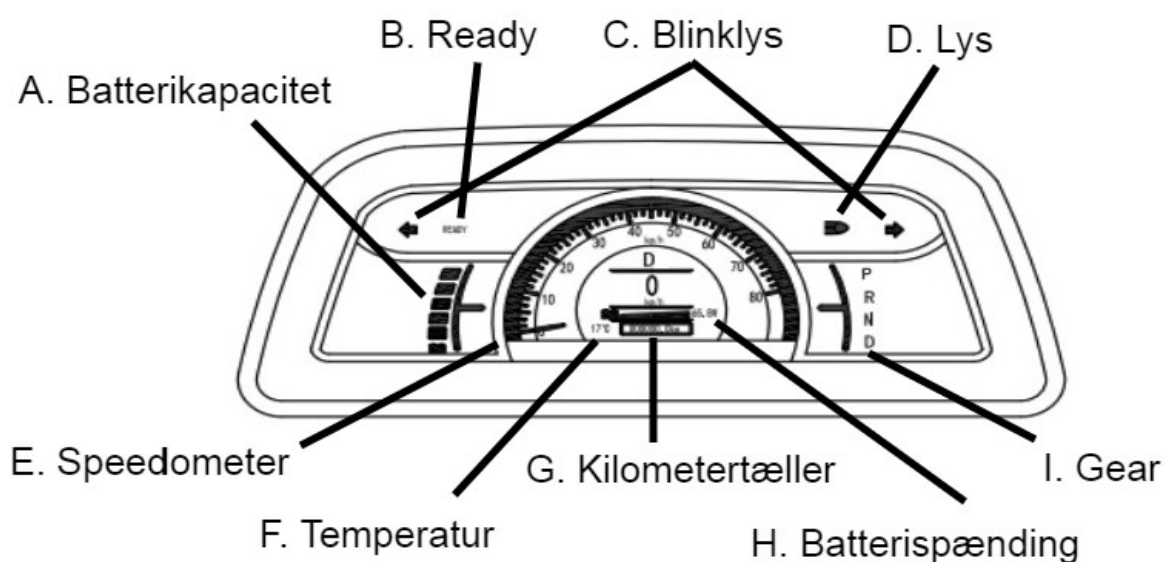


A. Batterikapacitet Angiver, hvor meget strøm der er på din kabinescooter.	B. Ready Kabinescooteren er klar til at køre.	C. Blinklys Aktiveres, når du skal dreje til enten venstre eller højre.
D. Lys Angiver, om kort eller langt lys er tændt. NB: I Danmark er det lovpligtigt at køre med nærløst tændt.	E. Speedometer Angiver, hvor stærkt kabinescooteren kører.	F. Temperatur Angiver, hvor mange grader celsius der er i kabinen.
G. Kilometertæller Angiver, hvor mange kilometer kabinescooteren har kørt.	H. Batterispænding Angiver, hvor meget strøm der er på din kabinescooter.	I. Gear Angiver, hvilket gear kabinescooteren står i: P (parkering), R (bak), N (neutral) eller D (fremad).

5.4. Bakkamera

Displayet fungerer både som speedometer og bakkamera. Når gearet sættes i bak (R), skifter displayet automatisk til bakkamera.

NB: Bakkameraet skal betragtes som en ekstra visuel hjælp. Sørg altid for også at orientere dig igennem ruderne og i spejlene, når du bakker.

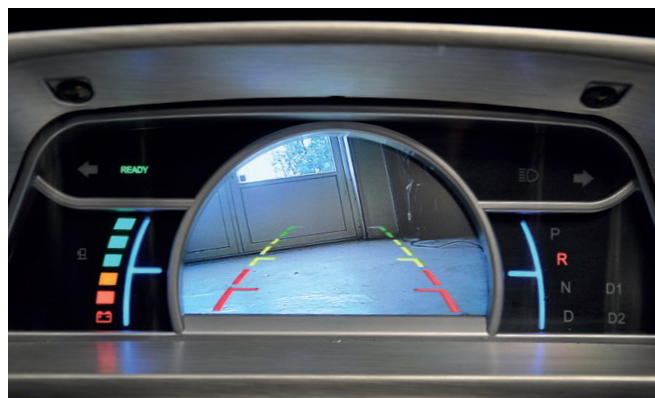

5.5. Venstre håndtag

1) Nærlys og fjernlys

Nærlyset aktiveres ved at trykke for-neden på knappen.

Fjernlyset aktiveres ved at trykke for-oven på knappen.

2) Blinklys


Skub kontakten til enten venstre eller højre, og nulstil igen ved at sætte den i midterpositionen.

3) Katastrofeblink

Til brug i nødstilfælde eller ved ulykker

4) Horn

Til at advare i faretruende situationer. NB: Virker kun, når kabinescooteren er tændt.

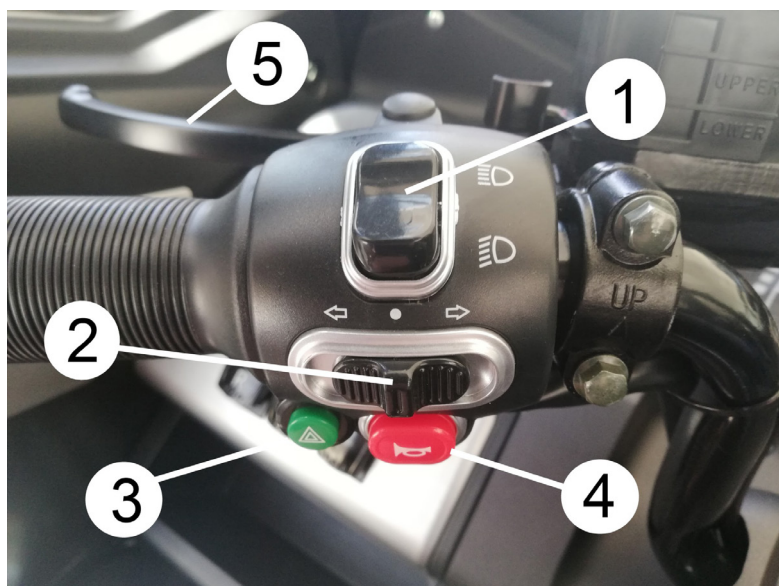

5) Bagbremse

Træk ind i bremsegrebet for at aktivere bagbremsen. NB: Det er altid bagbremsen, der skal aktiveres først. Forbremsen skal supplere bagbremsen ved hårde opbremsninger.

5.6. Højre håndtag


1) Dødmandsknap



Står knappen nederst, er der spænding på motoren, og den er klar til at køre.



Står knappen øverst, er der ingen spænding på motoren, og din kabinescooter vil ikke køre, når du drejer gashåndtaget. Der vil samtidig være gult lys i 'P' displayet.

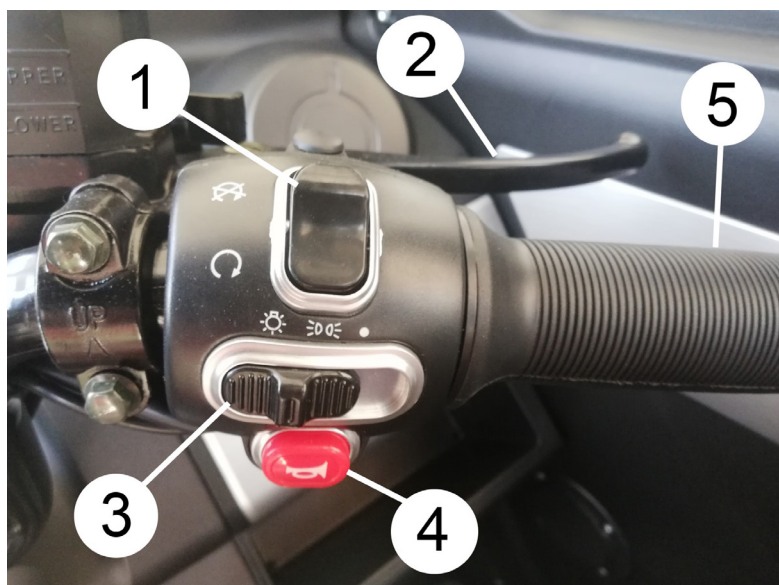


2) **Forbremse**

Træk ind i bremsegrebet for at aktivere forbremsen. NB: Det er altid bagbremsen, der skal aktiveres først. Forbremsen skal supplere bagbremsen.

3) **Lyskontakt**



Fjernlys: Skal aktivere, når det er mørkt for at tænde for fjernlyset.

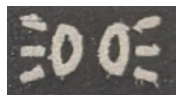

Kørellys: Skal aktiveres, for at lyset tænder.
NB: Det er lovpligtigt at køre med lys i Danmark.

4) **Horn**

Til at advare i faretruende situationer

5) **Gashåndtag**

Drej langsomt rundt på håndtaget for at øge hastigheden på kabinescooteren.

5.7. **Bremser**

Der er både for- og bagbremser på kabinescooteren. Bagbremsen aktiveres ved at trække ind i venstre bremsegreb, og forbremsen aktiveres ved at trække ind i højre bremsegreb.

NB: Når du skal bremse, er det vigtigt altid at bruge bagbremsen først og supplere med forbremsen bagefter, da kabinescooteren ellers kan risikere at skride ud, hvis du bremser med forbremsen først. Når du skal bremse, så træk først langsomt i bremsen og derefter hårdere, når du skal bremse helt ned og standse. Elmotoren bliver afbrudt, når bremserne trækkes. Bremselysene tænder, når én eller begge bremser trækkes ind.



NB: Sørg altid for at bremse ned, inden du svinger. Hvis du bremser og svinger på samme tid, er der risiko for, at kabinescooteren kan vælte/tippe eller skride ud.

5.8. **Parkeringsbremse**

Når du forlader kabinescooteren, er det vigtigt at aktivere parkeringsbremserne, hvilket du kan gøre på både for- og bagbremserne.


Sådan aktiverer du parkeringsbremserne - se billederne på næste side:

1) Træk bremsegrebet ind i den ene side.

2) Når håndtaget trækkes ind, kommer der en åbning ved bremsegrebet. Nedenfor er der billede af et trukket bremsegreb, som man kan se åbningen, og en billede, hvor åbningen ikke er der, da bremsegrebet ikke er trukket.

3) Når bremsegrebet er trukket, og åbningen er der, kan man med tommelfingeren skubbe en knop op, som går i hak i takkerne i åbningen og dermed sikrer, at bremsen er trukket.

4) Gør det samme ved bremsegrebet i den anden side af styret.

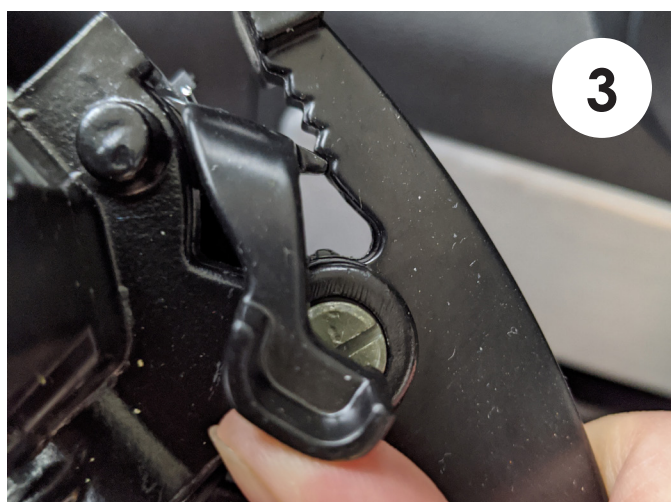

Sådan slipper du parkeringsbremserne igen:

Deaktivering af parkeringsbremserne sker ved at trække bremsegrebet ind. Knoppen, som sad fast i takkerne, er nu nede igen, og bremserne er nu ikke trukket mere.

5.9. Automatgear

Kabinescooteren har automatgear. Du vælger gear via en knap, som er placeret på panelet under styret.

Med en vippeknap kan du vælge imellem :

- (D) fremadgående gear ved at trykke op.
- (R) bakgear ved at trykke ned.
- (N) frigearet er i midterpositionen.
Brug frigearet, når du parkerer.



5.10. Kabinevarmer

Kabinescooteren har som standard installeret kabinevarme, hvor du via en vippeknop kan angive, hvordan du vil opvarme din kabinescooter. Varmeknappen er placeret på panelet under styret.

Når du starter varmeanlægget op, kan du vælge, om ventilationsanlægget skal blæse opvarmet eller uopvarmet luft op på forruden. Hvis der ønskes opvarmning i hele kabinen, kan varmeanlæg tilkøbes som ekstraudstyr. Se afsnit 12.



Opvarmet luft: Trykker du ind øverst på vippeknappen, aktiverer du den elektriske varmeblæser. Når du vipper knappen tilbage i midterpositionen, deaktiverer du blæseren.



Uopvarmet luft: Trykker du ind nederst på vippeknappen (blæserikon), aktiverer du blæseren. Når du vipper knappen tilbage i midterpositionen, deaktiverer du blæseren.




NB: Vær opmærksom på, at kabinescooteren bruger mere strøm, når du bruger opvarmet luft, hvilket har indflydelse på batterikapaciteten og derfor også på rækkevidden, hastigheden osv. Vi anbefaler derfor kun at bruge den elektriske varme i en kort periode for derefter igen at slukke. Er batterikapaciteten i kabinescooteren under 50 %, anbefaler vi ikke at starte den elektriske varme.

5.11. Vinduesvisker

Kabinescooteren har en vinduesvisker, hvor du via en vippeknop kan aktivere vinduesviskeren. Knappen til vinduesviskeren er placeret på panelet under styret.

Trykker du ind øverst på knappen, starter vinduesviskeren. Du slukker den igen ved at vippe knappen tilbage i midterpositionen.

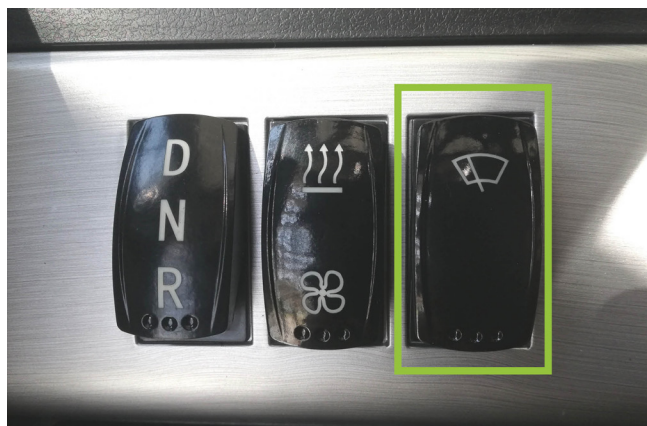

NB: Vær opmærksom på, at kabinescooteren vil bruge mere strøm, når vinduesviskeren er aktiveret, hvilket har indflydelse på batterikapaciteten og derfor også på rækkevidden, hastigheden osv.

5.12. Katastrofeblink

Kabinescooteren er som standard installeret med katastrofeblink, som skal bruges i nødstilfælde eller ved ulykker.

Katastrofeblinket sidder på venstre håndtag. Du aktiverer det ved at trykke knappen ned, hvorefter blinklysene både for og bag vil begynde at blinke.



5.13. Musikafspiller

Kabinescooteren er som standard installeret med musikafspiller, som kan afspille SD-kort og USB. Modellen kan variere. Eventuel instruktion fås ved henvendelse til forhandler.

Radio med FM, Bluetooth, kanalhusker og håndfrit telefonopkald kan tilkøbes som ekstraudstyr. Se afsnit 12.



5.14. Døre

Venstre og højre dør har samme udseende og indhold:

- 1) Døråbner
- 2) Elruder
- 3) Håndtag
- 4) Rummelig dørlomme



5.15. Soltag

Kabinescooteren har et praktisk soltag, som sikrer bedre lys og god udluftning i kabinen.

Sådan åbner du soltaget - se billederne:

- 1) Du åbner soltaget med et vippehåndtag.
- 2) Træk ned i håndtaget og skub opad.
- 3) Soltaget er nu åben.





Sådan lukker du soltaget igen:

Træk ned i håndtaget igen, vip det tilbage på plads og tryk op, så det er helt lukket.

5.16. Bagrude

Kabinescooteren har en stor bagrude, som kan åbnes. Ved at åbne både soltag og bagrude sikres god luftcirkulation.

Sådan åbner du bagruden - se billederne:

- 1) Du åbner bagruden med et vippehåndtag.
- 2) Træk ud i håndtaget og skub udad.
- 3) Bagruden er nu åben.





Sådan lukker du bagruden igen:

Træk håndtaget lidt op og træk det tilbage igen, vip det tilbage på plads og tryk ind, så det er helt lukket.

5.17. Førersæde

Førersædet i din kabinescooter kan komfortindstilles efter dine behov.

Sædet kan rykkes enten frem eller tilbage, så det passer bedst muligt til dig.

Du indstiller sædet vha. et håndtag på højre side af førersædet. Træk op i håndtaget, indstil sædet enten frem eller tilbage og sørg for, at det klikker sig fast bagefter.



Ryglænet kan justeres enten frem eller tilbage, så det passer bedst muligt til dit behov.

Du indstiller sædet vha. et håndtag på venstre side af førersædet. Træk op i håndtaget og indstil ryglænet til den ønskede vinkel.



Ryglænet kan vippes helt frem, så der er nemmere adgang til bagsædet.

Du vipper ryglænet helt frem ved at trække op i håndtaget på venstre side af førersædet, hvorefter du kan vippe sædet frem.

Når sædet skal rettes op igen, træk da igen op i venstre håndtag og vip sædet tilbage i oprettet position.



NB: Er der installeret sikkerhedssele, skal den være fastspændt under hele turen. Er der ingen sikkerhedssele, bruges styrt-hjelm.



5.18. Bagsæde

Kabinescooteren har et rummeligt bagsæde med sikkerhedssele, som er godkendt til passagerkørsel med én passager, ligesom der også er god plads til bagage, indkøbsposer el.lign.



Bagsædet må kun anvendes af personer, hvis sikkerhedsselen er spændt. Efter færdselslovens §80 må der til børn benyttes sikkerhedssele i kombination med selepude.



5.19. Sidespejle

Kabinescooteren kan være forsynet med sidespejle i både venstre og højre side.

Du indstiller sidespejlene ved at trykke ind på selve spejlet.



5.20. 12V udtag

Kabinescooteren er forsynet med et 12V udtag, som kan bruges til opladning af mobiltelefon el.lign.



5.21. Hovedafbryder / sikring

I din kabinescooter er der en sikring, også kaldet en hovedafbryder, som sikrer, at elektronikken i din kabinescooter fungerer.

Tip: Hvis du ikke skal bruge din kabinescooter i 5 dage eller mere, skal du slå hovedafbryderen fra, da der kan ske skade på batteriet eller køretøjets elektriske komponenter. Et køretøj, som ikke bliver brugt, aflader med 1ah konstant til standbystrøm til computeren i controller og omformer til 12V anlægget (centrallås/alarm). I tilfælde af, at laderen ikke er tilsluttet køretøjet i en længere periode, vil dette forårsage et ødelagt batteri, hvis spændingen falder under 52V. Afbryderen skal også slås fra, hvis der skal foretages reparationer eller andet servicearbejde på kabinescooteren - se billederne på næste side:

1. Inden du slår hovedafbryderen fra, sørg da først for, at batteriet er helt opladet.
2. Hovedafbryderen er bagerst i kabinen lige over bagsædet (billede 1).
3. Åbn lemmen ved at trykke ned foroven (billede 2).
4. Vip den blå knap NED for at slå hovedafbryderen fra. Din kabinescooter kan nå stå stille uden behov for opladning i en længere periode (billede 3).
5. Når du igen skal ud at køre i din kabinescooter, slår du hovedafbryderen til ved at vippe den blå knap OP. OBS: Tjek, at batteriet er opladet, inden du kører (billede 4)



NB: Hvis kabinescooteren bliver kraftigt belastet, kan hovedafbryderen slå fra, og kabinescooteren vil ikke længere kunne køre. Hvis dette sker, skal du lade kabinescooteren køle af, inden du igen forsøger at slå hovedafbryderen til igen, og efterfølgende ikke belaste kabinescooteren lige så kraftigt som før.




NB: Hvis du skulle komme i et uheld eller en anden nødsituation i din kabinescooter, anbefaler vi straks at slå hovedafbryderen fra, så det elektriske system er ude af drift.



5.22. Typeplade og stelnummer

På typepladen finder du stelnummeret, som bruges til at identificere kabinescooteren i vores system eller ved eventuelt tyveri. Alle serviceaftaler og fremtidige reparationer bliver også registreret på serienummeret.

Typepladen er på siden af førersædekonsollen.

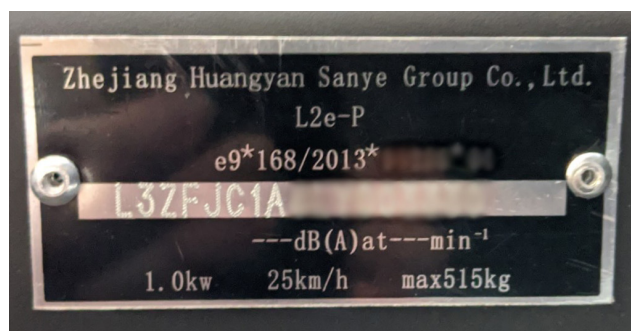

5.23. Fjernbetjent centrallås

Kabinescooter er installeret med fjernbetjent centrallås, som tillader dig at aflåse og låse din kabinescooter op på afstand uden brug af nøglen.



Lås kabinescooteren: Tryk på den lukkede hængelås.



Lås kabinescooteren op: Tryk på den åbne hængelås.



6. Info om batterierne

Kabinescooteren drives af batteri og oplader. Vi tilbyder forskellige batteripakker alt efter, hvor langt dit kørselsbehov er: batteripakke A eller S. Læs mere om batteripakkerne på www.kabinescooter.dk.

Se side 1 for information om, hvilke batterier der er installeret i denne kabinescooter.

6.1. Opladeren

Kabinescooteren har en oplader, som passer i et almindeligt 220V-stik. Opladeren er til indendørs brug og må ikke udsættes for fugt el.lign. Batteri og lader er forskellige alt efter valgte batterimodel.




NB: Benyt kun original oplader, som er udleveret sammen med køretøjet, når du skal oplade din kabinescooter. Brug af uoriginal oplader kan skade batterierne og nedsætte batteriernes levetid. Læs ladeinstruktionerne, inden opladningen påbegyndes.

6.2. Ladeinstruktion

1. Sørg for, at din kabinescooter er slukket, inden du begynder opladningen.
2. Ladestikket er bag på din kabinescooter under et dæksel (se billede 1).
3. Vip dækslet op for at få adgang (se billede 2).
4. Inden du starter opladningen, skal du sikre dig, at ladestikket er helt tørt og klar til brug.
5. Sluk for stikkontakten, så der ikke er nogen strømforbindelse til scooteren, når du forbinder ladestikket med kabinescooteren.
6. Forbind nu dit ladestik med din kabinescooter (se billede 3).
7. Tænd nu på stikkontakten og tjek, at din kabinescooter oplader. Du kan se det ved, at en diode på ladestikket lyser rødt (se billede 4). Du vil også kunne høre, at den lader, da der samtidig starter en blæser til afkølingssystemet.
8. Når kabinescooteren er færdig med at oplade, vil blæseren stoppe. Drej nøglen og se batteristatus.



NB: Hvis dit ladekabel er for kort, er det vigtigt, at forlængerledningen har samme tykkelse og dermed samme spænding som ladekablet. Aflæs størrelsen på dit kabel. Ligeledes er det vigtigt, at ladekablet ikke er for langt eller fx er rullet ind i en kabeltromle, da kabeltromlen kan blive for varmt og risikere at gå i brand eller give stød.

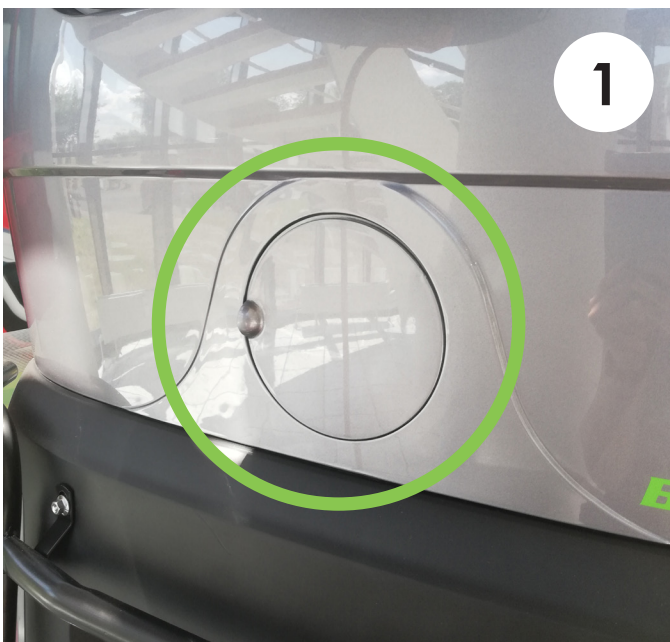



6.3. Sådan sikrer du lang levetid på batterierne

Levetiden på dine batterier kan påvirkes på mange forskellige måder: hvor ofte og hvor langt du kører i din kabinescooter, og hvordan og hvor ofte du oplader batterierne.

Tip: Gør det til en vane, at du oplader kabinescooteren, når du kommer hjem fra en tur, da du dermed er sikker på, at batterierne er varme. Oplader du på kolde batterier, kan du risikere at skade dem. Sørg for at få kontrolleret batteriet ved hvert eftersyn og få udliveret batteritest af forhandleren, så du kender status på dit batteri.

BACH-kabinescootere leveres med enten lead acid- eller litumbatterier, og ved korrekt behandling kan levetiden forlænges. Sørg altid for at parkere køretøjet i nærheden af en stikkontakt, så køretøjet kan stå til opladning, når du ikke bruger køretøjet i en længere periode.

Lead acid-batterier:

- Det anbefales at oplade batterierne efter hver køretur. Særligt, hvis batterikapaciteten er under 60 %.
- Oplad batterierne mindst 24 timer om ugen uanset brug. Gør dette for at sikre, at elektrolitten altid er på højeste niveau.
- Kulde og frost har ingen betydning for opladningen af et lead acid-batteri.
- Du kan forvente op til 300 fulde opladninger, eller hvad der svarer til ca. 10.000 km, før du skal skifte batterierne. Batterikapaciteten aftager gradvist i takt med, at det benyttes. Du kan forvente, at leadacid-batteriet skal udskiftes efter 2-3 år alt efter brug, hvis køretøjet og batteriet har fået den rette vedligeholdelse og fulgt serviceaftalerne.

Eksempler på, hvad der kan skade lead acid-batteriet:

- Hvis du er kørt tør for strøm og slår tændingen til og fra igen for at køre videre. Dette vil beskadige batteriet permanent.
- Hvis du kører med overlæs.
- Hvis hovedafbryderen ikke har været slået fra ved opbevaring i en længere periode.
- Hvis batterispændingen af en eller anden årsag har været under 10,5V.

Litumbatterier:

- Litumbatterier og tilhørende lader udgør en intelligent enhed, som giver et minimum af fejl, da det har et indbygget BMS sikkerhedssystem.
- Det anbefales at oplade batterierne efter hver køretur.

- Batteriet må gerne oplades med mange små opladninger og gerne til fuld opladning.
- Når batteriet er 100 % opladt, tages ladestikket fra.
- Når der ikke bliver ladet på batterierne, eller batterierne ikke bliver brugt så tit, bliver batteriet dovent. Det betyder, at distancen på en opladning bliver mindre og mindre, og batteriet ikke længere kan køre så langt på en opladning. Den bedste løsning på dette er at begynde at bruge batteriet, så det kan få lov til at vokse sig stærkt igen, og dette kan kræve 5-10 opladninger og fulde afladninger.
- Levetid på omkring 7-10 år svarende til køretøjets forventede levetid (800 fulde opladninger eller 40.000 km). Længden på levetiden afhænger af, om køretøjet og batteriet har fået den rette vedligeholdelse og fulgt serviceaftalerne.

Eksempler på, hvad der kan skade litium-batteriet:

- Hvis hovedafbryderen ikke har været slået fra ved opbevaring i en længere periode.
- Hvis du kører med overlæs.

Opladning af litium-batterier, hvis temperaturen er under 0 grader:

- Sørg for at sætte køretøjet til opladning lige efter en køretur. Dette sikrer, at driftstemperaturen stadig er tilstede i batteriet, når du tilslutter opladeren.
- Er temperaturen faldet til under 0 grader i batteriet, inden du tilslutter opladeren, vil batteriet ikke lade op af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis du har tilsluttet opladeren, men efter 15 min. kan konstatere, at køretøjet ikke går i gang med at oplade pga for lav temperatur, tag da opladeren ud og tænd da den elektriske varme i kabinen. Efter omkring 15 min. vil driftstemperaturen i batteriet igen være steget. Tilslut igen opladeren, og du bør nu kunne oplade køretøjet fuldt op.

6.4. Gode råd ved nye batterier

Følger du nedenstående råd, kan du sikre længere levetid og bedre ydeevne på dine batterier:

1) Vær forsigtig

Vær altid forsigtig, når batteriets ladestik sættes i kabinescooteren, og når batteriet monteres/afmonteres. Det er fin elektronik, der ikke tåler at blive behandlet hårdt.

2) Den første måned:

Sæt kabinescooteren til opladning, hver gang du har været ude at køre, indtil den er fuldt opladet.

3) Efter den første måned:

Kabinescooteren oplades efter behov. Fx når batterierne kun er 50 % opladet. Hvis du efter den første måned fortsætter med at oplade efter hver tur, kan batterierne blive dovne og levetiden kortere.

Hvis du skal køre langt, er det vigtigt at du lader din kabinescooter helt op, så du er sikret fuld strøm.

4) Koldt batteri:

Har kabinescooteren stået ude i koldt vejr, og er temperaturen i batterierne kommet under 0 grader, er det vigtigt, at du ikke oplader kabinescooteren. Kør i stedet en kort tur i ca. 5-10 minutter eller tænd det elektroniske varmesystem for at varme batterierne op, eller gør det til en vane, at du oplader kabinescooteren, når du kommer hjem fra en tur, da du dermed er sikker på, at batterierne er varme. Oplader du på kolde batterier, kan du risikere at skade dem.

Driftstemperatur er bedst mellem 10-25 grader C.

5) Står kabinescooteren stille i længere tid:

Hvis du ikke bruger din kabinescooter i længere tid fx hen over vinteren, kan det være en god idé at slå hovedafbryderen fra, da batteriet ellers vil stå og aflade hen over tid. Se vejledningen i afsnit 5.21.

6) Fjern lader efter opladning:

Vi anbefaler, at du altid fjerner opladeren fra kabinescooterens opladerstik, når den er færdig med at oplade. Bagefter lægges opladerkablet i kabinescooteren, så det er klar til næste gang, der skal oplades.

7) Batteripakker efter behov:

Vi tilbyder forskellige batteripakker alt efter, hvor langt dit kørselsbehov er: batteripakke A eller S. Læs mere om batteripakkerne på www.kabinescooter.dk.

6.5. Informationer om batterierne

Varenummer	Beskrivelse	Total Ah	Spænding V	Samlet Kw størrelse	Antal batterier	Antal 60V 5A ladere/ 230V 350W	Køretøjs- tilslutning	Kw forbrug	Oplad.tid	Tillednings- forbrug	Gns. Kw-pris	Pris fuld opladning
RS90	RS90 lithium batteri ~60km	40ah	60V	2,4	2 x RS75	2	230V	700W	4 timer	3A	2,50kr	7kr
RS100	RS100 lithium batteri ~90km	60ah	60V	3,6	3 x RS75	3	230V	1050W	4 timer	4,6A	2,50kr	11kr
RS125	RS125 lithium batteri ~115km	80ah	60V	4,8	4 x RS75	3	230V	1050W	5,4 timer	4,6A	2,50kr	14kr
RS200	RS200 lithium batteri ~155km	120ah	60V	7,2	6 x RS75	4	230V	1400W	6 timer	6,1A	2,50kr	21kr
RS400	RS400 lithium batteri ~210km	160ah	60V	9,6	8 x RS75	4	230V	1400W	8 timer	6,1A	2,50kr	28kr
A85	A85 bly batteri ~60 km	58ah	60V	3,48	5x12V BLY	1	230V	350W	13 timer	1,52A	2,50kr	12kr

7. Tekniske specifikationer

BACH - lille knallert 30

- Hastighed: 25 km/t
- Rækkevidde op til 210 km
- Bremsedistance v/20 km/t: <4 m
- Nettovægt (uden batterier): 270 kg
- Max vægt: 515 kg

BACH - stor knallert 45

- Hastighed: 45 km/t
- Rækkevidde op til 210 km
- Bremsedistance v/20km/t: <4 m
- Nettovægt (uden batterier): 270 kg
- Max vægt: 515 kg

Dimensioner for både 30 og 45:

- Længde: 2120 mm
- Højde: 1630 mm
- Bredde: 1120 mm
- Frihøjde: 135 mm
- Sporvidde (bag): 1046 mm

Mærke: BACH kabinescooter

Model: BACH delux 26 - godkendt til 2 personer

Motor: 1000 W (25 km/t) eller 1500 W (45 km/t)

Motortype: elektrisk

- 30: TOL DY 60V 1000 Watt

- 45: NP-60V 1500 Watt

Affjedring (for): Teleskop forgaffel

Affjedring (bag): Uafhængige bærearmer med fjederbensdæmpere

Sæder: Justerbart førersæde og fast bagsæde. Begge med sikkerhedsseler.



7.1. Dæk

7.1.1. Dækstørrelse

En BACH delux 26 er fabriksmonteret med følgende dækstørrelser:

Forhjul: 120/70-12

Baghjul: 125/65-R12

7.1.2. Dæktryk

Dæktrykket skal altid være:

Forhjul: 2,8 bar

Baghjul: 2,5 bar

NB: Vi anbefaler at tjekke dæktrykket ca. hver 3. måned. Det korrekte dæktryk vil forlænge dækkenes levetid, ligesom det også har betydning for rækkevidden og sikkerheden, når du kører i kabinescooteren.

Sådan kommer du luft i dækkene:

Via ventilen på billedet ovenfor. Dæktrykket kan kontrolleres på en tankstation med et dæktryksapparat.



7.1.3. Slid på dækkene

Der er tre faktorer, som påvirker kørekomforten og sliddet på køretøjets dæk:

- Dæktrykket
- Hvor meget du kører
- Underlaget, som du kører på

Derfor opfordres du til jævnligt at tjekke mønstret på dækkene. Er mønstret mindre end 0,5 mm, bør dækkene udskiftes, da dette kan påvirke kørselssikkerheden.



NB: Ved dækskifte benyttes altid et autoriseret BACH-serviceværksted, så de nye dæk bliver af samme kvalitet, som da køretøjet var nyt. Se forhandlerliste på www.kabinescooter.dk eller kontakt Kabinescooter.dk.

8. Gode råd til vedligeholdelse

En BACH kabinescooter kræver et minimum af vedligehold, men alle motoriserede køretøjer har behov for rutinemæssig service og vedligeholdelse.

8.1. Følg serviceanbefalingerne

Fordelene ved regelmæssige vedligehold og serviceeftersyn er:

- Høj driftsstabilitet
- Optimal sikkerhed og overholdelse af Færdselslovens krav
- Optimal acceleration og ydelse på køretøjets mekaniske dele
- Længst mulig levetid på køretøjet
- Opretholdelse af reklamationsretten

Find servicehæftet og serviceanbefalingerne bagerst i denne manual og læs mere i afsnittet om service i afsnit 14.

9. Gode råd til rengøring

- Hold altid ruder rene både ind- og udvendigt, så du har godt udsyn.
- Ved rengøring brug da en hårdt opvredet klud og mild sæbe, så du kan fjerne snavs. Brug ikke en blød børste.
- Brug ikke store vandmængder og kør ikke i vaskehal, da det kan beskadige kabinescooteren. Brug heller ikke en højtryksrenser, da dette kan skade både lak og elektriske komponenter.
- Rengørings sæt med rens og klude (Easy Shine Box, varenr. DB815983004) kan købes på www.kyle.dk. Til alufælge bruges fælgrens og klar lak.
- Brug aldrig kemiske væsker eller voks til skærme og paneler. Dette kan beskadige overfladerne.
- Ved ridser kan lakstift bestilles ved forhandleren.



OBS: Husk at slukke din kabinescooter inden rengøring, ligesom den heller ikke må oplade, hvis den samtidigt bliver vasket udvendigt.

10. Gode råd til opbevaring

10.1. Daglig opbevaring

Køretøjet opbevares bedst i temperaturer over +10 grader C og gerne i garage, carport el.lign. Har du ikke mulighed for at køre den i carport eller garage, anbefaler vi et overtræk, som kan købes på www.kabinescooter.dk. Se afsnit 12.

10.2. Stillestående opbevaring i længere periode

Hvis kabinescooteren skal stå stille i længere tid end 8-10 dage, kan du med fordel gøre følgende:

1. **Fuldt opladet batteri:** Sørg altid for, at dine batterier er ladet helt op til 100 %, og lad ikke ladekablet sidde i kabinescooteren, når den er færdig med at lade.
2. **Slå hovedafbryderen fra:** Skal kabinescooteren ikke ud at køre i en længere periode, anbefaler vi, at du slår hovedafbryderen fra (se afsnit 5.21.). På den måde bliver batterierne i kabinescooteren ikke afladet til under mindste spænding, og de tager således ikke skade.
3. **Lokale med udluftning:** Kabinescooteren skal stå indenfor i et lokale med udluftning.



11. Gode råd til kørsel i særligt vejr



Vær særlig opmærksom og forsigtig, når du kører i særligt vejr som fx regn, tåge, frost eller sne:

11.1. Regnvejr

Ved kørsel i vådt føre bør du køre langsommere og bremse tidligere end normalt og være opmærksom i sving. Vær også opmærksom på, at bremselængden kan forlænges på våde veje eller veje med våde blade.

11.2. Tåge

Ved kørsel i tåge bør du køre langsommere og være mere opmærksom i trafikken. Der er ikke tågelygter i kabinescooteren.

11.3. Frostvejr, is eller sne

Ved kørsel i frostvejr eller på is- og sneglattede veje bør du være særlig opmærksom, da bremselængden kan forlænges, og udskridninger kan forekomme.

12. Ekstraudstyr

Kabinescooteren kan monteres med diverse ekstraudstyr:

Produkt	Varenummer www.kabinescooter.dk	Pris inkl. moms	Pris inkl. montering	Passer til BACH 25	Passer til BACH delux 26
DK komfort - spar 1203 kr	DK-PAKKE	kr 17.995,00	x	x	x
Basispakke 1 - spar 658 kr	Varesamling-41	kr 2.995,00	x	x	x
Basispakke 2 - spar 890 kr	Varesamling-42	kr 3.495,00	x	x	x
Safety Care Pakke - spar 602 kr	Varesamling-35	kr 2.995,00	x	x	x
Bakspejl	BAKSP	kr 95,00	x	x	x
Metalkofangersæt (for og bag)	KOFSÆT	kr 895,00	x	x	x
Solskærm	SOLSK	kr 178,00	x	x	x
Fartpilot	FARTP	kr 1.495,00	x	x	x
Overtræk	OVERTR	kr 495,00		x	x
Hill hold assistent	HILL	kr 495,00	x	x	x
Lydisolering	LYDISOBACH	kr 1.395,00	x	x	x
Sædeflytning 8-10 cm bagud	SAEDEFOR	kr 1.495,00	x	x	x
Blinklysindikator med lyd	BLINKIND	kr 495,00	x	x	x
Undervognsbehandling	PAVA	kr 1.495,00	x	x	x
Sprinklervæskesystem	Varesamling-26	kr 795,00	x	x	x
Opgradering af elektrisk varmesystem	OPELVA	kr 7.995,00	x	x	x
Radio med Bluetooth og håndfri telefonopkald	BACHRADIO+B	kr 1.875,00	x	x	x
Caps-lock - bremselås	BRLAAS	kr 449,95		x	x
Anti-punkteringsvæske	ANTIPUNK	kr 795,00	x	x	x
Pulverslukker	PULV	kr 358,00	x	x	x
Pumpe inkl. manometer	PUMPE	kr 499,00		x	x
Hekter-oliefyr (2 Kw)	HEKTER2KW	kr 12.495,00	x	x	x
Tagbøjler (2 stk.)	TAGBOJ	kr 595,00	x	x	x
Elektrisk drejesæde (turny evo)	DREJSAEDE	kr 48.175,00	x	x	x
Drejesæde med originalt sæde	OEMDRE	kr 8.995,00	x	x	x
Ekstra lang dørstrop - montering i venstre dør	BA14-V	kr 395,00	x	x	x
Ekstra lang dørstrop - montering i højre dør	BA14-H	kr 395,00	x	x	x
Fodgaspedal	FODGAS	kr 1.395,00	x	x	x
Rollatorholder (kræver 'Metalkofangersæt')	ROLLHOLDER	kr 995,00	x	x	x
Ilflaskeholder	ILTFL	kr 795,00	x	x	x
Blaupunkt DAB'n'Play 370	BLAUPUNKTDAB	kr 1.995,00	x	x	x
Ratknop til kabinescooter	RATKNOP	kr 495,00	x		
Ekstra fjernlygte	EFLYG	kr 795,00	x	x	x

Se alt ekstraudstyr på www.kabinescooter.dk eller kontakt et BACH-serviceværksted for at høre nærmere om mulighederne for eftermontering på dit køretøj.

13. Reklamation og garanti

For private yder Kabinescooter.dk 2 års reklamationsret fra købsdato i henhold til Købeloven. Reklamationsretten dækker fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved kabinescooterens normale brug i købers private husholdning i Danmark.

Når du modtager din nye kabinescooter, anbefaler vi, at du gennemgår den for fejl/mangler. Hvis du som bruger/ejer bliver opmærksom på fejl, skal du straks meddele det til den forhandler, hvor du har købt kabinescooteren. Generelt bør man ikke benytte køre-

tøjjet, før en evt. fejl og/eller mangel er fundet og udbedret/repareret. Følgeskader, som skyldes fortsat kørsel, er ikke omfattet af reklamationsretten.

Du reklamerer ved at tage kontakt til den forhandler, hvor kabinescooteren er købt. Forhandleroplysningerne fremgår af stempel på første side i Service- & instruktionsbogen, som følger med køretøjet.

Ved kontakten vil der blive lavet en aftale om, hvornår kabinescooteren kan blive service-ret. Udbedring af en fejl og/eller mangel ved en berettiget reklamation sker for forhandlerens/Kabinescooter.dk's regning, og du bliver således holdt skadesløs for både arbejds-løn og eventuelle medgåede materialer.

Reklamationer sker i henhold til de gældende tekniske krav, som Kabinescooter.dk har udarbejdet. Skiftes der dele i forbindelse med reklamationen, tilhører disse forhandleren/Kabinescooter.dk. Reklamationsretten forlænges ikke på trods af, at der inden for 24 måneder efter købsdatoen repareres eller udskiftes dele som reklamation.

Forhandleren/Kabinescooter.dk afgør i alle tilfælde behovet for, om afhjælpning af eventuelle fejl og/eller mangler kan ske straks, eller om kabinescooteren skal indleveres på værksted, når blot dette sker inden for rimelig tid.

Ved reklamation skal kunden derfor sørge for at give så grundig og fyldestgørende en beskrivelse af fejl og/eller manglen som muligt. Forhandleren er berettiget til at søge unødige omkostninger ved en uberettiget reklamation dækket af kunden. Det er derfor en god ide, at kunden forinden reklamationen undersøger scooteren grundigt og anvender instruktionerne i Service- og instruktionsbogen. Kan der ved eftersynet ikke påvises nogen fejl og/eller mangler på køretøjet ud fra kundens fejlbeskrivelse, er forhandleren berettiget til at fakturere den arbejdstid og evt. kørsel, der er gået til at søge fejlen.

13.1. Reklamationsretten gælder

Reklamationsretten gælder under forudsætning af:

- at kabinescooteren bruges normalt og vedligeholdes i overensstemmelse med Service- og instruktionsbogen.
- at eventuelle plomberinger ikke er brudt, og at kabinescooteren ikke har været udsat for overlast.
- at der bruges originale BACH reservedele.
- at de foreskrevne service- og reparationsaftaler er gennemført rettidigt og korrekt af et aut. BACH serviceværksted.
- at reparationer/ændringer anbefalet af forhandleren er foretaget.
- at kabinescooteren ikke anvendes til udlejning eller erhvervsmæssig brug.
- at kabinescooteren ikke bruges til konkurrence- eller racerkørsel.
- at kabinescooteren ikke har været udsat for færdselsuheld.
- at der ikke er foretaget konstruktive ændringer på kabinescooteren, som ændrer i hastighed, ydeevne mv.

13.2. Begrænsninger i reklamationsretten

- Reklamationsretten dækker ikke fejl på køretøjer, som har været udsat for trafikuheld og/eller er ombygget eller ændret af uautoriseret værksted/forhandler.
- Reklamationsretten bortfalder helt, hvis der er udført/udføres reparationer og/eller dele (de)monteres, som resulterer i ændringer af kabinescooterens beregnede hastighed, motorens ydeevne eller ændringer på de elektriske systemer og/eller batterier.
- Tilsvarende er gældende, hvis der (efter)monteres reservedele, der ikke er godkendt af importøren.

- Reklamationsretten dækker endvidere ikke forhold, der kan tilskrives alm. slitage, tidens ælde eller forringelse forårsaget ved brug af kabinescooteren såsom pærer, LED-lys, dæk, sikringer, kontakter, bremsedele og diverse gummidele.
- Reklamationsretten omfatter heller ikke følgeskader som følge af ukorrekt brug af kabinescooteren eller manglende eller for sen udførelse af service eller reparationer foreskrevet af værksted eller Service- og instruktionsbogen.
- Reklamationsret dækker heller ikke begrænset støj eller vibrationer, der ikke har indflydelse på sikker kørsel med kabinescooteren.
- Almindeligt slid er ikke en mangel i Købelovens forstand, selvom nedslidning kan indtræde inden udløbet af de 24 måneders reklamationsret - dette gælder også batterier. Der er reklamationsret på fejl på genopladelige batterier, men svækket batterilevetid ved brug er ikke at betragte som en fejl, men blot et udtryk for slitage, da rækkevidden på kabinescooteren gradvist reduceres efter antallet af opladninger.

14. Service

Din kabinescooter kræver et minimum af service, men derfor er det stadig vigtigt at overholde den rutinemæssige serviceplan. Har din kabinescooter brug for service, lyser en værkstedsnøgle (se billedet). OBS: Den lysende værkstedsnøgle findes ikke i alle modeller, så husk at tjekke og overholde serviceintervallerne bagerst i denne bog.



Overholder du den rutinemæssige serviceplan for kabinescooteren, sikrer du:

- Høj driftsstabilitet.
- Optimal sikkerhed og overholdelse af Færdselslovens krav.
- Optimal acceleration og ydelse på køretøjets mekaniske dele.
- Længst mulig levetid på køretøjet.
- Opretholdelse af reklamationsretten.

Servicehæftet er bagerst i denne manual, ligesom forhandleren/serviceværkstedet også fører en journal over din kabinescooter online. Denne journal er nyttig, hvis du får brug for reklamationsretten.

Som ejer/bruger af kabinescooteren er det dit ansvar at sikre, at alle serviceeftersyn bliver overholdt, gennemført rettidigt, og at service udføres af et autoriseret serviceværksted. Rettidig service er overholdt, når den procentvise overskridelse er mindre end 10 %.

Listen over autoriserede serviceværksteder kan ses på:

<https://kabinescooter.dk/service-ydelser-212/>.

Alle service udføres for ejerens regning.

Eftersyn efter 3 måneder eller 300 km udføres gratis for ejeren, hvis eftersynet udføres af det forhandlerværksted, hvor kabinescooteren er købt. Udgifter til eventuelle reservedele og værkstedets arbejds løn vil således være uden beregning, men eventuel transport til/fra værkstedet vil stå for ejerens regning.



NB: Manglende vedligeholdelse og service af Kabinescooter kan påvirke garanti & reklamationsret for køretøjet.

14.1. Hvor kan du få foretaget service?

Service på kabinescooteren skal udføres af et autoriseret serviceværksted. Du finder oversigten over forhandlere på www.kabinescooter.dk under 'Forhandlere'.

NB: Vær opmærksom på, at ved udskiftning af reservedele eller foretagelse af service ved et uautoriseret værksted frafalder garantien og reklamationsretten.

14.2. Beskrivelse af klargøringen

Ved klargøringen af kabinescooteren gennemgår værkstedet bl.a.:

- Hastighed og acceleration
- Styrøj
- For- og bagbremse og håndbremse
- Musikafspiller og højttalere
- USB opladerstik
- Elruder
- Soltag
- Lys (positions lys og langt lys) og lysindikation i displayet
- Højre og venstre blinklys og blinklysindikation i displayet
- Højre og venstre bremselys og lyset i baglygterne og bremselyset i toppen
- Baklys og hyletonen
- Nummerpladelys
- Lås i døre
- Ratlås
- Dødmandsknap
- Blæser med kold- og varmluftsfunktion
- Vinduesvisker
- Gummikantlister
- Vinduer
- Fjernbetjeninger
- Skruer
- Dørlukning og dørstop
- Baghjul
- Støddæmper og affjedring
- Indstilling af højde på forlygte
- Smøring af elektriske stik
- Kontrol for synlige skader og ridser og rengøring med våd klud
- Prøvekørsel

14.3. Beskrivelse af serviceeftersynet

Ved serviceeftersyn af kabinescooteren kontrollerer/justerer/smører værkstedet bl.a.:

- Skruer og bolte
- Dæktryk
- Lys og lygter
- Viskerblad.
- Bremsévæske
- Varme og blæser
- Batterier og lader
- Låse og hængsler
- Styr og forgaffel
- Alle bevægelige dele
- Olie på bagtøj
- Konstruktive ændringer
- OBS: Gennemgangen kan variere alt efter, hvilket service der udføres.

15. Ofte stillede spørgsmål

Hvis din kabinescooter ikke vil køre, er der nogle punkter, som du selv kan tjekke og kontrollere:

- Er der strøm på kabinescooteren? (se afsnit 5.3.)
- Er batteriet opladt? (se afsnit 5.3.)
- Er nøglen drejet? (se afsnit 3.)
- Står gearet i 'D'? (se afsnit 3.)
- Er dødmandsknappen slået fra? (se afsnit 5.6.)
- Er håndbremserne sluppet? (se afsnit 5.8.)

Hvis din kabinescooter hopper under kørsel efter evt. længere tids opbevaring, kan du med fordel pumpe 4 bar (58 PSI) luft i dine dæk og lade det være i 10-14 dage. Derefter skal du gå ned på normalt dæktryk igen og køre nogle lange ture for at få det flade punkt rettet ud.

16. Afsluttende

Efter at have læst denne instruktionsbog gældende for BACH-kabinescooteren har du nu opbygget et større kendskab til din kabinescooter og kan føle dig helt sikker, når du bevæger dig ud i trafikken.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din forhandler.

Hold derudover øje med vores Facebook-side, hvor vi løbende deler informationer, nyheder, nye modeller, videoer og billeder: <https://www.facebook.com/kabinescooter/>

Med venlig hilsen



Lupinvej 5, 9500 Hobro


Tlf: 30 742 743



info@kabinescooter.dk

www.kabinescooter.dk

17. Illustrationer

Dimensioner

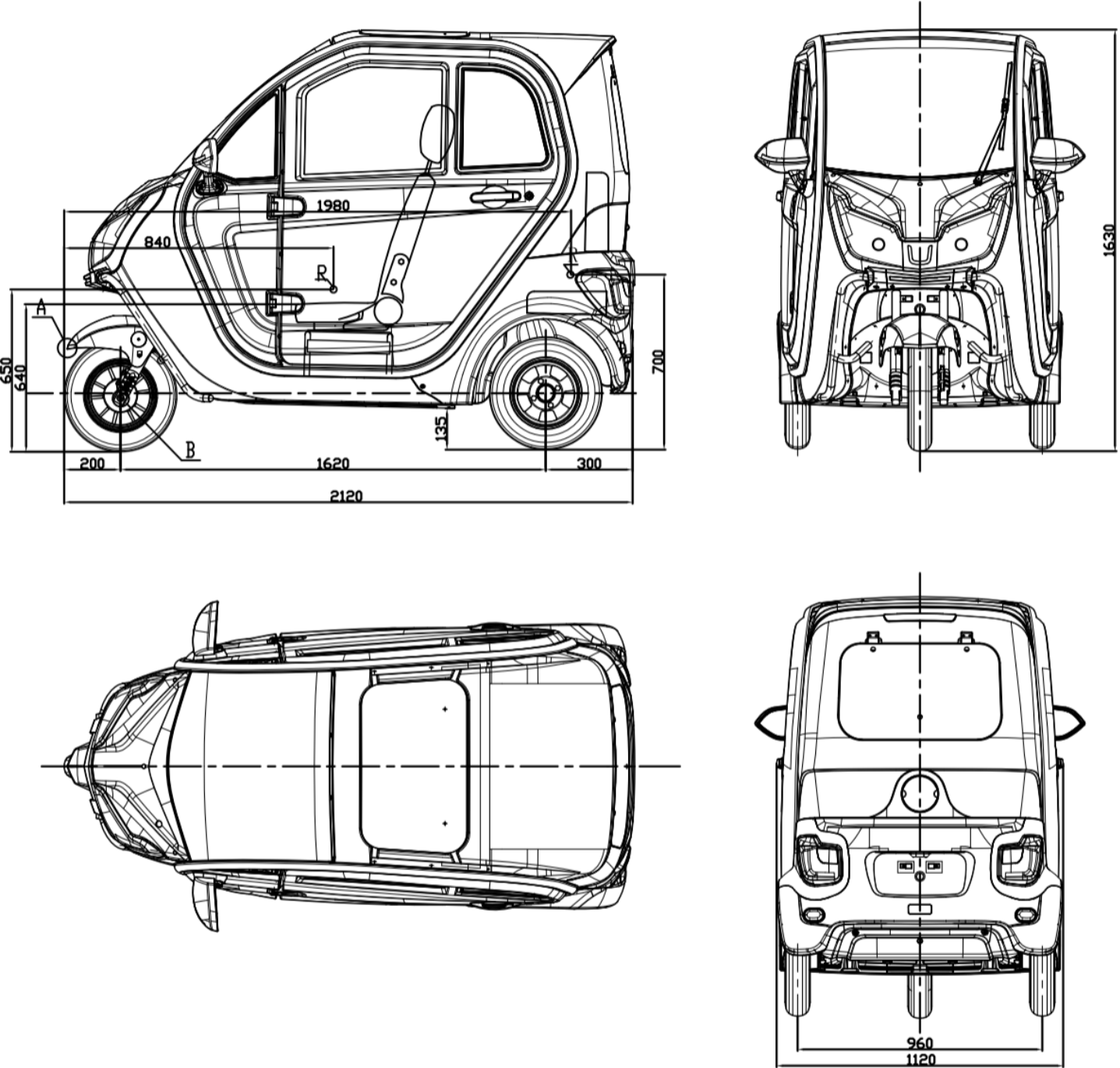

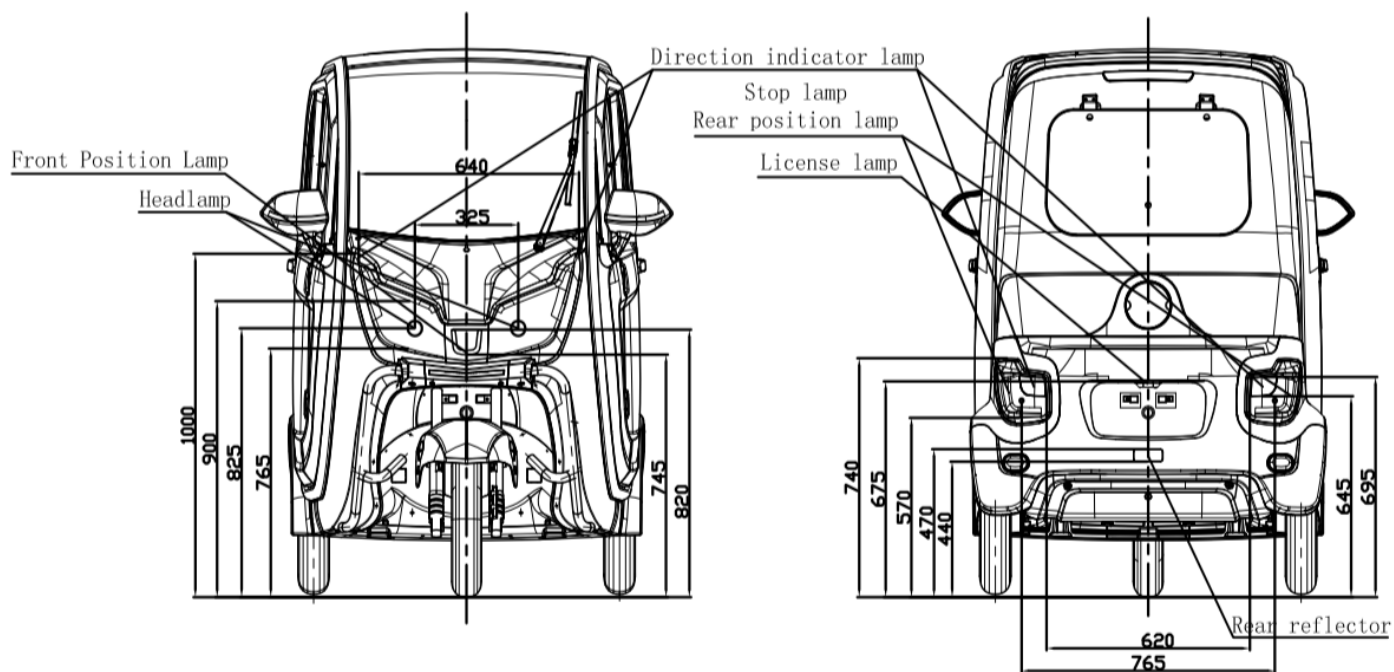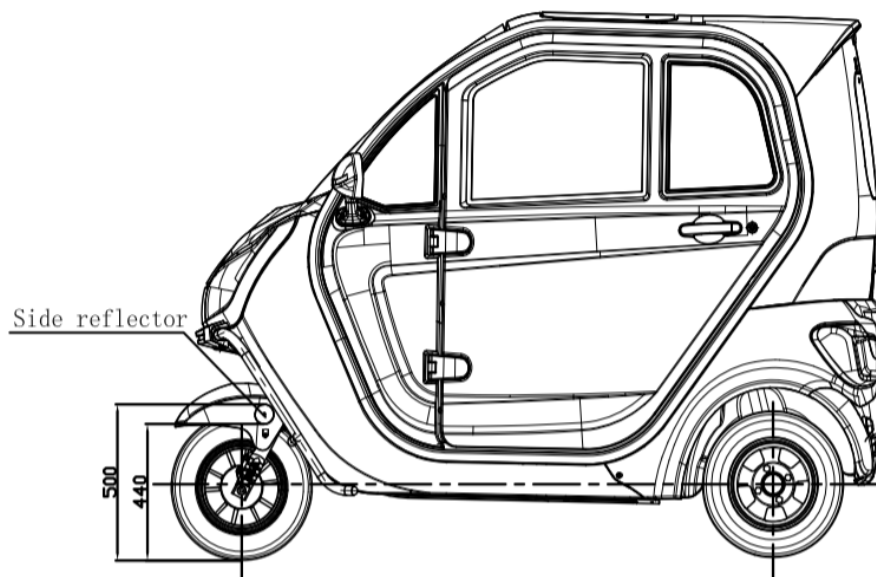


Placering af stelnummer

STAMP AT THE RIGHT SIDE OF MAIN FRAME

☆ L3ZFJC1A???????? ☆

R:X=450,Y=20,Z=400(r/o)

Text height: 5mm,Text depth: 0.3mm.



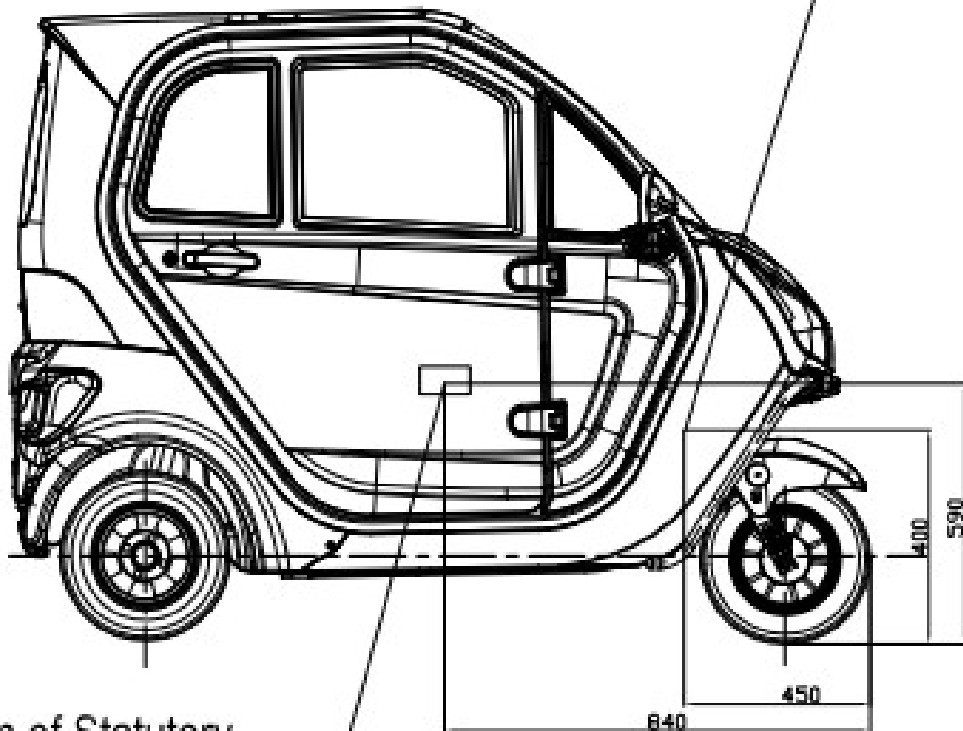


Location of Statutory



R:X=840,Y=200,Z=590

Text height: 4mm,Text depth: 0.3mm.

Placering af sidespejle

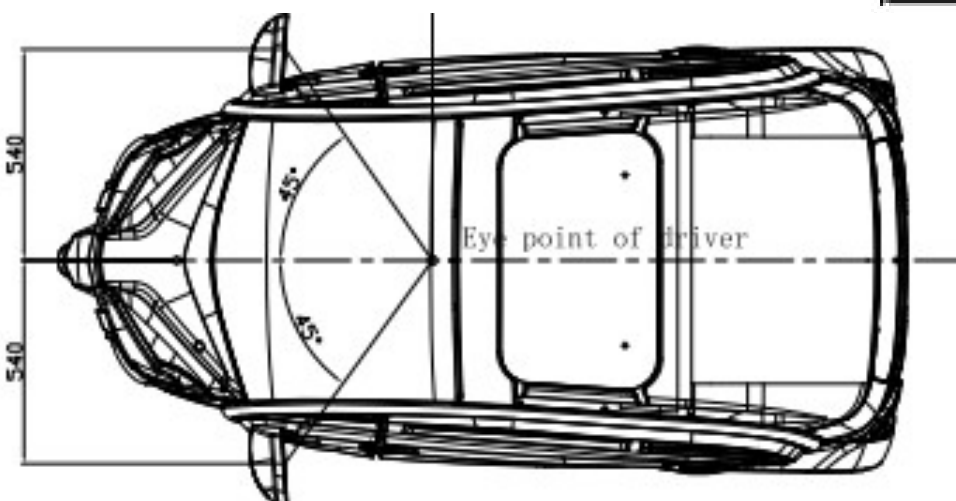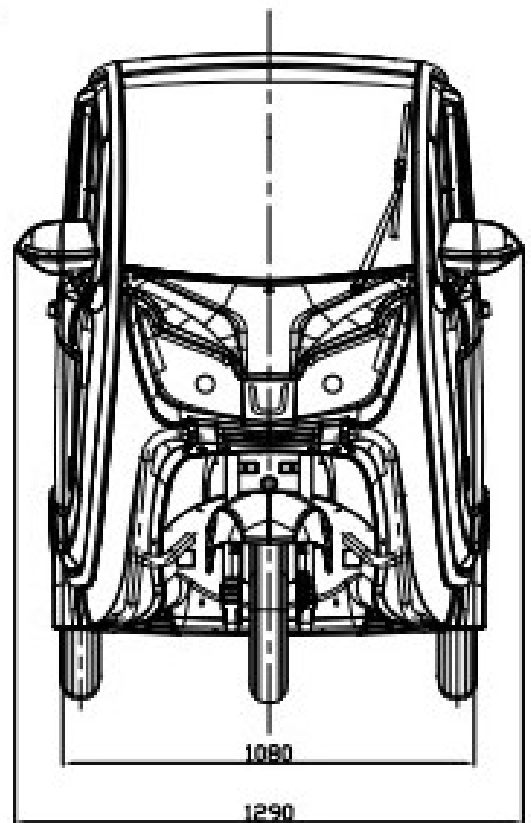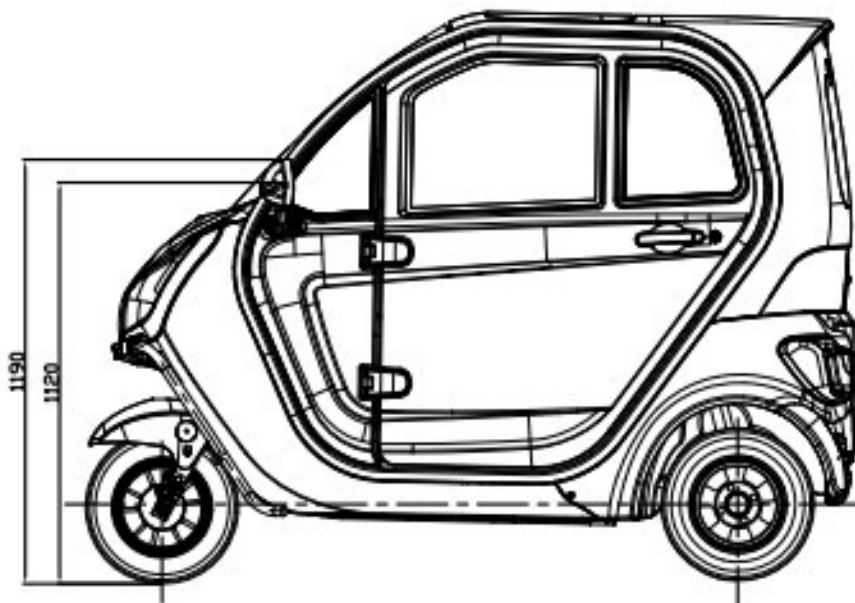



Førersæde og bagsæde

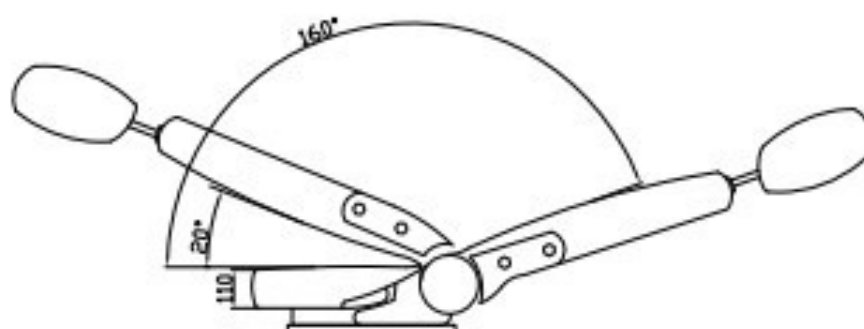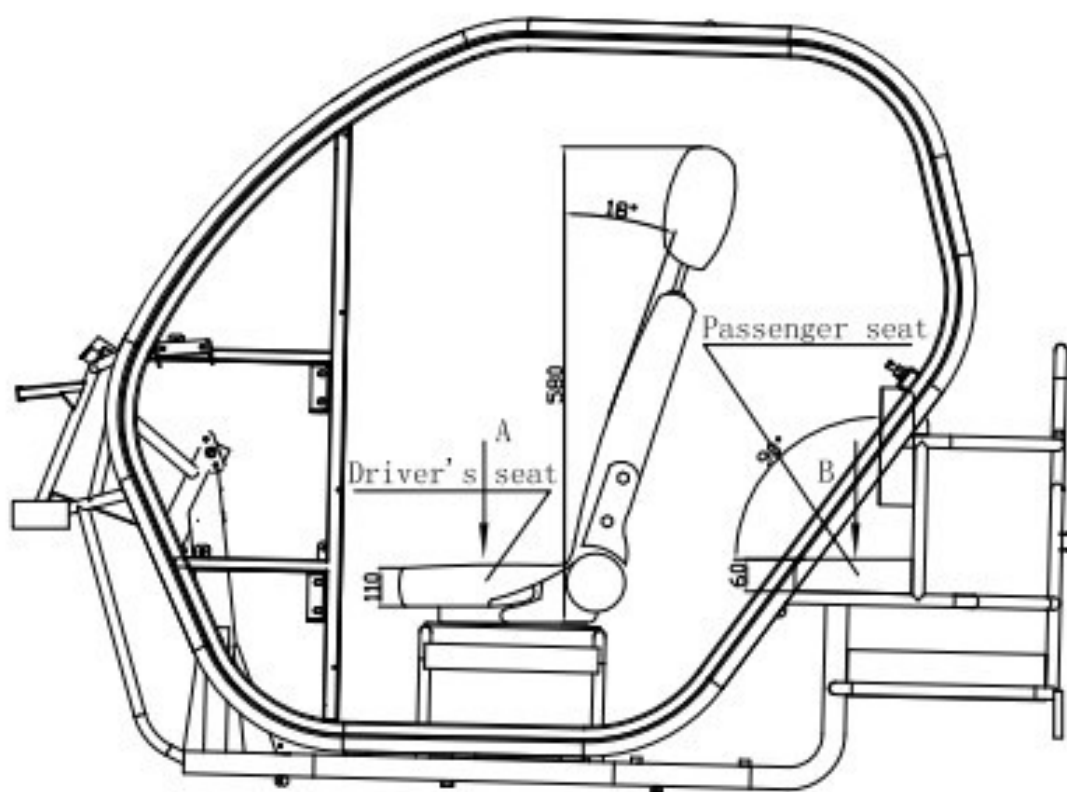


Distance: 60mm Distance: 60mm
 Front | Rear
 Total distance: 120mm

B Direction

A Direction

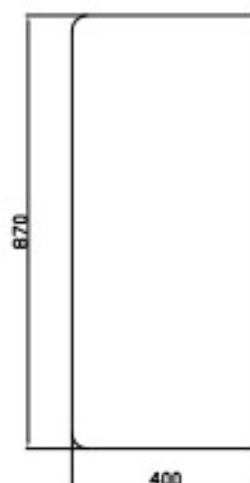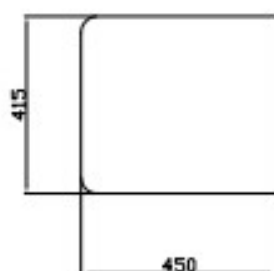


Døråbning

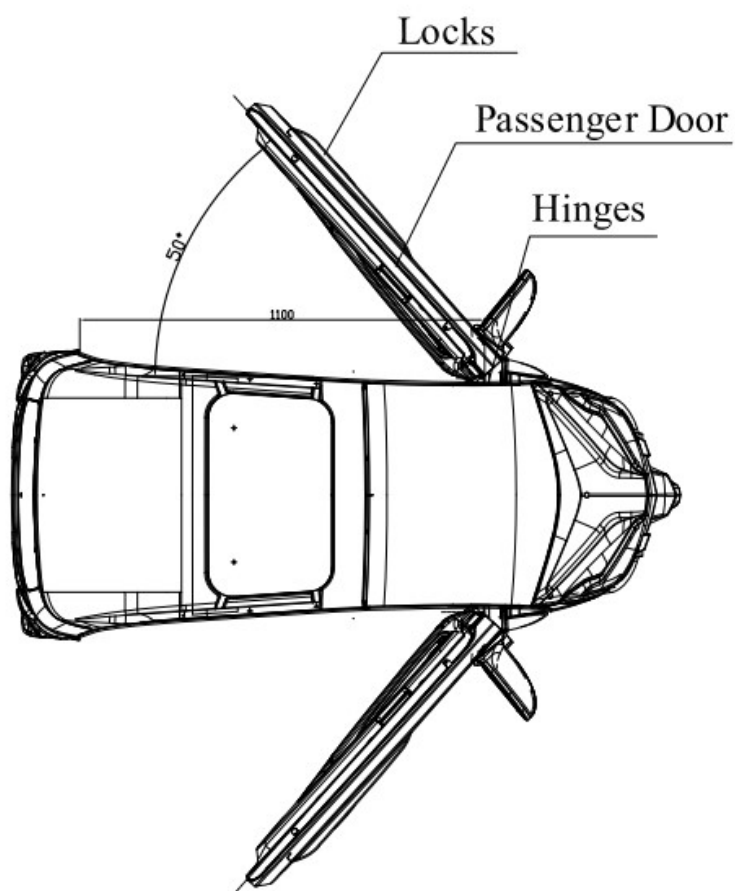


Ekstra døråbning af tilkøbes som ekstraudstyr, så døren kan åbne helt op til 90 grader (se afsnit 12.).

Drejeradius

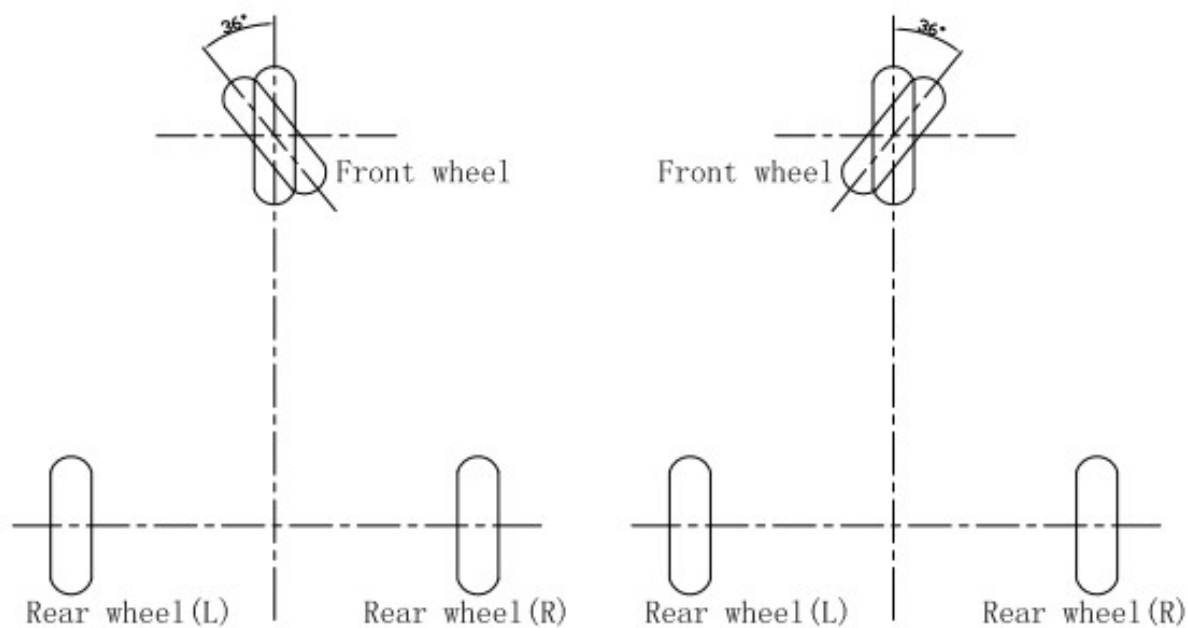


Placering af komponenter

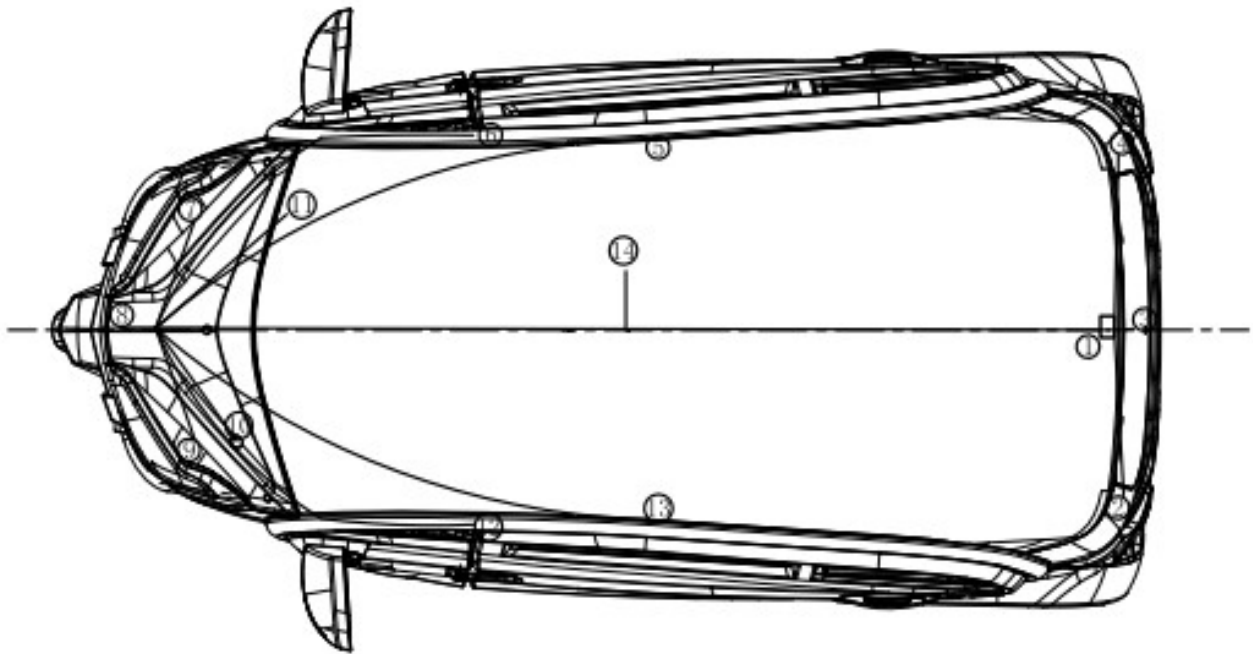


- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1、Controller | 7、Front right turn light |
| 2、Rear left turn light
Brake light | 8、Headlamp |
| 3、Rear license plate lamp | 9、Front left turn light |
| 4、Rear left turn light
Brake light | 10、Wiper |
| 5、electric window regulato | 11、Electric door lock |
| 6、Departure alarm | 12、Departure alarm |
| | 13、electric window regulato |
| | 14、Harness assembly |

Note: All high voltage harness having an outer covering with the colour orange.

Størrelsen på forruden

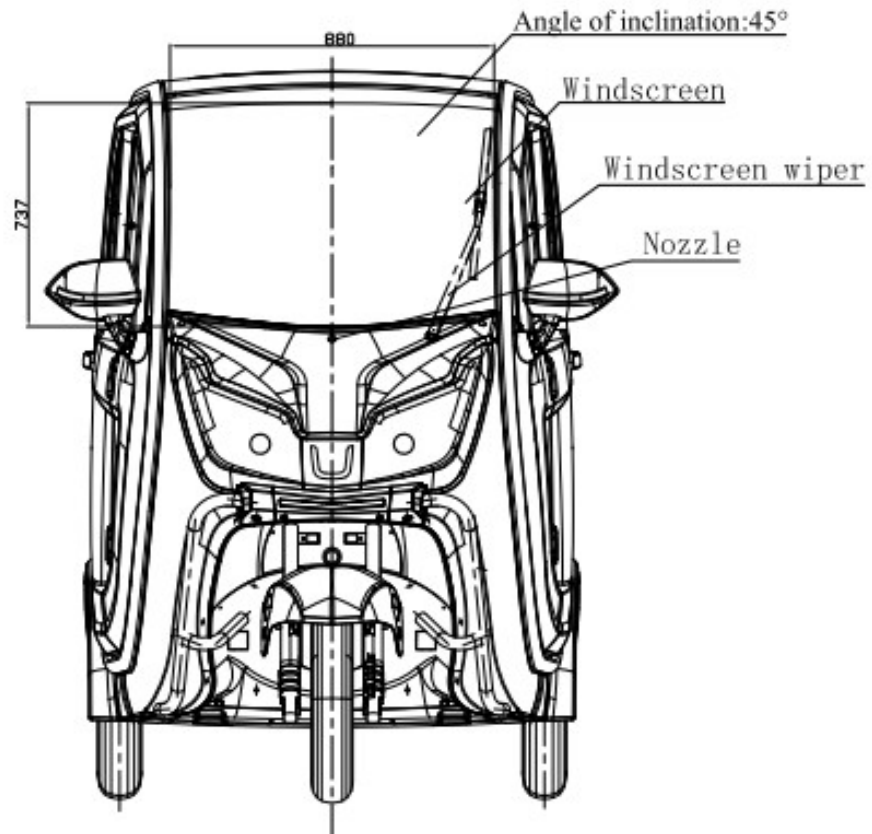

Ledningsdiagram

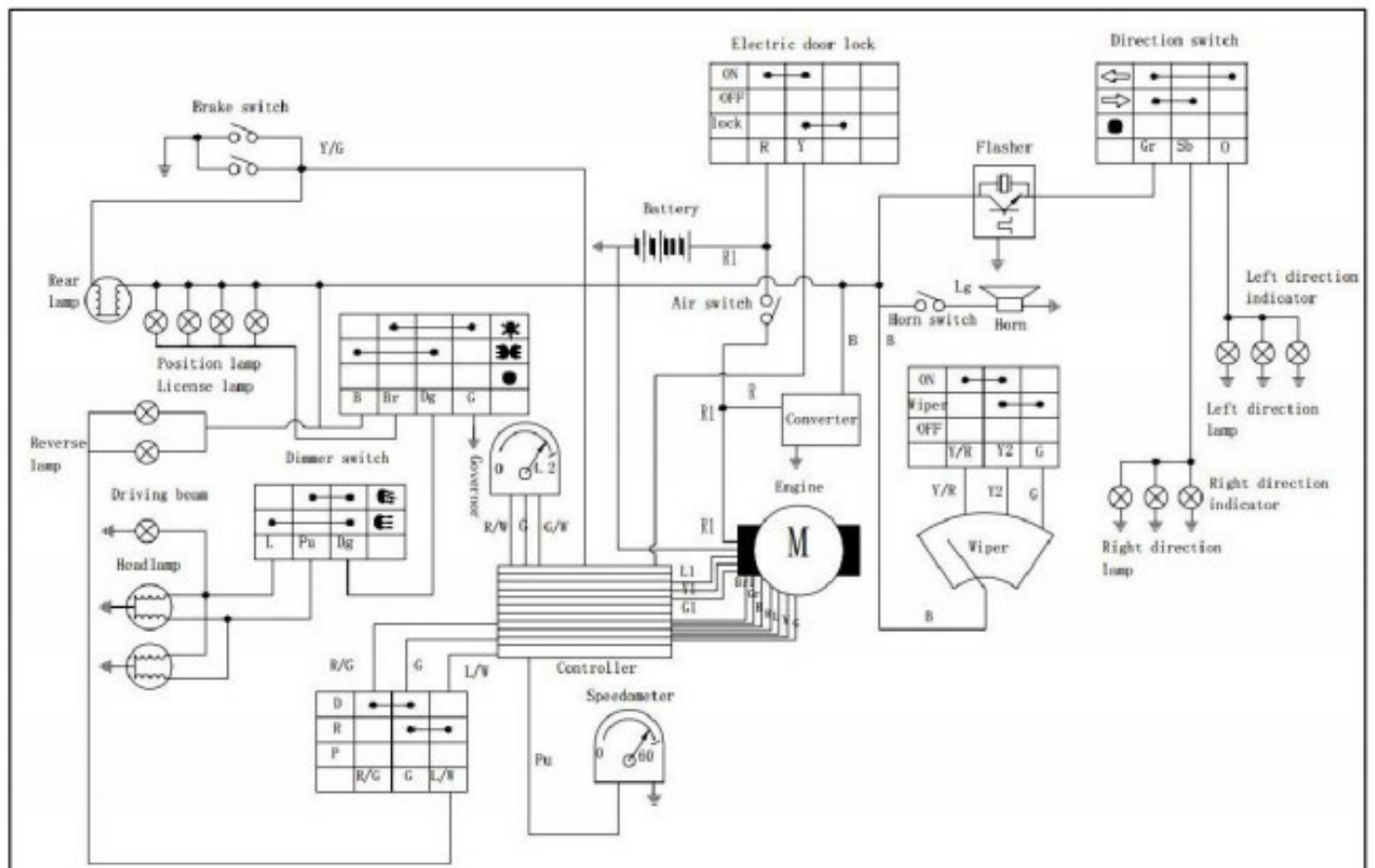

18. Servicehæfte

Din BACH Kabinescooter skal serviceres efter følgende retningslinier/intervaller, ellers bortfalder retten til garanti og reklamation:

Klargøring	Forhandlerstempel
Indregistreringsdato	
Dato - dd/mm/åååå	Underskrift

Eftersyn - gratis	Resultat af batteritest udleveret til slutbruger	☐ JA
Inden 3 mdr. eller 300 km	forhandler.kabinescooter.dk/service rapportering	
	Forhandlerstempel	
Dato dd - dd/mm/åååå		
Km kørt:		
Dato for næste service		Underskrift

1. service	Resultat af batteritest udleveret til slutbruger	☐ JA
Inden 6 mdr. eller 1.000 km	forhandler.kabinescooter.dk/service rapportering	
	Forhandlerstempel	

Dato dd - dd/mm/åååå		

Km kørt:		

Dato for næste service		Underskrift

2. service	Resultat af batteritest udleveret til slutbruger	☐ JA
Inden 12 mdr. eller 3.000 km	forhandler.kabinescooter.dk/service rapportering	
	Forhandlerstempel	

Dato dd - dd/mm/åååå		

Km kørt:		

Dato for næste service		Underskrift

3. service Inden 18 mdr. eller 6.000 km	Resultat af batteritest udleveret til slutbruger ☐ JA forhandler.kabinescooter.dk/servicerapportering
_____ Dato dd - dd/mm/åååå _____ Km kørt: _____ Dato for næste service	Forhandlerstempel Underskrift

4. service Inden 24 mdr. eller 9.000 km	Resultat af batteritest udleveret til slutbruger ☐ JA forhandler.kabinescooter.dk/servicerapportering
_____ Dato dd - dd/mm/åååå _____ Km kørt: _____ Dato for næste service	Forhandlerstempel Underskrift

5. service Inden 30 mdr. eller 12.000 km	Resultat af batteritest udleveret til slutbruger ☐ JA forhandler.kabinescooter.dk/servicerapportering
_____ Dato dd - dd/mm/åååå _____ Km kørt: _____ Dato for næste service	Forhandlerstempel Underskrift

6. service Inden 36 mdr. eller 15.000 km	Resultat af batteritest udleveret til slutbruger ☐ JA forhandler.kabinescooter.dk/servicerapportering
_____ Dato dd - dd/mm/åååå _____ Km kørt: _____ Dato for næste service	Forhandlerstempel Underskrift



Redaktionen afsluttet december 2020. Materialet må ikke gengives hverken helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra: ASSP, Kabinescooter.dk, Lupinvej 5, 9500 Hobro, tlf. 30 742 743. Der tages forbehold for ændringer i specifikationer som følge af producentens løbende udvikling af produktet. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i lovgivningen m.v.