



Zitzi
ACTIVE 

Brugervejledning

Zitzi Active

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforeskrifter	3	Støttebord	15
Værktøj	4	Kørebøjle	15
Montering/afmontering af ryg	4	Fodstøtte, helt	16
Justering af rygvinkel	5	Fodstøtte, delt med kugleled	17
Justering af ryghøjde	6	Lægstøtte	18
Justering af ryg i dybden	6	Fodrem	19
Justering af siddeposition	7	Ankelbespænding	19
Hovedstøtte	8	Kørestolsstel Flipper Pro G2	20
Hoftebælte	9	Kontorkørestolstel Seastar	22
Kropsele	10	Vedligeholdelse og pleje	23
Brystbælte	11	Sammenfatning og efterkontrol	24
Armstøtte fra ryg	12	Tilpasning og specialtilpasning	25
Støttehåndtag	13	Betingelser	26
Knæstøtte	14	Tekniske data	27

Produktet er fremstillet af Anatomic SITT AB


Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping
Telefon +46 11-161800

Produktet forhandles i Danmark af:

Anatomic SITT A/S
Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark
Tel +45 86 17 01 74
Fax +45 86 17 01 75



Sæt kryds i ruden ved
SPECIALTILPASNING for så
gælder CE-mærkningen ikke!

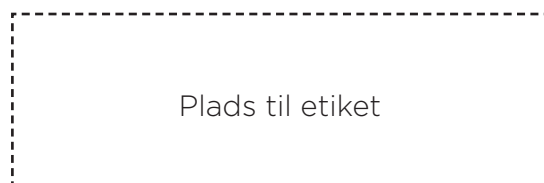

Plads til etiket

Sikkerhedsforeskrifter

Indledning

For at kunne udnytte Zitzi Active til fulde, er det vigtigt, at man læser denne brugervejledning igennem. Dette gælder alle personer, som har med brugeren at gøre.

Dette produkt er udviklet til brugere med siddestillingsmæssige udfordringer og passer til mange forskellige diagnoser. Tilpasning af Zitzi Active skal altid foretages af uddannet personale. Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Anatomic SITT A/S.



Anvendelsesområde

Brugen af produktet er tilsigtet, som et aktivt siddesystem sammen med kørestolsstel produceret af Anatomic SITT AB.

Active-sædet er et supplement til det sædvanlige siddesystem og tiden til den aktivt siddende stilling skal begrænses i forhold til brugerens forudsætninger.



Kontrol inden anvendelse

Kontroller alle bevægelige dele, bælter og detaljer med udseende af slitage, funktion mm. Kontroller også at plastdelene er hele og uden skader. Kontroller at siddesystemet sidder ordentligt fast på kørestolsstellet.

Ved anvendelse af Zitzi Active skal et af vores hoftebælter altid anvendes og også et brystbælte eller kropssele ved behov (følg anvisningerne i resp. bæltets brugervejledning).



Efterlad aldrig brugeren uden opsyn i Active-stolen og vær opmærksom på eventuelle problemer for brugeren.

Sikkerhedsbånd

Et sikkerhedsbånd leveres til siddesystemet. Dette skal altid anvendes sammen med adaptersystem universal. Dette bånd skal spændes fra sædets rygprofil og rundt om kørestolsstellets kørebøjle/-håndtag. Sørg for at dette bånd sidder stabilt og spændt.



Kontrol efter anvendelse

Kontroller altid efter brug for at opdage rødme eller trykmærker på brugeren.

Korrespondance

Zitzi Active og dets tilbehør er CE mærkede produkter. Et unikt serie nummer er placeret på en etiket under sædepladen. Dette serie nummer skal der refereres til ved enhver korrespondance vedr. produktet.

Værktøj

Værktøjsnøglen (4 mm unbraconøgle) som du skal bruge til at udføre justeringer er placeret på toppen af rygprofilen, som du finder på bagsiden af stolen.

! Værktøjet skal sidde i profilen, når det ikke anvendes som en beskyttelse mod rygprofilens top og altid findes indenfor en håndsrækning til justeringer.

Der medfølger også en løs Umbraconøgle T-25)

 = Justeringsnøgle 

 = Umbraconøgle 




Montering/afmontering af ryg

Ryggen er monteret med 4 unbrako-skruer.

Før rygprofilen ned i samlemøtrikkerne og spænd de fire medfølgende skruer.

Ryggen er automatisk i den korrekte position ved hjælp af stoppet i rygprofilen.

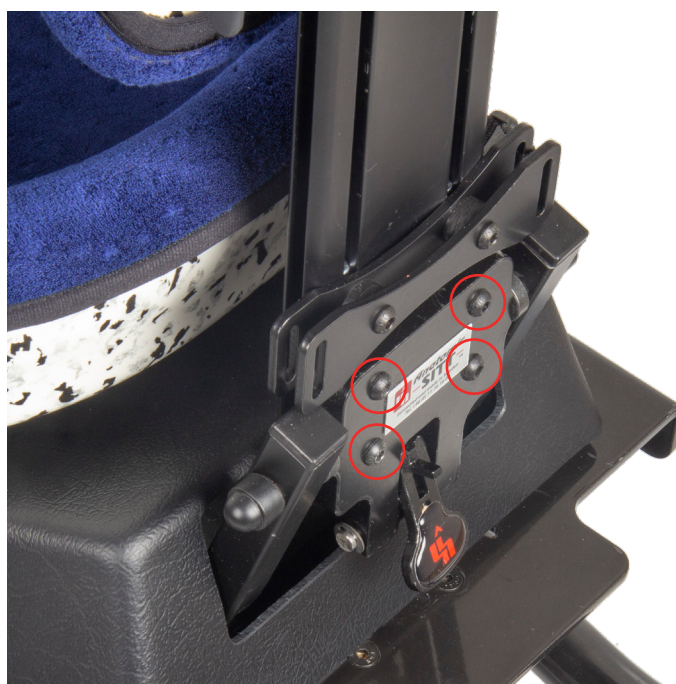

Justering af rygvinkel




Placer først låsehåndtaget i aktivt leje ved at trække håndtaget lige ud og op. For at justere vinklen på ryggen, skub håndtaget nedad og placer det i den ønskede position. Når den ønskede position er opnået, slip håndtaget.



Det er meget vigtigt at håndtaget er børnesikret (placeret nedad, når justering af rygvinklen er fortaget.)




Justering af ryghøjde

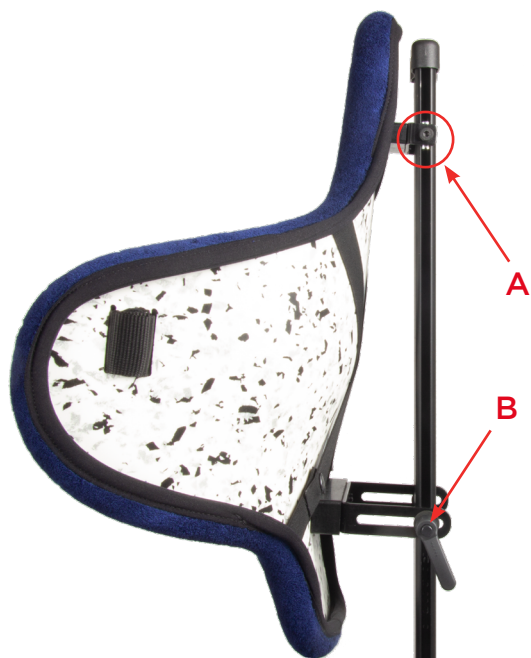

- Løsen unbrakoskruerne A og italienergrebet B, se billedet, på begge sider af rygprofilen.
- Juster til den ønskede højde.
- Placer ryggen, så man udnytter ryggens integrerede lændestøtte
- Spænd skruerne og italienergrebet.

○ = Justeringsnøgle 

Justering af ryg i dybdeled

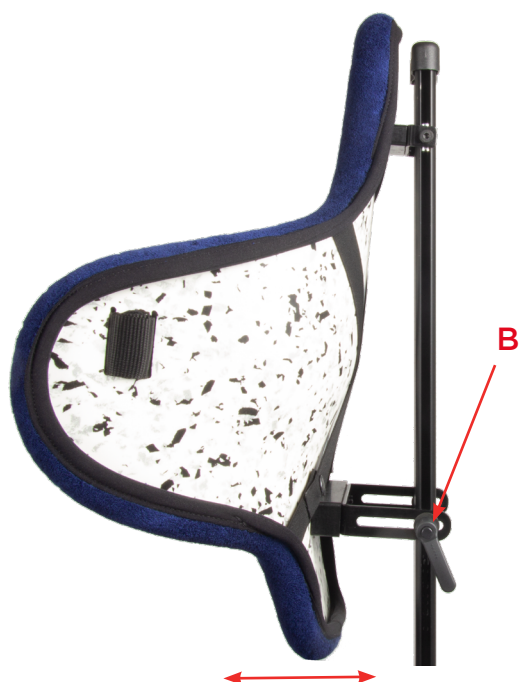

- Løsen italienergrebet B, se billedet på begge sider af rygprofilen
- Juster ryggen i dybdeleddet C til ønskede dybde
- Lås italienergrebet




Justering af siddeposition

Forskydning af sædedelen

Sædedelen har to positionsalternativer: standardmontering (position 1) eller bagerste position (position 2). Forskellen er at sædedelen flyttes 2.5 cm bagud i position 2.

Ændring mellem de to positioner sker ved at de fire skruer løsnes og sædet flyttes til ny position.

Spænd skruerne ordentligt.

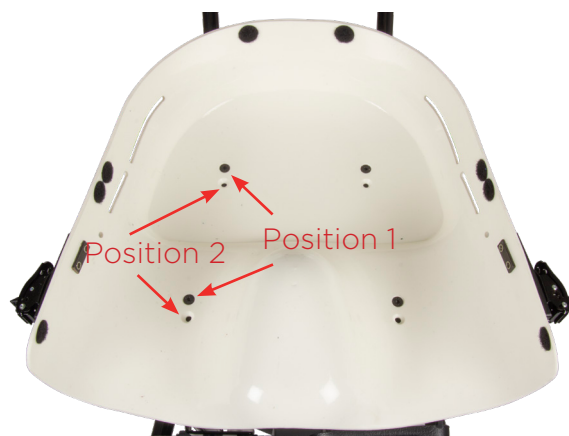

Tilpasning med kantpolstring

Kantpolstringen kan fjernes helt eller delvist, hvis man ønsker mere plads i sædet. Den sidder med velcro og kan derfor enkelt fjernes og efterfølgende genplaceres. Såfremt man ønsker en afkortning af kantpolstringen, kan den enkelt klippes til ønskede længde.

Tilpasning med sædebrøndspude

Sædebrøndspuden kan også fjernes, tilpasses eller erstattes af andet materiale.



Hovedstøtte

A - Montering af hovedstøttebeslag

Først fjernes den integrerede værktøjsnøgle, som sidder højt oppe i rygprofilen.

Skud efterfølgende hovedstøttebeslaget (A) ned til ønskede position i slidsen på rygprofilen. Spænd skruerne!

B - Monter efterfølgende hovedstøtten

Efterfølgende monteres hovedstøttebeslaget (A), juster til ønskede position. Lås italienergrebet (B)!

C - Justering af hovedstøtten

Løsen justeringsskruerne (C) så meget at hovedstøtten kan justeres med hånden til ønsket position, stram efterfølgende skruerne (C).

Såfremt hovedstøtten skal højere op justeres dette ved at løsne italienergrebet (B) og efterfølgende flytte hovedstøtten til ønsket højde. Stram efterfølgende italienergrebet B.



B Italienergreb

A Hovedstøttebeslag, 4 skruer med profilmøtrikker.



Hoftebælte

Justering af hoftebæltesbeslag

For at flytte positionen på hoftebæltebeslaget med slids til rem, løsner du skrue (A) og flytter spændet (B) til ønskede position (se alternative huller bag dækslet). Sæt skruen (A) i og spænd til.

Montering af hoftebælte

Træk hoftebæltets bånd gennem slidsen i sædet (C) og ned gennem spændet (B). Klem bæltet fast i spændet (B).



○ = Umbræconøg! ✓

Justering af antirotationsbæltebeslag

For at flytte positionen på bæltefastgørelsen løsner du skruerne (A) og flytter spænderne (B+D) til ønskede position (se alternative huller). Sæt skruerne i (A) og spænd dem .

Montering af antirotationsbælte

Før begge stropper i bæltet gennem slidsen i sædet (C) og ned gennem spænderne (B) og (D). Spænd bæltet fast i spænderne.



Kropssele



Nedre fastgørelsesbeslag,
indgår 1 stk. som standard

Montering af øvre fæstebeslag - A

Start med at fjerne den integrerede værktøjsnøgle, som sidder højest oppe i rygprofilen og evt. hovedstøttebeslaget. Skub de øverste monteringsbeslag (A) ind på rygprofilens spor og find den rette placering.

Justering af øvre fæstebeslag


Løsen skruerne og indjuster ønskede højde og vinkel. Højden på de øverste monteringsbeslag skal være placeret, så trækretningen er en smule over skulderområdet. Spænd skruerne.

Montering af sele

Træk selens øvre remme gennem sporet og i spændet. Træk herefter selens nedre fæstepunkter ind i det nedre beslag (B). Anvend triglide spændet E.

Justering af trækretning og bredde

Løsen skruerne på det øverste monteringsbeslag og juster til den ønskede højde. Spænd de øverste skruer. Juster vinklen og spænd skruerne

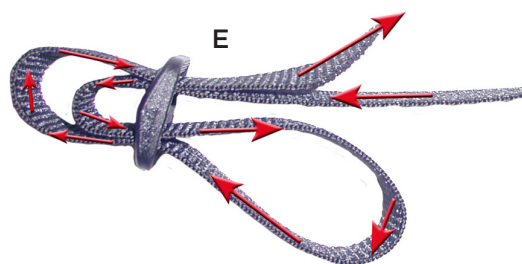

Sørg for, at der er plads nok rundt om halsen. Selen skal anvendes i kombination med et hoftebælte! Tjek at bæltepuderne sidder korrekt. Produktet skal monteres og justeres af relevant kompetent personale.

 = Justeringsnøgle 

Brystbælte

Montering af brystbælte

Montering af båndet til brystselen gøres ved at båndet trækkes gennem kropstøtten, se billedet til højre.



Armstøtte fra ryg

Montering af armlæn fra ryg

Inden montering af armlænet bagfra, skal du først fjerne justeringsnøglen og alle andre dele, der måtte være i vejen. Disse dele kan for eksempel omfatte nakkestøtter, øvre monteringsbeslag og kørebøjle.

Løsen stopskruerne (A), og juster armlænsbeslagene (B) for at få adgang til skruerne (C) på midterbeslaget gennem hullerne. Løsn disse skruer tilstrækkeligt til at kunne skrue profilmøtrikkerne (D) ind i rillerne på bagprofilen. Justér derefter beslaget til passende højde, og spænd skruerne. Sæt armlænsbeslagene i passende bredde, og spænd stopskruerne. Genmonter om nødvendigt de dele, du har fjernet for at kunne montere armlænbeslaget.

Højdejustering


Løsen skruerne (C) let for at justere armlænets højde. Armlænet skal muligvis først justeres i bredden til siderne, hvis de blokerer for huller til højdejustering.

Derefter flyttes armlænet til den ønskede position, og spænd derefter skruerne (C).



Breddejustering

For at ændre bredden på armlænet skal du løsne stopskruerne (A) og derefter flytte armlænet til den ønskede position. Spænd derefter skruerne.

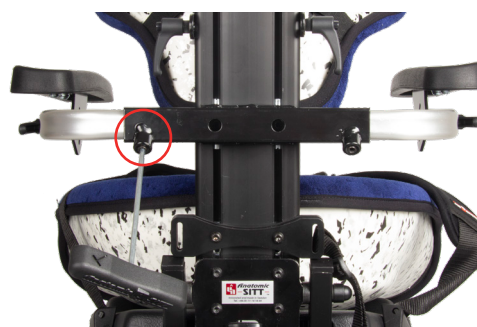



Vinkeljustering opad/nedad

Såfremt du vil justere vinklen på armlænet, løsner du håndtagsknappen (E) og roterer efterfølgende armlænet til ønskede vinkel. Spænd derefter håndtagsknappen (E).



Vinkeljustering lateralt

Såfremt du vil justere pladen lateralt og i vinklen, løsner skruerne (F) og flyt efterfølgende armlænet til ønskede position. spænd efterfølgende skruerne (F).

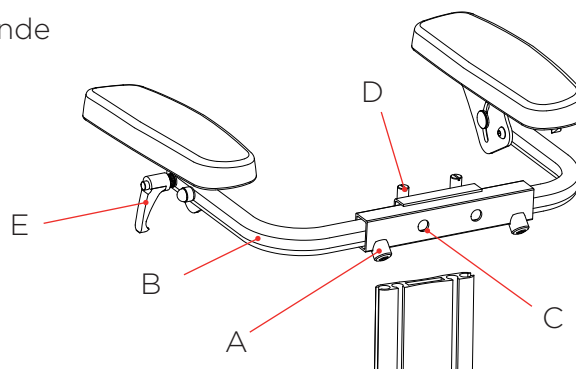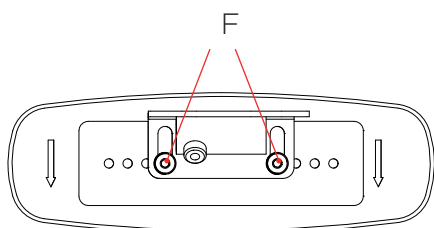

Støttehåndtag

Montering af støttehåndtaget


Monter støttehåndtaget (A) i det midterste beslag (B) (firkantet rør). Lås støttehåndtaget fast med låseskruen (C).

Justering af vinklen på støttehåndtaget

Løsen vredet (D) og juster efterfølgende til ønskede vinkel. Lås vredet, når den ønskede vinkel er nået.



Vigtigt - Efter justering skal takkerne gå i hak med hinanden, så de låser. Stram låsen hårdt.

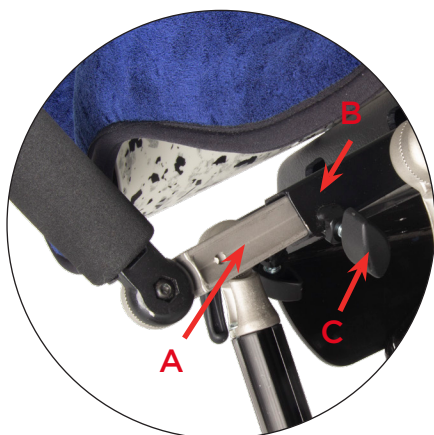

Knæstøtte

Montering af knæstøtten

Knæstøtten monteres ved hjælp af det takkede plastbånd på hver sin side af sædet.

Beslagene til knæstøtten kan placeres højt eller lavt (se billederne nedenfor).

- Montering (lavt) i underdelen sker med fastgjort skrue i eksisterende huller som vist på billede 1.
- Montering (højt) i sædet sker med monteringsæt (korte skruer og plade) i eksisterende huller som vist på billede 2-3.



1. Lav placering af knæstøttebeslaget



2. Høj placering af knæstøttebeslaget



3.



Justering af knæstøtten

Knæstøtten kan spændes med det praktiske spænde, som har indbygget spændearm og frigørelsesknap.



Spændearm




Frigørelsesknap

Støttebord

Montering af bordet


Læg bordet på armlænspladerne og vrid efterfølgende bordets låsearm ind (A) under armlænspladen (B).

Låsearmene skal vrides til de er indenfor kanten på armlænspladen.

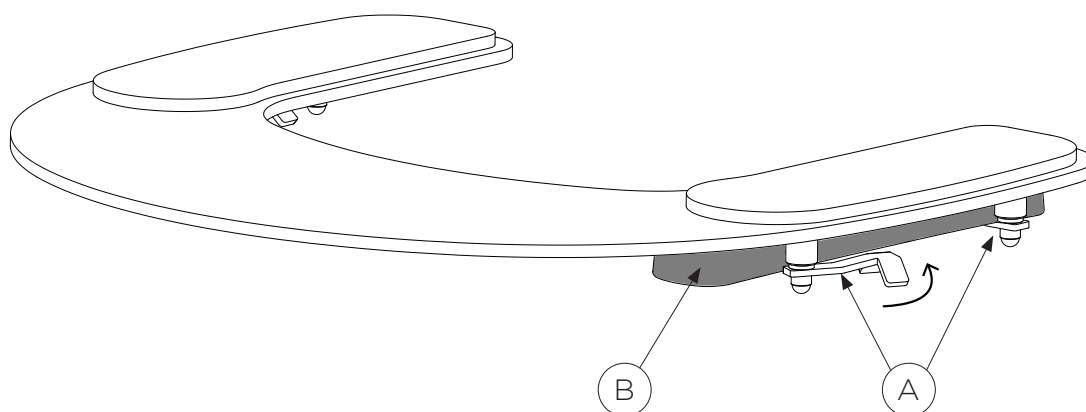

Kørebøjle

- 1) Fjern t-nøglen fra rygprofilen.
- 2) Før profilmøtrikkerne (A) ind i rillerne på rygprofilen og før kørebøjlen til ønskede position.
- 3) Spænd skruerne.

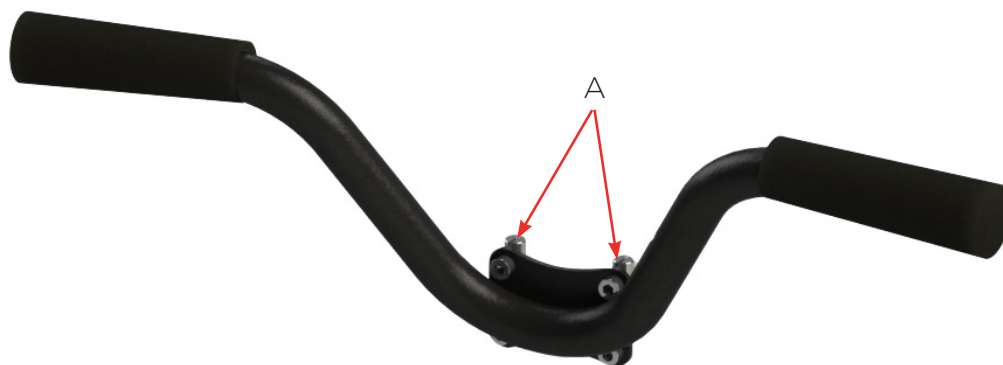

Fodstøtte hel

Montering af fodstøtten

Monter fodstøtten i det firkantede rør (A).
Lås fodstøtten fast med italienergrebet (B).

Justering af vinkel i knæled

Løsen italienergrebet (C) og juster efterfølgende til ønskede vinkel. Lås italienergrebet når ønskede vinkel er opnået.

! **Vigtigt** - Efter justering skal takkerne gå ind i hinanden, så de låser. Stram italienergrebet hårdt!

Højdejustering af fodpladen

Løsen italienergrebet (D) på begge stænger, juster efterfølgende fodpladen til ønskede højde. Stram italienergrebet når ønskede højde er opnået.

Vinkeljustering af fodpladen

Løsen skruen (E) på begge stænger, juster efterfølgende fodpladen til ønskede vinkel. Stram italienergrebet når ønskede vinkel er opnået.



Vigtigt - Efter justering skal takkerne gå ind i hinanden, så de låser



 = Justeringsnøgle 

Delt fodstøtte med Kugleled

Montering af fodstøtten

Monter fodstøtten i det firkantede rør (A)
Lås fodstøtten fast med italienergrebet (B).

Justering af vinkel på knæled

Løsen italienergrebet (C) og juster efterfølgende til ønskede vinkel. Lås italienergrebet, når ønskede vinkel er opnået.



Vigtigt - Efter justering skal takkerne gå ind i hinanden, så de låser. Stram italienergrebet hårdt!

Højdejustering af fodpladen

Løsen italienergrebet (D), juster efterfølgende fodpladen til ønskede højde. spænd skruen når ønskede højde er opnået.

Vinkeljustering af fodpladen

Løsen skruerne (E) til fodpladen og indstil ønskede vinkel. Spænd skruerne igen ordentligt.



Lægstøtte

Montering af lægstøtte

Fjern rørdækslet længst nede og løs en endestoppet. Fjern stoppet og fodpladen fra stangen. Før lægstøttesbeslagets profilmøtrikker ind på ydersiden af resp. side, se billedet nedenfor. Spænd skruerne (A).

Monter lægstøttespladen, se billedet nedenfor med lukkede skrueforbindelser (B).


Eftermonter fodpladen, endestoppet og rørdækslet.

Højde-/dybdejustering af lægstøtten

Løs en skrue (A), juster efterfølgende lægpladen til ønskede højde og dybde. Spænd skruerne (A).

Side-/vinkeljustering af lægstøtten

Løs en lidt på skruerne (B), juster efterfølgende lægpladen sidevers og eventuelt vinkel. Spænd skruerne (B).

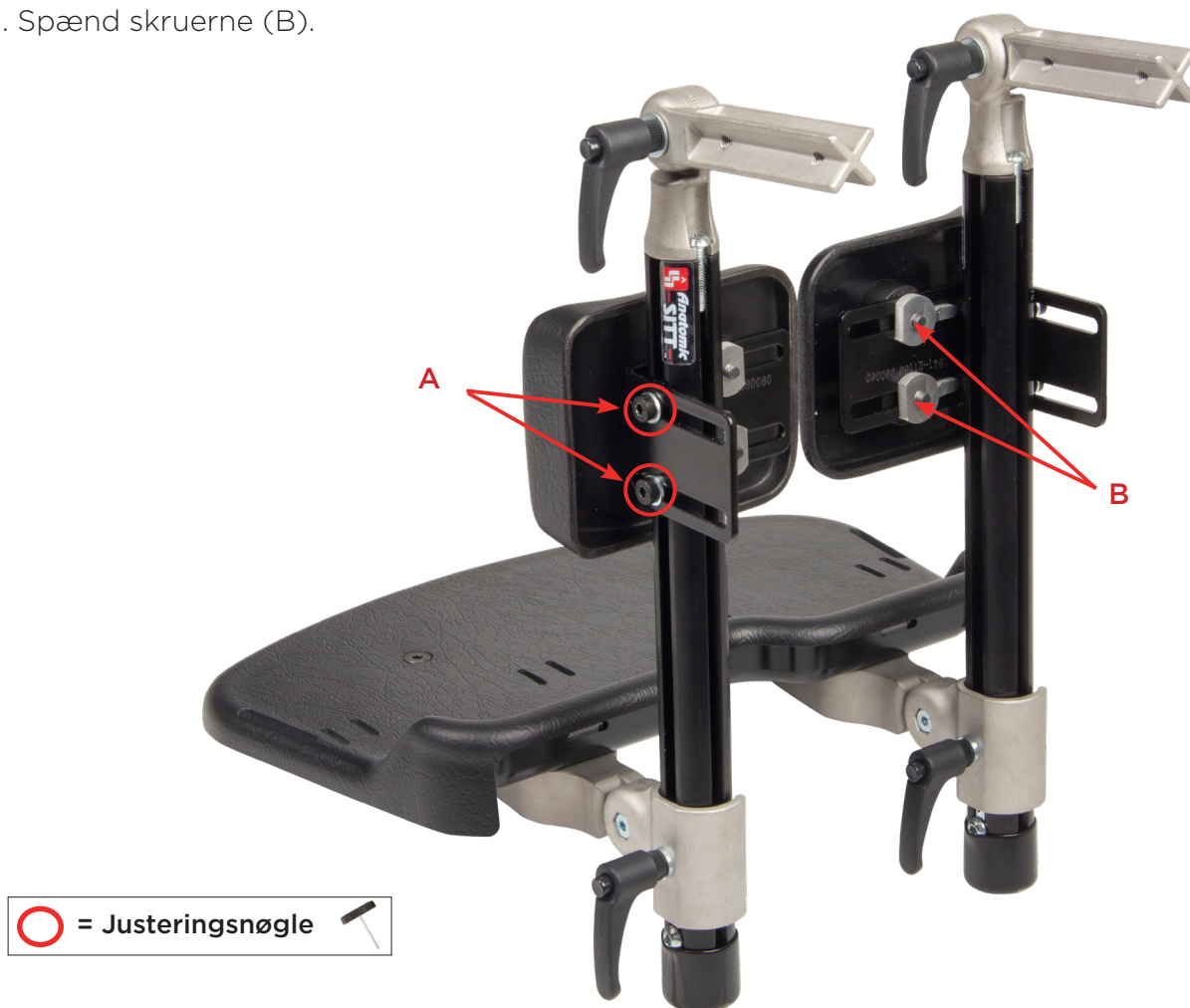

Fodrem

Fodpladen er forberedt til montering af fodrem.

Montering af fodremme på alle fodplader, sker ved at remmen trækkes ned og op gennem to af de passende forborrede huller i fodpladen. Fodremmen kan monteres i de forreste alternativt bagerste huller.



Ankelbæspænding

Fodpladen er forberedt til montering af ankelbæspænding.

Montering af ankelbæspænding på hel justerbar & delt justerbar fodstøtte gøres under den justerbare fodplade.



Kontroller at polstringen ikke er foldet på ankelbæspændingen.


Inde-kørestolsstel Flipper Pro G2



Fast montering


Fast montering indebærer at man fastgør siddesystemet direkte til kørestolsstellet. Montering med denne metode skal ske med medfølgende monteringssæt.

I bunden på siddesystemet findes hul til fast montering på kørestolsstel.

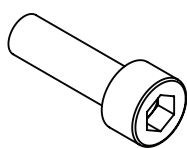


M6 Skrue (A)

4 stk.

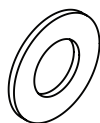

M6 Skive (B)

4 stk.

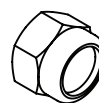

M6 Møtrik (C)

4 stk.



OBS! Anvend aldrig andre skruer end de medfølgende. Hvis andre dimensioner er ønskværdige, kontakt Anatomic SITT A/S.

Montering af adaptersystem


Anvend adaptersystem Universal Small (153042)

Begynd med at montere pladen (A) på kørestolsstellet ved at skrue de medfølgende skruer, afstandsstykker og møtrikker (B) fast.

Monter efterfølgende adapterpladen (C) med skruerne (E) i hullerne på siddesystemets underside. Distanceskiverne (D) skal monteres mellem siddesystemet og adapterpladen.

Når adapterpladens respektive plade er monteret på siddesystem og kørestolsstel kan disse kombineres.

Siddesystemet er korrekt monteret, når en kliklyd høres.

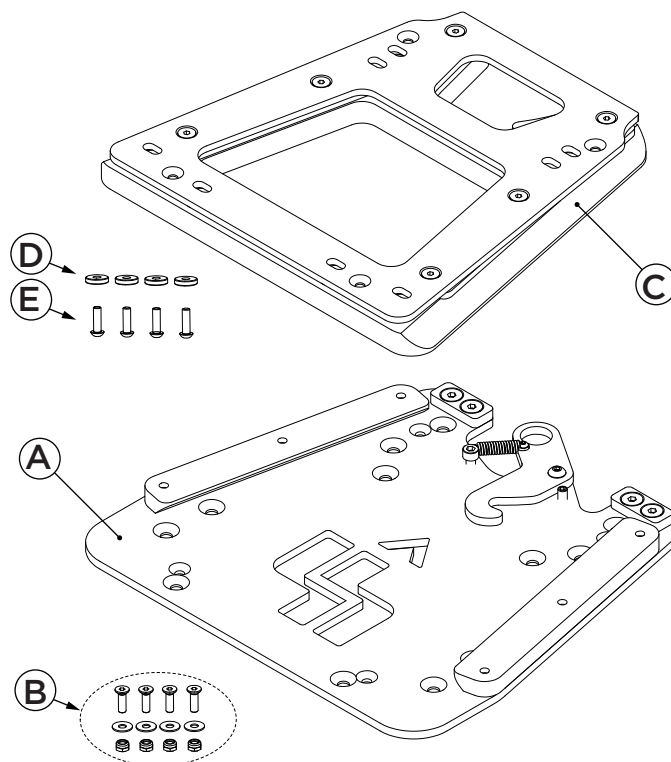



OBS! Kontroller at siddesystemet er korrekt monteret inden brug.



Ved anvendelse af Adaptersystem Universal skal sikkerhedsbåndet på siddesystemets ryg anvendes og fastgøres rundt om kørebøjlen eller tilsvarende på kørestolsstellet.

For håndtering af kørestolsstellet henvises til separat brugervejledning.

Kontorkørestolsstel Seastar

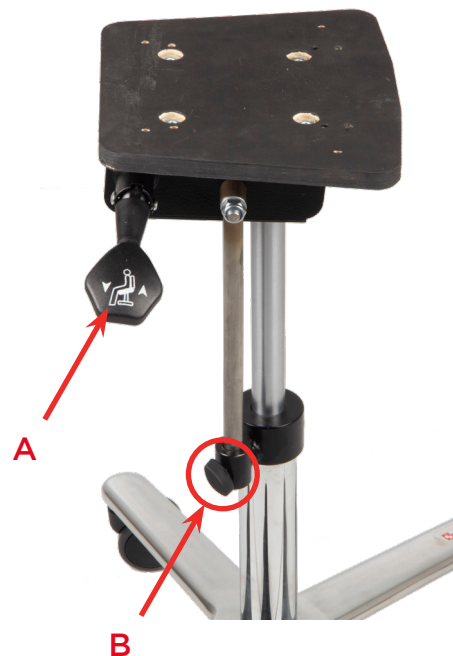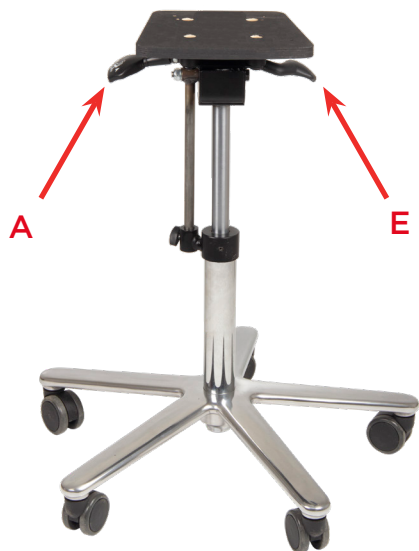

Montering af sædeenheden på kørestolsstellet

Fast montering eller montering med adaptersystem sker på samme måde som på inde-kørestolsstelet Flipper Pro G2 (se foregående opslag).

Højdejustering

Først må man løsne rotationsspæren (B) som forhindrer sædet i at snurre rundt. Højdejustering af sædet sker efterfølgende ved hjælp af palen (A) som holdes nede under justeringen. Lås rotationsspæren (B) efter justeringen.

Tilt

Aktiver palen (E) for at tilte stolen.


Montering af fodstøtte

Løsen foden fra sædestangen uden at beskadige støddæmperen. Skub fodstøtten op på sædestangen og skru hjulet ud (C). Skub sædestangen ned i foden.

Justering af fodstøtten

For **højdejustering** løsne hjulet (C) og fodstøtten kan flyttes op eller ned til ønskede højde, hvorefter hjulet (C) strammes.

For **vinkeljustering** af fodstøtten skrues hjulet (D) ind eller ud for at fodpladen skal komme i ønskede vinkel.

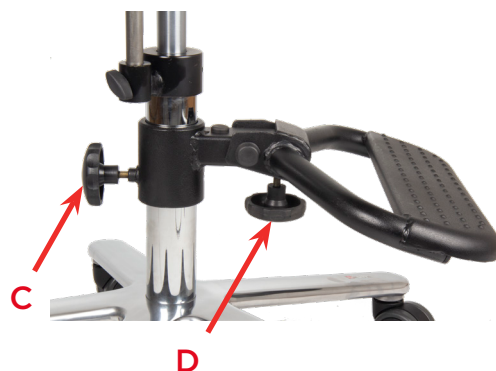

Vedligeholdelsesvejledning

Serviceinterval

For at hjælpemidlet skal fungere korrekt og sikkert bør regelmæssig service og kontrol udføres. Behovet for service skifter og skal bedømmes fra gang til gang afhængig af brug og slid. Kontroller alle bevægelige dele og skruer for slitage. Service skal altid foretages af professionelt og kvalificeret personale. Du er altid velkommen til at kontakte Anatomic SITT A/S.

Rengøring og vask

Plast og metal dele kan tørres af med en fugtig klud, eller vaskes med antibakteriel vaskemiddel eller lignende. Tænk grønt, tænk på miljøet!

Anvend biologisk nedbrydelige vaskemidler.

Puder, betræk og bæltepuder kan vaskes ved 60° skånevask og må ikke tørretumbles men kan tørres i tørreskab. Følg instruktionen på de respektive vaskeanvisninger. Samme regler gælder for positioneringsseler og hoftebælter fra Anatomic SITT A/S.

Kontroller jævnligt hjælpemidlets stand og udfør vedligeholdelse hvis nødvendigt

Gaspatronen skal aktiveres regelmæssigt

Gaspatronen bør bruges regelmæssigt for at bevare sin funktion.

Hvis produktet ikke bruges, skal gaspatronen aktiveres mindst en gang hver 6. måned. Ydermere skal produktet opbevares, så patronerne er placeret nedad ellers kan gaspatronens forsegling brydes og gøre, at den ikke kan udløses.

Værktøj

Værktøjet (4 mm unbrakonøgle) bruges til at lave justeringer med. Den er integreret i toppen af rygprofilen. En løs Umbrakonøgle (T25) medfølger også.

Garanti

Der er to års reklamationsret fra leveringsdatoen i henhold til købeloven. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet udsat for ekstreme påvirkninger eller "unormal" håndtering. For garantibehandling er det nødvendigt, at det fejlbehæftede produkt returneres til os. Vedlæg altid følgesedlen for den oprindelige leverance.

Kombinationer

Zitzi Active og tilbehør er CE-mærkede produkter, som kan kombineres med samtlige af det tilbehør, som beskrives i denne brugsanvisning. Zitzi Active passer bl.a. sammen med kørestolsstellene; Zitzi Flipper Pro G2 og Seastar. For øvrige kombinationer, venligst kontakt Anatomic SITT A/S.

Reservedele

For at Zitzi Active skal beholde sin CE-mærkning skal hjælpemidlet kun forsynes med reservedele leveret af Anatomic SITT A/S.

Renovering

Renovering af hjælpemidlet må kun foretages med originale dele fra Anatomic SITT.



OBS! Kontroller altid ved renovering at hjælpemidlet ikke er specialtilpasset, inden det afleveres til ny borger.

Mærkning

Zitzi Active med tilbehør er et CE-mærket produkt.

Et unikt serienummer er placeret på en etiket, som sidder under sædets betræk. Dette serienummer skal oplyses ved korrespondance vedrørende produktet.

Genbrug

En brugt del eller produkt, skal afmonteres og kasseres. Delene skal herefter sorteres efter materiale type, metal, plast og brændbare stoffer (tekstiler). Gaspartron sorteres som farligt materiale.

Opfølgning og efterkontrol

Opfølgning

Udfør kontinuerligt opfølgning angivet under hvert punkt. Du bør kontrollere nedenstående punkter hver gang brugeren skal anvende hjælpemidlet.

- Kontroller regelmæssigt at alle skruer er ordentligt spændte.
- Kontroller regelmæssigt slitage på stropper og bæltepuder.
- Kontroller at balancering på stellet er korrekt.
- Kontroller indstillinger på tilbehør, så brugeren har en korrekt siddeposition.
- Sæt ikke brugeren i siddesystemet før du hører en kliklyd ved montering af siddesystemet på et stel med adaptersystem og vær sikker på at sædet sidder ordentligt fast på kørestolsstellet.

Tilpasning og specialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang en Active ændres, skal man vurdere, om det er en tilpasning eller en specialtilpasning.

En tilpasning er en ændring indenfor CE-mærkningen. Alle andre ændringer er specialtilpasninger. Tilpasningerne må kun foretages af en person, der anses for at være kvalificeret til opgaven og bør altid ske på en professionel måde. CE-mærket betyder, at produktet opfylder alle de væsentlige europæiske sikkerhedskrav.

Bemærk, at en risikovurdering altid bør foretages efter en tilpasning samt en special tilpasning af medicinsk udstyr. Produktet må aldrig blive farligt for brugeren at anvende efter tilpasning.

Produktet bør mærkes med oplysninger om det er tilpasset til en specifik bruger, så produktet ikke fejlagtigt antages for at være et produkt i standardudførelse.

Tilpasninger som kan foretages på Active

Bemærk, at en risikovurdering altid bør foretages efter en tilpasning samt en special tilpasning af medicinsk udstyr. Produktet må aldrig blive farligt for brugeren at anvende efter tilpasning.

Afkortning af fodstøtteprofiler

Fodstøtteprofilens længde kan afkortes, så den passer bedre til brugeren.

Afkortning af rygprofiler

Rygprofilens længde kan afkortes. Profilen må aldrig blive så kort, at alle rygbeslagene ikke kan monteres.

Betingelser

Garanti

Der er to års reklamationsret fra leveringsdatoen i henhold til købeloven. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet udsat for ekstreme påvirkninger eller "unormal" håndtering. For garantibehandling er det nødvendigt, at det fejlbehæftede produkt returneres til os. Vedlæg altid følgesedlen for den oprindelige leverance.

Reklamation

Beskriv fejlen samt årsagen hertil så nøjagtig som muligt. Oplys om du ønsker reparation eller eventuel udskiftning. Vedlæg kopi af fakturaen og oplys leveringsadresse, kontaktperson samt telefonnummer.

Sørg for, at du pakker produktet godt, så det er beskyttet mod eventuelle stød under transport. Noter shippingnummer på dokumentationen. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Returnering

I tilfælde af fejlbehæftede ordrer eller leverancer, skal produkterne returneres indenfor 20 dage fra levering. Vedlæg altid en kopi af både følgesedlen og fakturaen. Giv din grund til at returnere produkterne.

Sørg for, at du pakker produktet godt så det er beskyttet mod stød under transporten. Noter shippingnummer eller lignende på dine dokumenter. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.



Specialtilpassede produkter tages ikke retur

TEKNISKE DATA - ZITZI ACTIVE


	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3	Størrelse 4
Sædets dybde (cm) (D)	25	30	35	40
Hoftebredde (cm)* (E)	19 / 21	23 / 25	27 / 29	31 / 33
Kropsbredde (cm)** (A)	17	21	24	28
Kropsstøtthøjde (cm) (F)	28 - 33	32 - 40	38 - 44	43 - 50
(Kropsstøttemål gælder uanset hvilken sædedelstørrelse som vælges)				
Ryghøjde (cm) (B)	32	37	42	47
Rygprofil længde (cm)(C)	39	45	53	59
Hoftevinkeljustering	32°	38°	38°	38°

* Aftagelig kantpolstring indgår bagved polstringen for mindre just. ved hofte og bækken


** Kropsbredde flexibel + 3 cm (Med brystbælte også - 3 cm)

Abduktion: Samtlige størrelser 28°

Sædedelens hældning er 15° fremad

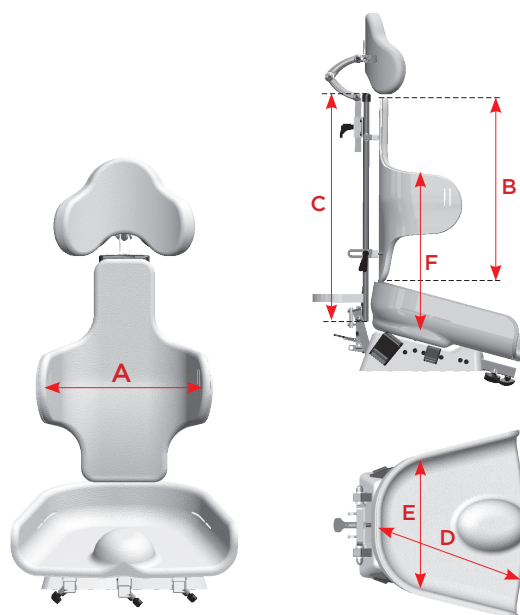


ARMLÆN FRA RYG

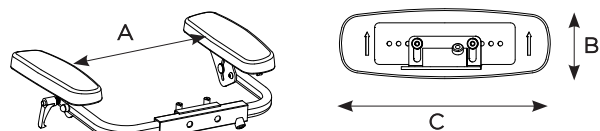


Mål	A	B	C
Str. 1	240 - 340 mm	75 mm	230 mm
Str. 2	280 - 440 mm	75 mm	230 mm
Str. 3	280 - 440 mm	75 mm	330 mm

HOVEDSTØTTE

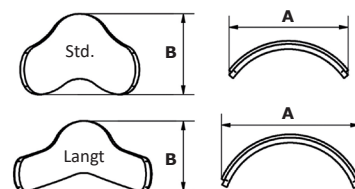

	A	B
Hovedstøtte str. 1	220 x 150 mm	
Hovedstøtte str. 1 lang	280 x 160 mm	
Hovedstøtte str. 2	240 x 190 mm	
Hovedstøtte str. 2 lang	280 x 210 mm	

FODSTØTTE

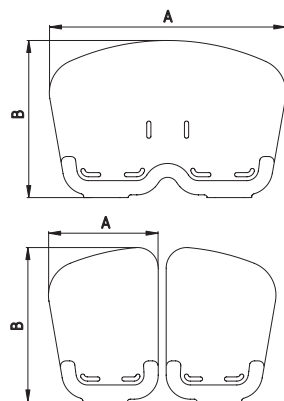


	A x B
Hel str. 0	320 x 260 mm
Hel str. 1	315 x 195 mm
Hel str. 2	345 x 225 mm
Hel str. 3	380 x 260 mm
Hel str. 4	380 x 310 mm
Hel str. 5	430 x 310 mm
Hel str. 6	480 x 310 mm

	A x B
Delt str. 2	160 x 220 mm
Delt str. 3	180 x 255 mm
Delt str. 4	175 x 305 mm


Størrelse	1	2	3	4	5	6
Fodstøttestang profil længde (cm)	25	30	35	35	40	40

STØTTEHÅNDTAG

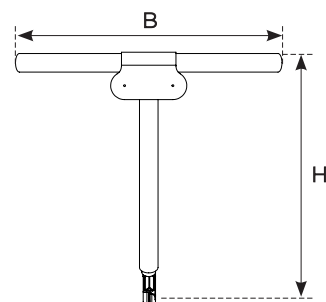



Mål (cm)	B	H
Støttehåndtag str. 1	32	32
Støttehåndtag str. 2	37	37
Støttehåndtag str. 3	42	42
Støttehåndtag str. 4	47	47

STØTTEBORD

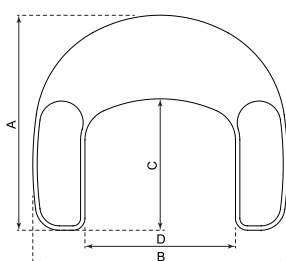

Støttebord	A	B	C	D
Str. 1	380 x 450 x 230 x 260 mm			
Str. 2	430 x 510 x 260 x 300 mm			
Str. 3	490 x 580 x 300 x 340 mm			
Str. 4	540 x 640 x 330 x 380 mm			

KNÆSTØTTE

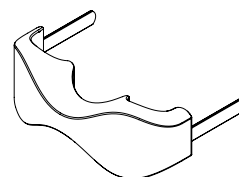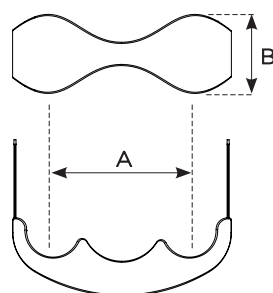

Mål (cm)	A	B
Knæstøtte str. S	27	7
Knæstøtte str. L	30	12

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Tel +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.dk

SE

Anatomic SITT AB (producent)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

