



Nina med Polar Fodbremse 600-201-CE



Modeller:

- Inge
- Knud
- Anne
- Birgit
- Nina
- Sadelstole
- Sadelstole med ryglæn



BRUGER MANUAL

Original

Oprettelses dato: 09-03-2026

Dokument navn: Nina med Polar Fodbremse 600-201-CE

Udarbejdet af: Egholm Stole ApS

Indholdsfortegnelse:

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Introduktion | 2 |
| 2 | Identifikation | 2 |
| 2.1 | Fabrikant information | 2 |
| 2.2 | Identifikation af | 2 |
| 2.3 | CE mærke og Overensstemmelseserklæring..... | 2 |
| 2.3.1 | CE-mærkeplade: | 2 |
| 2.3.2 | EU-Overensstemmelseserklæring..... | 3 |
| 3 | Sikkerhedsinformationer | 4 |
| 3.1 | Sikkerhedsbestemmelser og advarsler | 4 |
| 4 | Beskrivelse af Stolen | 5 |
| 4.1 | Generel beskrivelse af stolen..... | 5 |
| 4.2 | Begrænsninger, | 5 |
| 4.2.1 | Tilsigtet brug | 5 |
| 4.2.2 | Målgruppe | 5 |
| 4.2.3 | Område begrænsninger..... | 5 |
| 4.2.4 | Tidsbegrænsninger | 5 |
| 4.3 | Kontrol før ibrugtagning | 6 |
| 5 | Betjeningsvejledning | 6 |
| 5.1 | Stolens funktioner..... | 6 |
| 5.1.1 | Højdejustering..... | 6 |
| 5.1.2 | Bremsefunktion..... | 6 |
| 6 | Vedligehold og rengøring | 7 |
| 6.1 | Rengøring | 7 |
| 6.1.1 | Hjul..... | 7 |
| 6.1.2 | Stel..... | 7 |
| 6.1.3 | Polsteroverflader | 7 |
| 7 | Reservedele | 7 |
| 7.1 | Kontakt ved bestilling af reservedele | 7 |
| 7.2 | Reservedelsliste | 7 |
| 7.3 | Bestilling af forbrugs- og reservedele | 8 |
| 8 | Ophør af brug | 8 |
| 8.1 | Demontering / Genanvendelse | 8 |

1 Introduktion

Denne brugsanvisning er udarbejdet af Egholm Stole ApS.



Vigtigt!

Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug.

Den bør altid være til rådighed for brugeren og følge stolen

2 Identifikation

2.1 Fabrikant information

| Emne | Beskrivelse |
|-----------------|---------------------|
| Fabrikant | Egholm Stole ApS |
| Adresse: | Lundagervej 100 C |
| Postnummer/ by: | 8722 Hedensted |
| Telefon nr.: | 28257140 |
| E-mail: | salg@egholmstole.dk |

2.2 Identifikation af

| Emne | Beskrivelse |
|----------------|-------------------------------------|
| Navn: | Nina med Polar Fodbremse 600-201-CE |
| Serial nr.: | (xx) xxxxxxxxxxxxxxxx (xx) xxxxxx |
| Produktionsår: | 2026 |

2.3 CE mærke og Overensstemmelseserklæring

2.3.1 CE-mærkeplade:



2.3.2 EU-Overensstemmelseserklæring

EU-Overensstemmelseserklæring

I henhold til **FORORDNING (EU) 2017/745** fra Europa-Parlamentet og Rådet af 5. april 2017

Original

Fabrikant

Egholm Stole ApS
Lundagervej 100 C
8722 Hedensted, Danmark
Tlf.: +45 75893410

Beskrivelse og identifikation af produktet

Produkt: Nina med Polar Fodbremse 600-201-CE

Serienummer UDI-DI (GMN): (xx) xxxxxxxxxxxxxxxx (xx) xxxxxx

Handelsnavn: Nina med Polar Fodbremse 600-201-CE

Risikoklasse: Klasse I

Det erklæres hermed udtrykkeligt, at produktet opfylder alle relevante bestemmelser i følgende forordning:

(EU) 2017/745 Forordning (EU) 2017/745 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 5. april 2017 om medicinske anordninger, der ændrer Direktiv 2001/83/EF, Forordning (EF) nr. 178/2002 og Forordning (EF) nr. 1223/2009 og ophæver Rådets direktiver 90/385/EØF og 93/42/EØF.

Henvisning til anvendte harmoniserede standarder

EN ISO 14971:2019 Medicinske anordninger – Anvendelse af risikostyring for medicinsk udstyr

Henvisning til andre anvendte standarder

DS/EN 1335-1:2020 + A1:2022 Kontormøbler – Kontorstole – Del 1: Mål – Bestemmelse af

Dimensioner

DS/EN 1335-2:2018
Sikkerhedskrav

Kontormøbler – Kontorstole – Del 2:

Hedensted d. 20-04-2026

Diana og Jette Egholm
Direktører

3 Sikkerhedsinformationer



ADVARSEL!

Følg instruktionerne i denne manual til sikker og korrekt anvendelse.

Gem denne manual til senere brug

3.1 Sikkerhedsbestemmelser og advarsler

Liste med relevante advarsler, brugeren skal forholde sig til ved brug af stolen

| Symbol | Forklaring |
|--------|---|
| | Brug aldrig stolen på ujævne overflader, herunder områder med niveauforskelle eller løse tæpper, da dette kan medføre risiko for, at stolen mister stabilitet |
| | Stolen skal altid være bremset, når man sætter sig ned eller rejser sig op fra den |
| | Indstil kun sæde- og rygvinkel, imens brugeren sidder i stolen med fødder i kontakt med gulv |
| | Service, ud over almindelig rengøring, bør altid udføres af en fagperson |
| | Brug kun stolen hvis alle dens funktioner er funktionelle |

4 Beskrivelse af Stolen

Nina med Polar fodbremse har et rigtig godt formstøbt sæde, der er formstøbt så brugeren lettere kan sidde med ret ryg, få benene nedad, samt lettere komme helt ind til køkkenbordet uden at skal vride i ryggen.

Betrækket er Valencia Kunstlæder, som er antibakteriel, rengøringsvenligt og slidstærkt. Det ideelle er at stolen kan låses ved behov, ved tryk på fodpedalen.

4.1 Generel beskrivelse af stolen



4.2 Begrænsninger,

4.2.1 Tilsigtet brug

Bremsestolen er beregnet til brug af personer i eget hjem, som har nedsat evne til at stå op, f.eks. under forberedelse af mad eller andre daglige aktiviteter. Stolen giver mulighed for stabil siddestilling og sikker mobilitet ved behov. Den er også tilegnet personer på arbejdsmarkedet, der har behov for en stabil stol der kan låses.

4.2.2 Målgruppe

Voksne med nedsat stå- og balanceringsevne, der har behov for en stabil stol med integreret bremsefunktion.

4.2.3 Område begrænsninger

bremsestole med fodbremse er IKKE egnet til gulvtæpper. Se i stedet på vores stole med håndbremse.

4.2.4 Tidsbegrænsninger

Garanti periode: 5 år ved maks. brugervægt på 160 kg

4.3 Kontrol før ibrugtagning

Kontroller stolen for mangler eller transportskader før ibrugtagning
 Kontakt leverandøren/Egholm Stole ApS, hvis der observeres mangler eller skader på stolen

5 Betjeningsvejledning

I dette afsnit beskrives hvorledes stolen betjenes på en sikker og korrekt måde.

5.1 Stolens funktioner

5.1.1 Højdejustering

For at sikre en ergonomisk korrekt arbejdsstilling kan du nemt justere stolens siddehøjde.



Følg disse trin:

- Sæt dig på stolen
 Sæt dig roligt på sædet, så gasliften kan reagere korrekt på din vægt.
- Find højdehåndtaget
 Under sædet, i venstre side, sidder et lille håndtag eller en vippearms. Dette håndtag styrer stolens gaslift.
- Hæv stolen
 Rejs dig en smule fra sædet, så der ikke er fuld belastning på stolen. Træk eller vip håndtaget opad.
Stolen vil nu hæve sig, så længe du holder håndtaget aktivt.
- Sænk stolen
 For at sænke højde, forbliv siddende og træk igen håndtaget opad.
Stolen sænker sig gradvist, indtil du slipper håndtaget.

5.1.2 Bremsefunktion

Du kan låse stolen ved behov, ved at træde pedalen fremad.

For at låse op, træder du bagud.

På bremsen sidder der et lille hjul/justeringsskrue der kan justere højden på bremsen. Hvis den er for høj, kan stole vippe lidt når den er låst. Drej på hjulet/skruen for at justere højden.

Stolen kan fås med 2 forskellige typer gascylindere.

Den ene er låst, så sædet ikke drejer. Dette gør stolen meget stabil, og fodbremsen flytter sig ikke. For at dreje stolen, låses der op ved at træde pedalen bagud. Herefter kan hele stolen let dreje.

Den anden mulighed, er en drejbar gascylinder. Den fungerer, så du frit kan dreje på sædet, uanset om stolen er låst eller ej. Ulempen er, at så drejer du også væk fra fodbremsen



6 Vedligehold og rengøring

6.1 Rengøring

Stolen skal altid holdes ren. Især hjulene, for at stolen kører optimalt

6.1.1 Hjul

Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rense for eventuelle trådrester o.l.

Rens hjulbanerne efter behov. Bliver hjulene slidte, kan der købes nye hos Egholm Stole

6.1.2 Stel

Rengøres med lunkent vand evt. tilsat en pH-neutral sæbe.

6.1.3 Polsteroverflader

Betrækket på denne model er som standard kunstlæder.

Stof: Pletter fjernes med en hårdt opvreden klud med vand. Kan støvsuges med blød børste.

Kunstlæder: Rengøres med en hårdt opvreden klud med vand eller mild sæbe. Tåler også 70/30 sprit opløsning

Læder: Rengøres med sæbespån eller læderrrens og derefter vedligeholdes med læderbalsam. Vi henviser til Denwax.com.

7 Reservedele

7.1 Kontakt ved bestilling af reservedele

| Emne | Beskrivelse |
|-----------------|---------------------|
| Fabrikant | Egholm Stole ApS |
| Adresse: | Lundagervej 100 C |
| Postnummer/ by: | 8722 Hedensted |
| Telefon nr.: | 28257140 |
| E-mail: | salg@egholmstole.dk |

7.2 Reservedelsliste

Skulle noget gå i stykker, eller ønskes stolen ændret?

Alle dele på stolen kan udskiftes.

Kontakt os for yderligere info om mulighederne, da de er mange.

| | |
|---------------|--|
| Sæde | Der kan tilkøbes nyt sæde. Vi kan ombetrække det gamle og I kan få en helt anden type sæde på. |
| Mekanisme | Mekanismen under sædet med håndtag, kan skiftes |
| Gascylinder - | Der er 2 typer. Drejbar og ikke drejbar. Begge fås i flere højder Ikke drejbar https://www.egholmstole.dk/produkt/ikke-roterbare-gascylindere/ Drejbar https://www.egholmstole.dk/produkt/gascylindere-til-hoejdejustering/ |
| Fodkryds | Der kan købes ny fodkryds med bremse. |

| | |
|------|---|
| Hjul | Hjulene kan let skiftes. https://www.egholmstole.dk/produkt/hjul-uden-skaerm/ |
|------|---|

7.3 Bestilling af forbrugs- og reservedele

For at sikre en korrekt bestilling af reservedele, skal følgende information, være med på bestillingen.

- Stolens serienummer
- Beskrivelse af reservedelen / reservedelene
- Fakturerings data
- Ønsket leveringstid.

8 Ophør af brug

Inden stolen kasseres, så vær sikker på at der ikke blot skal skiftes en reservedel. Vi kan også ombetrække sæde og ryg. Vi bestræber os på at lave stole der kan bruges i rigtig mange år, Det er bedre at forære stolen til en værdig trængende end at kassere den.

8.1 Demontering / Genanvendelse

Hvis stolen skulle komme i en så dårlig tilstand, at det vurderes, at den skal tages ud af brug, er det vigtigt at den ophugges korrekt i forhold til lokale regler for bortskaffelse/genanvendelse af materialer.

Følgende skal overholdes:

- Adskil stolens genanvendelige dele og aflever dem på et genbrugscenter.
- Sælg stolen til en autoriseret skrothandler.
- Stolen må ikke smides ude i naturen.