


MemoryCube

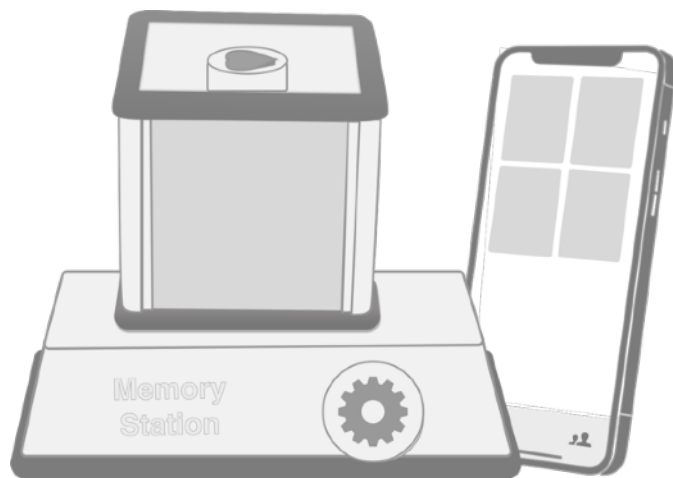

Brugsvejledning

Carity ApS, Version 1.0

Indhold

Specifikationer	3
Sikkerhedsinstruktioner	4
MemoryCube Quickstart	5
Brug af MemoryCube	7
Installer smartphone app	9
Brug af smartphone app	11
Inviter andre brugere	12
Tilføj personlige billeder og videoer	13
Hastighed og varighed	16
Om hjerteknappen	17
Om gearknappen	18
Skift af temabilleder	19
Rengøring	19
Batteriskift	20
Ved spørgsmål	21

Specifikationer

MemoryCube

Strømkilde: 3 stk 1,5V AA batterier

MemoryStation

Strømkilde: USB-C strømforsyning

Fjernsynstilkobling: Micro HDMI (type D)

USB-C strømforsyning

Input: AC 100-240V, 50/60 Hz

Output: DC 5,1V 3A, max 15W

HDMI 2.1 kabel 2,0 m

Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C

Nominelt strømforbrug: 12 W

Samlet vægt: ca 950 g

Placering af serienummermærkater

MemoryCube: Fjern billedet på siden ud for "Sluk" på bunden så kan mærkaten ses gennem ruden

MemoryStation: Mærkaten er placeret på bunden af enheden.

Varemærker: iPhone, IOS, Android, Bluetooth, USB-C, HDMI og andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere

CE-mærkning: Carity Aps erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU overensstemmelseserklæringen findes på følgende internet adresse: <https://memorycube.dk/DoC>

Trådløs kommunikation mellem enheder

Bluetooth 5.0 (BLE)

Maksimal rækkevidde (BLE):

Synslinje ca. 8 m

Trådløs kommunikation med Internet servere

4G mobildatanet

(dataabonnement gennem Carity)

Videosignal til Fjernsyn


HDMI 2.0

MemoryCube appen fås til:

IOS (iPhone) og Android

Yderligere informationer

memorycube.dk

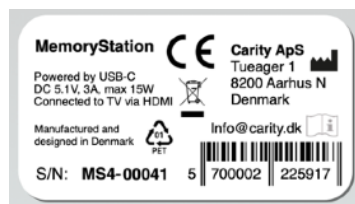



Sikkerhedsinstruktioner

- Undgå kontakt med vand, og placer enhederne så de ikke udsættes for væskesprøjt.
- Undlad at åbne enhederne, da der er følsomme elektriske komponenter indeni. Det er ikke tilladt at åbne og ændre enhederne, da dette kan være forbundet med fare og kan ødelægge tilsluttet udstyr.
- MemoryCube bruger almindelige alkaliske (alcaline) 1,5V AA batterier som skal udskiftes, når de er opbrugte. Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning. De må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet.
- MemoryStation skal tilsluttes den medfølgende USB-C strømforsyning og det medfølgende HDMI kabel. Disse må kun udskiftes med enheder leveret af Carity ApS.
- Kabler, der er beskadigede, må ikke anvendes - hverken HDMI kabler eller strømforsynings-kabler.
- Følg rengøringsanvisningerne undgå kraftige rengøringsmidler, opløsningsmidler eller vand i et omfang der kan trænge ind i enhederne.

MemoryCube Quickstart


Tilslut de medfølgende kabler på bagsiden af MemoryStation.

Den sorte del af etiketten skal helt ind i den hvide kasse.

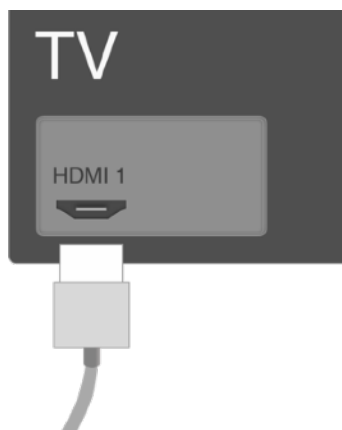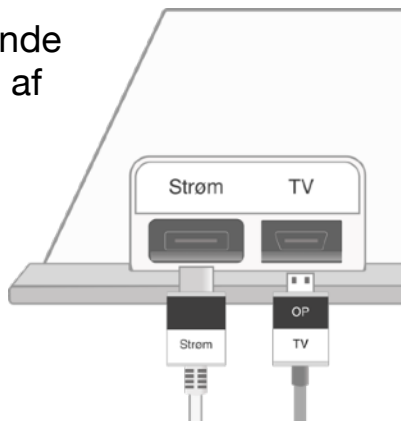


Lokaliser **HDMI1**-indgangen på dit fjernsyn, og tilslut den anden ende af HDMI-kablet fra MemoryStation.

Sæt strømforsyningen til din MemoryStation i stikkontakten.

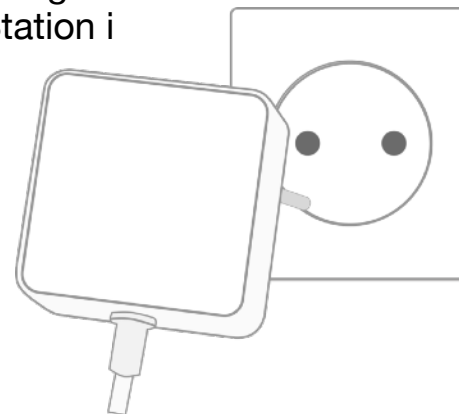


Fjern batteri-fanen på MemoryCube.

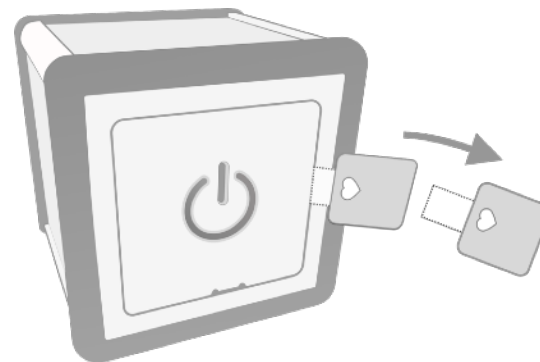

MemoryCube er nu klar til brug efter opstart.


Brug af MemoryCube

Start

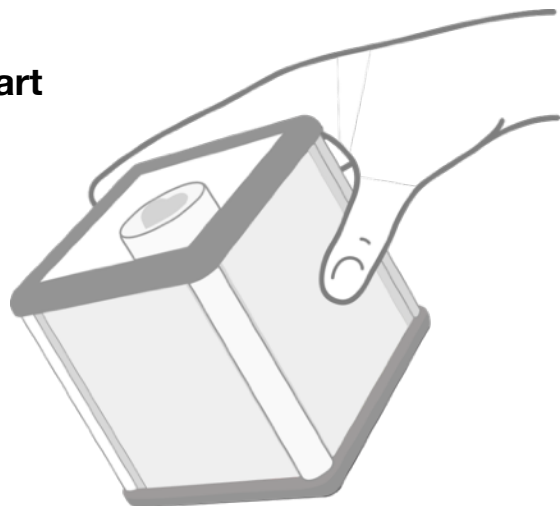

Vend en af de fire temasidebilleder opad for at starte en præsentation af billeder og videoer fra det valgte tema.

Pause

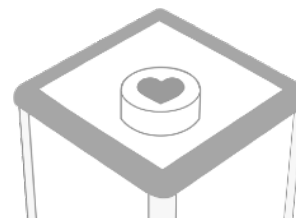

Vend hjerteknappen opad for at pause præsentationen for at snakke om et billede eller en video.


Fortsæt præsentationen ved at vende temabilledet opad igen.

Sluk



Vend bunden med “sluk” ikonet opad for at stoppe præsentationen og slukke for fjernsynet

Installer smartphone app

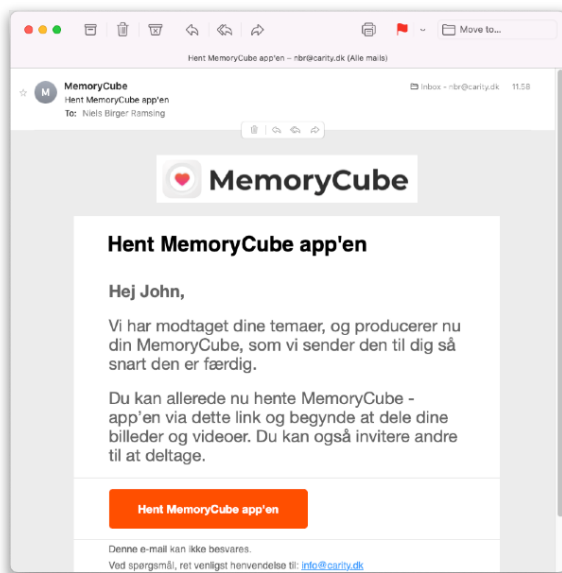

Brug **Hent MemoryCube app'en** knappen i den invitation, der er sendt til din E-mail konto for at installere MemoryCube app på din smartphone.



MemoryCube
Photo & Video


OPEN

The registration screen for the MemoryCube app. It features the MemoryCube logo at the top, followed by the heading 'Opret bruger'. Below this is a form with two input fields: 'E-mailadresse' (containing 'Niels.ramsing@mac.com') and 'Vælg adgangskode' (containing 'Ønsket adgangskode'). At the bottom is a large orange button labeled 'Opret'.

Når du åbner appen første gang skal du oprette dig som bruger og vælge adgangskode.

E-mail adressen skal være den samme som invitationen blev sendt til og kan ikke ændres.

Brug af smartphone app

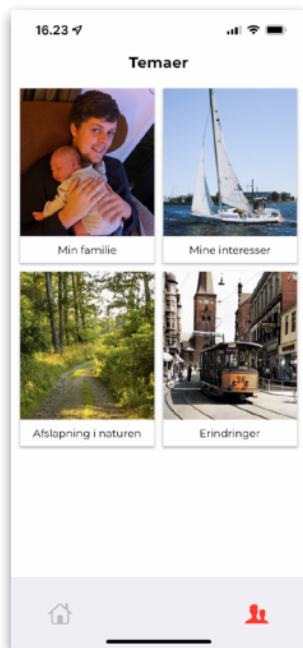

Startsiden viser de fire temabilleder fra din MemoryCube.

Ved at trykke på et af temabillederne kan du se billeder og videoer for temaet.

Inviter andre brugere



Vælg profilindstillinger på startsiden.

Vælg “Inviter og administrer brugere”.

Vælg **Inviter ny** for at sende en invitation.

< **Inviter bruger**

Modtagers e-mailadresse

navn@eksempel.dk

Emne

Du er blevet inviteret til MemoryCube

Personlig besked

Du er blevet inviteret til at deltage i en MemoryCube af Niels Ramsing.

Vi tilføjer følgende til din besked:

“Tryk på nedenstående link for at acceptere invitationen til MemoryCube, så du kan begynde at dele billeder og video. Har du ikke allerede app'en installeret, vil linket viderestille dig til hentning af app'en. Når den er installeret, skal du bruge linket igen, som denne gang åbner app'en og accepterer invitationen.

LINK”


Inviter

Tilføj personlige billeder og videoer

Vælg hvilket tema du vil tilføje materiale til på startside.

På temasiden vises de billeder og videoer der allerede er lagt ind.

Tryk på  for at tilføje billeder og videoer fra dit fotoalbum.

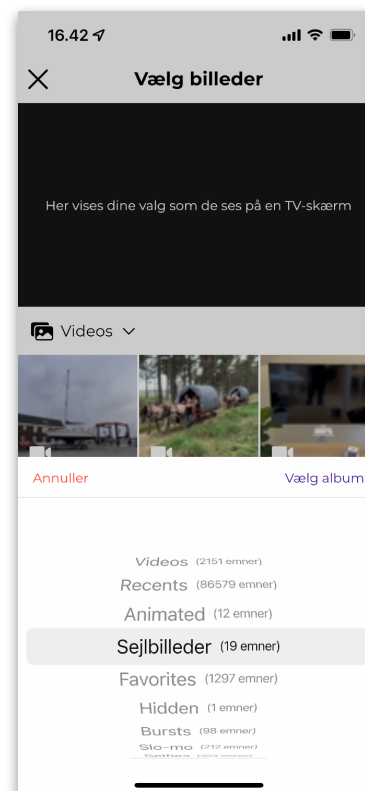

Du kan vælge, hvilket fotoalbum du vil tilføje billeder fra, ved at trykke på





under det sorte felt med teksten "Her vises..."

Vælg det album fra listen, der indeholder de billeder, du vil tilføje, og tryk på **Vælg album**

Vælg de billeder du vil tilføje ved at trykke på dem 

Når du har valgt de billeder, du vil tilføje til din MemoryCube, skal du trykke på **Næste** for at tilføje billedtekst, personer og begivenhed.

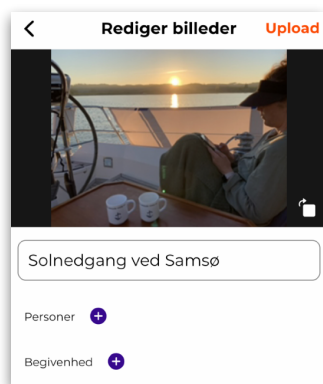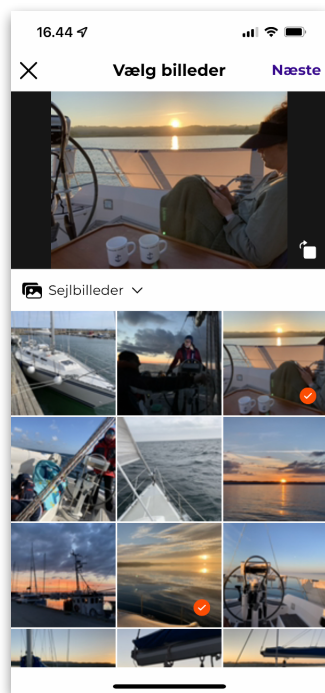


Tryk **Upload** for at sende dine billeder til MemoryCuben.

Hastighed og varighed

For hvert tema kan man indstille hastighed og varighed af præsentationerne. Man kan også bestemme om rækkefølgen af billeder skal være låst eller ændres dynamisk hver gang billederne vises.

Tryk på temaets gearknap for at ændre indstillingerne.

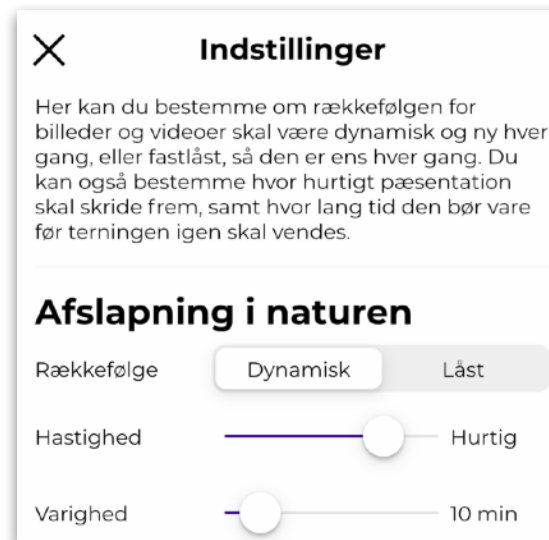

Om hjerteknappen...




Når hjerteknappen vendes opad sættes præsentationen på "Pause", så man kan snakke om det billede man ser.




Ved tryk på hjerteknappen sendes et "hjerter" til den bruger, der har lagt billedet ind i systemet. Når man modtager et hjerte ved man, at billedet er set og påskønnet.



Drej på hjerteknappen for at bladere gennem billeder og videoer i det nuværende tema. Så kan du finde netop det billede, du har lyst til at se og snakke om.

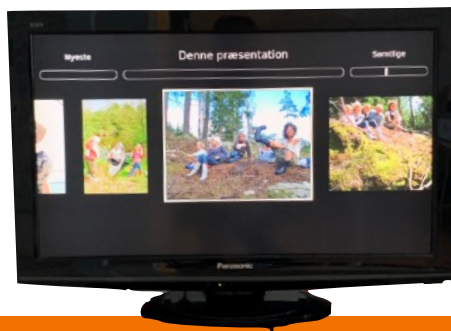


Om gearknappen...

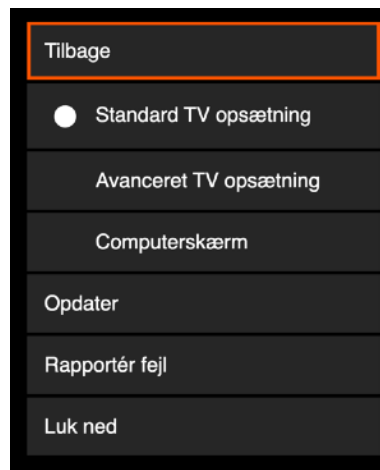

Ved kort tryk på gear-knappen kan man ændre opsætningen af forbindelsen til fjernsynet, opdatere programmet og rapportere fejl.

Man vælger i menu'en ved at dreje gear-knappen og trykke når det ønskede valg er indikeret.

Ved langt tryk på gear-knappen har man mulighed for at slukke eller genstarte. (Tryk på knappen i mindst 3 sekunder)

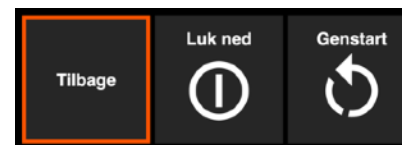

Skift af temabilleder

For at skifte temabilleder fjernes den grå gummikant omkring hjerteknappen.

Derefter kan man trække billederne ud ved at tage fat i den lille tab på midten.

Når ny billeder skal sættes i, vendes en side på Memory-Cube opad, så det tilhørende temabillede vises på fjernsynet. Derefter ved man, hvilket billede, der skal indsættes på den pågældende side.



Rengøring


Ydersiden af enhederne kan rengøres ved aftørring med en blød, tør klud. Er de meget snavsede, kan man bruge en fugtig klud og et fortyndet neutralt rengørings-middel.

Brug **ikke** andre opløsningsmidler end fortyndet husholdningssprit for at undgå skade på plastoverfladerne.

Batteriskift

MemoryCube bruger almindelige 1,5V batterier (type AA alkaline), som skal udskiftes når de er opbrugte.

Batterierne skiftes ved at åbne dækslet med sluk ikonet i bunden.

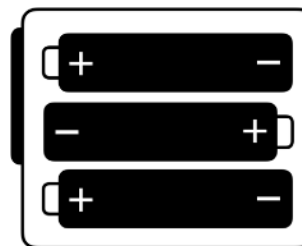

De nye batterier **skal** vende rigtigt - som angivet i bunden af holderen.

De gamle batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning. De må **ikke** bortskaffes med husholdningsaffaldet.



Ved spørgsmål

Det er muligt at finde svar på vores website:

MemoryCube.dk

Den indeholder er en liste med svar på de mest almindelige spørgsmål:

MemoryCube.dk/FAQ

Alternativt kan man kontakte vores support:

E-mail: info@carity.dk

Telefon: **+45 2729 3927**

Vores adresse er:



Carity ApS
Tueager 1
DK-8200 Aarhus N
Denmark

For yderligere informationer se:

www.memorycube.dk

Ved spørgsmål skriv til

info@carity.dk



Tueager 1
DK-8200 Aarhus N
Mobile: +45 2729 3927
E-mail: info@carity.dk
Web: www.carity.dk