




Everest Massagestol

Brugervejledning

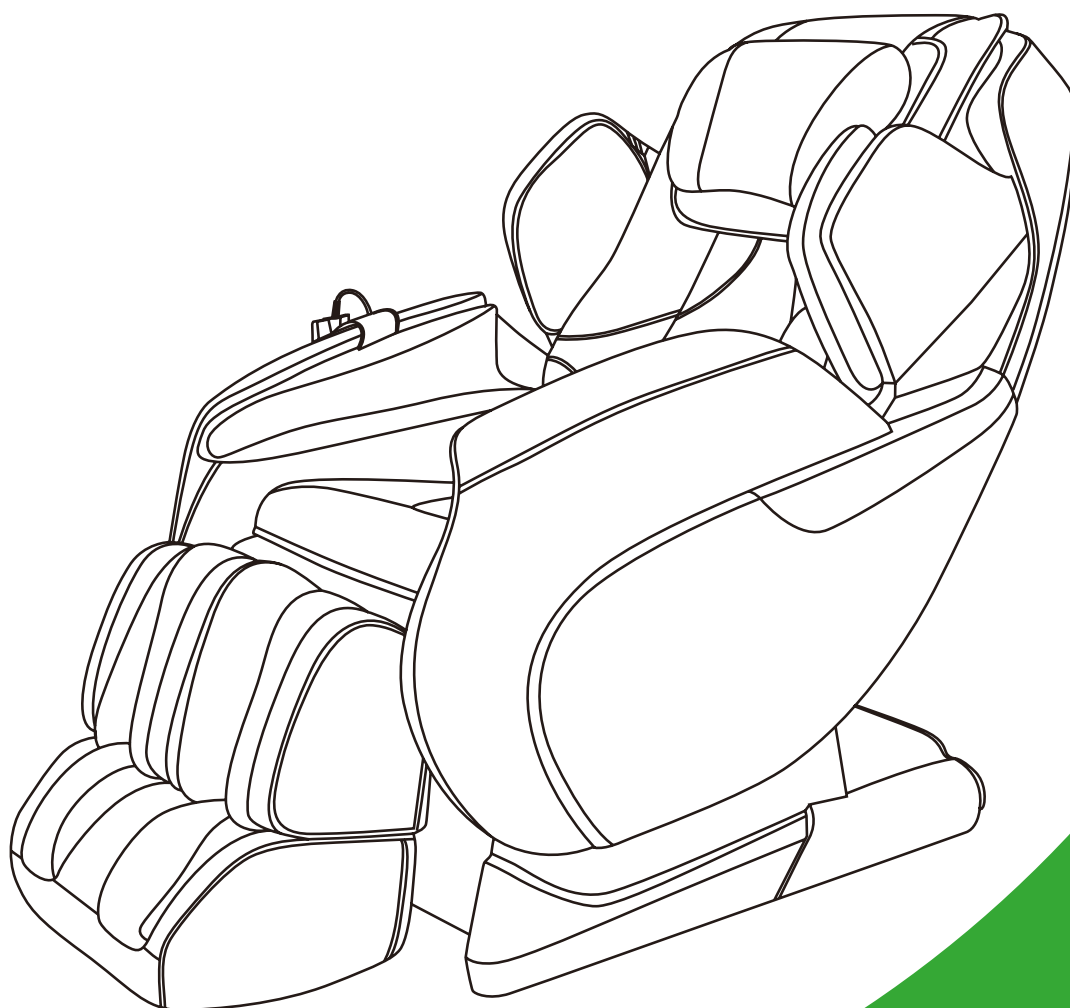

Tak fordi du købte dette produkt. Læs venligst denne brugsanvisning nøje for at vide, hvordan man bruger dette produkt korrekt før operationen. Vær venligst opmærksom på de vigtige sikkerhedsadvarsler. Behold denne manual til fremtidig brug.

INDHOLD

Sikkerhed og vedligeholdelse	side 4
Delens navne og funktioner	side 6
Funktioner	side 7
Brugsanvisning	side 8

Sikkerhed og vedligeholdelse

1. Sikkerhedsadvarsel

- Tillad ikke at børn må røre bevægelige dele af dette produkt.
- Anvend venligst jordforbundet strømforsyning passende til dette produkt.
- Udtræk venligst stikkontakten efter brug og før rengøring for at sikre mod beskadigelse af produktet.
- Anvend venligst dette produkt som angivet i denne vejledning.
- Anvend ikke tilbehør, som ikke er anbefalet.
- Anvend ikke dette produkt udendørs.
- Læs venligst denne brugsvejledning omhyggeligt før anvendelse af produktet.
- Anvend ikke produktet på andre måder end angivet i denne vejledning.
- Anvendelse af produktet i 20 minutter per gang er anbefalet.
- Anvend ikke produktet hvis læderet er ødelagt eller beskadiget.
- Anvend ikke produktet hvis betrækket eller læderet er beskadiget.
- Anvend ikke hvis åbningen til varmelegemet er tildækket eller blokeret.
- Tab ikke noget over dette produkt.
- Fald ikke i søvn under anvendelse af dette produkt.
- Anvend ikke dette produkt i beruset tilstand eller ved følelse af ubehag.
- Anvend ikke dette produkt inden for en time efter indtagelse af et måltid.
- Anvend ikke massagefunktionen i for høj hastighed for at undgå skader.

2. Anvendelsesomgivelser

- Anvend ikke produktet i rum med høje temperaturer og fugt så som på et badeværelse.
- Anvend ikke produktet mens rummets temperatur ændres drastisk.
- Anvend ikke produktet i svært støvet eller kaustisk miljø.
- Anvend ikke på steder hvor der ikke er plads nok eller tilstrækkelig ventilation.

3. Personer, som ikke bør anvende dette produkt

- Personer, der lider af knogleskørhed, bør ikke anvende dette produkt.
- Personer, der lider af hjertesygdomme eller bærer elektronisk medicinsk udstyr såsom en hjertepacemaker, bør ikke anvende dette produkt.
- Personer, der lider af feber, bør ikke anvende dette produkt.
- Gravide kvinder eller kvinder, der har menstruation, bør ikke anvende dette produkt.
- Personer, der er skadet eller har en hudsygdom, bør ikke anvende dette produkt.
- Børn under 14 år eller mentalt ustabile personer bør ikke anvende produktet uden at være ledsaget.
- Personer, der har fået instruktioner af deres læge til at slappe af, og personer, der føler ubehag, bør ikke anvende dette produkt.
- Anvend ikke dette produkt hvis din krop er våd eller fugtig.
- Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, der er intolerante over for varme, bør anvende produktet med forsigtighed.

4. Sikkerhed

- Kontroller at spændingen er egnet til dette produkt i forhold til specifikationer.
- Træk ikke stikket ud, hvis din hånd er våd.
- Undgå at der trænger vand ind i dette produkt for at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af dette produkt.

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Beskadig ikke kablerne og lav ikke ændringer i produktets cyklus.
- Anvend ikke en våd klud til at rengøre elektriske dele såsom kontakten og stikket.
- Hold afstand til produktet i tilfælde af strømafbrydelse for at undgå skader, hvis strømmen kommer pludseligt tilbage.
- Stop brug af dette produkt, hvis det ikke virker som normalt. Henvend dig venligst omgående til den lokale udbyder.
- Stop brug af dette produkt, hvis du føler ubehag. Henvend dig venligst til lægen.
- Det er ikke hensigten, at dette apparat skal bruges af personer (børn inkluderede) med reducerede fysiske, sanselige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden om produktet. Disse personer bør kun anvende produktet, hvis de er under opsyn eller vejledt i brug af produktet af en person, der kan tage vare for deres sikkerhed.
- Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med dette produkt.
- Hvis strømforsyningen er beskadiget, skal den erstattes af leverandøren, service udbyderen eller lignende autoriserede personer for at undgå en faresituation.



5. Vedligeholdelse

- Dette produkt bør vedligeholdes af autoriserede, udstyrede personer. Brugere frarådes at skille produktet ad eller vedligeholde det selv.
- Afbryd venligst strømmen til produktet efter brug.
- Anvend ikke dette produkt, hvis kontakten har løsnet sig.
- Hvis produktet ikke skal anvendes i lang tid, så rul kablerne sammen og bevar produktet i et miljø, der er tørt og ikke støvet.
- Opbevar ikke dette produkt under høje temperaturer eller nær et ildsted og undgå længerevarende direkte sollys.
- Hvis den aftagelige strømforsyning er beskadiget, skal den erstattes af leverandøren, service udbyderen eller lignende autoriserede personer for at undgå en faresituation.
- Rengør produktet med en tør klud. Anvend hverken fortyndingsmiddel, benzen eller alkohol på produktet.
- De mekaniske dele af dette produkt er designet og produceret til dette produkt og bør ikke nødvendigvis vedligeholdes.
- Anvend ikke skarpe dele til at skubbe dette produkt.
- Hverken rul eller træk produktet på en ujævn overflade. Det skal løftes før det bliver flyttet.
- Anvend produktet med mellemrum. Dette produkt bør ikke være i anvendelse uafbrudt i længere tid.

6. Løsning af normale funktionsfejl

- Naturlige bevægelseslyde vil lyde fra motoren, når produktet er i brug.
- Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, tjek strømforsyningen og kontakten for, om de er forbundet. Tjek at kontakten er tændt.
- Hvis den fastsatte operationstid for programmet er slut, slukker produktet automatisk. Hvis produktet har været i anvendelse i lang tid, vil det varmebeskyttende legeme automatisk aktivere sluk-funktionen. Produktet bør kunne anvendes efter en halv times pause.

Delens navne og funktioner

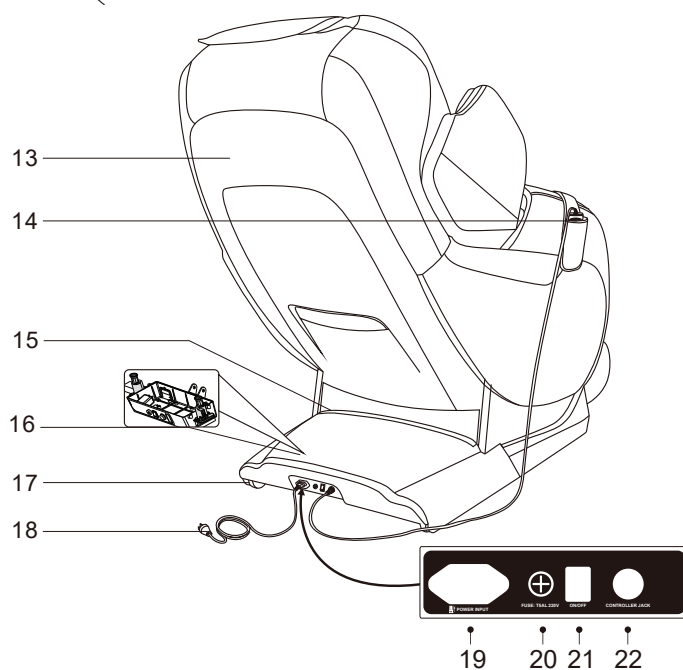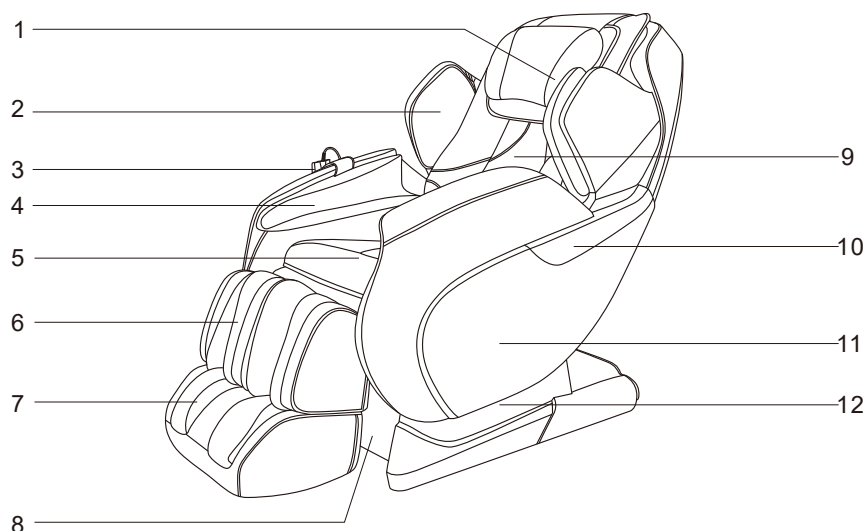

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Pude | 12. Sideplade |
| 2. Overarm luftpose dele | 13. Bagplade |
| 3. Lomme til manuel fjernbetjening | 14. Manuel fjernbetjening |
| 4. Arm luftpose dele | 15. Låg til styrekasse |
| 5. Sædepude | 16. Sikkerhedsknap |
| 6. Benstøtte ramme | 17. Base styrehjul |
| 7. Fodstøtte ramme | 18. Strømkabel og strømstik |
| 8. Forseglingsplade | 19. Strøm kontaktindgang |
| 9. Rygstøttepude | 20. Sikring |
| 10. Armlænsdekoration | 21. Tænd/sluk knap |
| 11. Armlæn | 22. Kontaktindgang til fjernbetjening |

Funktioner

Funktioner:

- Produktet er designet med vertikalt bevægende, lydløse, firhjulstruktet intelligentmassage hænder.
- Produktet er designet med efterlignende massagemetoder som shiatsu, æltning, klapning, banken og samtidig æltning og klapning.
- Produktet er installeret med automatisk registrering og lokalisering af brugerens skuldre.
- Produktet har installerede karakteriserede automassagefunktioner: smerteforbedring, komfort, let, hurtigt forbedrende massageoplevelse, overkrop, underkrop, seks automatiske funktioner.
- Produktet er installeret med hukommelsesfunktioner: M1 og M2
- Manuel massage af overkroppen med tre muligheder: fast, delvist og overordnet massage med fem hastighedsniveauer. Ved brug af klapning, shiatsu og bankning er vidden mellem de to massagekugler justerbar på tre niveauer: vid, mellem og smal. Ved brug af fast eller delvis funktionerne, kan massagehænderne justeres op og ned til det punkt, der skal masseres.
- Lufttryksmassagefunktionen har tre muligheder: hele kroppen, arme (overarm-delen installeret med fire luftposer, arm-delen installeret med otte luftposer), ben installeret med 16 luftposer. Tre intensitetsniveauer.
- Benstøtten er installeret med rullemassagefunktion under foden, to roterende massagebuler ved tæerne og massagetoppe ved hæl og svang.
- Rygvarme funktion: kulfilter fjerninfrarød varmelegeme.
- Højre armlæn er udstyret med en USB-oplader og ligge-funktion.
- Fodstøtten er installeret med et dobbelttrin til at passe brugernes forskellige højder.
- Ryglænets ramme er installeret, så den afviger fra væggen, men anvender minimal plads for at opnå maksimal pladsbesparelse.
- Benhøjde justerbar, ryglæn justerbar og automatisk ligge-funktion.
- L formet ryglinje passer kroppens kurver og indebærer nul-tyngde når ryglænet ligger ned.

Brugsanvisning



De specifikke skærbilleder referer til egentlige objekter til dette produkt

Brugsanvisning


1. Tænd for strømkontakten.



2. Begynd massage:

- 1) Tryk på Tænd-knappen og massagestolen læner sig automatisk tilbage og begynder massage.
- 2) Automatisk registrering af skulder og massage af akutryk punkt lokalisering, venter på færdiggørelse af test.
- 3) Hvis der er en difference i massagekuglerne og skulderens faktiske position, kan du justere dem ved hjælp af op- og ned-knapperne til den ønskede position. Skulderpositionen har 10 justerbare niveauer. Stolen begynder automatisk massage, hvis skulderpositionen ikke justeres inden for 10 sekunder.

Knap	Beskrivelse	Skærm
	Juster massagekuglerne opad til passende position	
	Juster massagekuglerne nedad til passende position	

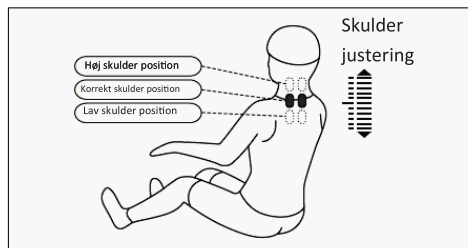

- 4) Vælg massage funktion til at starte massage. Hukommelsesmassage funktion: Hold knappen til overkrop "Upper body/M1" eller underkrop "Lower body/M2" inde i tre sekunder, og herefter indtast hukommelsesmassage funktion "M1" eller "M2". Den vil vende tilbage til

Funktion	Knap	Skærm
Hukommelse massage		Memory
		Memory

Brugsanvisning

- Karakteriseret automassage

Funktion	Knap	Beskrivelse	Skærm
Karakteriseret auto-massage		Dybdegående massage på akutryk punkter, lindrer effektivt smerten	Auto F1
		Løser kroppens fysik	Auto F2
		Fremmer blodcirkulation	Auto F3
		Lynstart alle massageeffekter (hold inde i to sekunder og tryk herefter på hastighedsknappen)	Auto F0
		Massage af overkroppen	Auto F4
		Massage af underkroppen	Auto F5

- Overkrop manuel massage og underkrop manuel massage
 - 1) Overkrop manuel massage

Funktion	Knap	Beskrivelse	Skærm
Teknik		Hastighed og vidde	
		Hastighed	
		Hastighed og vidde	
		Hastighed	
		Hastighed og vidde	
Hastighed		Hastighedsjustering i tre niveauer	 Hastighed
Vidde		Viddejustering i tre niveauer	 Vidde

Brugsanvisning

Funktion	Knap	Beskrivelse	Skærm
Ryg- stykke		Fast position (fast punkt) massage frem og tilbage	 H0
		Mindre område (delvist) massage frem og tilbage	 H1
		Overordnet massage frem og tilbage	 H2
		Overkrop massage frem og tilbage	 H3
		Underkrop massage frem og tilbage	 H4
		Justering af massagepunkt (ved fast og delvis position kan du justere position af massagepunkt)	Massagehånd flyt opad
			Massagehånd flyt nedad

- Lufttryks massage funktion

Funktion	Knap	Beskrivelse	Skærm
Lufttryks-tilstand		Tre lufttryk niveauer (krop, arme og ben)	Arme  Ben 
Intensitet		Tre justerbare niveauer	Arme  Ben 

- Andre manuelle funktioner

Funktion	Knap	Beskrivelse	Skærm
Rulle		Rulle til sål: rulle knap med tre hastighedsniveauer	
Varme		Fjerninfrarød rygvarme: føles varm tre minutter efter funktionen er igangsat	

Funktion	Knap	Beskrivelse
Læg løft og slip		Lægstøtte løft knap. Tryk på knappen og lægstøtten løftes langsomt og stopper, når knappen slippes
		Lægstøtte fald knap. Tryk på knappen og lægstøtten falder langsomt og stopper, når knappen slippes
Rygstøtte løft og slip		Rygstøtte løft knap: Tryk på knappen og rygstøtten løftes langsomt og stopper, når knappen slippes
		Rygstøtte fald knap: Tryk på knappen og rygstøtten falder langsomt og stopper, når knappen slippes
Auto ligge-tilstand		Tre niveauer af cirkulations funktion. Når knappen trykkes skiftes der til automatisk ligge-tilstand.

Brugsanvisning

4. Sluk produktet og stop massage

- 1) Tryk på tænd/sluk knappen undermassageprocessen og alle massagefunktioner stopper omgående. Rygstøtten og fodstøtten returnerer automatisk til originalposition. Imens kan du installere hukommelsesfunktionen. Efter estimeret funktions-tid vil alle massage funktioner afsluttes, og du kan i mellemtiden installere hukommelsesfunktionen. Dog vil rygstøtten og fodstøtten ikke returnere automatisk til originalposition.
- 2) Hukommelsesfunktion: Efter estimeret funktions-tid eller at apparatet bliver slukket, vil skærmen på fjernbetjeningen blinkende vise "Memory" for at minde brugerne om at de kan gemme massageindstillingerne før apparatet slukkes. Tryk på hukommelsesknapperne "M1" eller "M2" i henhold til, hvor du vil gemme dine indstillinger.
- 3) Slå strømmen fra hele produktet ved at tage stikkontakten ud:




Illustration af strømkontaktens position



Tag stikkontakten ud



ADVARSEL

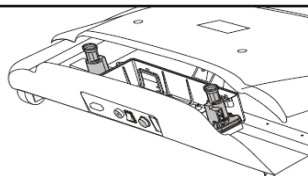


Installeret med sikkerhedskontakt i strømkassen, så hvis der er stort pres på strømkassen, vil autoophøret af ligge-tilstanden forhindre at brugerne bliver skadet, når massagen er i gang.

Brugsanvisning

10. Flytteanvisning

Tjek at alle kabler er langt fra gulvet, og tilt herefter rygstøtten bagover til en hvis grad (støt på hjulene). Skub stolen forlæns eller baglæns med håndkraft. Sæt herefter stolen langsomt og skånsomt ned, så den står som normalt.

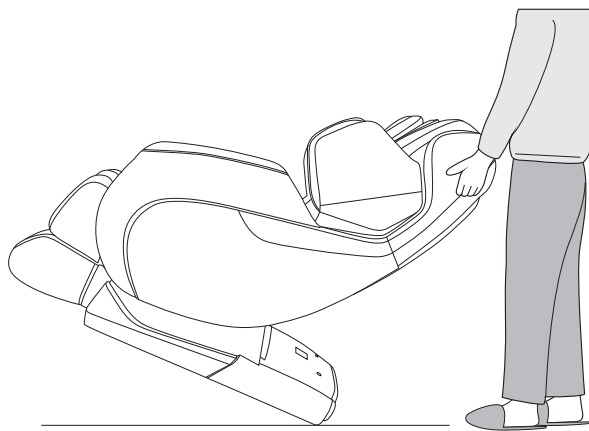

Note: Når stolen skal flyttes, bør du først slukke stikkontakten og trække strømstikket og fjernbetjeningskablet ud.

Produktspecifikationer

Model: 8148260
 Navn: Massagestol
 Nominel spænding: 220 - 240V~ 50Hz/60Hz
 Nominel strømindgang: 150W
 Estimeret tid: 20 minutter
 Sikkerhedsstruktur: Klasse I

Materialer: PVC, PA, ståldele, elektriske og elektroniske dele

Materiale	PU	Læder	Stof	Træ



Kontakt os

Carelax Danmark ApS
Herstedvang 7A
2620 Albertslund

CVR: 38219499

Tlf.: +45 30 554 554
info@carelaxdanmark.dk
www.carelaxdanmark.dk