

Walk Safe®

by NRS Healthcare

Brugervejledning

S58115 Walk Safe® Medium
S58139 Walk Safe® Stor



**Sørg for at læse denne obligatoriske vejledning før brug.
Opbevar vejledningen et sikkert sted til senere brug.**

Patenteret i Storbritannien: GB2613198 | Patenteret i Kina: ZL202122982123.8
International patentpublikation: WO/2023/094832 | Patentanmeldt i Australien: AU2022395923
Patentanmeldt i Canada: CA3239048 | Patentanmeldt i USA: US18712590



Scan denne QR-kode for supplerende klinisk vejledning om,
hvordan man indstiller og anvender Walk Safe®

Tilsigtet brug

Walk Safe[®] giver støtte til at stå og gå til brugere med reduceret bevægelighed, der kan lægge vægt på både arme og ben. Den hjælper også brugeren med at sætte sig eller rejse sig fra siddende stilling. Kun til indendørs brug.

Symboler

Symboler anvendt på produktet og i denne vejledning.



Producent



Batchnummer



Se brugsanvisningen



Vare-/
katalognummer



Sørg for at læse
og følge disse
instruktioner nøje



Genbrugssymbol



Maksimal
brugervægt



Advarsel



Medicinsk udstyr



CE-mærkning



Unik udstyrs-
identifikationskode



Autoriseret
repræsentant i EU

Sikkerhed



- Hvis du er i tvivl om, hvordan man skal bruge Walk Safe®, eller hvis du føler dig usikker eller utilpas, mens du bruger Walk Safe®, skal du straks stoppe med at bruge Walk Safe® og konsultere sundhedsfagligt personale.




- Kun til indendørs brug
 - Må IKKE bruges, hvis du ikke kan lægge vægt på både arme og ben.
 - Må IKKE bruges på glatte eller våde gulve.
 - Må IKKE bruges på ujævne gulve.
 - Må IKKE bruges til at gå op ad trapper.
- Overskrid IKKE den maksimale brugervægt på 230 kg.
- Hvis Walk Safe® bliver beskadiget eller udvikler en fejl, skal du straks stoppe med at bruge Walk Safe® og kontakte din leverandør eller producenten.
- Rapportér enhver alvorlig hændelse i forbindelse med brug af Walk Safe® til leverandøren eller producenten samt den relevante ansvarlige myndighed i det område, hvor brugeren bor.

Udpakning

Fjern emballagen, og kontrollér alle dele omhyggeligt.



Kontakt straks din leverandør eller serviceudbyder, hvis dele mangler eller er beskadigede. Forsøg IKKE at samle.

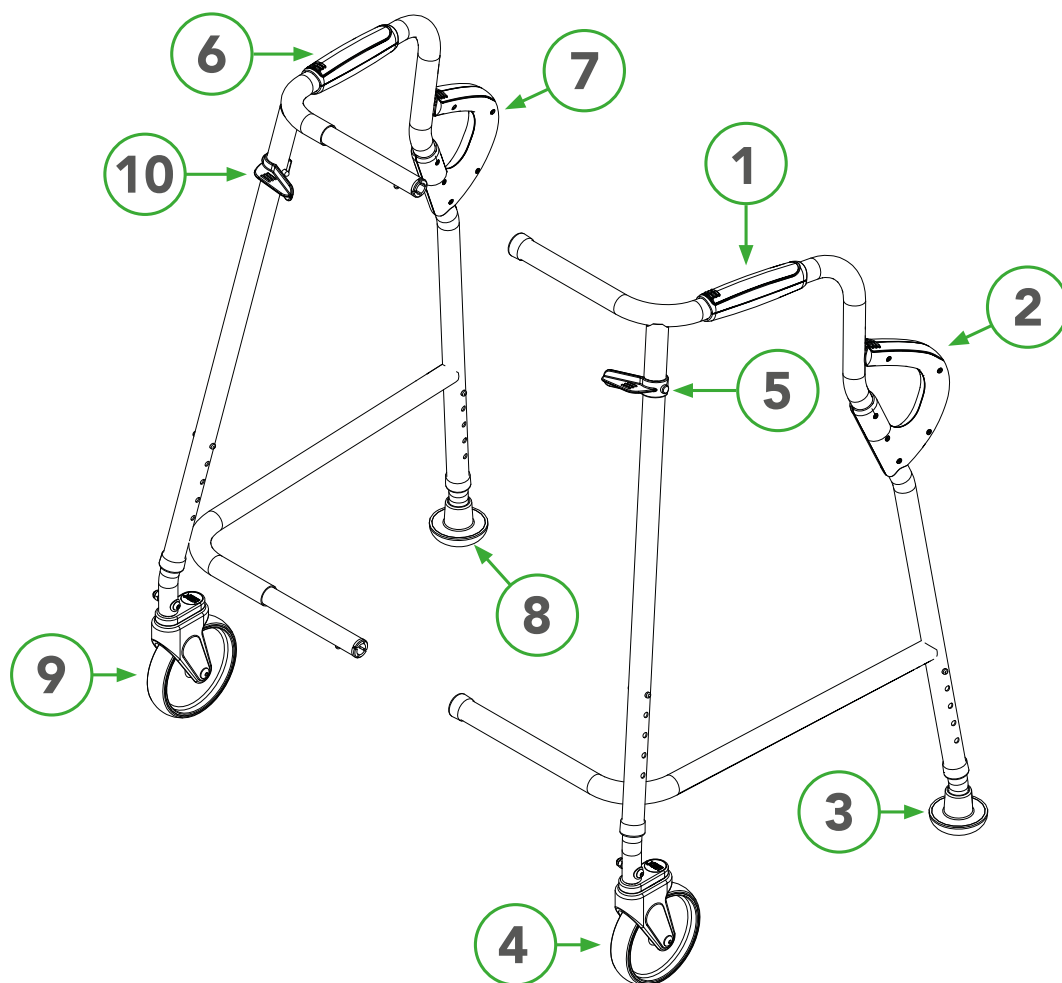

Venstre (V) ramme

- ① Øverste håndtag
- ② Nederste håndtag
- ③ V dupsko
- ④ V hjul
- ⑤ Holder til kurv


Højre (H) ramme

- ⑥ Øverste håndtag
- ⑦ Nederste håndtag
- ⑧ H dupsko
- ⑨ H hjul
- ⑩ Holder til kurv

Montering

For at samle Walk Safe® skal du lægge højre ramme på siden og placere venstre ramme, så rørene flugter som vist.

Skub rørene sammen, mens du trykker på knaplåsene, indtil knaplåsene klikker på plads. Rejs Walk Safe® op, og kontrollér, at den sidder sikkert sammen.

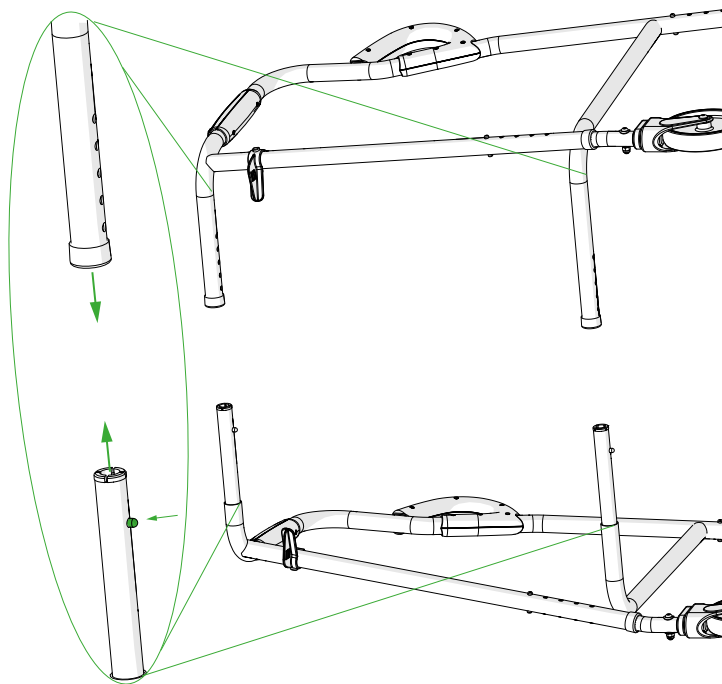


Afmontering

Udfør proceduren i omvendt rækkefølge for at adskille, hvis rammen skal skilles ad til opbevaring, transport osv.

Justering af bredde

For at justere bredden på Walk Safe® skal du trykke på knaplåsene på de øverste og nederste rør, der forbinder rammerne, og flytte rammerne sammen eller fra hinanden efter behov. Sørg for, at knaplåsene er i samme position i toppen og i bunden.

Juster rammens bredde, indtil dine hofter passer behageligt mellem de øverste håndtag.

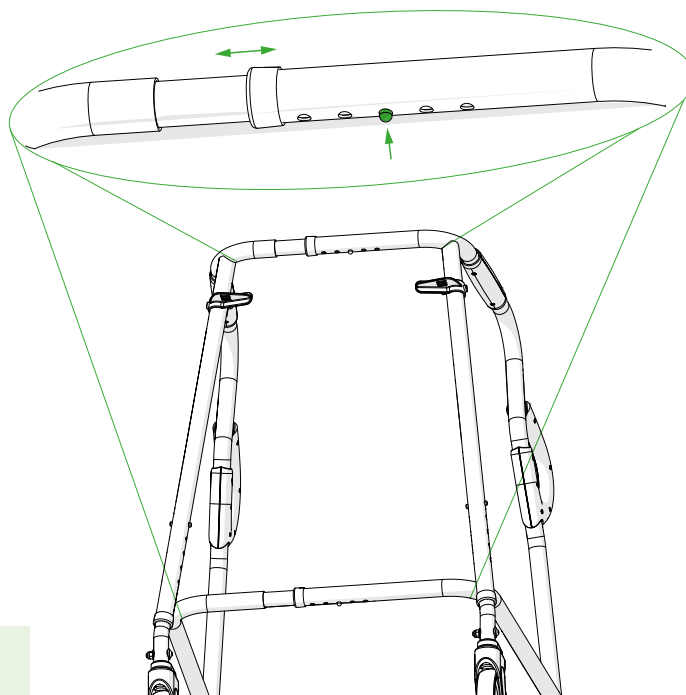

Rammebredde (til ydersiden af øverste håndtag)

Begge modeller: 380-460 mm.

Højdejustering


Det er vigtigt, at Walk Safe® er indstillet til den korrekte højde. For at kontrollere den korrekte højde på din ramme skal du sørge for, at dine albuer er let bøjede, når du står op og holder i håndtagene.

Når du står med hænderne ned langs siden, skal håndtagene nå til lige over håndleddet.

Rammehøjde (til toppen af håndtagene):



S58115 Medium: 750-850 mm.

S58139 Stor: 850-950 mm.

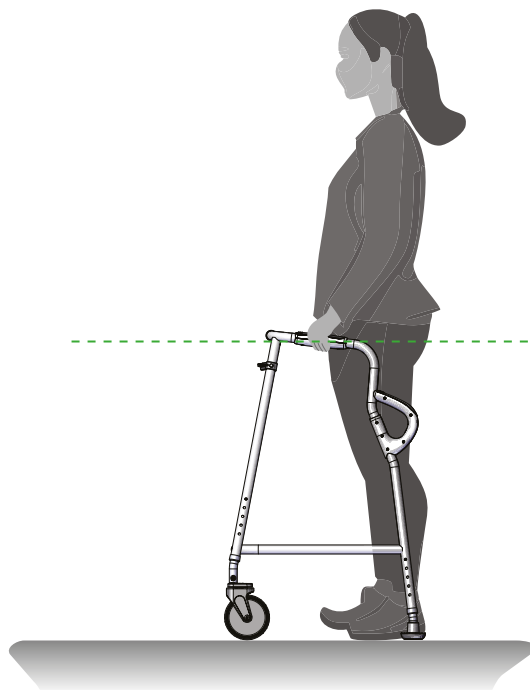


For at justere højden skal du trykke på knaplåsene over hvert hjul og dupsko og justere, indtil du når den nødvendige højdeindstilling. Sørg for, at knaplåsene går helt ned i hullerne.

Hvert hjul og dupsko er mærket. Sørg for, at bogstavet på hvert hjul og dupsko svarer til og flugter med bogstavet på rammen ovenfor.

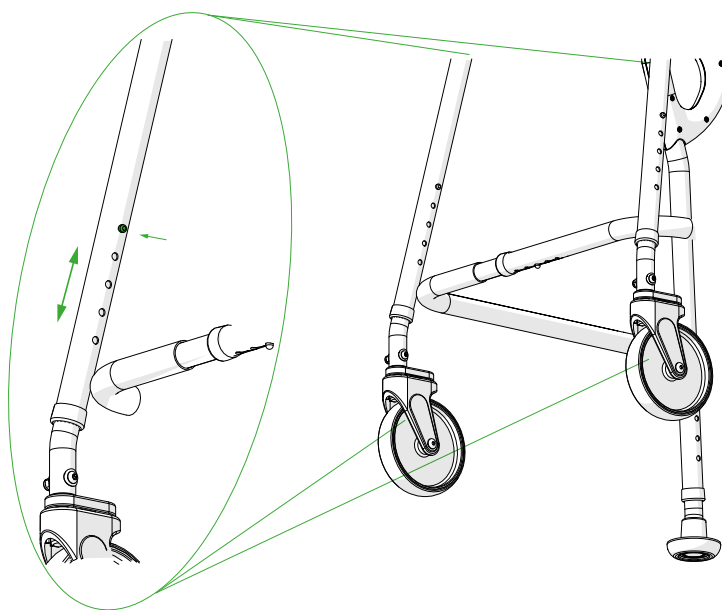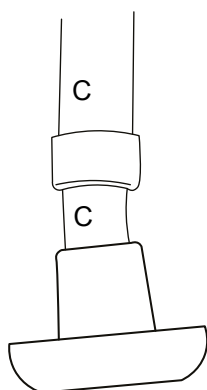


- Sørg for, at hvert ben på rammen er i samme højde.
- Forlæng IKKE benene længere end til mærkaten "MAX". Dette kan medføre personskade.
- Hjulene indeholder stærke magneter. Hold ALT følsomt udstyr mindst 152 mm væk fra dem under montering og brug.

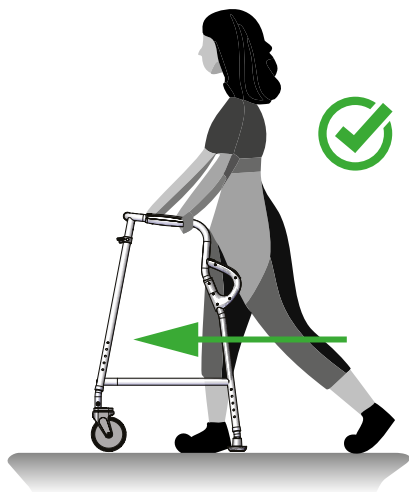

Gang i en lige linje

For at gå i en lige linje skal du blot skubbe Walk Safe® fremad et skridt foran dig.

Gå ind i rammen med den ene fod foran den anden, indtil begge ben er inde i rammen. Hvis det ene ben er svagere end det andet, skal du gå med det svageste ben først.

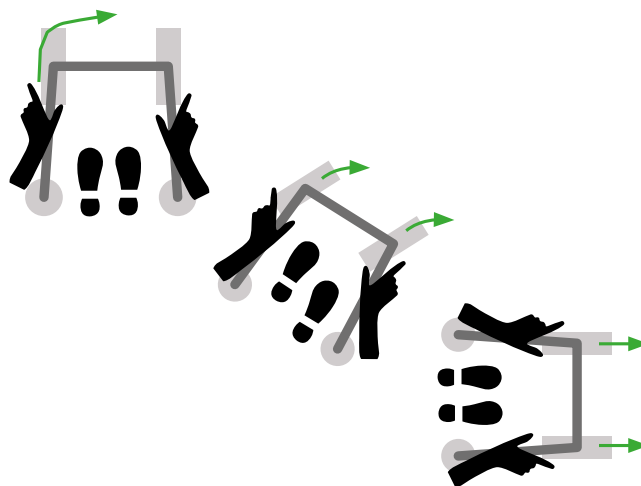


Drejning

For at dreje skal du "styre" med håndtagene på Walk Safe®. Dette får forhjulene til at dreje, så rammen bevæger sig i den retning, du ønsker.

Når du begynder at gå i en lige linje, vender forhjulene tilbage til en fremadrettet position.

Du behøver ikke løfte rammen for at dreje.

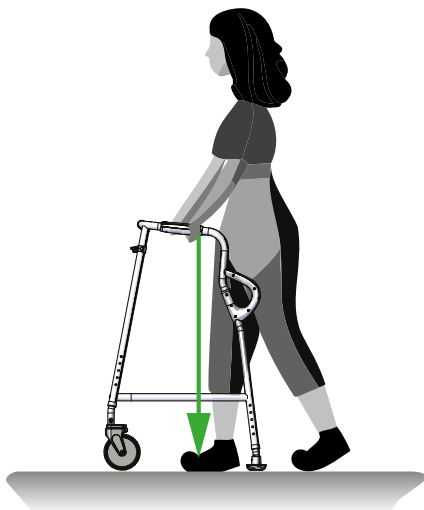

Standning

Hvis du føler, at Walk Safe® glider væk fra dig, skal du trykke ned på de øverste håndtag for at stoppe bevægelsen. Dupskoene indeholder gummibremser, der vil komme i kontakt med gulvet og stoppe bevægelsen.



Tærskelovergang


Walk Safe® er designet til at lade dig gå over lave tærskler såsom tynde tæpper eller dørtærskler uden at løfte rammen.

Ved større tærskler skal du løfte rammen forsigtigt.





- Gå IKKE for langt ind i rammen.
- VÆLTEFARE: Stræk dig IKKE for at nå rammen.
- VÆLTEFARE: Løft IKKE rammen for at dreje.
- VÆLTEFARE: Forsøg IKKE at gå baglæns, da dette kan få rammen til at vælte.

Til stående stilling

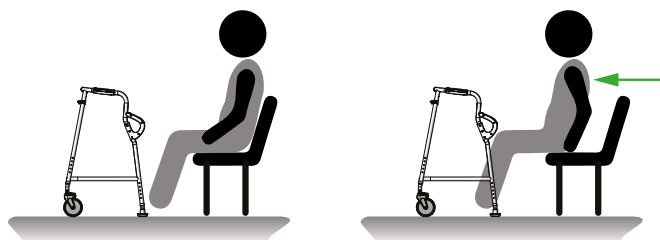

- 1 Ryk dig ud til forkanten af din stol eller seng.

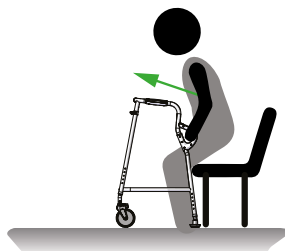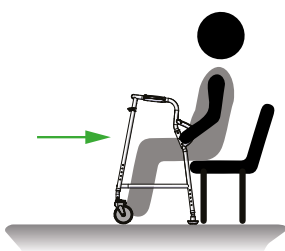


- 2 Træk let de nederste håndtag på Walk Safe® mod dig selv, så rammen omslutter dine ben og rører stolen eller sengen.
- 3 Læn dig fremad, så næsen er over tæerne.
Hvis din stol har armlæn, kan du bruge disse som støtte, når du rejser dig.
Hvis din stol ikke har armlæn, kan du bruge de nederste håndtag på Walk Safe® til at løfte dig selv op til stående stilling.
- 4 Bevæg derefter den ene hånd og så den anden op til de øverste håndtag, mens du rejser dig op i stående stilling.




Skub dig altid opad mod rammen.
Du skal aldrig trække rammen tilbage, da den vil vippe tilbage og kan forårsage personskade.


Til siddende stilling

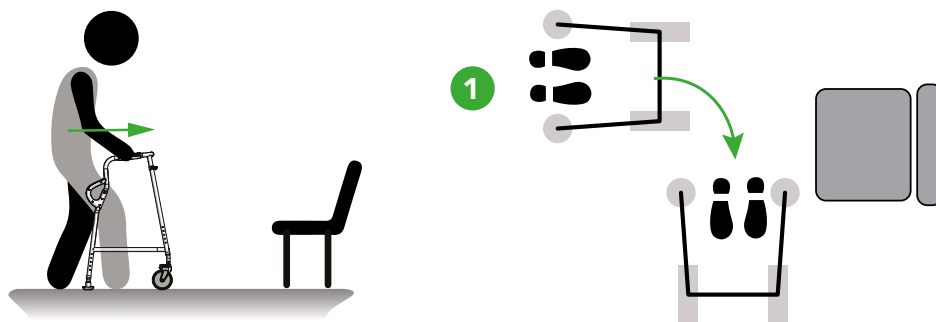

- 1** Gå hen mod din stol eller seng, og vend Walk Safe® lige foran stolen eller sengen, så den står sidelæns mod den.


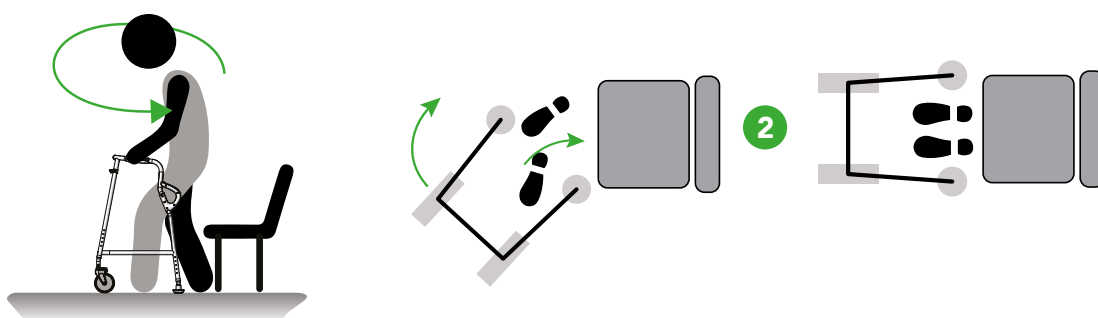


- 2** Drej Walk Safe® rundt, så du står lige foran stolen eller sengen, og benene rører den.

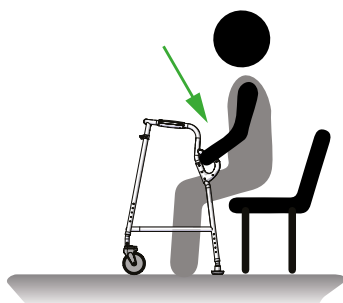

- 3** Hvis din stol har armlæn, bør du bruge disse som en hjælp til at sænke dig ned til siddende stilling.

Hvis din stol ikke har armlæn, kan du bruge de nederste håndtag på Walk Safe® til at sænke dig ned til kanten af din stol eller seng på kontrolleret vis.

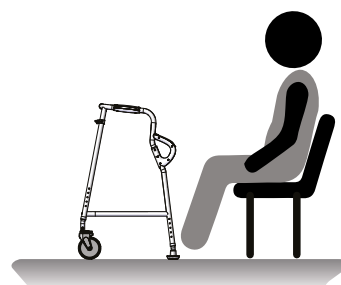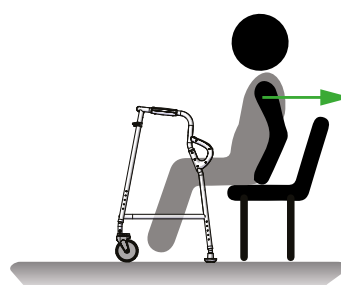

- 4** Ryk dig baglæns i stolen til en korrekt siddestilling.


Montering af en Buckingham Caddy-kurv

Walk Safe® er kompatibel med en Buckingham Caddy-kurv (tilgængelig på completecareshop.co.uk).

Brug ikke de klemmer, der følger med Buckingham Caddy-kurven.

Placer kurven løst på rammen som vist. Brug et jævnt tryk til at skubbe kurven ned på det øverste rør på Walk Safe®, indtil den "klikker" på plads. Den bør sidde godt fast.

Walk Safe® leveres med to holdere designet til at holde kurven i den rigtige position. Kurven bør blot hvile mod disse som vist på illustrationen.

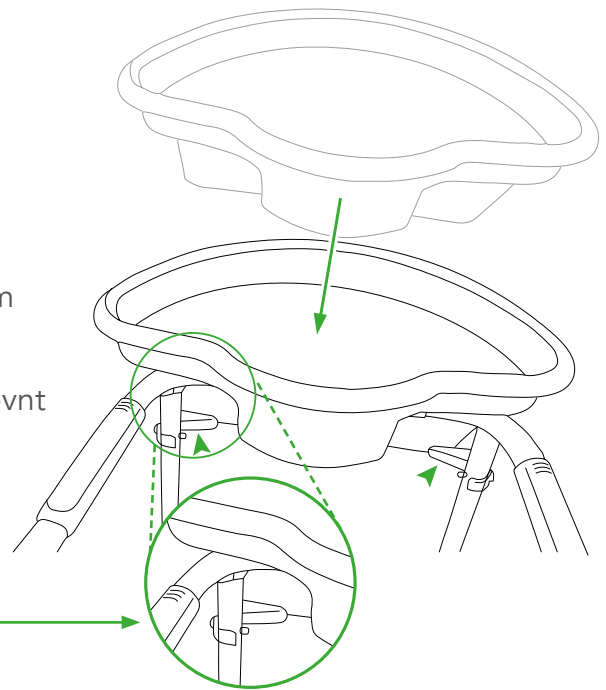

For at undgå, at Walk Safe® vipper fremad, må du IKKE lægge mere end 2 kg i kurven.

Hæng IKKE genstande på Walk Safe® (bortset fra en Buckingham Caddy-kurv).

Vedligeholdelse


Undersøg Walk Safe® for tegn på alment slid eller beskadigelser med jævne mellemrum og før genbrug. Tjek regelmæssigt:

- Om rammen er intakt og om alle håndtag, fastgørelseselementer og knaplåse sidder sikkert.
- Om hjulene kan dreje og rotere frit.
- Om der er slid på bremserne i dupskoene (se "Inspicer: Bremse i dupsko" for flere oplysninger).



Hvis Walk Safe® bliver beskadiget eller udvikler en fejl, skal du straks stoppe med at bruge enheden og kontakte din leverandør eller producenten.

Når du vedligeholder Walk Safe®, må du kun bruge reservedele leveret af producenten. Se Reservedele og tilbehør.

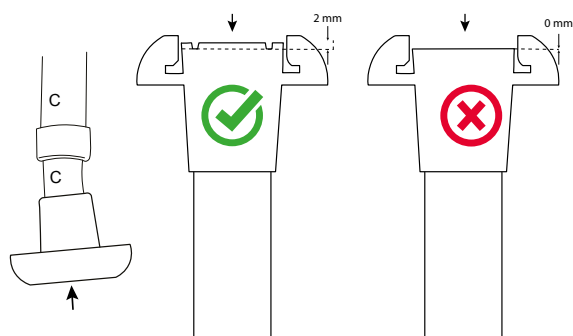

Inspicer: Bremse i dupsko


For at kontrollere bremserne i dupskoene skal du vende Walk Safe® på hovedet.

En cirkulær rille i gummibremsedelen af hver dupsko indikerer slid. Når enheden er ny, er rillen ca. 2 mm dyb. Når du ikke længere kan se rillen, skal du udskifte dupskoen.

Rengøring

Rengør Walk Safe® regelmæssigt med et neutralt rengøringsmiddel til almen brug og varmt vand. Kontrollér, om rengøringsmidlet er egnet, før brug. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller klude, da disse kan beskadige overfladen permanent og gøre garantien ugyldig.

For at desinficere Walk Safe® skal du tørre den af med en fortyndet blegemiddelsopløsning og rengøre den med en fugtig klud. Lad Walk Safe® tørre helt før brug og opbevaring. Walk Safe® kan også desinficeres ved hjælp af damprensning.

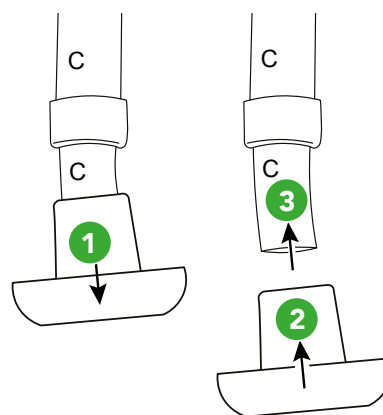

Udskift: Bremse i dupsko

Dupskoene kan købes som reservedel. Se Reservedele og tilbehør.

Træk den gamle dupsko (1) af, og tryk den nye dupsko (2) fast på bagbenet (3). Den kan være stram og svær at få på plads.

Reservedele og tilbehør

Produkt-kode	Beskrivelse
S59867	Holder til kurv (par)
S59843	Dupsko (par)
S59829	Venstre hjul (enkelt)
S59831	Højre hjul (enkelt)
S59806	Nederste håndtag (enkelt)
S59818	Øverste håndtag (enkelt)
S60742	Buckingham Caddy-kurv

Standarder

Walk Safe® overholder følgende standarder.

ISO 11199-1:2021 Ganghjælpemidler, som håndteres med begge arme – Krav og prøvningsmetoder.
Del 1: Gangstativer.

ISO 24415-1:2009 Dupsko til ganghjælpemidler – Krav og prøvningsmetoder.
Del 1: Friktion.

Produktgaranti

NRS Healthcare giver garanti på dette produkt i en periode på 24 måneder fra købsdatoen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl.

Denne garanti dækker ikke misligholdelse eller uhensigtsmæssig brug af nogen del af produkterne. Problemer, der opstår som følge af normal slitage, forbrugsdele eller kundemisbrug, er ikke dækket.

Denne garanti dækker kun brug i hjemmet. Hvis Walk Safe® bruges i kommercielle eller semi-kommercielle omgivelser såsom plejehjem, skoler, lejeboliger eller boligfællesskaber osv., er garantien kun gyldig i et år. Forbrugsdele er kun dækket af garantien i et år.

Enhver garanti udstedt af NRS Healthcare påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

Bortskaffelse af produktet

Rengør Walk Safe® grundigt før bortskaffelse, og genbrug, hvor det er muligt.

Walk Safe® er lavet af metal og plastik. Den kan bortskaffes på dine lokale myndigheders genbrugspladser eller via lokale affaldsindsamlere.



Genbrug eventuel papemballage.

Hvis du har problemer med vores produkter, bedes du kontakte os.

Vi er en førende leverandør af medicinsk udstyr og hjælpemidler til hverdagen. Gå til en af vores hjemmesider for at se hele vores udvalg af produkter.

Kontaktoplysninger:

Telefon +44 (0)345 121 8111

E-mail customerservice@nrshealthcare.co.uk

Find os her

www.completecareshop.co.uk



NRS Healthcare

Sherwood House, Cartwright Way,
Forest Business Park, Bardon Hill,
Coalville, Leicestershire, LE67 1UB,
Storbritannien



NRS Healthcare

19-21 Altona Road, Blaris Industrial
Estate, Lisburn, Co. Antrim,
Nordirland, BT27 5QB