



Brugermanual

Leg Raiser EASY

BRUGERMANUAL – Leg Raiser EASY – DK Version 4

Indhold

1. Forord.....	3
1.1 Elektronisk version.....	4
2. Mærkning af udstyret.....	5
3. Brugsbetingelser	6
4. Tekniske specifikationer.....	7
4.1 Målskitse.....	7
4.2 Tekniske specifikationer	7
5. Vejledning.....	8
6. Vedligeholdelse	10
6.1 Rengøring	10
6.2 Løbende eftersyn	10
7. Serviceeftersyn.....	10
8. Reklamationsret	11
9. Reservedele	11

1. Forord

Til lykke med din nye Leg Raiser EASY-produkt.

Dette er en original brugermanual til din Leg Raiser EASY-produkt. I det efterfølgende anvender vi betegnelsen Produkt for Leg Raiser EASY, hvis ikke andet specifikt er anført.



Det er vigtigt, at du gennemlæser manualen, før produktet tages i brug.

Leg Raiser EASY er et ergonomisk hjælperedskab, som kan hjælpe sundhedspersonalet til at lette arbejdsgange i forbindelse med påsætning af kompressionsstrømper, samt fod og ben pleje. Produktet har indbygget automatisk ben løft, samt ruller for afhjælpning i forbindelse med kompressionsstrømpe påsætning.



1.1 Elektronisk version

Brugermanualen samt øvrige oplysninger om Leg Raiser EASY kan ses på www.danrehab.dk



Scan QR-koden og find brugermanualen.



2. Mærkning af udstyret

Leg Rasier EASY

HMI-no.: 143973
Item no.: 100500



SN LRE 25015


 Tlf. +45 86447355
 DK-7160 Tørring

our website

25-05-20



= Producent af pågældende produkt.

Danrehab A/S
Tlf. 86447355
DK-7160 Tørring

= Producentens navn, tlf.nr. og adresse.



= Produktet opfylder alle krav til CE-mærkning.

Leg Raiser EASY (HMI-nr. 143973) = Produktidentitet (handelsnavn og HMI-nr.)



LRE xxxxxx

= Serienummer for det pågældende produkt.

(max. 160 kg)

= Maksimal belastning på produktet.

IP 52

= IP-klassificering (IP52 støvtæt, tåler vanddråber og aftørring med fugtig klud)



= QR-kode (fører til yderligere info om produktet)

3. Brugsbetingelser

Leg Raiser EASY bør udelukkende benyttes ergonomisk redskab til sundhedspersonale. Produktet anvendes i forbindelse med fod og/eller ben pleje, hvor borgerens ben ønskes løftet op for bedre adgang til pleje. Dette er primært et ergonomisk redskab som kan hjælpe plejepersonalet til så optimal arbejdsstilling som muligt.

Maks. belastning fremgår af mærkningen på produktets nederste stel, og bør ikke overstiges, da det kan medføre defekt eller personskade.



Bevægelige dele: Pas på fare for klemning. Ejeren af produktet er forpligtet til at vedligeholde den iht. vedligeholdelsesvejledningen i afsnit 6. Det er ikke tilladt at modificere produktet, da det kan være forbundet med fare for personsikkerheden.



Delene til produktet kan være varme eller kolde at røre ved i tilfælde af opbevaring i f.eks. varerum i bil eller i direkte sol. Vær opmærksom på dette inden ibrugtagning af produktet.



Lastevne: Maks. 160 kg



Stå aldrig på sædet.



Brugervejledning skal gennemlæses grundigt før ibrugtagning



Produktet indeholder ikke elektronik eller batterier. Ved bortskaffelse skal lokale bestemmelser og forskrifter overholdes.



Dette er et arbejdsredskab til løft af tunge ben og må ikke anvendes som en stol.



Vær opmærksom på tippefare, hvis du hviler dig på kanten af sædet.

Disclaimer.




Danrehab A/S garanterer, at det er sikkert at anvende produktet under forudsætning af, at det anvendes fornuftigt og efter hensigten. Hvis produktet udviser nogen form for synlige fejl, må produktet ikke anvendes, og det må ikke anses for at være sikkert at anvende eller leve op til normal brugsstandard, herunder kvalitet, beskaffenhed og holdbarhed.

Det betyder, at Danrehab A/S ikke kan holdes ansvarlig for evt. uheldsmæssig anvendelse eller for hvad der måtte ske, hvis produktet ikke anvendes efter hensigten.

4. Tekniske specifikationer

4.1 Målskitse

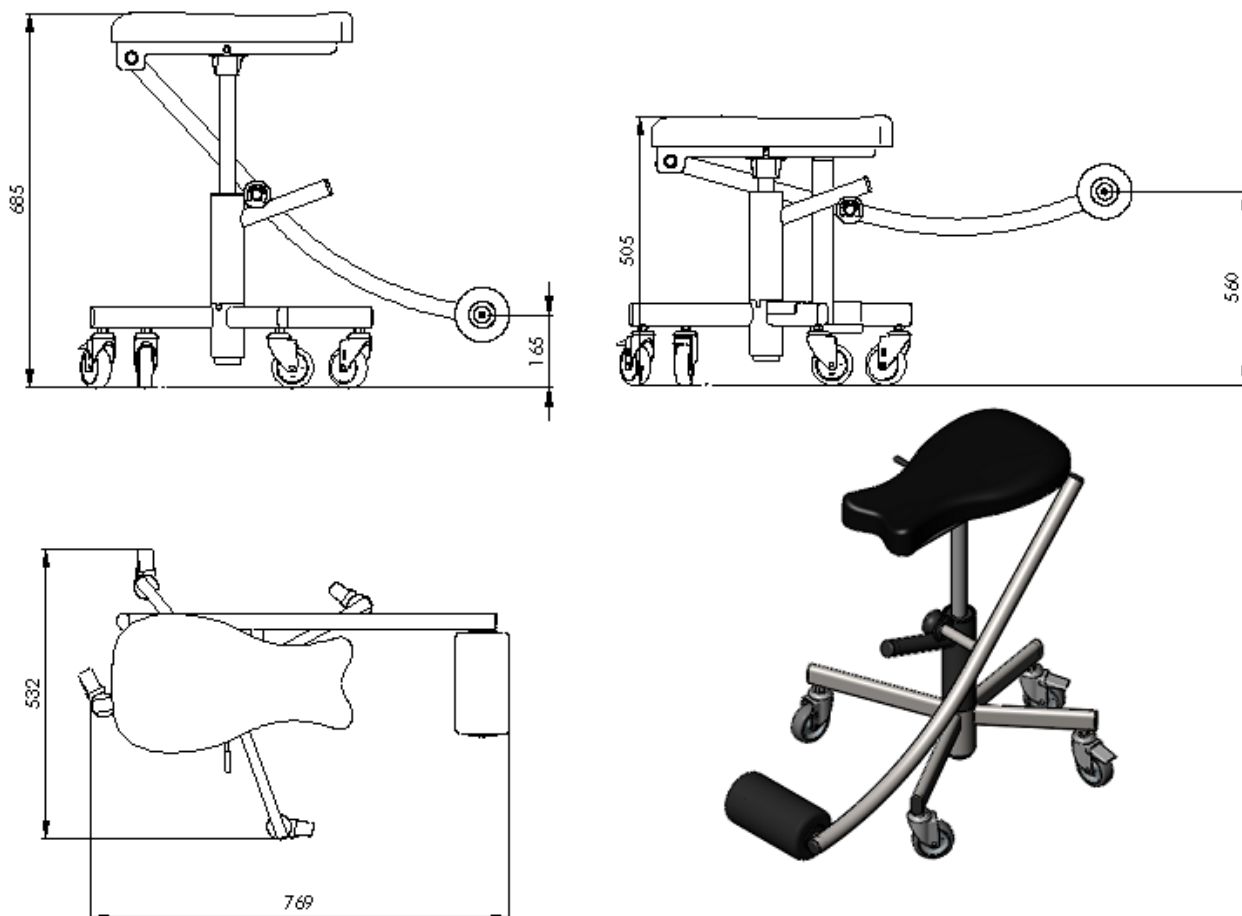

4.2 Tekniske specifikationer

Mål (L x B x H-sæde):	769 x 532 x 505-685
Egenvægt:	11 kg
Max. last:	160 kg
Støv og Vand	IP 52 (IP52 støvtæt, tåler vanddråber og aftørring med fugtig klud)
Arbejdstemperatur:	+5°C to +40°C
Opbevaringstemperatur:	-10°C to +50°C
Materialer:	Pulverlakeret stål, sæde fremstillet af møbelskum, samt allergitestet betræk.
Forventet levetid:	>5 år.

Forbehold for tekniske modifikationer.

5. Vejledning



Figur 1:

Sæt dig på produktet, og bed borger om at sidde med let spredte ben.



Figur 2:

Kør forsigtigt frem, således ben rullen føres ind bag borgers ben.



Vær opmærksom på ikke at køre ind i borgers fødder.



Figur 3:

Når ben-rullen er kørt ind bag borgers ben, rulles der stille lidt tilbage, således borgers fod slipper gulvet



Figur 4:

Nu trykkes let på udløserarmen, samtidig med at der køres roligt bagud.



Når sædet sænkes, og borgers fod/ben løftes, vær opmærksom på at borgers for går fri af sædet

Figur 5:
Behandling af borgers fod/ben kan nu foretages i en ergonomisk gunstig position



Figur 6:
Eksempel med påførsel af kompressionsstrømpe:

Strømpen påført, et på- og aftagningsudstyr (f.eks. en Doff N' Donner) placeres ved borgerens fod.

Strømpen føres let hen over rullerne, bemærk kan gøres uden at løfte borgerens ben.



Figur 7:
Et på- og aftagningsudstyr (f.eks. en Doff N' Donner) rulles af borgerens ben, uden at løfte benet



Figur 8:
Efter færdigbehandling af borger, kan benet sænkes roligt ved at trykke på udløserarmen, samtidig med at du letter trykket i sædet.



Pas på med IKKE at rejse dig op så længe borger har vægt på rullen, da det kan medføre tipning forover, og borgers ben kan falde hårdt til gulvet.

6. Vedligeholdelse

6.1 Rengøring

Produktet bør af hygiejniske grunde, jævnligt blive rengjort med desinficerende produkter. Leg Raiser EASY tåler fint rengøring med opvredet klud, og kan desinficeres ved at bruge nedenstående anbefalede desinfektionsprodukter:

- Hydrogen Peroxide Aq. 1,0% (max.) (fortyndet Brintoverilte)
- Ethanol baserede produkter 70-85 v/v%. alkohol
- Sæbeopløsninger PH-værdi max. 9

Der må IKKE anvendes højtryksrensere eller anden form for højtryksspul da det kan forårsage permanent skade på produktet.

6.2 Løbende eftersyn

Produktet kræver et minimum af vedligeholdelse, dog anbefales daglig iagttagelse af produktets tilstand. Nedenstående punkter bør gennemgås dagligt før ibrugtagning.

- Skulle der opstå utilsigtede fejl eller mislyde, kontakt straks din forhandler for at få udbedret fejlen.
- Kontrollér jævnligt alle skruer, om de evt. har løsnet sig.
- Kontrollér at sædepolstringen er intakt.
- Hjulene tjekkes jævnligt – efterspændes eventuelt – og skal holdes fri for hår m.m. for at bevare den optimale køreevne:
HUSK, at hjulskift altid bør foretages af en fagkyndig person.

7. Serviceeftersyn

Ved normal drift er der en forventet levetid på >5 år under forudsætning af, at produktet vedligeholdes i henhold til producentens forskrifter. Ud over den almene vedligeholdelse som er beskrevet i afsnit 6, anbefaler vi som fabrikant, at der foretages rutinemæssige eftersyn ca. en gang om året, eller som minimum hver gang, produktet kommer retur til det lokale hjælpemiddelsdepot, af en fagkyndig servicetekniker.



Det er vigtigt at de daglige og rutinemæssige eftersyn udføres som anbefalet, da manglende eller forkert udførte eftersyn kan resultere i materiel eller personskaade.

8. Reklamationsret

Reklamationsretten dækker i henhold til de til enhver tid gældende regler vedr. reklamationsret.

Se mere herom i salgs- og leveringsbetingelserne, som findes på vores hjemmeside:



OBS:

Reklamationsretten kan bortfalde, hvis de anbefalede eftersyn ikke udføres, eller hvis produktet bliver anvendt til ikke tilsigtet brug. Samt ved anvendelse af ikke originale reservedele jf. reservedelsoversigten.

9. Reservedele

Danrehab varenummer	Beskrivelse	Foto / illustration
100497	Sæde for Leg Raiser EASY	
020-002	PUR rulle	
1030-75	Ø75 hjul uden bremse	
1030-75B	Ø75 hjul med bremse	
100493	Gasdæmper 220N	



Dette produkt skal genbruges i henhold til nationale regler. Efter adskillelse af produktet skal du sortere komponenterne ud fra hvad de er lavet af, og genbruge dem individuelt.

Kontakt venligst dit lokale genbrugssted for vejledning, hvis det er nødvendigt.

www.danrehab.dk

