

ZITZI DELFI PRO





Dynamisk siddestilling


Trin 1. Bækken- & benpositionering

Kombinationen af, korrekt indstillet siddesystem, optimal sædebrønd, effektivt hoftebælte og en velstøttet sacrum giver forudsætningerne for at mindske shear og fremadskridning, hvilket understøtter aktivitet og postural kontrol. Sædedelen er trinløs justerbar i sædedybde og abduktion/adduktion hvilket muliggør optimal individuel siddestilling og samtidigt lader brugeren vokse med siddesystemet.




Trin 2. Hoftebæltets placering

Et korrekt indjusteret positioneringsbælte giver forudsætning for at positionere bækkenet og mindske risikoen for fremadskridning/bagud kippet bækken. Vi tilbyder positioneringsbælter i flere forskellige materialer, modeller og størrelser.

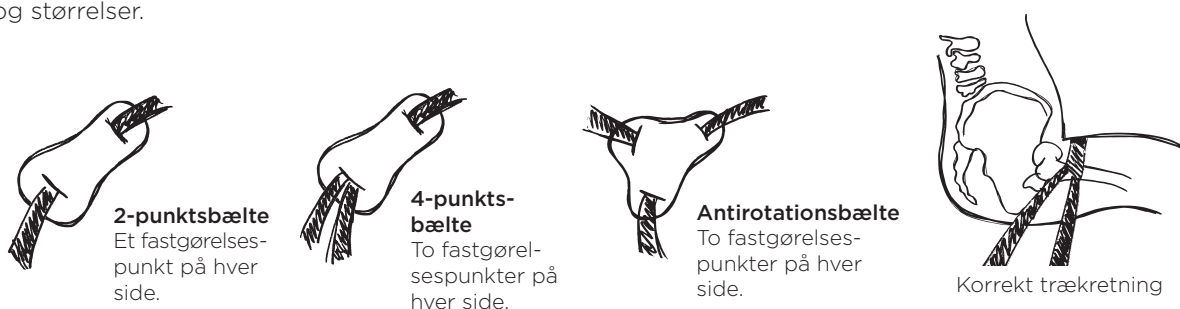

Trin 3. Trepunkts-positionering

Justerbare kropsstøtter sammen med eksempelvis hoftestøtte skaber en god forudsætning for at positionere overkroppen hvilket mindsker risikoen for fejlstilling. God postural kontrol leder til bedre hovedkontrol og øger mulighederne for aktivitet og årvågenhed. Vi har hermed muligheden for både at korrigere samt bibeholde positioneringen af overkroppen.

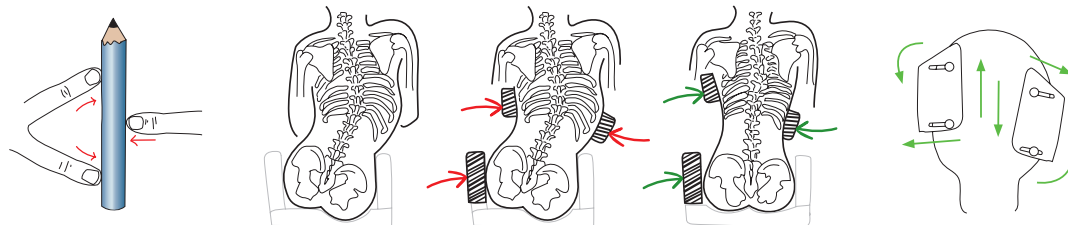


Positioneringsseler

Sammen med hoftebæltet giver sternumstøtten eller H-selen en god støtte til at positionere overkroppen, hvilket giver forudsætninger for bedre hovedkontrol.



Sternumstøtte


- Koncentreret støtte over sternum
- Modvirker fremadfald

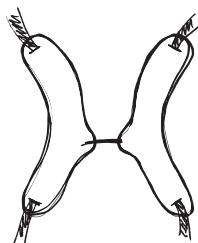

H-sele

- Holder skulderpartiet på plads samt modvirker rotation
- Passer godt til eksempelvis dem, som bruger sonde

Trin 4. Flex-funktion/Hoftevinkeljustering

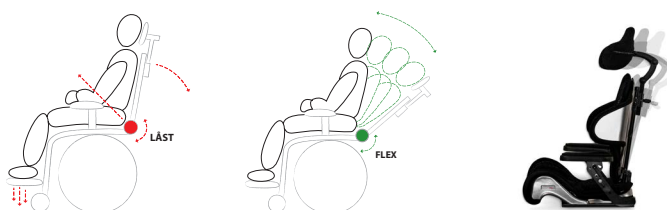

Dynamisk støtte giver bevægelsesfrihed, variation samt kan give en beroligende effekt ved extensions-spasticitet. Ryggen er stilbar i hoftevinkel og siddesystemet er udstyret med et flex-led, hvilket gør ryglænet fleksibelt. I stedet for at brugeren presser imod en fast ryg og bækkenet glider frem, opnår man den fordel med flexryggen, at ryggen på stolen bevæger sig bagud med brugeren og brugeren "kommer af" med sin spasticitet.

Trin 5. Hovedpositionering/Eksempel



Aktivt pandebånd



HeadActive



Heads Up



Pro Serie



Zitzi Delfi Pro

Siddesystem til børn og unge



Zitzi Delfi Pro

Størrelser	5 str.
Abduktion	-9/+18°
Max brugerhøjde	170 cm
Max brugervægt	90 kg
Axilhøjde	17-40 cm
Kropsbredde	14-31 cm
Sædebredde, produkt	24-38 cm
Sædebredde, bruger	12-38 cm
Sædedybde	14-45 cm




- Siddesystemet er specielt udviklet til brugere med siddestillingsproblematikker.
- Siddesystemet vokser med brugeren.
- Crachtestet og godkendt.
- Værktøj til justering er integreret i ryggen og dermed altid lige ved hånden.




Alle vores betræk er vaskbare på 60°

OBS!
Vælg forstærket ryg, når brugeren har høj tonus.


Tilbehør Zitzi Delfi Pro

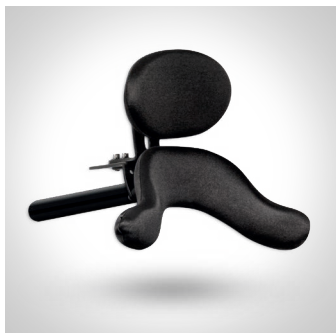


ProSerie enkel nedre

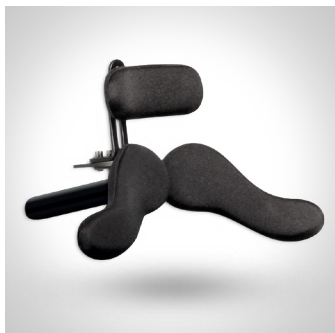


ProSerie Junior

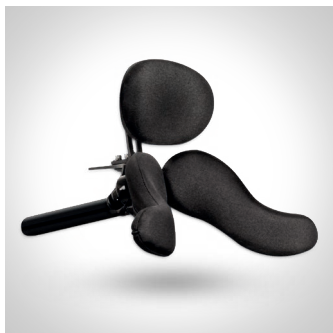

ProSerie Voksen

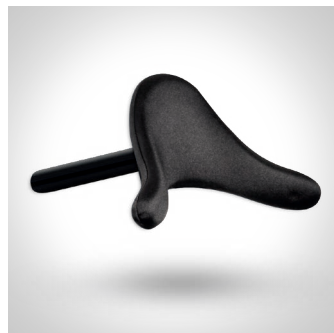


ProSerie Mini

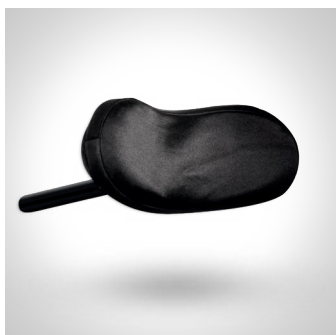

ProSerie Plush



Standard hovedstøtte

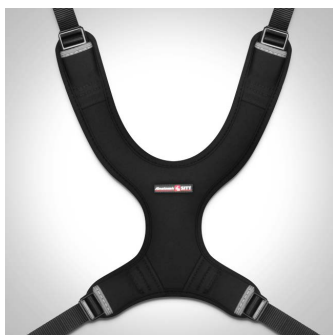

Sternumstøtte Pro




H-Sele Pro



Antirotationsbælte



Hoftebælte

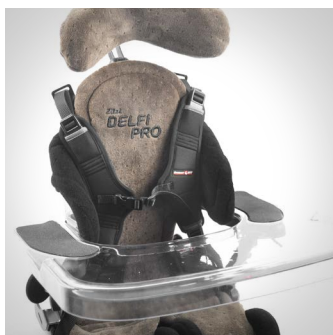


Bord




Dækplade til bord



Albuestop

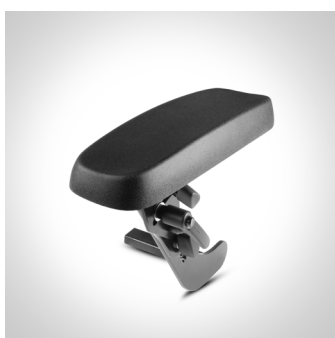

Armlæn

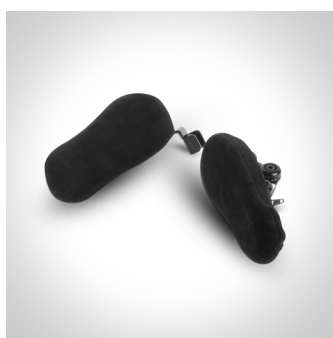

Bækkenstøtte



Hoftestøtte

Tilbehør Zitzi Delfi Pro - fortsat



Fodstøtte



Delt fodstøtte



Justerbar fodstøtte



Delt justerbar fodstøtte



Flex fodstøtte



Fodstøttespolstring



Lægplader



Fodkasse



Lægpladespolstring




Ankelbespænding



Fodrem



Armbind

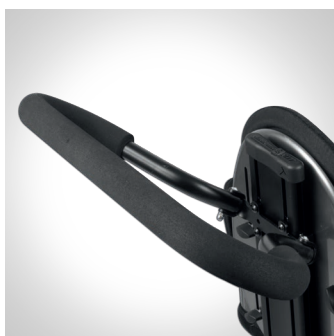

Kørebøjle



Adapterplade



Fæsteplade



Legebøjle

Størrelser/mål

Zitzi Delfi Pro

Hvilken størrelse på siddesystem, bør jeg vælge?

Delfi Pro str. 0 - ca. 14-20 cm i sædedybde / længde ca. 60-80 cm

Delfi Pro str. 1 - ca. 17-27 cm i sædedybde / længde ca. 70-100 cm

Delfi Pro str. 2 - ca. 23-33 cm i sædedybde / længde ca. 90-130 cm

Delfi Pro str. 3 - ca. 30-40 cm i sædedybde / længde ca. 120-160 cm

Delfi Pro str. 4 - ca. 35-45 cm i sædedybde / længde ca. 140-170 cm

Det er sædedybden, som er vigtigst i første omgang, når man skal vælge størrelse. Det skyldes at bredden tilpasses til brugerens bredde med ryg-gens kropsstøtter og bækkenstyr.

Hvilken størrelse på kørestolsstel, bør jeg vælge?

Delfi Pro str. 0 - Flipper Pro str. 2 / Guppy str. 1 / Seabass str. 1

Delfi Pro str. 1 - Flipper Pro str. 2 / Guppy str. 1 / Seabass str. 1

Delfi Pro str. 2 - Flipper Pro str. 2 / Snapper / Guppy str. 1 / Seabass str. 1

Delfi Pro str. 3 - Flipper Pro str. 3 / Snapper / Guppy str. 1 / Seabass str. 1

Delfi Pro str. 4 - Flipper Pro str. 3 / Guppy str. 2 / Seabass str. 1





Pengyvognen har en indbygget affjedring, som gør at den triller jævnt, selv på ujævne overflader. Udstyret med terrænhjul, hvilket er en stor fordel om vinteren eller på skovturen.

Pengyvognen kan med et snuptag klappes sammen og låses i denne position.

Størrelser	1 stk.
Crashtestet	Godkendt
Farve	Sort
Vægt	12 kg
Belastningsvægt	50 kg
Tilt	-23° til +40°
Sædehøjde	54 cm
Hjul, svingbare	7", 12"



ZITZI GUPPY

Zitzi Guppy er udviklet til at passe til de fleste siddesystemer, heriblandt formstøbte sæder.

Forskellige hjul tilbydes, for at imødekomme forskellige behov.

Størrelser	2 stk.
Hjul	16", 20", 22", 24"
Belastningsvægt	70 kg

Tilt	0-32°
Sædehøjde	46 cm
Farve	Sort

Vægt	14 kg
Crashtestet	Godkendt



Zitzi SEABASS PRO

Velbalanceret kørestolsstel som passer med flere forskellige siddesystemer inkl. formstøbte sæder.

Samtlige drivhjul har quick-release funktion og tilbydes både som luft og massive.

Størrelser	3 stk.
Hjul	12", 16", 20", 22", 24"
Belastningsvægt	135 kg
Tilt	35°
Sædehøjde	41/46 cm
Farve	Sort
Vægt	20 kg
Crashtestet	Godkendt



Zitzi FLIPPER PRO FLEX

Flipper Pro Flex er både til indendørs- og udendørsbrug. Vælg mellem 12" eller 16" hjul. Kørestolsstellet har også tilt, ved hjælp af gaspatron.

Tilbydes i en elektrisk eller en manuel udgave. Tilt in space forbedrer vægtfordelingen.

Størrelser	1 stk.
Modeller	2 stk.
Belastningsvægt	95 kg
Tilt	30°
Højdejustering	29-65 cm*
Totalbredde	63 cm
Totallængde	81 cm
Vægt	31 kg

* Målene angiver stelhøjden og ændres alt efter hvad du vælger af siddesystem.



Zitzi FLIPPER PRO

Kørestolsstellet har 125 mm hjul for enkelt at kunne rulle over tæppekanter, dørtrin og andre forhindringer.

Stellet tilbydes i to varianter mht. hæve- og sænkemekanisme, nemlig som elektrisk eller manuel. Tilt in space forbedrer vægtfordelingen.

Størrelser	3 stk.
Belastningsvægt	75 kg
Tilt	30°
Højdejusterbar	Ja
Sædehøjde (min)	21 cm*
Sædehøjde (max)	61 cm*
Hjul, standard	125 mm

* Målene angiver stelhøjden og ændres alt efter hvad du vælger af siddesystem.

Anatomic SITT A/S
Viengevej 4
8240 Risskov

Telefon 86 17 01 74
Fax 86 17 01 75
Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

Web www.anatomicsitt.com
www.facebook.com/AnatomicSITT.dk
youtube.com/anatomicsitt