

TRACK WHEEL

Omdanner din kørestol til en alsidig offroader



Er din kørestol klar til nye eventyr?

Forvandl din kørestol til en alsidig offroader og oplev en ny følelse af hastighed og frihed.

Track Wheel er din ideelle ledsager på udflugter i byen, i skoven, på stranden, eller hvor eventyret nu kalder.

Det 12" store Track Wheel hæver forhjulene og vipper kørestolen en anelse bagud, hvorved rullemodstanden reduceres. Det gør kørestolen nemmere at manøvrere, du kan køre hurtigere, og det føles mindre ubehageligt, når du kører over bump. Nyd du blot turen og glem alt om at holde øje med ujævnheder i vejen.

Track Wheel er retningsstabil, vejer minimalt og er let at montere. Når først hjulet er justeret, kan du være på farten i løbet af få sekunder.



Brosten ingen hindring. Med Track Wheel kan du forcere ujævnt terræn, samtidig med at du sparer på kræfterne.

Følelsen af frihed



Single Arm

Monteres på kørestolens fodstøtte uden brug af værktøj eller ekstra beslag.



Double Arm

Maksimal stabilitet til kørestole med opklappelig eller højt placeret fodstøtte.

Single Arm

Før Track Wheel tages i brug første gang, justeres det, så det passer til din kørestol. Det tager 5-10 minutter og gøres ved hjælp af standardværktøj (umbraconøgle 4 og 5.)



Kulfiber
2,6 kg

Single Arm monteres på fast fodstøtte.

På farten på få sekunder

Når Track Wheel er justeret, er det nemt og ligetil at montere.

Følg blot disse to enkle trin:

1. Drej næsehjulet og flyt håndtaget til position 1
2. Sæt næsehjulet fast på kørestolen og flyt håndtaget til position 2



Drej næsehjulet udad, når du monterer det, og tilbage indad for startposition/kørsel.

Double Arm

Før Track Wheel tages i brug første gang, justeres det, så det passer til din kørestol. Double Arm kan justeres både i højden og i bredden. Processen tager 15-20 minutter.




Kulfiber
4,5 kg

Double Arm fastgøres nemt med quick release klemmer.

Hurtig og nem montering

Når Track Wheel er justeret, er det nemt og ligetil at montere. Følg blot disse to enkle trin:

1. Drej næsehjulet udad og flyt håndtagene på quick release klemmerne til position 2.
2. Fastgør næsehjulet til kørestolen og flyt håndtagene til position 1 for at lukke og dreje næsehjulet tilbage indad.

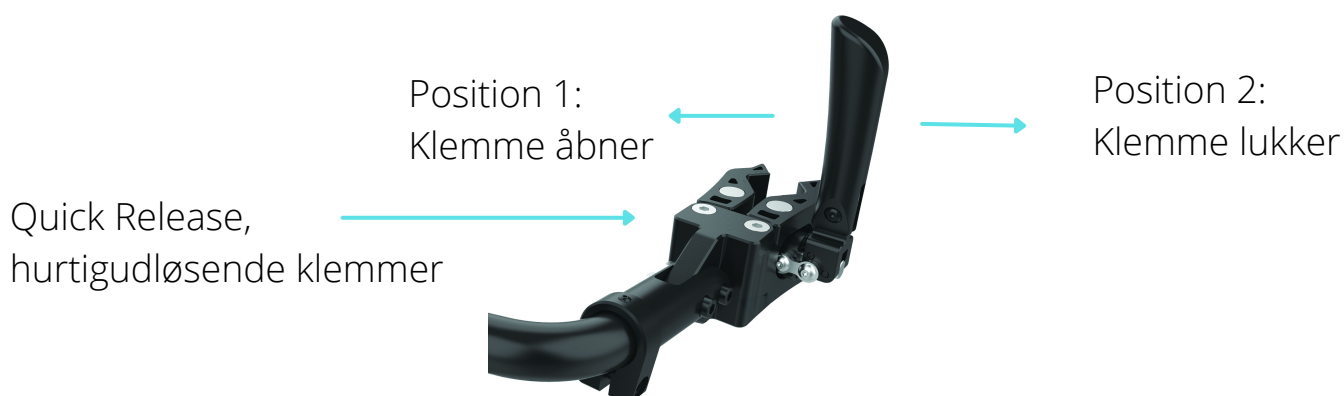



Din Track Wheel forhandler:

KXP

www.koerestolseksperten.dk
8980 3398 * admin@koerestolseksperten

