

Tjekliste før brug

- ✓ Stram og spænd eventuelle løse skruer og dele
- ✓ Kontakt Made for Movement eller din hjælpemiddelkonsulent fra Made for Movement hvis der er mislyde eller dele som er i stykker

Forflytning af brugeren ind i Innowalk

1



Innowalk skal være i siddende position. Alle bæltter og remme åbnes og forflyt brugeren ind manuelt eller ved brug af sejl og lift.

2



Placer brugeren godt tilbage på sædet.

3



Spænd bryststøtten.


4



Justér lægbøjlen til den rigtige højde.

Placér brugerens ben ind i lægbøjlen og sæt føringssnoren på.

5

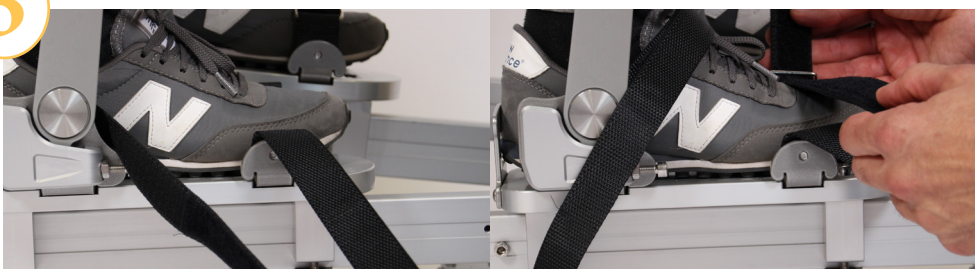

Spænd lægbøjlerne og sæt føringssnoren fast i fæstet.

6

BEMÆRK! Kontroller at snoren er strammet rigtigt inden brugeren rejses op

Innowalk Small



Stil fødderne parallelt. Snore løsnes/strammes ved hjælp af frikoblingen.

Innowalk Medium



Tryk den røde knap ind og træk ud i låsen. Juster med håndtaget til korrekt position. Føringssnoren strammes ved at presse håndtaget ned mod gulvet.


Innowalk Large



Drej på håndtaget til korrekt position ved stop skruen. Snore strammes ved at dreje mod højre.

BEMÆRK! Det er vigtigt at håndtaget står i samme position hver gang produktet er i brug.

7

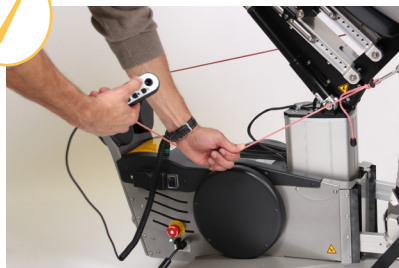

Hold ned på føringssnoren når brugen rejses fra siddende til stående. Kontroller at snoren har den rigtige stramhed når brugen er helt stående.

8



Spænd hoftebæltet.

- ✓ Start gangbevægelsen og juster tempoet til brugeren.
- ✓ Kontroller at brugeren både står og bevæger sig optimalt.

Monter nødvendigt ekstra udstyr

Bord



Sæt bordet på og sving det ind foran brugeren.

Skulderstropper



Sæt skulder stropper på.

Antioverstræk



Spænd antioverstræks remmen bagom lægbøjlen.

BEMÆRK!

Håndtering af Innowalk og brugere i dette hjælpemiddel skal gøres af personer som har fået oplæring af en hjælpemiddelkonsulent fra Made for Movement.

For mere information, se bruger manualen for Innowalk eller kontakt din hjælpemiddelkonsulent fra Made for Movement.

Vores dygtige hjælpemiddelkonsulenter vejleder i optimal forflytningsteknik, for både bruger og hjælper


Forflytning af brugeren ud af Innowalk

1



Bordet svinges ud, fjern skulderstropper, remmen for antioverstræk og hoftebæltet løsnes.

2

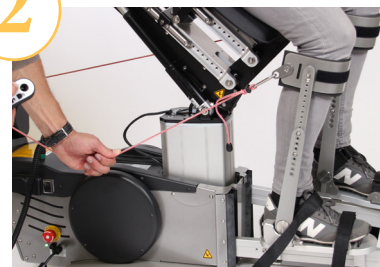

Hold ned på føringssnoren når brugeren bevæges fra stående til siddende.

3



Remmene over fødderne løsnes.

4



Føringssnoren tages af og lægbøjlerne kan ligges ned.

5



Bryststøtten slæses ud og brugeren forflyttes manuel eller ved brug af sejl og lift.



Kontakt os gerne for mere information

+ 45 43 99 77 29

info.dk@madeformovement.com

www.madeformovement.com



Ind & ud
Quick Guide

INNOWALK