

BRUGSANVISNING

KLINISKE INDIKATIONER

Typiskeindikationer for denne enhed:

- Brandsår; • Tryksår; • Multitrauma;
- Andre typer af (væskende) hudlidelser.

Kontraindikationer:

- Ustabil spinal fraktur; • Pulmonal kongestion;
- Ikke-ventileret liggende fladt på maven;
- Patienter med en kropsvægt >150 kg.

PLACERING AF PATIENTEN

- Enheden skal have den indstillede temperatur (mellem 30° -38°C), inden patienten placeres.
- Sluk for luftstrømmen ved at bruge fodpedalen eller knappen OFF, før du flytter patienten på enheden.
- Der skal anbringes et rent hospitalslagen på filterpladen, inden patienten placeres.
- Brug højdeindstillingsfunktionen til at flytte og behandle patienten på den bedste måde.
- Dæk altid patienten med et hospitalslagen, når patienten er placeret på enheden.
- Hospitalslaget skal skiftes dagligt.
- Fjern aldrig gummikanten eller åbn filterpladen, mens patienten er på enheden.
- Træk aldrig i filterpladen for at vende og genplacere patienten, men brug hospitalslaget til dette formål.



TILBEHØR

Tilgængeligt tilbehør til enheden:


- Strækbehandlingsstang;
- Strækbehandlingsramme; • Fjernbetjent ryglæn; • Fodstøtte.




*Se PEARLSTM AFCS brugsanvisning FRM423-206

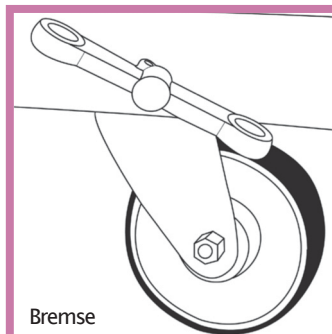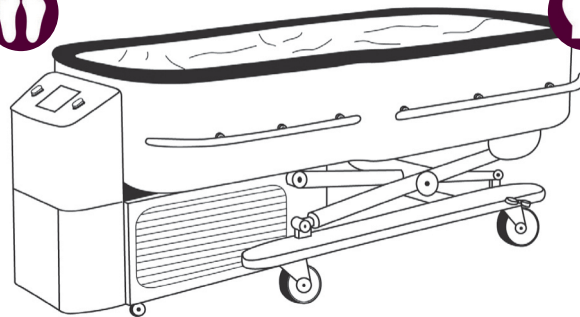


Bremse

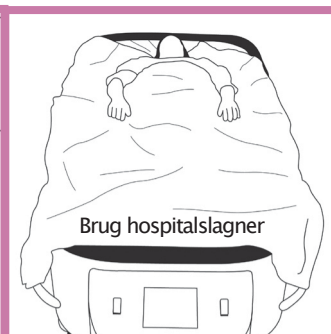

Brug hospitalslagner

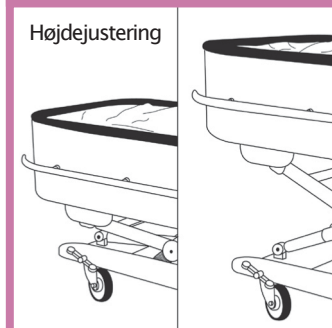


Højdejustering

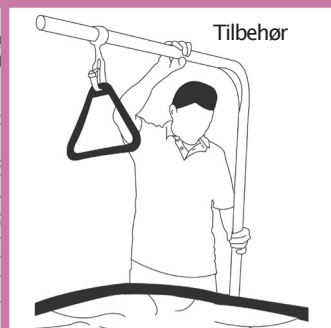

Tilbehør

KONDENS

Under ekstreme varme/fugtige rumforhold (> 30°C/55%) vil køleenheden frigive kondensfugt; brug en flaske/bakke til opsamling af fugt.

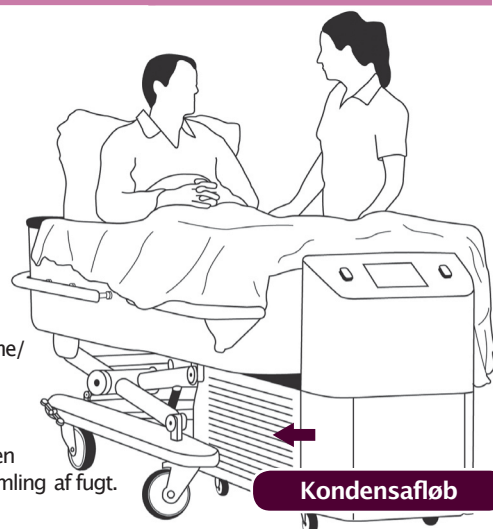

Kondensafløb

INDEN DENNE ENHED ANVENDES

Vurder de forskellige risici, herunder, men ikke begrænset til, følgende (ufuldstændig) liste:

- Sørg for, at patienten ikke dehydreres ved kontinuerlig ventilation af enheden.
- En genoptræningsplan bør overvejes for patienter, som vågner op efter bevidstløs/vegetativ tilstand.
- Vær opmærksom på, at glasperler kan gøre gulvet glat.
- Hold afstand, når systemet sænkes.
- Oliebaserede salver, cremer og lotions, som lækkes gennem pladen vil forringe glasperlerne, hvilket gør systemet ubrugeligt.
- Lad ikke skarpe genstande komme i kontakt med filterpladen.
- Al installation, transport, service, vedligeholdelse og fejlfinding må kun udføres af kompetente og autoriserede personer.

NØDSITUATIONER

Høj sengetemperatur:


Hvis enheden når en temperatur på 40°C, slukkes den automatisk. Følg omhyggeligt anvisningerne på skærmen.

CPR:


I tilfælde af en nødsituation, skal man trykke på CPR-knappen. Det stopper luftstrømmen.

Følg omhyggeligt anvisningerne på skærmen.

OVEROPHEDNING

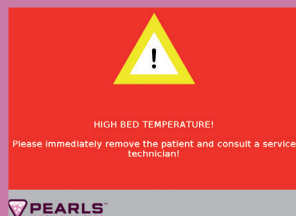


CPR

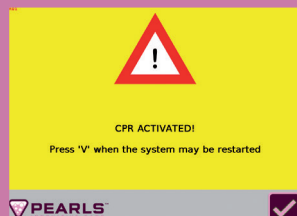



START





STARTMENU

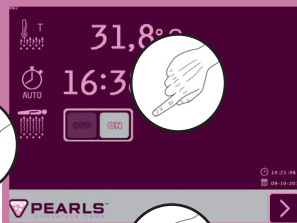



TEMPERATURINDSTILLING

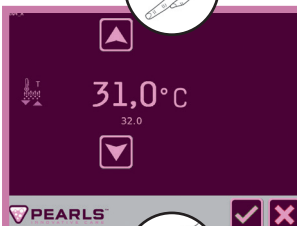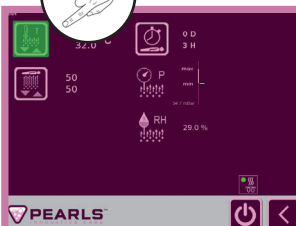

LUFTSTRØMSINDSTILLING

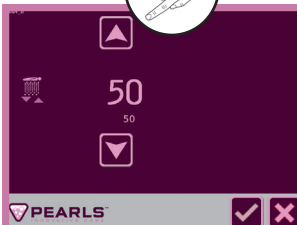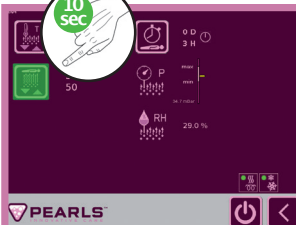

BEHANDLINGSTIMER

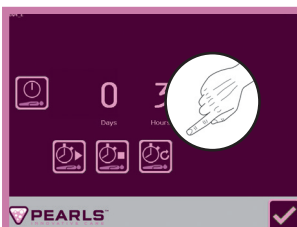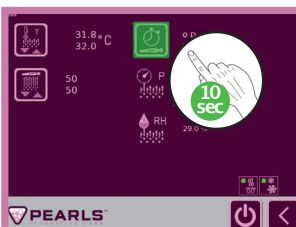

ADVARSLER



Faktisk vs indstillet temp. > 3°C.



Lufttryk lavt; service nødvendig.



Service nødvendig; informér tekniker.



Service nødvendig; informér tekniker.



Luftfilter skal skiftes.



Glasperler skal skiftes.




Varmeeenhed TIL.



Køleenhed TIL.



PEARLSTM
INNOVATIVE CARE

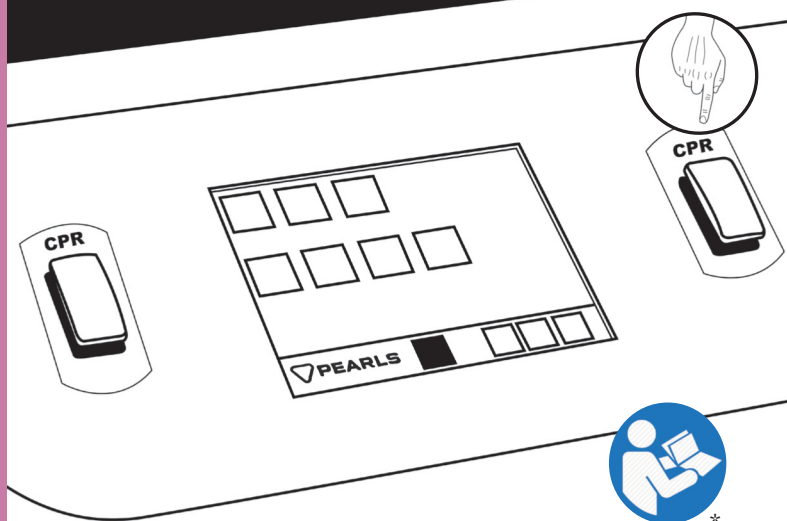

OPSTART:

- TIL/FRA: Når strømforsyningen er tilsluttet, skal man vente indtil opstartsproceduren er afsluttet. Start ved at trykke på.
- START-menu: den faktiske temperatur vises, og en 30 minutters nedtælling aktiveres (luftstrømmen starter automatisk efter denne tidsperiode).
- Brug TIL-knappen eller fodpedalen til manuelt at starte luftstrømmen.
- Brug KOMFORT-pedal til at genplacere patienten; luftstrømmen øges til MAKS., hvilket gør sengen blødere i en tidsperiode.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER

- Temperatur/luftstrømkraft ændres i menuen MERE med
- Hold knappen nede (den bliver grøn), indtil menuen for justering popper op.
- Ændr indstilling og bekræft med.
- Patientbehandlingstimer kan aktiveres, stoppes eller nulstilles i menuen MORE.

ADVARSLER:

- Advarselsikoner vises for at informere plejeren om vigtige forhold. I de fleste tilfælde vil en akustisk alarm lyde, som kan slås fra i 30 minutter med.

DEKONTAMINERING

- Efter hver patient skal enheden rengøres ved at følge en streng protokol. Kun autoriseret personale har tilladelse til at udføre denne protokol.

*Se PEARLSTM AFCS brugsanvisning FRM423-206



CE 0344

Synergier

Advanced
Patient Support

Synergie Nederland BV - Sterrekroos 6, 4941VZ Raamsdonksveer - Holland.
Synergie forbeholder sig ret til at foretage ændringer i design, egenskaber og modeller uden forudgående varsel. Den eneste garanti Synergie giver er den udtrykkelige skriftlige garanti, som leveres med salget af deres produkter.

© 2016 Synergie Nederland BV. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES

