


Maxi Move 5

1




Anbring sejlet under plejemodtageren.
Se brugsvejledningen til sejlet.

2

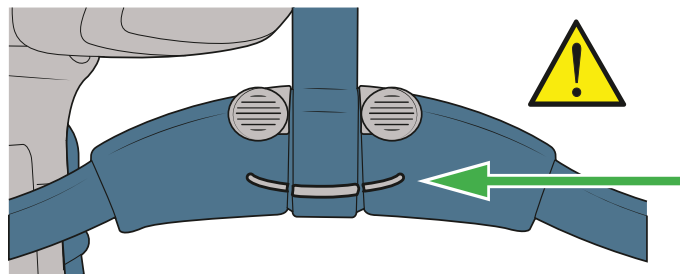


Kontrollér, at afstandsbøjlen er fastgjort korrekt. "Smile"-mærkerne skal flugte.


3

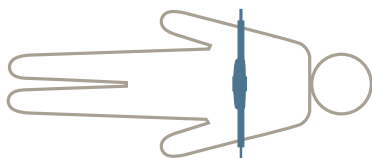

2 kroge

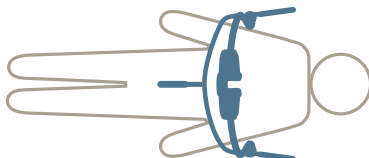


DPS

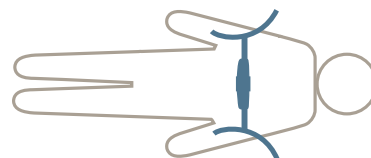

4 kroge


Anbring afstandsbøjlen.

4

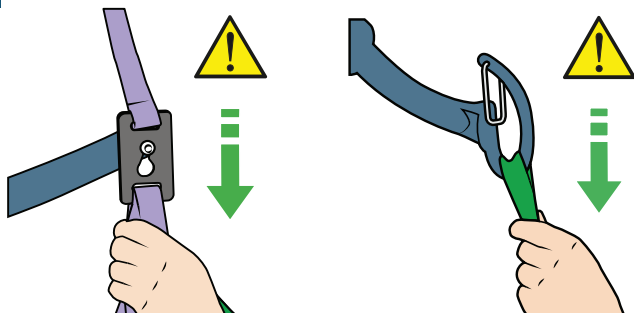

Fastgør sejlet til afstandsbøjlen.

5

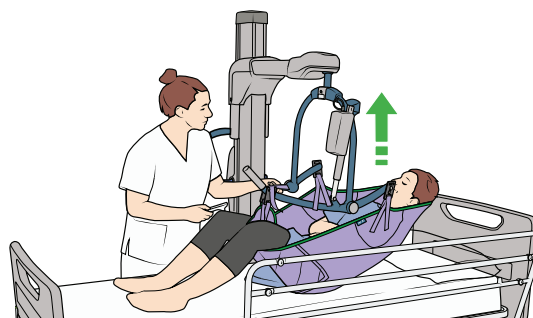

Vurder plejemodtagerens komfort,
og kontrollér sejlfastgørelsen,
mens plejemodtageren løftes.

