

# DAISYBox

Dansk Hurtig Start Guide udgivet af  
InSight Synshjælpemidler ApS



## Hej.

Du skal have tusind tak for at vælge os som leverandør, og vi håber du enten allerede er eller bliver glad for dit nye synshjælpemiddel. Dette dokument er en Hurtig Start Guide til synshjælpemidlet som du har i hænderne, eller snart modtager. Skulle du få brug for yderligere assistance er du altid velkommen til at kontakte os. Vi assisterer gerne. Det kan være i form af henvisning til en decideret brugervejledning, til specifikke afsnit i en brugervejledning, det kan være henvisning til præsentationsvideoer eller direkte support via telefon eller e-mail.

*Mange venlige hilsner,  
InSight Synshjælpemidler ApS*

## Kontakt os.

Du er velkommen til at ringe på telefonnummer [39 39 30 04](tel:39393004).

Du kan også sende en e-mail til [vej@synsh.dk](mailto:vej@synsh.dk).

### **InSight Synshjælpemidler ApS**

Islevdalvej 184, 1. Sal  
2610 Rødovre  
CVR-nr.: 45592839

Besøg os på websitet [www.synshjælpemidler.dk](http://www.synshjælpemidler.dk).

*Udgivet \*indsæt måned år\**

# Indholdsfortegnelse

|                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| Hej.....                                                                      | 2 |
| Kontakt os.....                                                               | 2 |
| Kom ret godt i gang med din DAISYBox.....                                     | 4 |
| Fysisk beskrivelse.....                                                       | 4 |
| Opladning.....                                                                | 5 |
| Så skal vi i gang.....                                                        | 5 |
| Internet forbindelse.....                                                     | 6 |
| Opret forbindelse til netværk via internet kabel.....                         | 6 |
| Opret forbindelse til netværk via Wi-Fi.....                                  | 6 |
| Verificer gerne at du har forbindelse til internettet og at det fungerer..... | 7 |
| Opret forbindelse til NOTA.....                                               | 7 |
| Afspil en lydbog.....                                                         | 7 |

## Kom ret godt i gang med din DAISYBox

I denne Hurtig Start Guide skal du igennem et par afsnit for at komme rimelig godt i gang med din helt nye DAISYBox. Allerede nu må du gerne sørge for at du har følgende klar:

- Din DAISYBox enhed.
- Strømforsyningen
- En internet adgang i nærheden, som du enten kan forbinde til trådløst eller via kabel.
- Skal du forbinde trådløst skal du kende navnet på netværket samt den tilhørende adgangskode.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger end dem du finder i denne hurtige vejledning bør du gennemgå brugervejledningen. Hvis du skal rimelig hurtigt i gang skal vi være lidt effektive, nemlig.

### Fysisk beskrivelse.


Vi starter lige med at lære din nye DAISYBox at kende. Placer den foran dig så du har kontrolpanelet vendt mod dig. Herunder har vi en visuel præsentation af kontrolpanelet, og knapperne er fra venstre mod højre:



|             |         |                     |                   |         |
|-------------|---------|---------------------|-------------------|---------|
| Tænd / Sluk | Tilbage | Lydstyrke Drejeknap | Pil Op og Pil Ned | OK knap |
|-------------|---------|---------------------|-------------------|---------|

Lydstyrke Drejeknap er en knap som du både kan trykke ned på, for at vælge eller aktivere et element, og også dreje rundt mod og med urets retning. Når du ikke skal indskrive tegn, eksempelvis en adgangskode, bruges Lydstyrke Drejeknappen til at justere på lydstyrken.

Hvis du vender den om, har du på bagsiden følgende tilslutningsporte, fra venstre mod højre:

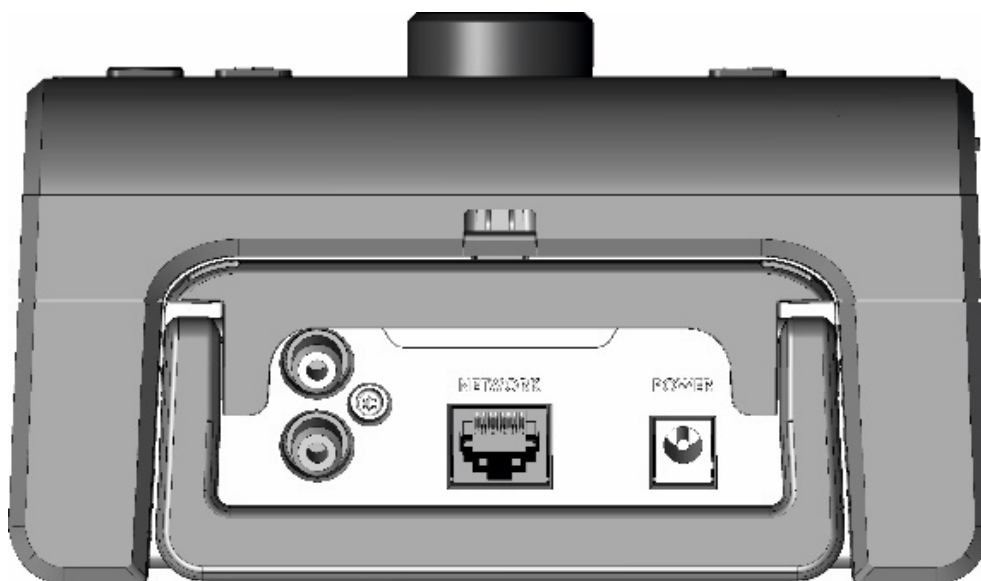

|                                   |                         |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stereo lydudgang (to runde porte) | Port til internet kabel | Port til strømforsyning |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|

## Opladning.

Inden du begynder at bruge din DAISYBox for første gang skal du tilslutte den til en strømforsyning. Du bør lade den op i mindst fire timer før du tænder for den, for på den måde at sikre, at du får aktiveret alle batteries celler. Mens din DAISYBox lader op kan du passende gennemgå denne hurtige vejledning, eller brugervejledningen. Så lærer du hvad din DAISYBox kan og måske du finder en funktion eller to som overrasker dig. God fornøjelse i hvert fald.

## Så skal vi i gang.

Når du er færdig med at lade din DAISYBox op i mindst fire timer er du klar til at komme i gang. I dette afsnit skal du igennem oprettelse af forbindelse til et netværk samt også tilføjelse af en NOTA konto.

Har du bestilt din DAISYBox enhed med opsætning fra os har vi allerede sørget for, at opsætningen er gennemført. Det eneste du skal gøre er at tænde for din enhed og vente omkring ti sekunder på, at den får forbindelse til dit netværk efterfulgt af din NOTA konto.

Står du selv for opsætningen skal du fortsætte herfra: Du kan fint allerede nu tænde for din DAISYBox. Det gør du ved at trykke en gang hurtigt på Tænd / Sluk knappen. Din DAISYBox starter op med annonceringen "Tilslutter...", efterfulgt af en melodi.

## Internet forbindelse

Du kan enten gøre brug af et internet kabel eller en Wi-Fi forbindelse.

### ***Opret forbindelse til netværk via internet kabel***

Tilslut blot det medfølgende, eller dit eget, internet kabel til internet porten bag på din enhed. Sæt den anden ende af internet kablet i din internet router. Efter omkring ti sekunder, i tilfælde af at dit internet ellers fungerer, vil din DAISYBox have oprettet forbindelse til netværket. Du kan nu springe videre til Opret forbindelse til NOTA afsnittet.

### ***Opret forbindelse til netværk via Wi-Fi ved brug af WPS***

Du kan gøre brug af WPS funktionen til at oprette forbindelse til dit Wi-Fi netværk. Det kræver at dit Wi-Fi netværk understøtter WPS og at du derved har fysisk adgang til din Wi-Fi router. Er du i tvivl bør du tage kontakt til din internet udbyder, eller gennemgå brugervejledningen for netop din Wi-Fi router.

1. Tryk ned på Lydstyrke Drejeknappen for at tilgå en såkaldt Pause menu. Din DAISYBox annoncerer "Pause".
2. Benyt Pil Ned indtil du lander på elementet Enheds konfiguration. Tryk på OK knappen.
3. Aktiver nu WPS funktionen ved at trykke på WPS knappen på din Wi-Fi router.
4. Benyt Op eller Ned for at navigere til elementet Tilføj et trådløst netværk, og tryk på OK.
5. I tilfælde af at din DAISYBox og din router finder hinanden, vil du blive spurgt om du ønsker at bekræfte oprettelse af forbindelse. Du hører annonceringen "Vil du tilføje netværket \*navn på dit netværk\*. Tryk på OK knappen og forbindelsen oprettes automatisk.

### ***Opret forbindelse til netværk via Wi-Fi manuelt***

Når du skal oprette forbindelse til et Wi-Fi skal du være bekendt med navnet på dit netværk, også kaldet et SSID, samt også den adgangskode, som skal benyttes. Du kan oprette forbindelse til netværk uden adgangskode ved at følge samme procedure.

Godt at vide: Du skal på et tidspunkt indskrive adgangskode manuelt. Er du snedig, kan du finde et almindeligt, eksternt USB tastatur som du normalt bruger til en computer, og indsætte det i USB porten i din DAISYBox, ude på venstre kant. Brug tastaturet når du skal indskrive adgangskoden.

1. Tryk ned på Lydstyrke Drejeknappen for at tilgå en såkaldt Pause menu. Din DAISYBox annoncerer "Pause".
2. Benyt Pil Ned indtil du lander på elementet Enheds konfiguration. Tryk på OK knappen.
3. Naviger ned til elementet Tilføj et trådløst netværk og tryk på OK.

4. Din DAISYBox enhed begynder automatisk at søge efter tilgængelige Wi-Fi netværk i nærheden, og efter omkring tyve sekunder får du annonceret antallet af netværk som blev fundet.
5. Benyt Pil Op indtil du lander på dét Wi-Fi netværk navn som du ønsker at oprette forbindelse til. Tryk da på OK knappen.
6. Du skal nu indskrive adgangskoden. Det gør du ved at benytte Lydstyrke Drejeknappen til at ændre på tegnet som du får annonceret. Du kan også benytte Pil Op eller Pil Ned, hvis det er lettere. Drejer du mod urets retning kommer du tilbage i en liste. Drejer du med urets retning kommer du fremad i en liste. Denne liste består først af små bogstaver (bemærk annonceringen "a, lille"). Dernæst store bogstaver. Drejer du videre med Lydstyrke Drejeknappen kommer du til tal, efterfulgt af specialtegn. Det sidste tegn i listen, hvis du benytter Lydstyrke Drejeknap og drejer i urets retning, er et Færdig tegn (Enter tegn).
7. Indskriv adgangskoden ved at angive de enkelte tegn ét for ét. Når du har drejet hen til det tegn du skal bruge, tryk på OK knappen for at indsætte det. Er adgangskoden "InSight" eksempelvis, drejer du først hele vejen til "I, stor". Tryk på OK knappen. Du hører annonceringen "I, stort, tilføjet", efterfulgt af "I, stor" igen. Det betyder at du er klar til at ændre næste tegn. Benyt derfor Lydstyrke Drejeknappen til at finde "n, lille". Tryk igen på OK knappen. Du benytter Tilbage knappen hvis du har brug for at slette tegn du har indskrevet.
8. Når du har indskrevet hele adgangskoden skal du indsætte et nyt tegn, som du skal ændre til Færdig tegnet (Enter tegn). "InSight" skal altså indskrives i sin helhed, indsæt et nyt tegn efter det sidste "t", og benyt Lydstyrke Drejeknappen i urets retning, hele vejen til de sidste tegn, som er Færdig tegnet. Tryk på OK knappen.
9. Du får annonceret adgangskoden som du har angivet, efterfulgt af en bekræftelse på, at Wi-Fi netværket er blevet konfigureret.

### ***Verificer gerne at du har forbindelse til internettet og at det fungerer.***

1. Det gør du ved at trykke på Tilbage knappen. Hvis du lige er blevet færdig med at oprette forbindelse til et Wi-Fi. Ellers tilgå Pause menuen ved at trykke en gang på Lydstyrke Drejeknappen.
2. Benyt Pil Op eller Pil Ned til du lander på elementet Enheds status. Tryk på OK.
3. Benyt Pil Op eller Pil Ned til du lander på Netværks test elementet. Du får annonceret en del informationer som ikke nødvendigvis giver mening. Vær blot opmærksom på ordet "Fejl" og sætningen "Ingen netværks forbindelse", i dét tilfælde er der noget galt nemlig.

### ***Opret forbindelse til NOTA***

Din DAISYBox enhed forventer at have en NOTA konto indlejret. Det betyder, at når der ikke er en konto, men en internet forbindelse, vil du blive bedt om at angive dit brugernavn og adgangskode automatisk. Du hører derfor annonceringen "Der opstod et problem under login, dit brugernavn eller password er ikke korrekt. Angiv brugernavn".

1. Du placeres automatisk i brugernavn redigeringsfeltet. Angiv derfor dit brugernavn på samme måde som du indskrev adgangskoden til dit Wi-Fi netværk. Tilsluttede du din DAISYBox enhed til et internetkabel og har derfor ikke angivet en adgangskode, skal du nu gennemgå punkt 6, 7 samt 8 under Opret forbindelse til netværk via Wi-Fi afsnittet. Overvej at bruge et almindeligt, eksternt USB computertastatur hvis du har et sådant ved hånden.
2. Efter brugernavnet skal der angives en adgangskode til din NOTA konto.
3. Lykkedes det, og finder din DAISYBox din NOTA konto, vil du efter få sekunder blive præsenteret for din egen Boghylde med den eller de bøger, som du aktuelt har adgang til.

Din DAISYBox enhed vil cirkulere gennem de bøger du har i din boghylde og annoncere titlen på dem, en efter en.

## **Afspil en lydbog.**

Generel håndtering (eller noget som er godt at vide):

- Benyt Lydstyrke Drejeknappen for at justere på lydstyrken, enten op eller ned, ved at dreje på den.
- Benyt Pil Op eller Pil Ned for at navigere fra bog til bog.
- Benyt Lydstyrke Drejeknap til at tilgå Pause menuen, ved at trykke en gang ned på den.

Når du gerne vil afspille en lydbog skal du navigere til den, som du gerne vil lytte til. Du hører titlen annonceret efterfulgt af et lydsignal som er en nedtælling. Efter tre sekunder, fra titlen er annonceret, vil din DAISYBox automatisk begynde at afspille pågældende bog.

Du kan også benytte OK Knappen hvis du bare gerne vil i gang.



## **InSight Synshjælpemidler ApS**

*Synshjælpemidler til hele Danmark.*

39 39 30 04 // [vej@synsh.dk](mailto:vej@synsh.dk)