

Vi er overbeviste om, at du blandt de mange modeller i vores **Starlight®**-serie af hovedbeskyttelse vil finde den rigtige til beskyttelse om dagen mod hovedskader som følge af fald eller stød mod hovedet.

Til beskyttelse mod farer om natten eller ved urolig søvn anbefaler vi vores **Starlight® Snooze**.



ato form^{gmbh}
 Zur Lauterhecke 34 • D-63877 Sailauf
Tel.: 06093 944-0 • Fax: 06093 944-444
info@ato-form.com • www.ato-form.com



Brug kun hovedbeskyttelsen, hvis den er i fejlfri stand!
Kontakt altid din forhandler, hvis der er fejl.

Kort guide

Hovedbeskyttelse

STARLIGHT® (LÆDER)

ato form^{...lust for life® gmbh}

Læs vejledningen omhyggeligt inden første brug!

Detaljeret brugsanvisning i henhold til MDR findes på www.ato-form.com / downloadområdet, via denne QR-kode eller på forespørgsel.



Du har valgt en hovedbeskyttelse fra **Starlight**®-serien fra ATO FORM. Vi vil gerne takke dig for din tillid og for at have købt vores produkt.

Fremstillingen af det købte produkt er underlagt en løbende kvalitetskontrol. Hvis du har spørgsmål til dette produkt og dets tilbehør, bedes du kontakte din forhandler.

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem inden første brug, da den er udarbejdet med henblik på brugerens sikkerhed og som vejledning til korrekt brug og vedligeholdelse.

Yderligere oplysninger findes på vores hjemmeside i download-området.

Sørg for, at **Starlight**®-hovedbeskyttelsen er i perfekt stand, inden du bruger den.

Hovedbeskyttelsen må kun bæres af én bruger. Opbevar altid hovedbeskyttelsen uden for rækkevidde af uautoriserede personer.

Indstil hovedbeskyttelsen korrekt inden brug. **Starlight**® **Secure** Leather-modeller kan tilpasses den individuelle hovedform på oversiden.

Alle modeller i **Starlight**®-serien er udstyret med en justerbar hagebånd, og modellerne **Starlight**® **Protect** og **Protect Plus** er desuden udstyret med en nakkebånd. Juster båndet/båndene, så hovedbeskyttelsen sidder godt, men ikke for stramt.

Hvis din hovedbeskyttelse er udstyret med en valgfri hagebeskytter, skal du kontrollere, at hagebeskytteren sidder korrekt, når du justerer remmen.

Sørg for, at remmene er lukket ordentligt.

Hvis **Starlight**® **Secure** læderhovedbeskyttelsen er udstyret med ekstra pande- og nakkebeskyttelse, skal du sørge for, at denne er korrekt og fastgjort.

Starlight® hovedbeskyttelsen kan rengøres med mild sæbe på en fugtig klud eller svamp. Stærke rengøringsmidler kan indeholde stoffer, der kan beskadige hovedbeskyttelsen og dermed forringe dens beskyttende virkning.

Bemærk de yderligere plejeanvisninger på bagsiden af denne brugsanvisning.

Hovedbeskyttelsen i serien **Starlight**® fra ATO FORM må kun anvendes til det tilsigtede formål og må ikke bruges til andre formål.