

## MONTERING OG OPSÆTNING

### KOMPONENTER

Din Elio Strong elektriske kørestol leveres forsvarligt emballeret i en papkasse. Åbn toppen af kassen, og læg den derefter forsigtigt på siden for lettere at kunne trække kørestolen og indholdet ud.

Joystick



Stol



Værktøj



Oplader



Litiumbatteri



Sikkerhedssele



Pude



Brugsanvisning



1. For at folde stolen ud: Hold i toppen af ryggen og træk den op, mens du presser ned på sædet for at folde kørestolen ud og fuldføre monteringen (se billede 1).

Hold i toppen af ryggen



Pres sædet ned for at folde ud

Billede 1



2. Fortsæt med at folde kørestolen ud til siddeposition, indtil du hører et KLIK, som bekræfter, at den er låst i den rigtige position (se billede 2).

3. Find sædepuden og rygpuden, som følger med. Placer sædepuden således, at bagsiden af puden og velcrolukningen på undersiden stemmer overens med velcrolukningen på sædet (se billede 3).



4. Placer derefter rygpuden over den øverste stang, og fastgør den til velcrolukningen på begge sider af ryggens spændestroppe. Sørg for, at rygpuden er placeret bag den horisontale rygstang på stolen (se billede 4).

5. Monter joysticket i den åbne holder på armlænet på højre side (kan flyttes til venstre side ved behov) (se billede 5). Stram skruen under armlænet for at fastgøre joysticket sikkert (se billede 6).



6. Forbind controllerens ledningsstik til CPU-ledningsstikket. Sørg for at justere benene korrekt i henhold til pilmarkeringen, så de ikke bliver bøjedede, knækker eller beskadiges (se billede 7).



Billede 7

**Bemærk** Sørg for, at kontaktbenene står «hvid pil» mod «hvid pil»..

## Montering af sikkerhedssele

Sikkerhedsselen har til funktion at begrænse forskydning og dæmpe bevægelser, samt forhindre at brugeren glider fremad i sædet. Selen kan justeres for optimal komfort. Ved en ulykke vil den holde brugeren sikkert på plads og reducere risikoen for personskade ved sekundær kollision.

### 1. Montering af sikkerhedssele:

Sørg for, at sikkerhedssele er fastgjort omkring taljen og til den nedre del af ryglænsrammen på den elektriske kørestol.

### 2. Justering af sikkerhedssele efter brugerens komfort:

Fastgør selen, indtil du hører et tydeligt klik. Juster selen til en passende længde. Den skal sidde godt, men ikke være så stram, at det medfører ubehag.

### 3. Løsne sikkerhedssele:

Tryk på knappen på spændet for at åbne selen.



### Advarsel!

Sørg for, at sikkerhedssele er korrekt fastgjort til den elektriske kørestol og justeret til en komfortabel position for brugeren. Kontrollér, om selen er løs eller beskadiget. Hvis du opdager et problem, skal du kontakte forhandleren for vedligeholdelse og reparation.

## BATTERI

### Montering af batteri

Placer batteriet i batteriholderen på begge sider af kørestolen. Hold i batterihåndtaget og før den anden side af batteriet ind i åbningen på batterirøret, indtil batteriet er helt på plads (se billede 8).



### Afmontering af batteri

Tryk på den bløde plastknap på batteriholderen samtidig med, at du trækker batteriet ud (se billede 9).



**Advasel!**

Sørg for, at strømmen til kørestolen er afbrudt, før du gør dette.

## SAMMENKLAPNING OG UDFOLDNING


### Fremgangsmåde for at klappe kørestolen sammen

1. Hold øverst på ryglænsrammen med én hånd. Med den anden hånd vipper du sikkerhedslåsen bag på ryglænet ned for at låse op.
2. Løft fronten af sædet op med hånden for at klappe kørestolen sammen.
3. Pres toppen af ryglænet og fronten af sædet mod hinanden.
4. Klap fodstøtten/pladen sammen.



### Fremgangsmåde for at folde kørestolen ud

1. Fold først fodstøtten ud.
2. Hold øverst på ryglænet med én hånd og fronten af sædet med den anden.
3. Pres hænderne fra hinanden, indtil du hører et «klik», som bekræfter, at kørestolen er helt udfoldet.

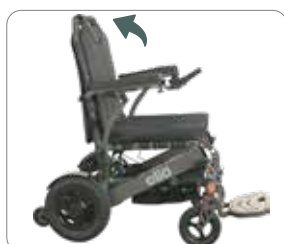

# JOYSTICK

## Kontrolpanel

Elio Strong er udstyret med en joystick-controller. De forskellige funktioner er vist nedenfor.

### Sænk hastighed

Hver berøring reducerer hastigheden ét niveau.

### Øg hastighed

Hver berøring øger hastigheden ét niveau.

### Venstre skærmknap

Skifter skærmvisning.

### Strømbryder

- Tryk på knappen for at tænde kørestolen og sætte den i standbytilstand.
- Hold knappen inde i 3 sekunder for at slukke for strømmen.

### Advarselslyd

Et pip høres, når kørestolen tændes, og når der trykkes på knapperne på kontrolpanelet.


### Højre skærmknap

Skifter skærmvisning.



### USB Ladeport

### Ladeport

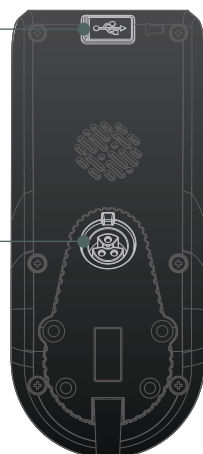

### Joystick

Styrer retning, hastighed og bremsekontrol



## Joystick og køretips

### Advarsel!

1. Undgå skarpe sving ved høj hastighed.
2. Skub køregrebet i den ønskede retning for at styre kørestolen. Grebet regulerer hastigheden proportionalt – jo mere du skubber det, desto højere bliver hastigheden. Den maksimale hastighed er begrænset til 6 km/t
3. Foretag ikke ændringer i joystick-indstillingerne. Hvis du oplever ændringer i, hvordan kørestolen reagerer på styring, skal du kontakte serviceleverandøren.

## Betjeningsretning for joystick


Joysticket gør det muligt at styre kørestolen fremad, bagud, til venstre og til højre, samt regulere acceleration, opbremsning og stop.



Når køregrebet står lodret, er kørestolen i standby. Skub grebet frem for at køre fremad. Jo mere det skubbes frem, desto højere bliver hastigheden.



Reducér trykket fremad på køregrebet forsigtigt for at sænke hastigheden. Når grebet vender tilbage til lodret position, stopper kørestolen, og bremserne aktiveres.

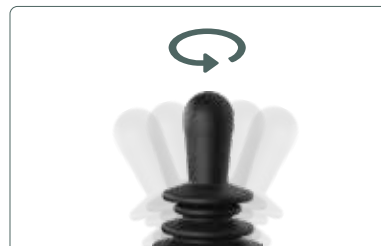

Kørestolen vil dreje til højre, venstre eller køre bagud afhængigt af retningen og hvor meget køregrebet bevæges.

# Display

<p><b>Bluetooth Status</b></p> <p>Ikke tilsluttet    Tilsluttet</p>	<p><b>Låsestatus</b></p> <p>Ulåst    Låst</p>	<p><b>Temperatur</b></p> <p>Overophedet    For kold</p>	<p><b>Advarsel om hastighedsbegrænsning</b></p> <p>Advarsel om reduceret hastighed ved lav batterikapacitet. Batteriet skal oplades straks.</p>
---	---	---	---

**Nuværende hastighed** (0.0 km/h)

**Hastighedsniveau** (Gear 1)  
Hastighedsniveauet justeres med [+] og [-]-knapperne mellem 1 (lavest) og 5 (højest).

**Batteri-indikator**

**Samlet kørelængde (km)** (100 km)

<p><b>Lavt batteri</b></p> <p>Indikatoren bliver gul, og én bjælke vises. Ikonet for hastighedsbegrænsning vises i øverste højre hjørne.</p>	<p><b>Tom for strøm</b></p> <p>Ikonet for hastighedsbegrænsning i øverste højre hjørne lyser, når batteriniveauet er ved at være tomt.</p>	<p><b>Opladningsstatus</b></p> <p>Det grønne ikon blinker kontinuerligt under opladning.</p>
--	--	--



# BANO LIFE

**Når den lille forskel betyder alt**

Hjælpemidler, som giver dig friheden til at leve på egne præmisser.

Bano Life  
Karetmagervej 19B, DK-7000 Fredericia  
info@banolife.com  
tlf. 75 56 32 44

**banolife.dk**