

## Vedligeholdelse af foldbar toiletstol

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsefrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

## Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Toiletstolen er ikke stabil	Benene er justerede til forskellige længder	Juster alle benene til samme længde.
Sædet er ikke vandret	Sædet er ikke låst korrekt i beslagene	Kontroller at sædet er placeret korrekt og låst til beslagene i siderammerne.

## Bortskafelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afeveres på en kommunal genbrugsplads