



Brugermanual

MAJ

BRUGERMANUAL – MAJ – DK VERSION 1



+45 86 44 73 55



info@danrehab.dk




www.danrehab.dk

Læs brugermanualen nøje igennem, før du anvender produktet. Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem.

Max belastning MAJ: 150 kg.

- a. Fjern teleskopbenenes låse clips (A).
- b. Træk forhøjerens teleskopben (B) ud (eller skub dem ind) således, at det svarer til den ønskede forhøjelse af toiletet – dog IKKE så højt, at brugeren ikke støtter fladt med fødderne på gulvet.
- c. Isæt låse clipsene igen. Sørg for, at de er skubbet HELT i bund i hullerne i stellet. Slå sædet på toiletkummen op.
- d. Placer toiletforhøjereren over toiletkummen.
- e. Alt efter forhøjelsens omfang kan man anvende en stænkskærm (C).
- f. MAJ kan også anvendes som en fritstående toiletstol, hvis en spand bruges i stedet for en stænkskærm. En nylongjord (D) fungerer som støtte for låget på toiletforhøjereren.
- g. Hvis gulvet omkring toiletkummen er skævt eller ujævnt, kan ét af teleskopbenene forsynes med en lille stilleskrue.

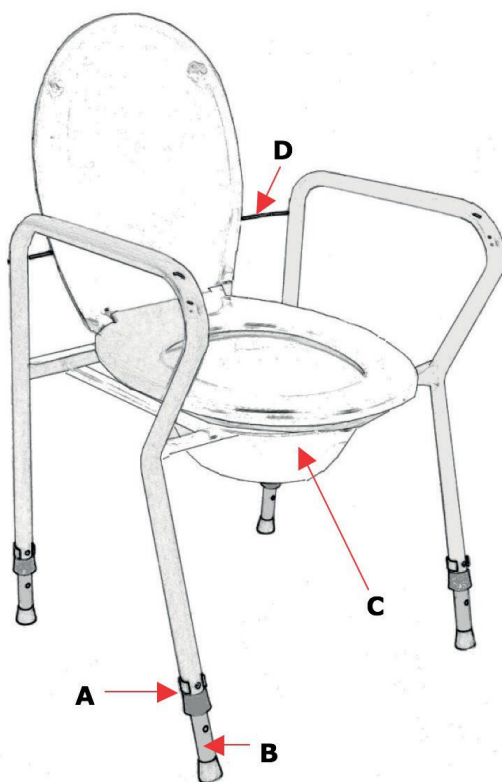



Sædelåget må ALDRIG slås mere end 110° op!



Tryk ALDRIG på sæde låg og sæde for at "hjælpe" disse ned hurtigere. Dæmpningssystemet, som disse er forsynet med, ødelægges derved!



Anvend ALDRIG sædelåget som siddeplads eller til at træde på!



Belast ALDRIG armlæn eller ryglæn (=låg) med hele kropsvægten – stående ved side af, foran eller bag toiletforhøjeren – da en evt. tipningsfare derved kan opstå.



Vi gør opmærksom på, at man ikke må lægge fuld kropsvægt på armlæn.

Rengøring & vedligeholdelse

1. Rengøring foretages med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler, hvorefter toiletforhøjeren spules. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud.
2. Nylongjord, teleskopben, sæde gummedupper og låse clips efterses for skader med jævne mellemrum og udskiftes om nødvendigt.
3. Udskift ødelagte/slidte dele:
HELLER ÉN GANG FOR MEGET END ÉN FOR LIDT!

