
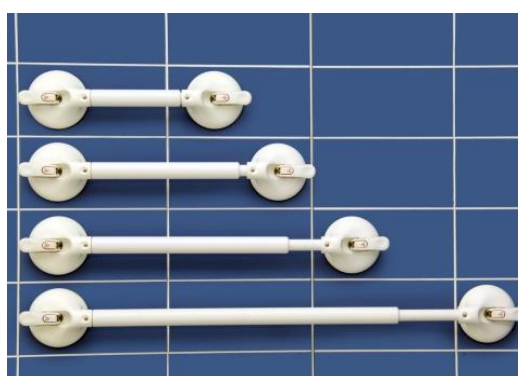
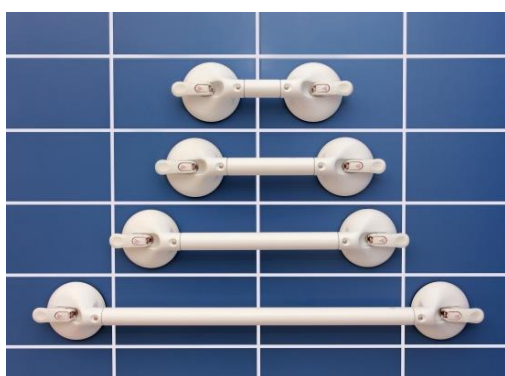


Mobile håndgreb med vakuum sikkerhedsindikator

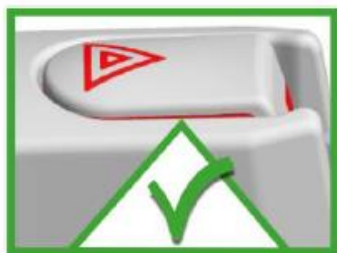

DK

Instruktionsmanual Mobile håndgreb

REF

14002 20S
 14002 25S
 14002 26S/SCL
 14002 27S/SCL

14002 21S
 14002 22S
 14002 23S
 14002 24S

14002 28S, 14002 29S (KID)



Indholdsfortegnelse

1. Generelt	2
1.1 Generelt information	2
1.2 Forklaringer / symboler i denne manual og på håndgrebet	3
1.3 Tilsigtet brug	3
1.4 Indikationer	3
1.5 Kontraindikationer	3
1.6 Produktets anvendelsesområde.....	3
1.7 Til information	4
1.8 Levetid	4
1.9 Genbrug.....	4
2. Sikkerhedsinformation.....	4
3. Montering / Samling.....	5
3.1 Montering.....	5
3.2 Montering/sugeevne (se siderne 8 og 10).....	5
3.3. Frigørelse	5
3.4. Adskillelse (se side 9)	5
4. Tekniske data	6
4.1 Mærker på produktet	6
4.2. Oversigt over tekniske data	6
4.3 Materialer	6
5. Vedligeholdelse	6
5.1 Vedligeholdelse.....	6
5.2 Vedligeholdelse.....	7
5.3 Opbevaring.....	7
6. Identificering og afhjælpning af fejlfunktioner	7
7. Bortskaffelse	7
8. Billeder af opsætning.....	8
8.1 Billeder for opsætning / samling	8
8.2 Billeder af montering / adskillelse.....	10
8.3 Billeder af vakuumsikkerhedsindikatorens funktion	11
9. Tilbehør.....	12
10. Supplerende produkter.....	12

1. Generelt

1.1 Generelt information



Læs denne brugermanual omhyggeligt før brug og følg sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt for at garantere din sikkerhed ved brug af det mobile greb. Behold disse instruktioner for fremtidige tvivlsspørgsmål og delagtiggør dem med andre brugere.

Hvis sikkerhedsreglerne, som er angivet i instruktionerne, ikke følges, bortfalder vores skadesansvar.

1.2 Forklaringer / symboler i denne manual og på håndgrebet

	Brugsanvisningen skal læses! (ISO 7010; M002)
	For personer med nedsat synsevne kan størrelsen på teksten indstilles for denne online brugermanual på https://www.mobeli.de/download-bereich
	Advarsel (indikerer en farlig situation)
	Producent (som supplement – grebets fremstillings år)
	Ordrenummer
	Maks brugervægt
	Det mobile greb fra Mobeli overholder Direktivet 93/42/EEC for medicinsk udstyr af klasse I
	De mobile MOBELI håndtag er i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745
	Parti angivelse
	Entydig produktidentifikation (Unique Device Identification)
	Beskyt mod sollys



Allergi varsel: Gummi sugekopperne er af høj kvalitet, indeholder naturligt gummilatex. Naturligt gummilatex kan forårsage allergiske reaktioner, inklusive anafylaksiske reaktioner.

1.3 Tilsigtet brug



Håndgreb eller Håndgreb til støtte for at komme i oprejst position både til børn og voksne. De mobile håndgreb er udviklet til at støtte den naturlige bevægelse. **De er ikke designet til at bære den fulde kropsvægt.**

Anden brug, f.eks. som sæde, bærehåndgreb eller klatrehjælp, er ikke tilladt.

1.4 Indikationer

Velegnet til personer med: begrænset mobilitet, balanceproblemer, muskelsvaghed (let til moderat), behov for postoperativ genoptræning, funktionsnedsættelser.

1.5 Kontraindikationer

Håndtaget er ikke egnet til personer, der lider af en eller flere af følgende tilstande:

Kognitive begrænsninger eller demens med manglende evne til sikker brug (medmindre plejepersonalet eller en hjælper kan låse vippearmen med vippearmsikringen (tilbehør) og regelmæssigt kontrollere vakuumtilstanden i forhold til den foreliggende overflade). Personer med en vægt over den angivne maksimale brugervægt.

Uegnede, ikke-porøse overflader eller ikke-klæbende overflader, hvor sikker fastgørelse ikke kan garanteres.

1.6 Produktets anvendelsesområde

Håndtaget er beregnet til stort set selvstændig brug i lukkede rum, f.eks. brusebad, badekar, toilet og håndvask. Vakuumsugekopperne må kun monteres på glatte, ikke-porøse og faste overflader, der er porøse og dampdætte, rene, tørre og fri for olie/fedt. På ru eller porøse overflader reduceres vedhæftningskraften og holdbarheden eller er ikke til stede. Vær opmærksom på, at fliser ikke nødvendigvis er plane og dampdætte (egnet til vakuum). Test først dine fliser og væggen.

Da vakuumsugekopperne er fremstillet af klæbende, blødt elastisk naturgummi, kan de tilpasse sig let strukturerede fliser (vigtigt: reduceret holdbarhed! Overhold sikkerhedsangivelserne).

Det mobile håndtag kan bruges hjemme, f.eks. til midlertidige opgaver efter et hospitalsophold eller til afprøvning af boligen. Det kan også bruges på klinikker og plejehospitaler som et ekstra og kortvarigt supplement til stationære håndtag.

Det mobile håndtag kan også bruges, hvor faste håndtag ikke kan monteres, f.eks. i glasbrusekabinen eller i badekarret. Hvis det ikke er tilladt (muligt) at bore i væggene, f.eks. i en lejlighed, eller hvis der kan være vand- og/eller strømledninger i væggen.

1.7 Til information

På hoteller og i offentlige bygninger i Europa skal klinker være ikke-porøse og damptætte (ifølge DIN EN 159 og 176). Ifølge Standard, DIN 12004, skal klinkeklæbemateriale have en minimumsstyrke på 0,5 N/mm². F.eks. for 2 klinker med en størrelse på 147x147 mm x0,5 N/mm² vil dette indebære en sugeevne på ca. 2,160 kg. Selv med en effektiv klæbeoverflade på blot 1/3 del af klinkeoverfladen (f.eks. grundet en hårdt takket murske) og udfyldte klinkefuger, er der stadig en sugeevne på ca. 700 kg.

Desværre kan man ikke altid stole på denne antagelse; derfor er det helt afgørende at teste sugeevnen af de pågældende klinker eller andre af væggens overfladematerialer.

Der kan også være mindre holdekraft på grund af materialets aldring eller ved tørbyggeri, derfor er det nødvendigt at foretage en kontrol (f.eks. ved at belaste håndtaget med ryk).

1.8 Levetid

Den forventede levetid er 6 år (ved dagligt brug og i overensstemmelse med det tilsigtede formål) i en institution eller i en offentlig bygning. Forudsætningen for dette er overensstemmelsen med vedligeholdelsen og med sikkerhedsreglerne, som er angivet i disse brugsinstruktioner.

Den reelle levetid kan variere afhængigt af brugsfrekvensen og brugsintensiteten. Håndtagene er testet i henhold til ISO 17966:2016.

1.9 Genbrug

Produktet er egnet til gentaget brug. Hvor ofte produktet kan bruges afhænger af typen af brug. Rengør og desinficér produktet fuldt ud før brug igen og kontrollér håndgrebet omhyggeligt specielt sikkerhedsvakuumindeklarations funktion.

2. Sikkerhedsinformation



- **Før hver brug af det mobile håndgreb skal vakuumsikkerhedsindikatoren kontrolleres, og der skal efterfølgende eventuelt handles ifølge instruktionerne (se side 10).**
- **Selv på fuldstændigt uigennemtrængelige, glatte klinker kan det aldrig fuldt ud afgøres, hvornår vakuummet forringes (f.eks. pga. mindre revner). Derfor er det vigtigt altid at holde øje med vakuumsikkerhedsindikatoren.**
- Brug kun det mobile greb når den nødvendige erfaring er erhvervet eller under vejledning af en person, som har erfaring med brug. Børn må kun anvende grebet under vejledning, eller hvis sikkerhedslåsen er sikret med en Vippestopsikring (se tilbehør side 11).
- Før hver ny opsætning, skal grebets standsmæssige funktion checkes. Vær specielt opmærksom på gummi-sugekopperne. De skal være rene og ubeskadigede, og der må ikke være tegn på revner eller hakker
- **Anvend aldrig greb med beskadigede gummi- sugekopper og/eller reduceret sugeevne.**
- Husk, at håndtaget kun holder så godt som underlaget; kontroller derfor underlagets vedhæftning (f.eks. fliser på væggen) inden brug på et nyt sted.
- Efter at have trykket vakuumpalerne ned kan sugeevnen, som er skabt af vakuummet, være helt eller delvist væk, specielt i forbindelse med uglaserede klinker, natursten, træ og på keramisk coating, som har mønster/er blevet slebet, eller som er blevet overfladeslebet for at give en grebssikker overflade. Ved greb med vakuumsikkerhedsindikator bliver dette tydeligt ved at advarselsvippen løfter sig.
- **Advarsel!** Anvendelse i vand vil reducere sugeevnen.
- Sugeevnen, som angivet ovenfor, virker under normal stuetemperatur (10°-30°C). Ved høje temperaturer, som f.eks. i en sauna vil sugeevnen blive reduceret. **Advarsel!** Højere temperaturer på mere end 41°C kan opnås ved solstråling eller ved kontakt med varmt vand, hvilket kan medføre hudskader og/eller forbrænding.
- Den angivne sugeevne er beregnet på ca. 300 m over havet. Ved større højder formindskes sugeevnen (med ca. 10% per 1000 højdemeter).
- Udsæt aldrig sugekopperne for UV- stråling (sollys) gennem længere tid, ellers vil de hurtigt miste deres elasticitet. Af denne årsag fastgør aldrig grebet til en overflade (f.eks. et vindue), som vil blive oplyst udefra.
- Placer ikke noget under grebet, som kan skades af håndgrebet ved pludselig frigørelse og efterfølgende fald oven på det, ellers fjern grebet hver gang, det har været i brug.
- **Det mobile håndgreb må kun anvendes, hvis Vippestop Sikkerhedslåsen er låst korrekt.**
- Monter ikke håndgrebet på køretøjs metalpaneler, folier, eller tynde glasoverflader, fordi vakuummet, som dannes ved sugekoppen, kan forvride og beskadige disse materialer.

- Hvis håndgrebet forbliver påsat gennem længere tid, er der risiko for at underlaget (f.eks. et badekar) bliver permanent plettet af gummiet.
- Kombiner aldrig MOBELI produkter med andre producenters dele. Dette vil sætte garantien og enhver skadeserstatning ud af spillet. **Risiko for uheld!**



Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med dette medicinske produkt, skal du kontakte producenten af dette produkt (e-mail: info@mobeli.de) samt den nationale kompetente myndighed i dit land.

3. Montering / Samling

3.1 Montering (se side 9)

Samling: Klik sugeskop delen sammen med teleskopstangen i begge ender (fig. 11) – vær opmærksom på, om stangen er klikket rigtigt fast – lyt efter klik.



Test kliklåsens holdbarhed ved at trække dele fra hinanden! Håndgrebet må ikke anvendes, hvis begge kliklåse ikke er låst sikkert.

3.2 Montering/sugeevne (se siderne 8 og 10)

1. Undersøg sugeskop puderne, og den overflade som de er monteret på.
2. Foretag gennemgående rengøring af overfladen (fig. 1), så den er ren (f.eks. for størknet lim) og er fri for fedtstof. Ligeledes skal gummiskivens overflade være ren.
3. **Tryk det mobile håndgreb hårdt mod den overflade, hvor det skal suges fast** (fig. 3-5).
 - a. **Låsepalerne skal være løse på dette tidspunkt.**
 - b. Til enhver tid skal det tilsikres, at **gummiskiverne** altid er placeret med deres fulde suge flade på klinkerne eller på andre overflader, så intet udfyldningsstykke eller klinkefuger (fig. 8 og 9) er placeret under en gummiskive, og at gummiskiverne monteres mindst 10 mm over en fuges nedre kant (fig. 2). Med teleskopgrebet (bestillingsnumre: 14002-21S, -22S, -23S, -24S) kan man justere grebets længde for at opnå dette (fig. 6 og 7).
4. Mens man trykker håndgrebet fast til den overflade, til hvilken det skal fastgøres, vip først den ene låsepal og dernæst den næste låsepal (fig. 2, 3, 4, 5 og 7)
5. Vakuumsikkerhedsindikatoren overvåger permanent vakuumtilstanden. Efter at låsepalen er trykket på plads, skal sikkerhedsindikatoren med **det røde felt være helt i niveau med låsepalens overflade** (side 10, fig. 13 og 15). Over tid når vakuumbet aftager, vil sikkerhedsindikatoren hæve sig.
 - Hvis sikkerhedsindikatorens røde felt er kommet til syne, må grebet under ingen omstændigheder anvendes, og grebet skal straks genmonteres.
 - **Desto tydeligere sikkerhedsindikatorens røde felt kan ses, jo lavere er den sugeevnen** (fig. 14 og 16)
6. Kontrollér vakuumsikkerhedsindikatoren før en hver brug. Personer med nedsat syn eller blinde kan føle sig frem til vakuumstyrken på indikatoren. Hvis vakuumsikkerhedsindikatoren ikke er helt i niveau med overfladen, genmonter da sugeskopperne. Hvis sikkerhedsindikatoren stadig er hævet, efter at vippehåndtaget er trykket ned, og fortsat er hævet, efter at vippehåndtaget er trykket i bund, skal man genmontere håndgrebet (se fejlfunktioner, side 7). Hvis tilbagetrækning af sikkerhedsindikatoren ikke kan opnås, må håndgrebet under ingen omstændigheder anvendes.



3.3. Frigørelse

1. Grib fat under vippearman med fingeren og løft den, samtidig med at du placerer tommelfingeren på den strukturerede fordybning på vippearman for at forhindre tilbageslagseffekten. **Forsigtighed bør udvises – ved forkert håndtering er der fare for at blive klemt!**
2. Vent et øjeblik. Gummiskiverne vil afspændes efter 30-60 sekunder og returnere til deres oprindelige form, og derfra kan disse afmonteres fra væggen. Hvis gummiskiverne fortsat klæber i længere tid, kan man som supplement løfte gummiskiverne i en side (mellem væggen og gummiskiven) med en finger, så der kan komme luft ind under.
3. **Forsøg ikke at løsne gummiskiverne med skarpe genstande eller med værktøj, da disse derved ville blive beskadiget.**
4. Når håndgrebet ikke er i brug, opbevar det med gummiskiverne i ulåst tilstand (dvs. med vakuumlåsepalerne løftet), fladt og jævnt. Beskyt den mobile håndgreb (f.eks. i emballagen) fra UV-stråler.



3.4. Adskillelse (se side 9)


Adskillelse: Løsn kliklåsene i begge ender af teleskopstangen (fig. 10) og fjern sugeskopperne (fig. 11). Opbevar sugeskopperne med låsepalerne løftet og på en flad overflade (side 9, fig. 12).

4. Tekniske data

4.1 Mærker på produktet (forklaring af symbolerne se side 3)

På bagsiden af håndtaget (C)  (01)0425025440xxxx
(10) JJJJ-MM   1-Hand-Griff / 2-Hand Griff / 2-Hand-Teleskopgriff
ROTH GmbH D-72213 Altensteig 20XX
MOBELI.de   140022xS  xx

På håndtagets overside (D)   max. xx kg  

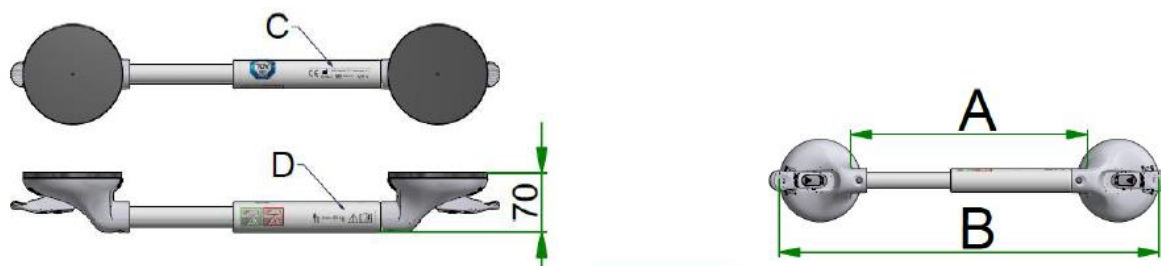

 **Maks. vægt i de tekniske data og på håndgrebets oversigt skal overholdes. Det mobile håndgreb er blevet udviklet til at understøtte naturlig bevægelse. De er ikke designet til at bære den fulde kropsvægt.**

4.2. Oversigt over tekniske data

	Grebslængde A (justerbar for teleskopgreb) i mm	Total længde B i mm	Grebs Ø i mm	Maks. brugervægt in kg	Maks. brugervægt in pund	Produkt vægt i kg
Roth ordenr						
14002 20S	110	330	35	105	230	0,76
14002 21S	220-345	440-565	35 / 24	85	187	0,89
14002 22S	340-465	560-685	35 / 24	85	187	1,02
14002 23S	440-565	660-785	35 / 24	85	187	1,13
14002 24S	665-790	885-1010	35	80	176	1,37
14002 25S	210	430	35	100	220	0,85
14002 26S/ SCL	350	570	35	95	208	1,01
14002 27S/ SCL	650	870	35	95	208	1,33
14002 28S	170	430	26	75	165	0,79
14002 29S	310	570	26	75	165	0,88

4.3 Materialer

Håndgrebet er fremstillet i HI PVC -materiale, og alle metaldele er fremstillet i rustfrit stål. Sugekoppen er fremstillet af NBR, sugekop huset er fremstillet af PA 6.6.

5. Vedligeholdelse

5.1 Vedligeholdelse (Rengøring og desinficering)

- Rengør håndgrebet med en klud og almindeligt husholdningsrengøringsmiddel såsom sæbevand, men anvend ikke skrappe rengøringsmidler og heller ikke med slibende effekt. Anvend ikke fortynder eller petroleum og anvend ikke rengøringsmiddel, som nedbryder plastik.
- Rens håndgrebet gennemgående med varmt vand, indtil alt sæbe og skum er fjernet (hvis ikke fjernet kan rust hænge fast på det rustfrie stål).
- Hold altid gummiskiven fri for olie, støv og snavs ved at skylle med varmt vand og efterfølgende aftørring med en fnugfri klud.
- En grundig rengøring af sugekopperne med vores rengøringsmiddel (best. nr. 1400680) eller isopropanol øger sugeeffekten og anbefales med længere mellemrum. Afhængigt af hyppigheden af brugen og brugsforholdene, f.eks. efter brug af olieholdige badeadditiver.
Disse rengøringsmidler må kun bruges på sugekopperne, ikke på plastdelene.

- Desinficér produktet ved at aftørre alle overflader med en klud påført rengøringsmiddel.
 - I hospitalsmiljøer henvis også til "Recommendations of the Commission for Hospital Hygiene and Infection Prevention" på Robert Kock Institutets hjemmeside, www.rki.de.
 - Grebet er resistent over for aktive midler i hånd- og overfladerengøringsmidlerne, som er godkendt af DGHM (Disinfection Commission of the German Society for Hygiene and Microbiology) med undtagelse af fenol, æter, pyridin, derivater og rhodanat.
- ⚠ **Kun desinficering med ren alkohol-baseret indhold må anvendes på gummisugekopperne.**

5.2 Vedligeholdelse (Service)

- Hvis håndgrebet har været opsat på væggen gennem længere tid, vil gummisugekopperne blive overstruktet. Derfor anbefaler vi at nedtage grebet fra væggen ca. hver 2. uge og lade det ligge natten over på en plan overflade med sugekopperne deaktiveret og derefter genmonter håndgrebet næste dag.
- Undersøg gummiskiverne for eventuelle funktionsmæssige revner/skader pga. reduceret elasticitet grundet alder, slid, udsættelse for sollys, forkert opbevaring og mærker/ridser. Hvis gummiskiverne beskadiges og sugeevnen derfor svækkes, skal begge sugekop hoveder (reservedelsnummer 14002S) eller gummiskiverne (reservedelsnummer 1402721) udskiftes via en uddannet specialist.
- Frihold altid vakuumsikkerhedsindikatoren for snavs.
- **Kontrollér håndgrebet regelmæssigt for skader, og brug under ingen omstændigheder håndgrebet, hvis det er beskadiget.**

5.3 Opbevaring

- Hvis håndtaget ikke bruges i længere tid, skal det opbevares med afspændte sugekopper på en plan overflade (helst i emballagen) og beskyttet mod sollys

6. Identificering og afhjælpning af fejlfunktioner

Fejlfunktioner	Mulige årsager	Foranstaltninger
Nyt greb: Sikkerhedsindikatorerne hæver sig efter kort tid	Lim eller andet snavs på overfladen	Foretag gennemgående rengøring
	Overfladen er ikke ikke-porøs selvom den synes jævn eller er skadet (f.eks. en papirstynd revne i klinken). Mulig testprocedure: Påsæt grebet på en rude eller spejl og hold øje med sikkerhedsindikatoren. Hvis sikkerhedsindikatoren ikke bevæger sig mere, er fejlen i underlaget.	Om muligt, fastgør håndgrebet et andet sted hvor underlaget er ikke porøst. Hvis ikke muligt, kan man pålime selvklæbende rustfri stålplader (ordrenr.: 1461414). Se tilbehør.
Gammelt greb: Sikkerhedsindikatorerne hæver sig efter kort tid	Gummiskiver er ridsede eller beskadiget	Ved skade kan gummiskiverne (ordrenr.: 1402721) udskiftes via forhandleren, eller hele sugekop hovedet kan udskiftes (ordrenr.: 14002S)
Sikkerhedsindikatoren er let hævet efter montering	1. Indikatoren er ikke vipet ned før låsepalen er trykket hårdt ned	Genmonter håndgrebet efter at have trykket sikkerhedsindikatoren hårdt ned (side 8, fig. 2, pil 2) Se video: vedhæfte håndtag.
	2. Gummiskiven er overstruktet. Sker når håndgrebet har været opsat for længe	Nedtag håndgrebet og opbevar det på en jævn overflade natten over med låsepalen i hævet tilstand (side 9, fig. 12) Opsæt grebet igen næste dag og tryk låsepalen hårdt ned. Hvis sikkerhedsindikatoren stadig stikker ud efter at have trykket den hårdt ind, ordrenr.: 1402721) udskiftes via forhandleren, eller hele sugekop hovedet kan udskiftes (ordrenr.: 14002S)

Video vedhæfte håndtag



7. Bortskaffelse


Produktets emballage bør genanvendes. Metaldelene kan genanvendes som genanvendeligt metal. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de nationale regler herfor. Kontakt din lokale genbrugsplads for yderligere information.




Disse mobile håndgreb fra ROTH må ikke eksporteres til USA (se den amerikanske version af brugermanualen).

Med forbehold for tekniske ændringer.

8. Billeder af opsætning

8.1 Billeder for opsætning / samling

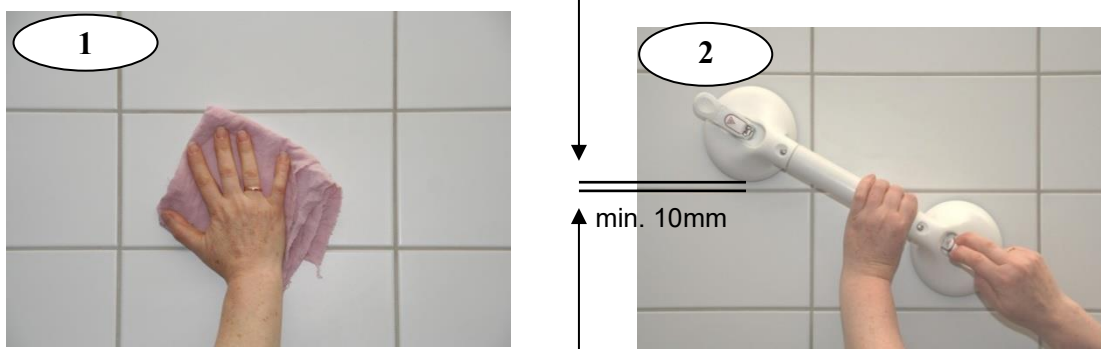


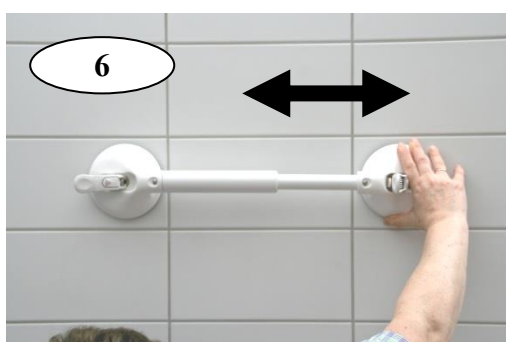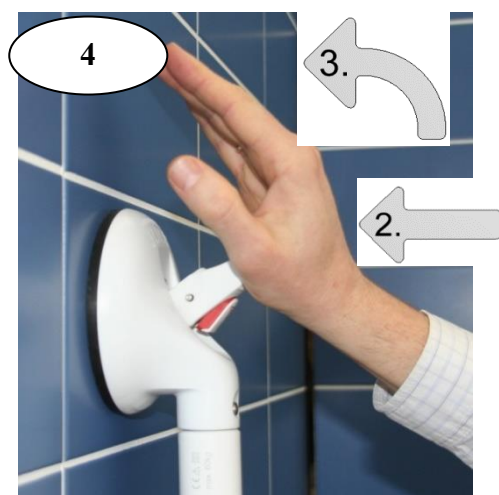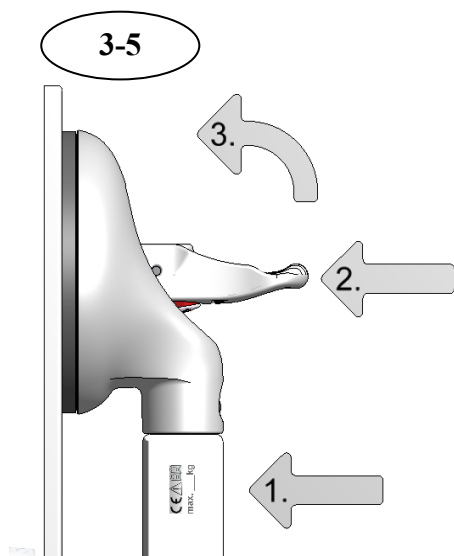

REF

1400221S; 1400222S; 1400223S; 1400224S

8.2 Billeder af montering / adskillelse

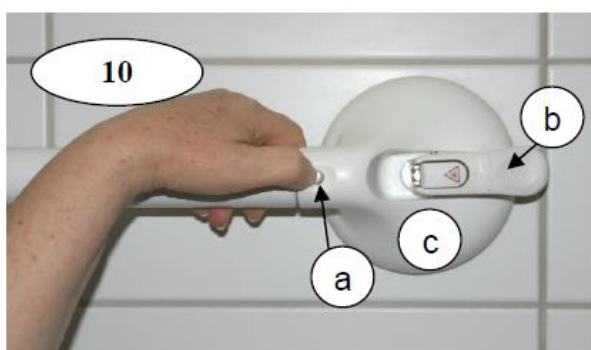

REF 14002S

MOBELI® .COM
D-72213 Altensteig

ROTH® Made in Germany

8.3 Billeder af vakuumsikkerhedsindikatorens funktion

Vakuumsikkerhedsindikatoren på låsepalen



Korrekt!



Sugeevnen for svag!


Håndtaget skal straks monteres igen.

Fare for uheld!

Vakuumsikkerhedsindikatoren virker. Vakuummet overvåges permanent


Symbolforklaringer:

15

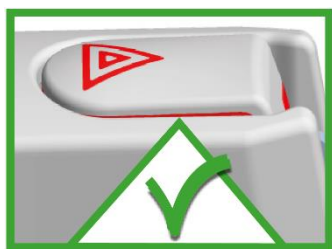

Fuld sikkerhed for den angiven maksimale brugervægt.

16

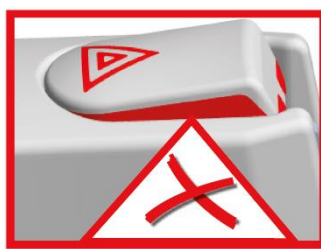

OBS: Håndgrebet skal tages af og genopsættes med det samme!

Håndgrebets vakuum er reduceret. Håndgrebet er ikke længere tilladt at bruge med den maksimalt angivne brugervægt. (Blot til orientering: Håndgrebet har stadig reduceret)

9. Tilbehør

Tilbehør fås hos din forhandler

For at uautoriserede personer (f.eks. personer med demens, børn eller i offentlige områder) ikke kan åbne håndtaget, anbefaler vi vores vippearmsikring.

REF

1400672 (2 Sikringer, 1 Nøgle)

Video Skift Lås



En grundig rengøring med vores rengøringsmiddel (bestillingsnr. 1400680) øger sugeeffekten og anbefales med længere mellemrum, afhængigt af hyppigheden af brugen og brugsforholdene (f.eks. ved tilsmudsning eller efter brug af olieholdige badeadditiver).

Video Rengøring



Vinkelledsadapter

Ordrenr.: 1400558

Til brug ved hjørner

Monteringsadapter

Ordrenr.: 1400574

Kraftforstærkning til betjening af vippearmen

Mareringsringe

Ordrenr.: 1402766

For bedre kontrast for personer med synsnedsættelse

Rustfri stålplader

Ordrenr.: 1461414

Til non-porøse klinker

Sugekopbeskyttelse

Ordrenr.: 1400682

Til transport

Video Skift udvidelse



10. Supplerende produkter

Ved højere belastningskrav anbefaler vi vores QuattroPlus!

QuattroPlus-håndtagene er godkendt til en maksimal brugervægt på op til 160 kg.



Hvis du har brug for yderligere information og videoer omkring produkter, er du meget velkommen til at kontakte os. Du finder videoer på vores hjemmeside, www.mobeli.com

Brugsvejledningen findes her: www.mobeli.com/download-area

Video MOBELI Produkter



Et mærke af



MOBELI®

ROTH® GmbH
Kohlbergstraße 5
D-72213 Altensteig
Phone: (+49) 07453/9381-0 Fax - 23
E-Mail: info@mobeli.de
Internet: www.mobeli.com