




*- Hvor styrke og fleksibilitet mødes*



# Brugervejledning

**SkovTrup**

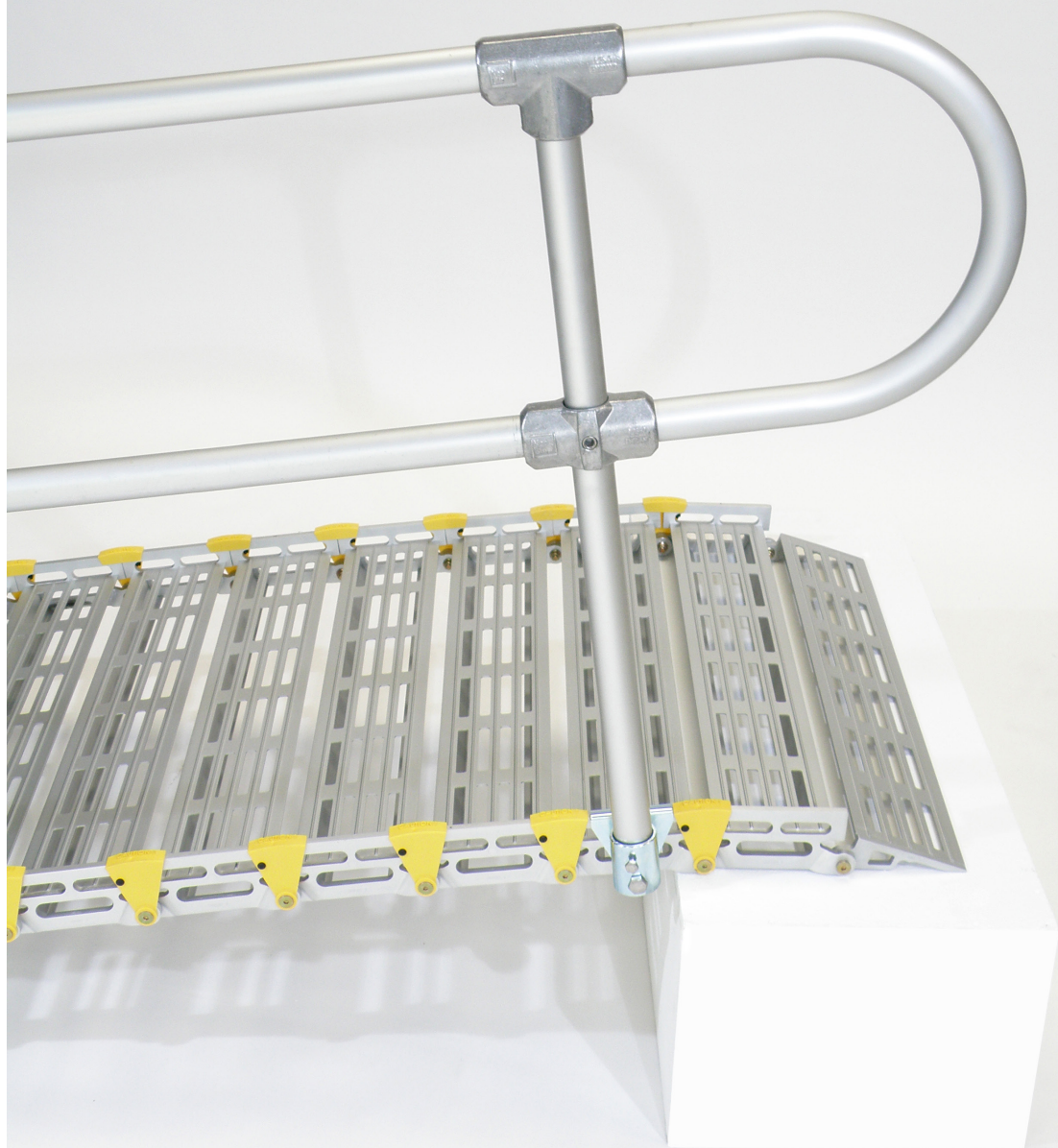

## **INDHOLD**

- Vigtigt om sikkerhed
- Generel information
- Brug af Roll-A-Ramp
- Tilføje og fjerne led
- Alsidighed
- Låsepinde
- Semi-permanent montering
- Afstandsstykker
- Sikkerhed
- Længde/bærende vægt oversigt

## **VIGTIG BESKED OM SIKKERHED**

1. Håndter aldrig din Roll-A-Ramp mellem leddene, når du pakker den ud eller sammen. Risiko for at klemme fingre. I stedet: tag fat i hullerne på siden af rampen.
2. Håndter aldrig din Roll-A-Ramp på steder markeret med gule sikkerhedshætter.
3. Brug kun din Roll-A-Ramp som beskrevet i denne manual.
4. Rul din Roll-A-Ramp ud vertikalt. Vend den efterfølgende og læg på plads.
5. Træd aldrig på kanterne.
6. Du må ikke løbe eller hoppe på ramperne.
7. Når rampen placeres, skal du sikre at mindst et bærende element af rampen er placeret på det øverst plateau (se billede næste side).
8. Brug kun rampen på fast grund.
9. Vær sikker på at rampen står fast og brug evt. tilbehør som kan købes hos din forhandler.
  - Transportbælte
  - Diverse beslag
  - Anti-slip måtte

### **VÆRKTØJSLISTE (til rampe uden gelændre)**

- Unbrakonøgle (leveres med din Roll-A-Ramp – 13 mm)
- Skiftenøgle (leveres med din Roll-A-Ramp)

## GENEREL INFORMATION

Roll-A-Ramp er lette, holdbare og alsidige ramper. Ramperne er produceret af anodiseret aluminium, som også bruges til produktion af fly. Din Roll-A-Ramp giver dig mange år med nem bevægelighed og nye adgangsmuligheder.

## BRUG AF DIN ROLL-A-RAMP


For at bruge din Roll-A-Ramp; placer den sammenrullede rampe stående. Mens rampen stadig står på siden, fjern remmen og rul rampen ud. Når ramper er rullet helt ud, kan den vendes og placeres efter behov.

For at rulle din rampe sammen igen, simpelt gå ovenstående procedure igennem baglæns. Nemt og enkelt.

De gule sikkerhedshatte er designet til at beskytte dine fingre mod at blive klemt imellem leddene og skal altid være monteret. Brug IKKE din rampe uden alle sikkerhedshatte korrekt monteret.

Bemærk; at en af enderne af hver rampe er markeret som "Upper End". Denne ende skal ALTID være den øverste ende af rampen.


Leddene på den øverste halvdel af din Roll-A-Ramp har en 1° krumning og leddene på den nederste halvdel har krumning på 0°. Dette sikrer, at kørestolsbrugere kan anvende rampen ubesværet. De vinklede led sikrer, at brugeren nemt kan komme ind i et køretøj, på en veranda eller gennem en døråbning på grund af den favorable adgangsvinkel.

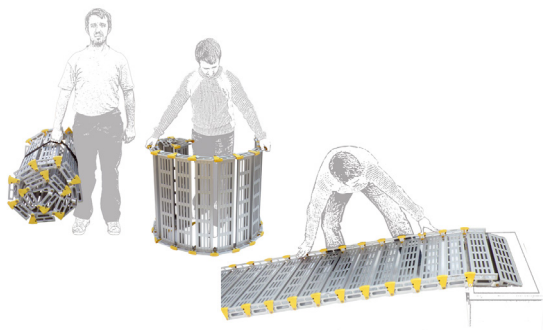

## VIGTIGT!

For at højne sikkerheden og forhindre beskadigelse din rampe er det vigtigt, at du placerer det første bærende led af den øverste del af rampen på landingen (se nedenfor).

Adgangsleddet er **IKKE** et bærende led.

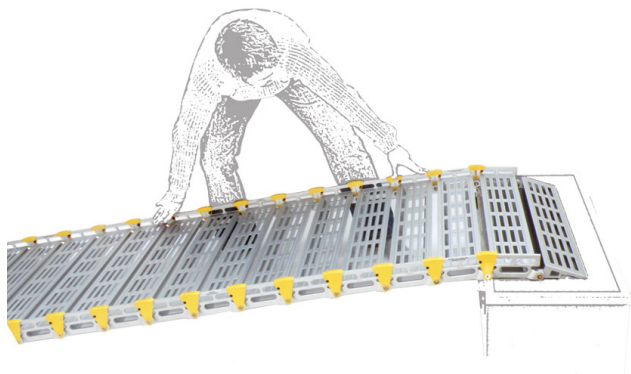

## TILFØJE OG FJERNE LED

Din Roll-A-Ramp er designet til, at du selv kan justere længden ved nemt at tilføje eller fjerne led. Dette gøres ved at fjerne bolten fra leddet på den laveste del og enten indsætte eller fjerne de ønskede led.

## ALSIDIGHED

Din letvægts Roll-A-Ramp rulles sammen og kommer med dens egen praktiske rem for nem transport og opbevaring.

Du kan konfigurere din Roll-A-Ramp til brug i mange situationer. Udover at bruge den som et transportabelt rampesystem, kan du lave din Roll-A-Ramp så den blive stiv, foldbar på midten eller semi-permanent med faste monteringsbeslag.

For at lave din rampe så den kan foldes på midten, skal du have to led løst spændt, så de kan virke som drejeled.

## KONFIGURER DIN RAMPE TIL KUN AT FOLDE PÅ MIDTEN

1. Læg rampen med bunden i vejret.
2. Spænd de relevante bolte stramt ved at benytte en 13 mm unbrakonøgle og en sikftenøgle.
3. Led hvor rampe skal dreje over spændes mindre.

Bemærk at rampen vil her støtte på karm kant!



## LÅSEPINDE

Låsepinde fås som tilbehør og anvendes til nemt og hurtigt at dele din rampe i sektioner for enklere transport og opbevaring. Låsepinde kan købes hos din Roll-A-Ramp forhandler.


Låsepindene kan bruges til enhver sektion, hvor led er sat sammen.

Fjern boltene ved hjælp af værktøjet som fulgte med rampen. Indsæt låsepinden i stedet for boltene.



## SEMI-PERMANENT MONTERING

Den semi-permanente montering er det nemmeste system at anvende til din Roll-A-Ramp.

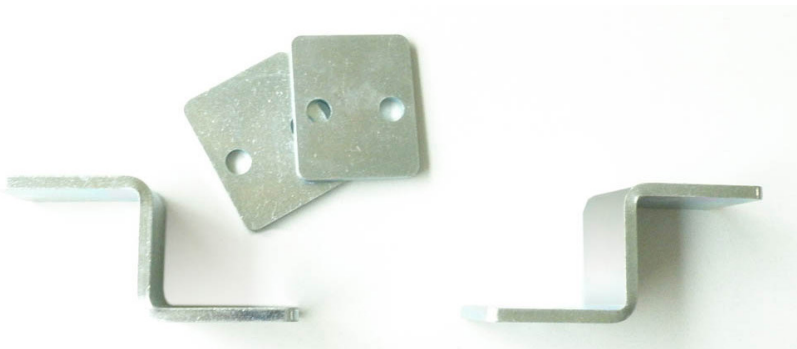

Beslagene kan installeres i døren på jeres bil og kan bruges til alle rampe typer.

Monteringsbeslagene består af tre dele til hver rampe. Den store skive monteres evt. på indersiden af døren til jeres bil. Denne kombination af beslag er designet til maksimum styrke ved support af din Roll-A-Ramp.

Kontakt din forhandler for mere information og flere muligheder.

## AFSTANDSSTYKKER

Afstandsstykker til 31 cm model: Afstandsstykker holder ramperne parallelle i forhold til hinanden og sikrer at dine 31 cm ramper bliver holdt i korrekt afstand. Din forhandler kan levere afstandsstykker af varierende størrelser for forskellig akselvidde. Kontakt din forhandler for at høre mere.





## VIGTIGT – SIKKERHEDSINFORMATION

De følgende instruktioner og råd er nødvendige for din personlige sikkerhed.

Vi anbefaler, at du læser og forstår manualen, inden du tager din Roll-A-Ramp i brug. Har du spørgsmål så kontakt din forhandler.

- 1. Løfte og opsætning:** Hvis rampen er mere en 1,5 m lang, vejer den over 14,7 kg. For at undgå skader bør du ikke løfte eller flytte den alene.
- 2. Opsætning:** Stil den sammenrullede rampe stående, fjern remmen og rul rampen ud, mens den stadig står op. Når rampen er rullet fuldt ud, kan du vende og placere den efter behov. For at rulle rampen sammen igen; gennemgå procedure for opsætning men baglæns og påfør remmen for sikkerhed.  
På denne måde er hoveddelen af rampens vægt altid på jorden under opsætning og risiko for skader minimeres.
- 3. Sikkerhedshatte:** Gule sikkerhedshatte er monteret for at beskytte mod klemte fingre under op- og nedtagning af rampen. Pas altid på fingrene, hvor siderne støder sammen og fra mellemrum mellem individuelle dele for at undgå klemmeskader.
- 4. Støtteben:** Når du bruger en 76 cm rampe, som er længere end 274 cm, skal støtteben benyttes. Disse opretholder det bærende forhold mellem vægt og længde og sikre samtidig at rampen ikke føles fjedrende ved brug.
- 5. Vinkel på hældning:** Generelt anbefales stigning 1:20, hvilket vil sige en 10 cm stigning vil kræve en 200 cm rampe (bærende længde). Dog kan man i praksis for selvkørt manuel kørestol gå op til 1:7 og for hjælpe-skubbet kørestole og elkørestole 1:5. Kontakt venligst deres forhandler for mere information angående din kørestol.  
Maksimum hældning = 30° (for industriel transport og andre tekniske anvendelser).

6. **Vedligeholdelse:** Det er vigtigt, at du efterser din rampe minimum hver 6. måned for tegn på skader eller slitage fra brug. Særlig opmærksomhed skal gives til alle dele, som holder rampen samlet (bolte, skruer og sikkerhedshatte). Det er vigtigt, at disse alle er til stede og korrekt strammet til. Rengør alle overflader med mild rengøringsmiddel for at fjerne olie, fedt og andet. Evt. brug WD40 oliespray.
7. **Trin/dørbredde:** Brug aldrig rampen, når den er for bred til at gå gennem dørbåningen. Dette kan risikere i at rampen hælder og vil ikke være sikker at bruge. Vælg evt. en smallere rampetype. Brug aldrig rampen, hvis trinnet, hvor rampen hviler på, er smallere end selve rampen. Dette kan være farligt, da rampen risikerer at tippe.
8. **Glatte overflader:** Benyttes rampen på glatte eller meget polerede overflader (fx marmor) bør en gummimåtte placeres under begge ender af rampen for at undgå udskridninger.
9. **Opbevaring:** Opbevar rampen sikkert efter brug.
10. **Benyt kun originale reservedele.**








## TABEL OVER LÆNGDE OG TILLADTE VÆGT

| Total længde (cm) | Antal bærende led | Bærende længde (cm) | Belastning/ led (kg) |                |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 91                | 3                 | 46                  | 450                  |                |
| 107               | 4                 | 61                  | 450                  |                |
| 122               | 5                 | 76                  | 450                  |                |
| 137               | 6                 | 91                  | 450                  |                |
| 152               | 7                 | 107                 | 450                  |                |
| 168               | 8                 | 122                 | 400                  |                |
| 183               | 9                 | 137                 | 400                  |                |
| 198               | 10                | 152                 | 350                  |                |
| 213               | 11                | 168                 | 300                  |                |
| 229               | 12                | 183                 | 300                  |                |
| 244               | 13                | 198                 | 300                  |                |
| 259               | 14                | 213                 | 300                  |                |
| 274               | 15                | 229                 | 240                  |                |
| 290               | 16                | 244                 | 220                  |                |
| 290               | 16                | 244                 | 300                  | Med støtte     |
| 305               | 17                | 259                 | 300                  | Med støtte     |
| 320               | 18                | 274                 | 300                  | Med støtte     |
| 335               | 19                | 290                 | 300                  | Med støtte     |
| 351               | 20                | 30                  | 300                  | Med støtte     |
| 366               | 21                | 320                 | 300                  | Med støtte     |
| 381               | 22                | 335                 | 300                  | Med støtte     |
| 396               | 23                | 351                 | 300                  | Med støtte     |
| 411               | 24                | 366                 | 300                  | Med støtte     |
| 427               | 25                | 381                 | 300                  | Med støtte     |
| 442               | 26                | 396                 | 300                  | Med støtte     |
| 457               | 27                | 411                 | 300                  | Med støtte     |
| 472               | 28                | 427                 | 300                  | Med støtte     |
| 488               | 29                | 442                 | 300                  | Med to støtter |
| 503               | 30                | 457                 | 300                  | Med to støtter |
| 518               | 31                | 472                 | 300                  | Med to støtter |

**Overbelast IKKE din Roll-A-Ramp! Benyt kun rampen inden for den tilladte hældning!**

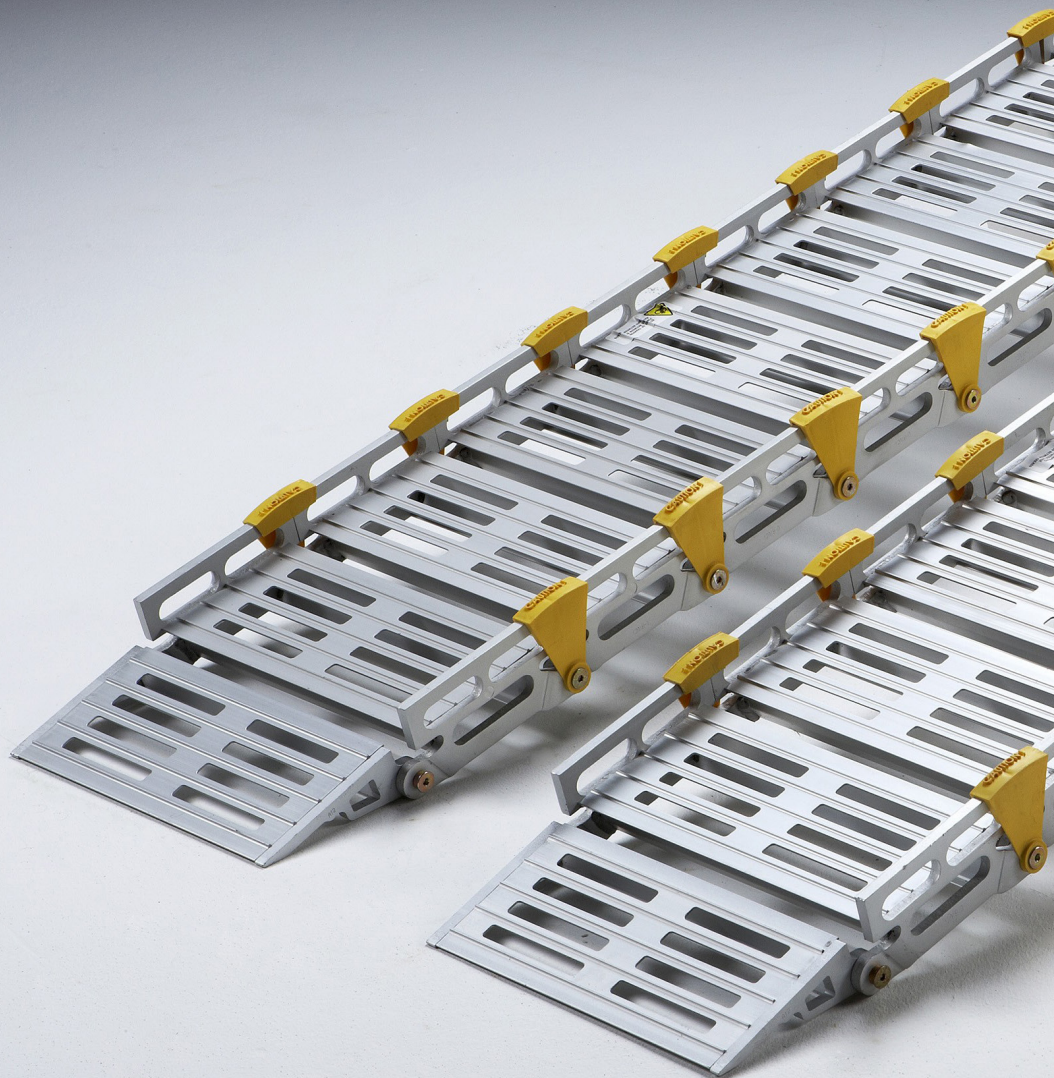

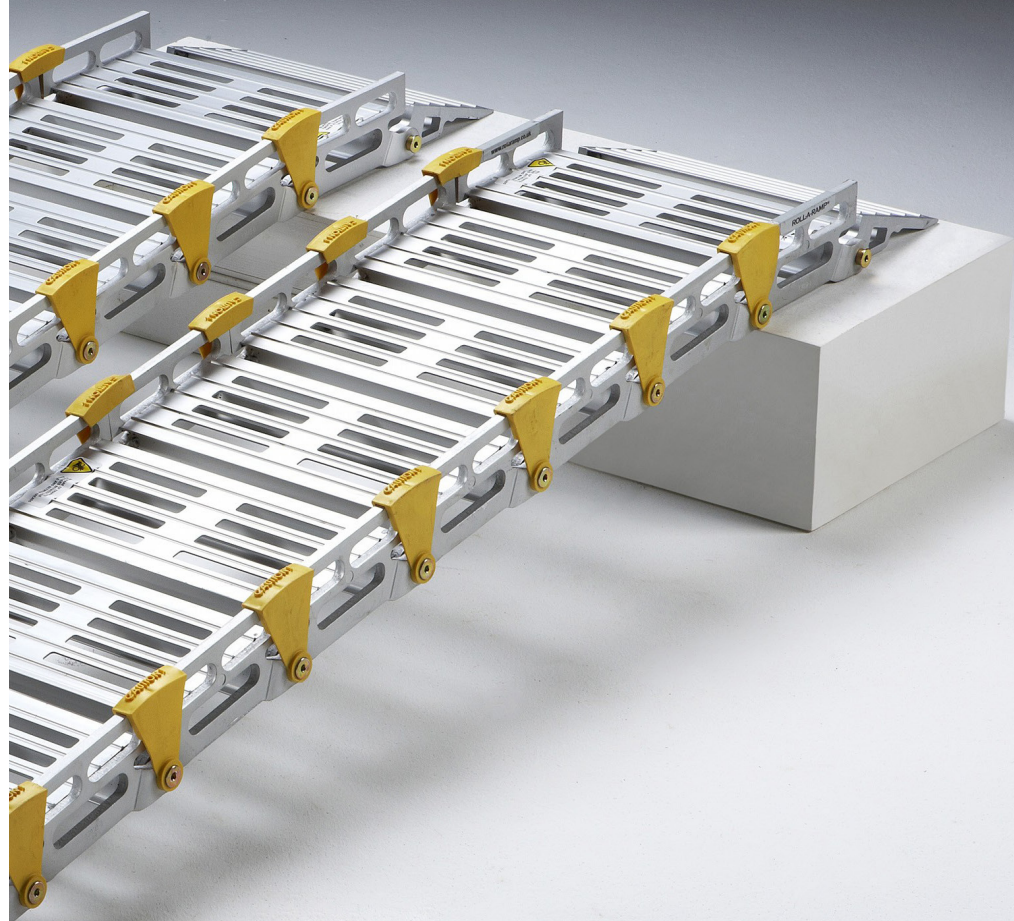

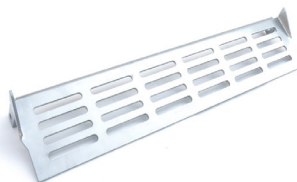

**LIKE os på Facebook og få seneste nyheder og tilbud**

**SkovTrup**

Parallelvej 1, Snæbum, 9500 Hobro • 98 54 87 67 • [info@SkovTrup.dk](mailto:info@SkovTrup.dk) • [www.SkovTrup.dk](http://www.SkovTrup.dk)