



Instruktionsguide til

DressBuddy Aftager

DressBuddy Aftager er beregnet til aftagning af korte og lange kompressionsstrømper med åben og lukket tå.

Henvender sig også til borgere, der skal være selvhjulpne i aftagning, og som ikke kan bukke sig ned og nå sine fødder.

Med DressBuddy Aftager er det muligt at tage kompressionsstrømper af med brug af kun én arm.

DressBuddy Aftager kan købes som et enkelt stativ eller som et sæt. I sættet medfølger friktionsplade som tilbehør.



HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Person mål		Stativ mål	
			Personhøjde i cm	Lægomkreds i cm	Bredde i cm	Længde i cm
72542	1032	SÆT - 2 dele - AFTAGER - MELLEM	Op til 185	Op til 40	16	60
74617	1033	SÆT - 2 dele - AFTAGER - LANG	Over 185	Op til 40	16	70
73687	1034	SÆT - 2 dele - AFTAGER - MELLEM OG BRED	Op til 185	Over 40	19	60
74616	1035	SÆT - 2 dele - AFTAGER - LANG OG BRED	Over 185	Over 40	19	70
72541	2022	ENKELT - AFTAGER - MELLEM	Op til 185	Op til 40	16	60
74613	2023	ENKELT - AFTAGER - LANG	Over 185	Op til 40	16	70
73686	2024	ENKELT - AFTAGER - MELLEM OG BRED	Op til 185	Over 40	19	60
74615	2025	ENKELT - AFTAGER - LANG OG BRED	Over 185	Over 40	19	70

Materiale: Rustfri stål.

Rengøring: DressBuddy kan afvaskes med sprit, i autoklave eller ved håndvask. Friktionsplade kan vaskes i hånden ved max 30° C.



Youtube
video



HMI-Basen
Manual



Danish **CARE** Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere

Aftagning



1. Læg friktionspladen på gulvet mellem fødderne.



2. Sæt de blå kugler på DressBuddy Aftager lige indenfor kantbåndet bag på læggen.



3. Skub DressBuddy Aftager ned langs benet og sæt den på friktionspladen.



4. Placer DressBuddy Aftager på den blå friktionsplade og træk benet bagud, så strømpen trækkes ned til anklen.



5. Gnid hælen fremad på friktionspladen med små korte ryk, og træk foden ud af strømpen.



Tips og tricks



1. Hvis borgeren har sårbar hud, så lav en fold på strømpen ved aftagning, så kuglerne ikke kommer i berøring med huden.



2. Hvis borgeren har svært ved at anvende friktionspladen eksempelvis pga. for få kræfter i benet eller vanskeligheder ved at koordinere bevægelsen, så anbefaler vi at anvende DressBuddy aftager på hjul.



3. Hvis borgeren har svært ved at få foden ud af strømpen, så kan det skyldes, at de blå kugler sidder for langt nede i strømpen eller for langt fremme i strømpen og derved mindskes elasticiteten. Husk at de blå kugler skal sidde på kantbåndet for størst mulig elasticitet og bagpå benet.



4. Hvis borgeren ikke har kræfter til at skubbe strømpen af, så anvend et andet glidestykke eksempelvis Slip Perfect eller Easy OFF.



5. Elektrisk aftager ORT.O.MATE.
Til borgere som ikke kan blive selvhjulpne i aftagning af kompressionsstrømper ved brug af andre typer hjælpemidler, anbefaler vi at anvende ORT.O.MATE elektrisk aftager.



Hvem er vi?



Danish Care Supply A/S er blandt Danmarks førende leverandører af småhjælpe-midler. Vi sælger hjælpemidler til private borgere, virksomheder, kommuner og regioner.

Vi tilbyder et bredt udvalg af hjælpemidler, der dækker behov inden for:

- På- og afklædning
- Køkkenredskaber og spisning
- Personlig pleje, bade- og toilethjælp
- Dagligstuen og soveværelset
- Rollatorer, krykker og stokke
- Inkontinens
- Brandhæmmende produkter
- Medicinhåndtering

Derudover tilbyder vi hjælpemidler, der effektivt aflaster plejepersonalet i deres arbejde med borgere.

Sådan handler du hos os:

Du kan bestille vores hjælpemidler direkte på vores hjemmeside, via e-mail, på telefon eller ved et besøg i vores fysiske butik.

Vores erfarne team står altid klar med gode råd og professionel vejledning, så du får mest muligt ud af vores hjælpemidler.

www.danishcaresupply.dk



Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danish CARE Supply A/S

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Hjemmeside



Følg os på

facebook

facebook.com/danishcaresupply