



Instruktionsguide til

DressBuddy stående

DressBuddy Stående er beregnet til på- og aftagning af korte og lange kompressionsstrømper med åben og lukket tå. Kan bruges til både ben og arm strømper.

Henvender sig til borgere der har nedsat funktion i skuldre, arme eller hænder samt borgere, der ikke kan bukke sig frem og nå ned til sine fødder.

DressBuddy Stående kan købes som et enkelt stativ eller som et sæt. I sættet medfølger friktionsplade og Slip-Perfect glidestykke som tilbehør.



			Person mål
HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Lægomkreds i cm
72525	1007	SÆT - 3 dele - STÅENDE - MELLEM	Op til 40
77970	1008	SÆT - 3 dele - STÅENDE - BRED	Over 40

72622	2021	ENKELT - STÅENDE - MELLEM	Op til 40
79782	2026	ENKELT - STÅENDE - BRED	Over 40

Materiale: Rustfri stål.

Rengøring: DressBuddy kan afvaskes med sprit, i autoklave eller ved håndvask. Slip Perfect glidestykke og friktionsplade kan vaskes i hånden ved max 30° C.



Youtube
Video



HMI-Basen
Manual



Danish **CARE** Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere

Påtagning



1. Placér friktionspladen på gulvet mellem dine ben.



2. Sæt strømpen på de blå kugler lige indenfor kantbåndet. Læg DressBuddy stående på dine lår og sæt glidestykket ned i strømpen.
Sæt DressBuddy stående på gulvet, og før din fod ned i strømpen. Træd ned i strømpen til foden kommer ned på friktionspladen.



3. Gnid hælen med små korte ryk på friktionspladen.



4. Tag strømpen af kuglerne og træk strømpen op.



5. Træk i den grønne slip så glidestykket kommer ud af strømpen. Træk i glidestykket mellem benene.

Aftagning



1. Placér friktionspladen foran fødderne, så din hæl hviler naturligt på friktionspladen.



2. Sæt de blå kugler i strømpen lige indenfor kantbåndet bag på læggen.



3. Skub DressBuddy Stående ned af læggen mod friktionspladen.



4. Træk benet bagud, så strømpen trækkes ned til anklen, så din fod trækkes ud af strømpen.



5. Gnid hælen mod friktionspladen med små korte ryk, indtil strømpen glider af.






Tips og tricks

Påtagning



1. Hvis der er folder på strømpen, så før kuglerne hen over folderne til de forsvinder.

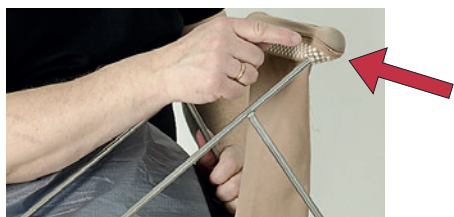

2. Hvis borgeren har svært ved at få foden ud af strømpen, skyldes det ofte, at de blå kugler sidder for langt nede i strømpen eller for langt fremme i strømpen og derved mindskes elasticiteten. Husk at de blå kugler skal sidde på kantbåndet og bagpå benet for størst mulig elasticitet.

Aftagning



1. Hvis borgeren har sårbar hud, så lav en fold på strømpen ved aftagning, så kuglerne ikke kommer i berøring med huden.



2. Hvis borgeren har svært ved at anvende friktionspladen eksempelvis pga. for få kræfter i benet eller vanskeligheder ved at koordinere bevægelsen, så anvend i stedet DressBuddy aftager på hjul.

Hvem er vi?

Danish Care Supply A/S er blandt Danmarks førende leverandører af småhjælpe midler. Vi sælger hjælpe midler til private borgere, virksomheder, kommuner og regioner.

Vi tilbyder et bredt udvalg af hjælpemidler, der dækker behov inden for:

- På- og afklædning
- Køkkenredskaber og spisning
- Personlig pleje, bade- og toilethjælp
- Dagligstuen og soveværelset
- Rollatorer, krykker og stokke
- Inkontinens
- Brandhæmmende produkter
- Medicinhåndtering

Derudover tilbyder vi hjælpemidler, der effektivt aflaster plejepersonalet i deres arbejde med borgere.

Sådan handler du hos os:

Du kan bestille vores hjælpemidler direkte på vores hjemmeside, via e-mail, på telefon eller ved et besøg i vores fysiske butik.

Vores erfarne team står altid klar med gode råd og professionel vejledning, så du får mest muligt ud af vores hjælpemidler.

www.danishcaresupply.dk

Danish CARE Supply A/S

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Hjemmeside



Følg os på

facebook

facebook.com/danishcaresupply