

Oticon | ConnectLine

BRUGSANVISNING

Streamer Pro



oticon
PEOPLE FIRST

Tak

Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille din nye Streamer i højeste kvalitet med størst mulig brugervenlighed og et minimum af vedligeholdelse.

Streameren forbinder dine høreapparater trådløst til forskellige lydkilder og får dine høreapparater til at virke som trådløse hovedtelefoner. Streameren sender lyden direkte ind i begge dine høreapparater for at give dig den bedste lytteoplevelse.

Den komplette beskrivelse af systemet findes i en vejledning, som fås online på www.oticon.dk Her vil du også finde interaktive præsentationer, "hvordan-videoer" og en støttesektion med ofte stillede spørgsmål.

Vi anbefaler, at du læser denne vejledning omhyggeligt, før du begynder at bruge apparatet for at få det maksimale udbytte af din nye Streamer. Brugsanvisningen beskriver de mest brugte funktioner, som er vigtige at forstå, før du begynder at bruge Streameren. Vi opfordrer dig også til at læse "Sådan kommer du i gang"-brugervejledningen, som er inkluderet i pakken. Kontakt din høreklub, hvis du har spørgsmål til brug eller vedligeholdelse af Streameren.

Retningslinjer for brug

Streameren er beregnet til at blive brugt af trådløse Oticon høreapparatbrugere sammen med deres høreapparater. Streameren er forbindelsesleddet mellem høreapparater og andre enheder - såsom mobiltelefoner.

Streameren kan tilsluttes til en række eksterne (ekstra) apparater, der gør, at høreapparatbrugeren bedre kan høre tv'et eller kommunikere gennem Bluetooth-aktiverede mobiltelefoner mv.

Streameren kan også bruges som fjernbetjening, der gør det muligt for dig at justere høreapparatets lydstyrke og ændre programmerne i høreapparaterne.

VIGTIGT

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du begynder at bruge din Streamer. Den indeholder forklaringer og vigtige informationer om brugen og vedligeholdelsen af din Streamer og batterier.

Indhold

Kassens indhold	8
Oversigt	11
Advarsler	12
Basale funktioner - førstegangsbrug	
Sådan bæres Streameren - med nakkestroppen	16
Sådan bruges Streameren uden nakkestrop	18
Sådan tændes og slukkes Streameren	20
Opladning af Streameren	22
Batteriindikator	24
Fjernbetjening af høreapparaterne	28
Parring af Streameren med en mobiltelefon eller andre enheder	30
Slet parring	32

Forts. på næste side

Primære funktioner

Tilslutning/streaming	34
Mobiltelefon	35
ConnectLine telefon-adapter	40
ConnectLine mikrofon	42
ConnectLine tv-adapter	44

Sekundære funktioner

Streaming	47
Musik/audio - kabel	48
Headset - kabel	50
Musik/audio - trådløst	52
Pc-headset - trådløst	54
Telespole (indbygget)	56
FM-modtager (option)	58
Undgå varme, fugt og kemikalier	60

Yderligere information

Rengøring og vedligeholdelse	61
Tilbehør og reservedele	62
Individuel tilpasning af din Streamer	64
Teknisk information	67

Kassens indhold

Streamer Pro - hvad er der i kassen

Kassen indeholder følgende:



Din nye Streamer



Nakkestrop - medium (side 16)



Nakkestrop - lang (side 16)

Æske 1



Oplader (side 22)



Rengøringsklud

Æske 4



Beskyttelsescover (side 62)

Æske 2

Usb opladerkabel
(side 22)



3,5 mm minijack
stereokabel
til mp3/musik
(side 48)

3,5 mm headset
splitter-kabel til
brug sammen med
pc'er (side 50)



*Option

Æske 3




Holder til oplader (side 22)

Sådan kommer du i gang



Denne brugsanvisning

Oversigt

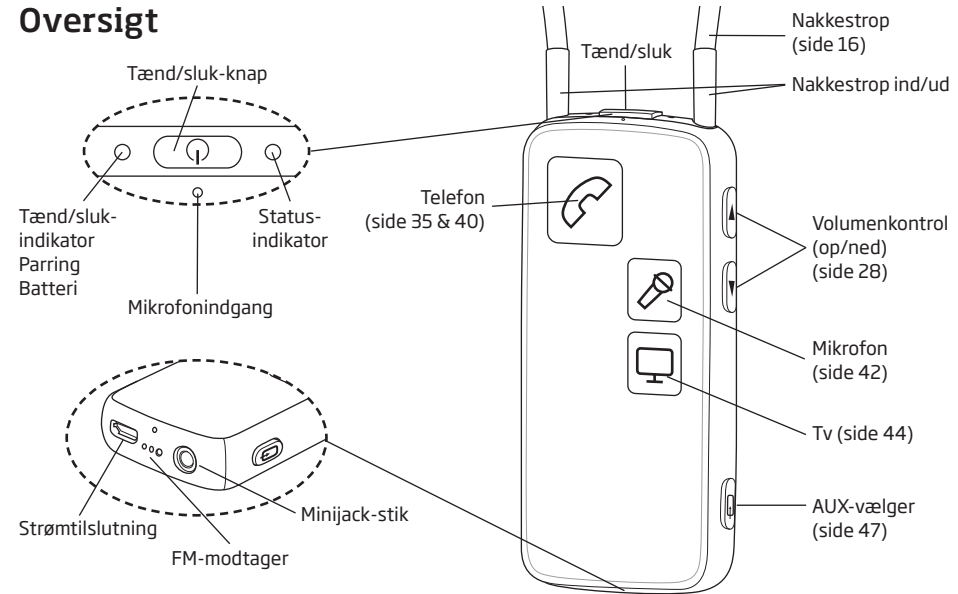

Advarsler

Før du tager din Streamer i brug, skal du omhyggeligt sætte dig ind i nedenstående generelle advarsler og i de øvrige oplysninger i denne brugsanvisning.

Produkter, der kan tilsluttes til eksternt udstyr

Sikkerheden ved brug af Streameren med AUX-kablet bestemmes af en ekstern signalkilde. Når kablet er tilsluttet et apparat, der er tilsluttet el-nettet, skal dette apparat opfylde kravene i IEC-60065, IEC-60601 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Sikkerheden ved genopladning af batterier med USB-stikket alene bestemmes af det eksterne apparat. Når indgangskablet er tilsluttet et apparat, der er tilsluttet el-nettet, skal dette apparat være UL-godkendt eller opfylde kravene i IEC-60065, IEC-60950, IEC-60601 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Eksplodingsrisiko

Det kan eksplodere og forårsage alvorlige skade.

Udsæt aldrig Streameren for ekstrem varme ved at putte den i ovnen, mikroovnen, brænde den eller efterlade den i en bil parkeret i solen.

Advarsler

Risiko for kvælning

Streamereren er ikke legetøj og skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade dem selv. Særlig opmærksomhed bør rettes mod mindre komponenter, for at forhindre børn i at sluge dem og blive kvalt.

Søg omgående læge, hvis nogen kommer til at sluge en del.

Interferens og implantater

Din Streamer er designet til at opfylde de strengeste standarder inden for Standards of International Electromagnetic Compatibility. Streameren kan dog skabe interferens med andet medicinsk udstyr såsom icd-enheder og pacemakere.

- Kontakt producenten af implantater for information om risiko for forstyrrelser
- Fjern omgående Streameren, hvis der er mistanke om interferens. Brug ikke Streameren og søg rådgivning

Interferens kan også forårsages af forstyrrelser i elektriske luftledninger, metaldetektorer i lufthavne, elektromagnetiske felter fra andet medicinsk udstyr, radiosignaler og statisk elektricitet.

Advarsler

Brug af nakkestrop

Hvis nakkestroppen ved et uheld fanges i noget, mens du har den på, er den konstrueret, så den automatisk brydes. Forsøg derfor aldrig på at forkorte eller ændre på nakkestroppen på en uautoriseret måde. Nakkestroppen bør ikke bruges til børn, der vejer under 11 kg.

Brug i biler

Brug af Streameren sammen med en mobiltelefon under kørslen kan distrahere dig. Hvis kørselsforhold eller færdselsregler kræver det, skal du køre ind til siden og parkere, før du foretager og besvarer opkald.

Brug om bord på fly

Streameren bør ikke bruges om bord på fly, medmindre det specifikt er tilladt af flypersonalet.

Advarsler

Udskiftning af batteri

Åbn ikke batterilåget, da dette kan beskadige batteriet. Servicegarantien bortfalder, hvis der er tegn på forsøg på at åbne batterilåget.

Kompatibilitet med mobiltelefon

Der henvises til www.oticon.dk for en liste over mobiltelefoner, der er blevet testet grundigt af Oticon, og har vist sig at opfylde minimumskravene for ConnectLine kompatibilitet på testtidspunktet. Oticon tager dog intet ansvar for en sådan kompatibilitet i almindelighed. Navnlig er Oticon hverken ansvarlig for inkompatibilitet som følge af fremtidige opdateringer af mobiltelefoner og/eller for situationer med inkompatibilitet, der ikke er omfattet af, og/eller er blevet fundet, ved disse tests. Oticon tager ikke noget økonomisk ansvar i form af refusion af mobiltelefoner, der ikke fungerer som forventet. Før du køber en ny mobiltelefon, rådes du til at konsultere listen nævnt ovenfor.

Basale funktioner - førstegangsbrug

Sådan bæres Streameren - med nakkestroppen

Nakkestroppen er en integreret del af Streamerens elektroniske system. Den bruges som en antenne til at sende lyd til dine høreapparater.

For den bedst mulige lyd og længst mulige streaming-tid, skal Streameren altid bæres med en af de medfølgende nakkestropper. Streameren leveres med to nakkestropper, en lang og en medium.



VIGTIGT

Anvend nakkestroppen med forsigtighed. Af sikkerhedsmæssige årsager (for at undgå kvælning) vil nakkestroppen automatisk blive løsnet, hvis den sidder fast i noget. Du må ikke afkorte eller ændre nakkestroppen på nogen måde, dvs. såsom at binde en knude for at afkorte længden. Hvis en nakkestrop knækker, kan den ikke repareres og skal udskiftes omgående. Kontakt din høreklub for en udskiftning.

Sådan isættes nakkestroppen

Nakkestroppen klikker ind i hullerne på toppen af Streameren.

Bemærk, at når du taler med nogen gennem Streameren, er det vigtigt, at din stemme kan opfanges af den indbyggede mikrofon på toppen.

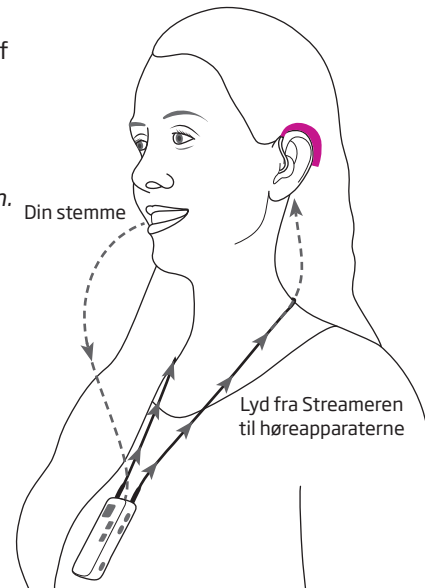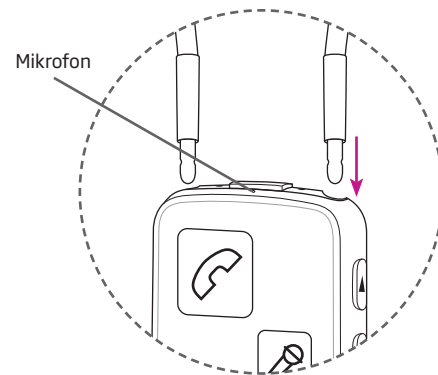

Sådan bruges Streameren uden nakkestrop


Streameren kan også bruges uden nakkestrop, fx. hvis den opbevares i en lomme eller bruges med en bælteclips..

Afstanden til høreapparatet bør ikke være over en meter, når Streameren bruges med en nakkestrop. Du kan opleve udfald i lyden, hvorfor vi altid anbefaler at bruge nakkestrop.

Når du bruger Streameren uden nakkestrop, bruger den mere strøm - derfor reduceres den maksimale streaming til 5 timer på en fuld opladning.

VIGTIGT

En defekt nakkestrop skal straks udskiftes.

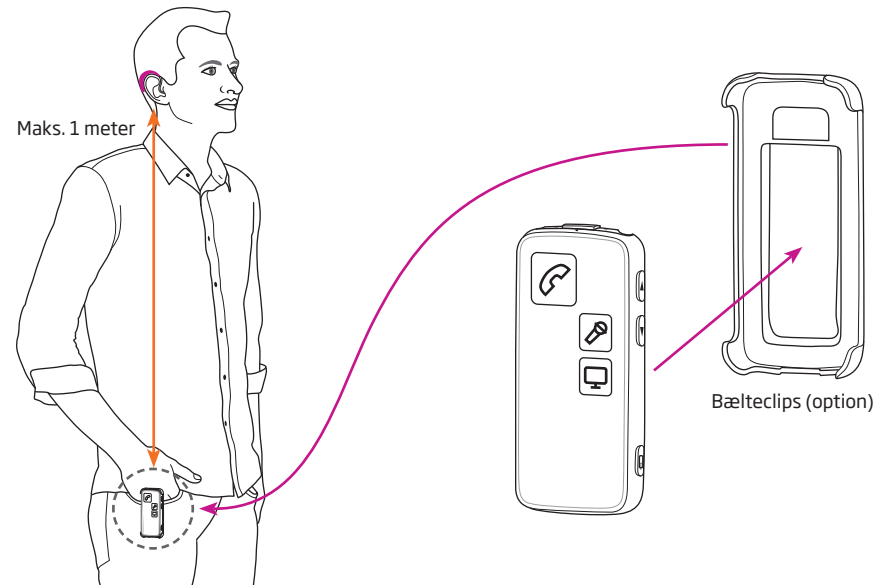

Sådan tændes og slukkes Streameren

Tænd

Tryk på **tænd/sluk-knappen** ovenpå Streameren i ca. 2 sekunder, indtil alle lys foran og ovenpå blinker og indikerer, den er tændt.


Slip tænd/sluk-knappen. Strømindikatoren på toppen af Streameren skal nu fade til grøn.

Hvis Streameren ikke kan tændes, kontroller at den er opladet (side 22).

Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at se Streamerens status.

Sluk

Tryk på tænd/sluk-knappen øverst på Streameren i ca. 2 sekunder, indtil den grønne strømindikator slukkes.

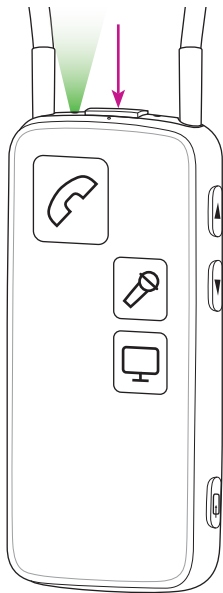


Tænd/sluk		
Status	Forside	Beskrivelse
		Streameren er slukket
		Efter at have trykket på tænd/sluk-knappen i ca. 2 sekunder vil alle lys tændes et par sekunder for at vise, at Streameren nu er tændt
		Streameren er nu tændt og klar til at blive brugt







Opladning af Streameren

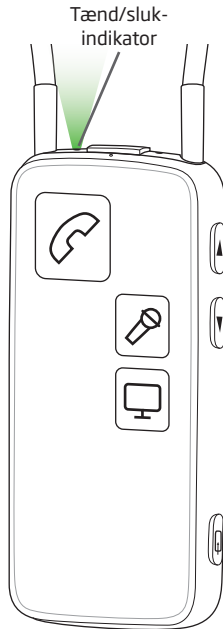Streameren bruger et genopladeligt batteri. Vi anbefaler, at Streameren oplades en gang dagligt for den bedste ydelse.


For at bruge den medfølgende oplader og holder til oplader (A) eller et usb-kompatibelt apparat med en ladestrøm på 500mA, skal du blot indsætte mikro-usb-stikket i bunden af Streameren (B).

Opladning angives med en indikator ovenpå Streameren, der blinker grønt. Når apparatet er fuldt opladet, vil indikatoren lyse konstant grønt.




Opladning		
Status	Forside	Beskrivelse
  		Mens Streameren oplades, blinker statusindikatoren grønt
  		Opladning - når den er tændt (eller i brug) - vil statusindikatoren skifte mellem stærk og svag grøn



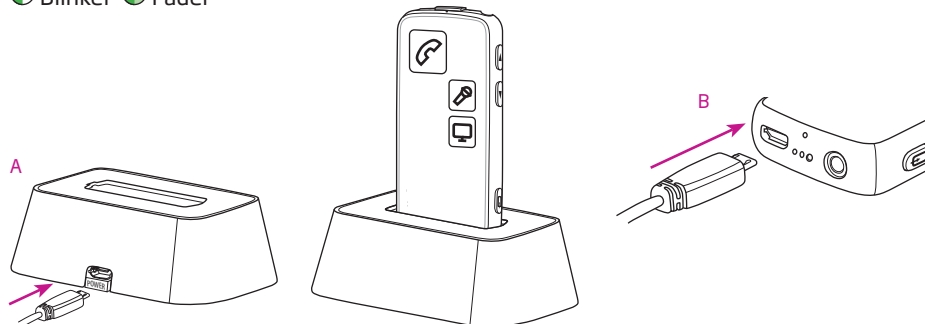

 Blinker  Fader

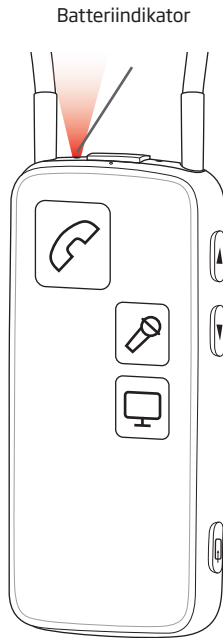

Batteriindikator

Streamereren vil vise **lavt batteriniveau** (ca. 20 minutters kapacitet tilbage) med et konstant rødt lys, og meget lavt batteriniveau (ca. 5 minutters kapacitet tilbage) med et blinkende rødt lys.



Batteriindikator - lavt batteriniveau		
Status	Forside	Beskrivelse
 		Lavt batteriniveau - ca. 20 minutters kapacitet tilbage, når der streames til høreapparaterne
 		Meget lavt batteriniveau - ca. 5 minutters kapacitet tilbage, når der streames til høreapparaterne

 Konstant  Faldende

VIGTIGT

Batteriet må bruges helt op. Hvis batteriet holdes fuldt opladet, vil dets kapacitet forlænges. Batteriet kan ikke udskiftes af brugeren.

Batterikapacitet og opladningstid	
Batterikapacitet, når der bruges nakkestrop	Op til 10 timers typisk daglig brug: 2 timers telefon, 6 timers tv og 2 timers standby (efter 2 år vil kapaciteten være ca. 8 timers typisk daglig brug).
Batterikapacitet, når der ikke bruges nakkestrop	Op til 5 timers typisk brug: 1 times telefon, 3 timers tv og 1 times standby.
Batteri-opladningstid	2 timer for fuld opladning, når den medfølgende strømforsyning bruges.
Fjernbetjening	Hvis Streameren er slukket, kan fjernbetjening af høreapparatet fungere i op til 6 måneder på en fuld opladning.
Batteri- levetid	Batteriet i Streameren vil vare i mere end 2 år, hvis det oplades helt hver dag. Batteriet kan udskiftes af din høreapparattilpasser.

Fjernbetjening af høreapparaterne

Volumen op/ned

Et kort tryk enten på volumen op eller ned vil regulere lydstyrken i høreapparaterne. Du vil høre små bekræftende "tik" i dine høreapparater.

Skift program i høreapparaterne


Du kan skifte program op eller ned ved **at trykke volumenknappen op eller ned** i mere end et sekund. Programskift indikeres med en lyd i dine høreapparater.

Sådan mutes høreapparaterne

Du kan mute høreapparaterne ved **at trykke volumenknappen op OG ned i 1 sekund samtidig.**

VIGTIGT

- Mute-funktionen findes kun i de nyeste Oticon-høreapparater. Bed din høreapparattilpasser om yderligere information.
- Selvom Streameren er slukket, vil fjernbetjenings-funktionen i høreapparaterne stadig arbejde.

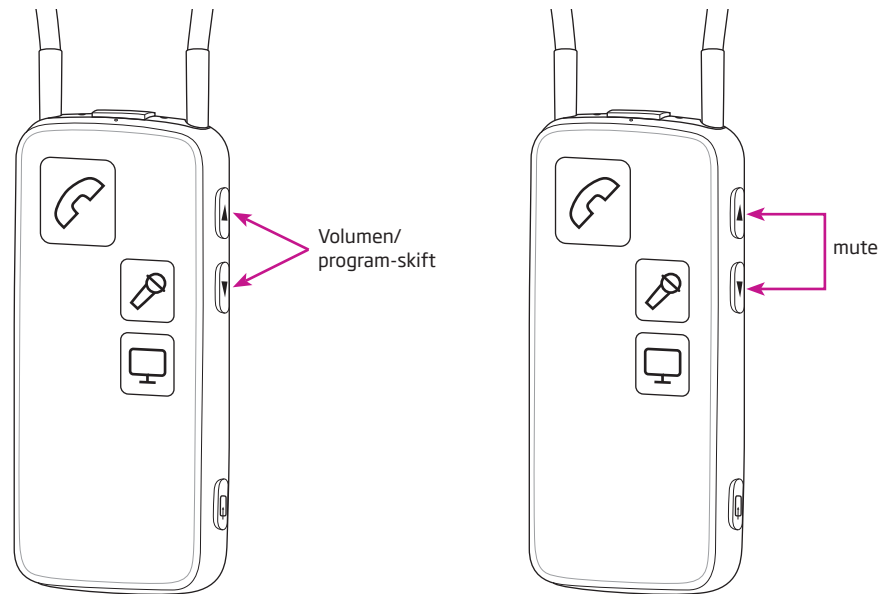


Parring af Streameren med en mobiltelefon eller andre enheder

Inden Streameren kan bruges sammen med andre enheder - som fx mobiltelefoner - skal de to enheder parres.

1. Sådan sættes Streameren i parrings-tilstand.

Tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 5 sekunder, indtil indikatoren blinker blå.

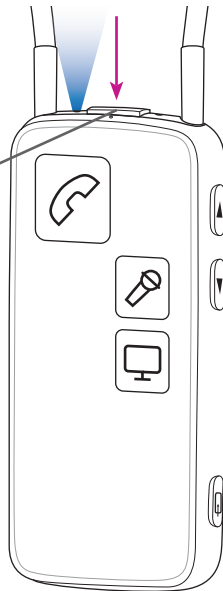

2. Sæt den anden enhed (fx mobiltelefon) i parringstilstand.


Denne funktion findes typisk i mobiltelefonens indstillinger.

Vi anbefaler dig at kigge i din mobiltelefons "brugsanvisning", fx under parring.

3. Den anden enhed (mobiltelefonen) vil ofte bede om en pinkode.


Streamerens pinkode er **0000** (fire nuller).



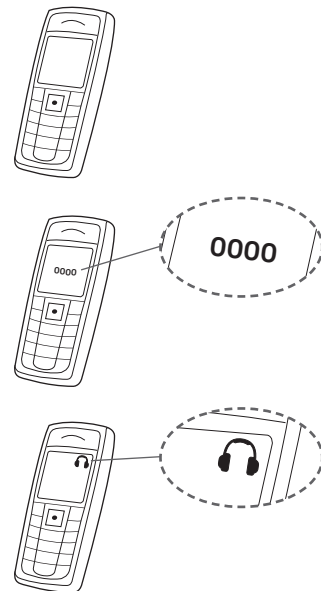



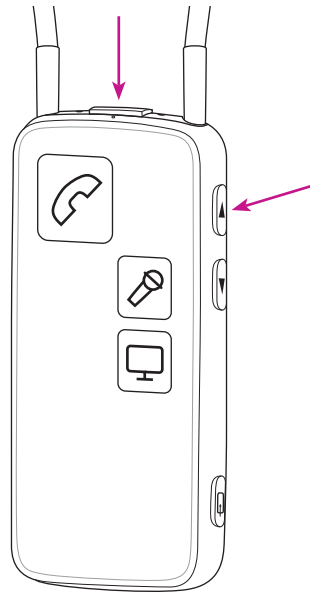


4. Når de er parret, vil mobiltelefonen typisk vise et headset-ikon og samtidig lyser Streamerens parringsindikator konstant blå.



Slet parring

Hvis du har problemer med parring, kan du slette alle parringer ved at trykke på tænd/sluk-knappen og volumen op-knappen samtidig i 3 sekunder.



Parring		
Status	Forside	Beskrivelse
  		Streamer i parringstilstand
  		Parring afsluttet
  		Streamer tændt

 Konstant  Blinkende

Primære funktioner

Tilslutning/streaming


ConnectLine Streamer er blevet designet til at give dig den bedst mulige daglige brug i følgende situationer:

1. Brug af mobiltelefon via Bluetooth* (side 35).

Brug af ConnectLine telefon-adapter (sælges separat) sammen med en analog fastnettelefon* (side 40).

2. Brug af en ConnectLine mikrofon (sælges separat), til at forbedre dine muligheder for at høre en valgt taler på en vis afstand eller i støjende situationer (side 42).

3. Brug af ConnectLine tv-adapter (sælges separat) til at sende lyden fra fjernsynet trådløst til dine høreapparater* (side 44).

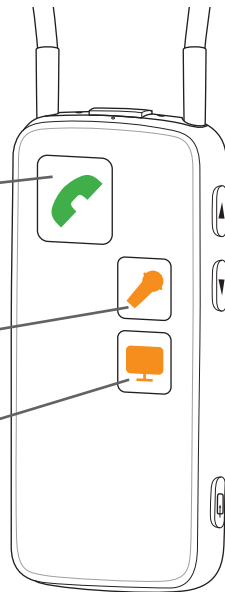


* I realiteten bliver Streameren og høreapparaterne til et trådløst headset

Mobiltelefon

For at kunne modtage eller foretage opkald mens du bruger Streameren, skal du sørge for, at Streameren og mobiltelefonen er parret (side 30-31), er tændt og er inden for rækkevidde (10 meter). Din mobiltelefon vil ofte indikere, at den er forbundet med Streameren med et lille headset-ikon.

For yderligere information:

www.oticon.dk

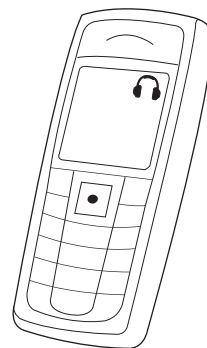


Således besvares et opkald

Sørg for, at du kan tale ind i Streamerens mikrofon.

Når din mobiltelefon ringer, hører du et signal i dine høreapparater. Samtidig vil telefonknappen på Streameren og statusindikatoren blinke grønt.

Tryk kort på telefonknappen på Streameren for at besvare opkaldet. Du vil høre et lille bekræftende bip i dine høreapparater. Telefonknappen og statusindikatoren vil nu lyse grønt konstant.

For at afslutte opkaldet skal du blot trykke kort på telefonknappen på Streameren.

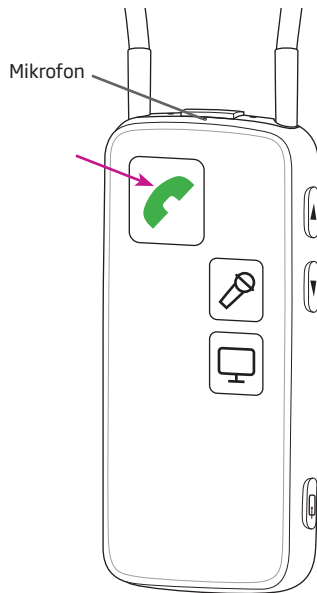

Modtagelse af et opkald

Status	Forside	Beskrivelse
		Streamer tændt og klar
		Telefonindikatoren og topstatus blinker grønt. Du vil høre et signal i dine høreapparater
		Når opkaldet forbindes, vil du høre et bip, der angiver, at opkaldet er blevet besvaret - du kan nu lytte og tale med den anden person

Konstant Blinkende


Således foretages et opkald

Sørg for, at du kan tale ind i Streamerens mikrofon.






Du skal blot bruge mobiltelefonen til at foretage et opkald. Du skal ikke bruge Streameren. Du skal blot **taste nummeret, som du normalt gør, når du foretager et opkald** - opkaldet bliver automatisk forbundet med din Streamer.

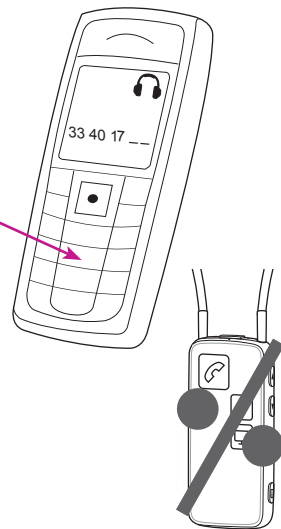Telefonknappen på Streameren og statusindikatoren på toppen lyser grønt, og du vil høre et bip i høreapparaterne, der angiver, at opkaldet nu er forbundet via din Streamer og dine høreapparater.

For at afslutte opkaldet skal du blot afbryde opkaldet på telefonen eller telefonknappen på Streameren.



Foretagelse af opkald

Status	Forside	Beskrivelse
 		Streamer tændt og klar
 		Når opkaldet forbindes, vil du høre et bip, der angiver, at opkaldet er blevet forbundet - du kan nu lytte og tale med den anden person


 Konstant  Blinkende







ConnectLine telefon-adapter

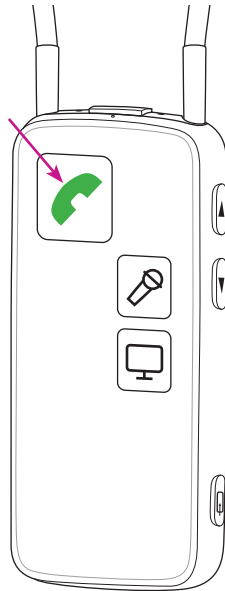Streameren kan også bruges sammen med en traditionel analog fastnettelefon ved at bruge en ConnectLine telefon-adapter, der kan købes som tilbehør.


For nærmere oplysninger om, hvordan du bruger ConnectLine telefon-adapteren, henvises der til brugsanvisningen, som fulgte med enheden eller:

www.oticon.dk



Tale i telefon		
Status	Forside	Beskrivelse
 		Streamer tændt og klar
  		Streamer forbundet - du kan nu lytte og tale med den anden person

 Konstant

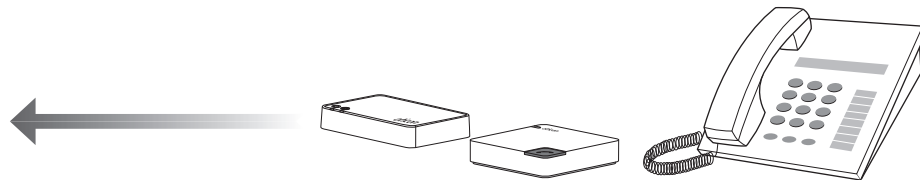









ConnectLine mikrofon

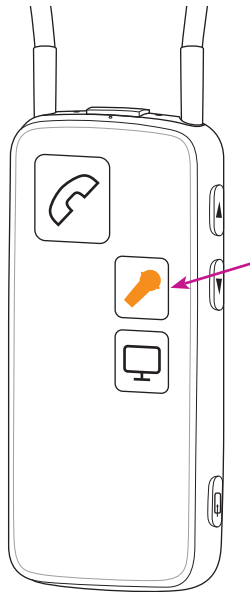ConnectLine mikrofon (tilbehør) overfører lyden fra en valgt taler til høreapparaterne via Streameren.


For nærmere oplysninger om, hvordan du bruger ConnectLine mikrofon, henvises der til brugsanvisningen, som fulgte med mikrofonen eller:

www.oticon.dk



Lyd fra en ConnectLine mikrofon		
Status	Forside	Beskrivelse
  		Streamer tændt og klar
  		Når den er forbundet med mikrofonen, vil du høre lyden fra mikrofonen i høreapparaterne

  Konstant

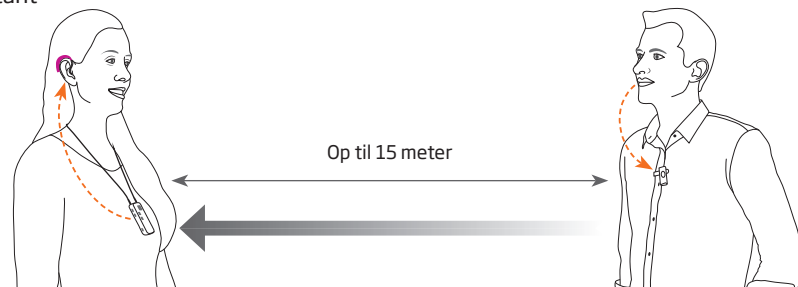










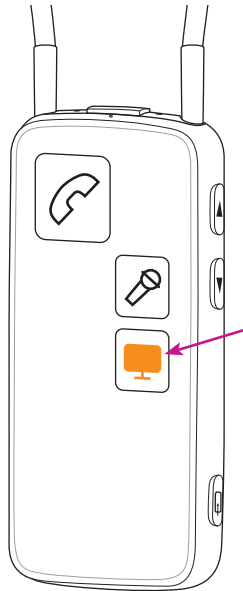


ConnectLine tv-adapter

ConnectLine tv-adapter (tilbehør) overfører lyden fra et tv til dine Oticon høreapparater via Streameren.


For nærmere oplysninger om, hvordan du bruger Connect-Line tv-adapteren, henvises der til brugsanvisningen, som fulgte med enheden eller:

www.oticon.dk

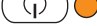

Se tv		
Status	Forside	Beskrivelse
  		Streamer tændt og klar
  		Forbindelse til et tv
  		Streamer forbundet - lyd fra tv i høreapparaterne

  Konstant   Blinkende

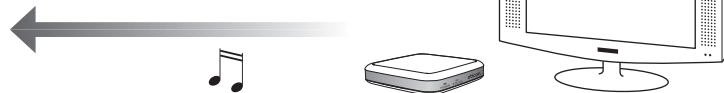


Sekundære funktioner

Streaming

Streameren kan bruges sammen med et bredt udvalg af lydenheder, såsom mp3-afspillere, computere osv.

Følgende prioriteringer gælder.

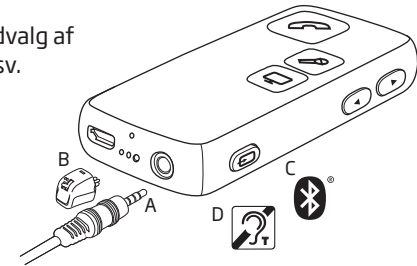

A	Prioritet 1	Minijack ind/ud (hvis tilsluttet)	Tryk kort på AUX-vælgeren	Side 48
B	Prioritet 2	FM (hvis tilsluttet)	Tryk kort på AUX-vælgeren	Side 58
C	Prioritet 3	Trådløs Bluetooth (indbygget)	Tryk kort på AUX-vælgeren	Side 52
D	Prioritet 4	Telespole (indbygget)	Tryk på AUX-vælgeren og hold den inde i ca. 2 sekunder	Side 56


Musik/audio - kabel







Ved at indsætte og tilslutte det medfølgende minijack-kabel kan du lytte til musik/audio fra en lang række apparater.

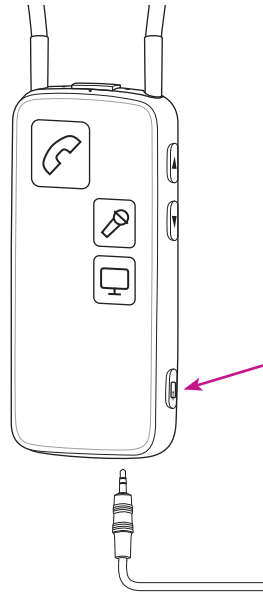

For at lytte til audio fra dit apparat skal du blot trykke kort på **AUX-vælgeren**. Når kablet isættes, starter streamingen automatisk.


For yderligere information:

www.oticon.dk



Musik/audio - kabel		
Status	Forside	Beskrivelse
  		Streamer tændt og klar
  		Du vil høre et bekræftende bip efterfulgt af lyden fra enheden

  Konstant

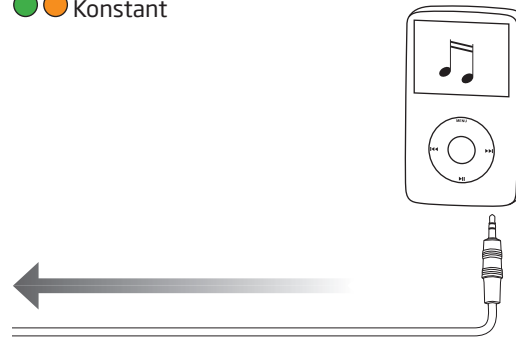

Headset - kabel


Sørg for, at du kan tale ind i Streamerens mikrofon.

Ved at indsætte og tilslutte det medfølgende minijack-kabel og det medfølgende headset splitter-kabel, kan du bruge Streameren som headset sammen med din computer.

For at bruge headset-funktionen skal du blot **trykke kort på AUX-vælgeren**.


For yderligere information:

www.oticon.dk

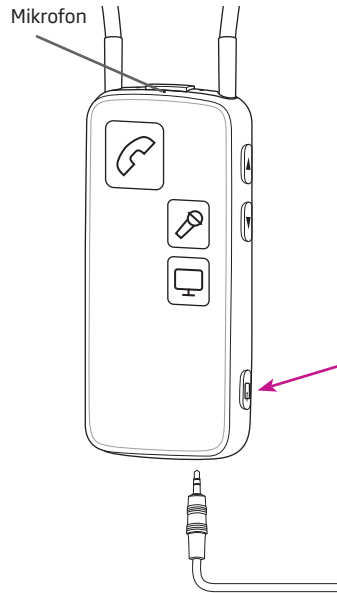

Headset - kabel		
Status	Forside	Beskrivelse
		Streamer tændt og klar
		Du vil høre et bekræftende bip - du kan nu lytte og tale med den anden person

Konstant

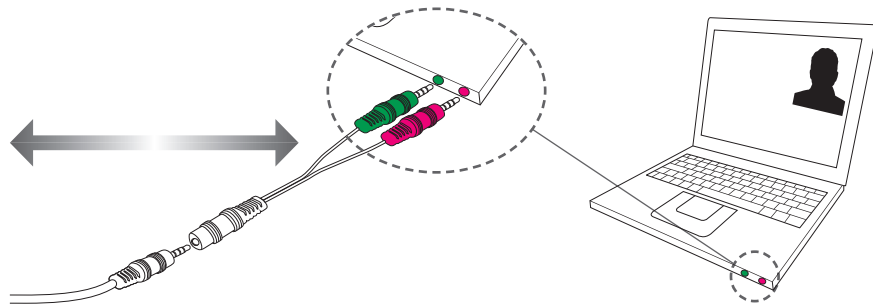


Musik/audio - trådløst




For at høre musik/lyd trådløst, fx fra en mp3-afspiller eller en computer med en indbygget Bluetooth, skal du sørge for, at apparatet er blevet parret med din Streamer (side 30), at begge er tændt og inden for rækkevidde (<10 meter).



Hvis du parrer med en computer, skal du sørge for at Streameren er parret som et hovedtelefon/A2DP-apparat.

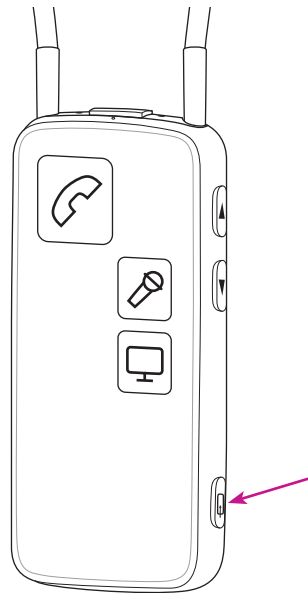For yderligere information:

www.oticon.dk/audio



Musik/audio - trådløst		
Status	Forside	Beskrivelse
  		Streamer tændt og klar
  		Streamer forbinder til musik/audio-enhed
  		Du vil høre et bekræftende bip efterfulgt af lyden fra enheden

  Konstant  Blinkende



Pc-headset - trådløst


Sørg for at du kan tale ind i Streamerens mikrofon.

Når du parrer med en computer, skal du sørge for at Streameren er parret som en hovedtelefon-enhed.







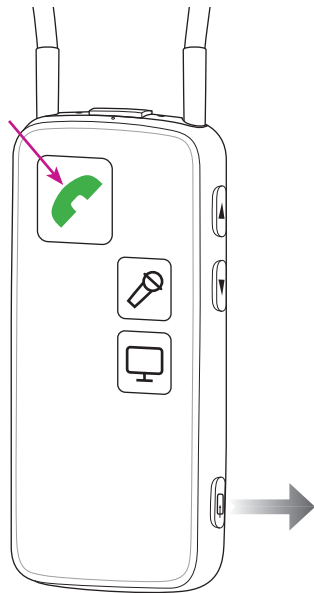


For at bruge headset-funktionen skal du blot **trykke kort på telefonknappen**.



For yderligere information:


www.oticon.dk



54

Pc-headset - trådløst		
Status	Forside	Beskrivelse
  		Streamer tændt og klar
  		Streamer forbinder til musik/audio-enhed
  		Du vil høre et bekræftende bip efterfulgt af lyden fra enheden

  Konstant  Blinkende

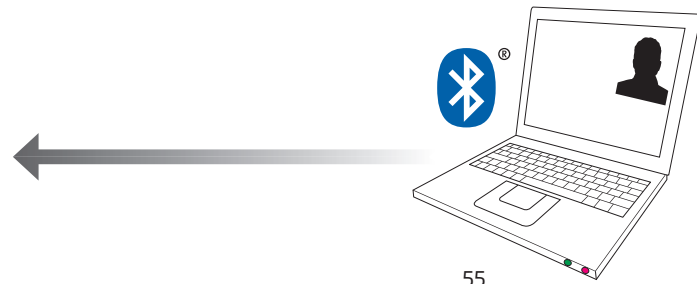

55

Telespole (indbygget)


Streameren har en indbygget telespole-modtager.







For at modtage lyd fra telespole-modtageren, skal du trykke på AUX-vælgeren og holde den nede i ca. 2 sekunder.

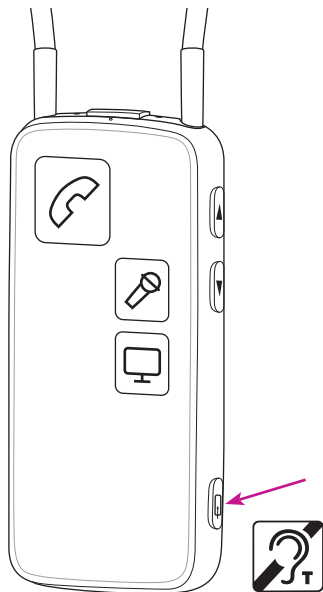For yderligere information:

www.oticon.dk/telespole

Bemærk: om ønsket kan funktionen ændres, så telespolen aktiveres ved et kort tryk i stedet. Se side 64.



Telespole		
Status	Forside	Beskrivelse
  		Streamer tændt og klar
  		Du vil høre et bekræftende bip efterfulgt af lyden fra teleslyngen

  Konstant


FM-modtager (option)

Ved at bruge det EURO-pin-stik i bunden af Streameren, kan lyd fra en FM-modtager modtages.


Sæt blot FM-modtageren i og tryk kort på AUX-vælgeren.



For yderligere information:

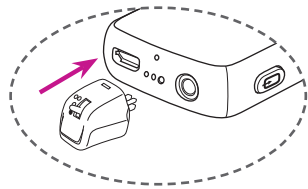www.oticon.dk

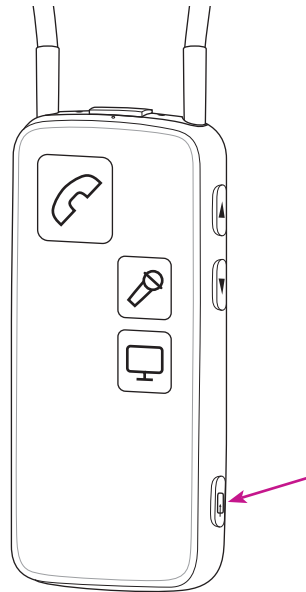

58



FM		
Status	Forside	Beskrivelse
		Streamer tændt og klar. FM-modtager tændt og klar til kanal-synkronisering
		Du vil høre et bekræftende bip efterfulgt af lyden fra enheden

 Konstant

VIGTIGT

Sørg for, at Streameren er tændt, men at der ikke streamer til høreapparaterne, og at FM IKKE er valgt, når du går ind i et klasseværelse eller lignende, hvor FM-kanalsynkronisering er påkrævet.

59

Undgå varme, fugt og kemikalier

Streamerens driftstemperatur er 10-45°C.

Udsæt aldrig Streameren for ekstrem varme ved at putte den i ovnen, mikroovnen, brænde den eller efterlade den i en bil parkeret i solen. Det kan eksplodere og forårsage alvorlige skade.

Streameren må aldrig udsættes for fugt i fx dampbad, brusebad eller kraftig regn.

Streameren må ikke udsættes for eller rengøres med kemiske rengøringsmidler eller alkohol. Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge din Streamer. Du bør altid tage din Streamer af, inden du bruger denne slags produkter og lade dem tørre, inden du tager Streameren på igen.

Yderligere information Rengøring og vedligeholdelse

Streameren er et forseglede apparat, der kun kræver et minimum af vedligeholdelse. Snavs, fugt og fedtstof skal tørres af med en tør eller fugtig klud. Det anbefales, at Streameren rengøres regelmæssigt. Mikrofonen, audioindgangene og nakkestrop samt opladeren skal holdes fri for snavs.

Streameren og nakkestroppen må aldrig vaskes eller nedsænkes i vand eller andre væsker.

Tilbehør og reservedele

Beskyttelsescover

Ekstra beskyttelsescover kan købes hos din høreapparat-tilpasser.



Beskyttelsescover - en knap

Et beskyttelsescover med en fremspringende knap, der gør "blind" brug nemmere kan købes hos din høreapparat-tilpasser.



Ekstra nakkestropper

Ekstra nakkestropper fås i tre størrelser: Kort (51 cm), medium (66 cm) og lange (81 cm) hos din høreklunik.



Bælteclips

En bælteclips kan købes hos din høreklunik.



Individuel tilpasning af din Streamer

Din høreapparattilpasser kan tilpasse din Streamer for bedre at opfylde dine specifikke behov.

Mobiltelefon

Din høreapparattilpasser kan aktivere følgende mobiltelefonfunktioner

Afvis opkald

Alle indgående opkald kan afvises ved at trykke kort på volumen ned-knappen på Streameren.

Stemmeopkald

Et kort tryk på telefonknappen vil aktivere stemmeopkald (hvis din mobiltelefon understøtter det, og du ikke er inden for rækkevidde af en ConnectLine telefon-adapter).

Genopkald

Ved at trykke på telefonknappen og holde den nede aktiveres genopkald (hvis mobiltelefonen understøtter det).

Viderestil opkald

Ved at trykke på telefonknappen og holde den nede stilles opkaldet tilbage til mobiltelefonen.

Deaktiver funktionen "alle knapper besvarer opkald"

Hvis de er deaktiveret, er det kun telefonknappen på Streameren, der kan besvare opkald.

Aktiver indgående (A2DP) alarmer

Hvis dette er aktiveret, kan andre enheder, fx iPods, computere og mobiltelefoner, aktivere/starte fx audiostreaming, indgående tekstalarmer eller musik, der startes fra en parret og tilsluttet computer.

Andet

AUX-vælger

Standardindstillinger

Trådløs Bluetooth (indbygget) - kort tryk

Telespole - langt tryk

Kan ændres til

Telespole - kort tryk

Trådløs Bluetooth (indbygget) - langt tryk

Teknisk information

Udover Bluetooth-senderen indeholder Streameren en radiosender, der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer med 3,84 MHz. Senderens magnetiske feltstyrke er $< -15 \text{ dB}\mu\text{A/m @ 10m}$.

Streamerens sendestyrke ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Streameren opfylder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund af den begrænsede plads på selve enheden findes alle relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning.

Streameren indeholder et modul med mærkningen:

FCC ID: U28CL2STRM

IC: 1350B-CL2STRM

Apparatet opfylder reglerne i afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 fra Industry Canada.

Brug af udstyret er underlagt følgende to betingelser:

1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Apparatet skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket brug.

Ændringer eller justeringer af apparatet, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Oticon, kan annullere garantien på enheden.

BEMÆRK: Dette apparat er blevet testet og fundet at opfylde grænserne for et Klasse B digitalt apparat i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne.

Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation.

Hvis denne enhed forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke enheden, opfordres brugeren til at gøre følgende:

- Drej eller flyt modtagerantennen
- Øg afstanden mellem enheden og modtageren
- Tilslut apparatet til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp

Oticon erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Overensstemmelses-erklæring fås hos:

Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
www.oticon.dk

Oticons servicecenter:
Oticon A/S
Tilstedvej 73 • 7700 Thisted
Telefon: 39 17 71 00 eller 39 13 89 15



Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.



CE 0543 0682

128105DK/11.12

128105DK/11.12

People First

Med vores People First-løfte forpligter vi os til at forbedre menneskers muligheder for at kommunikere naturligt og deltage aktivt



0000128759000001

oticon
PEOPLE FIRST