




Xenon<sup>2</sup> FF

Brugervejledning

  
**QUICKIE**<sup>®</sup>

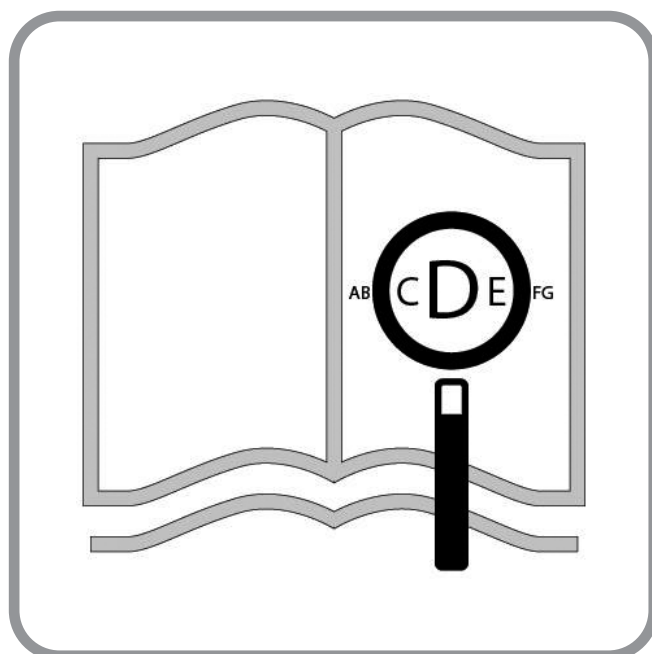

Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på:  
[Sunrisemedical.dk](http://Sunrisemedical.dk).

## Kørestolskomponenter

DA





SUNRISE MEDICAL er godkendt i henhold til ISO 13485, som bekræfter kvaliteten af vores produkter på alle stadier fra udvikling til produktion. Dette produkt opfylder de standarder, der er angivet i EU- og UKCA-bestemmelser. Det viste ekstraudstyr eller tilbehør kan købes mod tillægspris.



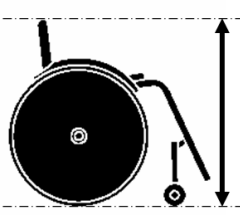
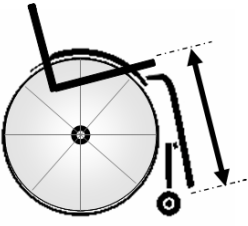
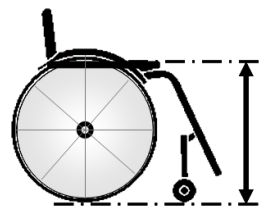
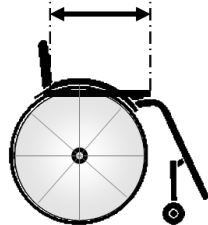
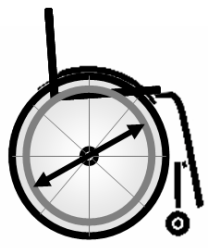
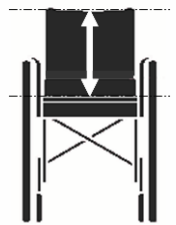

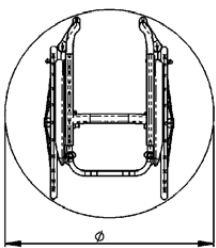
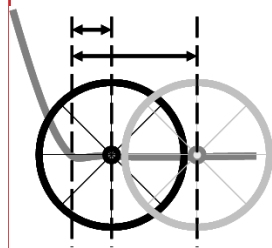
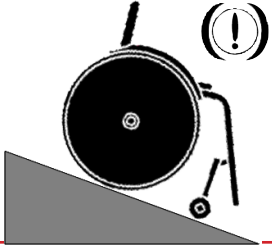
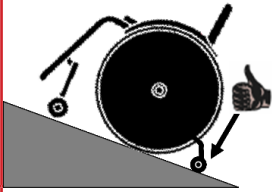

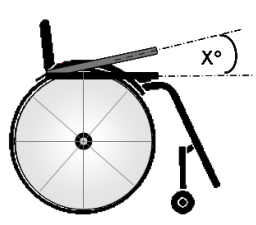
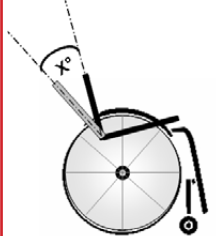
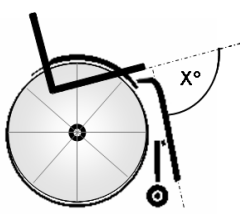
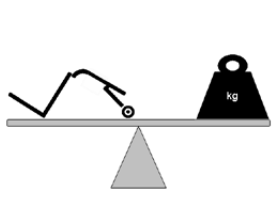
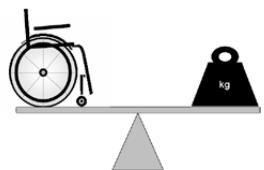









08

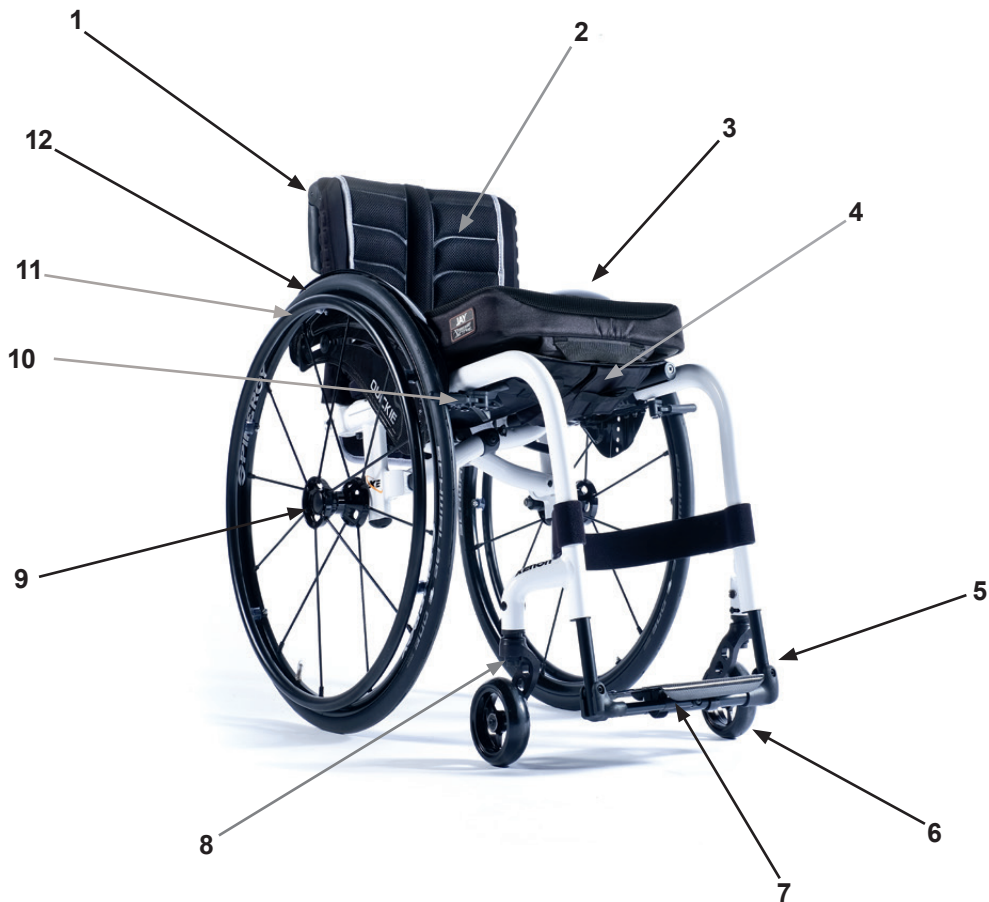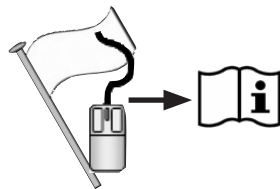


1. Skubbehåndtag
2. Ryglænspolstring
3. Sidestykker
4. Sædepolstring
5. Fodstøtte
6. Svinghjul
7. Fodplade
8. Forgaffel
9. Lynkoblingsaksel
10. Bremses
11. Drivring
12. Baghjul

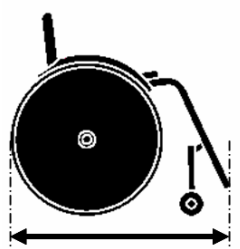

	1050 ↑↓ 770		760 ↑↓ 520		1020 ↑↓ 690		500 ↑↓ 220
	550 ↑↓ 430		500 ↑↓ 340		567 ↑↓ 540		MAKS. ↑↓ MIN.
	475 ↑↓ 250		500 ↑↓ 320				MAKS. ↑↓ MIN.
	880 ↑↓ ---		+130 ↑↓ +40				MAKS. ↑↓ MIN.
	10° ↑↓ 0°		10° ↑↓ 0°		10° ↑↓ 0°		MAKS. ↑↓ MIN.
	15° ↑↓ 0°		103° ↑↓ 75°		103° ↑↓ 92°		MAKS. ↑↓ MIN.
	6,3 ↑↓ ---		8,8 ↑↓ ---		140 ↑↓ ---		MAKS. ↑↓ MIN.

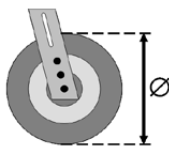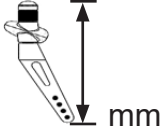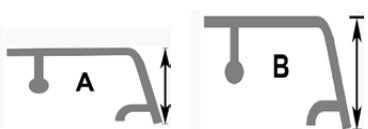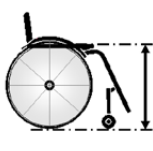				
3" (76 mm)	A	A	430	370-430
			440	370-440
			450	370-450
			450	370-450
	B	B	460	370-460
			470	370-470
			470	370-470
			480	370-480
4" (102 mm)	A	A	490	380-490
			490	380-490
			500	390-500
			510	400-500
	B	B	510	400-500
			490	380-490
			500	390-500
			510	400-500
5" (127 mm)	A	A	520	410-500
			460	370-460
			470	370-470
			480	370-480
	B	B	470	370-470
			480	370-480
			490	380-490
			500	390-500
B	B	510	400-500	
		520	410-500	
		510	400-500	
		520	410-500	
B	B	530	420-500	
		520	410-500	
		510	400-500	
		520	410-500	

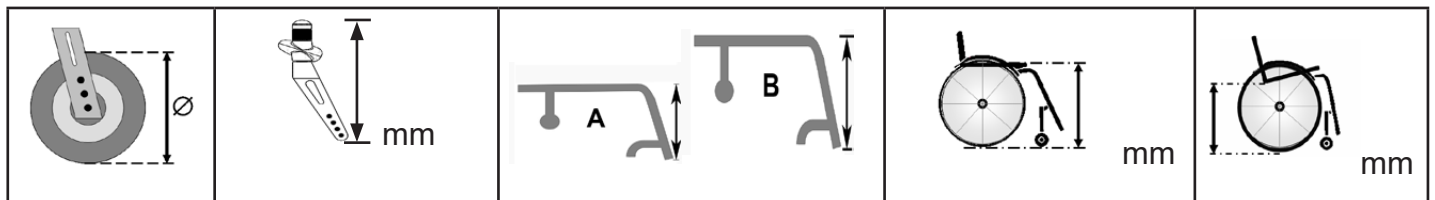





6" (152 mm)	123 mm	A	480	370-480
			490	380-490
			500	390-500
4" (102 mm)	Froskelår	B	520	410-500
			530	420-500
			540	430-500
5" (127 mm)	Froskelår	A	470	370-470
			480	370-480
			490	380-490
6" (152 mm)	Froskelår	B	500	390-500
			520	410-500
			530	420-500
5" (127 mm)	Froskelår	A	520	410-500
			530	420-500
			540	430-500
4" (102 mm)	Froskelår	B	490	380-490
			500	390-500
			510	400-500
6" (152 mm)	Froskelår	A	530	420-500
			540	430-500
			550	440-500



M5 = 5,0 Nm.  
M6 = 7,0 Nm.  
M8 = 10,0 Nm.



Nm

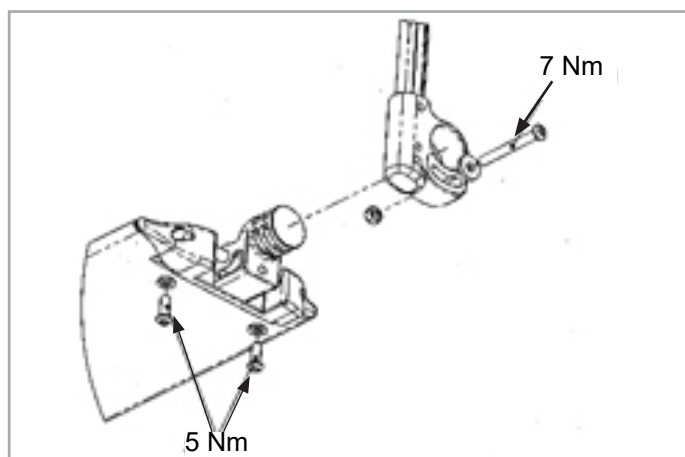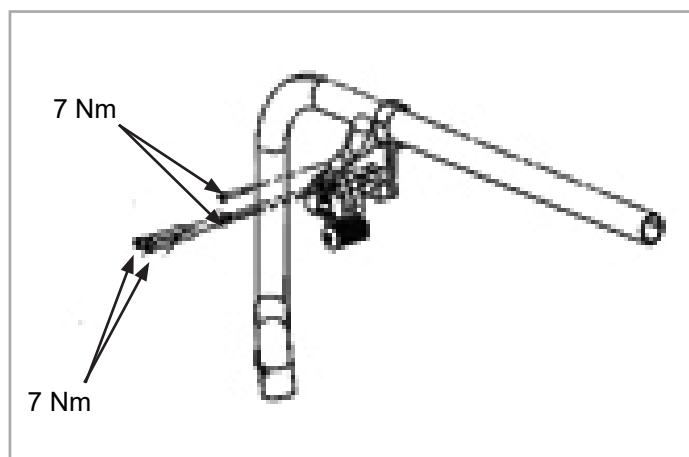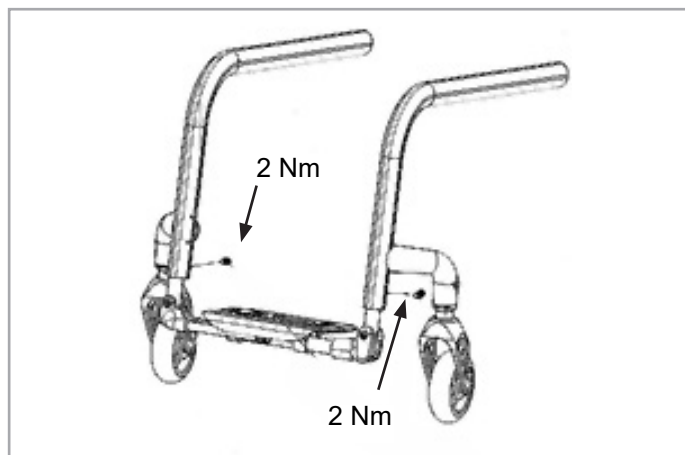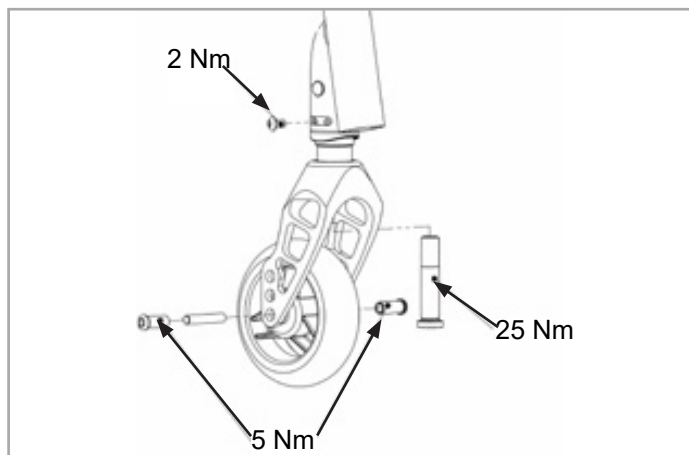

 **ADVARSEL!**

Nogle skruer, der bruges under fremstillingen, er gevindlåste (blå prik på gevindet) og kan kun justeres tre gange, før de skal udskiftes med nye gevindlåste skruer. Eventuelt kan skrueerne genbruges ved hjælp af Loctite™ 243 gevindlås.

## Forord

### Kære kunde,


Det glæder os meget, at du har valgt et førsteklases produkt fra SUNRISE MEDICAL.

I denne brugervejledning kan du finde mange gode råd og idéer, som vil gøre din kørestol til en velkendt og pålidelig partner i dagligdagen.

Det betyder meget for Sunrise Medical at være i tæt kontakt med vores kunder. Derfor vil vi gerne holde dig informeret om nye og aktuelle produkter. At være i nær kontakt med vores kunder betyder, at vi tilbyder en hurtig og fleksibel service i tæt samarbejde med kunderne. Hvis du har brug for reservedele eller tilbehør til din kørestol eller hvis du blot har et spørgsmål, står vi klar til at rådgive dig.

Vi ser naturligvis helst, at du er tilfreds med vores produkter og services. Hos Sunrise Medical arbejder vi konstant på at forbedre vores produkter. Der kan derfor forekomme ændringer i udvalget af produkter, hvad angår udformning, teknologi og udstyr. Som følge heraf kan der ikke rejses erstatningskrav på baggrund af oplysninger eller illustrationer i denne brugervejledning.

**SUNRISE MEDICAL's kvalitetsstyringssystem er godkendt i henhold til DIN EN ISO, ISO 13485 og ISO 14001.**

 Som producent erklærer SUNRISE MEDICAL hermed, at dette produkt overholder bestemmelserne i Forordning om medicinsk udstyr (2017/745).

### BEMÆRK:

#### Generelle brugerråd.

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det resultere i personskade, beskadigelse af produktet eller skade på miljøet.

Bemærkning til brugeren og/eller patienten: Alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten bor.

#### B4Me særlige indretninger

Sunrise Medical anbefaler på det kraftigste, at brugeren læser og forstår alle oplysninger, der leveres sammen med B4Me produktet, før produktet anvendes første gang. Dette skal gøres for at sikre, at B4Me produktet fungerer efter producentens hensigt.

Sunrise Medical anbefaler ligeledes, at oplysningerne om produktet ikke bortskaffes, når de er blevet læst, men opbevares til fremtidig brug.

#### Kombinationer med medicinsk udstyr

Dette medicinske udstyr kan muligvis kombineres med andet medicinsk udstyr eller et andet produkt. Information om hvilke kombinationer, der er mulige, kan findes på SunriseMedical.dk. Alle de angivne kombinationer er blevet valideret, så de opfylder kravene til generel sikkerhed og ydeevne, Bilag I, punkt 14.1 i Forordning om medicinsk udstyr 2017/745.

Vejledning om kombination, så som montering, kan findes på SunriseMedical.dk

Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af din kørestol, vedligeholdelse eller sikkerhed, bedes du kontakte din autoriserede SUNRISE MEDICAL-forhandler.

Såfremt der ikke findes en autoriseret forhandler i dit område, eller hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til os:

#### Sunrise Medical Aps

Mårkærvej 5-9

2630 Taastrup

Denmark

+45 70 22 43 49

info@sunrisemedical.dk

Sunrisemedical.dk

#### VIGTIGT:



DU MÅ IKKE BRUGE KØRESTOLEN FØR DU HAR LÆST OG FORSTÅET DENNE VEJLEDNING.

## Anvendelse

Kørestole er udelukkende til brug for børn og voksne, der er gangbesværede eller bevægelseshæmmede, til deres personlige brug indendørs eller udendørs, enten som selvkørende, eller når de bliver hjulpet af en tredjepart (skubbet af en hjælper).

**Den maksimale brugervægt (som omfatter brugeren og vægten af evt. tilbehør monteret på kørestolen) er angivet på det serienummermærkat, som findes på krydset eller stabiliseringsstangen under sædet.**

Garantien gælder kun, såfremt produktet anvendes til de påtænkte formål og under de forudsætninger, der angives i denne vejledning.

Kørestolens forventede levetid er 5 år.

DER MÅ IKKE MONTERES UORIGINALE

RESERVEDELE bortset fra den slags, som har Sunrise Medicals officielle godkendelse.

## Anvendelsesområde

### Indikationer

De mange forskellige monteringsmuligheder samt kørestolens modulbaserede konstruktion betyder, at denne kørestol er egnet til brugere, som er gangbesværede eller bevægelseshæmmede på grund af:

- Lammelse
- Tab af lemmer (benamputering)
- Deformiteter/misdannelser i benene
- Ledkontraktion/ledskader
- Sygdomme som f.eks. hjerte- eller kredsløbsproblemer, manglende balanceevne eller kakeksi, muskeldystrofi, hemiplegi. Desuden er kørestolen egnet til ældre personer, som stadig har kræfter i overkroppen.

### Kontraindikationer

Kørestolen må ikke anvendes uden ledsager i tilfælde af:

- Perceptionsforstyrrelse
- Ubalance
- At begge arme mangler, hvis vedkommende ikke understøttes af en omsorgsperson
- Ledkontraktur eller ledskade på begge arme
- Nedsat siddefunktion

### BEMÆRK:

Bemærk venligst, at kørsel med kørestol kræver tilstrækkelige kognitive, fysiske og synsevner. Brugeren skal være i stand til at vurdere følger af handlinger under betjening af kørestolen og, om nødvendigt, korrigere dem. Disse egenskaber og sikker brug af de ekstra monterede komponenter kan ikke vurderes af Sunrise Medical som producent. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for eventuelle skader som følge heraf.

Se betjeningsvejledningen til kørestolen og de ekstra monterede komponenter. Instruér brugeren i sikker brug af kørestolen og de ekstra monterede komponenter. Informér brugere om specifikke advarsler, der skal læses, forstås og overholdes.


Inden man henviser til en bestemt kørestolsmodel, bør man tage hensyn til brugerens kropsstørrelse og vægt samt personens fysiske og psykiske helbred, alder, boligforhold og omgivelser.

## Indholdsfortegnelse

Forord	8
Anvendelse	9
Anvendelsesområde	9
Indholdsfortegnelse	10
Forklaringer	10
1.0 Generelle oplysninger om sikkerhed og kørselsbegrænsninger	11
2.0 Transportmuligheder	14
3.0 Garanti	16
4.0 Håndtering	17
5.0 Lynkoblingsaksler	18
6.0 Indstillinger	18
6.1 Vippepedaler	18
6.2 Bremses	18
6.3 Fodstøtter	20
6.4 Sædestyring	22
6.5 Svinghjul	24
6.6 Ryglæn	25
6.7 Hovedstøtter	25
6.8 Sporing af hjul	26
6.9 Sidestykker	27
6.10 Skubbehåndtag	28
6.11 Krykkeholder	29
6.12 Tipsikringer	29
6.13 Stabiliseringsstang	30
6.14 Transithjul	30
6.15 Hoftesele	31
6.16 Håndcyklens aksel	33
7.0 Daglige eftersyn	34
8.0 Dæk og montering	34
9.0 Vedligeholdelse og rengøring	34
10.0 Fejlsøgning	35
11.0 Bortskaffelse/Genbrug af materialer	35
12.0 Mærkeplade	36
13.0 Tekniske specifikationer	36

## Forklaringer

### 3.1 Forklaringer på advarselstekster brugt i denne vejledning

Tekst	Forklaring
 <b>RISIKO!</b>	Gør brugeren opmærksom på mulig risiko for alvorlig personskade eller livsfare, hvis det viste råd ikke overholdes
 <b>ADVARSEL!</b>	Gør brugeren opmærksom på mulig risiko for personskade, hvis det viste råd ikke overholdes
 <b>VIGTIGT!</b>	Gør brugeren opmærksom på mulig risiko for beskadigelse af kørestolen og dens udstyr, hvis det viste råd ikke overholdes
<b>BEMÆRK:</b>	Generelle råd eller oplysninger om bedste fremgangsmåde
	Henviser til yderligere dokumentationsmateriale

#### **BEMÆRK:**

- De kørestole, der er vist og beskrevet i denne brugervejledning, er muligvis ikke nøjagtigt magen til din egen model. Alle instruktionerne er relevante, uanset de forskellige detaljer.
- Yderligere oplysninger og sikkerhedsanvisninger kan rekvireres hos din autoriserede forhandler.
- Producenten forbeholder sig ret til at ændre enhver form for vægtangivelser, mål eller andre tekniske data indeholdt i denne vejledning uden forudgående varsel. Alle tal, mål og kapaciteter vist i denne vejledning er omtrentlige og udgør altså ikke tekniske specifikationer.

#### **BEMÆRK:**

- Skriv adresse og telefonnummer på din lokale servicerepræsentant i det blanke felt.
- I tilfælde af funktionssvigt bør du kontakte vedkommende og give dem alle relevante oplysninger om problemet, så de hurtigst muligt kan hjælpe dig.

Forhandlerunderskrift- og stempel

## 1.0 Generelle oplysninger om sikkerhed og kørselsbegrænsninger

### BEMÆRK:

- I visse konfigurationer kan kørestolen være bredere end 700 mm. Hvis det er tilfældet, vil det under visse omstændigheder ikke være muligt at bruge nogle eller alle tilgængelige flugtveje i en bygning.
- Hvis kørestolskonfigurationen har en bredde, der overstiger 700 mm, kan det være vanskeligt eller umuligt at anvende de offentlige transportmidler.

Kørestolen er udviklet og konstrueret således, at den yder maksimal brugersikkerhed. Gældende internationale sikkerhedsstandarder er opfyldt. Ikke desto mindre kan brugere komme til skade ved forkert brug af kørestolen. Af sikkerhedsmæssige grunde skal nedenstående regler overholdes.

Uautoriserede eller ukorrekte tilpasninger eller justeringer øger risikoen for ulykker. Som kørestolsbruger er du en del af den daglige trafik på veje og fortove, ligesom alle andre trafikanter. Derfor vil vi gerne minde dig om, at du dermed skal overholde alle gældende færdselsregler. Vær forsigtig, når du anvender kørestolen første gang. Lær kørestolen at kende.

Følgende bør kontrolleres hver gang, inden kørestolen anvendes:

- Quick-release aksler på baghjulene
- Velcro på sæde og ryg
- Dæk, dæktryk og bremser.




Inden der foretages justeringer af kørestolen, er det vigtigt, at man læser det pågældende afsnit i brugervejledningen.

Huller i vejen eller ujævne overflader kan forårsage, at kørestolen tipper, især ved kørsel op eller ned ad bakker. Læn dig altid forover, når du kører forlæns op over et trin eller op ad en skråning.

### ⚠ RISIKO!

- Den maksimale belastning på 110 kg eller 140 kg må ALDRIG overskrides (afhængig af stellet: 110 kg eller 136 kg, når kørestolen anvendes som et sæde i et køretøj) for kørestolsbrugeren plus eventuelle genstande på kørestolen. Bemærk, at vægtplysninger for konfigurationer med lettere enkeltdele er angivet separat. Hvis den maksimale belastning overskrides, kan dette medføre skader på kørestolen samt risiko for, at du falder ud, at kørestolen vælter, eller at du mister kontrollen, hvorved du selv og andre kan udsættes for alvorlige personskader.
- Ved transport i et køretøj udstyret specielt til handicapbrug skal passagererne for så vidt muligt altid bruge de fastmonterede sæder og forsvarlige sikkerhedsseler i køretøjet. Det er kun ved at følge denne metode, at man kan sikre passagereren bedst mulig beskyttelse i tilfælde af biluheld. Under forudsætning af, at der anvendes sikkerhedsudstyr, som forhandles af SUNRISE MEDICAL, samt et sikkerhedssystem udformet specielt til dette formål, kan letvægtskørestole anvendes som sæde ved handicaptransport i særligt indrettede motorkøretøjer. (Yderligere oplysninger findes i kapitlet "Transport").
- For at undgå, at kørestolen vælter, eller at der opstår andre farlige situationer, bør du altid øve dig i brugen af den nye kørestol på en jævn kørselsflade med godt udsyn.
- Denne kørestol må kun bruges af én person ad gangen. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse med det beregnede formål.
- Undgå brug af fodpladerne ved ind- og udstigning af kørestolen. Fodpladerne bør slås op og svinges så langt ud til siden som muligt, inden du stiger ud eller ind.
- Afhængigt af svinghjulenes diameter og indstilling samt kørestolens tyngdepunkt kan det forekomme, at svinghjulene begynder at slingre ved høje hastigheder. Dermed risikerer man, at svinghjulene blokeres, og at kørestolen tipper forover. Sørg derfor for, at svinghjulene er justeret korrekt (se kapitlet "Svinghjul").

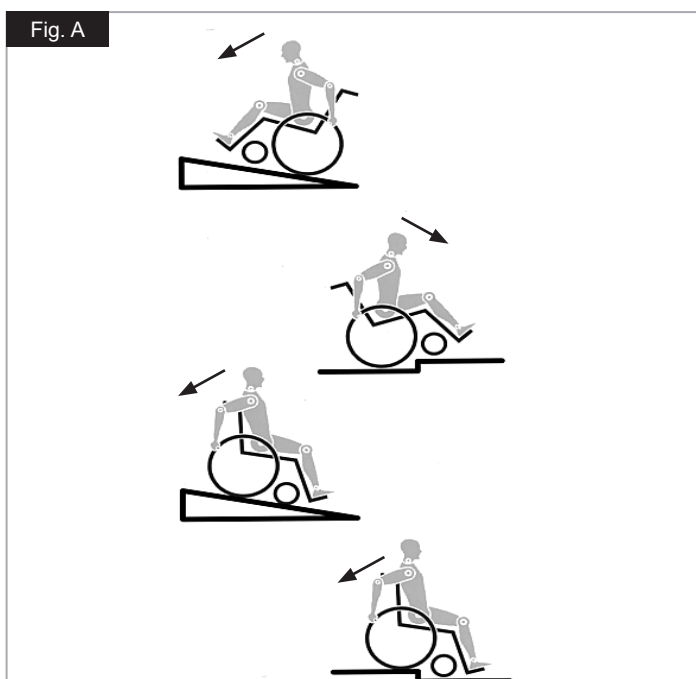

- Det er desuden særligt vigtigt, at man ikke kører på skråninger, hvis bremsene ikke er aktiveret. Kør med nedsat hastighed. Dette produkt er testet til en maksimal hastighed på 10 km/t. Ved højere hastigheder kan der, afhængigt af kørestolens konfiguration og/eller brugerens fysiske tilstand eller evner, opstå uventet slingen i svinghjulene. Dette medfører risiko for personskade på brugeren.
- Hvis man kører sidelæns på en hældning eller skråning, kan det forøge risikoen for, at kørestolen tipper sidelæns.
- Sørg for at afprøve, hvad der sker, når ændringer af tyngdepunktet påvirker kørestolens balance, f.eks. op og ned ad skråninger eller ved kørsel over forhindringer. Dette bør altid udføres med hjælp fra en erfaren ledsager.
- Det anbefales desuden, at uerfarne brugere anvender tipsikringer.
- Tipsikringer monteres for at forhindre, at kørestolen tipper bagover, uden at man har kontrol over den. De bør under ingen omstændigheder anvendes i stedet for transithjul eller ved transport af en passager i en kørestol, hvor baghjulene er afmonteret.
- I forbindelse med indstillinger i yderposition (f.eks. hvis baghjulene sidder så langt fremme som muligt), hvor brugeren ikke har den rette kropsholdning, risikerer man, at kørestolen vælter selv på jævne kørselsflader.
- Sørg for at læne overkroppen fremad ved kørsel op ad skråninger og trin.
- Sørg for at læne overkroppen tilbage ved kørsel ned ad skråninger og trin.
- Der må ikke hænges tunge varer, som for eksempel indkøbsposer eller rygsække på kørestolens skubbehåndtag, nakkestøtte eller ryglæn.
- Dette kan ændre balancepunktet, og der er risiko for at kørestolen tipper bagover. Når du rækker ud efter noget (hvad enten det befinder sig foran, ved siden af eller bag ved kørestolen), skal du altid sørge for, at du ikke læner dig for langt ud, idet en eventuel ændring af tyngdepunktet medfører risiko for, at kørestolen tipper eller vælter.
- Sørg altid for at anvende kørestolen på forsvarlig vis. F.eks. bør du altid undgå at køre ind mod eller over forhindringer (såsom trin og kantsten) uden at bremse imens, og du bør ikke køre hjulene hårdt ned i huller, mellemrum o.l.
- Kørsel på trapper bør kun ske med hjælp fra en ledsager. Der findes særligt udstyr til hjælp med f.eks. kørsel på ramper eller af og på kørestolslift, som bør anvendes. Hvis der ikke er egnet udstyr til rådighed, skal kørestolen tippes bagover og skubbes hen over forhindringen (dette kræver 2 ledsagere).
- Normalt bør enhver form for tipsikringer, som er monteret på kørestolen, indstilles forud for forcering af trin o.l., så de ikke kan komme i kontakt med forhindringen. I modsat fald risikerer man at komme alvorligt til skade, hvis kørestolen vælter. Efter forceringen skal tipsikringerne indstilles, så de sidder i den rette position igen.
- Sørg for, at ledsageren kun holder i kørestolen ved hjælp af de dele, der sidder forsvarligt fast (dvs. ikke fodstøtterne eller sidestykkerne).
- Når man anvender kørestolslift, skal man sørge for, at eventuelle påmonterede tipsikringer er placeret, så de ikke rager ud over platformen.
- Brems din kørestol på en ujævn overflade, eller ved forflytning til og fra kørestolen (f.eks. ind og ud af en bil)
- Hvis brugerens ben er amputeret ved låret, skal der anvendes anti-tipsikringer.
- Se efter, om dæktrykket er korrekt, inden du begynder at køre. I baghjul bør det være mindst 3,5 bar (350 kPa). Det maksimale tryk er angivet på dækket.
- Knæledsbremserne fungerer kun, hvis der er tilstrækkelig højt dæktryk, og indstillingerne er udført korrekt (se kapitlet "Brems").
- Bremsene er ikke beregnet til at låse hjulene på kørestolen. De er kun monteret for at sikre, at kørestolen ikke pludselig begynder at køre af sig selv. Når du stopper på en ujævn overflade, bør du altid bremse kørestolen for at undgå, at den kører af sig selv. Slå altid begge bremses til, da kørestolen ellers kan tippe.
- Bremsene er ikke beregnet til at bremse en kørestol i bevægelse.
- Gør altid brug af elevatorer og ramper. Hvis de ikke findes på steder, hvor det er relevant, bør du bede en ledsager om hjælp. Kørestolen må kun løftes i de dele, der er forsvarligt monteret. Hvis der er monteret tipsikringer skal disse fjernes/drejes væk inden løftet. Kørestolen må kun skubbes og aldrig løftes, hvis der sidder en person i den.
- Hvis sædet og rygpollstringen er beskadiget, skal de udskiftes med det samme.
- Du må ikke løfte eller bære kørestolen ved hjælp af rygrørene eller skubbehåndtagene.
- Der må ikke monteres noget uautoriseret elektronisk udstyr, drevet eller mekanisk betjent bevægelsesdrev, håndgreb eller andre anordninger, som ændrer kørestolens tilsigtede formål eller struktur.
- Alle kombinationer med andet medicinsk udstyr skal godkendes af Sunrise Medical.
- Vær ekstra forsigtig i nærheden af åben ild, især glødende cigaretter. Sædet og rygpollstringen er fremstillet af materialer, som let kan antændes.
- Ved transport i et køretøj udstyret specielt til handicapbrug skal passagererne for så vidt muligt altid bruge de fastmonterede sæder og forsvarlige sikkerhedsseler i køretøjet. Det er kun ved at følge denne metode, at man kan sikre passagereren bedst mulig beskyttelse i tilfælde af biluheld. Under forudsætning af, at der anvendes sikkerhedsudstyr, som forhandles af SUNRISE MEDICAL, samt et sikkerhedssystem udformet specielt til dette formål, kan letvægtskørestole anvendes som sæde ved handicaptransport i særligt indrettede motorkøretøjer. (Yderligere oplysninger findes i kapitlet "Transport").

- Sørg altid for, at lynkoblingsakslerne på baghjulene er indstillet korrekt og er forsvarligt fastlåst. Hvis knappen på lynkoblingsakslen ikke er trykket ind, kan baghjulet ikke tages af.
- Især ved brug af drivringe i letvægtsmetal er der risiko for, at man brænder fingrene ved hårde opbremsninger, eller når der bremses på lange skråninger.
- Hvis kørestolen udsættes for direkte sollys i lang tid, kan dele af kørestolen (f.eks. stel, benstøtter, bremses og sidestykke) blive varme (>41 °C).
- For at undgå skader på hænderne bør man lade være med at gribe mellem egerne eller mellem baghjulet og bremsen, mens kørestolen er i bevægelse.
- Når kørestolen anvendes udendørs, bør man altid bære læderhandsker for at få et bedre greb og beskytte hænderne mod snavs og overopvarmning.
- Kørestolen må ikke anvendes på skråninger > 10°.
- Den maksimale hældningsgrad for sikker kørsel på skråninger er dynamisk, dvs. den afhænger af kørestolskonfigurationen, brugerens fysiske evner samt den måde, brugeren kører på. Eftersom brugerens fysiske evner og måde at køre på er forskellige fra person til person, kan den maksimale hældningsgrad for sikker kørsel ikke angives her. Hældningsgraden skal derfor fastslås af brugeren selv med hjælp fra en ledsager for at undgå, at kørestolen tipper på skråninger. Det anbefales på det kraftigste, at uerfarne brugere får monteret tipsikringer på kørestolen.
- Kørestolen må ikke anvendes på mudrede eller isglatte kørselsflader.
- Kørestolen må ikke anvendes på steder, hvor der ikke er adgang for fodgængere.
- Ved alle bevægelige dele, er der en naturlig risiko for at fingrene kommer i klemme. Du bedes håndtere den med forsigtighed.
- Kørestolen bør ikke anvendes i stærk regn, i sne eller glat føre, eller hvor kørselsfladen er i uforsvarlig stand.
- Kørestolen må ikke anvendes i farlige omgivelser.

### ADVARSEL!

**KVÆLNINGSFARE** – Dette mobilitetshjælpemiddel bruger små dele, som under visse omstændigheder kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn.

**BEMÆRK:** Yderligere oplysninger og sikkerhedsanvisninger kan rekvireres hos din autoriserede forhandler.

### Bemærk:

- Bremsernes funktion, såvel som de generelle køreegenskaber, afhænger af dæktrykket. Kørestolen føles betydeligt lettere og er nemmere at manøvrere, når baghjulene er pumpet ordentligt op, og der er samme dæktryk i begge hjul.
- Sørg for, at der er slidbanemønster nok på alle dækkene!
- Husk, at du til enhver tid skal overholde de gældende færdselsregler, når du færdes i offentlig trafik.
- Når du færdes i mørke, bør du altid være iført lyst tøj eller tøj med reflekser, så du bedre kan ses. Sørg for, at reflekserne i hver side og bag på kørestolen er fuldt synlige. Det anbefales også, at du monterer en egentlig lygte på kørestolen.
- Pas altid på, at du ikke får fingrene i klemme, når du arbejder med eller justerer kørestolen!
- De kørestole, der er vist og beskrevet i denne brugervejledning, er muligvis ikke nøjagtigt magen til din egen model. Dog er alle vejledninger stadig fuldt ud relevante uanset de forskellige detaljer, der måtte være.
- Producenten forbeholder sig ret til at ændre enhver form for vægtangivelser, mål eller andre tekniske data indeholdt i denne vejledning uden forudgående varsel. Alle tal, mål og kapaciteter vist i denne vejledning er omtrentlige og udgør altså ikke tekniske specifikationer.
- Justeringer af kørestolen, især justeringer af sikkerhedsrelaterede komponenter, for eksempel bremses, tipsikringer og ryglæn skal foretages af en autoriseret forhandler.
- Hvis man benytter tilføjet mobilt udstyr, som håndcykler, strømført udstyr osv., skal man sikre, at kørestolen er udstyret med de korrekte svinghjulsgafler til sådan brug.

### Brugstid

- Produktets forventede levetid er 5 år.

## 2.0 Transportmuligheder


### RISIKO!

Hvis dette påbud ikke overholdes, er der risiko for alvorlige personskader eller livsfare!

Sørg for, at din kørestol er egnet til at transportere kørestolsbrugeren i et køretøj. Symbolerne på produktmærkatet vil hjælpe dig med at identificere, om din kørestol er kollisionstestet og derfor egnet til at transportere brugeren i et køretøj:



Kollisionstestet

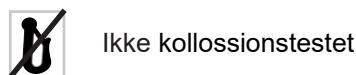


Ikke kollisionstestet

Transport af kørestolen i et køretøj:

En kørestol, der er fastspændt i et køretøj, giver ikke samme sikkerhed og beskyttelse under transporten, som hvis man bruger køretøjets faste sæder og sikkerhedsseler. Det anbefales altid, at brugeren flyttes over i køretøjets faste sæder. Vi erkender imidlertid, at det ikke altid er praktisk muligt at flytte brugeren. Under sådanne omstændigheder, hvor det er nødvendigt, at brugeren transporteres siddende i kørestolen, skal følgende råd overholdes nøje:

1. Sørg for at få bekræftet, om køretøjet er monteret med det rette udstyr til transport af en passager i kørestol, og om ind- og udgangsforholdene passer til den type kørestol, du anvender. Køretøjets bund skal være kraftig nok til at bære den samlede vægt af brugeren, kørestolen og evt. tilbehør.
2. Der bør være plads nok rundt om kørestolen til, at man let kan komme til at fastgøre, stramme og løsne såvel bespændingssystemet som sikkerhedsselerne.
3. Med brugeren siddende i kørestolen skal den placeres i kørselsretningen og fastspændes ved hjælp af kørestolsbespænding samt et sikkerhedsseselsystem til brugeren (hvor både fastspændings- og sikkerhedsseselsystemet opfylder kravene i ISO 10542 eller SAE J2249) i henhold til producentens vejledning for brugen af pågældende systemer.

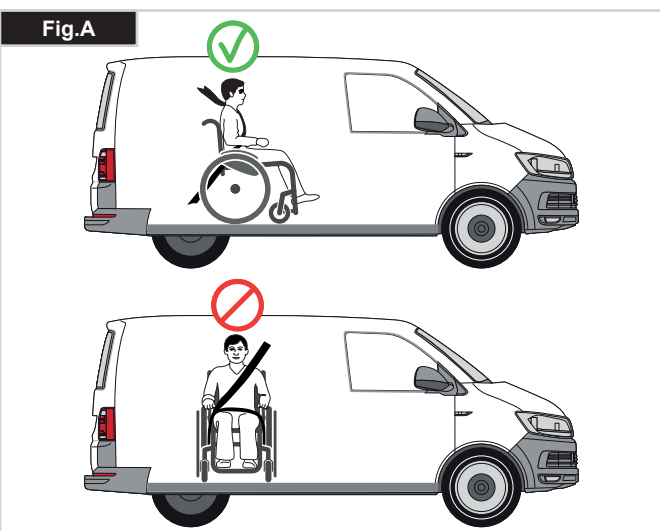

4. Kørestolen er ikke afprøvet til at placeres i andre retninger i et køretøj, og den må derfor under ingen omstændigheder transporteres i sidelæns retning (Fig. a).

5. Kørestolen skal spændes fast ved hjælp af et 4-punktssystem til kørestolsbespænding, som opfylder kravene i ISO 10542 eller SAE J2249. Disse systemer omfatter ikke-justerbare remme foran og justerbare remme bagpå, som normalt fastgøres ved hjælp af karabinhager eller S-kroge samt spænder med han- og hun-dele. Disse bespændingssystemer består normalt af 4 individuelle remme, som fastgøres til hvert hjørne af kørestolen.

6. Bespændingssystemet bør monteres på selve kørestolsstellet som illustreret på næste side og må altså ikke føres rundt om påmonterede dele eller tilbehør såsom hjulenes eger, bremses eller fodstøtterne.

7. Fastspændingsselerne bør monteres så nær ved en 45° vinkel som muligt og derefter spændes forsvarligt i henhold til producentens vejledning.

8. Der må ikke foretages ændringer eller erstatninger på kørestolens fastspændingspunkter eller de strukturelle dele og stallets komponenter før du har rådført dig med producenten. I modsat fald kan en Sunrise Medical-kørestol ikke længere betragtes som egnet til transport i et køretøj.

9. Kørestolsbrugeren skal fastspændes med såvel hofte- som skulderseler. Dermed nedsættes risikoen for, at vedkommende slår hovedet eller brystkassen mod andre dele af køretøjet samt risikoen for andre alvorlige skader på brugeren og andre personer i køretøjet. (Fig. B) Skulderselen skal monteres på B-søjlen i køretøjet - i modsat fald udsættes brugeren for øget risiko for alvorlige skader.

10. Hvor der er behov for en hovedstøtte, når brugeren bliver transporteret i kørestolen som et sæde i et køretøj, skal der installeres en hovedstøtte, der er egnet til transport, og som positioneres korrekt under transport af kørestolsbrugeren.

11. Udstyr beregnet til kropsstøtte (f.eks. hofteremme eller hofteseler) må ikke bruges til fastspænding i køretøjet og må især ikke anvendes som den eneste form for fastspænding af kørestolsbrugeren under transport i et køretøj, medmindre udstyret er godkendt og mærket i henhold til ISO 7176-19 eller SAE J2249.



## Transportmuligheder fortsat

12. Kørestolsbrugerens sikkerhed under transporten afhænger af, hvor omhyggeligt arbejdet udføres af den person, der er ansvarlig for at fastgøre kørestolsbespændingen, og de skal have modtaget relevante instruktioner og/eller oplæring i anvendelsen.

13. Man bør for så vidt muligt afmontere alt hjælpeudstyr fra kørestolen og opbevare det på sikker afstand af kørestolen, f.eks.:

stokke, krykker, løse puder og bordplader.

14. Benstøtter med hævefunktion eller leddelt indstilling bør ikke anvendes i hævet position under transport af kørestol og bruger, hvis der samtidig anvendes kørestolsbespænding samt et sikkerhedsselesystem til fastspænding af kørestolsbrugereren.

15. Ryglæn med tilbagelæning bør indstilles i opretstående position.

16. De manuelle bremses skal slås til, så de griber forsvarligt fast i dækkene.

17. Sikkerhedsseler skal monteres på B-søjlen i køretøjet. Pas på, at selen ikke holdes væk fra kroppen på grund af kørestolskomponenter såsom armlæn eller hjul, der kan sidde i vejen for selen.

### Vejledning i fastspænding af kørestolsbrugereren:

1. Hofteselen skal bæres lavt hen over den forreste del af bækkenet, så hofteselens vinkel ligger inden for det optimale område på 30-75° i forhold til vandret.





Ideelt bør man forsøge at opnå en mere skråtstillet (dvs. større) vinkel inden for det optimale område, dvs. tæt på, men aldrig større end 75°. (Fig. C).

2. Skuldreselen skal sidde korrekt ned over skulderen og skråt hen over brystkassen som vist på billedet (Fig. D og E).

Sikkerhedsselerne skal strammes så meget, som det kan lade sig gøre uden at det føles ubehageligt for brugeren.

Sikkerhedsselernes remme må ikke være snoet under brug.

Skuldreselen skal sidde korrekt ned over skulderen og skråt hen over brystkassen som vist på billedet (Fig. D og E).

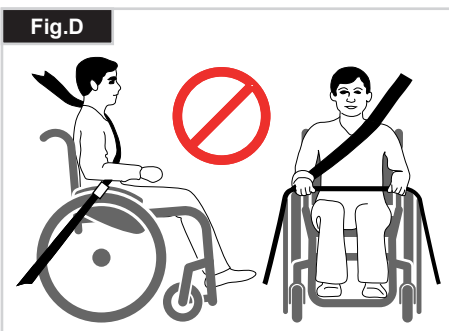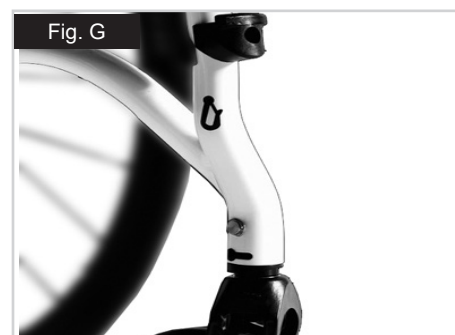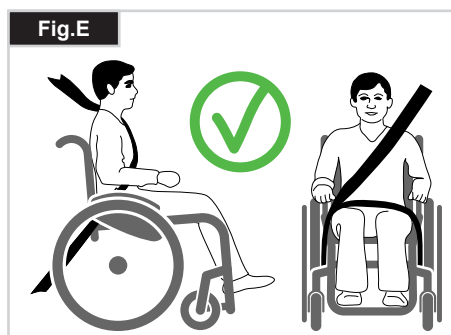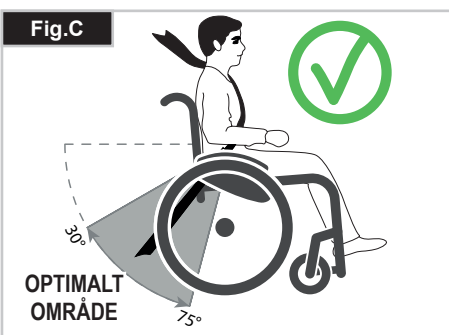

3. Kørestolens fastgøringspunkter findes på den indre del af det forreste stel, lige over svinghjulet og det bageste sidestel. Selerne monteres rundt om sidestellene på det punkt, hvor de vandrette og lodrette stelrør krydser hinanden. (Se Fig. G - H)

4. Symbolet for fastgøring (Fig. F) på kørestolsstellet viser, hvor fastspændingsremmene skal placeres. Remmene skal strammes efter, når de forreste remme er monteret for at holde kørestolen på plads.

### BRUGER DER VEJER MINDRE END 22 kg

Når den bruger, der transporteres, er et barn, der vejer mindre end 22 kg, og det involverede køretøj har mindre end otte (8) siddende passagerer, anbefales det, at barnet overføres til et UNCE Regulation 44-kompatibelt børnesikkerhedssystem (CRS).

Denne type børnesikkerhedssystem giver passageren et mere effektivt sikkerhedssystem end det traditionelle 3-punkts sikkerhedssystem, og nogle CRS-systemer omfatter yderligere holdningsstøtte, der hjælper med at bevare barnets siddestilling.

Forældre eller plejere kan i nogle tilfælde overveje muligheden for, at deres barn bliver i kørestolen under transporten på grund af barnets kropsholdningskontrol og kørestolens indstillinger.

I sådanne tilfælde anbefaler vi, at dit professionelle sundhedspersonale og relevante kompetente personer udfører en risikovurdering.

### Transportmuligheder – bespændingssystemets placering på kørestolen

Kørestolen er fastgjort ved hjælp af forhjulenes bespændingssystem. (Fig. G).

Placering af kørestolens bageste bespændingssystem (Fig. H).

#### **DENNE GARANTI INDSKRÆNKER IKKE DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL KØBELOVEN.**

Sunrise Medical\* yder en garanti til sine kunder, som anført i garantibetingelserne for kørestole, der dækker det følgende.

#### **Garantibetingelser:**

1. Hvis en del eller dele af kørestolen har brug for reparation eller udskiftning på grund af en produktions- og/eller materialefejl bliver den berørte del repareret eller udskiftet gratis inden for 24 måneder. For produktions- og/eller materialefejl på stellet eller krydsstellet, kan reparation eller erstatning ske op til 5 år efter levering. Garantien dækker kun produktionsfejl.
2. For at håndhæve garantien, skal du kontakte Sunrise Medicals kundeservice med de nøjagtige oplysninger om problemet. Såfremt du anvender kørestolen uden for din Sunrise Medical-servicerepræsentants område, skal reparationer og udskiftninger udføres af en anden part anvist af producenten. Kørestolen skal repareres af en Sunrise Medical autoriseret servicemedarbejder.
3. For dele, som er blevet repareret eller udskiftet inden for garantien, giver vi en garanti i overensstemmelse med disse garantivilkår for kørestolens resterende garantiperiode i henhold til punkt 1).
4. Originale reservedele, der er blevet monteret på kundens regning, er dækket af en garanti på 12 måneder (efter montering) i overensstemmelse med garantibetingelserne i denne brugervejledning.
5. Erstatningskrav fra denne garanti kan ikke forekomme, for reparationer eller udskiftninger på kørestolen på grund af følgende årsager:
  - a. Almindelig slitage, som omfatter batterier, armlænsputer, polstring, dæk, bremseklodser osv.
  - b. Hvis produktet overbelastes. Se EF-etiketten vedrørende den maksimale brugervægt.
  - c. Produktet eller delen ikke er blevet vedligeholdt i henhold til producentens anbefalinger som angivet i brugervejledningen og/eller den tekniske vejledning.
  - d. Der er anvendt andet tilbehør end det, der er angivet som originalt tilbehør fra producentens side.
  - e. Kørestolen eller delen er beskadiget som følge af misligholdelse, uheld eller uhensigtsmæssig brug.
  - f. Ændringer/modificeringer er blevet foretaget på kørestolen eller dele, der afviger fra producentens specifikationer.
  - g. Hvis der er foretaget reparationer, inden kundeservice er blevet informeret om problemerne.
6. Denne garanti er omfattet af loven i det land, hvor produktet blev købt af Sunrise Medical\*

\* Betyder den Sunrise Medical-forhandler, hvorfra produktet blev købt.

## 4.0 Håndtering

### Sådan foldes kørestolen sammen

Start med at fjerne siddepuden fra kørestolen, og slå så fodpladen (i ét stykke) eller de individuelle fodplader op. Tag fat i selen eller sæderørene (Fig. 4.1) på midten, fra bagsiden, og træk opad indtil foldebeslaget (Fig. 4.2) klikker på plads.

### Transport

Flytning af kørestolen bør foretages, mens den er klappet sammen, idet man løfter kørestolen i den forreste del af tværstiveren og skubbehåndtagene.

### Sådan foldes kørestolen ud

Skub foldebeslagets udløserhåndtag (Fig. 4.3) nedad og skub begge halvdele af stellet fra hinanden. Tryk derefter ned på sæderørene (se illustrationen). Dermed er kørestolen foldet ud. Sæderørene skal nu klikkes på plads i plaatsadlen. Dette kan gøres lettere ved, at man vipper kørestolen lidt til en af siderne, så vægten tages af det ene baghjul. **Pas på, at du ikke får fingrene i klemme i tværstivermontagen.** Montér siddepuden. (Fig. 4.4).

### Sådan sætter du dig i kørestolen uden hjælp (Fig. 4.5)


- Skub kørestolen hen mod en væg eller et tungt møbel.
- Anvend bremsene;
- Slå fodpladerne op.
- Du kan nu lade dig sænke ned i kørestolen.
- Slå fodpladerne ned igen, og anbring fødderne, så de sidder foran hælstropperne.

### Sådan rejser du dig fra kørestolen uden hjælp (Fig. 4.6)

- Anvend bremsene;
- Slå fodpladerne op ved hjælp af den ene fod;
- Med en hånd på hvert armlæn, skal du bøje dig en smule fremad for at bringe kropsvægten frem i sædet, og så med begge fødder fast på jorden, og den ene fod et godt stykke tilbage, skal du skubbe dig i opretstående position.

### ADVARSEL!

- Stå ikke på fodpladerne under ind- eller udstigning. Kørestolen kan tippe fremad, hvis man står på fodpladerne.
- Anbring altid fødderne sikkert på jorden ved ind- eller udstigning af kørestolen.
- Du skal altid aktivere bremsene, når du stiger ind eller ud af kørestolen.

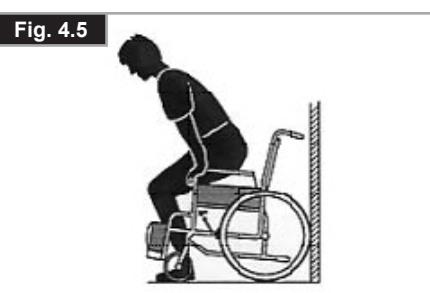

## 5.0 Lynkoblingsaksler

### Lynkoblingsaksler på baghjulene

Baghjulene er forsynet med lynkoblingsaksler. Hjulene kan derfor monteres eller afmonteres uden brug af værktøj. Hjulet afmonteres ganske enkelt ved et tryk på knappen til lynkobling på akslen, hvorefter hjulet trækkes af akslen. (Fig. 5.1).

### Lynkobling til quadri-/tetraplegikere

Løft udløsningshåndtaget (1) op. Udtagning af lynkoblingsakslerne og/eller hjulene.

Når hjulene/lynkoblingsakslerne er blevet sat tilbage på stolen, skal udløsningshåndtaget slås ned igen.

Du skal altid sørge for at udløsningsmekanismen er lukket og låst fuldstændigt, inden du begynder at bruge kørestolen (Fig. 5.2).

### ⚠ ADVARSEL!

- Lynkoblingsknappen på akslen skal holdes nede, mens akslen skubbes på plads i stellet for at montere baghjulene. Giv slip på knappen igen for at låse akslen på plads. Lynkoblingsknappen fastlåses igen i udgangspositionen.
- Risiko for personskade. Pas på ikke at få fingrene i klemme i det roterende hjul. Stop altid hjulrotation, før hjulene fjernes.

## 6.0 Indstillinger

### 6.1 Vippepedaler

Vippepedalen bruges af ledsagere til at skubbe en kørestol over en forhindring. Der skal trædes på pedalen for at skubbe kørestolen over en kantsten, et trin eller lignende (Fig. 6.1.1).

### 6.2 Bremsler

### ⚠ VIGTIGT!

Bremsefunktionen kan påvirkes, hvis bremslerne er forkert monteret og/eller justeret, eller hvis dæktrykket er for lavt.

### Bremsler

Din kørestol er udstyret med to sæt bremsler. De aktiveres med direkte kontakt til dækkene. Bremslerne aktiveres ved at skubbe begge bremsearme fremad, så de støder mod stopklodserne. Bremslerne frigøres ved at skubbe bremsearmene tilbage til udgangspositionen.



Følgende medfører nedsat bremsefunktion:

- Slidte dæk
- For lavt dæktryk
- Våde dæk
- Forkert indstilling af bremslerne.

Bremslerne er ikke beregnet til at bremse en kørestol i bevægelse. Bremslerne må derfor aldrig bruges til at bremse kørestolen, mens den er i bevægelse. Brug altid drivringene til at bremse kørestolen. Sørg for, at afstanden mellem dæk og bremser opfylder de angivne specifikationer. Afstanden justeres ved at løsne skruen, hvorefter den passende afstand kan indstilles. Spænd derefter skruen (Fig. 6.2.1 og Fig. 6.2.2).

### ⚠ VIGTIGT!

Efter justering af baghjulene bør afstanden til bremslerne kontrolleres og om nødvendigt justeres.

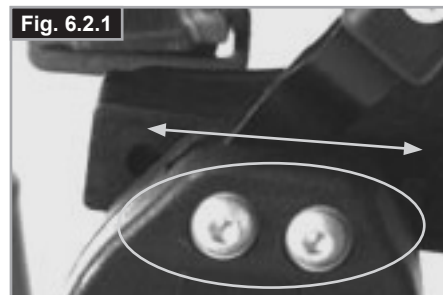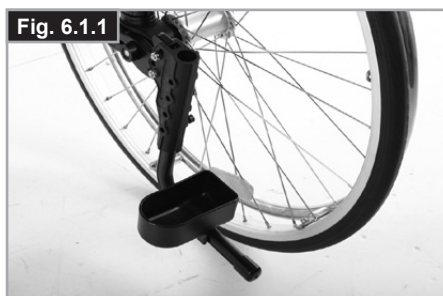

## Bremsehåndtagets forlænger

Ved brug af forlænger kræves der kun et minimum af kræfter til betjening af bremserne.

Bremsearmens forlænger er skruet fast til bremserne. Hvis den hæves kan den drejes fremad. (Fig. 6.2.3).

### ⚠️ VIGTIGT!

**Hvis bremsen monteres for tæt på hjulet, bliver kørestolen sværere at betjene. Dette kan medføre, at forlænger til bremsearmen knækker.**

### ⚠️ ADVARSEL!

Hvis brugeren overbelaster forlænger ved at støtte sig til den under en forflytning, vil bremsearmen knække! Vandsprøjt fra dækkene kan medføre nedsat bremseeffekt.

## Kompakt bremsehåndtag

Kompaktbremserne sidder under sædepolstringen og betjenes ved at trække selve bremserne bagud i dækkets retning. For at bremserne skal kunne fungere korrekt, skal de være trukket helt i bund, så de støder mod stopklodserne (Fig. 6.2.4).

### ⚠️ VIGTIGT!

- Hvis bremserne ikke monteres korrekt, kan det resultere i at kørestolen er sværere at betjene. Dette kan medføre, at bremseforlænger knækker!
- Bremsens monteringsbolte må ikke løsnes og/eller strammes yderligere.

## Tromlebremser


Tromlebremser gør det muligt for en ledsager at bremse sikkert og bekvemt. De kan også aktiveres ved hjælp af en bremsearm (1) for at forhindre, at kørestolen kører af sig selv.

Det skal kunne høres, når bremsearmen klikker på plads.

Tromlebremsernes funktion er ikke afhængig af lufttrykket i dækkene (Fig. 6.2.5).

### ⚠️ ADVARSEL!

- Tromlebremserne bør kun justeres af autoriserede forhandlere.
- De 2 tromlebremser skal altid betjenes samtidigt, for at kontrollere køreretningen!
- Tromlebremser kan kun bruges som en dynamisk bremse til at stoppe kørestolen under kørslen.
- Bremserne skal altid aktiveres for at sikre kørestolen under et kort eller langt stop eller ved forflytning.

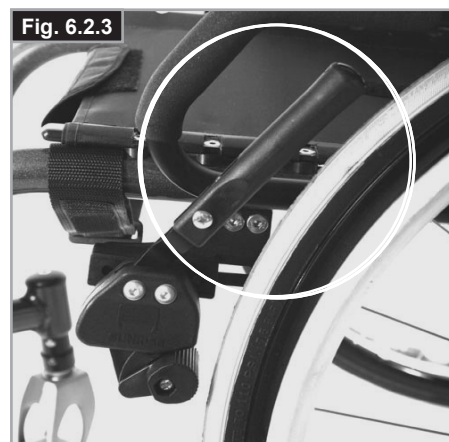

## 6.3 Fodstøtter

Xenon-modellen fås med forskellige typer fodplader. De kan slås op for at lette forflytning til/fra kørestolen. Hver type beskrives separat nedenfor.

### Underbenslængde

Underbenslængden kan justeres ved, at man løsner spændeskruen (Fig. 6.3.1). Skru spændeskruen løs, og justér røret med fodstøtten, til det sidder som ønsket. Spænd spændeskruen igen (se siden vedrørende tilspændingsmomenter). Sørg for, at samlestykket af plast sidder korrekt under spændeskruen.

### ADVARSLER!

- Stå ikke på fodpladen under forflytning. Stolen kan tippe fremad, hvis man står på fodpladen. Placér altid dine fødder fast på jorden ved forflytning ind eller ud af stolen.

### Platformens fodstøtter

Fodpladerne kan vippes op for at gøre det lettere at stige ind og ud af stolen.

Fodpladerne kan også vippes til seks forskellige vinkler i forhold til en flad overflade.


Spænd skruen (1) på fodpladens yderside forsvarligt fast.

Ved at fjerne clipsene (2), kan fodpladen justeres til tre forskellige positioner både i front og bagtil. Løsgør justeringsskruen (3) for at ændre fodpladens vandrette placering.

Til dette formål skal fodpladen slås op (Fig. 6.3.2 til Fig. 6.3.4).

Når du er færdig, skal du sikre dig, at alle skruerne er forsvarligt fastspændt (se siden vedr. tilspændingsmomenter).

Der skal altid holdes en minimal afstand på 2,5 centimeter fra jorden.

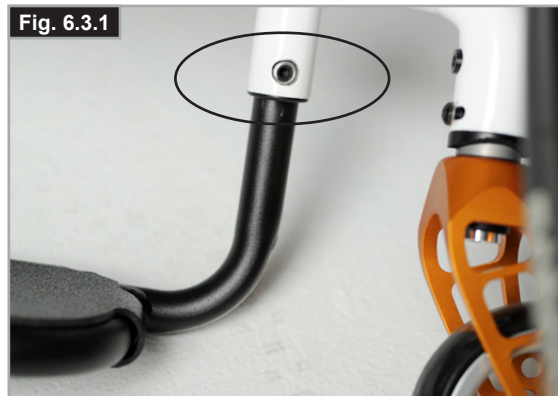

## Breddejustering af fodstøtter

Fodstøttens bredde kan justeres ved at løsne skruen (1) og indstille den ønskede bredde ved hjælp af 1, 2 eller 3 afstandsstykker (2), som placeres fra ydersiden til indersiden, hvorefter skruen spændes fast igen (Fig. 6.3.5).

## Letvægtsfodstøtte

Fodpladens vinkel kan justeres ved at løsne skruerne (2). Der kan monteres sidebeskyttelsespaneler på fodpladen ved hjælp af monteringshullerne (3). Disse hindrer fødderne i at glide af ved et uheld (Fig. 6.3.6). Sørg for, at alle skruer er spændt korrekt efter justeringen (se siden vedr. tilspændingsmomenter).

## Breddejustering

Du justerer fodpladens bredde ved at åbne skruen (2). Derefter kan rørene i holderen skubbes ind og ud, så fodpladens bredde ændres (Fig. 6.3.6).



Sørg for, at skruerne spændes med det korrekte tilspændingsmoment.

## Fodstøtte med automatisk opklapning

Fodstøttevinklen kan justeres ved at løsne skruerne (1) og dreje på fodstøtten. Sørg for at overholde tilspændingsværdierne, når skruerne spændes fast igen (Fig. 6.3.7).

## Fodstøtte, højt monteret

Denne type fodstøtte er monteret indvendigt på stellet, så den kan placeres højere end normalt (Fig. 6.3.8)

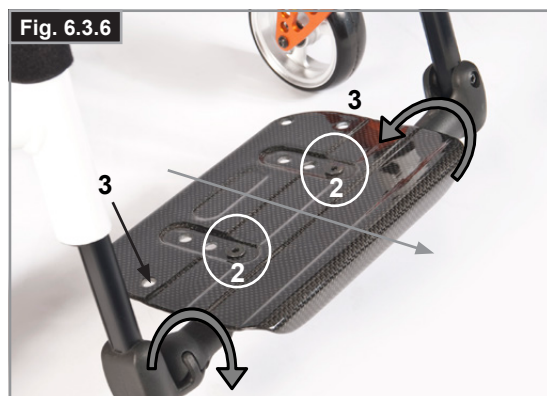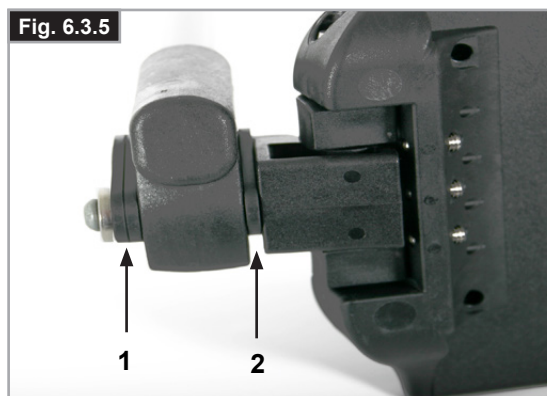

## 6.4 Sædestyring

### Sædepolstring

Sædepolstringen kan justeres ved at bruge flere stropper. For at kunne justere sædepolstringen, skal alle stropperne være åbne. Ved at trække i stropperne, bliver sædepolstringen strammet (Fig. 6.4.1).

**BEMÆRK:** Hvis spændingen er for høj, vil tværafstiveren ikke være i stand til at glide ind i sadlen.

### Indstilling af sædehøjden:

#### Letvægtsadapter

Sådan ændrer du sædehøjden:

- Fjern gummipropperne (3), der sidder i rillen ved bagakslen.
- Løsn unbrakoskruerne (1) med en unbrakonøgle. Anbring akselophænget (2) på akselmonteringsrøret (4) i henhold til den ønskede sædehøjde (Fig. 6.4.2).
- Akselophænget kan monteres omvendt for at opnå det laveste mulige siddehøjde.
- Spænd alle unbrakoskruer (1) vha. en tottrinsproces:
  - a) Spænd begge unbrakoskruer til et spændingsmoment på 5 Nm.
  - b) Spænd begge unbrakoskruer endnu en gang til et spændingsmoment på 8 Nm.
- Genmonter gummipropperne.

#### Standard adapter

Sådan ændrer du sædehøjden:




- Fjern gummipropperne (3), der sidder i rillen ved bagakslen.
- Løsn unbrakoskruerne (1) med en unbrakonøgle. Anbring akselbeslaget (2) på akselmonteringsrøret (4) i henhold til den ønskede sædehøjde (Fig. 6.4.3).
- Spænd alle unbrakoskruer (1) vha. en tottrinsproces:
  - a) Spænd begge unbrakoskruer til et spændingsmoment på 5 Nm.
  - b) Spænd begge unbrakoskruer endnu en gang til et spændingsmoment på 8 Nm.
- Genmonter gummipropperne.

#### BEMÆRK:

- Justering af bageste sædehøjde kan medføre, at svinghjuls vinklen også skal justeres.
- Hvis akselholderen blev flyttet eller fjernet under justering af sædehøjden, skal hjuljustering og hjulafstandens bredde kontrolleres og, hvis det er relevant, justeres (læs afsnittet "Sporing af hjul").

#### VIGTIGT!

- Nogle af skruerne, der anvendes under produktionen, er belagt med gevindlåsende væske (blå prik på gevindet) og kan kun justeres op til 3 gange, før de skal udskiftes med nye gevindlåsende skruer. Skruerne kan som alternativ genmonteres med Loctite™ 243 låsevæske.
- Der SKAL anvendes Loctite™ 243 Threadlocker til remontering af unbrakoskruerne (1) på akseladapteren.

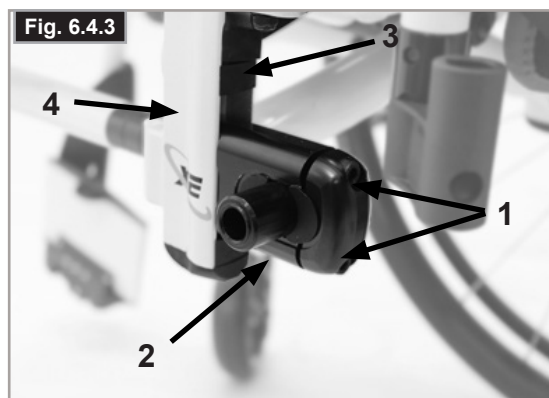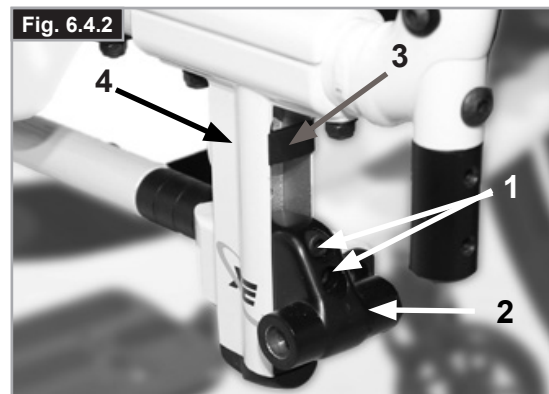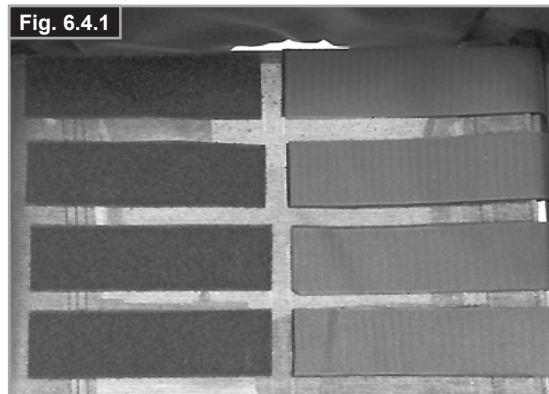

## Indstilling af tyngdepunkt

I grove træk kan justering af tyngdepunktet foretages på to forskellige måder. Justering kan udføres direkte på akselophænget (kun standard adapter) ved at rykke de halvmåneformede afstandsstykker fra den ene til den anden side. Hvis justeringen skal udføres i større trin, er det nødvendigt at ændre akselmonteringsrørets position på stedet.

### BEMÆRK:

- Justering af tyngdepunkt kan føre til en ustabil kørestol, der er tilbøjelig til at tippe. Dette kræver montering af tipsikringer.
- Justering af tyngdepunktet kan medføre, at svinghjuls vinklen også skal justeres.

### Justering af akselmonteringsrørets position

Hjulene tages ud af akselholderen ved hjælp af lynkoblingsakslerne. Begge skruer (1) løsnes og tages helt ud. Placér akselmonteringsrøret i den ønskede position på stedet. Sæt så skruerne på plads i hulpladen igen, og spænd dem fast. Når du rykker akselmonteringsrøret, skal du også sørge for at rykke sædestøtten på stedet (når der udføres justering af akselmonteringsrøret og sædestøtten). Sørg for, at højre og venstre side indstilles nøjagtigt ens. Brug det angivne spændingsmoment på 8 Nm (Fig. 6.4.4 til Fig. 6.4.5).

### Indstilling af tyngdepunkt på standard akselophæng

Justering kan udføres direkte på akselophænget (kun standard akselophæng) ved at rykke de halvmåneformede afstandsstykker fra den ene til den anden side. 3 positioner er mulige (Fig. 6.4.6 til Fig. 6.4.8).

Hjulene tages ud af akselholderen ved hjælp af lynkoblingsakslerne (4). Løsn unbrakoskruerne (1) med en unbrakonøgle. Fjern låget (2) fra akselophænget, og indstil de halvmåneformede afstandsstykker (3) i henhold til det ønskede tyngdepunkt. Sæt låget på igen.




Spænd alle unbrakoskruer (1) vha. en totrinsproces:

- a) Spænd begge unbrakoskruer til et spændingsmoment på 5 Nm.
- b) Spænd begge unbrakoskruer endnu en gang til et spændingsmoment på 8 Nm.

**BEMÆRK:** Hvis akselophænget blev flyttet eller fjernet under justering af tyngdepunktet, skal hjuljustering og hjulafstandens bredde kontrolleres, og, hvis det er relevant, justeres (læs afsnittet "Sparing af hjul").

### ⚠ VIGTIGT!

- Der SKAL anvendes Loctite™ 243 Threadlocker til remontering af unbrakoskruerne (1) på akseladapteren.

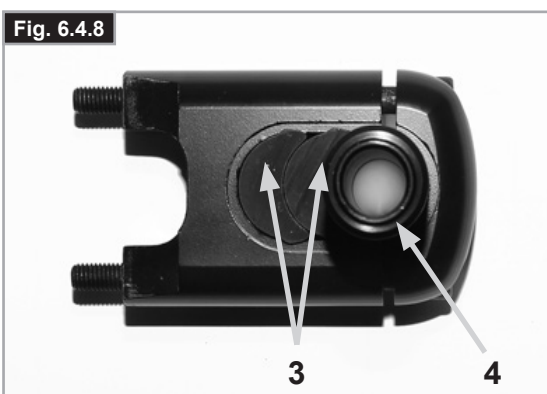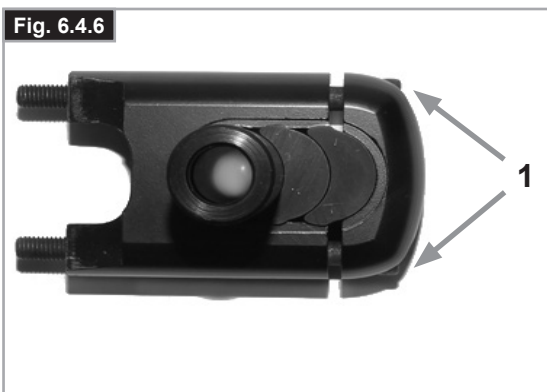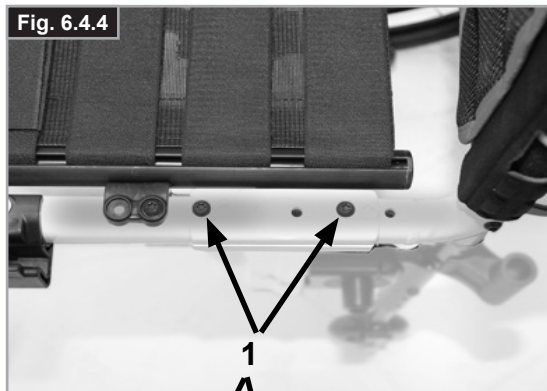

## 6.5 Svinghjul

### Indstilling af svinghjul, svinghjulsophæng og svinghjulsgaffel

Hvis kørestolen trækker en anelse mod højre eller venstre eller svinghjulene slinger, kan det skyldes en eller flere af følgende årsager:

- Hjulenes forlæns- og/eller baglænsbevægelse er ikke indstillet korrekt.
- Camringen er ikke indstillet korrekt.
- Sving- og/eller drivhjulenes lufttryk er forkert; hjulene drejer ikke tilstrækkeligt frit rundt.

Svinghjulene skal justeres optimalt, for at kørestolen kan køre lige. Svinghjulene bør altid justeres af en autoriseret forhandler. Svinghjulsophængene skal genindstilles, og hjulholderen skal kontrolleres, hver gang der er foretaget ændringer af baghjulenes position.

### Indstilling af svinghjul

Man kan nemt kontrollere, om forgaflerne er indstillet parallelt, ved at tælle de synlige tænder på begge sider. Når svinghjulsgafflen er indstillet, sidder den ved hjælp af tænder i en forsvarlig position, men kan stadig justeres 2° ad gangen og op til 16° (Fig. 6.5.1). Brug den flade side foran svinghjulsgafflen til at kontrollere om der er en højrevinklet position til jorden.

Det patentbeskyttede design betyder, at svinghjulsgafflen kan drejes, så den igen kan indstilles vinkelret på kørselsfladen, når sædehældningen ændres.

### Indstilling af retningsstabiliteten

Løsn unbrakoskruerne (1) under forgaflen. Derefter kan du fjerne skruerne (2). Nu kan du dreje den sorte muffe (3) mod venstre eller højre.

Mod venstre – kørestolen trækker mod venstre


Mod højre – kørestolen trækker mod højre

Spænd derefter skruen (2). Sørg for, at der er en vinkel på 90° fra gafflen til gulvet.

Spænd derefter skruen (1). (Fig. 6.5.2).

### VIGTIGT!

Nogle af skruerne, der anvendes under produktionen, er belagt med gevindlåsende væske (blå prik på gevindet) og kan kun justeres op til 3 gange, før de skal udskiftes med nye gevindlåsende skruer. Skruerne kan som alternativ genmonteres med Loctite™ 243 låsevæske.

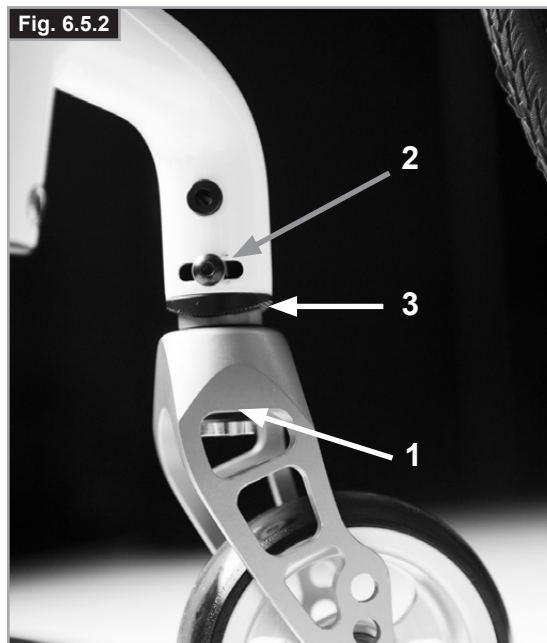

## 6.6 Ryglæn

Ryglænsvinklen justeres ved, at unbrakoskruen (1) løsnes og tages ud. Den ønskede position indstilles, hvorefter unbrakoskruen sættes i igen og spændes til det angivne spændingsmoment. (Fig. 6.6.1).

### Nedfældeligt ryglæn

Ryglænets øverste del kan klappes sammen, så kørestolen bliver nemmere at transportere.

Det gør du ved at trykke ned på begge greb (1) og slå ryglænet ned. Når ryglænet slås op igen, skal du sørge for, at det låses forsvarligt på plads i begge sider (Fig. 6.6.2 til Fig. 6.6.3).

### ⚠ ADVARSEL!

- Risiko for personskade: Pas på ikke at få fingrene i klemme i foldemekanismen.

### Justerbar ryg polstring

Remmen kan gøres mere eller mindre stram ved at justere velcrolukningerne (Fig. 6.6.4).

### Vinkeljustérbare ryglæn

Ryglænet kan indstilles til forskellige ryghøjder, i trin på 25 mm (4 indstillingsområder: 250-300 mm, 300-400 mm, 400-450 mm og 450-475 mm).

Fjern polstringens sidestøtter, og om nødvendigt ryglænets bælte, der dækker skruerne.

Skrue (1) løsnes, og ryglænet indstilles i den ønskede højde. Derefter skal skruerne spændes igen (Fig. 6.6.5).

Se siden vedr. spændingsmomenter.

### ⚠ VIGTIGT!

Du bedes tage hensyn til den ændrede tyngdekraft, når du indstiller ryglænets vinkel.



## 6.7 Hovedstøtter

### Hovedstøtte

Hovedstøtten (Fig. 6.7.1) kan løftes og flyttes horisontalt både forlæns og baglæns.

Du kan gøre dette ved at løsne skruen (1, 2 eller 3).

Nu kan du justere til den ønskede position. Spænd skruerne igen (se siden om spændingsmoment).

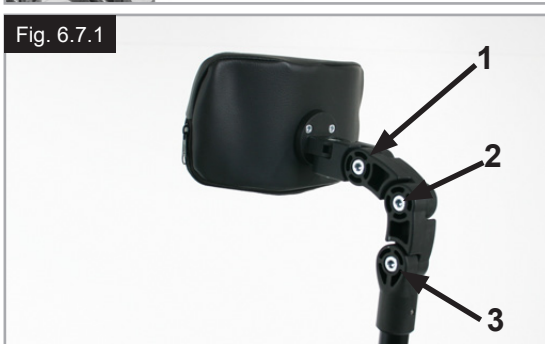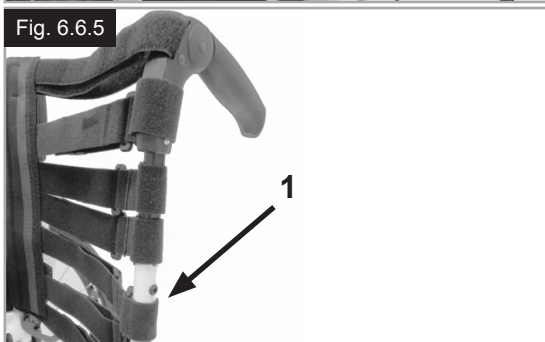

## 6.8 Sporing af hjul

### Sporing af hjulene

**BEMÆRK:** For at opnå den optimale bevægelsesfrihed skal baghjulene justeres, så de sidder i den bedst mulige position. Dette indebærer, at man indstiller hjulene med den korrekte sporing. Du gør dette ved at måle afstanden mellem begge sæt for- og baghjul for at sikre, at de sidder parallelt. Forskellen mellem de to mål må ikke være mere end 5 mm. Parallellindstillingen kan justeres ved at løsne skruerne (1) og dreje på akselholderen (3).

Når du er færdig, skal du sikre dig, at alle skruerne er forsvarligt fastspændt (Fig. 6.8.1 til Fig. 6.8.2). Unbrakoskruerne spændes igen til 8 Nm.

#### ADVARSEL!

Pas på - der er risiko for, at kørestolen tipper, når man ændrer sædets tyngdepunkt!

#### Justering af den bageste hjulafstands bredde


Den bageste hjulafstand defineres som afstanden mellem baghjulenes øverste del og ryglænsrørene og er indstillet fra fabrikken (125 mm). Dette mål skal øges, hvis det er nødvendigt at skabe større mellemrum mellem dækkene og de højdejusterbare armlæn, der kan monteres som ekstraudstyr.

Ved justering af bageste hjulafstand:

- Flyt akselholderen (3) "teleskopisk" ind i akselophænget (2) eller ud af akselophænget.
- Unbrakoskruen (1) på det bageste akselophæng løsnes.
- Akselholderen (3) skubbes indad eller udad for at opnå den ønskede hjulafstand.
- Spænd alle unbrakoskruer (1) vha. en tottrinsproces:
  - a) Spænd begge unbrakoskruer til et spændingsmoment på 5 Nm.
  - b) Spænd begge unbrakoskruer endnu en gang til et spændingsmoment på 8 Nm.
- Samme metode anvendes på stolens højre side, og mellemrummet justeres, så det svarer til afstanden på venstre side (Fig. 6.8.1 til Fig. 6.8.2).

#### VIGTIGT!

- Når du justerer den bageste hjulafstand, skal du justere hjulene ét ad gangen.
- Hjuljustering skal kontrolleres og, hvis det er relevant, skal den justeres, når akselholderen er flyttet eller fjernes (der henvises til afsnit "Sporing af hjul").
- Der SKAL anvendes Loctite™ 243 Threadlocker til remontering af unbrakoskruerne (1) på akseladapteren.

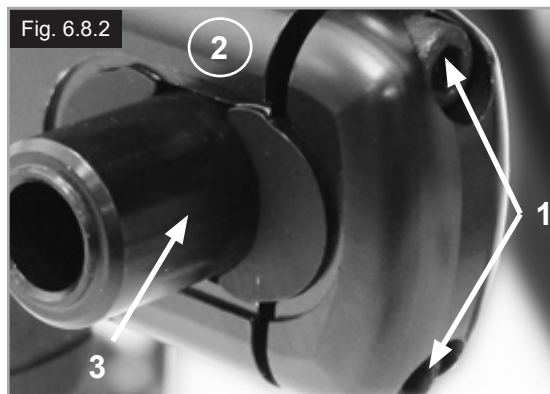

## 6.9 Sidestykker

### 1. Montering

- a. De udvendige armlænsskinner skubbes ned i holderen, der er monteret på kørestolsstellet.
- b. Armlænet låses automatisk på plads.

### 2. Højdejustering

- a. Udløsergrebet til højdejustering (2) drejes frem til det andet stoppunkt.
- b. Armlænspuden skubbes op eller ned til den ønskede højde.
- c. Udløsergrebet drejes på plads igen, så det sidder låst fast mod armlænsskinnerne.
- d. Tryk ned på armlænspuden (4), indtil skinnerne låses på plads med et klik.

### 3. Aftagning af armlænet

- a. Træk i låsegrebet (3), og løft hele armlænet af.

### 4. Påsætning af armlænet

- a. Skub armlænet ned i holderen igen, indtil det låses på plads med et klik.

### Montering af komponenter til armlænsholderen

#### Justering af armlænsholderen

De udvendige armlænsskinner placering i holderen kan justeres, så de løsnes eller spændes bedre fast, på følgende måde:

1. Holderens fire stopskruer (D) løsnes i hver side af holderen.
2. Lad armlænet sidde i holderen (E), og klem sammen på holderen, indtil den ønskede justering er opnået.
3. Spænd de fire skruer (D). (144 in-lbs, 16,3 Nm)

#### Justering af holderens position

1. De to spændeskruer (10) løsnes, indtil bøjlen er løs.
  2. Armlænsholderen skubbes på plads i den ønskede position.
  3. Stram til.
- (Fig. 6.9.1 til 6.9.4).

1. Udvendige armlænsskinner
2. Udløsergreb til højdejustering
3. Låsegreb
4. Armlænspude
5. Støttestang til overførsel
6. Sidestykker
7. Modtager
8. Justeringsbøjle
9. Dele til justering af holderen
10. Spændeskruer

Fig. 6.9.1

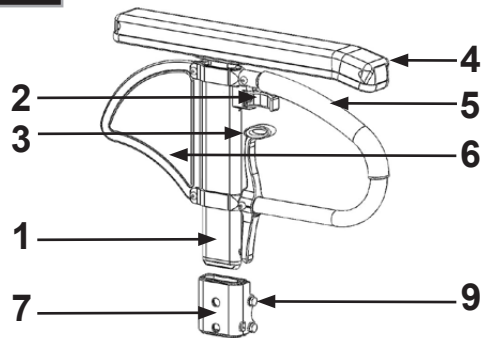


Fig. 6.9.2

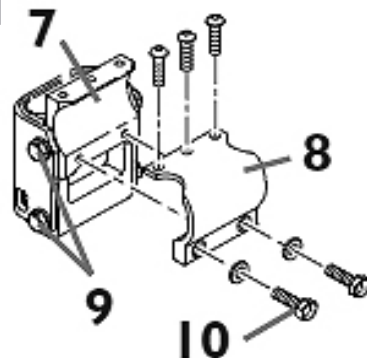


Fig. 6.9.3


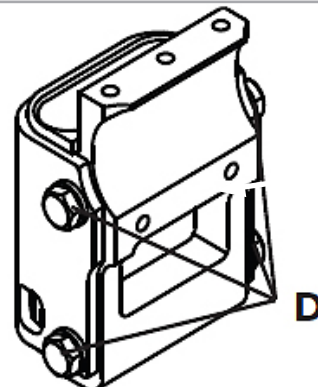


Fig. 6.9.4

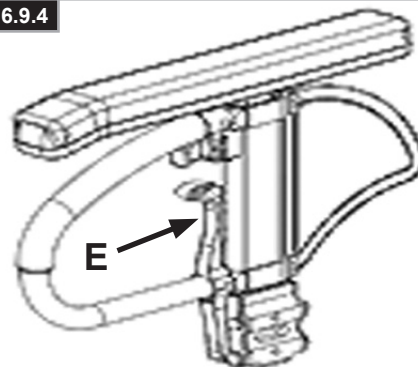

## Sidestykker (fortsat)

### Sidestykke med tøjskåner

Tøjskåneren forhindrer, at dit tøj snaves til af vandstænk fra hjulene (Fig. 6.9.5).

Ved at rykke sidestykket kan man indstille tøjskånerens position i forhold til baghjulet.

Det gør man ved at fjerne skruerne (1 og 2).

Når tøjskåneren sidder som ønsket, spændes skruerne fast igen (se siden vedrørende spændingsmomenter).

### ADVARSEL!

Hverken sidestykkerne eller armlænene må bruges til at løfte eller bære kørestolen i.

## 6.10 Skubbehåndtag

### Højdejusterbare skubbehåndtag




Skubbehåndtagene er fastgjort ved hjælp af stifter, så de ikke utilsigtet kan løsne sig. Ved at udløse spændeåndtaget (1) kan du justere højden på skubbehåndtagene (2), så de passer til dine individuelle behov. Hvis spændeåndtaget har været anvendt, skal du sørge for, at der lyder et klik, når det låses på plads igen. Skubbehåndtaget kan let indstilles i den ønskede position. Møtrikken på spændeåndtaget afgør, hvor stramt skubbehåndtagene spændes fast. Hvis møtrikken sidder løs, efter at spændeåndtaget er blevet justeret, vil skubbehåndtaget også sidde løst. Drej skubbehåndtaget fra side til side inden brug for at sikre, at det sidder forsvarligt fastspændt. Efter justering af håndtagets højde skal spændeåndtaget (1) altid spændes forsvarligt på plads. Hvis håndtaget ikke fastspændes forsvarligt, kan du komme til skade ved kørsel på trapper. (Fig. 6.10.1).

### VIGTIGT!

Hvis de højdejusterbare skubbehåndtag ikke monteres korrekt, risikerer man, at der opstår slør i håndtagene, eller at de ikke bliver ved med at have den ønskede placering. Sørg altid for, at de nødvendige skruer er spændt korrekt.

### Foldbare skubbehåndtag

Hvis de foldbare skubbehåndtag ikke skal bruges, kan de slås ned ved et tryk på knappen (1). Når de igen skal bruges, slås skubbehåndtagene op, indtil de klikker på plads. (Fig. 6.10.2).

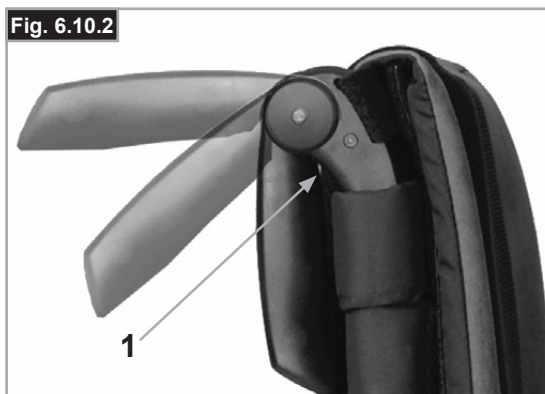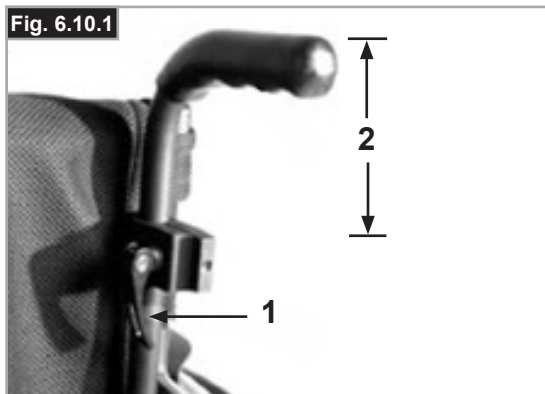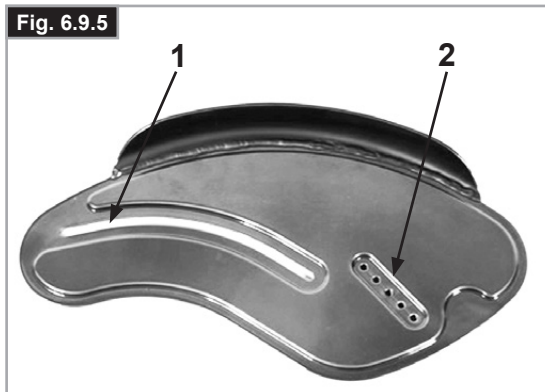

## 6.11 Krykkeholder

### Stokke-/krykkeholder

## 6.12 Tipsikringer

Ved hjælp af denne holder kan stokke, krykker o.l. transporteres direkte på kørestolen. Holderen er forsynet med en velcrostrop til fastgørelse af stokke, krykker eller andre hjælpemidler (Fig. 6.11.1).

### ADVARSEL!

Stokkene, krykkerne eller andre hjælpemidler må ikke fjernes, når du kører i kørestolen.

### ADVARSEL!

Sunrise Medical anbefaler, at man monterer tipsikringer på enhver kørestol. Ved montering af tipsikringer bør spændingsmomentet være 7 Nm.

Tipsikringerne hindrer kørestolen i at tippe bagover og giver yderligere sikkerhed for nye brugere eller for brugere, der er ved at lære, hvordan kørestolen betjenes.

### Model til montering i bøjle

#### Sådan skubbes tipsikringerne ind i bøjlen

- Tryk på den bageste knap på tipsikringens ophæng, så begge udløsertappe glider indad.
- Skub tipsikringerne (1) ind i indsatsbøsningen.
- Drej tipsikringen nedad, indtil udløsertappene låses fast i bøjlen.
- Den anden tipsikring monteres på tilsvarende vis.

### Indstilling af tipsikringerne

For at opnå den rette frihøjde på ca. 1" til 2" (25 til 50 mm), skal tipsikringerne hæves eller sænkes:

- Tryk på tipsikringens udløsergreb, så begge udløsertappe glider indad.
- Skub det indvendige rør opad eller nedad i hullerne til højdejustering.
- Slip knappen.
- Den anden tipsikring monteres på tilsvarende vis.
- Begge støttehjul skal indstilles i samme højde. (Fig. 6.12.1).

Fig. 6.11.1



Fig. 6.12.1


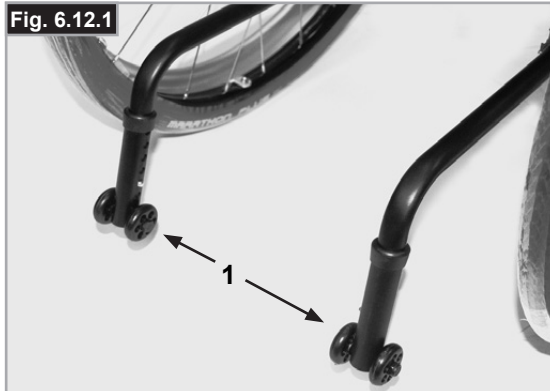


Fig. 6.12.2

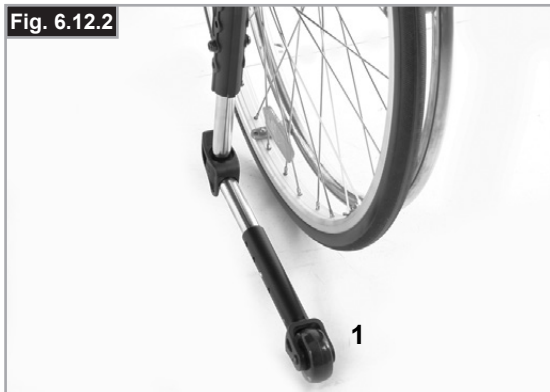

### Model med sidedrejning

Tryk ned på den øverste del af hver tipsikring (1) for at opnå den rette position (Fig. 6.12.2).

Tipsikringernes hjul bør sidde, så der altid er 30-50 mm mellemrum mellem dem og jorden.

Tipsikringerne kan også drejes, så de vender fremad.

Tipsikringerne skal altid vende fremad ved forcering af større forhindringer (f.eks. kantsten) for at forhindre, at de sidder i vejen under manøvren.

### RISIKO!

Hvis kørestolen ikke har tipsikringer monteret, eller hvis de ikke er monteret korrekt, er der risiko for, at kørestolen vælter med personskade til følge.

## 6.13 Stabiliseringsstang

### Stabiliseringsstang, der kan slå ned

Denne stang bruges til at gøre ryglænet mere stabilt. Hvis kørestolen skal foldes sammen, mens støttestangen er monteret, skal udløsergrebet (Fig. 6.13.1) først skubbes indad eller udløses, og stabiliseringsstangen skal slå ned.

Når kørestolen foldes ud, skal man sikre sig, at stabiliseringsstangen låses forsvarligt på plads.



## 6.14 Transithjul

### Transithjul

Transithjul bør altid anvendes i tilfælde, hvor kørestolen vil være for bred, hvis baghjulene er monteret (Fig. 6.14.1). Så snart baghjulene er afmonteret ved hjælp af lynkoblingsakslerne, kan transithjulene bruges til fortsat kørsel (Fig. 6.14.2).

Transithjulene er monteret, så de sidder ca. 30 mm over kørselsfladen, når de ikke er i brug. Derved undgår man, at de er i vejen under kørslen, ved transport eller når kørestolen tippes for at køre over en forhindring.

### RISIKO!

- Uden baghjul har din kørestol ingen bremser.
- Der er risiko for, at kørestolen tipper bagover.

Fig. 6.14.1



Fig. 6.14.2



## 6.15 Hoftesele

### ⚠ ADVARSLER!

- Inden kørestolen tages i brug, skal man sørge for, at hofteselen er monteret korrekt.
- Hofteselen skal kontrolleres dagligt for at sikre, at der ikke findes forhindringer eller slitage.
- Sørg altid for, at hofteselen er forsvarligt fastspændt og justeret korrekt inden brug.

### ⚠ RISIKO!

Hvis remmen sidder for løst, kan det medføre, at brugeren glider ned i stolen og bliver kvalt eller pådrager sig alvorlige kvæstelser.



Hofteselen monteres på kørestolen som vist i Fig. 6.15.1 til Fig. 6.15.10. Selen består af to dele. Hver del monteres ved hjælp af den låsebolt der holder sædet på plads. Boltens føres gennem selens snørehul. Derefter føres selen ned under sidestykkets bageste del (Fig. 6.15.1).

Hofteselen justeres efter brugerens behov på følgende måde:

Sørg for at justere selens placering, så spændet ligger midt på sædet (Fig. 6.15.2).

Den løse del af selen føres tilbage igen gennem spændets han-del og skydespænderne. Pas på, at selen bliver snoet ved spændets han-del (Fig. 6.15.3).

Den løse del af selen føres gennem skydespænderne og spændets han-del, så selen bliver længere (Fig. 6.15.4 til Fig. 6.15.6).

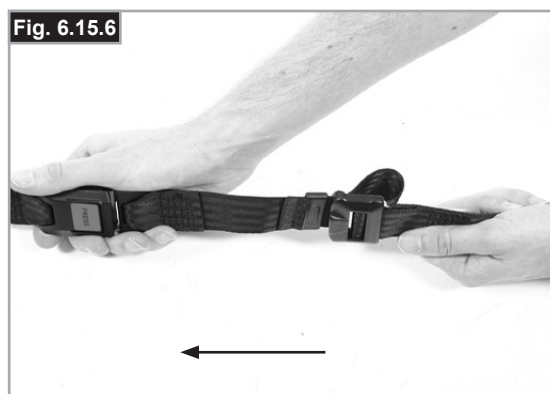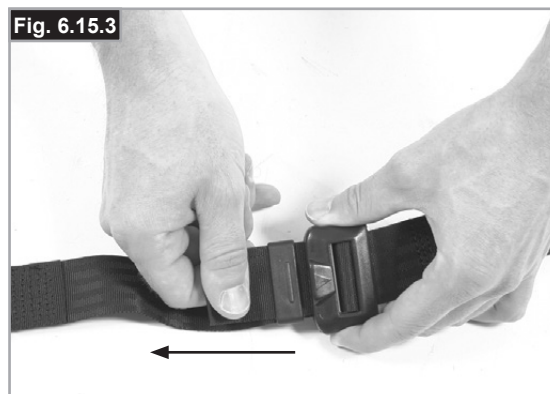

## Hoftesele fortsat

Når den er spændt, skal afstanden mellem hofteselen og brugeren kontrolleres. Når den er justeret korrekt, bør der ikke være plads til mere end en flad hånd mellem hofteselen og brugeren (Fig. 6.15.7).

Hofteselen skal monteres således, at remmen sidder i en vinkel på 45 grader hen over brugers bækken. Brugeren skal sidde oprejst og så langt tilbage i sædet som muligt, når selen er justeret korrekt. Selen skal sidde således, at brugeren ikke kan glide rundt på sædet (Fig. 6.15.8).

### Sådan lukkes spændet:

Han-delen sættes ind i hun-delen og skubbes helt på plads (Fig. 6.15.9).


### Sådan åbnes spændet:

Tryk på den RØDE knap midt på spændet, og træk forsigtigt de to halvdele fra hinanden (Fig. 6.15.10).

**BEMÆRK:** Hvis du har spørgsmål angående brugen af eller betjeningen af hofteselen, bør du kontakte kørestolsforhandleren, den henvisningsansvarlige eller din ledsager.

### ⚠ ADVARSLER!

- Hofteselen må kun monteres eller justeres af en godkendt Sunrise Medical-forhandler/-repræsentant.
- Hofteselen skal kontrolleres dagligt for at sikre, at den er justeret korrekt, og at der ikke findes forhindringer eller slitage.
- Sunrise Medical fraråder transport af en person i et køretøj med denne hoftesele som fastspændingsmetode.


 Yderligere oplysninger om befording findes i transitbrochuren fra Sunrise Medical.

### Vedligeholdelse:

Hofteselen og fastspændingsanordningerne skal efterses grundigt med jævne mellemrum for tegn på slid eller skader. Afhængigt af, hvordan og hvor meget den anvendes, kan det være nødvendigt at udskifte hofteselen.

### ⚠ ADVARSEL!

Hofteselen bør justeres efter slutbrugerens behov som beskrevet ovenfor. Sunrise Medical anbefaler også, at man kontrollerer selens længde og tilpasning med jævne mellemrum for at reducere risikoen for, at slutbrugeren utilsigtet justerer selen, så den bliver for lang.

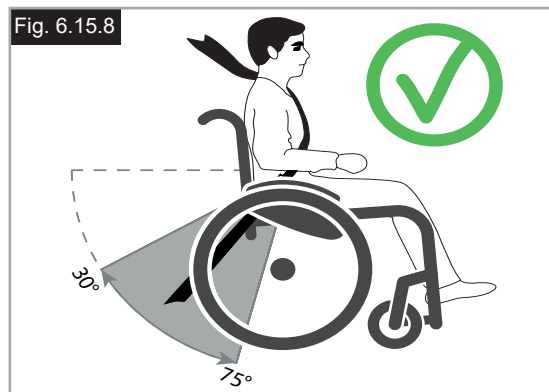


## 6.16 Håndcyklens aksel

### Håndcyklens aksel

Håndcyklens aksel skal justeres for at påvirke tyngdepunktet bagud. Dette betyder at, brugeren kan anvende håndcykel-tilbehøret på en sikker måde (Fig. 6.16.1).

#### ⚠ RISIKO!

- Brug af håndcykel uden håndcykelakslen gør kørestolen ustabil og kan medføre alvorlige personskader for brugeren og andre mennesker.
- Der må kun benyttes godkendt tilbehør sammen med kørestolen.

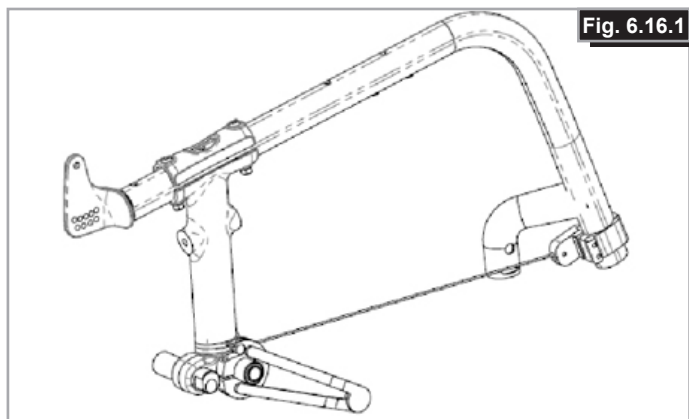





### Håndcyklens forstærkningsudstyr

Sådan monteres håndcyklens forstærkningsudstyr:

- Sæt niplen i enden af kablet ind i receptoren på stelletts forside (Fig. 6.16.2).
- Sæt niplen i den anden ende af kablet ind i receptoren på stelletts bagside (Fig. 6.16.3).
- Sæt spændingsværktøjet, (A), ind i kablets receptor på stelletts bagside (Fig. 6.16.4).
- Flyt spændingsværktøjet, (A), opad indtil receptoren og det forreste rør, (B), så småt begynder at bevæge sig imod bagsiden (Fig. 6.16.5).
- Hold kablet spændt med spændingsværktøjet, og stram skruen på det bageste kablets receptor (Fig. 6.16.5).
- Gentag processen i den modsatte side.

#### ⚠ ADVARSEL!

Begge kablernes spænding skal kontrolleres for stramhed inden og efter hver anvendelse af håndcyklen.

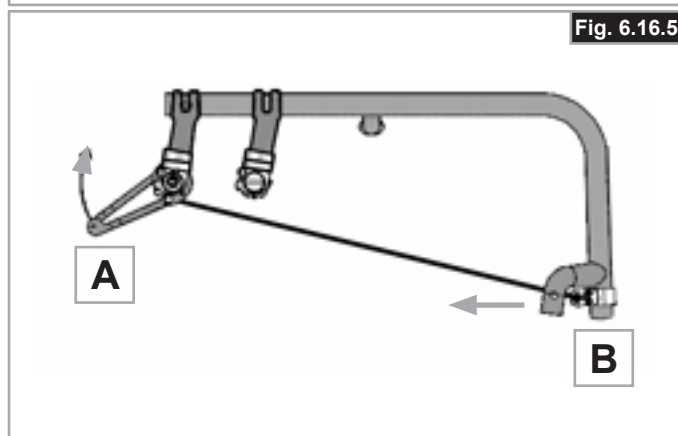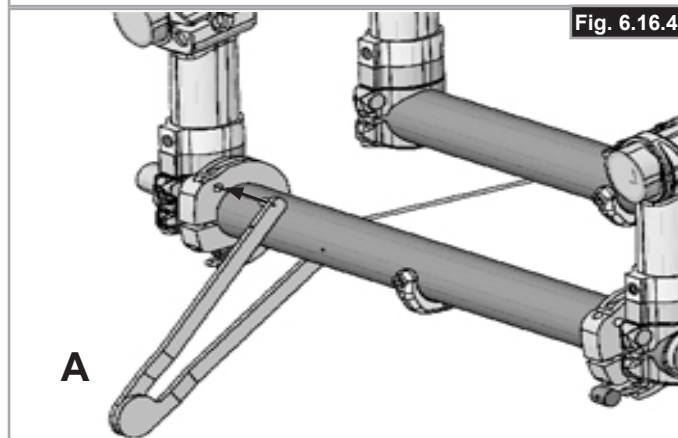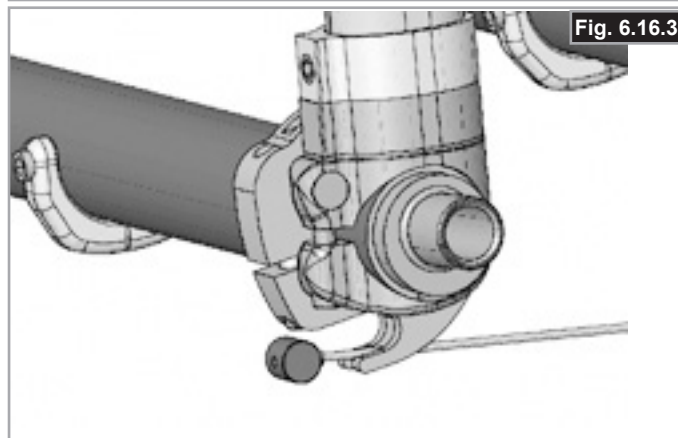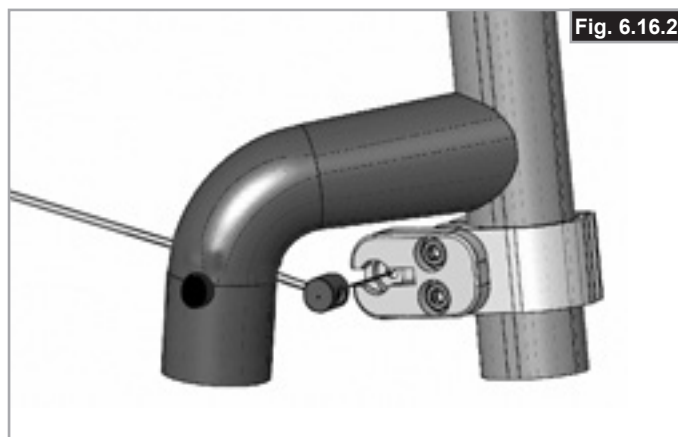

## 7.0 Daglige eftersyn

### VIGTIGT!

Som bruger af kørestolen er du som oftest den, der først lægger mærke til evt. fejl og mangler. Derfor anbefales det, at du hver gang, kørestolen skal tages i brug, først gennemgår punkterne på nedenstående liste:

- Kontrollér, at dæktrykket er korrekt.
- Kontrollér, at bremserne fungerer korrekt.
- Kontrollér, at alle aftagelige dele er forsvarligt fastgjort, f.eks. armlæn, fodstøtte, lynkoblingsaksel osv.
- Kontrollér, at der ikke er synlige skader på f.eks. stel, ryglæn, sædepolstring og rygpolstring, hjul, fodplade osv.

Ved ethvert tegn på skader eller funktionsfejl bør du kontakte din autoriserede forhandler.

## 8.0 Dæk og montering

### ADVARSEL!

Sørg altid for, at dækkene er forsynet med det korrekte dæktryk (min. 3,5 bar), da det kan påvirke kørestolens køreegenskaber.

Hvis dæktrykket er for lavt, øges rullemodstanden, og der kræves flere kræfter for at køre stolen fremad. Et lavt dæktryk har også en negativ indvirkning på kørestolens manøvreedygtighed.

### ADVARSEL!

Hvis dæktrykket er for stort, kan dækket sprænge.

Det korrekte dæktryk for et bestemt dæk er trykt på dækkets overflade (min. 3,5 bar).

Dækkene monteres på samme måde som almindelige cykeldæk.

Inden slangen monteres, skal du sikre dig, at fælgfladen og dækkets inderside er fri for fremmedlegemer.

Kontrollér dæktrykket efter montering eller reparation af et dæk. Det er meget vigtigt for sikkerheden og kørestolens funktion, at dæktrykket er korrekt, og at dækkene er i god stand.

## 9.0 Vedligeholdelse og rengøring

- Kontrollér dæktrykket en gang om måneden. Kontrollér alle dæk for slitage eller beskadigelse.
- Kontrollér bremserne ca. hver 4. uge for at sikre, at de fungerer korrekt og er lette at betjene.
- Dækkene skiftes på samme måde som almindelige cykeldæk.
- Alle de samlinger, der har indvirkning på sikkerheden ved brug af kørestolen, er selvlåsende møtrikker. Kontrollér hver 3. måned, at alle bolte er forsvarligt fastspændt (se siden vedrørende spændingsmomenter). Sikkerhedsmøtrikker bør kun benyttes én gang og bør straks udskiftes efter brug.
- Rengør kørestolen med et mildt rengøringsmiddel, når den er snavset. Sædepolstringen må kun rengøres med vand og sæbe.
- Tør kørestolen efter brug, hvis den er blevet våd.
- Smør lynkoblingsakslerne med lidt symaskineolie ca. hver 8. uge. Afhængigt af, hvor ofte og hvordan du bruger kørestolen, anbefales det, at den sendes til eftersyn hos en autoriseret forhandler hver 6. måned for at få den kontrolleret af uddannet personale.
- Brug udelukkende originale Sunrise Medical-dele. Der må ikke benyttes dele fra tredjeparter, som ikke er godkendt af Sunrise Medical.

### VIGTIGT!

**Sand og havvand (eller salt om vinteren) kan ødelægge hjullejerne på både for- og baghjul. Rengør kørestolen grundigt, hvis den har været udsat for ovennævnte.**

Følgende enkeltdele er aftagelige og kan sendes til reparation hos producenten eller forhandleren:

### **Baghjul-Armlæn-Fodstøtteholder-Tipsikringer**



Disse komponenter kan også fås som reservedele. Yderligere oplysninger findes i reservedelskataloget.

## Vedligeholdelse og rengøring fortsat

### Hygiejneprocesser ved genanvendelse:

Hvis kørestolen skal anvendes af en ny bruger, bør den klargøres grundigt. Alle overflader, der kan komme i kontakt med brugeren, skal behandles med desinfektionsmiddel i sprayform.

Der skal til dette formål anvendes et, i dit land, anbefalet desinfektionsmiddel, som bruges til hurtig, alkoholbaseret desinfektion af medicinske hjælpemidler og medicinsk udstyr, når der kræves et hurtigtvirkende desinfektionsmiddel.

Vær opmærksom på producentens vejledning til desinfektionsmidlet under anvendelsen.

Det kan ikke garanteres, at sømme kan desinficeres fuldstændigt. For at undgå mikrobakteriel kontaminering anbefales det derfor, at sædet og rygpulstringen kasseres i henhold til lokale retningslinjer om beskyttelse mod infektion.

## 10.0 Fejlsøgning

### Kørestolen trækker til den ene side

- Kontrollér dæktrykket
- Kontrollér, om hjulene drejer frit (lejer, aksel)
- Kontrollér svinghjulsvinklen
- Kontrollér, om begge svinghjul har ordentlig kontakt med kørselsfladen.

### Svinghjulene begynder at slingre

- Kontrollér svinghjulsvinklen
- Kontrollér, om alle bolte er fastspændt, og spænd dem evt. korrekt (se siden vedr. spændingsmomenter)
- Kontrollér, om begge svinghjul har ordentlig kontakt med kørselsfladen.

### Kørestolen knirker og rasler

- Kontrollér, om alle bolte er fastspændt, og spænd dem evt. korrekt (se siden vedr. spændingsmomenter)
- Smør de steder, hvor bevægelige dele kommer i kontakt med hinanden, med lidt olie.

### Kørestolen slingrer

- Kontrollér den vinkel, svinghjulene er indstillet i
- Kontrollér dæktrykket
- Kontrollér, om baghjulene er justeret forskelligt

## 11.0 Bortskaffelse/Genbrug af materialer

**BEMÆRK:** Hvis du har fået kørestolen stillet til rådighed, f.eks. gennem udlån af hjælpemidler, skal du være opmærksom på, at du muligvis ikke er dens egentlige ejer. Hvis du ikke længere har brug for den, skal du returnere den til den organisation eller den henvisningsansvarlige, der skaffede dig kørestolen.

I dette kapitel finder du en oversigt over, hvilke materialer, kørestolen er fremstillet af, med henblik på bortskaffelse eller genbrug af såvel kørestolen som dens emballage. Vær opmærksom på eventuel lokal lovgivning angående bortskaffelse eller genbrug, som der skal tages hensyn til, når kørestolen kasseres. (Der kan bl.a. være særlige regler angående rengøring eller desinfektion af kørestolen inden bortskaffelsen).

**Aluminium:** Svinghjulsgafler, hjul, kørestolens sidestykker, armlænsstel, fodstøtte, skubbehåndtag


**Stål:** Fastgøringspunkter, lynkoblingsaksler

**Plast:** Håndtag, rørpropper, svinghjul, fodplader, armlænsputer og dæk

**Emballage:** Plastposer af blød polyethylen, pap

**Polstring:** PVC-behandlet polyestertekstil og letantændeligt skum.

Bortskaffelse eller genbrug bør foretages af et renovationsfirma eller på en offentlig genbrugsstation. Du kan også returnere kørestolen til Sunrise Medical, som så vil tage sig af bortskaffelsen.

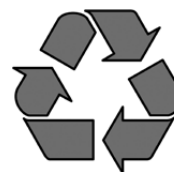

## 12.0 Mærkeplade

Mærkepladen sidder enten på tværstiveren eller det tværgående stelrør samt på en etiket i brugervejledningen. Mærkepladen angiver den nøjagtige modelbetegnelse såvel som andre tekniske specifikationer. Ved bestilling af reservedele eller ved reklamation bedes du oplyse følgende:

- Serienummer
- Bestillingsnummer
- Måned/År



	<b>SUNRISE MEDICAL</b>		Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		2021-04-09
<b>TYPE:</b>	Rollstuhl	<b>SN</b>	203211733451939		
<b>Xenon2</b>	ISO 7176-19:2008				
	110 kg		max 10°		360 mm
			360 mm		

<b>TYPE:</b>	Produktnavn/SKU-nummer.
	Maksimal sikker hældning med antitipstøtter monteret, Afhænger af kørestolens indstilling, holdning og brugerens fysiske evner.
	Sædebredde.
	Dybde (maksimalt).
	Maksimal belastning
	UKCA-mærkat.
	CE-mærkat.
	Se brugsanvisningen.
	Produktionsdato.
	Serienummer.
	Dette symbol betyder medicinsk udstyr.
	Producentens adresse
	Kollisionstestet til: ISO 7176-19:2008.
	Importørens adresse
	Ansvarlig person i Storbritannien
	Adresse på repræsentant i Schweiz

## 13.0 Tekniske specifikationer

### Samlet bredde:

Med standardhjul inkl. drivringe, monteret tæt:

- sammen med sidestykke af aluminium: SB + 170 mm
- sammen med tøjskåner af plast: SB + 190 mm
- Med en ekstra-smal montering af drivring, reduceres den samlede bredde med 20 mm.
- Med standardhjul med drivringe og 4° cambring: SB + 250 mm

### Samlet længde:

910 mm med en sædedybde på 480 mm

### Samlet højde:

1120 mm med en ryglænsenhøjde på 450 mm

### Vægt i kg:

- Samlet vægt fra 8,8 kg
- Ved transport (uden fodstøtte, hjul, sidestykke) 6,3 kg
- Sidestykke (enhed) 1,3 kg
- Hjul (enhed) 2,2 kg

### Maksimal brugervægt:

Xenon op til en belastning på 110 kg eller 140 kg afhængig af stelversionen.

### Sædehøjder:

De valgte stel, forgafler og svinghjul samt baghjulsstørrelsen (610 mm (24") eller 635 mm (25")) er afgørende for, hvilke sædehøjder der kan indstilles.

### Kørestolen overholder følgende normer:

1. Krav og prøvningsmetoder til statisk, slag- og udmattelsesstyrke (ISO 7176-8)
2. Krav til modstandsevne over for antændelse af polstrede dele i henhold til ISO 7176-16 (EN 1021-1/2)



ISO 7010-M002

Brugermanualen/Dette hæfte skal læses! (Blåt ikon)







Sunrise Medical S.r.l.  
Via Riva, 20 – Montale  
29122 Piacenza  
Italia  
Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060  
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG  
Erlenauweg 17  
CH-3110 Münsingen  
Schweiz/Suisse/Svizzera  
Fon +41 (0)31 958 3838  
Fax +41 (0)31 958 3848  
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3  
1540 Vestby  
Norge  
Telefon: +47 66 96 38 00  
post@sunrisemedical.no  
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB  
Neogatan 5  
431 53 Mölndal  
Sweden  
Tel.: +46 (0)31 748 37 00  
post@sunrisemedical.se  
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.  
H – Park, Heršpická 1013/11d,  
639 00 Brno  
Czech Republic  
Tel.: (+420) 547 250 955  
Fax: (+420) 547 250 956  
www.medicco.cz  
info@medicco.cz  
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps  
Mårkærvej 5-9  
2630 Taastrup  
Denmark  
+45 70 22 43 49  
info@sunrisemedical.dk  
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia  
11 Daniel Street  
Wetherill Park NSW 2164  
Australia  
Ph: +61 2 9678 6600  
E: enquiries@sunrisemedical.com.au  
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical  
North American Headquarters  
2842 Business Park Avenue  
Fresno, CA, 93727, USA  
(800) 333-4000  
(800) 300-7502  
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH  
Kahlbachring 2-4  
69254 Malsch/Heidelberg  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 7253/980-0  
Fax: +49 (0) 7253/980-222  
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical  
Thorns Road  
Brierley Hill  
West Midlands  
DY5 2LD  
England  
Phone: 0845 605 66 88  
Fax: 0845 605 66 89  
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga – Vizcaya  
España  
Tel.: +34 (0) 902142434  
Fax: +34 (0) 946481575  
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland  
Sp. z o.o.  
ul. Elektronowa 6,  
94-103 Łódź  
Polska  
Telefon: + 48 42 275 83 38  
Fax: + 48 42 209 35 23  
E-mail: pl@sunrisemedical.de  
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.  
Vossenbeemd 104  
5705 CL Helmond  
The Netherlands  
T: +31 (0)492 593 888  
E: customerservice@sunrisemedical.nl  
www.SunriseMedical.nl  
www.SunriseMedical.eu  
(International)

Sunrise Medical SAS  
ZAC de la Vrillonnerie  
17 Rue Michaël Faraday  
37170 Chambray-Lès-Tours  
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00  
Email: info@sunrisemedical.fr  
www.sunrisemedical.fr



OM\_Xenon 2 FF\_EU\_DK\_  
Rev1\_2024-07-05