

# Quick guide

## TurnAid sengehestbeskyttere *TurnAid bed rail bumpers*

- 1** Tag en beskytter, se hvilken side den passer til og læg den på madrassen.

*Take a bumper, see which side it fits and place it on the mattress.*




- 2** Båndet med velcro, skal vende ind mod madrassen, ved påsætning.

*The Velcro strap should face inward towards the mattress when attaching.*



- 3** Træk beskytteren ned over sengehesten, og fæstne det fast med velcroet.

*Pull the bumper down over the bed rail, and secure it with the Velcro.*

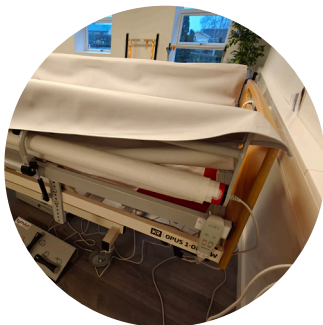

- 4** Tjek at alt sidder fast. Sengen er nu beskyttet og klar til borger.

*Check that everything is secure. The bed is now protected and ready for the citizen.*



# TurnAid sengehestbeskyttere

## TurnAid side rail bumpers

Nogle patienter har en tendens til at vende og dreje sig i sengen, hvilket ofte forårsager skader og risiko for indfangning. Opnå optimal sikkerhed for din patient med TurnAid sengehestbeskyttere

*Some patients are likely to turn and toss when in bed, often causing injuries and risk of entrapment. Get optimal safety for your patient with The TurnAid Side Rail Bumpers*

### Funktioner / Features

- Effektiv beskyttelse mod skader og indfangning  
*Effective protection against injuries and entrapment*
- Minimere trykmærker på alle kroppsdele - hoved, arme osv.  
*Minimizing pressure marks on all body parts - head, arms etc.*
- Velcro bånd til nem fastgørelse  
*Velcro straps for easy fastening*
- Hudvenlige og ikke allergifremkaldende egenskaber  
*Skin-friendly and non-allergenic properties*
- Imprægneret og modstandsdygtig over for urin, spyt, sved osv.  
*Impermeable and resistant to urine, saliva, perspiration etc.*
- Flammehæmmende udstyret  
*Flame retardant*
- Nem at rengøre  
*Easy to clean*

### Tekniske Specifikationer / Technical Specifications

<b>Vare nr.: 5050</b>	1 sæt = 2 stks. (V/H)
<i>Item No.:</i>	<i>1 set = 2 pcs. (L/R)</i>
<b>Slidstyrke:</b>	DIN EN ISO 12947-2 (Martindale)
<i>Abrasion resistance:</i>	DIN EN ISO 1021 1+2, BS 5852-IS 0/1, ÖNORM B3825
<b>Flammehæmmende:</b>	(B1), NFP 92-503 (M2), IMO 2010 FTP code Part 8, DIN
<i>Flame retardant:</i>	75200, FMVSS 302, ISO 3795
<b>Farve tæthed over for lys:</b>	DIN ISO 105 - B06
<i>Colour fastness to light:</i>	Vinylleder 650g/m <sup>2</sup> - tykkelse 1,0 mm
<b>Materialet:</b>	Fri for AZO, CFC, PCP, opfylder REACH, lang holdbarhed.
<i>The material:</i>	<i>Vinyl leatherette 650g/sqm. - thickness 1.0 mm</i> <i>Free of AZO, CFC, PCP, fulfilling REACH, long durability.</i>
<b>Rengøring:</b>	Tør af med en fugtig klud med standard rengøringsmidler
<i>Cleaning:</i>	<i>uden alkohol eller klor.</i> <i>Wipe with damp cloth with standard detergents</i> <i>without alcohol or chlorine.</i>