

Brugsanvisning

Hovedbeskyttelse

Serie Starlight®

Starlight® Secure Evo
Starlight® Secure Læder
Starlight® Easy
Starlight® Protect
Starlight® Protect-Evo
Starlight® Protect Plus
Starlight® Protect Plus-Evo
Starlight® Go Sport
Starlight® Go Sport Plus
Starlight® Go Sport Plus-Experience
Starlight® Standard
Starlight® Standard Soft
Starlight® Base
Starlight® Secure
Starlight® Generation Modeller
Starlight® Aqua
Starlight® Snooze

Kære kunde!

Vi vil gerne takke dig for den tillid, du har vist os, og for at du har købt vores produkt.

Starlight®-hovedbeskyttelsesserien udmærker sig ved sin kvalitet og sikkerhed og opfylder alle europæiske sikkerhedskrav.

For at du kan bruge dette hjælpemiddel optimalt, beder vi dig og eventuelle andre brugere eller plejere om at læse denne brugsanvisning omhyggeligt.

Sørg for, at hovedbeskyttelsen er i perfekt stand, før du bruger den.



**Læs venligst vejledningen
omhyggeligt før første brug og brug
hovedbeskyttelsen korrekt!**

1 Indholdsfortegnelse

Emneord	Side
1 Forord	3
2 Indholdsfortegnelse	4
3 Sikkerhedsinstruktioner	5-8
4 Den korrekte pasform af hovedbeskyttelsen	9
5 Garanti og produktansvar	10
6 Placering af CE-mærkningen	11
7 Modeller af hovedbeskyttelsesserien Starlight®	12-49
1. Indikationer / kontraindikationer	
2. Formål	
3. Typer og tilbehør / muligheder	
4. Tekniske data	
7.1 Starlight® Secure Evo (Læder)	12-13
7.2 Starlight® Secure Læder	14-15
7.3 Starlight® Easy	16-18
7.4 Starlight® Protect, Protect Plus	20-22
7.5 Starlight® Protect-Evo, Protect Plus-Evo	24-26
7.6 Starlight® Go Sport, Go Sport Plus	28-30
7.7 Starlight® Go Sport Plus-Experience	32-34
7.8 Starlight® Standard	36-37
7.9 Starlight® Standard Soft	38-39
7.10 Starlight® Base, Secure	40-41
7.11 Starlight® Generation	42-45
7.12 Starlight® Aqua	46-47
7.13 Starlight® Snooze	48-49
8 Rengøring og desinfektion	50-51
9 Vedligeholdelse og reparation	52
10 Brugstid og genbrug	52
11 Fejl, reparation, reservedele	53
12 Opbevaring	54

2 Sikkerhedsinstruktioner



Hovedbeskyttelsen i Starlight®-serien er CE-mærket og er udviklet i henhold til de nyeste resultater. Produktionen er underlagt en konstant kvalitetskontrol.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før hovedbeskyttelsen tages i brug.

Brugsanvisningen er en integrerende del af hjælpemidlet. I tilfælde af tab kan du anmode om en kopi eller downloade den fra download-området på vores hjemmeside www.ato-form.com. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt på et sted, hvor plejepersonalet har adgang til den.

Brugsanvisningen erstatter ikke fuldstændigt plejepersonalets eller brugerens erfaring, som er erhvervet f.eks. gennem deltagelse i kurser. I tilfælde af specifikke og vanskelige anvendelser er denne brugsanvisning

kun en vejledning i de vigtigste håndteringsprocedurer.

Sørg for, at alle brugere forstår brugen af hovedbeskyttelse og betydningen af de symboler, der er knyttet til hjælpemidlet.

Ulykker kan undgås ved at følge de tekniske anvisninger i henhold til de relevante EØF-direktiver.

Etiketterne må ikke fjernes.

Regelmæssig kontrol hos din specialforhandler (mindst 1 gang om året) forlænger hovedbeskyttelsens levetid og giver dig sikkerhed. Se også vigtige instruktioner og vedligeholdelse.

3 Sikkerhedsinstruktioner

- Før du samler eller bruger hovedbeskyttelsen i Starlight®-serien første gang, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt, da den er skrevet for din sikkerhed og som en vejledning i korrekt brug og vedligeholdelse af produktet. Brugsanvisningen er en uundværlig del af leveringen og bør opbevares et sikkert sted til senere brug.
- Brugsanvisningen er beregnet til forhandlere og brugere (eller deres eventuelle plejere) af Starlight®-hovedbeskyttelsesserien. Den indeholder oplysninger om korrekt brug af produktet, men kan ikke erstatte brugerens eller hjælperens nødvendige erfaring med at håndtere hjælpemidlet.
- Din forhandler har pligt til at overdrage dig produktet klar til brug, til at forklare dig detaljeret om hjælpemidlets funktioner og tekniske data og til at give dig den nødvendige hjælp og instruktion til korrekt og effektiv brug.
- Oplysningerne i brugsanvisningen henviser til det tidspunkt, hvor hovedbeskyttelsen blev markedsført. Fabrikanten forbeholder sig ret til at foretage de ændringer, der viser sig nødvendige i selve hovedbeskyttelsen og den tilhørende brugsanvisning, uden at være forpligtet til at ændre de respektive tidligere hjælpemidler og den tilhørende brugsanvisning.
- Rehabiliteringshjælpemidlet og dets tillægsprodukter skal anvendes under lægeligt tilsyn.
- Hovedbeskyttelsen bør kun bæres af én bruger.
- Efterlad aldrig brugeren uden opsyn. Opbevar altid hovedbeskyttelsen uden for uvedkommende personers rækkevidde.
- Juster hovedbeskyttelsen korrekt før brug.
- ATO FORM-hovedbeskyttelsen er udstyret med en justerbar hagerem. Juster hagerem, så hovedbeskyttelsen sidder godt, men ikke for stramt. Dette gælder også for beskyttelse af hagen, som fås som ekstraudstyr.
- Sørg for, at stropperne er stramt lukkede!
- Hovedbeskyttelsen er designet til at absorbere stød og fald fra brugeren. Det er ikke en hjelm, der beskytter mod faldende genstande.
- ATO FORM-hovedbeskyttelsen må kun anvendes til den tilsigtede indikation og må ikke misbruges (sport eller lignende).
- Opbevar altid hovedbeskyttelsen inden for rækkevidde, når den ikke er i brug (helst på samme sted i nærheden af brugeren), så den hurtigt og korrekt kan sættes på.
- Hovedbeskyttelsen i Starlight®-serien må kun anvendes af personer eller deres tilsynsførende, som har gjort sig bekendt med standarderne og bestemmelserne i denne brugsanvisning.
- Brug ikke genoptræningshjælpen uden først at sikre dig, at remmene er helt og korrekt fastgjort.

- Før hver brug af hjælpemidlet skal du kontrollere, at alle justerbare dele altid er låst.
- Når du bruger flere genoptræningshjælpemidler samtidig, skal du overholde de sikkerhedsrelevante oplysninger for de enkelte hjælpemidler og for den samlede enhed.
- Brug ikke produktet, hvis nogen dele er beskadiget eller mangler. Disse må kun udskiftes med originale dele.
- Du må ikke foretage nogen indgreb eller foranstaltninger, hvis du ikke er helt sikker på deres virkninger; kontakt den nærmeste tekniske tjeneste eller endda producenten direkte for at sikre dig, at de er sikre.
- I tilfælde af ulykker eller funktionsfejl skal du kontakte din forhandler eller den producent, som du har købt hjælpemidlet hos.
- Fabrikanten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes u hensigtsmæssig eller forkert brug af hjælpemidlet fra brugerens eller tredjemands side, forkert samling af dele og tilbehør, uagtsom vedligeholdelse, uautoriserede indgreb eller ændringer, brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, uforudsigelige ekstraordinære hændelser eller manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning.
- Alle alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med produktet, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren er etableret.
- Rengør hovedbeskyttelsen i Starlight®-serien i henhold til anvisningerne i kapitlet "Rengøring".
- Sørg for, at produktet er rengjort og om nødvendigt desinficeret i henhold til rengøringsvejledningen før brug.

Sikkerheds- og risikoplysninger for det valgte udstyr

Hovedbeskyttelsen tjener som beskyttelse i tilfælde af et ukontrolleret fald. Det kan dog ikke garanteres, at skader i tilfælde af et fald altid kan undgås, da dette i høj grad afhænger af det valgte udstyr til hovedbeskyttelse, faldkarakteristika og miljøforhold.

Modeller uden forstærket beskyttelse i baghovedet eller forstærket beskyttelse i panden er ikke egnede til faldrisici med øget farepotentiale.

I særlige tilfælde er alle ubeskyttede områder af hovedet og kraniet udsat for øget risiko for skader.

Risikoen for skader kan ikke helt elimineres, men ved at vælge den rigtige model og det rigtige udstyr kan risikoen for skader reduceres betydeligt.

Eksempler på udstyr:

- Beskyttelse af hage
- Ørebeskyttelse
- Kindbeskyttelse
- Beskyttelse af pande og/eller nakke
- Lukket top (fuldstændig dækning af kraniet)
- Visir med særlig hageskærm
- Xtra Ansigtsskærm ansigtbeskyttelse

Få mere at vide om udstyrsmulighederne på vores hjemmeside på www.ato-form.com.




Advarsel!

Hovedbeskyttelsen bør ikke bruges af børn, når de klatrer eller udfører andre aktiviteter, hvor der er risiko for kvælning/ophængning, hvis barnet vikles ind i hovedbeskyttelsen.

4 Den korrekte pasform af hovedbeskyttelsen

Hovedbeskyttelsen skal passe til hovedet uden spændinger eller huller.

Hovedbeskytteren sidder i den korrekte position, når hovedbeskytteren (1) (se illustrationen) sidder lige over øjenbrynene, og baghovedet (eller baghovedets fremspring) er godt dækket af baghovedpladen (2) eller polstringen på bagsiden.

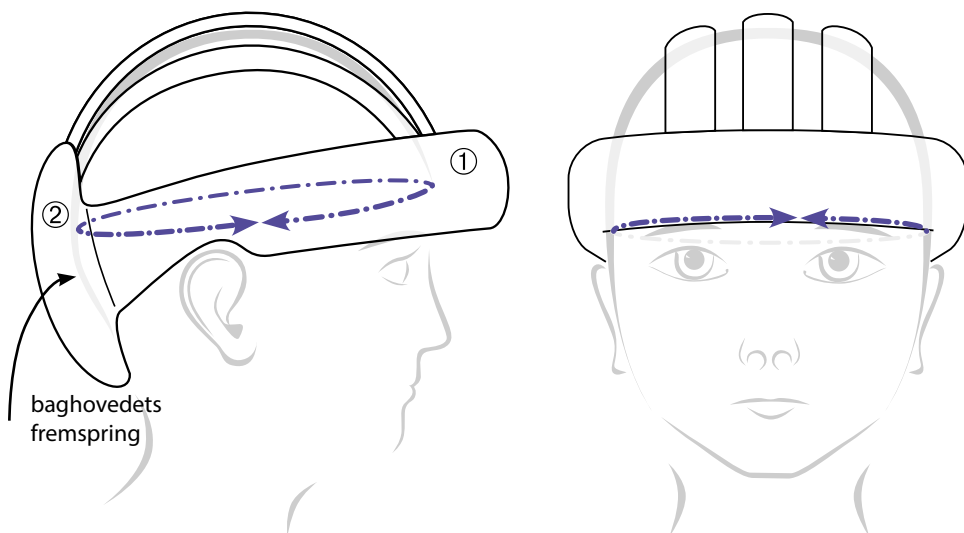

5 Garanti og produktansvar

For nye produkter fra ATO FORM GmbH har den private bruger ret til den lovbestemte garantiperiode på 2 år fra købsdatoen.

Opbevar venligst dokumenterne for købet omhyggeligt.

Hvis du har købt produktet uden for Tyskland, gælder de juridiske bestemmelser, der er gældende på købsstedet.

Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Manglende overholdelse eller reparationer eller ændringer af Starlight®-hovedbeskyttelsen eller dens komponenter foretaget af uautoriserede personer medfører, at garantien bortfalder.

Ethvert produktansvar fra producentens eller dennes repræsentants side (ATO FORM GmbH, Zur Lauterhecke 34, 63877 Sailauf) er i disse tilfælde på forhånd udelukket.

Fabrikantens forpligtelser overgår derefter til den person, der foretager ændringerne.

Undtaget fra garantien er forbrugsvarer og periodisk vedligeholdelse samt skader forårsaget af forkert brug, slitage eller indgreb fra tredjepart.

Garantiperioden forlænges ikke af en reparation eller en erstatningslevering inden for rammerne af garantikravet, med undtagelse af de udskiftede dele.

Accept af garantien udelukker enhver anmodning om midlertidig udskiftning med tilsvarende udstyr, undtagen efter forudgående aftale mellem de to parter.

6 Placering af CE-mærkningen

CE-mærket med angivelse af serienummer, producent og vaskeanvisninger er syet ind i hovedbeskyttelsens inderforing bag på hovedet.



7.1 Starlight® Secure Evo (Læder)

Starlight® Secure Evo-hovedbeskyttelsen har en 1 cm tyk beskyttelse hele vejen rundt og er forsynet med en lukket top.

Som tilbehør får du også en forstærket pande-/nakkebeskytter (3 cm tyk), en solskærm med velcrolukning og en hageskærm.

Starlight® Secure Evo er som standard udstyret med en bæltespænde lukning. Andre lukkesystemer som Fixlock eller magnetlukning kan bestilles som ekstraudstyr mod ekstra omkostninger.

7.1.1 Indikationer / kontraindikationer

Hovedbeskyttelsen anvendes til sikkerhed ved selvstændige bevægelser og aktive patienter, ved cerebral parese, epilepsi, spasticitet, multipel sklerose, kranio-cerebrale traumer, hoveddeformiteter, apopleksi, andre faldrisici eller bevægelser, autoaggressivitet og som post-operativ beskyttelse.

Den lukkede top giver særlig beskyttelse til patienter, som f.eks. mangler dele af

kraniehætten.

De eneste kontraindikationer, der skal nævnes her, er eventuelle hudintolerancer over for de anvendte materialer.

Vi bruger udvalgte materialer til forarbejdning af hovedbeskyttelsesmodellerne, der opfylder de højeste kvalitetsstandarder.

7.1.2 Formål

Starlight® Secure Evo-hovedbeskyttelsesmodellen er designet til at beskytte mod hovedskader i tilfælde

af ukontrollerede faldbevægelser eller bevægelsessekvenser; den dækker faldrisici med et middelhøjt skadespotentiale.

7.1.3 Typer og tilbehør

Grundmodel

C 40110.-OS **Starlight® Secure Evo** (med læderbetræk)

Tilbehør / muligheder

- C 4012 **Beskyttelse af hage** (Læder)
- C 4013 **Beskyttelse af panden** (Læder)
- C 4014 **Beskyttelse af nakken** (Læder)
- C 4015 **Solbeskyttelse med velcro**

7.1.4 Tekniske data

Hovedbeskyttelse Starlight® Secure Evo (Læder)	
Hovedets omkreds	47 - 62 cm i 5 intervaller mindre/større fås efter anmodning
Farver	Beige + særlige farver
Udvendigt materiale	Koskind er garvet på en miljøvenlig måde, især uden PCP, azofarvestoffer, formaldehyd og chrom VI-forbindelser.
Materiale foring	Perforeret kalveskind, hudvenligt, åndbart, varme- og fugtregulerende
Byggeri	fremstillet af 1 cm tykt stødabsorberende skum med læderbetræk
Normal beskyttelse af panden	1 cm tyk, 5 cm høj
Hovedbeskyttelse bagtil	1 cm tyk, 12 cm trukket ned
Forstærket beskyttelse af pande/nakke	3 cm tyk, 4 cm høj (Tilbehør)
Ørebeskyttelse	ikke relevant
Konstruktion af topline	Lukket, læderbetrækket, hætte af stødabsorberende skum
Hagerem	18 mm brede læderremme, der er fastgjort til hovedbeskyttelsen og kan justeres individuelt med bæltespænde, alternative fastgørelsesformer er mulige
Halsrem	ikke relevant
Beskyttelse af hagen	Læderbetrækket stødabsorberende skum skum
Vægt uden tilbehør	240 – 310 g

Med forbehold for tekniske ændringer!


Du kan finde yderligere oplysninger i vores aktuelle produktinformation på hjemmesiden.

7.2 Starlight® Secure Læder

Starlight® Secure hovedbeskyttelsen i læder har en 1 cm tyk beskyttelse hele vejen rundt.

Som tilbehør får du også en forstærket pande-/nakkebeskytter (3 cm tyk), en solskærm med velcrolukning og en hageskærm.

Den justerbare top er udstyret med syv sammenkoblede faner.

Starlight® Sercure Læder er som standard udstyret med en bæltespænde lukning. Andre lukkesystemer som Fixlock eller magnetlukning kan bestilles som ekstraudstyr mod ekstra omkostninger.

7.2.1 Indikationer / kontraindikationer

Hovedbeskyttelsen anvendes til sikkerhed ved selvstændige bevægelser og aktive patienter, ved cerebral parese, epilepsi, spasticitet, multipel sklerose, kranio-cerebrale traumer, hoveddeformiteter, apopleksi, andre faldrisici eller bevægelser, autoaggressivitet og som post-operativ beskyttelse.

De eneste kontraindikationer, der skal nævnes her, er eventuelle hudintolerancer over for de anvendte materialer.

Vi bruger udvalgte materialer til forarbejdning af hovedbeskyttelsesmodellerne, der opfylder de højeste kvalitetsstandarder.

7.2.2 Formål

Starlight® Secure Læder- hovedbeskyttelsesmodellen er designet til at beskytte mod hovedskader i tilfælde

af ukontrollerede faldbevægelser eller bevægelsessekvenser; den dækker faldrisici med et **middelhøjt skadespotentiale**.

7.2.3 Typer og tilbehør

Grundmodel

C 40110 **Starlight® Secure** (med læderbetræk)

Tilbehør / muligheder

C 4012 **Beskyttelse af hage** (Læder)

C 4013 **Beskyttelse af panden** (Læder)

C 4014 **Beskyttelse af nakken** (Læder)

C 4015 **Solbeskyttelse med velcro**

7.2.4 Tekniske data

Hovedbeskyttelse Starlight® Secure Læder	
Hovedets omkreds	47 - 62 cm i 5 intervaller mindre/større fås efter anmodning
Farver	Beige + særlige farver
Udvendigt materiale	Koskind er garvet på en miljøvenlig måde, især uden PCP, azofarvestoffer, formaldehyd og chrom VI-forbindelser.
Materiale foring	Perforeret kalveskind, hudvenligt, åndbart, varme- og fugtregulerende
Byggeri	fremstillet af 1 cm tykt stødabsorberende skum med læderbetræk
Normal beskyttelse af panden	1 cm tyk, 5 cm høj
Hovedbeskyttelse bagtil	1 cm tyk, 12 cm trukket ned
Forstærket beskyttelse af pande/nakke	3 cm tyk, 4 cm høj (Tilbehør)
Ørebeskyttelse	ikke relevant
Konstruktion af topline	7 faner, 0,5 cm tykt, stødabsorberende skum
Udformning af den øverste side lukket	ikke relevant
Hagerem	18 mm brede læderremme, der er fastgjort til hovedbeskyttelsen og kan justeres individuelt med bæltespænde, alternative fastgørelsesformer er mulige
Halsrem	ikke relevant
Beskyttelse af hagen	Læderbetrukket stødabsorberende skum
Vægt uden tilbehør	150 – 240 g

Med forbehold for tekniske ændringer!

Du kan finde yderligere oplysninger i vores aktuelle produktinformation på hjemmesiden.

7.3 Starlight® Easy

Starlight® Easy-hovedbeskyttelsen er en særlig let beskytter med en meget defineret pasform. Den har en 1,5 cm tyk pandebeskyttelse. På grund af det anvendte højteknologiske speciaskum tilpasser den sig ideelt til enhver hovedform og beskytter toppen af hovedet gennem gennemtænkt anatomisk tilpasningsevne.

Udarbejdelsen opfylder de højeste kvalitetskrav. Beskyttelsen tilbydes tofarvet, med frit valg af farve.

Et lige så enkelt og genialt justeringssystem til ørebåndet.

Starlight® Easy er som standard udstyret med en bæltespænde lukning.

En hageskærm og en polstret hagespænde kan fås som tilbehør (ekstraudstyr).

7.3.1 Indikationer / kontraindikationer

Hovedbeskyttelsen anvendes til sikkerhed ved selvstændige bevægelser og aktive patienter, i tilfælde af en lille risiko for fald, en mild form for epilepsi og som en let postoperativ beskyttelse.

Kontraindikationer, der skal nævnes her, er: åbne sår på hovedet og hudintolerance over for de anvendte materialer.

Vi bruger udvalgte materialer til forarbejdning af hovedbeskyttelsesmodellerne, der opfylder de højeste kvalitetsstandarder.

7.3.2 Formål

Starlight® Easy-hovedbeskyttelsen er designet til at beskytte mod hovedskader i tilfælde af ukontrollerede faldbevægelser

eller sekvenser af bevægelser; den dækker faldrisici med et **lavt til middelhøjt skadespotentiale**.

7.3.3 Typer og tilbehør

Grundmodel

5193-3	Starlight® Easy Læder	turkis/blå
5193-4	Starlight® Easy Læder	grafitgrå/sølv
5193-2	Starlight® Easy Læder	mørkeblå/lyseblå
5193-1	Starlight® Easy Læder	rød/orange
5193-5	Starlight® Easy Læder	lilla/lilla

Tilbehør / muligheder

EASY-S	Polstret hagerem
EASY-S	Kontrastsyninger
5193-01-...	Hageskærm (Læder) standard
5193-02-...	Hageskærm (Læder) ekstra lille
5193-03-...	Hageskærm (Læder) ekstra stor

 Du kan finde yderligere oplysninger i vores aktuelle produktinformation på hjemmesiden.

7.3.4 Tekniske data

Hovedbeskyttelse **Starlight® Easy**

Hovedets omkreds	45 - 62 cm i intervaller på 1 cm mindre/større muligt efter anmodning
Farver	efter eget valg (standard: 5 farvekombinationer)
Udvendigt materiale	Koskind er garvet på en miljøvenlig måde, især uden PCP, azofarvestoffer, formaldehyd og chrom VI-forbindelser.
Materiale foring	Perforeret kalveskind, hudvenligt, åndbart, varme- og fugtregulerende
Byggeri	fremstillet af 1 cm tykt stødabsorberende skum med læderbetræk
Normal beskyttelse af panden	1,5 cm tyk, 4 cm høj
Hovedbeskyttelse bagtil	ikke relevant
Forstærket beskyttelse af pande/nakke	ikke relevant
Ørebeskyttelse	ikke relevant
Konstruktion af topline	Gitterkonstruktion af stødabsorberende skum beklædt med læder
Udformning af den øverste side lukket	ikke relevant
Hagerem	12 mm brede læderremme, der er fastgjort til hovedbeskyttelsen og kan justeres individuelt med bæltspænde, alternativt forstærket tornspænde muligt
Halsrem	ikke relevant
Beskyttelse af hagen	Valgfrit læderbetrukket stødabsorberende skum til fastgørelse på hageremmen
Vægt uden tilbehør	120 – 260 g

Med forbehold for tekniske ændringer!

7.4 Starlight® Protect, Starlight® Protect Plus

Starlight® Protect-hovedbeskyttelsen har en 1,5 cm tyk pandebeskyttelse og en 1,5 cm tyk baghovedbeskyttelse.

Starlight® Protect Plus-hovedbeskyttelsen har en 4,5 cm tyk pandebeskyttelse og en 1,5 cm tyk baghovedbeskyttelse.

Det øverste hoved er lukket fast med 3 lameller. Der er også mulighed for en lukket top.

En visir eller Xtra-ansigtsskærm kan også fås som tilbehør til **Protect Plus**.

Starlight® Protect- og **Starlight® Protect Plus**-modellerne tilbyder ekstra ørebeskyttelse, hvis det er nødvendigt.

Starlight® Protect, Starlight® Protect Plus er som standard udstyret med en bæltespændelukning. Andre lukkesystemer som Fixlock eller magnetlukning kan bestilles som ekstraudstyr mod ekstra omkostninger.

7.4.1 Indikationer / kontraindikationer

Hovedbeskyttelsen anvendes til sikkerhed ved selvstændige bevægelser og aktive patienter, ved svære former for epilepsi, spasticitet, multipel sklerose, apopleksi, cerebral parese samt kranio-cerebrale traumer og i tilfælde af stærk autoaggression eller fare for at falde.

Den lukkede top giver særlig beskyttelse til patienter, som f.eks. mangler dele af kraniehætten.

De eneste kontraindikationer, der skal nævnes her, er eventuelle hudintolerancer over for de anvendte materialer.

Vi bruger udvalgte materialer til forarbejdning af hovedbeskyttelsesmodellerne, der opfylder de højeste kvalitetsstandarder.

7.4.2 Formål

Starlight® Protect- og Starlight® Protect Plus-hovedbeskyttelsesmodellerne er designet til at beskytte mod hovedskader i tilfælde af ukontrollerede faldbevægelser

eller bevægelsessekvenser. De dækker faldrisici med **øget risiko for personskaade**.

7.4.3 Typer og tilbehør

Grundmodel Starlight® Protect

- 5182-... **Starlight® Protect** standardmodel
- 5189-... **Starlight® Protect** top lukket
- 5184-... **Starlight® Protect** med ørebeskyttelse
- 5191-... **Starlight® Protect** top lukket med ørebeskyttelse
- 5192-... **Starlight® Protect** med øre- og kindbeskyttelse
- 5194-... **Starlight® Protect** top lukket med øre- og kindbeskyttelse

Grundmodel Starlight® Protect Plus

- 5183-... **Starlight® Protect Plus** standardmodel
- 5188-... **Starlight® Protect Plus** top lukket
- 5185-... **Starlight® Protect Plus** med ørebeskyttelse
- 5185VI-... **Starlight® Protect Plus** med ørebeskyttelse og visir inkl. speciel hageskærm
- 5190-... **Starlight® Protect Plus** top lukket med ørebeskyttelse
- 5190VI-... **Starlight® Protect Plus** top lukket med ørebeskyttelse og visir inkl. speciel hageskærm
- 5195-... **Starlight® Protect Plus** med øre- og kindbeskyttelse
- 5196-... **Starlight® Protect Plus** top lukket med øre- og kindbeskyttelse
- 5285-... **Starlight® Protect Plus** med ørebeskyttelse og Xtra ansigtsbeskyttelse
- 5290-... **Starlight® Protect Plus** top lukket med ørebeskyttelse og Xtra ansigtsbeskyttelse

Tilbehør / muligheder

- 5185-1 **Hageskærm**

 Du kan finde yderligere oplysninger i vores aktuelle produktinformation på hjemmesiden.

7.4.4 Tekniske data

Hovedbeskyttelse Starlight® Protect / Protect Plus	
Hovedets omkreds	48 - 62 cm i intervaller på 1 cm mindre/større muligt efter anmodning
Farver	Blå, rød, grøn, brun, sort + specialfarver
Udvendigt materiale	Koskind er garvet på en miljøvenlig måde, især uden PCP, azofarvestoffer, formaldehyd og chrom VI-forbindelser.
Materiale foring	Perforeret kalveskind, hudvenligt, åndbart, varme- og fugtregulerende
Byggeri	fremstillet af 1 cm tykt stødabsorberende skum med læderbetræk
Normal beskyttelse af panden	Højtydende skum med høj ydeevne 1,5 cm tyk, 4 cm høj (Protect)
Forstærket beskyttelse af panden	Højtydende skum med høj ydeevne 4,5 cm tyk, 4 cm høj (Protect Plus)
Hovedbeskyttelse bagtil	Bagsiden af hovedpladen højtydende skum med høj ydeevne 1,5 cm tyk, 14 cm trukket ned
Forstærket beskyttelse af nakken	ikke relevant
Ørebeskyttelse (valgfrít)	1,5 cm tyk, 10 cm trukket ned, tyndere vægtykkelse i ørepartiet med perforeret læder
Konstruktion af topline	3 stivere, hver 4 cm brede, af stødabsorberende skum, beklædt med læder (delvis, fra hovedets omkreds 57 cm, med 4 stivere)
Udformning af den øverste side lukket	Lukket, læderbetrukket, perforeret hætte af stødabsorberende skum. (for at sikre et godt mikroklima)
Hagerem	18 mm brede læderremme, der er fastgjort til hovedbeskyttelsen og kan justeres individuelt med bæltespænde, alternative fastgørelsesformer er mulige

Hovedbeskyttelse Starlight® Protect / Protect Plus	
Halsrem	18 mm læderrem med klip lukning og tornspænder til individuel justering
Beskyttelse af hagen	Valgfrit læderbetrukket stødabsorberende skum til fastgørelse på hageremmen
Vægt uden tilbehør (basismodel)	Protect 250 – 300 g Protect Plus 280 – 330 g

Med forbehold for tekniske ændringer!

7.5 Starlight® Protect-Evo, Starlight® Protect Plus-Evo

Starlight® Protect-Evo-hovedbeskyttelsen har en 1,5 cm tyk pandebeskyttelse og en 1,5 cm tyk baghovedbeskyttelse.

Starlight® Protect Plus-Evo-hovedbeskyttelsen har en 3,0 cm tyk pandebeskyttelse og en 1,5 cm tyk baghovedbeskyttelse.

Starlight® Protect-Evo og **Starlight®**

Protect Plus-Evo-modellerne tilbyder ekstra ørebeskyttelse, hvis det er nødvendigt.

Starlight® Protect-Evo, Starlight® Protect Plus Evo er som standard udstyret med en bæltespænde lukning. Andre lukkesystemer som Fixlock eller magnetlukning kan bestilles som ekstraudstyr mod ekstra omkostninger.

7.5.1 Indikationer / kontraindikationer

Hovedbeskyttelsen anvendes til sikkerhed ved selvstændige bevægelser og aktive patienter, ved svære former for epilepsi, spasticitet, multipel sklerose, apopleksi, cerebral parese samt kranio-cerebrale traumer og i tilfælde af stærk autoaggression eller fare for at falde.

De eneste kontraindikationer, der skal nævnes her, er eventuelle hudintolerancer over for de anvendte materialer.

Vi bruger udvalgte materialer til forarbejdning af hovedbeskyttelsesmodellerne, der opfylder de højeste kvalitetsstandarder.

7.5.2 Formål

Starlight® Protect-Evo- og Starlight® Protect Plus-Evo-hovedbeskyttelsesmodellerne er designet til at beskytte mod hovedskader i tilfælde af ukontrollerede faldbevægelser

eller bevægelsessekvenser. De dækker faldrisici med **øget risiko for personska-**

7.5.3 Typer og tilbehør

Grundmodel Starlight® Protect-Evo

- 5782-... **Starlight® Protect-Evo** standardmodel
- 5789-... **Starlight® Protect-Evo** med alternativ top
- 5784-... **Starlight® Protect-Evo** med ørebeskyttelse
- 5791-... **Starlight® Protect-Evo** med alternativ top og ørebeskyttelse

Grundmodel Starlight® Protect Plus-Evo

- 5783-... **Starlight® Protect Plus-Evo** standardmodel
- 5788-... **Starlight® Protect Plus-Evo** med alternativ top
- 5785-... **Starlight® Protect Plus-Evo** med ørebeskyttelse
- 5790-... **Starlight® Protect Plus-Evo** med alternativ top og ørebeskyttelse

Tilbehør / muligheder

- 5555-01 **Hageskærm**

 Du kan finde yderligere oplysninger i vores aktuelle produktinformation på hjemmesiden.

7.5.4 Tekniske data

Hovedbeskyttelse Starlight® Protect-Evo og Starlight® Protect Plus-Evo	
Hovedets omkreds	48 - 62 cm i intervaller på 1 cm mindre/større muligt efter anmodning
Farver	Blå, rød, grøn, brun, sort + specialfarver
Udvendigt materiale	Koskind er garvet på en miljøvenlig måde, især uden PCP, azofarvestoffer, formaldehyd og chrom VI-forbindelser.
Materiale foring	Perforeret kalveskind, hudvenligt, åndbart, varme- og fugtregulerende
Byggeri	fremstillet af 1 cm tykt stødabsorberende skum med læderbetræk
Normal beskyttelse af panden	1,5 cm tyk, 4 cm høj (Protect-Evo)
Forstærket beskyttelse af panden	3,0 cm tyk, 4 cm høj (Protect Plus-Evo)
Hovedbeskyttelse bagtil	1,0 cm tyk, 20 cm trukket ned
Forstærket beskyttelse af nakken	ikke relevant
Ørebeskyttelse (valgfrit)	1,5 cm tyk, 10 cm trukket ned, tyndere vægtykkelse i ørepartiet med perforeret læder
Konstruktion af topside	Kompositgitter, fremstillet af stødabsorberende skum, betrukket med læder
Version alternativ topside	Læderbetrukket, perforeret top med udsparinger af stødabsorberende skum (for at sikre et godt mikroklima)
Hagerem	18 mm brede læderremme, der er fastgjort til hovedbeskyttelsen og kan justeres individuelt med tornspænder, alternative fastgørelsesformer er mulige
Halsrem	ikke relevant
Beskyttelse af hagen	Valgfrit læderbetrukket stødabsorberende skum til fastgørelse på hageremmen

Hovedbeskyttelse **Starlight® Protect-Evo og Starlight® Protect Plus-Evo**

Vægt uden tilbehør (basismodel)	Protect-Evo 220 – 270 g, Protect Plus-Evo 250 – 300 g
---------------------------------	--

Med forbehold for tekniske ændringer!

7.6 Starlight® Go Sport, Starlight® Go Sport Plus

Starlight® Go Sport -hovedbeskyttelsen har en 1,5 cm tyk pandebeskyttelse og en 1,5 cm tyk baghovedbeskyttelse.

Starlight® Go Sport Plus-hovedbeskyttelsen har en 3,5 cm tyk pandebeskyttelse og en 1,5 cm tyk baghovedbeskyttelse.

Starlight® Go Sport- og Starlight® Go Sport Plus-modellerne tilbyder ekstra øreskyttelse, hvis det er nødvendigt.

Det øverste hoved lukkes fast med det øverste kors. Der er også mulighed for en lukket top.

Starlight® Go Sport, Starlight® Go Sport Plus er som standard udstyret med en bæltespænde lukning. Andre lukkesystemer som Fixlock eller magnetlukning kan bestilles som ekstraudstyr mod ekstra omkostninger.

7.6.1 Indikationer / kontraindikationer

Hovedbeskyttelsen anvendes til sikkerhed ved selvstændige bevægelser og aktive patienter, ved svære former for epilepsi, spasticitet, multipel sklerose, apopleksi, cerebral parese samt kranio-cerebrale traumer og i tilfælde af stærk autoaggression eller fare for at falde.

Den lukkede top giver særlig beskyttelse til patienter, som f.eks. mangler dele af kraniehætten.

De eneste kontraindikationer, der skal nævnes her, er eventuelle hudintolerancer over for de anvendte materialer.

Vi bruger udvalgte materialer til forarbejdning af hovedbeskyttelsesmodellerne, der opfylder de højeste kvalitetsstandarder.

7.6.2 Formål

Starlight® Go Sport- og Starlight® Go Sport Plus-hovedbeskyttelsesmodellerne er designet til at beskytte mod hovedskader i tilfælde af ukontrollerede faldbevægelser

eller bevægelsessekvenser. De dækker faldrisici med **øget risiko for personska-**

7.6.3 Typer og tilbehør

Grundmodel Starlight® Go Sport

- 5382-... **Starlight® Go Sport** standardmodel
- 5389-... **Starlight® Go Sport** top lukket
- 5384-... **Starlight® Go Sport** med ørebeskyttelse
- 5391-... **Starlight® Go Sport** top lukket med ørebeskyttelse
- 5392-... **Starlight® Go Sport** med øre- og kindbeskyttelse
- 5394-... **Starlight® Go Sport** top lukket med øre- og kindbeskyttelse

Grundmodel Starlight® Go Sport Plus

- 5383-... **Starlight® Go Sport Plus** standardmodel
- 5388-... **Starlight® Go Sport Plus** top lukket
- 5385-... **Starlight® Go Sport Plus** med ørebeskyttelse
- 5390-... **Starlight® Go Sport Plus** top lukket med ørebeskyttelse
- 5395-... **Starlight® Go Sport Plus** med øre- og kindbeskyttelse
- 5396-... **Starlight® Go Sport Plus** top lukket med øre- og kindbeskyttelse
- 5485-... **Starlight® Go Sport Plus** med ørebeskyttelse og Xtra ansigtsbeskyttelse
- 5490-... **Starlight® Go Sport Plus** top lukket med ørebeskyttelse
og Xtra ansigtsbeskyttelse

Tilbehør / muligheder

- 5555-01 **Hageskærm**

 Du kan finde yderligere oplysninger i vores aktuelle produktinformation på hjemmesiden.

7.6.4 Tekniske data

Hovedbeskyttelse Starlight® Go Sport og Starlight® Go Sport Plus	
Hovedets omkreds	48 - 62 cm i intervaller på 1 cm mindre/større muligt efter anmodning
Farver	Blå, rød, grøn, brun, sort + specialfarver
Udvendigt materiale	Koskind er garvet på en miljøvenlig måde, især uden PCP, azofarvestoffer, formaldehyd og chrom VI-forbindelser.
Materiale foring	Perforeret kalveskind, hudvenligt, åndbart, varme- og fugtregulerende
Byggeri	fremstillet af 1 cm tykt stødabsorberende skum med læderbetræk
Normal beskyttelse af panden	Højtydende skum med høj ydeevne 1,5 cm tyk, 4 cm høj (Go Sport)
Forstærket beskyttelse af panden	Højtydende skum med høj ydeevne 3,5 cm tyk, 4 cm høj (Go Sport Plus)
Hovedbeskyttelse bagtil	Bagsiden af hovedpladen 1,5 cm tyk, 14 cm trukket ned
Forstærket beskyttelse af nakken	ikke relevant
Ørebeskyttelse (valgfrit)	1,5 cm tyk, 10 cm trukket ned, tyndere vægtykkelse i ørepartiet med perforeret læder
Konstruktion af topline	Kryds, (stivere, der bliver smallere mod midten af hovedet), fremstillet af stødabsorberende skum, der er dækket af læder.
Udformning af den øverste side lukket	Lukket, læderbetrukket, perforeret hætte af stødabsorberende skum. (for at sikre et godt mikroklima)
Hagerem	18 mm brede læderremme, der er fastgjort til hovedbeskyttelsen og kan justeres individuelt med bæltespænde, alternative fastgørelsesformer er mulige
Halsrem	ikke relevant

Hovedbeskyttelse Starlight® Go Sport og Starlight® Go Sport Plus	
Beskyttelse af hagen	Valgfrit læderbetrasket stødabsorberende skum til fastgørelse på hageremmen
Vægt uden tilbehør (basismodel)	Go Sport 250 – 300 g Go Sport Plus 280 – 330 g

Med forbehold for tekniske ændringer!

7.7 Starlight® Go Sport Plus-Experience

Starlight® Go Sport Plus-Experience- hovedbeskyttelsen har en 3,5 cm tyk pandebeskyttelse og en 1,5 cm tyk baghovedbeskyttelse.

Det øverste hoved lukkes fast med det øverste kors. Der er også mulighed for en lukket top.

Starlight® Go Sport Plus Experience er som standard udstyret med en bæltespænde lukning. Andre lukkesystemer som Fixlock eller magnetlukning kan bestilles som ekstraudstyr mod ekstra omkostninger.

7.7.1 Indikationer / kontraindikationer

Hovedbeskyttelsen anvendes til sikkerhed ved selvstændige bevægelser og aktive patienter, ved svære former for epilepsi, spasticitet, multipel sklerose, apopleksi, cerebral parese samt kranio-cerebrale traumer og i tilfælde af stærk autoaggression eller fare for at falde.

Den lukkede top giver særlig beskyttelse til patienter, som f.eks. mangler dele af kraniehætten.

De eneste kontraindikationer, der skal nævnes her, er eventuelle hudintolerancer over for de anvendte materialer.

Vi bruger udvalgte materialer til forarbejdning af hovedbeskyttelsesmodellerne, der opfylder de højeste kvalitetsstandarder.

7.7.2 Formål

Starlight® Go Sport Plus-Experience- hovedbeskyttelsesmodellen er designet til at beskytte mod hovedskader under

ukontrollerede faldbevægelser eller bevægelsessekvenser. Den dækker faldrisici med **øget risiko for personskade.**

7.7.3 Typer og tilbehør

Grundmodel

5583-... **Starlight® Go Sport Plus-Experience** Standardmodel

5588-... **Starlight® Go Sport Plus-Experience** top lukket

Tilbehør / muligheder

5555-01 **Hageskærm**



**Du kan finde
yderligere oplysninger
i vores aktuelle
produktinformation på
hjemmesiden.**

7.7.4 Tekniske data

Hovedbeskyttelse Starlight® Go Sport Plus-Experience	
Hovedets omkreds	48 - 62 cm i intervaller på 1 cm mindre/større muligt efter anmodning
Farver	Blå, rød, grøn, brun, sort + specialfarver
Udvendigt materiale	Koskind er garvet på en miljøvenlig måde, især uden PCP, azofarvestoffer, formaldehyd og chrom VI-forbindelser.
Materiale foring	Perforeret kalveskind, hudvenligt, åndbart, varme- og fugtregulerende
Byggeri	fremstillet af 1 cm tykt stødabsorberende skum med læderbetræk
Normal beskyttelse af panden	ikke relevant
Forstærket beskyttelse af panden	3,5 cm tyk, 4 cm høj
Hovedbeskyttelse bagtil	1,5 cm tyk, 14 cm trukket ned
Forstærket beskyttelse af nakken	ikke relevant
Ørebeskyttelse (valgfit)	1,5 cm tyk, 10 cm trukket ned, tyndere vægtykkelse i ørepartiet med perforeret læder
Konstruktion af topside	Kompositgitter, fremstillet af stødabsorberende skum, betrukket med læder
Udformning af den øverste side lukket	lukket, læderbetrukket, perforeret hætte af stødabsorberende skum (for at sikre et godt mikroklima)
Hagerem	18 mm brede læderremme, der er fastgjort til hovedbeskyttelsen og kan justeres individuelt med bæltespænde, alternative fastgørelsesformer er mulige
Halsrem	ikke relevant
Beskyttelse af hagen	Valgfrit læderbetrukket stødabsorberende skum til fastgørelse på hageremmen

Hovedbeskyttelse **Starlight® Go Sport Plus-Experience**

Vægt uden tilbehør (basismodel)	280 – 330 g
---------------------------------	-------------

Med forbehold for tekniske ændringer!

7.8 Starlight® Standard

Den beskyttende effekt af **Starlight® Standard** er sikret hele vejen rundt af en stoffbetrukket, stødabsorberende 1,5 cm tyk skumpolstring.

Toppen er næsten lukket med lameller og giver den største beskyttelse på toppen af hovedet. Eventuelt er det også muligt at

anvende en lukket top og/eller en solskærm.

Starlight® Standard er som standard udstyret med et spænde med afbøjningsspænde. Andre lukkesystemer kan bestilles som ekstraudstyr mod et tillægsgebyr.

7.8.1 Indikationer / kontraindikationer

Hovedbeskyttelsen anvendes til sikkerhed ved selvstændige bevægelser og aktive patienter, i tilfælde af en lille risiko for fald, en mild form for epilepsi og som en let postoperativ beskyttelse.

Kontraindikationer, der skal nævnes her, er: åbne sår på hovedet og hudintolerance over for de anvendte materialer.

Vi bruger udvalgte materialer til forarbejdning af hovedbeskyttelsesmodellerne, der opfylder de højeste kvalitetsstandarder.

7.8.2 Formål

Starlight® Standard-hovedbeskyttelsen er designet til at beskytte mod hovedskader i tilfælde af ukontrollerede faldbevægelser

eller sekvenser af bevægelser; den dækker faldrisici med et **lavt til middelhøjt skadespotentiale**.

7.8.3 Typer og tilbehør

Grundmodel

- 5180 **Starlight® Standard Grundmodel**
- 5280 **Starlight® Standard top lukket**
- 5380 **Starlight® Standard „Sport“ skjoldhætte**
- 5480 **Starlight® Standard „Sport“ skjoldhætte, top lukket**

Tilbehør / muligheder

C 4012B **Hageskærm** (Tekstil)

7.8.4 Tekniske data

Hovedbeskyttelse Starlight® Standard	
Hovedets omkreds	47 - 62 cm, i 5 intervaller mindre/større muligt efter anmodning
Farver	Blå, rød, brun + specialfarver
Udvendigt materiale	Tekstil
Materiale foring	Bomuldsjersey
Byggeri	1,5 cm tykt stødabsorberende skum
Normal beskyttelse af panden	1,5 cm tyk, 10 cm høj
Hovedbeskyttelse bagtil	1,5 cm tyk, 10 cm høj
Forstærket beskyttelse af pande/nakke	ikke relevant
Ørebeskyttelse	ikke relevant
Konstruktion af topline	de øverste stivere syet på tværs, med 1 cm tykt skumindlæg
Udformning af den øverste side lukket	Lukket, tekstilbetrukket hætte af stødabsorberende skum
Hagerem	18 mm tekstilbånd med 2 afbøjningsspænder (alternative lukningstyper er mulige)
Halsrem	ikke relevant
Beskyttelse af hagen (valgfrit)	Skum, betrukket med bomuldsblanding
Vægt uden tilbehør (basismodel)	fra 95 g

Med forbehold for tekniske ændringer!

**! Du kan finde
yderligere oplysninger
i vores aktuelle
produktinformation på
hjemmesiden.**

7.9 Starlight® Standard Soft

Den beskyttende effekt af **Starlight® Standard Soft** er sikret hele vejen rundt af en stoffbetrukket, stødabsorberende 1,5 cm tyk skumpolstring.

Toppen er næsten lukket med lameller og giver den største beskyttelse på toppen af hovedet.

Starlight® Standard Soft er som standard udstyret med en Fixlock-lukning. Andre lukkesystemer kan bestilles som ekstraudstyr mod et tillægsgebyr.

7.9.1 Indikationer / kontraindikationer

Hovedbeskyttelsen anvendes til sikkerhed ved selvstændige bevægelser og aktive patienter, i tilfælde af en lille risiko for fald, en mild form for epilepsi og som en let postoperativ beskyttelse.

Kontraindikationer, der skal nævnes her, er: åbne sår på hovedet og hudintolerance over for de anvendte materialer.

Vi bruger udvalgte materialer til forarbejdning af hovedbeskyttelsesmodellerne, der opfylder de højeste kvalitetsstandarder.

7.9.2 Formål

Starlight® Standard-hovedbeskyttelsen er designet til at beskytte mod hovedskader i tilfælde af ukontrollerede faldbevægelser

eller sekvenser af bevægelser; den dækker faldrisici med et **lavt til middelhøjt skadespotentiale**.

7.9.3 Typer og tilbehør

Grundmodel

5180-S **Starlight® Standard Soft** Grundmodel

5180-SG **Starlight® Standard Soft** Grundmodel quiltet

Tilbehør / muligheder

C 4012B **Hageskærm** (Tekstil)

7.9.4 Tekniske data

Hovedbeskyttelse Starlight® Standard „Soft“	
Hovedets omkreds	47 - 62 cm, i 5 intervaller mindre/større muligt efter anmodning
Farver	Blå, rød, brun + specialfarver
Farver quiltede modeller	Rosé, Lyseblå
Udvendigt materiale	Tekstil
Materiale foring	Bomuldsjersey
Byggeri	0,5 cm tykt stødabsorberende skum 1,0 cm tykt Polypropylensum
Normal beskyttelse af panden	1,5 cm tyk, 10 cm høj
Hovedbeskyttelse bagtil	1,5 cm tyk, 10 cm høj
Forstærket beskyttelse af pande/nakke	ikke relevant
Ørebeskyttelse	ikke relevant
Konstruktion af topline	de øverste stivere syet på tværs, med 1 cm tykt skumindlæg
Udformning af den øverste side lukket	ikke relevant
Hagerem	18 mm tekstilbånd, med fixlock- fastgørelsesanordning, alternative fastgørelsesanordninger er mulige
Halsrem	ikke relevant
Beskyttelse af hagen	Skum, betrukket med bomuldsblanding
Vægt uden tilbehør (basismodel)	fra 95 g

Med forbehold for tekniske ændringer!

**! Du kan finde
yderligere oplysninger
i vores aktuelle
produktinformation på
hjemmesiden.**

7.10 Starlight® Base, Starlight® Secure (Tekstil)

Toppen af hovedet er næsten lukket af lameller. Hovedbeskyttelsen kan justeres i størrelse ved hjælp af en snøre (Secure-model) eller velcrolukning (Base-model) og giver den største beskyttelse på toppen af hovedet.

Hage-/hoved- og nakkebeskyttere kan bestilles som tilbehør.

Starlight® Base- og Starlight® Secure-modellerne er som standard udstyret med en velcrolukning med løkke. Andre lukkesystemer som f.eks. Fixlock kan bestilles som ekstraudstyr mod et tillægsgebyr.

7.10.1 Indikationer / kontraindikationer

Hovedbeskyttelsen anvendes til sikkerhed ved selvstændige bevægelser og aktive patienter, ved cerebral parese, epilepsi, spasticitet, multipel sklerose, kranio-cerebrale traumer, hoveddeformiteter, apopleksi, andre faldrisici eller bevægelser, autoaggressivitet og som post-operativ beskyttelse.

De eneste kontraindikationer, der skal nævnes her, er eventuelle hudintolerancer over for de anvendte materialer.

Vi bruger udvalgte materialer til forarbejdning af hovedbeskyttelsesmodellerne, der opfylder de højeste kvalitetsstandarder.

7.10.2 Formål

Starlight® Base- og Secure-hovedbeskyttelsesmodellerne er designet til at beskytte mod hovedskader i tilfælde af ukontrollerede faldbevægelser eller bevægelsessekvenser; de dækker faldrisici

med et **middelstort skadespotentiale**, hvor den beskyttende effekt leveres af en stofbeklædt, stødabsorberende skumpolstring.

7.10.3 Typer og tilbehør

Grundmodelle

- C 40200_ **Starlight® Base**
- C 40110_B **Starlight® Secure** (Tekstil)

Tilbehør / muligheder

- C 4012B **Beskyttelse af hage** (Tekstil)
- C 4013B **Beskyttelse af panden** (Tekstil)
- C 4014B **Beskyttelse af nakken** (Tekstil)

7.10.4 Tekniske data

Hovedbeskyttelse Starlight® Base og Secure	
Hovedets omkreds	47 - 62 cm, i 5 intervaller mindre/større muligt efter anmodning
Farver	Blå, bordeaux, grøn, grå + specialfarver
Udvendigt materiale	Tekstil
Materiale foring	Bomuldsjersey
Byggeri	1 cm tykt stødabsorberende skum
Normal beskyttelse af panden	1 cm tyk, 5 cm høj
Hovedbeskyttelse bagtil	1 cm tyk, 12 cm trukket ned
Forstærket beskyttelse af pande/nakke	3 cm tyk, 4 cm høj (Tilbehør)
Ørebeskyttelse	ikke relevant
Konstruktion af topline Starlight® Base	4 faner, 1 cm tykt stødabsorberende skum, betrukket med bomuldsblanding, sammenføjet med velcro
Konstruktion af topline Starlight® Secure	7 faner, 0,5 cm tykt stødabsorberende skum, betrukket med bomuldsblanding
Udformning af den øverste side lukket	ikke relevant
Hagerem	18 mm tekstilbånd, med afbøjningsspænde, velcro- og fleecebeslag, alternative fastgørelsesformer mulige
Halsrem	ikke relevant
Beskyttelse af hagen	Skum, betrukket med bomuldsblanding
Vægt uden tilbehør (basismodel)	120 – 160 g

Med forbehold for tekniske ændringer!


**Du kan finde
yderligere oplysninger
i vores aktuelle
produktinformation på
hjemmesiden.**

7.11 Starlight® Generation forskellige modeller

Modellerne i **Starlight® Generation**-serien giver hovedbeskyttelse med imponerende lethed. Hovedbeskyttelsen er kendetegnet ved en reduktion i volumen på grund af den anvendte højteknologiske skumpolstring. Den „lette“ beskyttende virkning er stadig fuldt ud intakt.

Alle modeller i **Starlight® Generation**-serien er opbygget efter samme princip: en dæmpningskappe af højteknologisk skum, der er individuelt tilpasset snitformen og

giver beskyttelse hele vejen rundt, dækket af et modelspecifikt ydermateriale og foring.

De udvalgte materialer og snitformer garanterer en optimal pasform og en god pasform for den „lette“ beskyttende effekt. Den justerbare hagerem giver god støtte.

Hageremmen (gennemsigtig eller i samme farve som det ydre materiale) er aftagelig.

7.11.1 Indikationer / kontraindikationer

Hovedbeskyttelsen anvendes til sikkerhed ved selvstændige bevægelser og aktive patienter, i tilfælde af en lille risiko for fald, en mild form for epilepsi og som en let postoperativ beskyttelse.

Kontraindikationer, der skal nævnes her, er: åbne sår på hovedet og hudintolerance over

for de anvendte materialer.

Vi bruger udvalgte materialer til forarbejdning af hovedbeskyttelsesmodellerne, der opfylder de højeste kvalitetsstandarder.

7.11.2 Formål

Starlight® Generation-hovedbeskyttelsen er designet til at beskytte mod hovedskader i tilfælde af ukontrollerede faldbevægelser

eller sekvenser af bevægelser; den dækker faldrisici med et **lavt til middelhøjt skadespotentiale**.



7.11.3 Typer og tilbehør

Grundmodeller Starlight® Generation Filthætte

G2000...-S	Starlight® Generation Filthætte,	Størrelse: S	/ 47 til 49 cm
G2000...-M	Starlight® Generation Filthætte,	Størrelse: M	/ 50 til 52 cm
G2000...-L	Starlight® Generation Filthætte,	Størrelse: L	/ 53 til 55 cm
G2000...-XL	Starlight® Generation Filthætte,	Størrelse: XL	/ 56 til 59 cm
G2000...-XXL	Starlight® Generation Filthætte,	Størrelse: XXL	/ 60 til 62 cm

(hver model: ydermateriale af filt, rød, camel eller antracit, med applikation og aftagelig gennemsigtig hagerem, der kan fjernes)

Tilbehør / muligheder til Starlight® Generation Filthætte

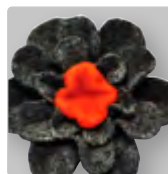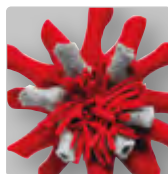

Modellerne i Starlight® Generation filthætte-serien kan desuden udsmykkes med forskellige applikationer eller broderier (mod ekstra betaling).

Grundmodeller Starlight® Generation Baseballkasket

G1000...-S	Starlight® Generation Baseballkasket, Størrelse: S	/ 47 til 49 cm
G1000...-M	Starlight® Generation Baseballkasket, Størrelse: M	/ 50 til 52 cm
G1000...-L	Starlight® Generation Baseballkasket, Størrelse: L	/ 53 til 55 cm
G1000...-XL	Starlight® Generation Baseballkasket, Størrelse: XL	/ 56 til 59 cm
G1000...-XXL	Starlight® Generation Baseballkasket, Størrelse: XXL	/ 60 til 62 cm

(hver model: ydermateriale i denim, blå, sort eller camouflaged, inklusive aftagelig hagerem i samme farve som ydermaterialet)

Grundmodeller Starlight® Generation Pom-pom hætte

G3000...-S	Starlight® Generation Pom-pom hætte, Størrelse: S	/ 47 til 49 cm
G3000...-M	Starlight® Generation Pom-pom hætte, Størrelse: M	/ 50 til 52 cm
G3000...-L	Starlight® Generation Pom-pom hætte, Størrelse: L	/ 53 til 55 cm
G3000...-XL	Starlight® Generation Pom-pom hætte, Størrelse: XL	/ 56 til 59 cm
G3000...-XXL	Starlight® Generation Pom-pom hætte, Størrelse: XXL	/ 60 til 62 cm

(hver model: ydermateriale af strikket stof creme med lammeskinsbeklædning, aftagelig gennemsigtig hagerem)

Grundmodeller Starlight® Generation Filtkappe

G4000...-S	Starlight® Generation Filtkappe,	Størrelse: S	/ 47 til 49 cm
G4000...-M	Starlight® Generation Filtkappe,	Størrelse: M	/ 50 til 52 cm
G4000...-L	Starlight® Generation Filtkappe,	Størrelse: L	/ 53 til 55 cm
G4000...-XL	Starlight® Generation Filtkappe,	Størrelse: XL	/ 56 til 59 cm
G4000...-XXL	Starlight® Generation Filtkappe,	Størrelse: XXL	/ 60 til 62 cm

(hver model: ydermateriale: strik eller uldstof, filt, aftagelig gennemsigtig hagerem)

Grundmodeller Starlight® Generation Hat til damer

G5000...-S	Starlight® Generation Hat til damer,	Størrelse: S	/ 47 til 49 cm
G5000...-M	Starlight® Generation Hat til damer,	Størrelse: M	/ 50 til 52 cm
G5000...-L	Starlight® Generation Hat til damer,	Størrelse: L	/ 53 til 55 cm
G5000...-XL	Starlight® Generation Hat til damer,	Størrelse: XL	/ 56 til 59 cm
G5000...-XXL	Starlight® Generation Hat til damer,	Størrelse: XXL	/ 60 til 62 cm

(hver model: ydermateriale: strik eller uldstof, filt, aftagelig gennemsigtig hagerem)

Grundmodeller Starlight® Generation Hat til mænd

G6000...-S	Starlight® Generation Hat til mænd,	Størrelse: S	/ 47 til 49 cm
G6000...-M	Starlight® Generation Hat til mænd,	Størrelse: M	/ 50 til 52 cm
G6000...-L	Starlight® Generation Hat til mænd,	Størrelse: L	/ 53 til 55 cm
G6000...-XL	Starlight® Generation Hat til mænd,	Størrelse: XL	/ 56 til 59 cm
G6000...-XXL	Starlight® Generation Hat til mænd,	Størrelse: XXL	/ 60 til 62 cm

(hver model: ydermateriale: uldstof eller filt, aftagelig gennemsigtig hagerem)

7.11.4 Tekniske data

Hovedbeskyttelse Starlight® Generation forskellige modeller	
Hovedets omkreds	47 - 62 cm, i 5 intervaller mindre/større muligt efter anmodning
Farver	Individuel efter model
Udvendigt materiale	Individuel efter model
Materiale foring	Blandet stof
Byggeri	Fremstillet af tekstilbeklædt, 6 mm tykt, stødabsorberende højteknologisk skum, (beskyttelse hele vejen rundt).
Normal beskyttelse af panden	6 mm højteknologisk skum (beskyttelse hele vejen rundt)
Hovedbeskyttelse bagtil	6 mm højteknologisk skum (beskyttelse hele vejen rundt)
Forstærket beskyttelse af pande/nakke	ikke relevant
Ørebeskyttelse	ikke relevant
Konstruktion af topline	6 mm tykt, stødabsorberende højteknologisk skum
Udformning af den øverste side lukket	ikke relevant
Hagerem	aftagelige, gennemsigtige eller samme farve som hovedbeskyttelse
Halsrem	ikke relevant
Beskyttelse af hagen	ikke relevant
Vægt uden tilbehør	ca. 120 – 220 g

Med forbehold for tekniske ændringer!

! Du kan finde yderligere oplysninger i vores aktuelle produktinformation på hjemmesiden.

7.12 Starlight® Aqua

Starlight® Aqua-hovedbeskyttelsen er en særlig letvægtsbeskytter med meget gode opbremsningsegenskaber og en meget defineret pasform. Der anvendes blødt, elastisk og stødabsorberende skum og neopren til produktionen.

Toppen af hovedet er næsten lukket af lameller. Hovedbeskyttelsen kan justeres i

størrelse med en snøre og giver den største beskyttelse på toppen af hovedet.

Starlight® Aqua-modellen er som standard udstyret med en velcro- og fleece-lukning.

Andre lukkesystemer, f.eks. Fixlock-lukning, kan bestilles som ekstraudstyr mod et tillægsgebyr.

7.12.1 Indikationer / kontraindikationer

Hovedbeskyttelsen bruges til sikkerhed under selvstændige bevægelser og aktive patienter, i tilfælde af en lille risiko for at falde, en mild form for epilepsi og som en let postoperativ beskyttelse under akvaterapi eller rekreative aktiviteter i vandet.

Kontraindikationer, der skal nævnes her, er: åbne sår på hovedet og hudintolerance over for de anvendte materialer.

Vi bruger udvalgte materialer til forarbejdning af hovedbeskyttelsesmodellerne, der opfylder de højeste kvalitetsstandarder.

7.12.2 Formål

Starlight® Aqua hovedbeskyttelsesmodellen er designet til at beskytte mod hovedskader under ukontrollerede bevægelser under

vandterapi eller sportsaktiviteter i vandet, og den dækker farer med et lavt til **middelhøjt skadespotentiale**.

7.12.3 Typer og tilbehør

Grundmodel

C 40110..-AQ **Starlight® Aqua** med neoprenovertræk

Tilbehør / muligheder

C 4012-AQ Hageskærm (standard)

C 4012-AQ Hageskærm (ekstra stor)

7.12.4 Tekniske data

Hovedbeskyttelse Starlight® Aqua	
Hovedets omkreds	47 - 62 cm i 5 intervaller mindre/større muligt efter anmodning
Farver	Sort
Udvendigt materiale	Neopren, 170 kg/m ³ Shore 00=35-43, vandtæt, antibakterielt
Materiale foring	Neopren
Byggeri	af neoprenbeklædt, 1 cm tykt, stødabsorberende skum
Normal beskyttelse af panden	1 cm tyk, 5 cm høj
Hovedbeskyttelse bagtil	1 cm tyk, 12 cm trukket ned
Forstærket beskyttelse af pande/nakke	ikke relevant
Ørebeskyttelse	ikke relevant
Konstruktion af topline	7 faner, 0,5 cm tykt, stødabsorberende skum
Udformning af den øverste side lukket	ikke relevant
Hagerem	20 mm bred polypropylen, sort, afbøjningsspænde, velcro- og fleecfastgørelse, alternative fastgørelsesformer mulige
Halsrem	ikke relevant
Beskyttelse af hagen	Valgfrit neoprenbeklædt, stødabsorberende skum til fastgørelse på hageremmen
Vægt uden tilbehør	130 – 210 g

Med forbehold for tekniske ændringer!


Du kan finde yderligere oplysninger i vores aktuelle produktinformation på hjemmesiden.

7.13 Starlight® Snooze

Starlight® Snooze-hovedbeskyttelse er en særlig letvægtsbeskytter med meget gode decelerationsegenskaber og en meget defineret pasform. Hovedbeskytteren har et 4 cm tykt pande- og baghovedområde af 2-komponentskum og bomuldsuld.

Den justerbare hagerem giver god støtte. Den behageligt bløde polstring af en kombination

af forskellige skumtyper forhindrer med garanti ubehageligt tryk under søvnen.

Starlight® Snooze-modellen er som standard udstyret med en velcro- og fleece-lukning.

Andre lukningssystemer som Fixlock, velcro eller magnetlukning kan bestilles som ekstraudstyr mod et tillægsgebyr.

7.13.1 Indikationer / kontraindikationer

Hovedbeskyttelsen anvendes til sikkerhed i forbindelse med selvstændige bevægelser og aktive patienter, hos cerebralparetikere, epileptikere, spastikere, multipel sklerose, kraniocerebrale traumer, hoveddeformiteter, apopleksi, andre patienter med risiko for at falde eller autoaggressive patienter og som postoperativ beskyttelse under hvile eller søvn.

De eneste kontraindikationer, der skal nævnes her, er eventuelle hudintolerancer over for de anvendte materialer.

Vi bruger udvalgte materialer til forarbejdning af hovedbeskyttelsesmodellerne, der opfylder de højeste kvalitetsstandarder.

7.13.2 Formål

Starlight® Snooze-ovedbeskyttelsesmodellen er designet til at beskytte mod hovedskader i tilfælde af ukontrollerede faldbevægelser

eller bevægelsessekvenser i hvile- eller søvnfasen; den dækker faldrisici med et **middelhøjt skadespotentiale**.

7.13.3 Typer og tilbehør

Grundmodel

C 5181 Starlight® Snooze med læderbetræk

Tilbehør / muligheder

5185-1 **Hageskærm** (Læder)

7.13.4 Tekniske data

Hovedbeskyttelse Starlight® Snooze	
Hovedets omkreds	Fremstillet efter mål
Farver	Beige
Udvendigt materiale	Koskind er garvet på en miljøvenlig måde, især uden PCP, azofarvestoffer, formaldehyd og chrom VI-forbindelser.
Materiale foring	Perforeret kalveskind, hudvenligt, åndbart, varme- og fugtregulerende
Byggeri	fremstillet af læderbetrukket højtydende skum + skum med skum af skumgummi + bomuldsuld
Normal beskyttelse af panden	4 cm tyk
Hovedbeskyttelse bagtil	4 cm tyk
Forstærket beskyttelse af pande/nakke	ikke relevant
Ørebeskyttelse	ikke relevant
Konstruktion af topside	2 ekstra brede tværstriber
Udformning af den øverste side lukket	ikke relevant
Hagerem	18 mm brede læderremme, der er fastgjort til hovedbeskyttelsen, med afbøjningsspænde, velcro- og fleecfastgørelse, alternative fastgørelsestyper mulige
Halsrem	ikke relevant
Beskyttelse af hagen	Valgfrit læderbetrukket stødabsorberende skum til fastgørelse på hageremmen
Vægt uden tilbehør	ca. 330 g


Med forbehold for tekniske ændringer!

Du kan finde yderligere oplysninger i vores aktuelle produktinformation på hjemmesiden.

8 Rengøring og desinfektion

Hovedbeskyttelse med tekstilbetræk

Rengøring:

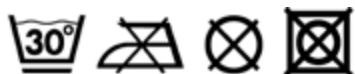

Ato Form hovedbeskyttelsen i bomuldsblanding kan rengøres med mild sæbe på en fugtig klud eller svamp.

Kraftige rengøringsmidler kan indeholde stoffer, der kan beskadige hovedbeskyttelsen og dermed forringe den beskyttende virkning.

Hovedbeskyttelsen kan vaskes i den fyldte vaskemaskine ved en temperatur på op til 30°.

Udsæt ikke hovedbeskyttelsen for høje temperaturer!

Desinfektion:


Hvis det er nødvendigt at desinficere med husholdningsdesinfektionsmidler, skal du tage hensyn til følgende anvisninger:

Assistenten skal bære passende beskyttelsesbeklædning (f.eks. handsker) for at undgå infektioner.

Når du bruger desinfektionsmidler, skal du følge producentens brugsanvisning.

... med læderbetræk

Rengøring:

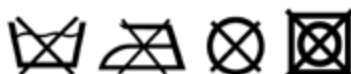

Ato Form læderhovedbeskyttelsen skal rengøres med læderrengøringsmiddel! Følg brugsanvisningen!

Kraftige rengøringsmidler kan indeholde stoffer, der kan beskadige hovedbeskyttelsen og dermed forringe den beskyttende virkning.

Udsæt ikke hovedbeskyttelsen for høje temperaturer!

Desinfektion:



Vi fraråder generelt desinfektion, da det kan skade læderet. Hvis det alligevel er nødvendigt, må du kun bruge et desinfektionsmiddel, der er egnet til naturlæder.


Hvis det er nødvendigt at desinficere med husholdningsdesinfektionsmidler, skal du tage hensyn til følgende anvisninger:

Assistenten skal bære passende beskyttelsesbeklædning (f.eks. handsker) for at undgå infektioner.

Når du bruger desinfektionsmidler, skal du følge producentens brugsanvisning.

... med neoprenbetræk

Rengøring:

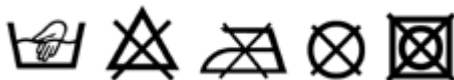

Ato Form neoprenhovedbeskyttelsen kan rengøres med mild sæbe på en fugtig klud eller svamp.

Kraftige rengøringsmidler kan indeholde stoffer, der kan beskadige hovedbeskyttelsen og dermed forringe den beskyttende virkning.

Til rengøring af hovedbeskyttelsen anbefaler vi håndvask ved op til 30°.

Udsæt ikke hovedbeskyttelsen for høje temperaturer!

... med filt og højteknologisk skum

Rengøring:



Ato Form-hovedbeskyttelsen med filt eller højteknologiske skumdele kan rengøres med mild sæbe på en fugtig klud eller svamp.

Kraftige rengøringsmidler kan indeholde stoffer, der kan beskadige hovedbeskyttelsen og dermed forringe den beskyttende virkning.

Til rengøring af hovedbeskyttelsen anbefaler vi håndvask ved op til 30°.

Udsæt ikke hovedbeskyttelsen for høje temperaturer!

Desinfektion:

Advarsel.

Brug kun et desinfektionsmiddel, der er egnet til neopren.

Hvis det er nødvendigt at desinficere med husholdningsdesinfektionsmidler, skal du tage hensyn til følgende anvisninger:

Assistenten skal bære passende beskyttelsesbeklædning (f.eks. handsker) for at undgå infektioner.

Når du bruger desinfektionsmidler, skal du følge producentens brugsanvisning.

Desinfektion:

Hvis det er nødvendigt at desinficere med husholdningsdesinfektionsmidler, skal du tage hensyn til følgende anvisninger:

Assistenten skal bære passende beskyttelsesbeklædning (f.eks. handsker) for at undgå infektioner.

Når du bruger desinfektionsmidler, skal du følge producentens brugsanvisning.

Advarsel!

Brug ikke stærke rengøringsmidler, der kan angribe hjælpemidler overflade.

9 Vedligeholdelse og reparation

Hvis der er behov for reparation af Starlight®-hovedbeskyttelsen, bedes du kontakte din fagforhandler eller ATO FORM-service på tlf. +49 6093 944-0.

Brug kun hovedbeskyttelsen, hvis den er i perfekt stand!

I tilfælde af defekter skal du straks kontakte din forhandler!

10 Brugstid og genbrug

Brugtid

For at opnå en optimal beskyttende effekt skal produktet håndteres omhyggeligt og med omhu. Du skal være omhyggelig med at sikre en præcis pasform!

Et eller flere af følgende kriterier kan have stor indflydelse på levetiden eller gøre det nødvendigt at foretage en nyanskaffelse:

Passer ikke længere, f.eks. på grund af vækst, ændringer i hovedform osv.

Ekstraordinær belastning af hovedbeskyttelsen, anvendelsesgrad

Hyppighed af brug, hyppighed af fald hos patienten

Graden af pleje

Hygiejnisk tilstand af hovedbeskyttelsen, som f.eks. påvirkes af medicinering og kliniske billeder

Genbrug

Genbrug af hovedbeskyttelse fra Starlight®-serien er udelukket.

Kontroller især efter et fald hovedbeskyttelsen for deformiteter eller andre uregelmæssigheder.

Efter et alvorligt fald fraråder vi yderligere brug af hovedbeskyttelsen. Hovedbeskyttelsen skal kontrolleres af en autoriseret forhandler eller af producenten.

11 Fejl, reparation, reservedele

Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Manglende overholdelse eller reparationer eller ændringer af hovedbeskyttelsen eller dens komponenter foretaget af uautoriserede personer medfører, at enhver garanti bortfalder.

Ethvert produktansvar fra producentens (ATO FORM GmbH, Zur Lauterhecke 34, 63877 Sailauf) eller dennes repræsentants side er i disse tilfælde på forhånd udelukket.

Hvis du har spørgsmål om reservedele og tilbehør, kan du kontakte din forhandler eller ATO FORM-service på tlf.nr. +49 06093 944-0.

12 Opbevaring

Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt på et sted, hvor du eller pleje- og vedligeholdelsespersonalet kan få adgang til den.

Den aktuelle version af denne brugsanvisning kan findes på vores hjemmeside i download-området.

Du kan finde flere oplysninger om produktet på vores hjemmeside på www.ato-form.com eller under denne QR-kode.



Med hensyn til miljøbeskyttelse:

Alle emballagedele kan genbruges.

Papemballagen skal henføres til det genanvendelige materiale affaldspapir.

Vi bruger derfor også papir som fyldstof. Eventuelle plastfolier, der anvendes i emballagen, er fremstillet af PE og kan derfor forbrændes eller genanvendes med lave emissioner.

Komplet program:

- Beskyttelse af hoved og krop
- Siddehjælpemidler
- Ståhjælpemidler
- Ganghjælpemidler/løbecykler
- Stand-up hjælpemidler og løftere
- Hjælpemidler til badeværelser og toiletter
- Særlig konstruktion

Tak for din interesse for vores produkter.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte salgsrepræsentanter eller din forhandler vil med glæde besvare alle dine spørgsmål.

Dit ATO FORM-team



ATO FORM GmbH,

Zur Lauterhecke 34, 63877 Sailauf
Tel. +49 6093 944-0, Fax +49 6093 944-444,
E-Mail: info@ato-form.com

www.ato-form.com

Din specialforhandler