

BUZZ 1 – Vare nr.: 25178



BUZZ 3 – Vare nr.: 109630



Brugermanual


BUZZ 1 & 3

BRUGERMANUAL – BUZZ 1 & 3 – DK VERSION 1

Læs brugermanualen nøje igennem, før du anvender produktet. Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem.

Max belastning BUZZ 1 & 3: 150 kg.

- VED IND- OG Udstigning: Alle hjul SKAL låses, inden brugeren sætter sig. Sørg for, at forhjulenes bremsepedaler (C) IKKE "peger" ind under stolen, og at drivhjulenes bremser er aktiveret. (Stolen leveres med to 125 mm forhjul med bremse.)
- VED SIDELÆNS FORFLYTning: Slå stolens armlæn (A) op for at lette forflytningen. Lås alle hjul - husk også at låse håndbremsen (B), inden brugeren sætter sig!
Armlænet kan forsynes med en lås, så det ikke slås op utilsigtet (af fx urolige brugere).
- VED TOILETBRUG: Placer stolen over toiletkummen, og lås alle hjul. Hvis stolen af forskellige årsager ikke kan køres ind over et toilet, kan en toiletspand anvendes.
- VED BADEBRUG: Stolen kan evt. udstyres med et sæde låg, som passer i toiletåbningen ELLER et polstret oversæde, som lægges over PUR-toiletsædet. Herved kan brugeren sidde mere oprejst og behageligt under badning.

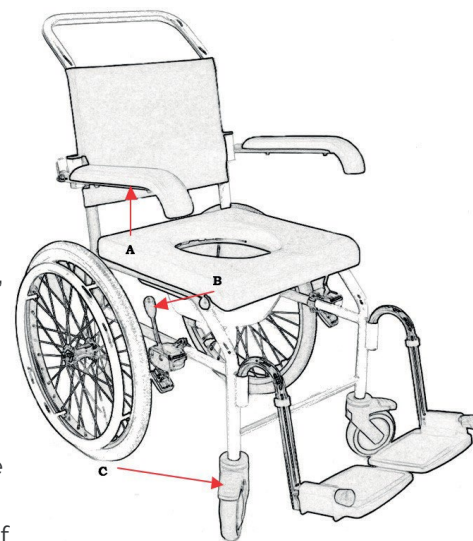

Ved brugers ind- og udstigning må særlig opmærksomhed vies til evt. tipningsfare. **STÅ DERFOR ALDRIG PÅ FODHVILERNES FODPLADER!**



Hvis brugeren læner sig kraftigt fremad, kan der opstå tipningsfare, hvis stolens forhjul ikke er låst, og hvis bremsepedalerne ikke peger fremad.



Vi gør opmærksom på, at man ikke må lægge fuld kropsvægt på armlænene.

Rengøring & vedligeholdelse

1. Rengøring foretages med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler, hvorefter stolen spules. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud.
2. Efterse jævnligt armlæn, ryglæn og bremses.
3. HJULENE efterses med jævne mellemrum – efterspændes eventuelt – og skal holdes fri for bl.a. hår for at bevare den optimale køreevne.
4. Husk, at bremseeffekten er afhængig af et korrekt dæktryk (angivet på siden af dækket).
5. Undersøg jævnligt for rustangreb (i tilfælde af, at stolens rustbeskyttelse er blevet beskadiget).


Brugsvejledning til fodhvilerne

Hvert fodhvilerpar består af to højdeindstillelige fodhvilerne (én til højre og én til venstre fod).

1. Anbring fodhvileren i beslaget (A), som er på svejset stolens forben. I hver side af beslaget er en slid, som fodhvilerens "knopper" glider ned i og derved låser fodhvileren for sidedrej.



Disse slidser kan have skarpe kanter, som man kan rive sig på ved et uheld, når fodhvilerne ikke er monteret på en stol.

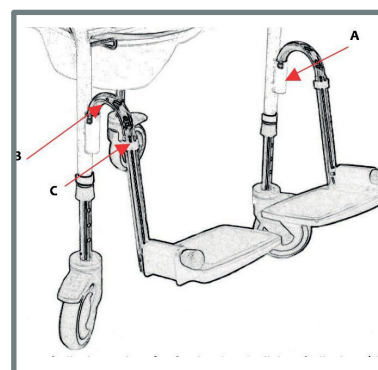

2. Ønskes fodhvileren svinget ud til siden, løftes fodhvileren - nemmest i krumningen (B) - cirka én cm lodret: Herved glider fodhvilerens "knop- per" op af slidserne, og fodhvileren kan nu drejes til siden (eller tages helt af).
3. Fodhvileren kan indstilles i længden ved at fjerne dens låseclip (C) og derefter trække eller skubbe fodhvilerens inder rør til den ønskede længde. HUSK at sætte fodhvilerens låseclip på plads igen efter indstillingen.
4. Fodhvilerne kan forsynes med et lægbånd eller ankel- bspændinger fremstillet i skai (med velcrolukning til at stramme eller slække) samt en udelt polstret fodplade til at sætte oven på de to eksisterende fodplader. Fodhvilerne kan efter ønske leveres længere eller kortere, hvis brugeren har ekstraord nært lange eller korte ben.



Under indstillingen skal man tage hensyn til den klemrisiko, der altid er til stede.



Dette produkt skal genbruges i henhold til nationale regler. Efter adskillelse af produktet skal du sortere komponenterne ud fra hvad de er lavet af, og genbruge dem individuelt. Kontakt venligst dit lokale genbrugssted for vejledning, hvis det er nødvendigt.

www.danrehab.dk



Klasse 1

