

MADE IN EUROPE



Vores produkter og råvarer er produceret i Europa.

Vælg kvalitet, spar penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

77_20250114_DK

Ergo Master



MC 001-1011

REF (Varenr.)	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
MC 001-1011	19993	Ergo Master	05744001970089

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 81 01

The Original Nordic Human Handling Concept



SCAN ME

Developed & Manufactured by:



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vigtig information inden produktet/-erne tages i brug:

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Til brugere hvor det at skubbe sig fra madrassen med hænderne er vanskeligt eller smertefuldt. Benyttes i forbindelse med at rejse- eller flytte sig sidevers i seng.

Produktet bør altid være fuldt understøttet i vandret position ved brug.

Anvendelse af produktet:

Bruger placerer produktet fuldt understøttet på underlaget og kan herefter lægge vægt i produktet/stemme fra og herved forflytte sig.

Indikation:

Produktet kan anvendes af brugere, der ikke er i stand til at skubbe sig fra mod underlaget under forflytning fx grundet nedsat bevægelighed i hånden og/eller fingre, spasticitet eller lignende funktionsnedsættelser.

Kontraindikation:

Bruger skal have tilstrækkelig kognitiv funktion til at kunne placere Ergo Master med tilstrækkelig understøttelsesflade, så Ergo Master ikke vipper ned af understøttelsesoverfladen under forflytningen.

Advarsel:

Sikker at produktet er fuld understøttet af underlaget inden brug.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Produktionsdato og levetid:

Produktets produktionsdato kan ses på produktets label under "LOT" og vises som ÅÅMMDD - fx 251020, som refererer til, at produktet er produceret d. 20. september 2025.

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug og belastning.

Kontrol/Eftersyn:

Produkter bør efterses jævnligt. Hvis produktet har defekte eller brudte overflader, bør produktet kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produkt-skader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Ergo Master

Brug af Ergo Master:



1. Ergo Master er velegnet til brugere, der har svært ved at støde fra i underlaget ved forflytninger.



2. Brugeren griber om Ergo Masters håndtag.



3. Det vil oftest være nødvendigt at have én Ergo Master i hver hånd. Brugeren er nu klar til at forflytte sig.

Forflytning op i seng:



4. Med Ergo Master i hver hånd og fødderne godt understøttet lægger brugeren vægt i Ergo Masteren.



5. Brugeren læner sig frem og støder fra med Ergo Master i underlaget. Brugeren kan nu flytte bagdelen længere op i sengen.

Forflytning til kørestol:



6. Brugeren kan benytte Ergo Master med eller uden glidebræt. Placer Ergo Master ovenpå glidebrættet og læg vægt på håndtaget.



7. Sørg for at Ergo Master er placeret HELT inde på glidebrættet, så den ikke glider af under forflytningen.



8. Brugeren kan nu læne sig frem og flytte bagdelen over i kørestolen.

Brugervejledning - Ergo Master

Tekniske specifikationer

Varenummer - Navn	Størrelse:	Antal:	Max. brugervægt:	Produktvægt:
MC 001-1011 Ergo Master	L 28 x B 14 cm	2	200 kg	0,60 kg

Materialer:
PE MD

ADVARSLER



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg for, at alle relevante bremsere er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Brugervægt/ SWL (Safe Working Load):

Anbefalet max. brugervægt: 200 kg



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Har produktet defekte eller brudte overflader skal det kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk

Find os på:

