



Zitti

Seabass Pro/
Seabass G2

Brugervejledning

Brugermanual, monterings-/justeringsanvisning,
service og vedligeholdelse samt genbrug



Denne brugervejledning omhandler kørestolsstellet Seabass med tilbehør.
For komplet oversigt over tilbehør se produktet bestillingsgrundlag.

Indholdsfortegnelse

Producent og forhandler.....	3	Drivhjulsplacering	21
Specialtilpasning.....	3	E-drive	23
Introduktion	4	Bremse	24
Kort om produktet.....	4	Parkeringsbremse	28
Symbolfortegnelse	5	Sædetilt.....	30
Produktmærkning.....	6	Fodstøtte Pro	31
Sikkerhedsforeskrifter	7	Fodstøtte G2	32
Uddannelse og kvalifikationer.....	7	Fodstøttesbeslag	33
Advasler og forholdsregler.....	7	Fodkasse	35
Kontrol før brug	9	Lægstøtte	36
Begrænsninger.....	10	Kørehåndtag Pro	37
Afklemnings risiko.....	11	Kørebøjle Pro.....	38
Godkendte kombinationer.....	11	Kørebøjle vinkelindstillelig G2	40
Afvisninger/tilbud	11	Kørebøjle foldbar.....	40
Tekniske data/Ydeevne	12	Armlæn vipbar fra ryg.....	42
Seabass Pro	12	Anti-tipstøtte.....	43
Seabass G2.....	13	Tippepedal.....	45
Tilpasning og specialtilpasning.....	14	Stænkskærm	46
Anbefalinger	14	Transportbeslag	47
Tilladte tilpasninger.....	14	Sædedel.....	48
Risikoanalyse	14	Resumé og opfølgning	49
Mærkning	14	Transport i køretøj	50
Monterings- og justeringsanvisninger	15	Køreteknik	52
Svinghjul	16	Vedligeholdelse og vaskeinstruktioner ...	54
Retningsholder	18	Kontrol før brug	54
Hjul	19	Service og vedligeholdelse.....	55
		Renovering	56
		Affaldssortering	59
		Garanti og retur.....	60
		Revision.....	61

Producent og forhandler

Produktet er fremstillet af Anatomic SITT i Norrköping AB

Post adresse	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besøgs adresse	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-post	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com
Instruktionsfilm	youtube.com/anatomicsitt

Produktet forhandles i Danmark af:

Anatomic SITT A/S, Marøgelhøj 22B, 8520 Risskov, Denmark

Tlf 86 17 01 74

Fax 86 17 01 75

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Specialtilpasning



Sæt kryds i ruden ved
SPECIALTILPASNING for da
gælder CE-mærkningen ikke



Introduktion

Inledning

Tillykke med valget af hjælpemidler, vi håber du vil få meget ud af vores produkt. For at du kan bruge den fuldt ud på en sikker måde, er det vigtigt, at du læser denne brugervejledning grundigt igennem. Dette gælder for alle personer, der opholder sig i brugerens nærhed.

Gem brugervejledningen til fremtidig brug. Nye udgafer kan downloades fra vores websted: www.anatomicsitt.dk.

Korrespondance - mærkning

På produktetiketten findes produktets varenummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numre skal angives ved korrespondance med Anatomic SITT gældende produkterne. Du finder serienummeret på siddepladens bagerste del.

CE-mærkning - klassificering

Hjælpemidlet med dets tilbehør er et CE-mærket medicinteknisk produkt, klasse I ifølge klassificeringsreglerne i bilag VIII (EU) 2017/745.

Overensstemmelseserklæring

Produktet opfylder kravene for medicintekniske produkter ifølge forordningen (EU) 2017/745 om medicintekniske produkter. Se gældende EU -overensstemmelseserklæring for produktvarianter og tilbehør, se www.anatomicsitt.com/da/dokument_dk.

Kort om produktet


Zitzi Seabass er et kørestolsstel. Produktet er beregnet til at blive brugt sammen med siddesystem eller Anatomic formstøbte sæder fra Anatomic Sitt. Zitzi Seabass kan bruges flere gange.

Symbolfortegnelse

	Disse symboler kan findes i brugervejledningen og på produktet og gør læseren opmærksom på vigtige sikkerhedsoplysninger mv.	 Angiver fremstilling af satsnummer, så at sats/batch kan identificeres.
	Dette symbol indikerer eventuel risiko for afklemning.	 Angiver at produktet er medicinsk udstyr.
	Instruktioner og tips som letter brugen af produktet.	 Angiver producentens referencenummer/varenummer så det medicinske udstyr kan identificeres.
 www.anatomicsitt.com	Angiver, at brugervejledningen altid skal læses før brug. URL angiver, hvor dokumentet er placeret elektronisk.	 Angiver producentens serienummer så specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.
	Angiver at brugervejledningen skal læses for at opnå vigtig sikkerhedsmæssig information om f.eks. advarsler som ikke findes på produktets medicintekniske etiket.	 Unik produktidentifikation, som muliggør en unik identificering af specifikt medicinsk udstyr.
	Angiver producenten af det medicintekniske produkt ifølge definition i (EU) MDR 2017/745. Kan også anvendes sammen med fremstillingsdato.	 Angiver at produktet er CE-mærket ifølge rette EU-direktiv.
	Angiver datoen for det medicinske udstyrs fremstilling.	 Angiver, hvor transportsikringen skal fastgøres på produktet ved transport i køretøj.

Produktmærkning


Etiket på hovedprodukt

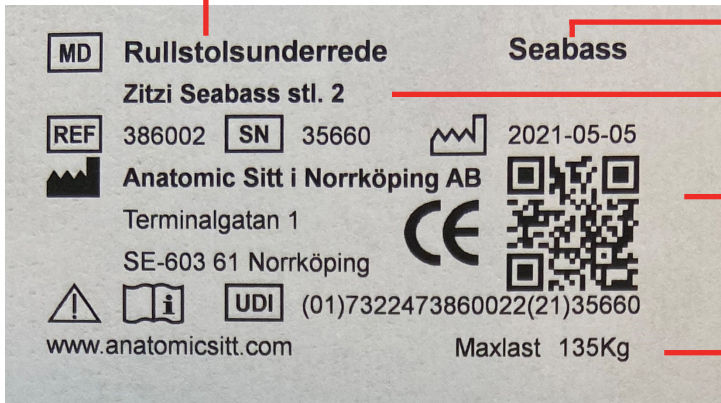

MD Rullstolsunderrede **Seabass**
Zitzi Seabass stl. 2
REF 386002 **SN** 35660 2021-05-05
Anatomic Sitt i Norrköping AB
 Terminalgatan 1
 SE-603 61 Norrköping
 www.anatomicsitt.com **CE** **QR-kode**
UDI (01)7322473860022(21)35660
 Maxlast 135Kg

Produkttypee
 Produktgruppe
 Produktnavn
 QR-kode
 Max belastningsvægt inkl. bruger

Etiket på tilbehør

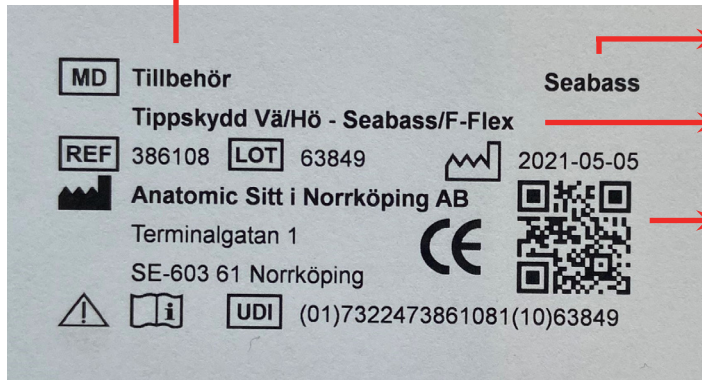

MD Tillbehör **Seabass**
Tippskydd Vä/Hö - Seabass/F-Flex
REF 386108 **LOT** 63849 2021-05-05
Anatomic Sitt i Norrköping AB
 Terminalgatan 1
 SE-603 61 Norrköping
 www.anatomicsitt.com **CE** **QR-kode**
UDI (01)7322473861081(10)63849

Produkttypee
 Produktgruppe/produktgrupper
 Produktnavn
 QR-kode

Sikkerhedsforeskrifter

Uddannelse og kvalifikationer

- Montering, service og renovering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Beslut om Anpassning/specialtilpasning skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (teknikere på hjælpemiddeldepot eller tilsvarende).
- Indstillinger, justeringer og test af hjælpemidlet skal altid foretages af kvalificeret fagpersonale (Eksempelvis hjælpemiddeltekniker).
- Hjælpemidlets bevilligende terapeut eller person med tilsvarende kompetencer og viden om brugeren og hjælpemidlet skal altid foretage en risikovurdering inden brug.

Advasler og forholdsregler



Læs altid brugervejledningen før brug.



Indstillinger må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Det er kun tilladt at foretage indstillinger på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.



Kontroller produktets funktion, før det udleveres til en bruger.



Den person, der ordinerer hjælpemidlet, er ansvarlig for at instruere brugeren og / eller andre personer i dets umiddelbare miljø i, hvordan produktet skal bruges sikkert. Kontroller altid produktets funktion før brug.



Den person, der ordinerer hjælpemidlet og har kendskab til om brugeren skal vurdere om brugeren kan balancere i det valgte sæde for at sikre, at eventuel tiprisiko er udelukket.



Justeringer må kun foretages på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.

-  Efter alle monteringsjusteringer eller servicearbejde skal alle monteringsskruer og møtrikker kontrolleres og spændes.
-  Kontroller at siddesystemet sidder ordentligt fast i kørestolsstellet før anvendelse.
-  Bremserne skal altid være låste ved ind- og udstigning.
-  Driftsbremsen, som virker på drivhjulenes tromlebremse, er beregnet til at blive brugt som bremse ved kørsel og parkering. Parkeringsbremsen, der virker på dækket, må kun bruges som låsebremse.
-  Svinghjulet kan kollideres med fodpladen i visse tilfælde. Svinghjulets styreevnen kan således blive påvirket, og fodpladeindstillingerne skal så muligvis ændres.
-  Brug aldrig fodpladen, til ind- og udstigning af hjælpemidlet.
-  Vær forsigtig og vær opmærksom på den øgede risiko for at vælte, når kørestolsstellet bruges på skrående terræn. kørestolsstellet må kun parkeres på vandrette og jævne overflader.
-  Løft altid i kørestolsstellet - aldrig i siddesystemet
-  Udfør aldrig service mens produktet anvendes.
-  Bemærk, at hvis brugeren tager fat i genstande uden for hjælpemidlet eller læner sig for langt ud af hjælpemidlet, kan der opstå et tyngdepunktsskift, hvilket kan føre til en øget risiko for at vælte.
-  Overbelast aldrig hjælpemidlet, se afsnittet Begrænsninger for aktuel max belastning
-  Efterlad aldrig brugeren uden opsyn, når hjælpemidlet anvendes.

Kontrol før brug

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til nedenstående punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slitage og skader. Tjek især skruer og møtrikker og vingeskruer.
- Kontroller, at sædet er korrekt fastgjort til chassiset.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller funktionen af eventuelle tipsikringer.
- Kontroller bremsernes funktion.
- Tjek hjulenes tilstand, og at de sidder fast.
- Tjek produktets bevægelige funktioner, såsom rygvinkel, hældning, højdejustering mv. vedrørende mobilitet og aflåsning.
- Kontroller kablets justering for hældning, så det fungerer korrekt.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet for udbedring.

Begrænsninger

Maxvægt

Den højste belastningsvægt er 135 kg. Med belastningsvægt menes den maksimale vægt som kørestolsstellet må udsættes for inkl. bruger og evt. anden vægt.

Livslængde

Produktets forventede livslængde er 5 år ved normal brug i overensstemmelse med produktets tilsigtede formål, forudsat at instruktioner i denne brugervejledning efterfølges. Den faktiske livslængde kan dog variere beroende på hvor ofte og intensivt produktet anvendes, men er max 10 år.

Gaspatron

Hvis produktet skal opbevares i lang tid, skal du overveje følgende:

Gaspatroner bør bruges regelmæssigt for at opretholde dens funktion. Når produktet ikke er i brug, skal gaspatronen aktiveres mindst hver 6. måned. Desuden skal den opbevares på en sådan måde, at stempelstangen rettes nedad, ellers kan gaspatronens forsegling gå i stykker, og den holder op med at fungere.

Afklemnings risiko

Vær opmærksom på, at produktet og dets tilbehør er korrekt indstillet, så brugeren ikke får ubehag eller skader under brug.

Hvis dette er tilfældet, foretag justeringer eller monter passende tilbehør.

Godkendte kombinationer

For at produktet kan bevare sin CE -mærkning, må hjælpemidlet kun leveres med tilbehør og reservedele leveret af Anatomic Sitt A/S. Se produktets bestillingsgrundlag for muligt tilbehør og reservedelesliste.




Afvigelser/tilbud

Ved funktionsfejl kontakt hjælpemiddeldepot eller forhandleren/producenten.

Hvis der opstår en alvorlig hændelse, skal den indberettes til Anatomic SITT og landets kompetente myndighed.

Tekniske data / Ydeevne

Seabass Pro

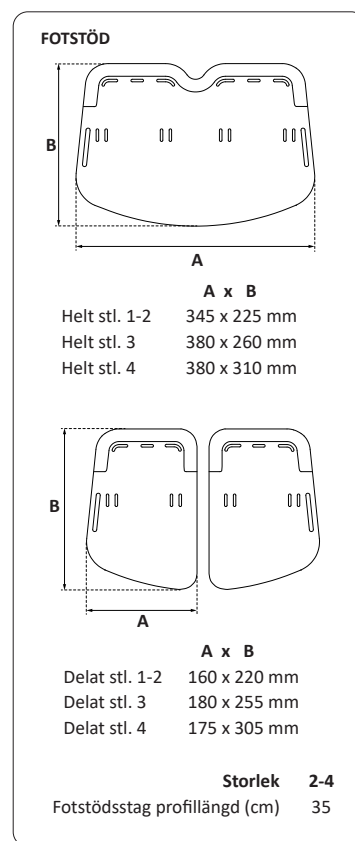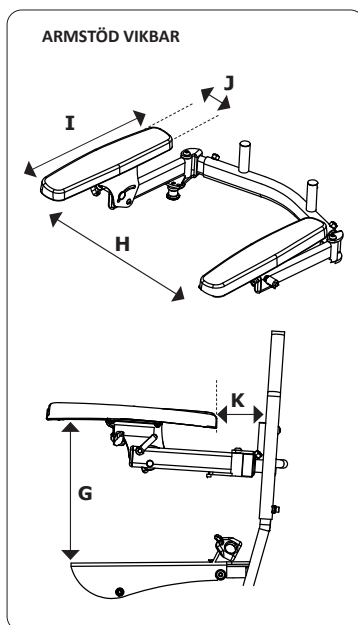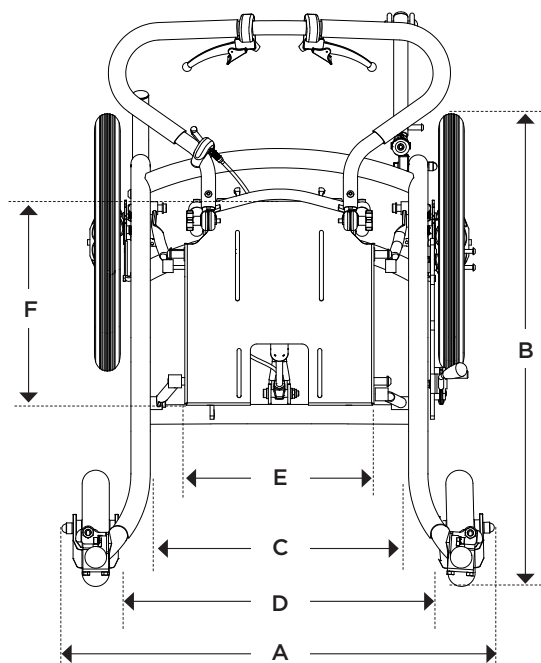


Produktdata	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3
Max belastningsvikt (brukare + sits)	135 kg	135 kg	135 kg
Sitthöjd (låg/standard)	41/46 cm	41/46 cm	41/46 cm
Längd (B) *	69 - 77 cm	69 - 77 cm	69 - 77 cm
Bredd (A) **	58 cm	63 cm	68 cm
Bredd vid bakaxeln med E-drive 16" hjul	64.5 cm	69.5 cm	74.5 cm
Invändig rambredd (C)	35 cm	40 cm	45 cm
Invändig bredd drivhjul	48 cm	53 cm	58 cm
Invändig bredd länkhjul (D)	44 cm	49 cm	54 cm
Sittplatta (E/F) (bredd/djup)	26/31 cm	29/32 cm	34/34 cm
Vikt	20 kg	21 kg	22 kg
Tilt	0-35° / -7-28°	0-35° / -7-28°	0-35° / -7-28°
Höjd från sittplatta (G)	19 - 30 cm	24 - 35 cm	34 - 39 cm
Bredd mellan armstöd (H)	21,5 - 31,5 cm	26 - 41 cm	32 - 47 cm
Mått armstödsplattor (I x J)	33,0 x 7,5 cm	33,0 x 7,5 cm	33,0 x 7,5 cm
Avstånd ryggrör till armstödsplatta (K)	5 - 13 cm	7 - 15 cm	5 - 15 cm

* Längden förändras beroende på val av drivhjul (12"-24") och drivhjulposition.

** Bredden som är angiven visar det bredaste måtten på underredet. Det är beroende av drivhjul, stänkskydd och drivringar. Med 16" drivhjul är stolen bredast vid länkhjulen.


Samtliga mått är tagna med respektive storlek i standardformat, standardram och 16" hjul.

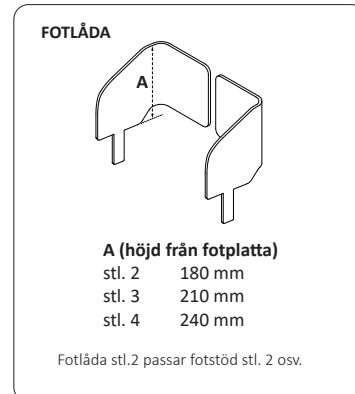

Tekniska data / ydeevne

Seabass G2

Produktdata	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3
Max belastningsvægt (bruger+sæde)	135 kg	135 kg	135 kg
Sædehøjde (lav/standard)	41/46 cm	41/46 cm	41/46 cm
Længde (B) *	69 - 77 cm	69 - 77 cm	69 - 77 cm
Bredde (A) **	58 cm	63 cm	68 cm
Indvendig rammebredde (C)	35 cm	40 cm	45 cm
Indvendig bredde drivhjul	48 cm	53 cm	58 cm
Udvendig hjulbredde m. E-drive 16"	64.5 cm	69.5 cm	74.5 cm
Indvendig bredde svinghjul (D)	44 cm	49 cm	54 cm
Sædeplade (E/F) (bredde/ dybde)	30/36 cm	30/36 cm	35/36 cm
Vægt	19 kg	20 kg	20 kg
Tilt	0-35° / -7-28°	0-35° / -7-28°	0-35° / -7-28°

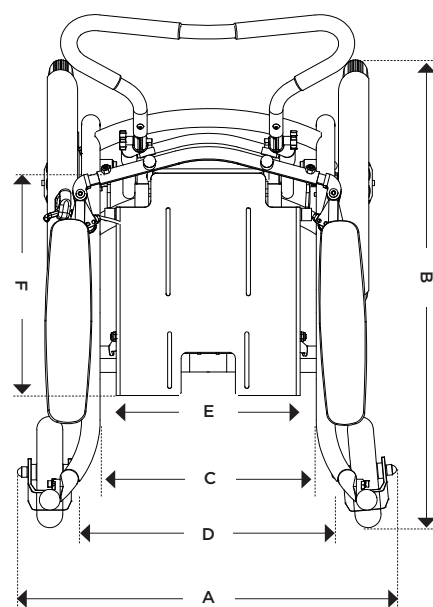


* Længden ændres afhængig af valg af drivhjul og drivhjulspose. 12" er den korteste og 24" er den længste.

** Den viste bredde viser kørestolsstellets bredeste mål og er afhængig af drivhjul, skærme og drivringe. Med 16" drivhjul er stolen bredest ved svinghjulene. Med 16" E-drive bredest ved drivhjulene.


Alle mål er taget med den respektive størrelse i standardformat. Standard stel og 16" hjul.

Armlæn


Mål armlæn fra ryg	Størrelse 1	Størrelse 2
Mål armlænsplader (AxB)	33,0 x 7,5 cm	33,0 x 7,5 cm
Bredde mellem armlæn (C)	21,5-31,5 cm	30-53 cm
Højde fra sædeplade (D)	19-30 cm	24-35 cm
Afstand rygør til plade (E)	5-13 cm	7-15 cm

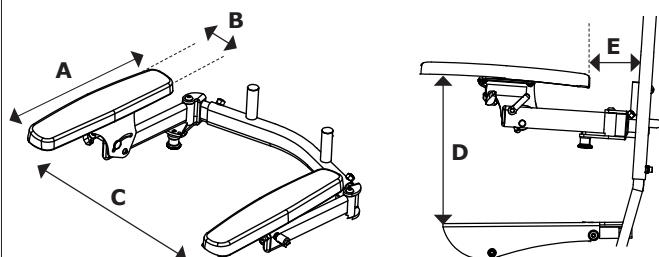

FODSTØTTE

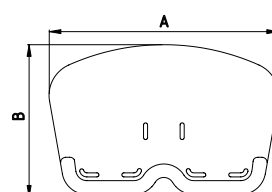

	A x B
Hel str. 2	345 x 225 mm
Hel str. 3	380 x 260 mm
Hel str. 4	380 x 310 mm
Hel str. 5	420 x 310 mm

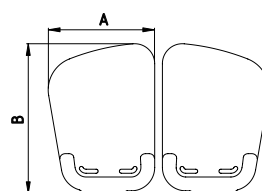

	A x B
Delt str. 2	160 x 220 mm
Delt str. 3	180 x 255 mm
Delt str. 4	175 x 305 mm

Størrelse 2-4
Fodstøttestang profilængde (cm) 35

Tilpasning og specialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang produktet ændres på nogen måde, skal der foretages en vurdering af, om det er en tilpasning eller en specialtilpasning.

En tilpasning er en ændring, der foretages inden for rammerne af produktets CE-mærkning. Alt andet er specialtilpasning. Justeringer må kun foretages af den person, der anses for kvalificeret til opgaven, og skal altid udføres på en professionel måde.

Tilladte tilpasninger inden for rammerne af CE -mærkning

Længden af fodstøtteprofilen kan forkortes, så den passer bedre til brugeren.

Hul i siddepladen skal lægges til montering. Dog skal følgende kriterier følges:

- Ikke flere end 4 huller
- Hul må ikke være større end 6,5 mm
- Hul må ikke være mindre end 15 mm fra nærmeste hul og spor
- Hul må ikke være mindre end 15 mm fra kant på plade

Risikoanalyse


Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering, både ved tilpasning og ved specialtilpasning af et hjælpemiddel. Produktet må aldrig være farligt for brugeren eller personer i nærheden, som skal bruge produktet efter tilpasning.

Mærkning

Produktet skal forsynes med en angivelse af, at det er tilpasset en bestemt bruger, så det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

Monterings- og justeringsanvisninger

Montering skal altid udføres af kvalificerede fagfolk (evt. teknikere på Hjælpemiddeldepot eller tilsvarende). Instruer brugeren og / eller andre personer i brugerens nærmiljøet om produktets funktioner, så hjælpemidlet kan bruges på en sikker måde.

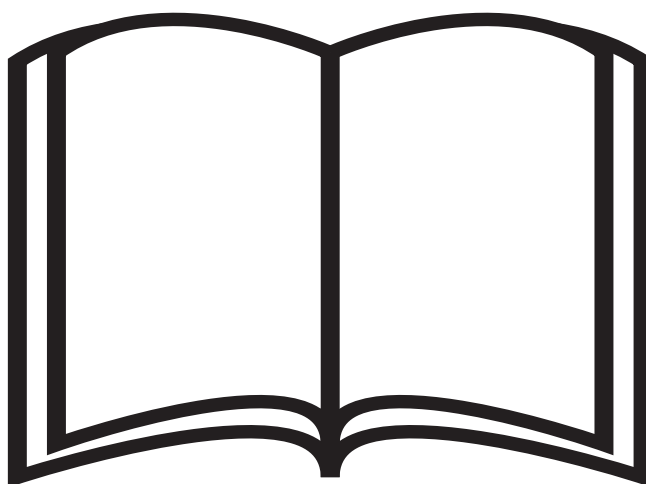

Svinghjul

Montering af svinghjul på kørestolsramme

Sæt profilmøtrikken (A) ind i det tilsigtede hul på undersiden af kørestolsrammen i svinghjulets friløb som vist. Monter derefter svinghjulet ved hjælp af skrue (B), skive (C) og excentrisk møtrik (D) og spænd.

Montering af svinghjul på svinghjulsgaffel

Vælg mellem fire (4) forskellige svinghjulsplaceringer og monter derefter svinghjulet (F) ved hjælp af den medfølgende hjulaksel (G), skive (H) og låsemøtrik (I) i den ønskede monteringshul på svinghjulsgaflen (K).


Flyt svinghjulet (F) op i svinghjulsgaflen (K) som vist på billedet. Sæt en skive på hjulakslen (G) og stik den derefter gennem det ønskede hul på svinghjulsgaflen. Mød derefter på den modsatte side med skive (H) og låsemøtrik (I). Spænd møtrikken. Afslut derefter med at montere møtrikhætterne (J) over låsemøtrikkerne.

Svinghjulsplaceringar

Svinghjulet kan placeres i fire (4) forskellige højdepositioner. Dette gør at du kan justere svinghjulets højde efter valg af drivhjulsplacering.



Husk at spænde skruerne ordentligt efter justering af svinghjulets placering.

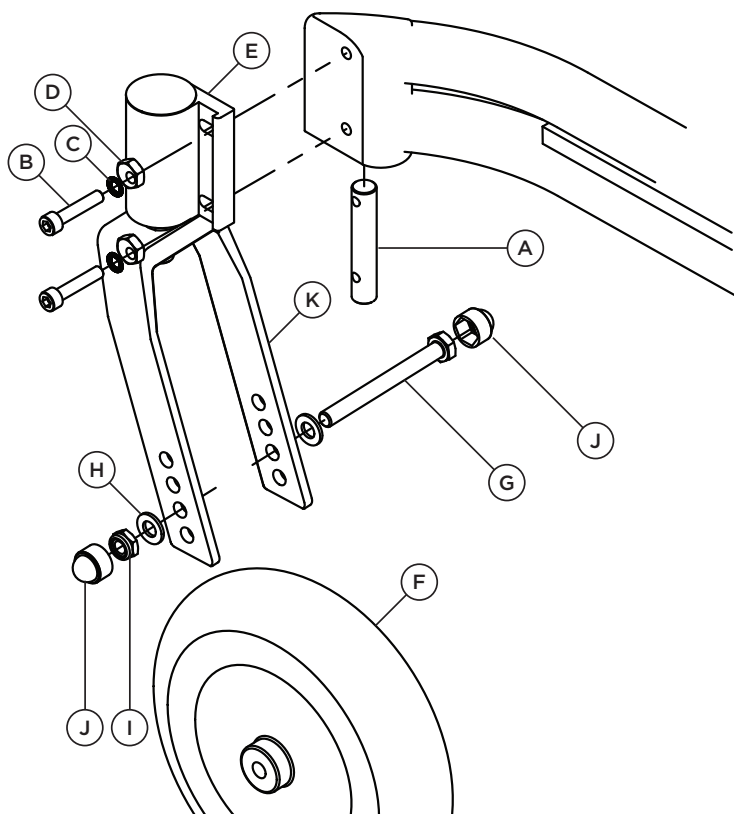

Indjustering af svinghjulsgaffel

Hvis kørestolen ikke ruller, som den skal, skal du muligvis justere svinghjulsgaflen (A). Dette kan ske, hvis du har justeret svinghjulets position uden at justere ind svinghjulsgaflen (A).


Det stiplede område på billedet viser, at positionen af svinghjulsbeslaget (B) skal være 90° i forhold til jordoverfladen.

Vinkeljustering af svinghjulsgaffel

For at vinkeljustere svinghjulsgaffeln løsner du og roterer de excentriske møtrikkerne (C) på svinghjulsbeslaget (B), indtil den korrekte vinkel er opnået. Sørg for at spænde møtrikkerne, når justering af svinghjulsgaflen er opnået.



Husk at spænde møtrikkerne ordentligt efter justering af svinghjulsgaflen.

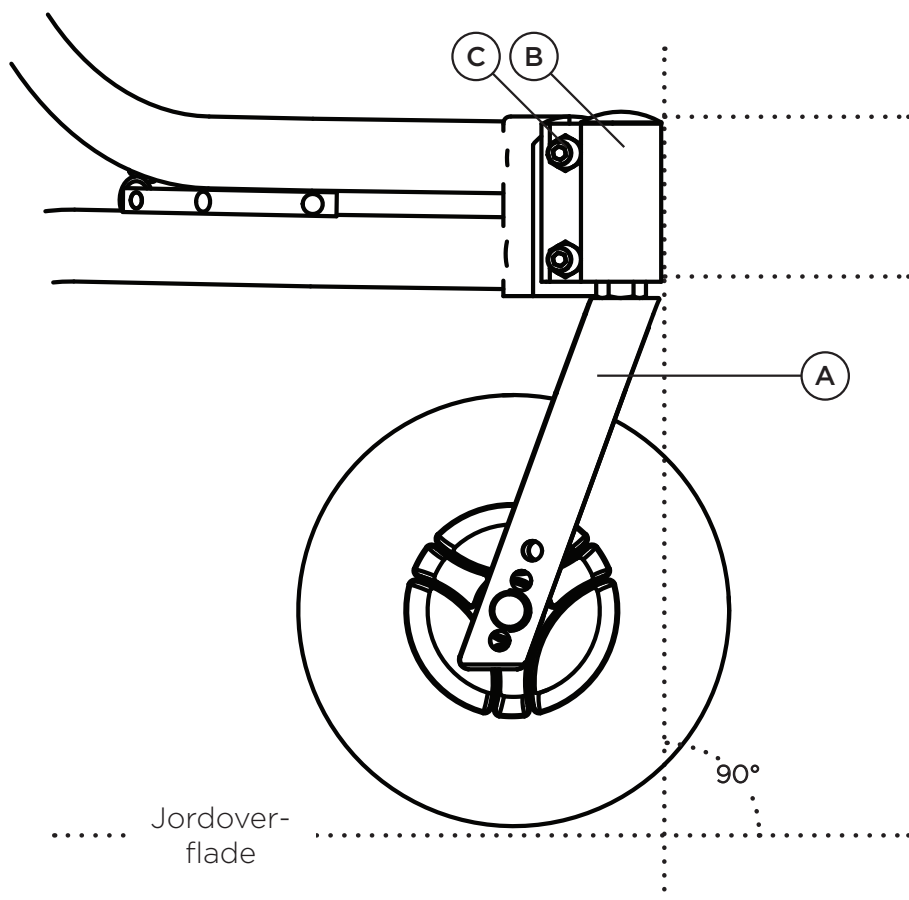

Retningsholder

Montering af retningsholder

Monter retningsholderen på svinghjulsbeslaget ved hjælp af det medfølgende monteringsudstyr.

Start med at fjerne lejehusetsbeslaget (A) fra kørestolsrammens svinghjulsbøsning (B) ved at skrue skrue (C) af. Løft derefter endehætten (D) af toppen af svinghjulsbeslaget (A), og skru centerbolten (E) ud.

Herefter monteres styreholderbeslagene (F) mellem svinghjulsbeslaget (A) og kørestolsstellets svinghjulsudskæring (B) og mellem svinghjulsbeslaget (A) og svinghjulsgaflen (G) med monteringsdetaljer som beskrevet på billedet.


Når samlingen af retningsholderen er afsluttet, samles svinghjulet på kørestolsrammen igen. Finjuster derefter svinghjulets kørselsretning ved let at justere skruen (J).

Aktivering af retningsholder

For at aktivere retningsholderen træk låsebolten (H) lige op og drej den derefter 90° og slip låsen ned i hullet på den bevægelige del. Sørg for, at kørselsretningen er låst.

Frigøring af retningsholder

For at frigøre retningsholderen træk låsebolten (H) lige, så låsen trækkes ud af hullet på den bevægelige del. Drej derefter låsen 90° og slip den forsigtigt ned.

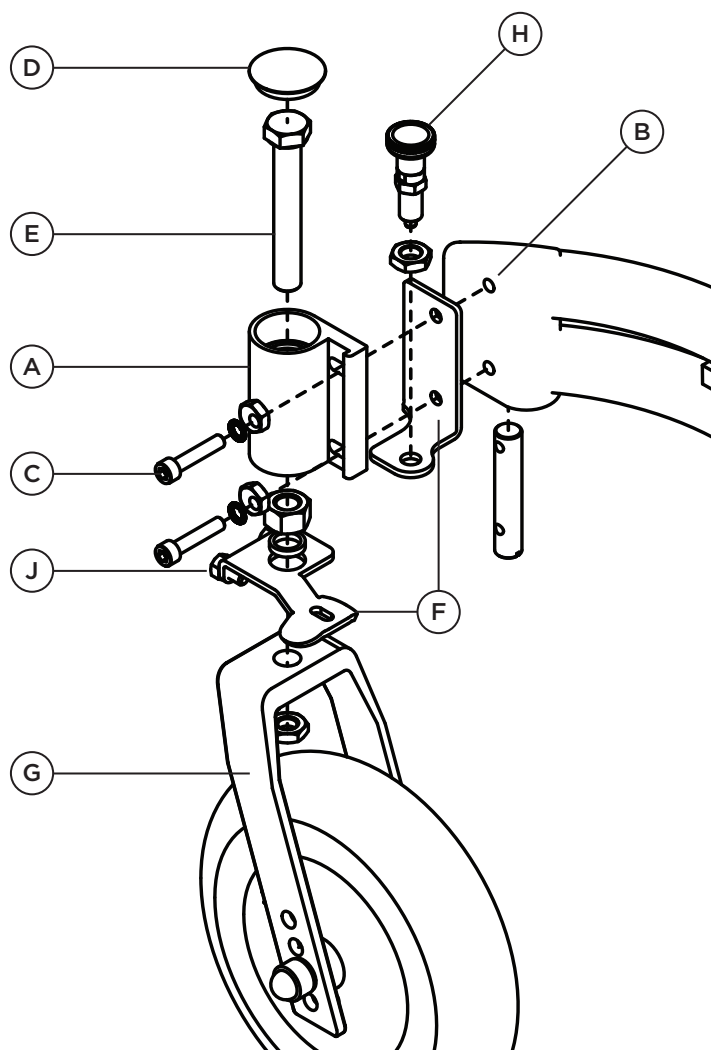

Hjul

Montering af drivhjul med quick-release

Drivhjulene kan nemt monteres af og på gennem dens quick-release funktion. Dette kan være nyttigt ved f.eks. transport af kørestolsstellet.

For at montere drivhjulene (A) skal du holde trykknappen (B) nede, som er centreret i nafet på quick-release-akslen og skubber drivhjulet (A) ind, indtil det stopper. Nu kan du slippe trykknappen (B). Sørg for, at drivhjulet er i låst position ved forsigtigt at trække i drivhjulet uden at holde trykknappen (B).





Sørg for, at hjulene er i låst position efter brug af quick-release-funktionen.

Demontering af drivhjul med quick-release

For at fjerne drivhjulene fra kørestolsrammen skal du holde trykknappen (B) nede, som er centreret i nafet og så trækker hjulet ud.

Ved udskiftning af tromlebremsen eller quick-release akslen kan det være nødvendigt at justere akslen, så den låser korrekt.

For at justere akslen skal du justere møtrikken (C) ind eller ud på akslen. Den skal justeres, så de 2 låsekugler (D) kommer lige uden for lejet. Sørg for, at den er låst ved at kontrollere, at låsestiften (E) er trukket tilbage.

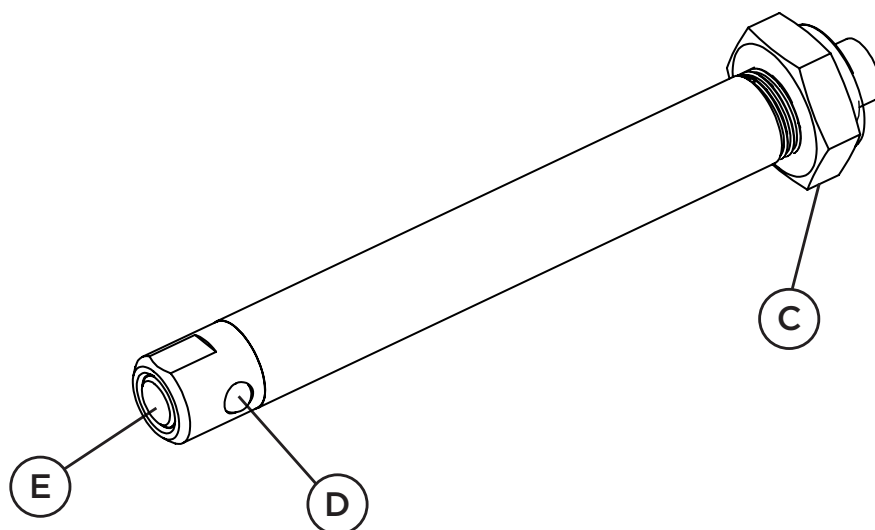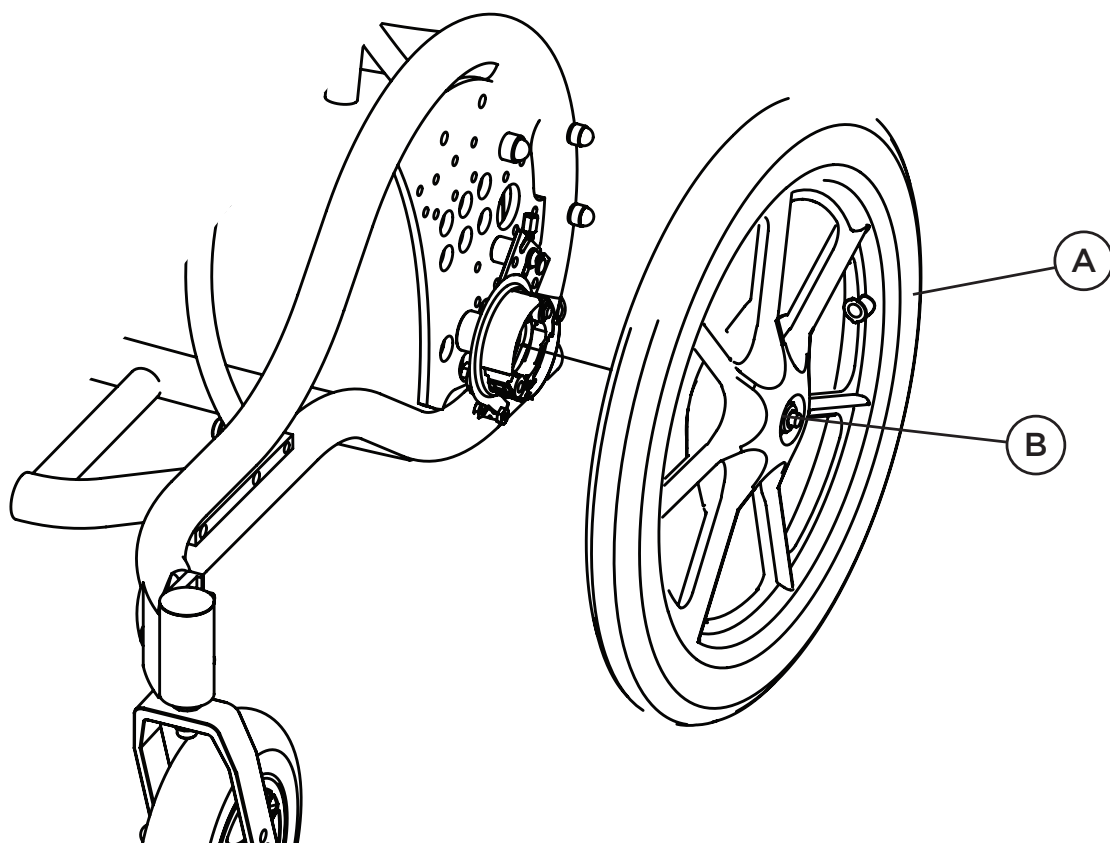

Drivhjulsplacering

Drivhjulsplaceringer

For at opnå det korrekte tyngdepunkt kan drivhjulet placeres i forskellige positioner afhængigt af siddesystemets placering på kørestolsstellets siddeplade. Der er forskellige antal tilstande, afhængigt af valget af hjulstørrelse, at vælge imellem.

Der er også flere forskellige muligheder at vælge imellem for samme hjulstørrelse. Kontakt os gerne for råd og tips om drivhjulsplacering, hvis du føler dig usikker.

Eksempel med Seabass med 24" drivhjul


Når du har tre (3) forskellige drivhjulsplaceringer at vælge imellem. Vælg den position, der er mest egnet i betragtning af sædesystemets placering på kørestolsstellet.




Husk, at ændring af drivhjulets placering kan øge risikoen for at vælte. Det kan også være nødvendigt at justere svinghjulets placering efter justering af drivhjulets placering.




Ved ændring af drivhjulets placering kan det også være nødvendigt at justere parkeringsbremsen lidt. Se afsnittet Parkeringsbremse for yderligere information.

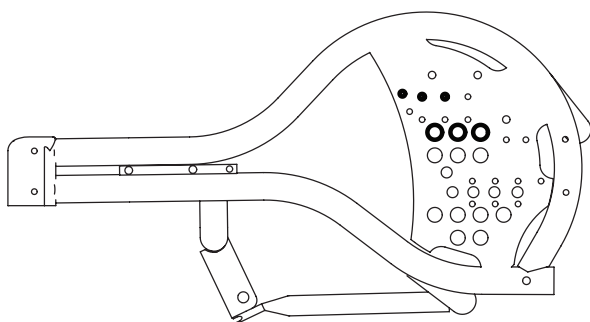


Drivhjulsplacering 24"

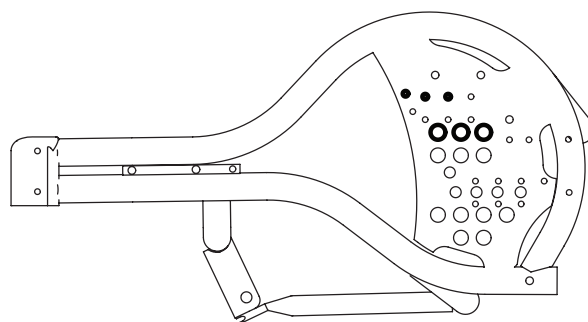


Drivhjulsplacering 22"

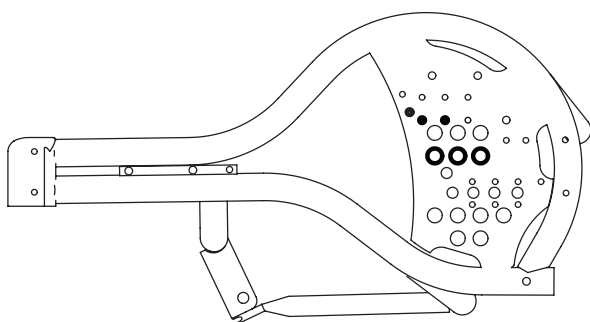


Drivhjulsplacering 20"

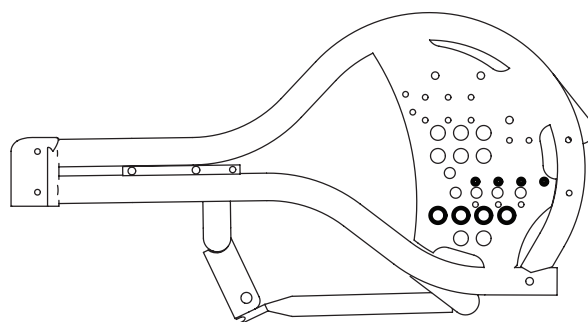


Drivhjulsplacering 16"

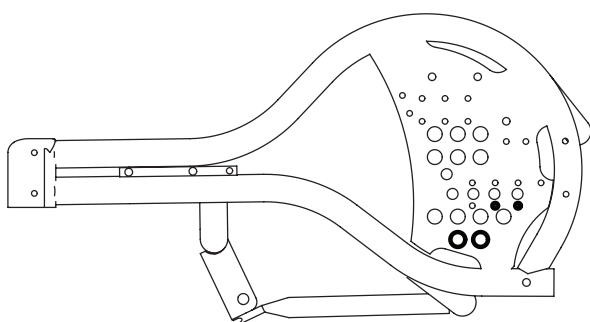

Drivhjulsplacering 12"

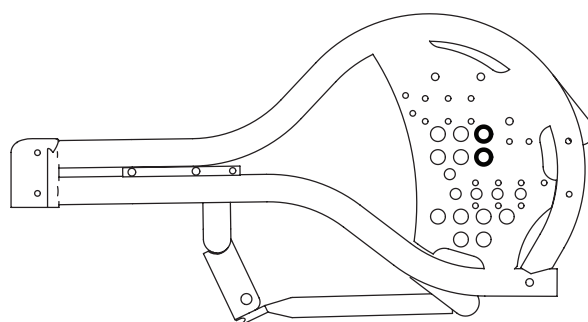

E-drive 20"

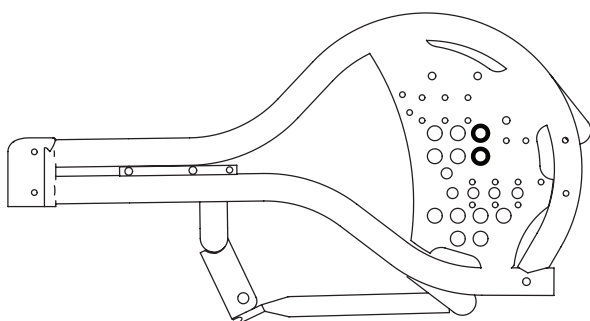

E-drive 16"

E-drive

E-drive sammen med Seabass G2

E-drive er en el-pakke som gør Seabass G2 el-manøvreret. E-drive findes som tilvalg til Seabass G2 med 16" samt 20" drivhjulstørrelse.

Montering af e-drive


E-drive erstatter eksisterende drivhjul og monteres iht. billedbeskrivelsen, i det tilsigtede hulmønster på sidestykket af kørestolsstellet med afstandsstykke, skive, skrue, møtrik og nafbøsning. Håndbetjeningen er monteret med de medfølgende detaljer på kørestangens kørehåndtag.



For mere detaljeret information om e-drive, henviser vi til separat monteringsanvisning "E-drive til Seabass G2 MED3058".

At bruge e-drive

E-drive gør Seabass G2 til en elektrisk betjent kørestol og betjenes ved hjælp af en håndbetjening.

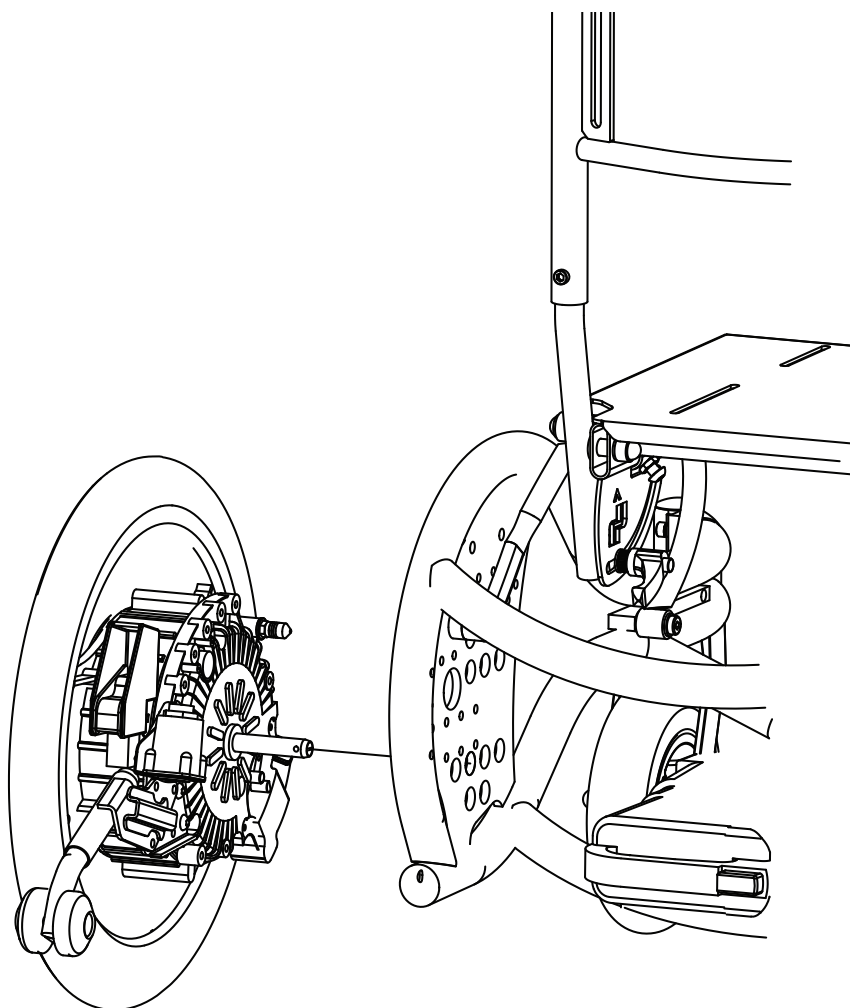

Bremse

Brug af tromlebremse

Kørestolsstellet er udstyret med tromlebremser, som manøvreres af hjælperen. Kontroller altid at bremsearmene fungerer inden brug.

Tryk højre bremsehåndtag ind (A) samtidigt med at du føre kørestolsstellet fremad. Baghjulet skal da bremse og ikke rulle. Bremsehåndtaget (A) skal ikke kunne skubbes helt ind mod kørehåndtaget, men der skal være et mellemrum på 5-10 mm.

Gentag derefter ovenstående procedure med det venstre bremsehåndtag.

Låsning af hjul

For at aktivere hjullåsning skal du trykke på bremsehåndtaget (A) og skubbe det røde låsehåndtag (B) frem til den ønskede position.



Frigøring af hjul

For at udløse hjullåsen skal du trykke på bremsegrebet (A) og det røde låsegrebet (B) udløses automatisk. Slip derefter bremsegrebet (A).

Fejlsøgning af tromlebremse

Hvis bremserne ikke virker, skal du først kontrollere, at bremsekablet har korrekt spænding. Hvis wiren har løst spænding, kan det være nok at spænde den igen ved at skrue skruen (C) af. Hvis justeringsskruen (C) ikke er nok, kan du prøve nedenstående hurtigguide til efterspænding af bremsekablet.

1. Spænd skruen (C) i nederste position
2. Løsen møtrik (D)
3. Komprimer bremsen ved at løfte tromlebremsearmen (E) og flytte møtrikken (D) lidt længere op ad kablet
4. Lås møtrik (D) og finjustere herefter med skruen (C)

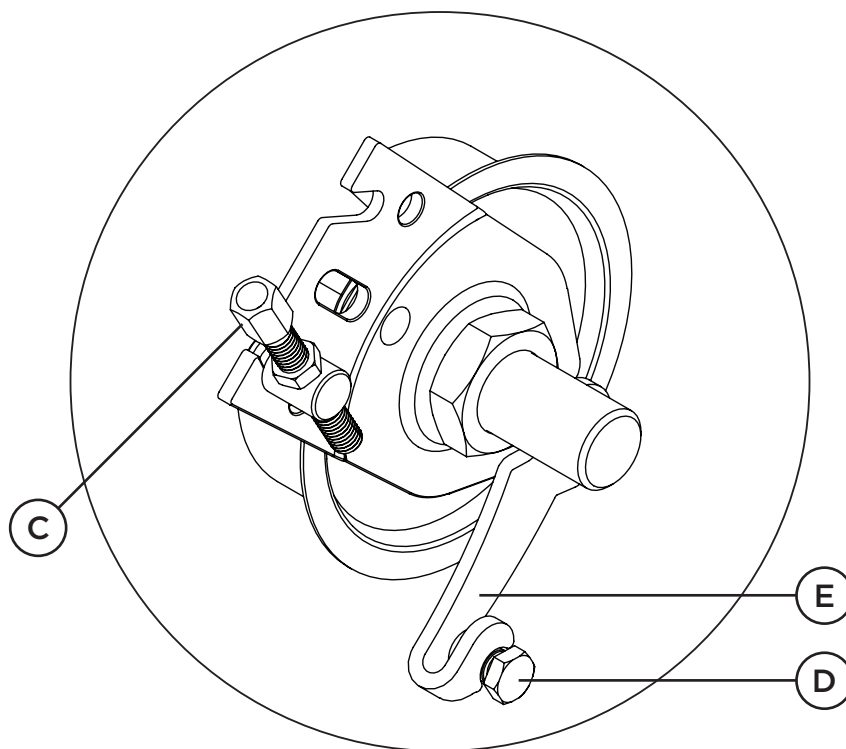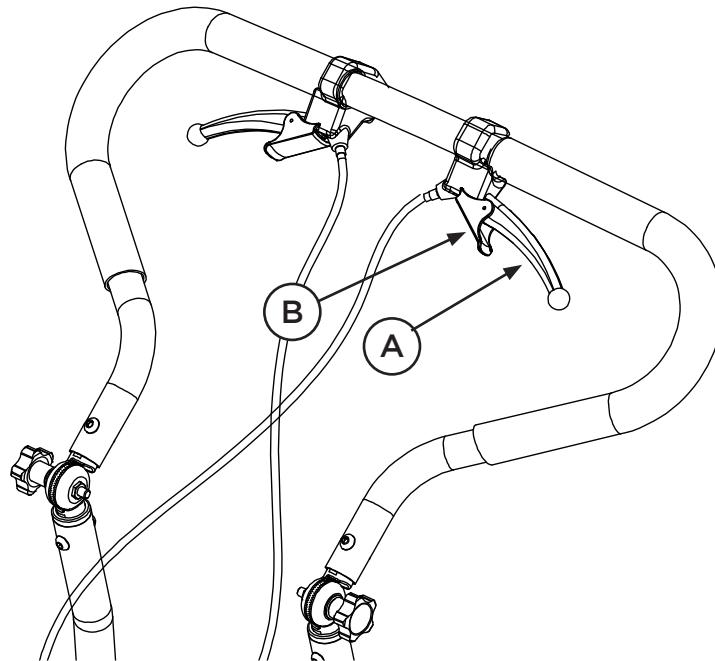

Detaljvy tromlebremse

Montering af tromlebremse

For at montere tromlebremsen skal du afmontere drivhjulet fra kørestolen ved at trykke på knappen på quick-release akslen og trække hjul og aksel ud af tromlebremsen.

Monter derefter tromlebremsen på kørestolsstellet ved at skrue den store afstandsstykke (D) over gevindet på tromlebremsen, og før derefter tråden gennem det tilsigtede hul i den ønskede position. Fastgør med den store møtrik (H) på indersiden af sideplade af rammen og stram let. Det er vigtigt, at du ikke strammer helt.

Tag derefter skruen (C) og indfør den gennem rotationslåsehullet i bremsetromlen (A), ind gennem den lille afstandsholder (E) og gennem huller i rammesiden. Se afsnit med Drivhjulsplacering med sidepladebilleder for mulige placeringer af drivhjul og bremsetromle.

Fastgør med skive (F) og møtrik (G) på indersiden af rammens sideplade. Spænd begge møtrikker (H) og (G), så bremsetromlen er sikkert fastgjort. Bremsetromlens rotationslås skal pege diagonalt bagud/opad i 12/16" og skrå fremad/opad i 20-24".

Sæt derefter quick-release-akslen tilbage med hjulet og skub ind, indtil hjulet går i indgreb. Test ved at trække hjulet lidt udad (uden at trykke på quick-release-knappen).




Bremsetromlens rotationslås skal pege skråt bagud/opad i 12/16" og skråt fremad/opad i 20-24".



Se afsnittet Quick release for yderligere information om, hvordan du bruger funktionen.



Tromlebremses monteringsprincip er det samme uanset hjulstørrelse.

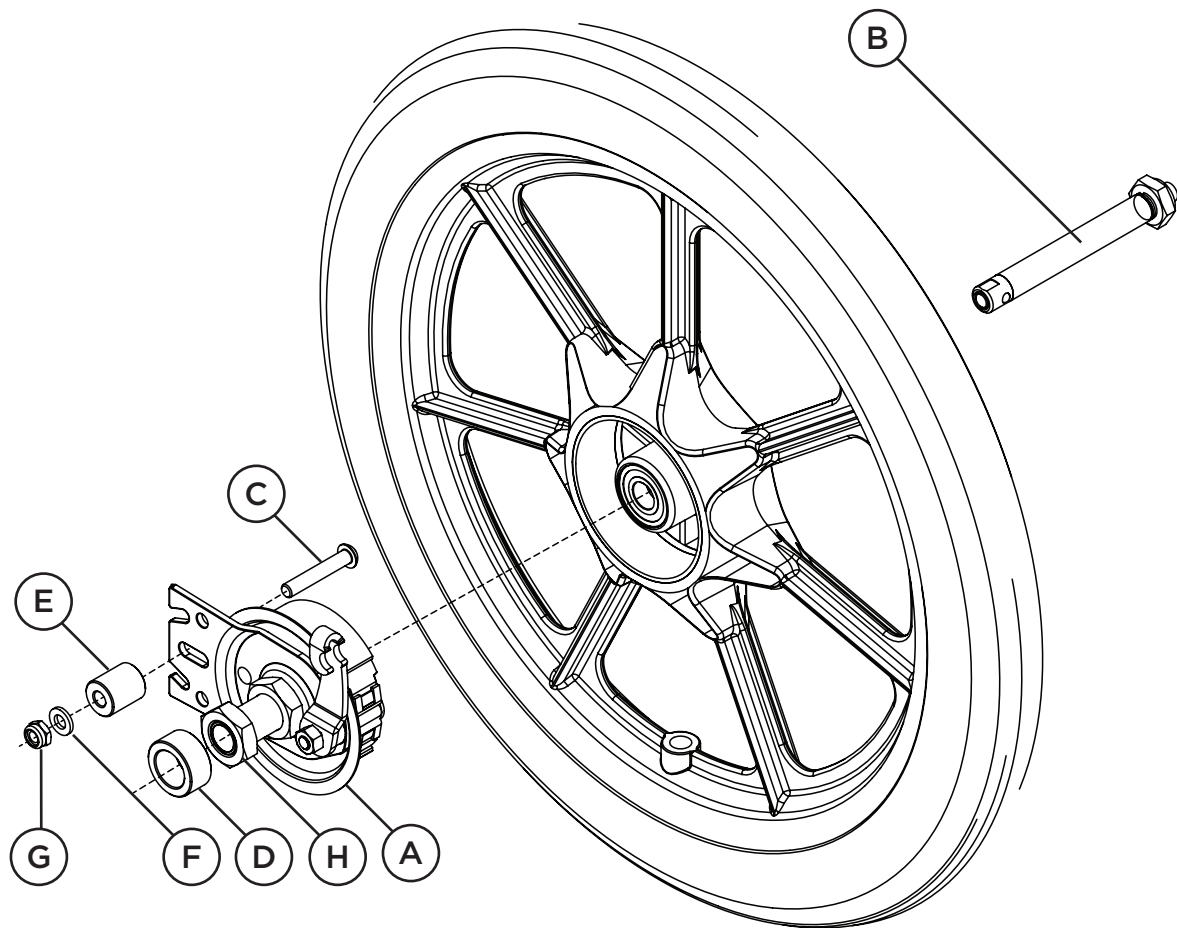

Parkeringsbremse 12-16"

Montering af parkeringsbremse til 12-16"

Parkeringsbremsebeslaget monteres som på billedet iberegnet hulmønster på sidestykket af kørestolsstellet med den medfølgende skruer (A), distancestykker (B) og møtrikker (C).

Indjuster parkeringsbremsen (D) ved behov ved at løsne skruen (E) og herefter flytte parkeringsbremsen (D) fremad eller bagud i sporet.


Spænd herefter skruen (E) når ønskede position er opnået.

Brug af parkeringsbremse

Lås parkeringsbremsen (D) ved at trykke parkeringsbremsearmen fremad.

For at få bedste montering på dækkets overflade ved brug af parkeringsbremsen anbefaler vi at mellemrummet mellem dæk og parkeringsbremsepind (F) skal være 20 mm når parkeringsbremsen er i hvileleje.

Træk parkeringsbremsearmen bagud for at frigøre parkeringsbremsen.

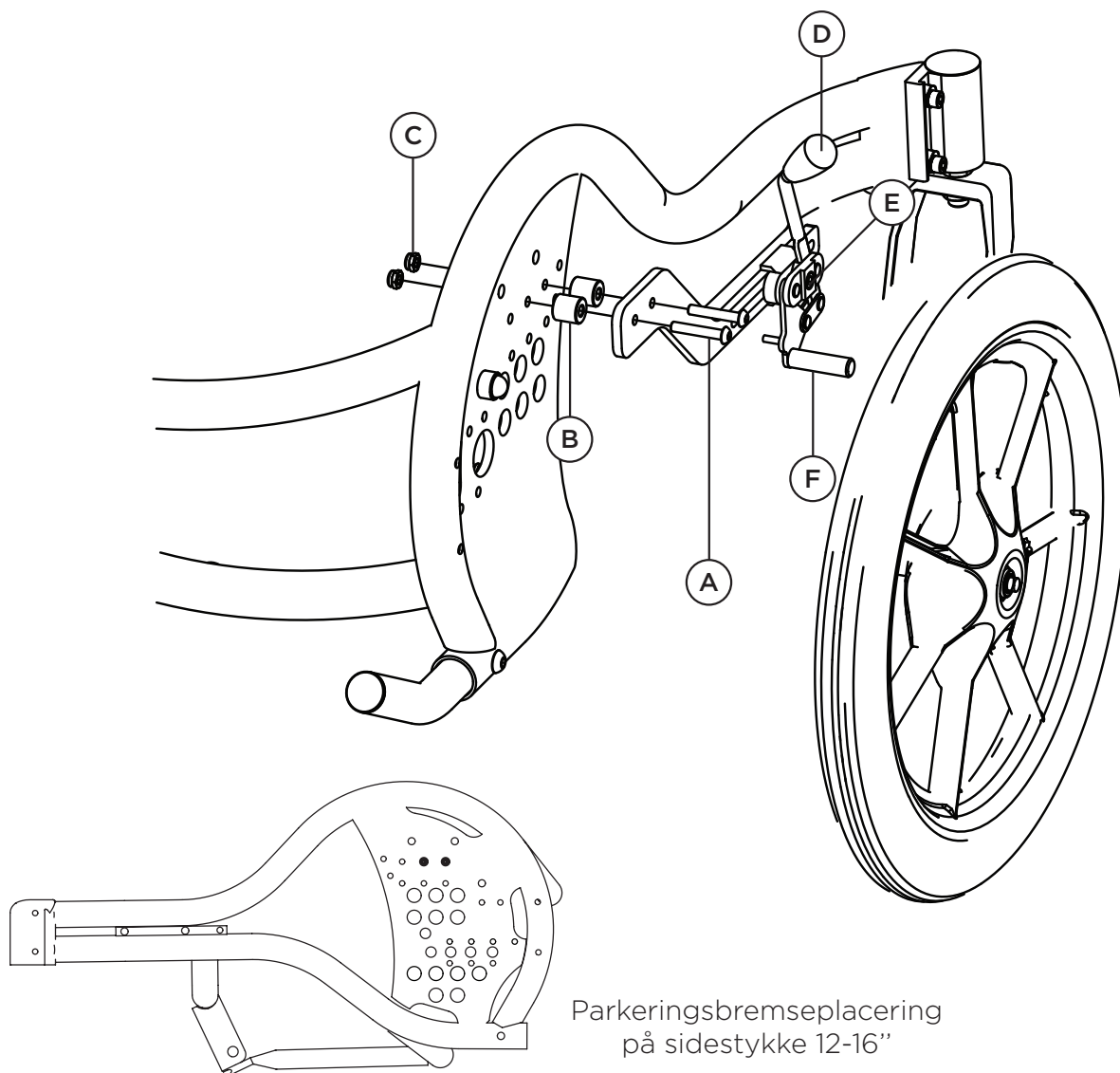

Parkeringsbremseplacering
på sidestykke 12-16"

Parkeringsbremse 20-24"

Montering af parkeringsbremse til 20-24"

Parkeringsbremsebeslaget monteres i henhold til billedet i de anviste huller på kørestolsstellets fastgørelse for det forreste transportbeslag (A) med de tilhørende skruer (B), spændeskiver (C), møtrikker (D) og møtrikdæksler (E). Ved brug af parkeringsbremsen sammen med transportbeslaget (A), udskiftes skruerne til parkeringsbremsen med transportbeslaget.

Juster om nødvendigt parkeringsbremsen (F) ved at løsne skruerne (G) på rørklemmen (H) og derefter flytte parkeringsbremsehåndtaget (F) frem eller tilbage. Spænd derefter skruerne (G), når den ønskede position er opnået.





Sørg for, at parkeringsbremsen ikke vipper sidelæns efter justering.

At bruge parkeringsbremse

Lås parkeringsbremsen (F) ved at trykke parkeringsbremsearmen fremad. For at få den bedste montering på dækkets overflade ved brug af parkeringsbremsen, anbefaler vi, at afstanden mellem dækket og parkeringsbremsebolten (I) skal være 20 mm, når parkeringsbremsen er i hvileposition. Træk parkeringsbremsehåndtaget bagud for at udløse parkeringsbremsen.



Ved brug af transportbeslaget sammen med parkeringsbremsen anvendes der ingen spændeskiver. For mere information, se afsnittet Transportbeslag.

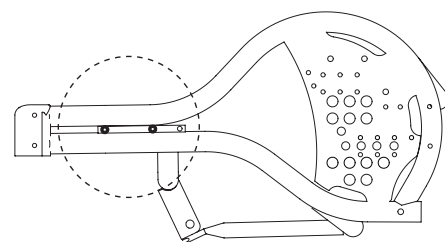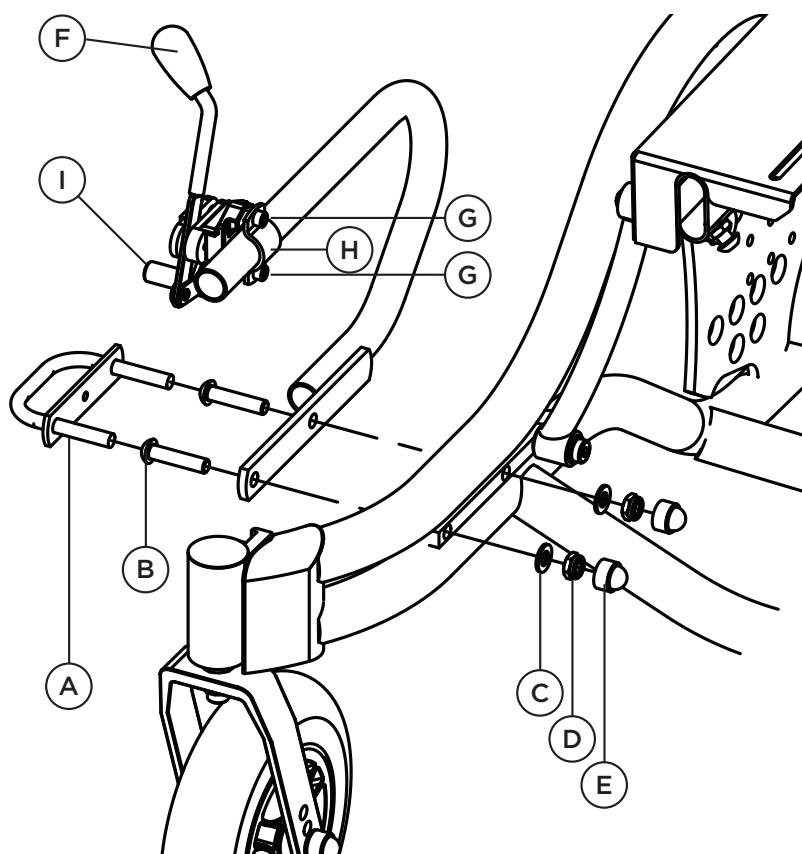

Parkeringsbremseplacering på sidestykke 20-24"




Sædetilt

Sædetiltning

Seabass har to forskellige positioner for tilt, som indstilles ved hjælp af huller ved den nederste gaspatronfastgørelse. Hvis gaspatronen er fastgjort til hullet i bunden (som på billede 1), opnås en hældning på 0-35°. Hvis gaspatronen er fastgjort til hullet ovenfor, opnås en hældning på -7-28°.

For at tilte kørestolsstellet skal du trykke på knappen (A), mens du holder styret med den ene hånd og skubbe nedad/fremad. Slip derefter knappen (A), når du har nået den ønskede hældning.

For at returnere sædevinklen til den oprindelige position, tryk på knappen (A) og træk kørebøjlen opad og bagud ved at holde i kørebøjles/kørehåndtagsens håndtag.

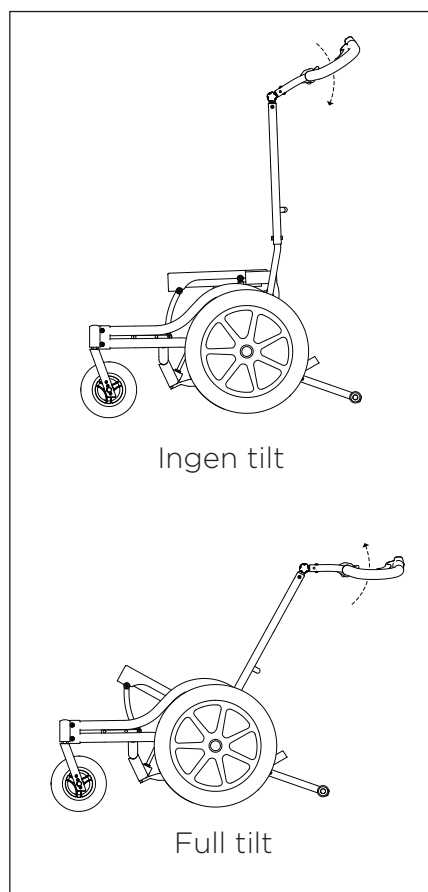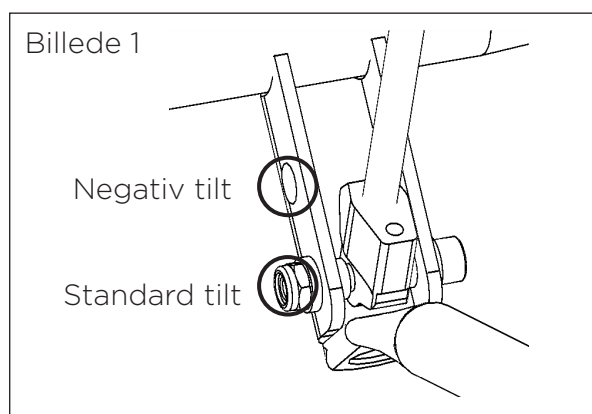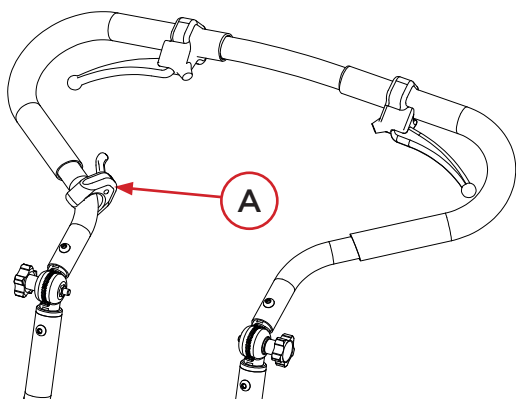

Ved tiltning af kørestolsstellet skubbes tyngdepunktet nedad/fremad, hvilket betyder en reduceret vælterisiko.



Vær opmærksom på den mulige afklemningsrisiko, når sædet tiltes.

Fodstøtte - Pro

Montering af fodstøtte

Uanset fodstøttens version udføres monteringen på samme måde.

Indsæt fodstøtten (A) i de tilsigtede huller under sædedelspladens forreste del af kørestolsstellet og stram derefter skruerne (B) på begge sider.



OBS! Du skal fjerne endedækslet fra fodstøtten på den forreste del af kørestolens siddeplade, før du monterer fodstøtten.

Sikkerhedsstop

Sikkerhedsstop (C) findes i form af en profilmøtrik som er monteret i bunden af fodstøttesprofilen inden endeaflutningen. Sikkerhedsstopet (C) kan også bruges til at finde tilbage til en førindstilt højdeposition.




Tips! Monter et ekstra sikkerhedsstop over fodstøtten i rillen på fodstøtteprofilen

Justering af vinkel ved knæleddet

Når fodstøtten er monteret i sædepladen, er det muligt at vinkeljustere fodstøtten ved knæleddet. Løsn håndtaget (D) lidt og juster til den ønskede vinkel. Spænd derefter håndtaget.

Justering af fodstøttens højde

Når fodstøtten er monteret i sædepladen, er det muligt at justere højden fodstøtten ved anklen. Løsn håndtaget (E) lidt og juster til den ønskede højde. Spænd derefter håndtaget.

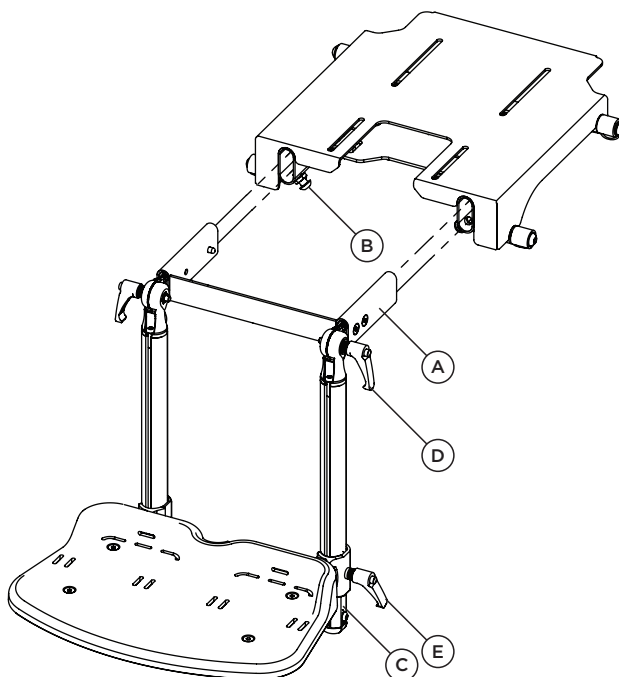

Fodstøtte - G2

Montering af fodstøtte

For at montere de to beslag til fodstøtten bruges de medfølgende skruer (C). Beslagene monteres iht. billedet med fire skruer/beslag i forkanten af sædepladen. Bemærk at låseskruerne (B) skal pege indad/nedad. Monter det firkantede rør (A) af fodstøtten i fodstøttebeslagene under den forreste del af sædepladen. Fastgør fodstøtten med låseskruerne (B) på begge sider.

Sikkerhedsstop

Sikkerhedsstop (D) i form af en kantskinne monteres i bunden af fodstøtteprofilen. Sikkerhedsstoppet kan også bruges til at vende tilbage til en forudindstillet højdeposition.





Monter et ekstra sikkerhedsstop over fodstøtten i fodstøtteprofilens rille for nemt at finde tilbage til en alternativ højdeposition (f.eks. med eller uden sko).

Justering af vinkel ved knæledet

Når fodstøtten er monteret i sædepladen, er det muligt at justere vinklen på fodstøtten ved knæleddet. Løsn vingeskruen (E) lidt og juster til den ønskede vinkel. Spænd derefter vingeskruen.

Justering af fodstøttens højde

Når fodstøtten er monteret i sædedelpladen, er det muligt at justere fodstøttens højde ved ankelleddet. Løsn knappen (F) lidt og juster til den ønskede højde. Spænd derefter knappen.

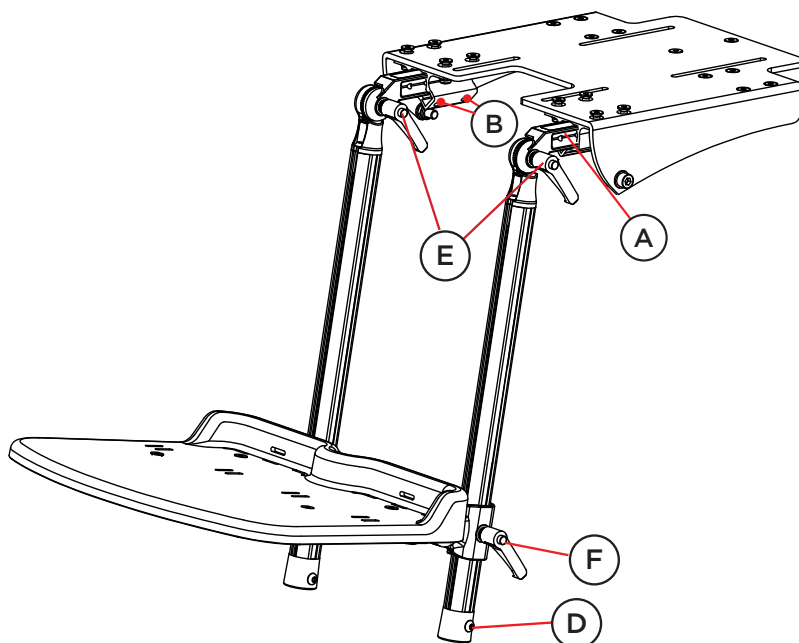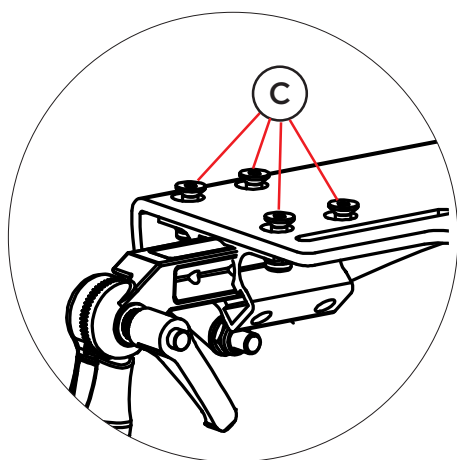

Fodstøttesbeslag

Fast fodstøttesbeslag (1)

For at højdejustere fodstøtten Løsner du spakvredet (A) något for at justere till ønskede højde. Spænd herefter åt spakvredet.

Fjedrende fodstøttesadapter (2)

For at justere fodstøtten i højden, løsnes skruen (D) og eventuelt skruen (E) lidt for derefter at justere til den ønskede højde. Spænd skruen (D). Vælg længden af fjedervandringen ved at justere skruen (E) til den ønskede position og stramme den.



Fjederens modstand kan justeres med en skruestrækker ved at dreje skruen i fjederpakken (F).










Opklappeligt fodstøttesbeslag (3)

For at justere fodstøttens højde skal du løsne håndtaget (A) lidt for at justere til den ønskede højde. Spænd derefter håndtaget. At bruge den sammenklappelige funktion, løft fodstøttepladen foran.

Kugleledsadapter (4)

For at justere fodstøttens højde skal du løsne håndtaget (A) lidt for at justere til den ønskede højde. Spænd derefter håndtaget.

For at bruge kugleledsfunktionen skal du først løsne skruerne (B) og (C) og justeres til den ønskede position. Spænd derefter skruerne (B) og sikkerhedslåsen position med skruen (C).

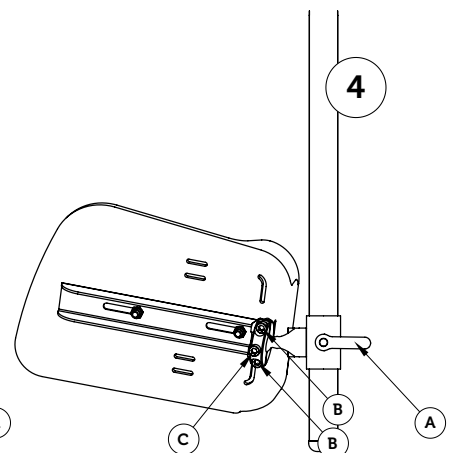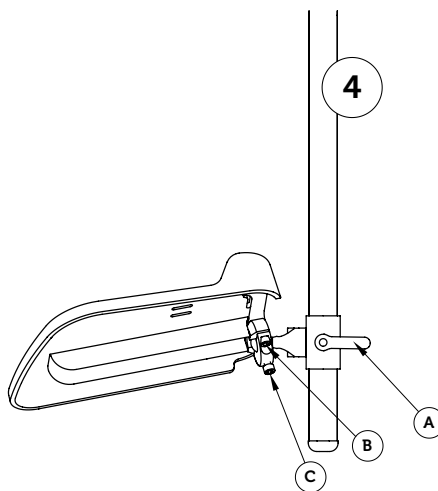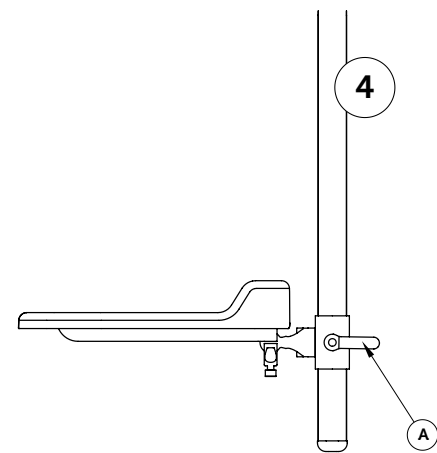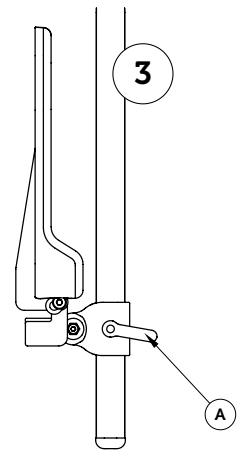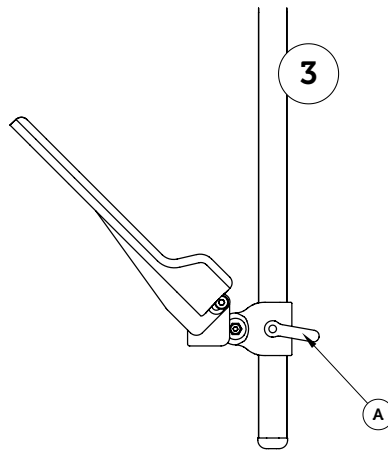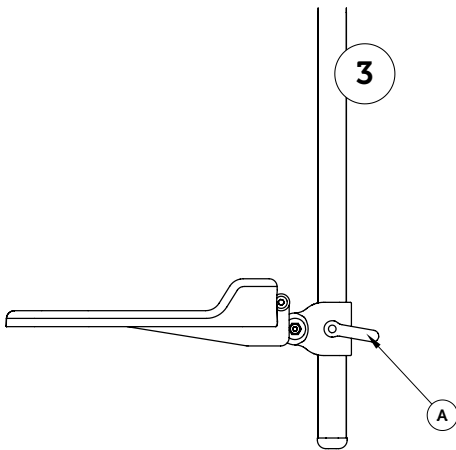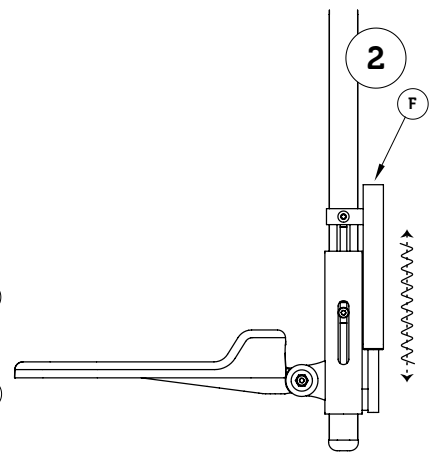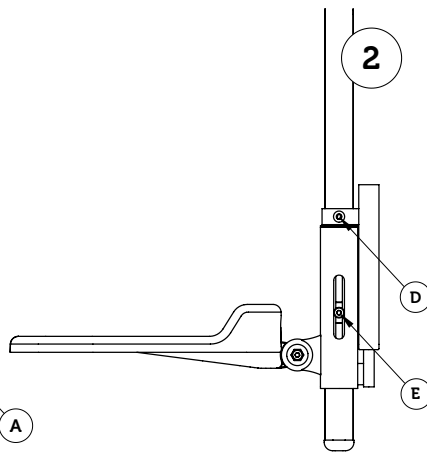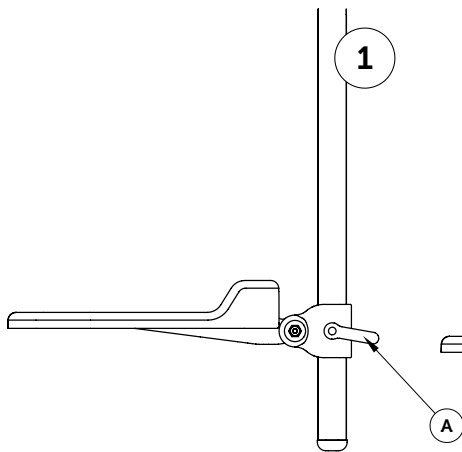


Fodkasse

Montering af fodkasse

for at montere fodkassen starter du med at trykke flangestiften (A) ind på fodkassen (B) i fodstøttebøjlen (C). Indstil derefter fodstøtten (D) til den ønskede højde og stram håndtaget (E).

Indstil den ønskede højde og bredde på fodboksen ved hjælp af skruerne (F) og (G). Plastikstangen (H) på fodkassen skal sættes ind gennem rillen (I) på fodstøttepladen. Afslut med at montere den medfølgende polstring og tjek at alt skruerne er ordentligt spændt.

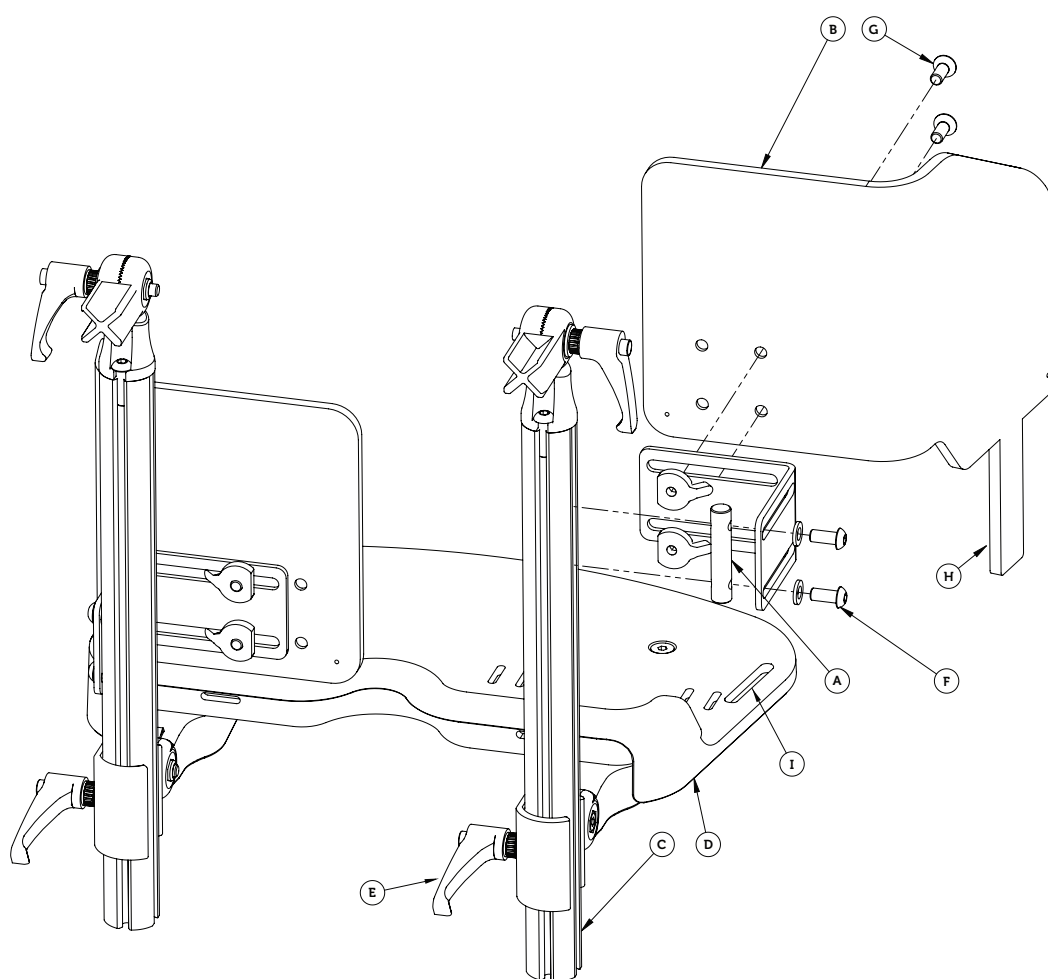

Plaststangen (H) kan skæres til efter justering til den ønskede højde eller kan opvarmes under fodstøttepladen efter dine ønsker.

Lægstøtte

Montering af lægstøtte

Før montering af lægstøtten kan udføres, skal du først fjerne eventuel fodstøtte. Start med at fjerne endedækslet (G) og løsner derefter håndtaget (F), der holder fodstøtten på plads på fodstøttestaget. Spænd derefter fodstøttepladen og dens beslag nedad.


Monter lægstøtten ved at skubbe profilskruen (C) ind i fodstøtten, juster til den ønskede højde og spænd skruerne (E). Genmonter derefter fodstøtten og endehætten (G) igen.

Højdejustering af lægstøtte

For at højdejustere lægstøtten løsner du skruerne (E) noget og justere herefter til ønskede højde. Spænd herefter skruerne (E).

Breddejustering af lægstøtte

For at breddjustere lægstøtten løsner du skruerne (A) noget for herefter at justere til ønskede bredde. Spænd herefter skruerne (A).

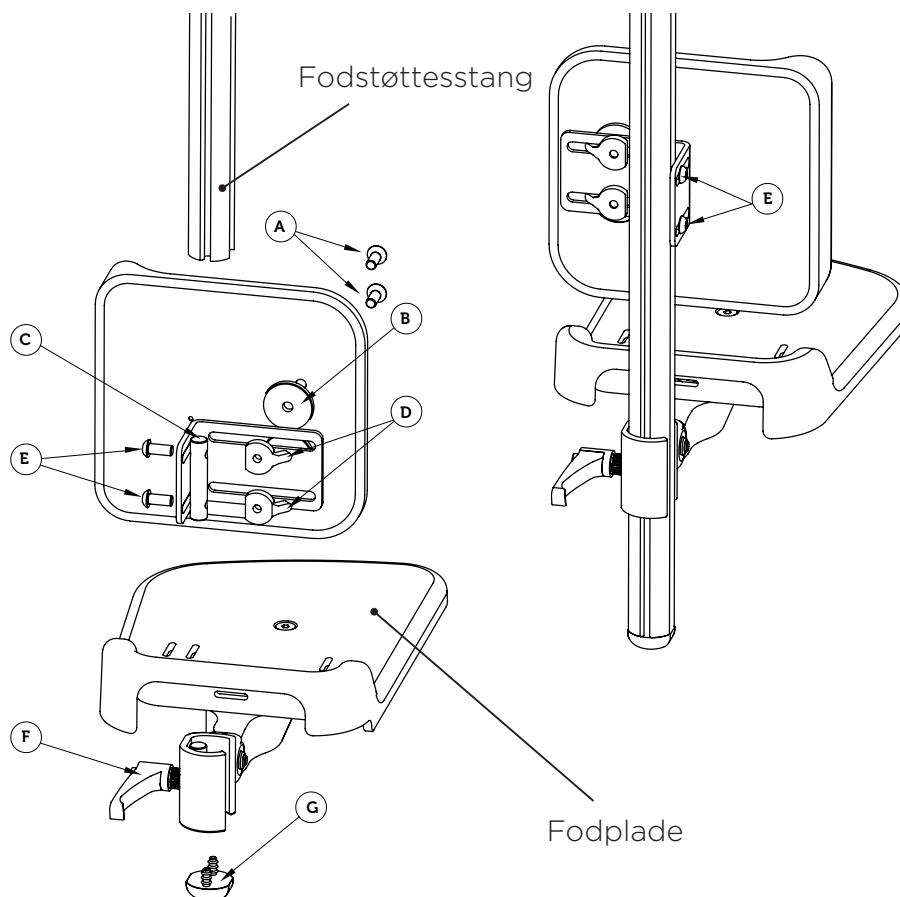

Kørehåndtag - Pro

Montering af kørehåndtag

Ved montering af kørehåndtaget skal du først montere kørehåndtagsbeslaget (A). Indsæt kørebøjlebeslagets fastgørelse (A) i de tilsigtede huller (B) under den bagerste del af sædedelpladen på kørestolsstellet, og stram derefter skruerne (C).

Placer derefter kørehåndtaget (D) over den lodrette bøjle (A1) på kørebuen, og spænd derefter skruerne (E).

Højdejustering af kørehåndtag

For at højdejustere kørebøjlen løsner du skruerne (E) og flyt herefter kørebøjlen til et af disse tre (3) højdeniveauer. Spænd herefter skruerne (E).

Dybdejustering af kørehåndtag

For at dybdejustere kørebøjlen (forlænge sædedybden) løsner du skruerne (C), under sædeplandens bagerste del, og flytter herefter kørebøjlen til ønskede dybde. Spænd herefter skruerne (C).




Kørehåndtagen er udstyret med et sikkerhedsstop, som sikrer, at du ikke kan påvirke sikkerheden ved dybdejustering af kørehåndtagene.

Vinkeljustering af kørehåndtag

For at vinkeljustere kørehåndtaget, løsner du italienserskruen (F) og flytter herefter kørehåndtaget til ønskede vinkel. Spænd herefter italienserskruen (F).



Kørehåndtagen skal altid hvile mod bagsiden af sædesystemet ved transport i køretøj.

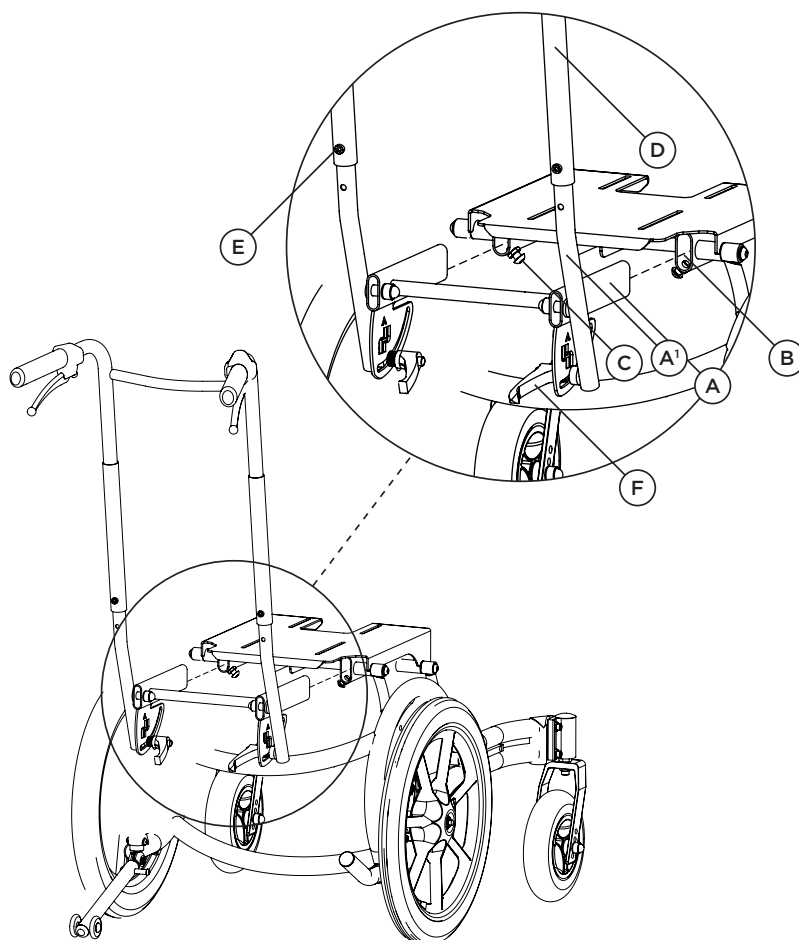

Kørebøjle - Pro

Montering af kørebøjle

Ved montering af kørebøjlen skal du først monte kørebøjlebeslagene (A). Før kørebøjlebeslagene (A) ind i tilsigtede hul (B) under sædepladen bagerste del på kørestolsstellet og spænd herefter skruerne (C).

Placer derefter kørebøjlen over kørebøjlebelsagets vertikale stang (A') og stram derefter skruerne (E).

Højdejustering af kørebøjle

For at justere kørebøjle's højde skal du løsne skruerne (E) og derefter flytte kørebøjlen til en af disse tre (3) højdepositioner. Spænd derefter skruerne (E).

Dybdejustering af kørebøjle

For at dybdejustere kørebøjlen (forlænge sædedybden) løsner du skruerne (C), under den bagerste del af sædepladen, lidt og bevæger derefter kørebøjlen til ønskede dybde. Spænd herefter skruerne (C).



Kørestangsbeslaget er udstyret med et sikkerhedsstop, som sikrer, at du ikke kan gå på kompromis med sikkerheden ved dybdejustering af kørebøjlen.

Vinkeljustering af kørebøjle


Kørebøjlen kan trinløst vinkeljusteres efter typeen af siddesystem. Frigør låsningen af kørebøjlen ved at løsne begge vingeskruer (F) og juster herefter til ønskede vinkel. Spænd herefter vingeskruerne (F).



Kørebøjlen skal altid ligge op imod siddesystemets ryg ved transport i køretøj.

Vinkeljustering af kørebøjlehåndtag

For at vinkeljustere kørebøjle's kørehåndtag løsner du knopskruerne (G) og justerer herefter til ønskede vinkel. Spænd herefter knopskruerne (G).

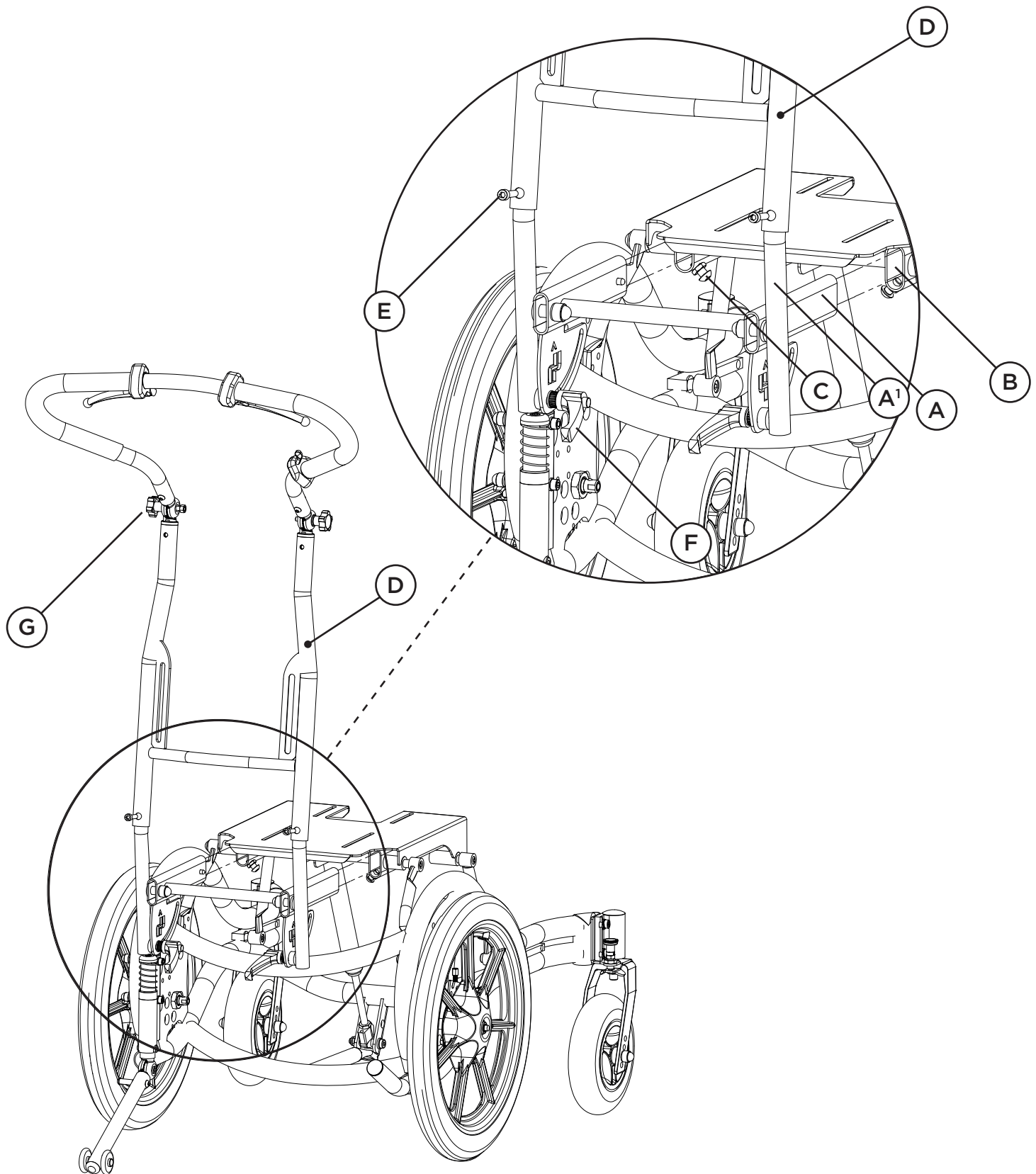

Kørebøjle vinkelindstillelig - G2

Montering af kørebøjle

Før kørebøjlen ind i beslagernes bagkant under sædedelspladen. Spænd skruerne (A) ordentligt efter montering.

Dybdejustering af kørebøjle

For at dybdejustere kørebøjlen (forlænge sædedybden) Løser du skruerne (A), under siddedelspladens bagerste del og flytter herefter kørebøjlen til ønskede dybde. Spænd herefter skruerne (A).

Vinkeljustering af kørebøjle

Kørebøjlen kan vinkeljusteres efter typeen af siddesystem. Frigør låsningen af kørebøjlen ved at løsne begge vingeskrue (B) og herefter justere til ønsket vinkel. Spænd herefter vingeskrue (B).



Kørebøjlen skal altid ligge op imod siddesystemets ryg ved transport i køretøj.

Vinkeljustering af kørebøjlehåndtag

For at vinkeljustere kørebøjleens kørehåndtag Løser du knophåndtagene (C) noget og justerer herefter til ønsket vinkel. Spænd herefter knophåndtagene igen (C).

Udskift knophåndtag med snabblås/hurtiglås

Knophåndtagene (C) ved kørehåndtaget kan erstattes med snabblås type (D) som bestilles separat. Hurtiglåsen monteres ved at skrue den forrige knap af og skrue hurtiglåsen på samme måde. Pas på ikke at spænde for stramt, så vil du ikke kunne stramme låsefunktionen.


foldbar kørebøjle

Montering og justering af foldbar kørebøjle

Foldbar kørebøjle monteres og indstilles på samme måde som den vinkeljusterbare (se ovenfor). Den foldbare kørebøjle har to styk snabblåse (D) monteret nedenfor på kørebøjlen. Med disse snabblåse kan kørebøjlen enkelt foldes ned fremad for at lette f.eks. transportere.

Sammenklapning af den foldbare kørebøjle

Frigør begge hurtiglåse (D) ved at folde låsearmen ud og folde kørebøjlen fremad. Fastgør kørebøjlen i den ønskede vinkel ved at folde låsearmen (D) ind igen. Hurtiglåsene kan justeres til at stramme strammere eller løsere ved at dreje låsearmen til højre eller venstre i åben position.

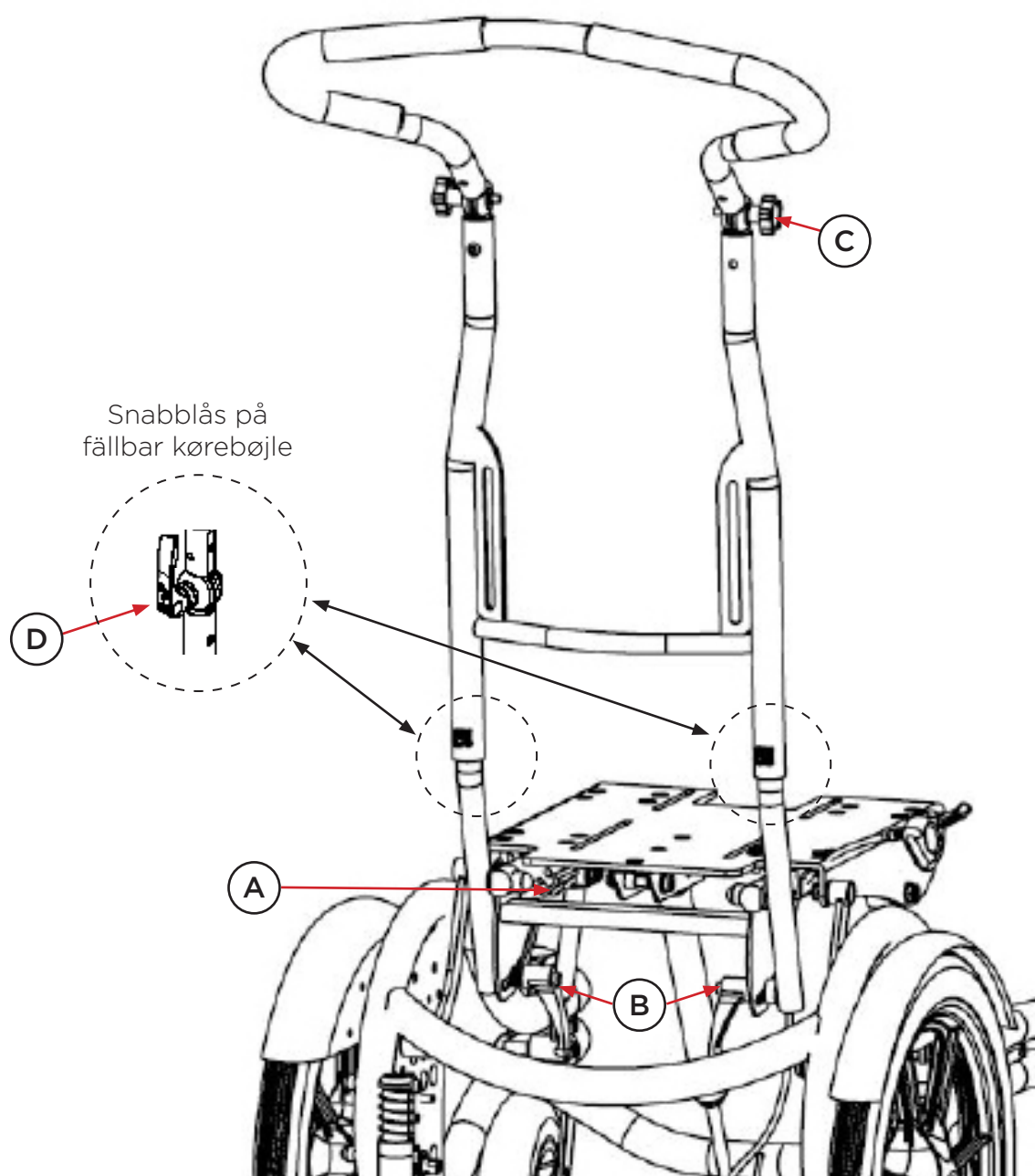

Sædedybdejustering

For at få rette vægtfordeling og et velbalanceret kørestolsstel kan kørestolsstellets kørebøjle dybdejusteres. Et velbalanceret kørestolsstel medføre lettere manøvrering.

For at justere sittedybden på kørestolsstellet løsner du skruerne (A) under sædepladens bagerste del og flytter herefter kørebøjlen till ønskede dybde. Spænd herefter skruerne (A) igen.



Hæng ikke tasker eller tunge genstande på kørebøjlen. Dette sammen med andre faktorer kan få kørestolsstellet til at tippe bagud.

Armlæn vipbar fra ryg

Den vipbara funktionen

For at vippe armlænet til siden skal du trække låsemekanismen (A) ned og derefter vippe væk fra armlænet. Sørg for, at der høres en kliklyd, når du klapper armlænet tilbage. Muligheden for vinkeljustering er tilvejebragt af låsemekanisms tre-hullers position (A).

Højdejustering

For at justere armlænets højde skal du løsne skruerne (B) lidt og derefter flytte armlænet til den ønskede højde. Spænd derefter skruerne (B).

Breddejustering

For at ændre bredden på armlænet skal du løsne skruen (C) og derefter flytte armlænet til den ønskede bredde. Spænd derefter skruen.

Vinkeljustering opad/nedad


Hvis du ønsker at justere vinklen på armlænet, skal du løsne håndtaget (D) og derefter flytte armlænet til den ønskede vinkel. Spænd derefter håndtaget (D).

Vinkeljustering i sideled

Hvis du ønsker at justere pladen sideværts og vinklet, løsnes skruerne (E) og flyt derefter armlænet til den ønskede position. Spænd derefter skruerne (E).



Sørg for, at der høres en kliklyd, når du slår armlænet tilbage, hvilket indikerer at låsemekanismen er hafnet i låst position.

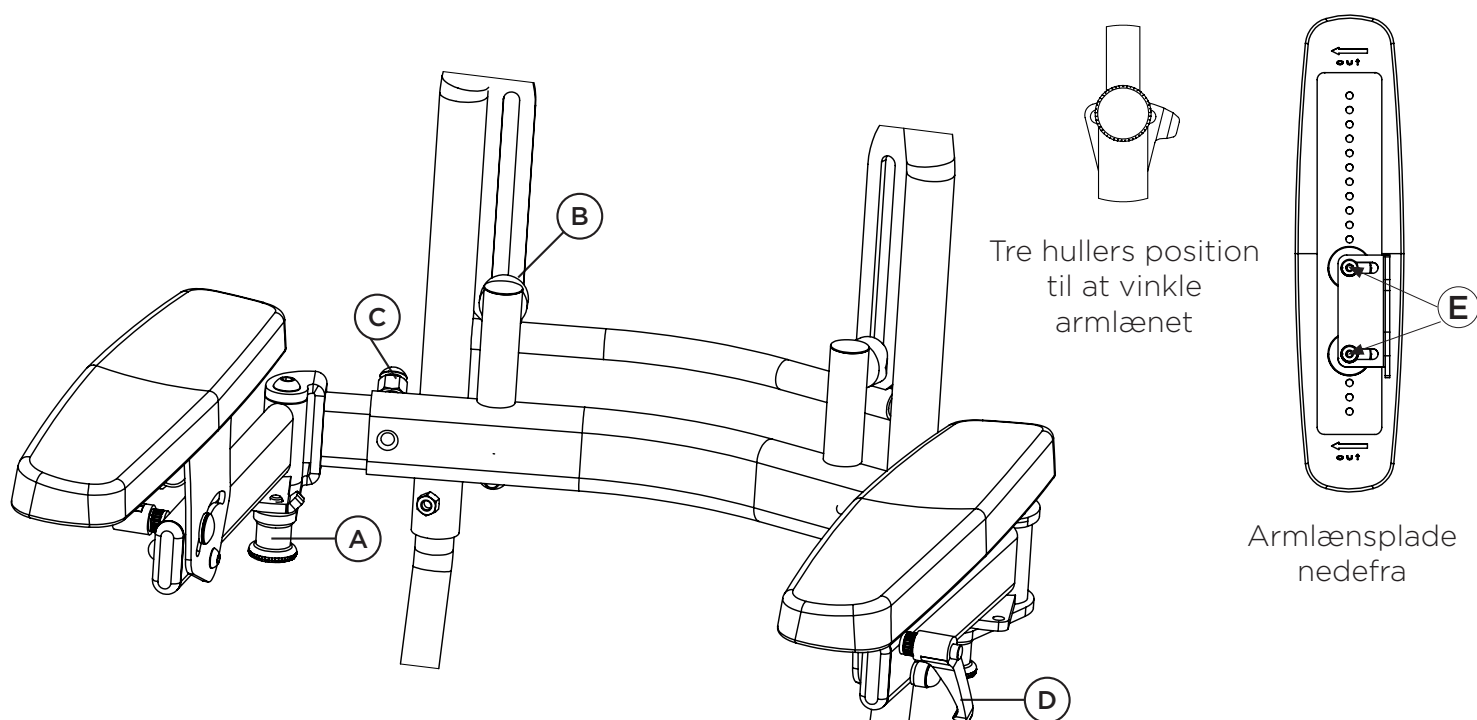

Anti-tipstøtte

Montering af anti-tipstøtte

Anti-tipstøtten er monteret på indersiden af kørestolsrammen som vist med de medfølgende skruer (A), spændeskiver (B), møtrikker (C), afstandsstykke (G) og møtrikdæksler (D).

Placer skiven (B) på skruen (A), og indsæt skruen (A) i de tilsigtede huller anti-tip støttebeslaget og gennem afstandsstykket (G) og gennem kørestolsrammen. Gør derefter det samme på den modsatte side med skive (B), møtrik (C) og spænd skruerne. Afslut derefter med at sætte møtrikhætter (D) på.



Seabass G2 bør altid udstyres med anti-tipstøtte med tanke på produktets mange indstillingsmuligheder.


At anvende anti-tipstøtte

Anti-tipstøtte bruges for sikker og tryk brug af kørestolsstellet og kan nemt vippe væk for ikke at være i vejen, når den ikke er i brug. Træd forsigtigt anti-tipstøtten ned (E) med din fod og drej den til siden. Prøv at træde så tæt på anti-tip-støttestangen (F) som muligt, når anti-tip-støtten deaktiveres. Dette er for at delene skal have den længst mulige levetid.

Sørg for at dreje anti-tipstøtten helt, indtil du hører et klik, hvilket indikerer at anti-tipstøtten endte på plads.



Ved brug af anti-tipstøtte sammen med tippepedal siddeer anti-tipstøtten monteret på venstre side som standard.

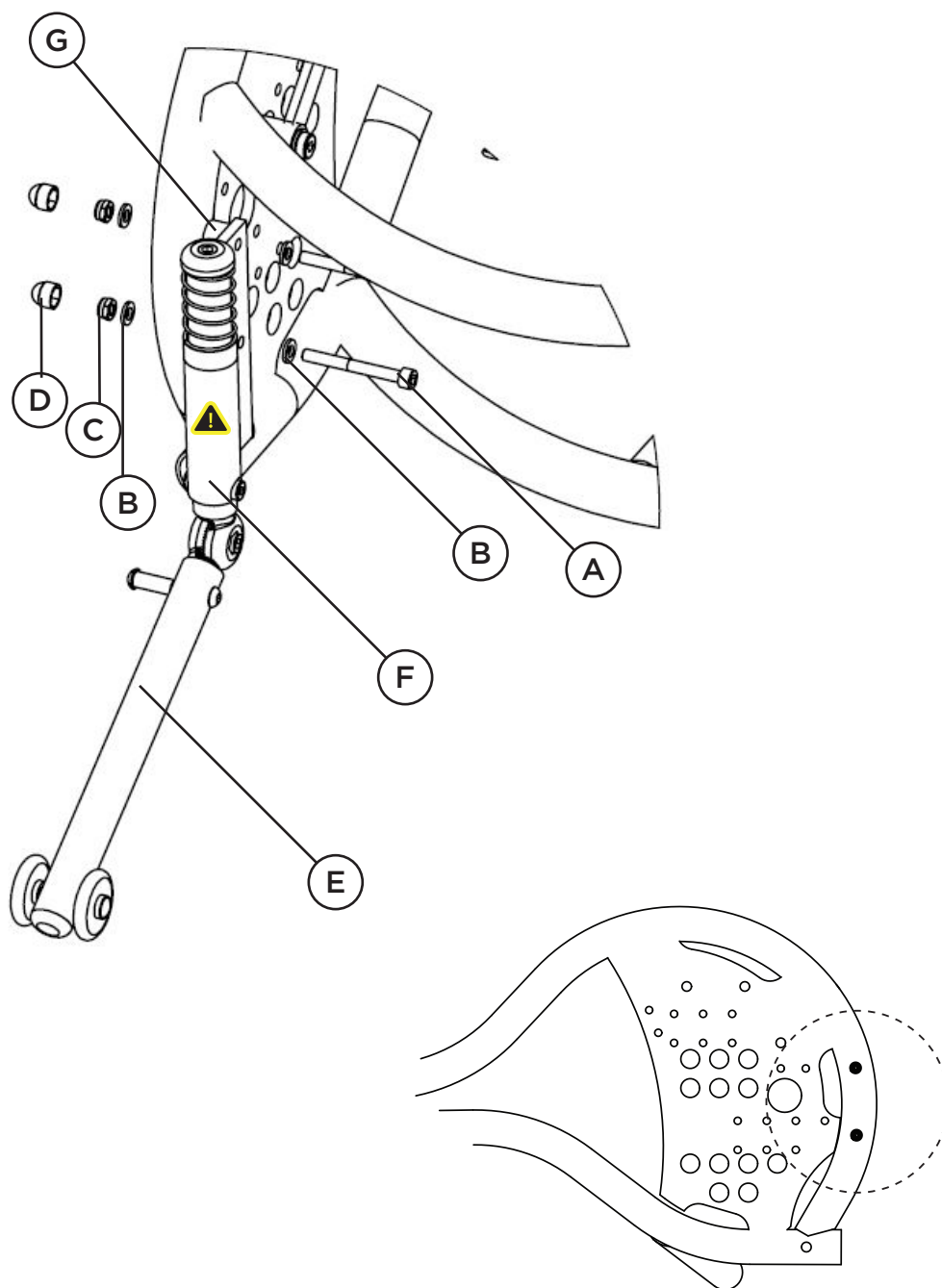

Tippepedal

Montering af tippepedal

Monter tippedalen (A) på det tilsigtede sted, i den bagerste del af kørestolsrammen, ved at indsætte tippedalen (A) og låse dens position med en skrue (B) udefra.



Du skal fjerne endedækslet fra det bagerste rør på kørestolsrammen, før montering af tippedal.




Tippepedalen sidder monteret på højre side som standard.

At bruge tippepedal

Tippedal bruges f.eks. til at lette hævnning af kørestolsstellet ved kantsten. Tryk med foden på tippedalen, samtidig med du holder kørebøjlen, og trækker lidt bagud, for at frigøre plads under svinghjulene.



Ved brug af tippedalen er det vigtigt at du holder i kørebøjle eller kørehåndtag ordentligt.

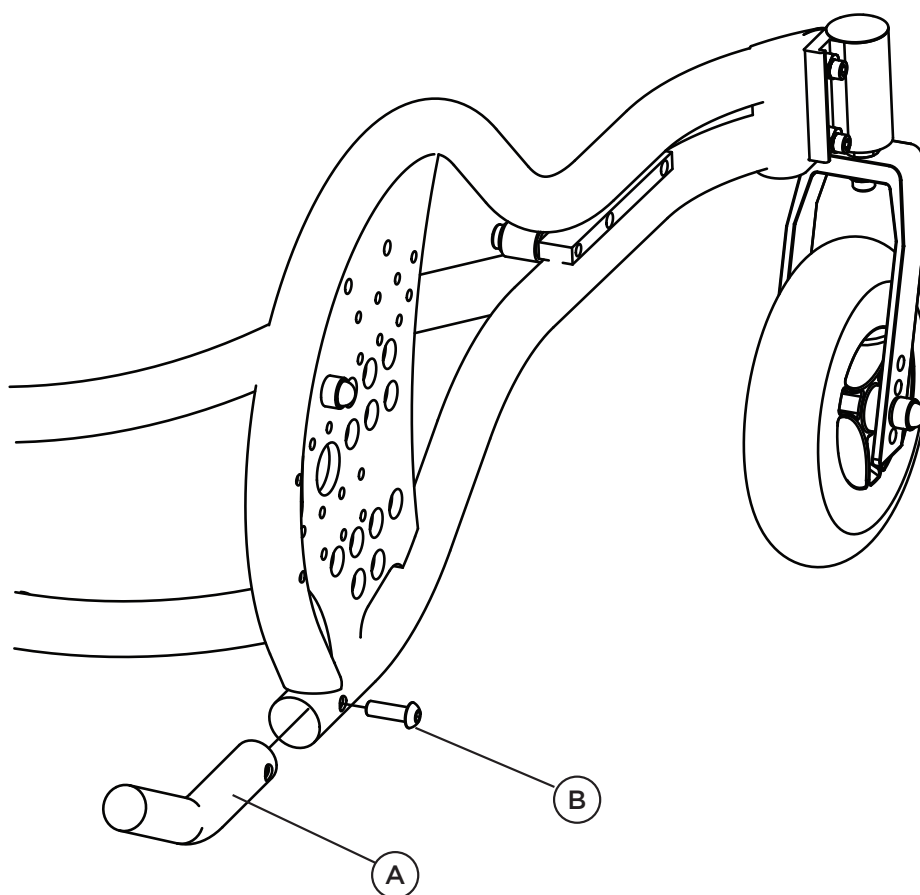

Stænskærm

Montering af stænskærm

Stænskærmen monteres med hjælp af medfølgende skruvar (A), brickor (B), møtrikker (C) og møtrikkåpor (D). Stænskærmen monteres i samme hålbillede som det bage transportfæstet, men på utsidan af rullstolsramen.


For at monter stænskærmen behøver du først Løsen drivhjulet från dess drivhjulssaxel med hjælp af quick-release funktionen og lægge det åt sidan så länge. Stick sedan igenom skruerne (A) i afsedd hålbillede og möt sedan upp med (transportfäste) bricka (B), møtrik (C) og dra åt. Sätt sedan på møtrikkåpor (D) og afsluta med att monter tillbaka drivhjulet når monteringen af stænskærm nu är slutförd.

Justering af stænskærm

Stænskærmen kan justeres i højdeled ved at Løsen skruerne (E). Justere till ønskede højde og dra åt skruerne (E) når ønskede højdeposition är opnået.



Du behøver ikke at skrue skruerne (E) helt ud, det er nok at løsne dem.

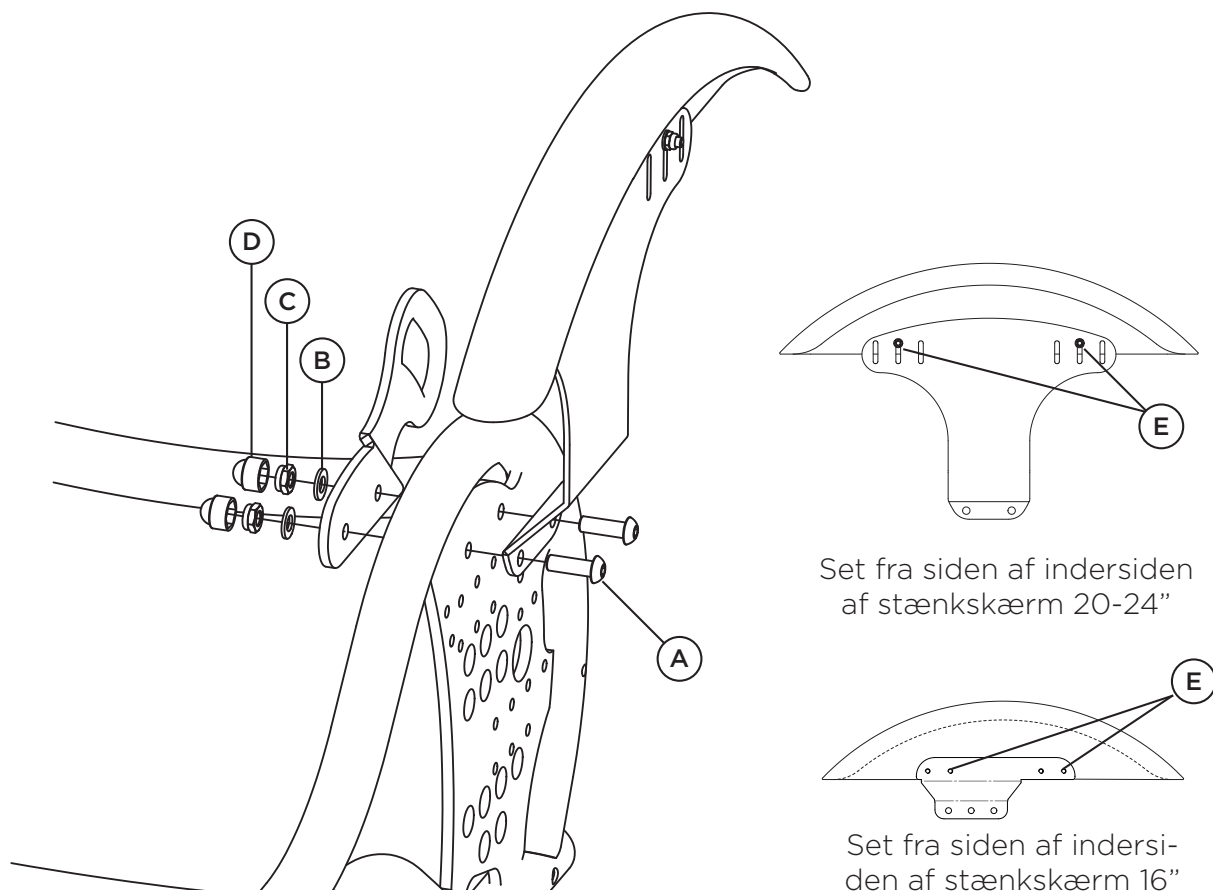

Transportbeslag

Montering af forreste transportbeslag

Monter det forreste transportbeslag (A) ved at sætte skiver (C1) på transportbeslaget (B) og indsæt derefter transportbeslaget med løkken udad, i eksisterende huller på forreste del af kørestolsstellet som beskrevet på billedet. Mød derefter skive (C) og møtrik (D) på indersiden af rammen og spænd. Afslut derefter med at sætte møtrikhætter (E) på.




Ved brug af transportbeslag og p-bremse til 20-24" drivhjul bruges der ikke skiver ved montering af det forreste transportbeslag.

Montering af bagerste transportbeslag

Det bagerste transportbeslag (F) monteres på indersiden af rammen ved hjælp af de medfølgende skruer (G), spændeskiver (H), møtrikker (I) og møtrikdæksler (J) som vist på billedet.

Sæt skruerne (G) ind i det tilsigtede hulmønster på sidestykket af kørestolsrammen og mød op på indersiden af kørestolsrammen med transportbeslaget (F), skive (H) og møtrik (I).

Afslut derefter med at sætte møtrikhætter på (J).

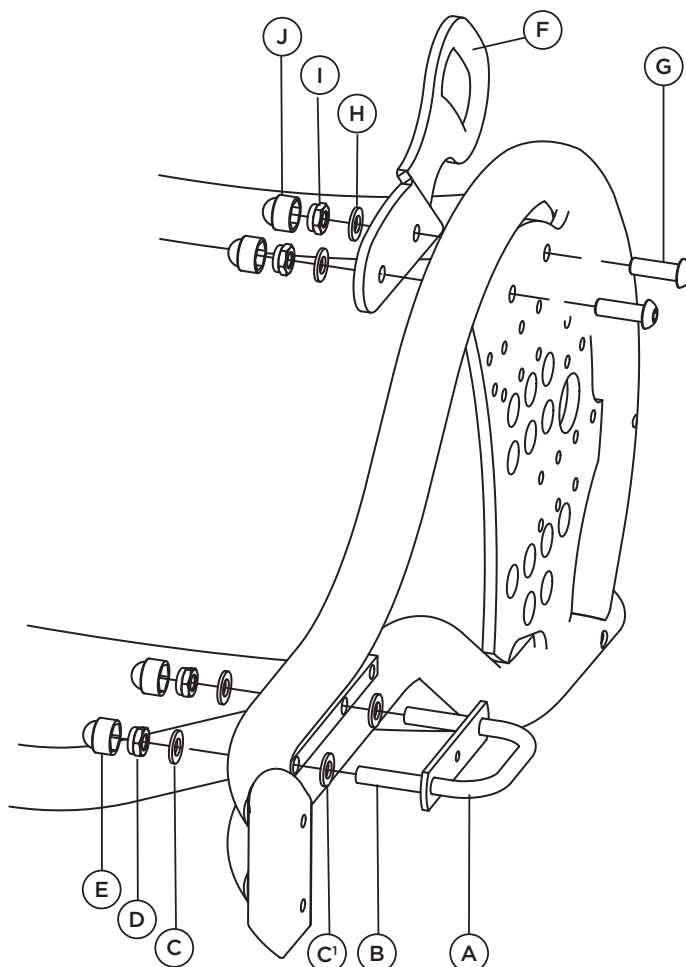



Sædedel

Montering af siddesystem

Siddesystemets fæsteplade monteres enkelt på kørestolsstellet gennem fire (4) skruer, spændeskiver og møtrikker i markerede riller (A) på kørestolsstellets sædeplade.




For yderligere information om fæsteplader, se den respektive brugervejledning til det valgte sædesystem.

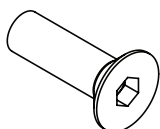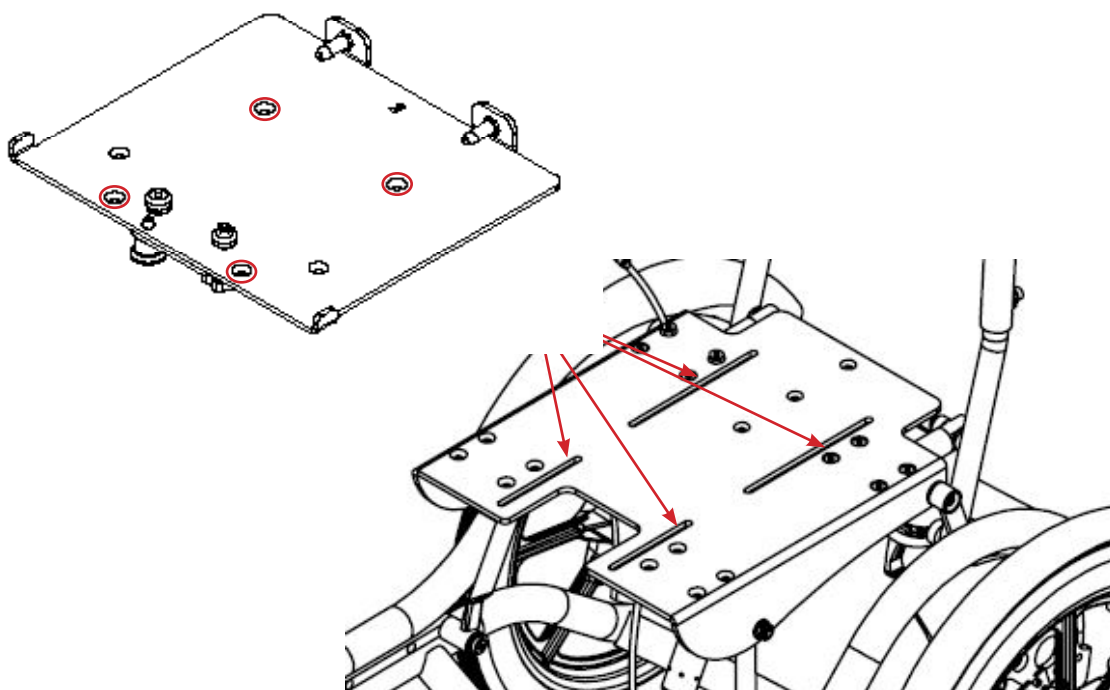

Insexskrue M6x20
Forsænket (D)
Antal 4 stk.



Bricka
M6/16x1 mm
Antal 4 stk.

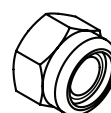

Låsemøtrik
M6
Antal 4 stk.

Resumé og opfølgning

Når montering og / eller justeringerne er gennemført, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er samlet korrekt i henhold til brugervejledning og fungerer efter hensigten.

Kontroller produktets indstillinger og dets tilbehør, så brugeren har en korrekt siddestilling.

Efter alt monteringsjustering eller servicearbejde skal alle knapper, fastgørelsesskruer og møtrikker kontrolleres og strammes.

Kontroller, at hjælpemidlet er korrekt afbalanceret for at sikre, at enhver risiko for at vælte er udelukket.

Hvis der opdages defekter, må produktet ikke bruges. Kontakt din distributør af hjælpemidlet til handling.

Transport i køretøj

Vi gør opmærksom på, at den absolut sikreste måde er at transportere brugeren i køretøjets faste sæder, fastspændt med den almindelige sikkerhedssele. Vi anbefaler ikke transport i køretøjer i kørestolsstellet. Vi er dog opmærksomme på, at visse brugere og situationer betyder, at brugeren skal transporteres siddende i kørestolsstellet. I disse tilfælde skal nedenstående sikkerhedsanvisninger altid følges for at minimere risikoen for personskader i tilfælde af en ulykke. Læs mere under Transportbeslag.




Retningslinjer for transport i køretøj

Kørestolsstellet er crashtestet og godkendt efter 7176-19 til 135 kg i bil.

Fastgørelse skal ske med spænderemme, godkendt i henhold til ISO 10542, i kørestolens transportbeslag mærket med følgende mærkat. Fastgør de fire spændebånd med karabinhagerne til kørestolens fastgørelsespunkter.

Lås bremserne på kørestolen og spænd stropperne. Kørebøjlen skal hvile mod ryggen.

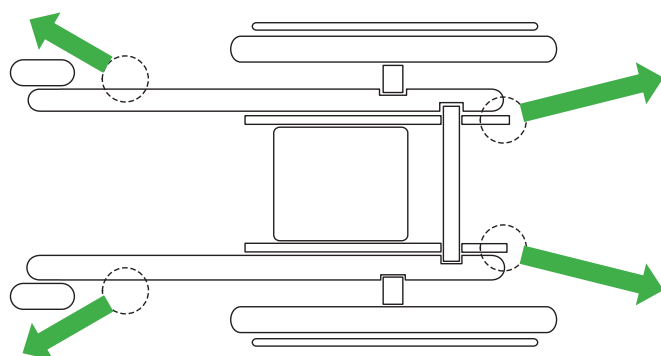

Forslag til spændebandenes trækretninger



Det er vigtigt kun at strække båndene, og ikke spænde dem for stramt. For stram spænding af remmene kan få kørestolsstellet til at blive skævt.



Crashtestet og godkendt. Max belastningsvægt er 135 kg.



Man skal køre fremadvendt i en bil med bilens trepunktssæle.



Fastgørelsessystemet og trepunktsselen skal være godkendt ifølge ISO 10542.



Fastgør de fire spænderemme med karabinhagerne til kørestolens fastgørelsespunkter. Lås bremserne på kørestolen og spænd stropperne. Kørebøjlen ska ligge op mod ryggen.



! Korrekt positionering af bæltet og vinklen ifølge fig.1.

! Bæltet skal sidde stramt og tæt mod kroppen. Kørestolens dele må ikke forhindre selen i at sidde tæt til kroppen.

! Den øverste del af bæltet skal gå over brugerens skulder uden at trykke på halsen (se fig. 2)

! Overskrid ikke maksbelastningen på kørestolsstellet.

! Der må ikke foretages ændringer eller skader på kørestolens transportbånds fastgørelser.

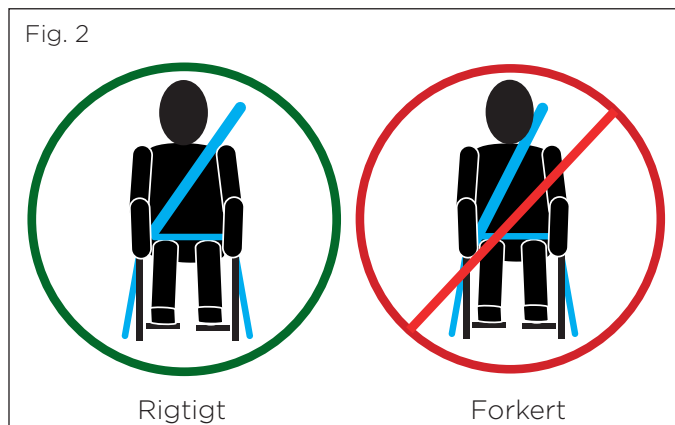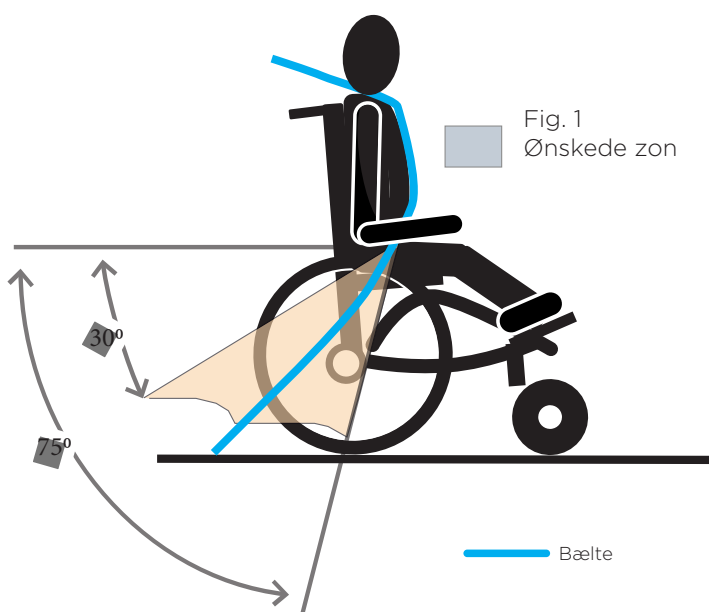

! Trepunktsseler skal bruges for at reducere risikoen for hoved- og brystskader forårsaget af køretøjskomponenter

! Hvis kørestolen er udstyret med et bord, skal dette fjernes og opbevares sikkert under transport.

! Når det er muligt, skal andet aftageligt udstyr enten fastgøres på kørestolen eller fjernes for sikker opbevaring under transport.

! Vær opmærksom på, at spændet på sikkerhedsselen ikke skal ende, så "åbningsknappen" kan komme i kontakt med løse dele ved en kollision.

! Kørestolen skal tages ud af drift, hvis den har været involveret i en kollision.


Køreteknik

Assistenthjælp, opad fremad

- Sørg for at deaktivere anti-tipstøtte.



Træd tippepedalen ned

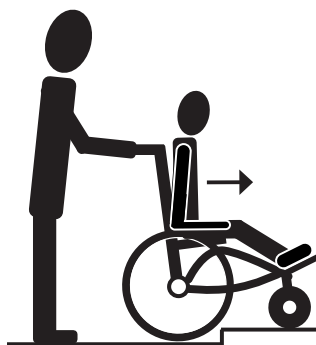


Assistenthjælp, opad baglæns

- Sørg for at deaktivere anti-tipstøtte.



Træd tippepedalen ned

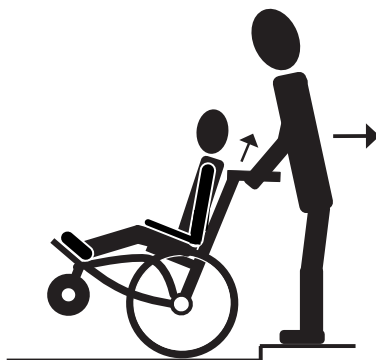


Assistenthjælp, ned forlæns

- Sørg for at deaktivere anti-tipstøtten .



Træd ned tippepedalen

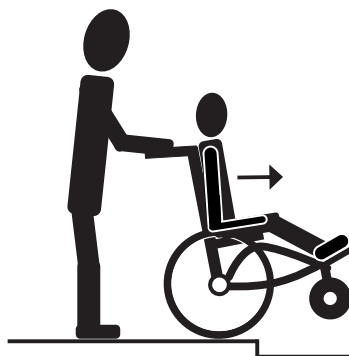

Aktiver altid evt. anti-tipstøtte, når forflytningen er klaret!

Assistenthjælp, op af trapper

- Sørg for at deaktivere anti-tipstøtte.


Vær altid to personer ved denne type af forflytning. Løft i rammen og kørebøjlen.



Assistenthjælp, ned af trapper

- Sørg for at deaktivere anti-tipstøtte.

Vær altid to personer ved denne type af forflytning. Bær i rammen og kørebøjlen.

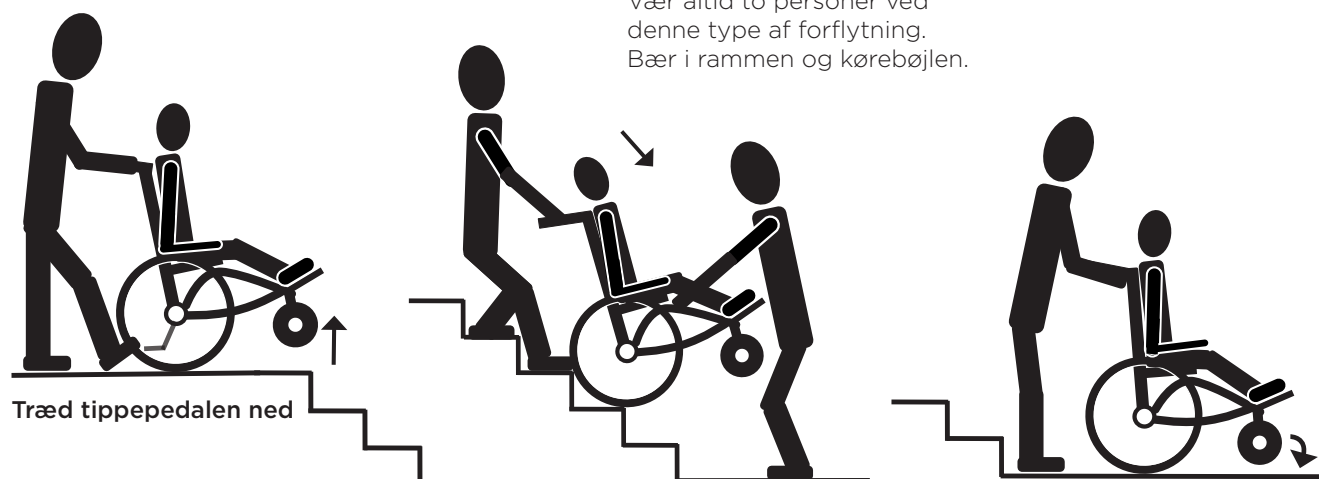

Skrående underlag

- Tænk over den øgede risiko for at vælte ved brug på skrå overflader. Slip aldrig kørebøjlen ved transport på skrå overflader. Kontroller, at kørestolsstellet er stabilt, og at bremserne er aktiveret ved parkering.



Aktiver altid ev. anti-tipstøtte når forflytningen er fuldført! Sørg for, at hæve- og sænkehåndtagene er strammet. Gå aldrig på en rulletrappe, selvom der er hjælp at hente!

Vedligeholdelses- og vaskeanvisninger

Kontrol før brug

For at hjælpemidlet skal fungere trygt og sikkert er det vigtigt med vedligeholdelse og rengøring.

Tilsyn og kontrol skal udføres før hver brug i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slitage
- og skader. Kontroller især skruer og møtrikker samt fingerskruer.
- Kontroller at sædet er sat ordentligt fast på kørestolsstellet
- Kontrollere produktets stabilitet
- Kontroller funktionen på eventuelle anti-tip-støtter
- Kontroller bremsernes funktion.
- Kontroller hjulenes stand og at de sidder fast.
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling, tilt, højdejustering, mm. vedrørende mobilitet og aflåsning.

Hvis der konstateres mangler: Brug ikke produktet. Kontakt din distributør af hjælpemidlet til udbedring.

Vedligeholdelse

Behovet for rengøring varierer og skal vurderes fra sag til sag afhængigt af produktets brug, men det anbefales mindst en gang om ugen.

Rengør plast- og metaldele med en svamp / klud og antibakterielle, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende midler eller opløsningsmidler.

Service og vedligeholdelse

For at fungere trygt og sikkert skal der udføres regelmæssig service på produktet. Behovet for eftersyn / service varierer og kan vurderes fra sag til sag afhængigt af produktets brug og slid, men mindst en gang hver 6. måned anbefales.

Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnit Sikkerhedsinstruktioner i brugervejledningen. Ved udskiftning af dele skal originaldele fra Anatomic Sitt A/S altid bruges.

Ved hver service skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at produktet er sikkert at bruge. Hvis der er mangler, der påvirker sikkerhed og ikke kan afhjælpes, skal produktet tages ud af drift. For rengøring af produktet, se afsnittene vedligeholdelse og renovering.

Kontroller følgende og korriger om nødvendigt:

- Kontroller alle produktets funktioner.
- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader.
- Kontroller, at alle skruer, møtrikker og bolte er strammet korrekt.
- Kontroller, at alle vingeskruer er intakte og fungerer.
- Kontroller, at sædet er sikkert fastgjort til kørestolsrammen.
- Kontroller at eventuelle anti-tip støtter fungerer.
- Kontroller bremsernes funktion.
- Funktionstest og smør alle bevægelige dele som led, vajre, hjul, vingeskruer mm. Anvend olie eller smøremiddel (f.eks. CRC 5-56, teflonspray etc).
- Kontroller produktets bevægelige funktioner, eksempelvis rygvinkling, siddestilling, højdejustering, mm. Både ifht. justeringsmuligheder, bevægelighed samt låsning.
- Kontroller at gaspatronerne låser i valgt leje.
- Kontroller at ledningerne er korrekt placeret og korrekt justeret.
- Kontroller hjulenes funktion: Kontroller at alle hjul sidder fast og står fast på underlaget. Kontroller at stolen ruller tilfredstillende.
- Kontroller evt. slitage på alle led, taggedede led og beslag. Sørg for, at de låser, som de skal.
- Kontroller mærkning, etiketter og advarselssymboler, så de er komplette og læselige.

Tillæg for E-drive

- Kontroller at aktuator og batterier er korrekt monterede og i et stik, der virker.
- Kontroller at ledninger, stik og tætningsringe er hele og uden synlige skader.
- Kontroller at håndkontrol og ladere er i god stand og fungerer.

Opfølgning

Når service udføres, skal du kontrollere, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugermanualen og fungerer efter hensigten.

Renovering

Renovering foretages, hvis hjælpemidlet er personligt og skal gives til en ny bruger eller opbevares i lang tid. Arbejdet skal altid udføres professionelt af kvalificeret personale, se afsnittet Sikkerhedsinstruktioner i brugermanualen.

Ved udskiftning af dele skal Anatomic SITTs originaldele bruges.

For oplysninger om produktet og dets funktioner, se brugervejledningen på www.anatomic sitt.com. For information om produktets levetid, se afsnittet, Begrænsninger i brugermanualen.

Ved renovering skal du altid kontrollere, at hjælpemidlet ikke er special tilpasset, før du sender det til en ny bruger.

Ved hver renovering skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at det er sikkert at bruge dem. Hvis der er fejl, der ikke kan afhjælpes ved renovering, skal produktet tages ud af drift.

Rengøring

Rengør plast- og metaldele med svamp / klud og antibakteriel, milde rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, ætsende midler eller opløsningsmidler.

Produktet kan med fordel rengøres i et vaskekabinet/autoklaffe ved 65 ° C i maksimalt 10 minutter. Ved rengøring af kørestolsstellet i vaskekabinet skal det stå fikseret og placeret opret med låste hjul.

Elektriske komponenter skal afmonteres fra kørestolsstellet inden rengøring i vaskekabinet.

Tørring

Kørestolsstellet kan tørres i kabinet i max 70°C i op til 10 minutter.

Kontroller ved reovering

Efter rengøring og tørring kontrolleres produktet for skader / slid. Husk, at produktets levetid er begrænset (se afsnit Begrænsninger i brugermanualen), når du foretager en vurdering for at kontrollere, om produktet er egnet til genbrug.

Knækkede, slidte eller revnede dele udskiftes. Brug kun originaldele fra Anatomic SITT. Reservedele kan bestilles i henhold til en separat reservedelsliste for produktet. For at produktet beholder sin CE -mærkning, må der kun anvendes reservedele leveret af Anatomic SITT.

Funktionstest og smør alle bevægelige dele såsom samlinger, ledninger, hjul, knopper osv. Brug den relevante olie eller smøremiddel (f.eks. CRC 5-56, Teflonspray osv.).

Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme.
Sørg for, at brugermanualen og alle originale etiketter følger med den nye bevilling.

Etiketter/mærkater

Ved behov for nye etiketter og mærkater, kontakt Anatomic SITT. For dets placering på hjælpemidlet se www.anatomicsitt.com, hvor brugervejledninger også kan findes.

Maling

For at forhindre korrosionsskader eller forbedre ridser kan maling bestilles fra Anatomic Sitt.

Artikelnummer: 387299, maling kørestolsstel G2, mattsort.

Kontrolpunkter

Samlet set:

- ☐ Kontroller hele produktet og dets tilbehør for at identificere ødelagte, revnede eller slidte dele, der skal udskiftes.
- ☐ Kontroller samtlige funktioner på produktet.
- ☐ Kontroller at hjælpemidlet ikke er skævt og at det stadig står med alle hjul mod underlaget.
- ☐ Kontroller at vajre er korrekt placerede og rigtigt indjusteret

Kørestolsstel:

- ☐ Kontroller, at alle skruer og møtrikker er stramme.
- ☐ Kontroller at tiltfunktionen virker og at gaspatronen låser i valgte leje.
- ☐ Kontroller at vajre er korrekt placerede og rigtigt indjusterede.
- ☐ Kontroller at eventuel løftegaspatron fungerer som den skal.
- ☐ Kontroller at kørebøjles justeringsmuligheder og led fungerer og at polstringen er hel.

Hjul/Bremser:

- ☐ Kontroller at skruer til hjulene er ordentligt spændte.
- ☐ Kontroller at svinghjulet snurrer uhindret og at lejerne ikke sidder fast.
- ☐ Kontroller at quick-release akslen låser korrekt.
- ☐ Kontroller at bremsekablerne er uskadede, korrekt placeret og korrekt indjusteret.
- ☐ Kontroller bremsefunktionen på samtlige hjul.
- ☐ Kontroller at kørestolsstellet ruller let og lige.
- ☐ Kontroller eventuelt dæktryk og mønster på dækket.
- ☐ Kontroller eventuelle drivringe/egerbeskyttere efter grader og skarpe kanter.

Fodstøtte:

- ☐ Udfør funktionskontrol af højde- og vinkeljustering.
- ☐ Kontroller for evt. slitage på alle led og sørg for at de låser, som de skal.

Armlæn:

- ☐ Kontroller armlænenes justeringer ifht højde, dybde og bredde.

Anti-tipstøtte:

- ☐ Kontroller vinkel/vridfunktion.

Fæstesystem:

- ☐ Kontroller låsefunktionen.

Øvrigt evt. tilbehør:

- ☐ Kontroller alle dele for slitage, udskift ved behov.
- ☐ Kontroller evt. låsemekanismer og justeringsmuligheder.

Elektriske funktioner:

- ☐ Kontroller at aktuator og batterier er korrekt monteret og i god stand.
- ☐ Kontroller at ledninger, stik og tætningsringe er hele og uden synlige skader.
- ☐ Kontroller at håndkontrol og ladere er i god stand og fungerer.

Efterkontrol

Når renoveringen er udført, skal du kontrollere, at produkterne (også hovedprodukt tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugermanualen og fungerer efter hensigten. Kontroller også, at markeringerne, etiketterne og advarselssymbolerne er intakte og læselige.

Affaldssortering

Genbrug

En brugt del eller et produkt skal skilles ad. Dele skal sorteres efter materialetype og afleveres på genbrugscentret eller tilsvarende. Bateri og gaspatron sorteres som farligt affald.

Garanti og retur

Garanti og reklamation

Der er to års reklamationsret fra leveringsdatoen i henhold til købeloven. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet udsat for ekstreme påvirkninger eller "unormal" håndtering. For garantibehandling er det nødvendigt, at det fejlbehæftede produkt returneres til os. Vedlæg altid følgesedlen for den oprindelige leverance.

For bedst at kunne vurdere reklamationen, skal produktet være tørt og rengjort, når det sendes tilbage.

Beskriv fejlen samt årsagen hertil så nøjagtig som muligt. Oplys om du ønsker reparation eller eventuel udskiftning. Vedlæg kopi af fakturaen og oplys leveringsadresse, kontaktperson samt telefonnummer.

Sørg for, at du pakker produktet godt, så det er beskyttet mod eventuelle stød under transport. Noter shippingnummer på dokumentationen. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Returnering

I tilfælde af fejlbehæftede ordrer eller leverancer, skal produkterne returneres indenfor 20 dage fra levering. Vedlæg altid en kopi af både følgesedlen og fakturaen. Giv din grund til at returnere produktet.

Sørg for, at du pakker produktet godt så det er beskyttet mod stød under transporten. Noter shippingnummer eller lignende på dine dokumenter. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Specialtilpassede produkter tages ikke retur!

Revision

I denne version af brugervejledningen er følgende ændret:

Korrespondence - mærkning

Beskrivelse af hvor produktetiketten sidder

Revisionsliste

ver. 2.0 - 2020-02-04

ver. 2.1 - 2021-05-26

SE

Anatomic Sitt AB (producent)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

www.anatomicsitt.com

DK

Anatomic Sitt A/S (forhandler)

Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup

Tlf 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.dk

www.facebook.com/AnatomicSITT.dk

www.instagram.com/anatomicsitt

