

BRUGSANVISNING – BADEBÆNK MED RYGSTØTTE OG ARMLÆN

KING.SS1BA-00

BADEBÆNK PLUS MED PLASTIK RYGSTØTTE OG ARMLÆN LM

TILTÆNKET ANVENDELSE: Badebænken Plus med Plastik Rygstøtte og Armlæn LM giver brugeren øget uafhængighed under brusebadet og reducerer træthed i stående stilling samt risikoen for fald og skader. De skridsikre gummifødder sikrer greb på gulvet, og de højdejusterbare ben gør det nemt at ændre den samlede højde i henhold til brugerens behov. Derudover kan badebænken bruges med forskellige benlængder mellem for- og bagbenene. Især kan forbenene være lavere end bagbenene: dette tillader brugeren at opretholde en mere korrekt holdning under badning samt at lette stående og siddende procedure. På grund af sin fleksibilitet kan badebænken placeres selv på en ujævn eller uregelmæssig overflade, ligesom mange brusekar. Rygstøtten og armlænene giver ekstra sikkerhed og komfort. Badebænken kan nemt flyttes på grund af sin lette vægt.

INDIKATIONER OG KONTRAINDIKATIONER: Badebænken Plus med Plastik Rygstøtte og Armlæn LM er beregnet til ældre, kørestolsbrugere, personer med nedsat mobilitet i lænden, knæet eller hoften, og til dem, der har svært ved at opretholde en stående stilling under de daglige hygiejnemæssige rutiner. Brugeren skal kunne bevare balancen under siddende og stående procedurer samt have tilstrækkelig evne til at sidde opret. Badebænken må ikke bruges, hvis brugeren har problemer med balancen eller opfattelsesforstyrrelser.

SIKKERHEDSADVARSLER OG INDIKATIONER:

- Den maksimale brugervægt angivet i monteringsinstruktionerne må ikke overskrides (120kg).
- Før hver brug skal man sikre sig, at badebænken er korrekt samlet og står stabilt.
- Badebænken kan kun bruges på overflader, der er fri for forhindringer.
- Under montering skal man nøje følge anvisningerne i brugermanualen.
- Risikoen for fingerklemning kan ske under monteringsprocessen.
- Man må ikke kaste sig ned på badebænken, da dette kan føre til at benene skrider, vælter eller synker. Hold altid brusesædet på sine 4 ben.
- Man må ikke ændre badebænken eller dets komponenter på nogen måde.
- Man må ikke bruge badebænken, hvis den er beskadiget eller ændret på nogen måde. Revner og deformationer kan stærkt påvirke enhedens ydeevne og sikkerhed.
- Efter brug skal badebænken fjernes fra brusebadet for at undgå forhindringer.
- Badebænken må ikke bruges til andre formål end det tiltænkte.
- Badebænken må ikke opbevares udendørs.

VEDLIGEHOLDELSEINFO: Produktets vedligeholdelse består af rengøring og sanitære procedurer. For at sikre en sikker brug og tilstrækkelig hygiejnestandard skal brugeren udføre disse procedurer før hver brug. Brugeren skal sikre sig, at enhedens strukturelle integritet og

dens komponenter samt skruernes tæthed er kontrolleret. Følg nedenstående trin for rengørings- og sanitetsprocedurer:


1. Handsker skal bæres.
2. Fjern synligt snavs før desinfektion.
3. Brug vand eller rengøringsmiddel til rengøring.
4. Tør enheden med en ren klud.


Alternativt kan produktet rengøres i almindelige opvaskemaskiner ved maksimale temperaturer.

GENBRUGSKRAV: Produktet er egnet til genbrug af andre brugere. Før genbrug skal produktet rengøres og desinficeres grundigt. Før produktet overdrages til andre, skal det kontrolleres af kvalificerede forhandlere.

KORREKT BORTSKAFFELSE: Produktet må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Spørg din lokale myndighed for korrekt og miljøvenlig bortskaffelse.

HÆNDELSESINDBERETNING: Hvis der sker en hændelse med dette produkt, bedes du kontakte virksomheden, hvor du har købt dette produkt på info@botved.dk, som er ansvarlig i dit land.

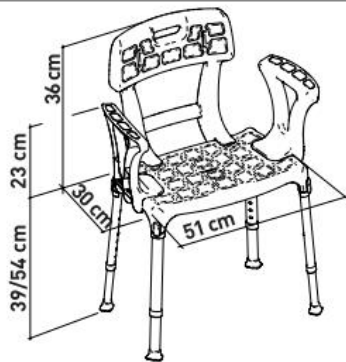

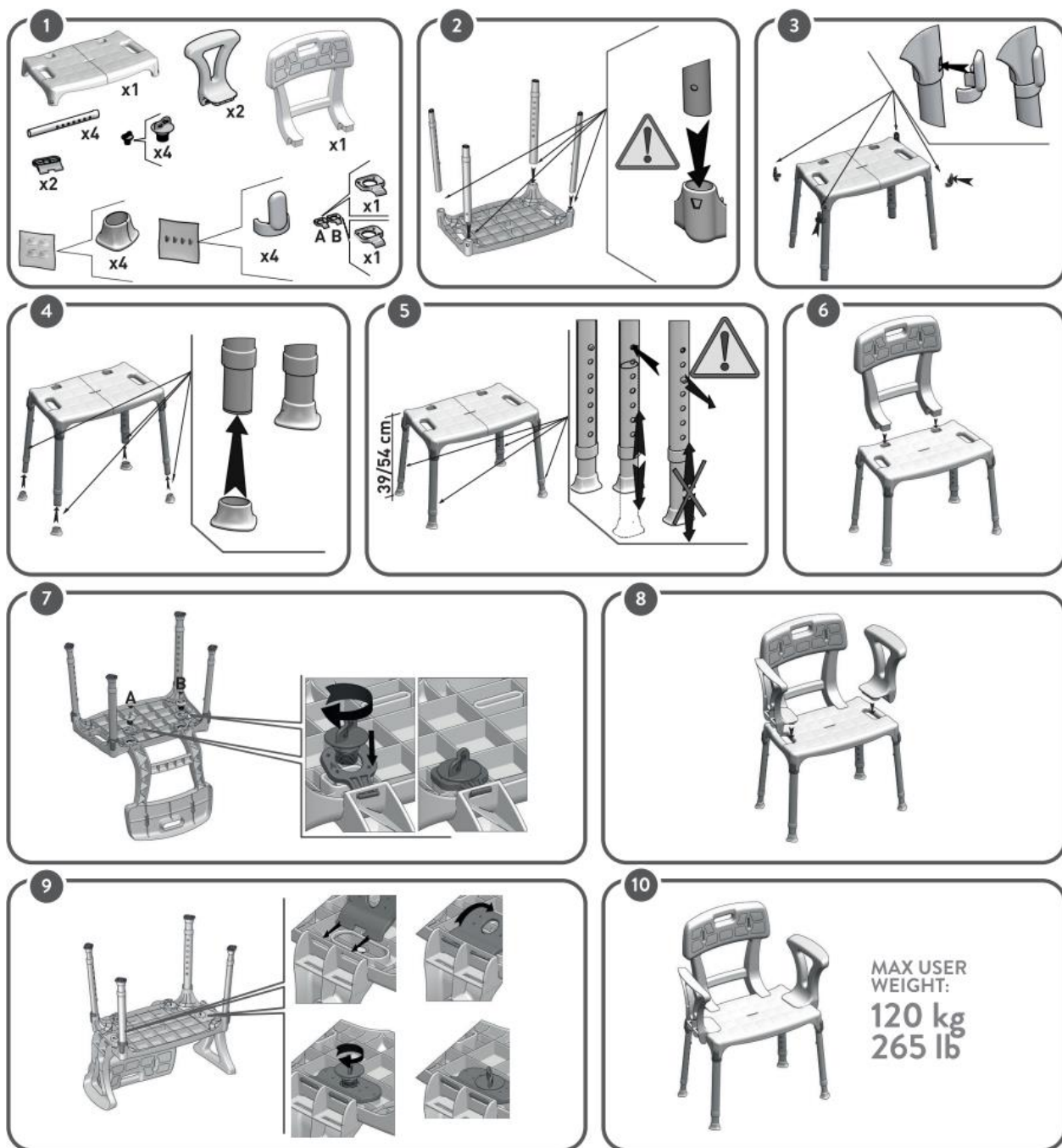

MADE IN ITALY



2 YEARS
GUARANTEE