

HUMANTECHNIK

Brugervejledning





1.1 Introduktion

Mange tak for din køb af CM-2.4 kommunikationssystem!

CM-2-kommunikationssystemet gør det mærkbart lettere at for høreapparatsbrugere at deltage i samtaler under akustisk vanskelige situationer.

Det er til trådløs transmission af tale, musik og lyd mellem CM-2.4 senderen og CM-2.4-modtageren, som kan være op til 150 meter fra hinanden.

For at undgå høreskader på grund af høje lydstyrker, skal du sørge for at indstille lydstyrken til et lavere niveau før brug. Producenten påtager sig intet ansvar for skader og kvæstelser som følge af forkert brug.

1.2 Hovedtræk

Verdensomspændende kompatibilitet på grund af begrænsningsfri 2,4 GHz transmission. Transmissionsområde på op til 150 m. Fuldt digitaliseret krystalklar lyd kvalitet. Op til 20 timers brug pr. batteriopladning. Praktisk opladning med genopladeren eller med direkte Micro-USB-forbindelse, kompatibel med de fleste mobiltelefonopladningsadapters

1.3 CM-2.4 Set

Softcasen indeholder:

- 1 stk. CM-2.4 sender
- 1 stk. CM-2.4 modtager
- 1 stk. plug-in mikrofon
- 1 stk. øre mikrofon
- 1 stk. øretelefoner
- 1 stk. hovedtelefon
- 1 stk. halsslynge
- 2 stk. bælteclips
- 2 stk. nakkestropper
- 1 stk. USB-strømforsyning
- 1 stk. USB-opladerkabel (Y-form)
- 1 stk. brugermanual

Tjek at alle dele medfølger. Kontakt din forhandler straks efter modtagelse, hvis der mangler noget.

1.4 Tilgængeligt tilbehør

- genopladeligt batteri A-5260-0
 - BC-01 bælteclips A-5291-0
 - AM-01 armbåndsholder A-5292-0
-
- Vare nr. A-4304-0

2. Hurtig installationsvejledning

Din CM-2.4 er allerede indstillet og klar til brug.

Justering af indstillingerne er kun nødvendigt tilfælde af transmissionsforstyrrelser og / eller dårlig lyd kvalitet. Skulle justeringer være nødvendige, bemærk de detaljerede beskrivelser Pkt. 4.7 og fremefter.

Opsætning og brug:


Oplad enhederne: Tilslut opladeren med strømforsyningen og placer enhederne i oplader - eller sæt USB-opladerkablet direkte i enhedens USB-stik og tilslut det til en almindelig USB-port (computer, bærbar computer, USB strømforsyninger).

Den røde opladningsstatus-LED på de respektive enheder lyser under opladning. LED'en slukkes når batteriet er fuldt opladet.

Opladningstiden er ca. 2 timer.


Sæt mikrofonen i MIC-indgangen på sender ● (symbol på sender).

Sæt øretelefonerne, hovedtelefoner eller halsteleslyngen ind i en af lydudgangene EAR1 eller EAR2 på modtageren))) ● (symbol på modtageren).

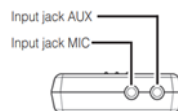


Hvis du bruger halsteleslyngen: Læg halsslyngen rundt om halsen og sæt dine høreapparater til "T" eller "MT" for at transmittere lydinformation direkte til T-spolen i dine høreapparater.

Tænd for enhederne: Skub ON /OFF-kontakten i øverste position. Placer mikrofonen tæt på din samtalepartner eller anden lydkilde for at opnå det bedste resultat.

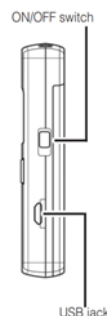

Juster modtagerens lydstyrke efter dine præferencer:

Lydstyrken kan justeres fra niveau 00 (Mute) til 09 (maks. Lydstyrke). Brug knapperne »▼« og »▲« til at justere lydstyrken efter ønske.

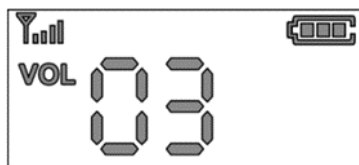

Efter brug: Sluk for enhederne: Skub ON / OFF-kontakten tilbage til den nederste position.



Bemærk venligst: Tilslut /frakobl ikke mikrofonen, hovedtelefonen eller halsteleslyngen, mens enheden er tændt!

Brug mikrofonerne korrekt



For at opnå optimal taleforståelighed, skal kindmikrofonen være max. 2 cm fra mundvigen og plug-in mikrofonen max. 10 cm fra munden.



3. Funktionsknapper på sender

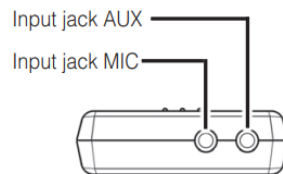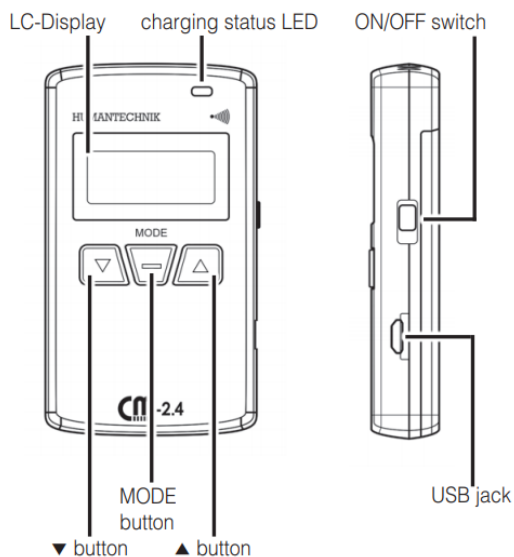

3.1 Funktionsknapper på modtager

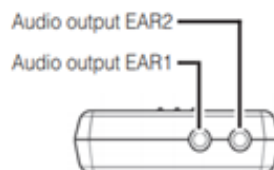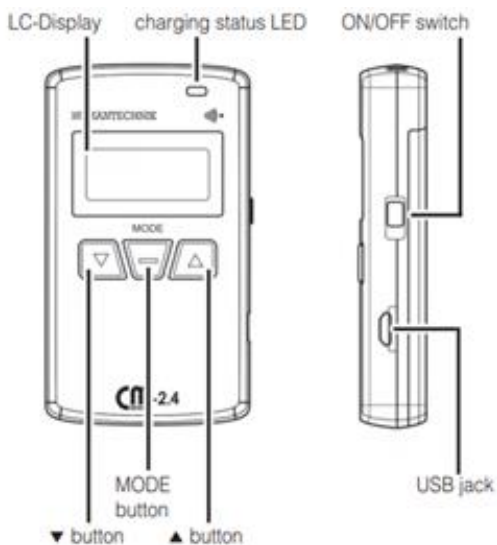


4. Detaljeret beskrivelse

4.1 Tænd / sluk

Skub ON/OFF-kontakten opad for at tænde enhederne. LC-displayet lyser. For at slukke for enhederne efter brug: Skub ON /OFF-kontakten tilbage til den nederste position. LC-displayet slukkes.

4.2 Transmission og modtagelse

Transmissionen starter, så snart enhederne er tændt. Symbolerne  »MASTER« og »TALK« er angivet på senderen

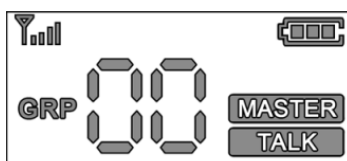

Symbolet  angiver signalstyrken.

4.3 Modtager: Lydstyrke op / ned

Lydstyrken kan justeres fra niveau 00 (Mute) til 09 (maks. Lydstyrke). Brug knapperne »▼« og »▲« til at justere lydstyrken efter ønske.



4.4 Modtager: Audioudgange EAR1 og EAR2. De medfølgende øretelefoner eller halsslyngen kan være tilsluttet en af udgangene EAR1 eller EAR2.

3,5 mm lydстик gør det muligt at tilslutte forskellige lydgeningsudstyr, såsom øretelefoner, hovedtelefoner, halsteleslynge men også lydforstærkere med mere.

Samtidig brug af begge udgange er muligt, men lydstyrken kan ikke justeres separat.

4.5 Transmitter: Justering af indgangsfølsomhed. Følsomheden af både indgangene »MIC« og »AUX« kan indstilles fra 00 til 05. For at indstille følsomhed, tryk på MODE-knappen. »VOL«-symbol vises på displayet. Brug knapperne »▼« og »▲« for at indstille indgangsniveauet som ønsket.

4.6 Strømforsyning /genopladning

Enhederne er udstyret med en genopladelig lithium-ion-batteri på 3,7 V/1100 mAh. Tilslut opladeren for at oplade batterierne med USB-strømforsyningen: Anbring enhederne i opladeren, eller sæt USB-ladekablet ind i USB-stikket på den respektive enhed og tilslut den til en almindelig USB-port (computer, bærbar computer, USB-strømforsyning). Den røde LED-lampe for opladning lyser under genopladning. LED'en slukker, når batteriet er fuldt opladet.

4.7 Valg af gruppenummer

I sjældne tilfælde af interferens, kan det hjælpe at ændre gruppenummer. Følgende justering skal foretages på både senderen og modtageren:

Sluk enheden. Hold derefter begge knapper nede »▼« og »▲« samtidig med du tænder enheden.

Symbolet „GRP“ i displayet blinker. Vælg et gruppenummer efter eget valg mellem 00 og 39 ved at trykke på »▼« og »▲« knapperne. Efter skal du vente i 5 sekunder for at ændringen træder i kræft. »GRP« -symbolet holder op med at blinke og valgte gruppenummer vises.

Bemærk venligst: Der skal kun være en aktiv sender indeni en gruppe! Yderligere aktiverede sendere med det samme gruppenummer vil forårsage interferens i lyd kvaliteten. Sender og modtager skal indstilles til samme gruppe nummer!

4.8 Specifikationer CM 2.4

Mål	85 x 50 x 15 mm (H x B x D)
Vægt	66 g
Frekvens type	ISM 2403 - 2480 MHz
Transmissionstilstand	ISM 2,4 GHz FSK-modulation med frekvenshop
Transmissionseffekt	Maks. 10 mW
RX-følsomhed	-95 dB
Forsinkelse	<30 ms
Datahastighed	2 Mbps
Strøm LI-ION	3,7 V / 1100 mAh
Brug tid pr. opladning	Ca. 20 timer
Rækkevidde	op til 150 m

Overensstemmelse

Denne enhed opfylder følgende EU-direktiver:

- 2011/65 / EG RoHS-direktivet
- 2002/96 / EG WEEE-direktivet
- 1999/5 / EG R & TTE-direktivet



Overholdelse af ovennævnte direktiver er bekræftet af CE-forseglingen på enheden. CE-overensstemmelseserklæringer er tilgængelige på internettet på www.humantechnik.com. - Specifikationer kan ændres.

Vedligeholdelse og pleje

Alle »CM-2.4« -enheder kræver ingen vedligeholdelse. Hvis de bliver snavsede, skal du blot tørre dem af. Rengøres med en blød, fugtig klud. Brug aldrig spiritus, fortyndervæsker eller andre organiske opløsningsmidler. Udsæt dem ikke for kraftigt sollys. Derudover skal de beskyttes mod overdreven varme, fugt og alvorlige mekaniske stød.

Bemærk: Disse produkter er ikke beskyttet mod vandstænk. Anbring ikke fyldte beholdere med vand, såsom blomstervaser, eller noget med en åben ild, såsom et tændt lys, over eller tæt på produkterne.

Egne noter:

Garanti

Alle »CM-2.4« -enheder er meget pålidelige produkter. Hvis der opstår en funktionsfejl på trods af at enheden er opsat og betjent korrekt, bedes du venligst kontakte din forhandler eller producenten direkte.

Denne garanti dækker reparation af produktet og vi returnerer det gratis til dig. Vi anbefaler at sende produktet i sin originale emballage.

Garantien gælder ikke skader, der er forårsaget ved forkert håndtering eller forsøg på at reparere enhed af uautoriserede personer (brud på enhedens forsegling).

Reparationer udføres kun under garanti, hvis ledsaget af en kopi af forhandlerens faktura / købskvittering. Angiv altid produktets serienummer ved enhver henvendelse.

Bortskaffelse af brugt elektrisk og elektroniske enheder (gældende i landene i Den Europæiske Union og andre europæiske med et separat indsamlings-system). Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke skal håndteres som almindeligt husholdningsaffald, men skal returneres til et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektroniske enheder.

Du beskytter miljøet og din sundhed ved korrekt bortskaffelse af dette produkt. Miljø og sundhed er truet af forkert bortskaffelse.



Scantone A/S, Stestrupvej 86 B, 4360 Kr. Eskilstrup

Tlf. 46 19 51 00 – info@scantone.dk – www.scantone.dk