


Adapter for enkelt side, og dobbelt side løft

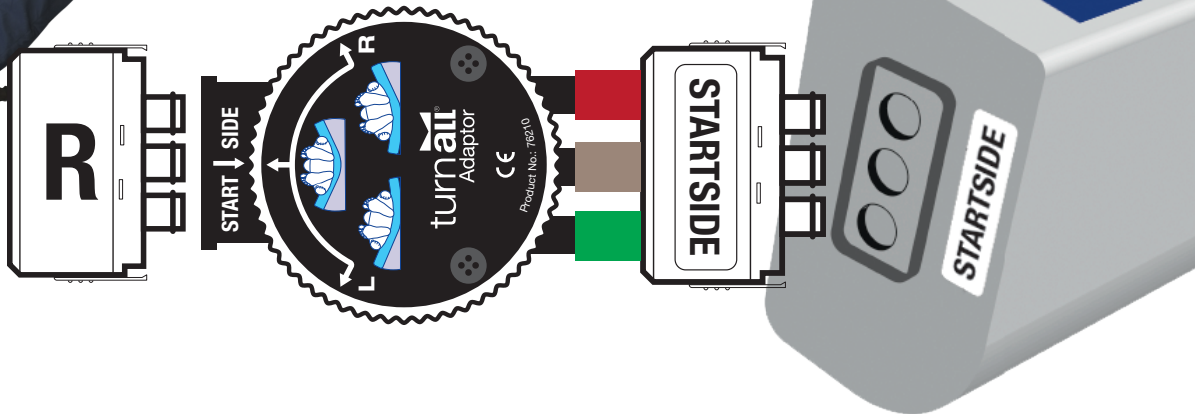


Den nye adapter sættes ind mellem den eksisterende pumpe og Turn All-slangeforbindelsen.

Højre/venstre-justeringen er set fra fodenden af sengen



Den midterste position af drejeknappen løfter begge sider af madrassen til en vinkel på 30° og forbliver der i en statisk position.

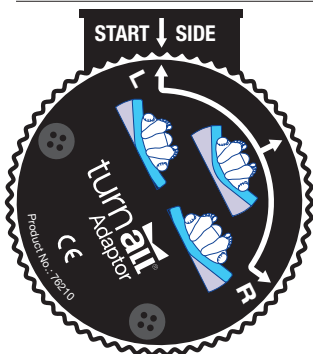

Venstre position på drejeknappen løfter venstre side af madrassen til en vinkel på 30° i 30, 60 eller 90 minutter, returnerer 30, 60, 90 minutter i liggende stilling under overgang til næste løft af venstre side. 5° sidestøtte er aktiveret hele tiden.



* Hvis systemet ikke løfter, når det startes, kan det være startet i liggende stilling. For at skifte til 30 graders løft skal du slukke for pumpen på tænd/sluk-knappen i 5 sekunder og tænde igen.



Den højre position af drejeknappen løfter madrassens højre side til en vinkel på 30° i 30, 60 eller 90 minutter, returnerer 30, 60, 90 minutter i liggende stilling under overgang til næste løft af højre side. 5° sidestøtte er aktiveret hele tiden.



* Hvis systemet ikke løfter, når det startes, kan det være startet i liggende stilling. For at skifte til 30 graders løft skal du slukke for pumpen på tænd/sluk-knappen i 5 sekunder og tænde igen.