

Grid Pad Go 10

Standard og Slimline udgaver

Manual og sikkerhed

Smartbox

Communication is life

Denne enhed er fremstillet af Smartbox Assistive Technology Ltd

Det Forenede Kongerige

Smartbox Assistive Technology Ltd
Ysobel House, Enigma Commercial Centre
Sandys Road
Malvern
WR14 1JJ

USA

Talk to Me Technologies
1100 Technology Parkway
Cedar Falls
IA 50613
United States

Europa

REHAVISTA GmbH
Konsul-Smidt-Str. 8c
28217 Bremen
Germany

Document: Grid Pad Go 10 (ST10E - SS10E) Manual and Safety, DK_A
Device: Grid Pad Go 10 (ST10E / SS10E)
Language: Danish
Date of issue: January 2025

Copyright © 2025 Smartbox Assistive Technology



Standard og Slimline udgaver

I denne vejledning finder du de grundlæggende oplysninger om, hvordan du kommer godt i gang med din Grid Pad Go 10.

Du kan finde en komplet guide til alle funktionerne i din Grid Pad Go 10 på Smartbox Hub:



<https://hub.thinksmartbox.com/topic/grid-pad/>


Grid Pad Go 10: Standard


Fronthøjtaler



Fronthøjtaler

Frontkamera

Håndtag

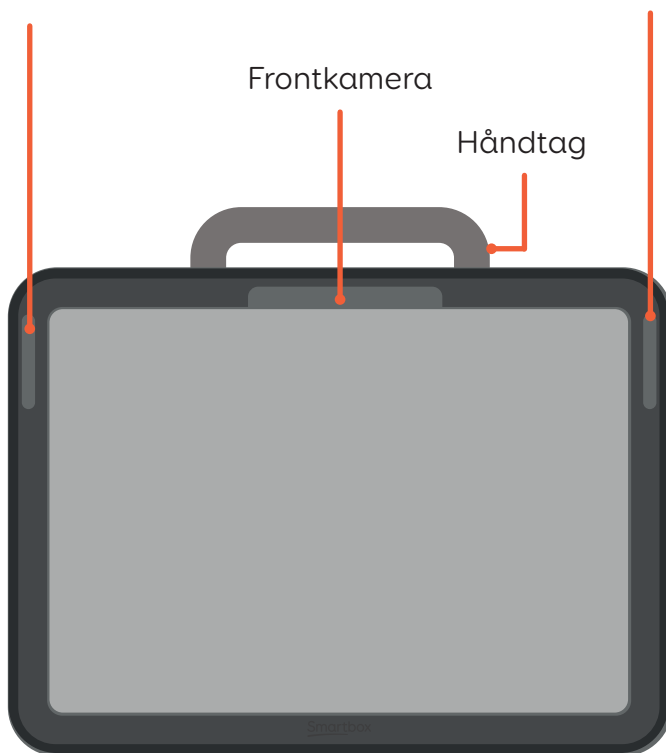

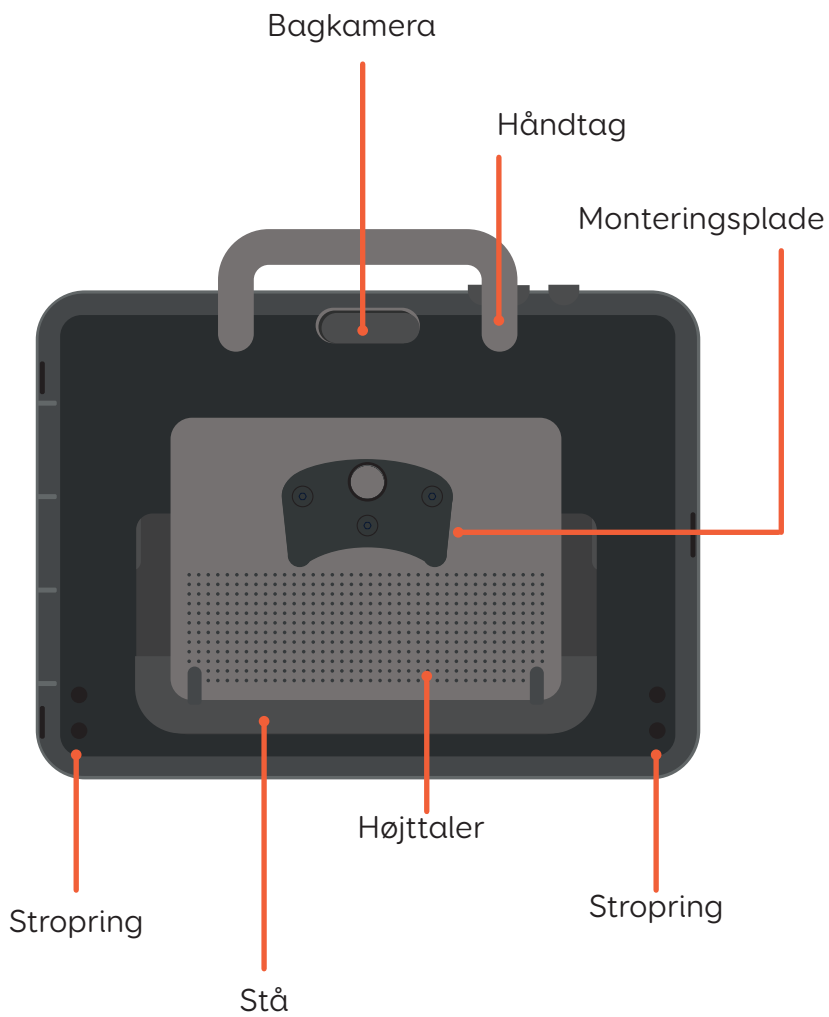

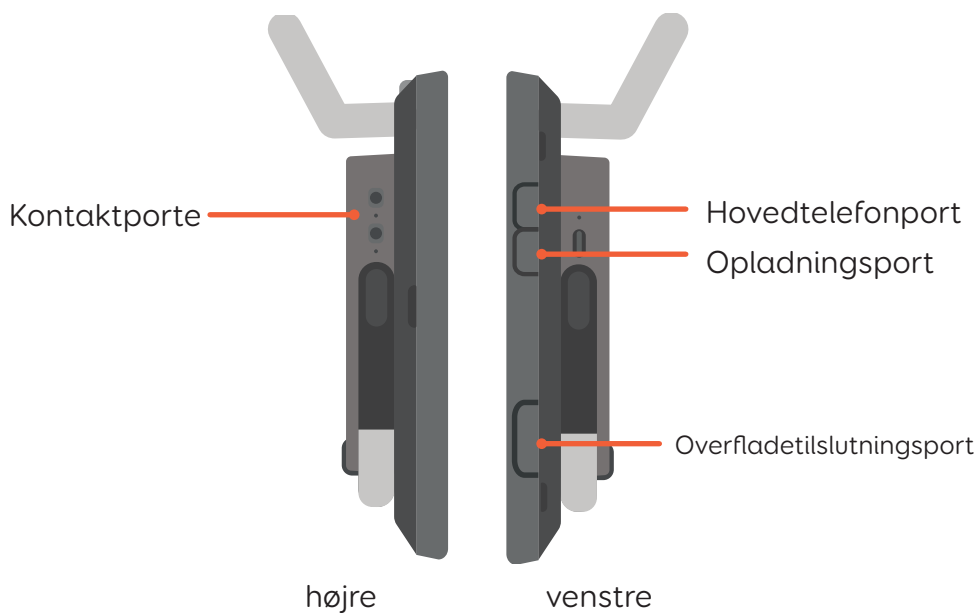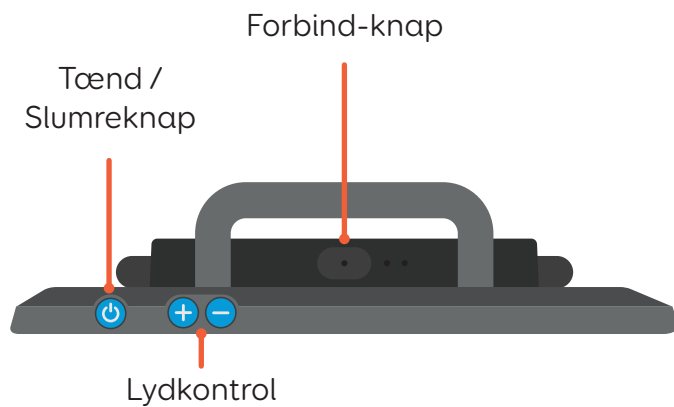


Grid Pad Go 10: Slimline

Højttaler

Frontkamera


Tænd /
Slumreknop

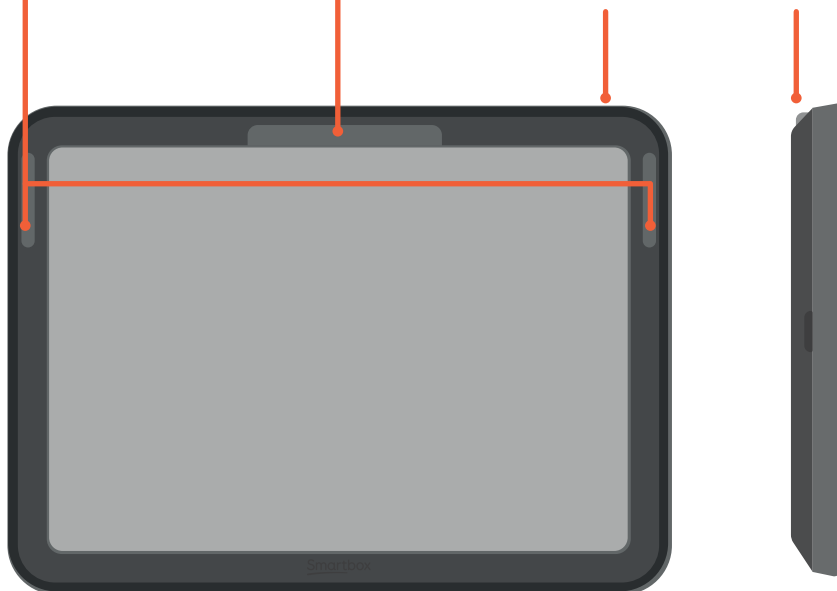

Tænd /
Slumreknop

Lydkontrol



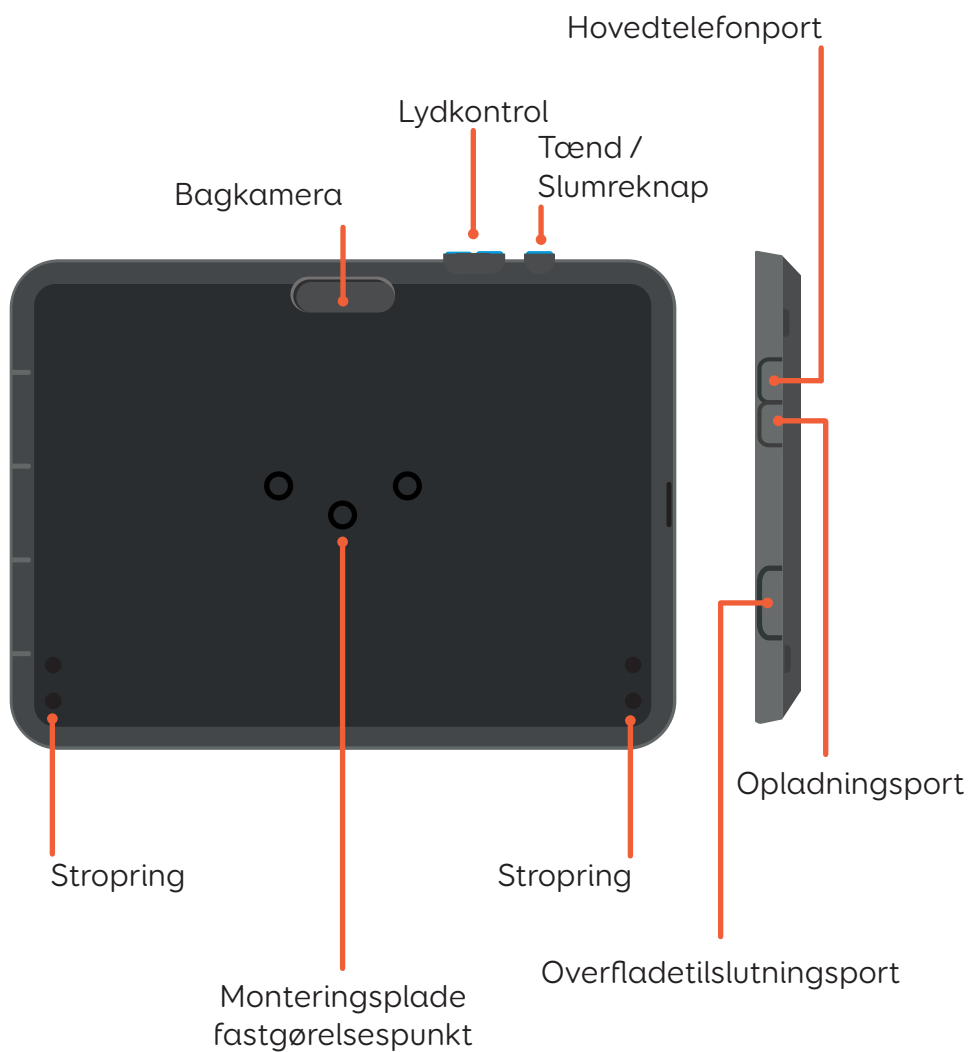

Hvad er der i æsken?

Smartbox etui
Smartbox etui med bagboks (**kun standard**)
Smartbox etui (**kun Slimline**)

Skulderstroppen
Taske
Skærmbeskytter
Opladningskabel
Strømadapter til stikkontakt
Grid

For at lære mere om din Grid Pad Go 10, vælg
Indstillinger - Generelt - Om



Din Grid Pad har mange funktioner, som kan brugertilpasses og styres i Grid.

Besøg Smartbox Hub for at få flere ressourcer og vejledninger til, hvordan du kommer i gang med Grid.

- Kom godt i gang med Grid
- Betjeningsmetoder og opsætning
- Fejlfindingsværktøjer
- Videoer og webinarer
- Ressourcer til grid layouts
- ...og meget mere.



**Læs mere om specifikationen af
Grid Pad Go 10:**



**Lær mere om de anvendte
materialer i Grid Pad Go 10 og
dens emballage:**




**Besøg Smartbox Hub for en stor
udgave af Grid Pad-manualen**



Tænd/sluk :Standard

Trin 1

Tænd din Grid Pad Go 10 ved hjælp af tænd/sluk-knappen på toppen af enheden.

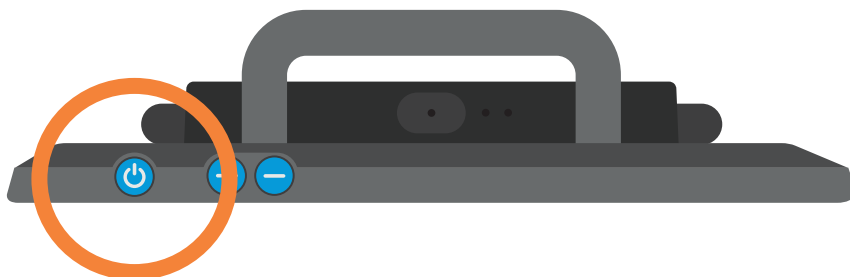

Trin 2

Tænd for højttaleren ved at trykke og holde Connect-knappen nede i 3 sekunder.



Tænd/sluk : Slimline

Enhedens tænd/sluk-knap sidder på den øverste venstre side af din Grid Pad Go 10.

For at tænde for din enhed skal du trykke på og holde tænd/sluk-knappen i 3 sekunder samt trykke på og holde Forbind-knappen i 3 sekunder.



Få din Grid Pad Go 10 til at slumre

Slumre er en indstilling med lavt energiforbrug, hvor enheden er inaktiv, og skærmen er slukket.

Tryk let på tænd/sluk-knappen for at få enheden til at slumre.

Tryk let på tænd/sluk-knappen for at vække enheden.

Sluk enheden

For at slukke enheden skal du trykke på og holde tænd/sluk-knappen.

Swipe >Skub for at slukke<-knappen på skærmen. Tryk på krydset for at annullere.

For Grid Pad Go 10 (Standard) skal du trykke på og holde Connect-knappen nede i 3 sekunder for at slukke for højttaleren.


Opladning - Standard

Når du oplader din Grid Pad 10 Go, skal du sørge for, at enheden og højttaleren oplades på samme tid. Grid Pad Go 10-opladeren har et Dual USB C-kabel.

Forbind Grid Pad-strømadapteren til en stikkontakt.

Forbind opladningskablet til strømadapteren.

Forbind USB C-kablet til opladningsport 1 & 2.

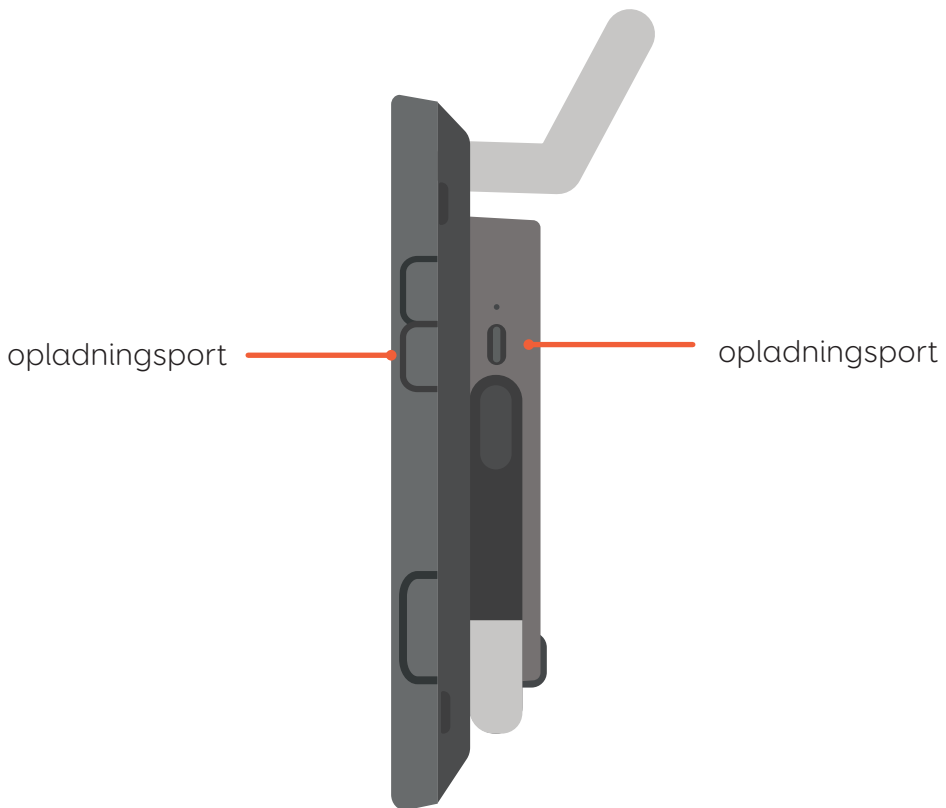


Opladning - Slimline

Forbind Grid Pad Go 10-strømadapteren til en stikkontakt.


Forbind opladningskablet til strømadapteren.

Forbind Lightning-kablet til opladningsport 1.

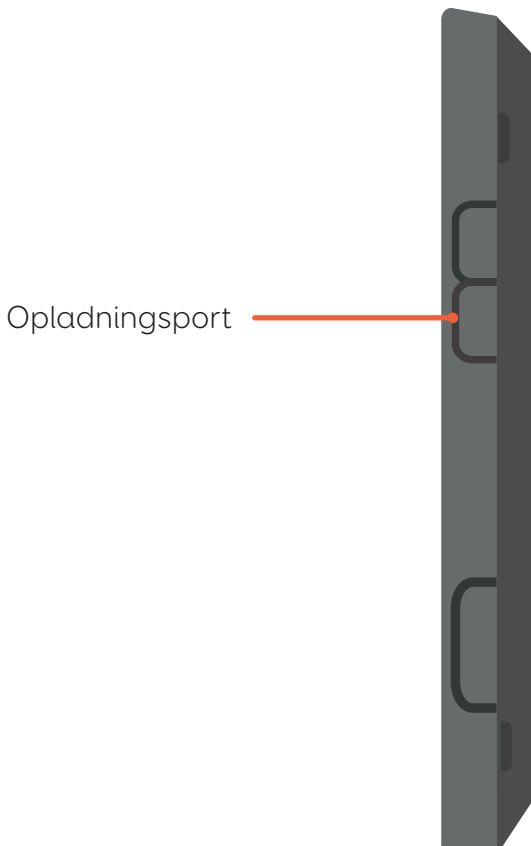

Sådan anvendes standen

Din Grid Pad Go 10s stander kan anvendes til at anbringe den på et skrivebord eller et bord, så den kan bruges bekvemt i enhver vinkel.

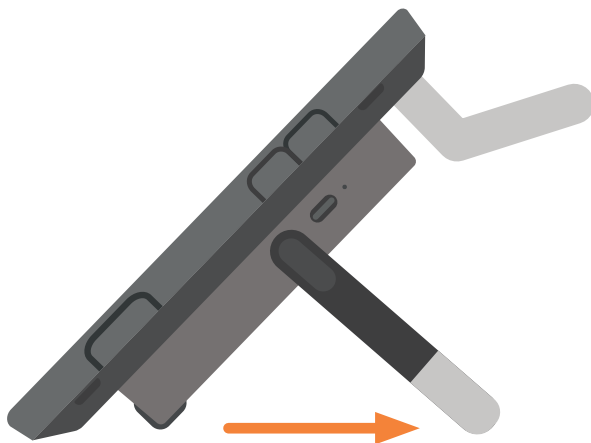


Montering

Din Grid Pad Go 10 kan monteres på en Rehadapt eller Daessy-tilslutning (monteringsbeslag sælges separat)


Det dobbelte monteringsbeslag kan monteres med skruerne og skruetrækkeren, som følger med sættet, i de tre huller bag på casen.

Flere oplysninger om sikker montering og vejledning om brug af Grid Pad Go 10 på en montering er tilgængelig i sikkerhedsmeddelelserne på side 23.

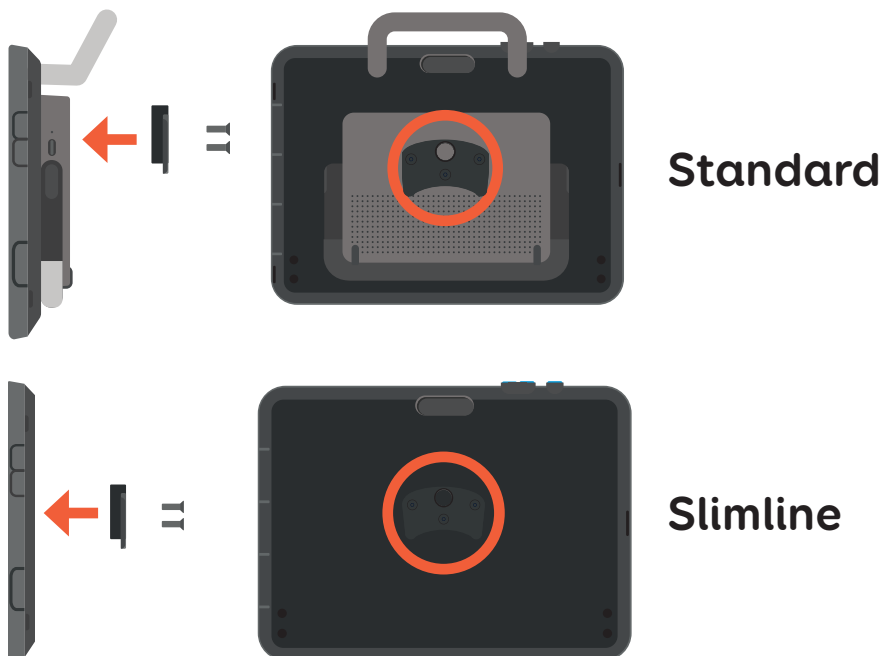


Fastgørelse af skulderstroppen

For at fastgøre remmen til din Grid Pad Go 10, før enden af skulderremmen gennem fastgørelsespunktet, slip stikket og skub det gennem løkken. Sæt stikket på igen og gentag på den modsatte side.

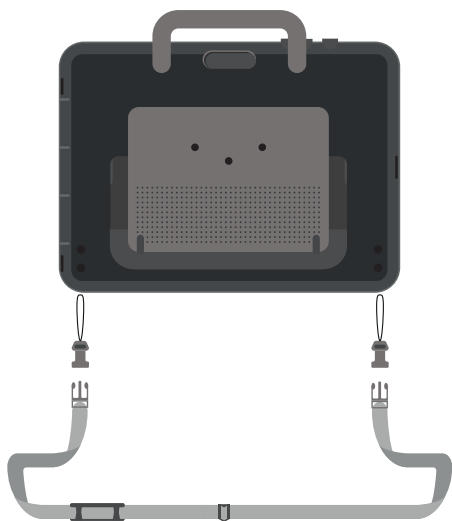

Standard

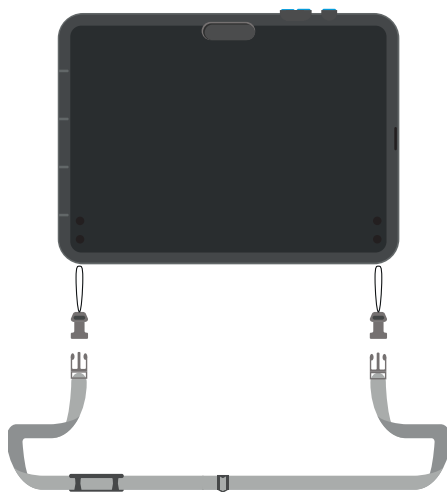



Slimline

Sådan finder du model- og serienummeret

Når du kontakter din supportgruppe, bedes du venligst have din enheds model- og serienummer på rede hånd. Det hjælper os med at identificere enheden, du har et problem med.

Du kan finde både modelnummeret og serienummeret bag på din Grid Pad.

Model- og serienummeret for enheden er placeret under stativet eller på bagsiden af enheden:

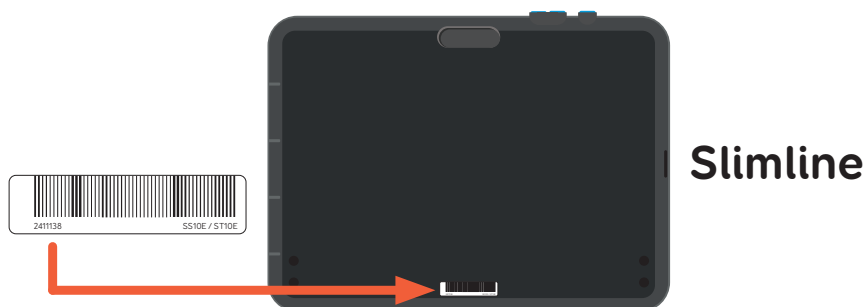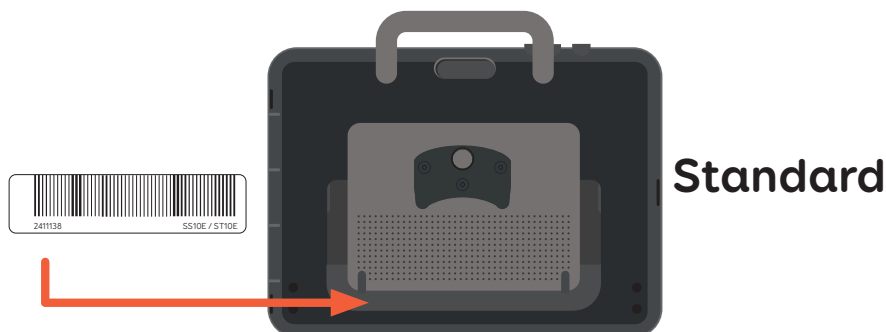

Firmware-opdateringer

Fra tid til anden vil Smartbox udsende opdateringer til Grid pad Go 10-højtaleren.

Besøg Smartbox-hubben for vejledning og fejlfinding af firmwareproblemer.



hub.thinksmartbox.com/topic/smartbox-link

Rengøring, dekontaminering og opbevaring af din enhed

Rengøring og dekontaminering af din enhed

- Luk din enhed ned, og tag opladeren ud før rengøring.
- Fjern alle kabler, der er tilsluttet enheden.
- Rengør alle de udvendige overflader med en fugtig klud eller spritserviet.
- Lad enheden tørre.
- Gentag processen for alt tilbehør, du måtte bruge med enheden.
- Når enheden er tør, kan skærmen også rengøres med en mikrofiberklud.
- Sejt snavs og rester kan fjernes med en tandbørste eller lignende.

Brug ikke sprayrengørevæske, gel eller polermiddel direkte på din enhed, og sænk ikke enheden i vand.

Opbevaring af din enhed

Når din enhed ikke er i brug, bør den opbevares sikkert. Læg eller pres ikke hårde genstande mod skærmen. Afbryd alle enheder, som er sluttet til enhedens porte, inklusive USB-porte, kontaktporte og strømkablet.

Enhedsspecifikation

Operativsystem

Temperatur	0 - 35 °C
------------	-----------

Opbevaringsmiljø

Temperatur	-20 °C - 45 °C
------------	----------------

Symbolforklaring

Symbol	Betydning
	Hovedtelefonport
	Opladningsport 1
	Opladningsport 2
	Forbind-knap
S1	Kontaktport 1
S2	Kontaktport 2
	CE-mærkningssymbol, der angiver overensstemmelse med EU's lovgivning.
	Federal Communications Commission-symbol, der angiver overensstemmelse med USA's lovgivning.
	WEEE-symbol, der angiver at du skal bortskaffe dette udstyr i overensstemmelse med lokale regler.

	Tænd/sluk-symbol
+	Øg styrke-symbol
-	Mindsk styrke-symbol
	Se manualen-symbol
IP22	Indtrængningsbeskyttelsesklasse 22
	UK Conformity Assessed symbol til at erklære overensstemmelse i UK
	Unik enhedsidentifikator
	Medicinsk udstyr
	EU-autoriseret repræsentant
	Schweizisk-autoriseret repræsentant
	Modelnummer
	Serienummer
	Min. / Maks. opbevarings- og transporttemperatur
	Min. / Maks. fugt ved opbevaring og transport

Sikkerhedsmeddelelser

Grid Pad Go 10 er klasse 1 medicinsk udstyr.

Specifikationer og standarder findes i afsnittet om overholdelse af angivne standarder i denne manual.

Tag venligst disse sikkerhedsadvarsler til dig for at sørge for sikker betjening af din enhed.

Anvendelse

Tilsigtet brug

Den anvendes til at generere syntetiseret tale.

Tiltænkt bruger

Enheden er designet til personer med komplekse kommunikationsog/ eller betjeningsbehov.

Komplekse kommunikations- og/ eller betjeningsbehov kan skyldes forskellige sygdomme, herunder, men ikke begrænset til:

- Udviklingsforstyrrelser, f.eks. cerebral parese, udviklingsmæssig verbal dyspraksi, autistisk spektrumforstyrrelse (ASD), sproglig

udviklingsforstyrrelse (DLD), forsinket udvikling.

- Erhvervede lidelser, f.eks. kardiovaskulær ulykke (CVA/ slagtilfælde), demens, traumatisk/ erhvervet hjerneskade (TBI/ABI).

Den kan også anvendes af individer med komplekse betjeningsbehov i fravær af kommunikationsvanskeligheder til computerstyring, omverdenskontrol og kommunikation, som ikke er ansigt-til-ansigt, f.eks., men ikke begrænset til individer med:

- Skade på rygmarv
- Degenerative neuromuskulære sygdomme (f.eks. muskeldystrofi, spinal muskelatrofi)

Tilsigtet miljø

Enheden kan bruges i forskellige miljøer i henhold til brugerens ønske, på den tilsigtede måde som beskrevet ovenfor. Disse miljøer kan omfatte, men er ikke begrænset til:

- private hjem
- understøttede boliger
- sygeplejefaciliteter
- skoler, gymnasier, universiteter
- i samfundet, f.eks. butikker, restauranter

Vigtige kontraindikationer, advarsler og forholdsregler

Selv om enheden designet til at hjælpe med udtryksfuld kommunikation, bør den anvendes i kombination med forskellige alternative og supplerende kommunikationsmetoder (ASK), og man bør derfor ikke stole på, at en person kan kommunikere ekspressivt udelukkende ved hjælp af enheden.

Andre ASK-metoder kan omfatte brug af papirbaserede systemer, tegnsprog eller rammer til øjenudpegning. På trods af dette er der enighed om, at personer med betydelige kommunikationsog/ eller betjeningsvanskeligheder vil være stærkt afhængige af VOCA (kommunikationshjælp med talegengivelse), i dette tilfælde Grid Pad, for at kommunikere på grund af den betydelige forbedring af ekspressiv kommunikation, VOCA ofte bringer.

Enheden er designet og fremstillet til at være ekstremt robust og pålidelig, men kan holde op med at fungere pga. strømsvigt eller andre tekniske problemer. Derfor bør enheden ikke:

- ikke bruges som et livsnødvendigt udstyr.
- udgøre en nødvendighed for en brugerens helbred.
- være brugerens eneste måde at foretage et nødopkald eller slå alarm.
- bruges til administration af medicin.
- være brugerens eneste måde at interagere med CE-enheder på.

Når enheden samarbejder med andet udstyr, kan der være inferens mellem enheden og tilslutningsudstyret. Derfor bør enheden ikke bruges:

- i et MR-miljø.
- i et røntgenmiljø.
- i et militært miljø.
- i et barskt RF-miljø.

Undgå høreskader

Brug af hovedtelefoner og højttalere ved høj lydstyrke kan forårsage permanent høreskade. Hold altid enhedens lydstyrke på et sikkert niveau.

Holdbarhed

Din enhed er solid og robust, men skal håndteres med forsigtighed, når du bevæger dig rundt. Den er blevet testet for fald på en meter. Bemærk, at dette ikke omfatter tilbehør.

Vand og væsker

Undgå vand eller væsker på enheden, især i portene eller åbningerne.

Hændelser

Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med enheden, skal du rapportere det til Smartbox (repair@thinksmartbox.com) og den korrekte myndighed i dit land/stat.

Kontakt med bruger

Rør ikke ved din enheds overflade med brudt hud, da dette kan forværre såret.

Spædbørn eller højrisikogrupper bør ikke røre ved overfladen af enheden, hvis der er risiko for at brænde huden

Strømforsyning og batterier

Din enhed indeholder et genopladeligt litium-ion-batteri. Alle genopladelige batterier nedbrydes med tiden. Brugstiden for din enhed efter en fuld opladning kan blive kortere over tid.

For at opnå optimal ydeevne bør din enhed ikke oplades ved ekstreme temperaturer under 0 °C eller over 45 °C. Ved disse temperaturer oplades batteriet langsomt eller slet ikke.

Udsæt ikke din enhed for ild eller temperaturer over 90°C, da disse forhold kan forårsage, at batteriet ikke fungerer korrekt, antændes eller eksploderer.

Oplad kun din enhed med det medfølgende strømkabel. Brug af uofficielle strømforsyninger kan forårsage alvorlige skader på din enhed og medføre brand. Hvis din enheds strømkabel er bortkommet eller beskadiget, skal du kontakte din udbyder.

Når batteriet i din enhed er afladet, og enheden ikke er tilsluttet en strømkilde, lukker enheden automatisk ned for at undgå beskadigelse på batteriet og hardwaren. Operativsystemet vil forsøge at gøre dette så sikkert som muligt, men det anbefales at tilslutte strømkablet, inden din enhed slukkes.

Det batteri, der strømforsyner din enhed, er underlagt forsendelsesbestemmelser. Tal med dit postvæsen eller kurér inden forsendelse for at sørge for en sikker levering af din enhed.

Placer ikke din enhed et sted, hvor strømadapterens stik er svært at fjerne.

Kun vores autoriserede personale har lov til at udskifte batteriet. I modsat fald kan der opstå personlig skade eller skade på enheden.

Du må ikke efterse eller foretage vedligehold på enheden, mens enheden er i brug. Sørg for at slukke for enheden og tage alle kabler ud, før du begynder at efterse eller foretage vedligehold på enheden.

Montering

Brug venligst en monteringsløsning, som er designet til din Grid Pad Go 10 (sælges separat). Sørg for, at det valgte monteringsystem er korrekt til dine behov, og udfør om nødvendigt en risikoanalyse.

Transport af din enhed


Under transport skal du sikre dig, at din enhed er tilstrækkeligt beskyttet mod slag og stød.





Der er strenge regler for litium-ionbatterier ombord på fly. Reglerne varierer fra flyselskab til flyselskab, så det anbefales at kontakte dit flyselskab, før du rejser.





Temperatur:


Sørg for, at din enhed er slukket, før du opbevarer eller lægges den i en taske.

Hvis din enhed anvendes ved høje temperaturer eller direkte sollys, når den måske temperaturer, som kan udløse en automatisk nedlukning. Dette er en sikkerhedsfunktion, der forhindrer varig beskadigelse af enheden. Hvis dette sker, skal du vente, indtil din enhed er kølet af, før du genstarter.

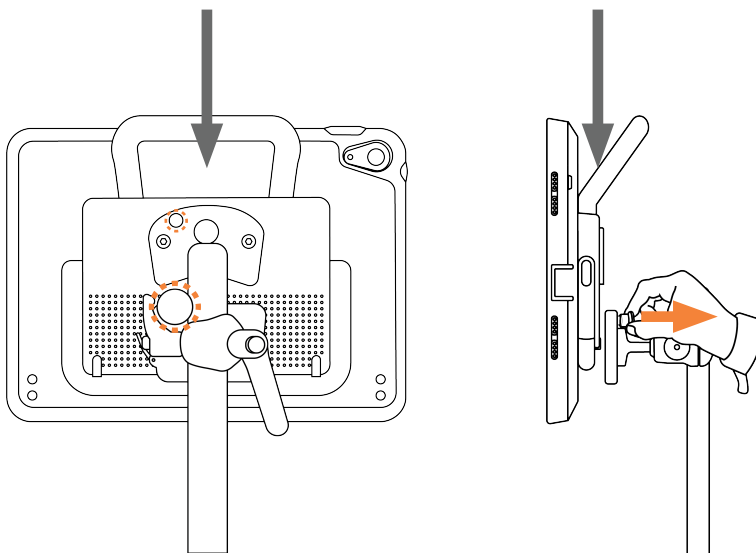

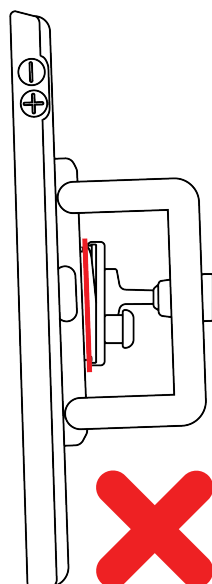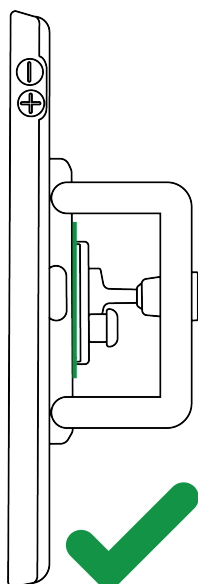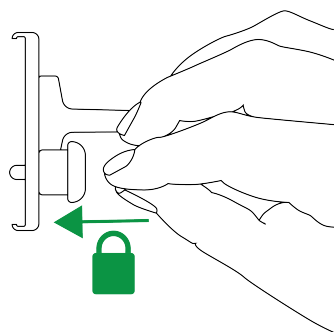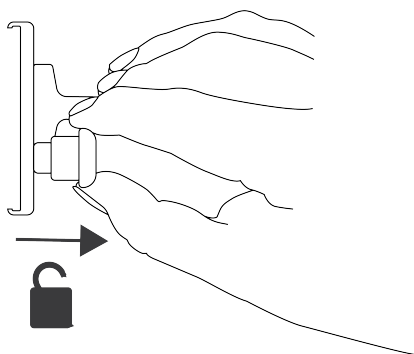

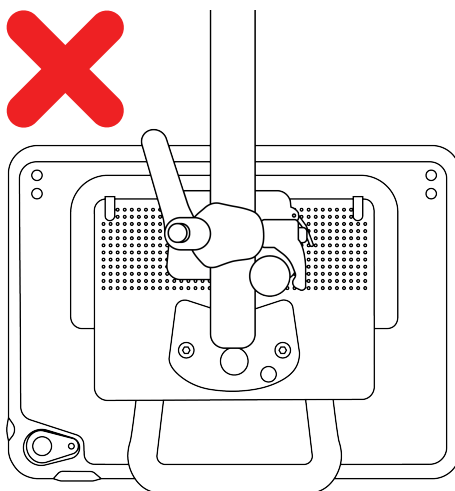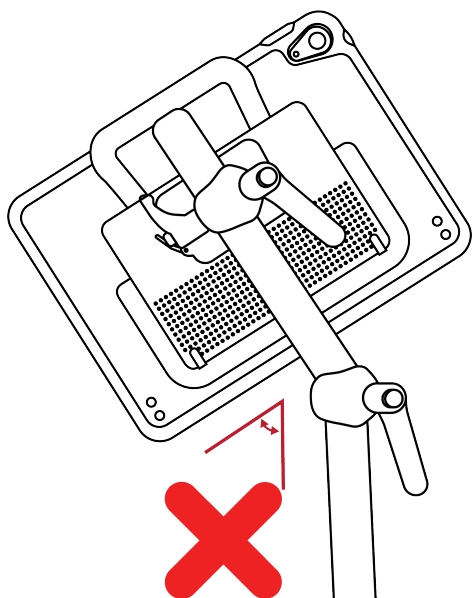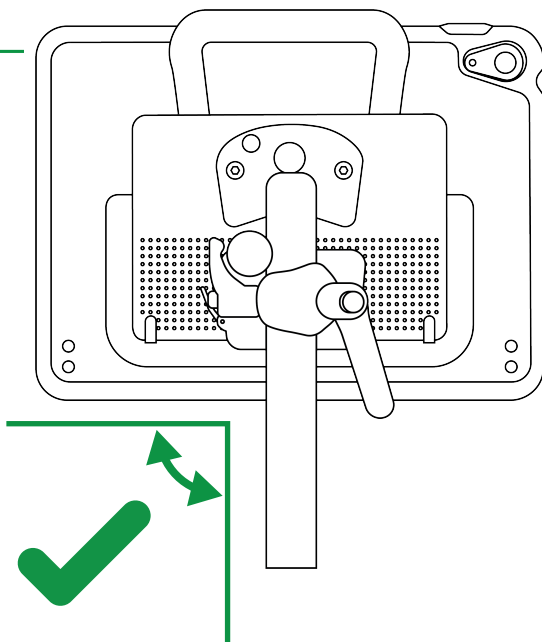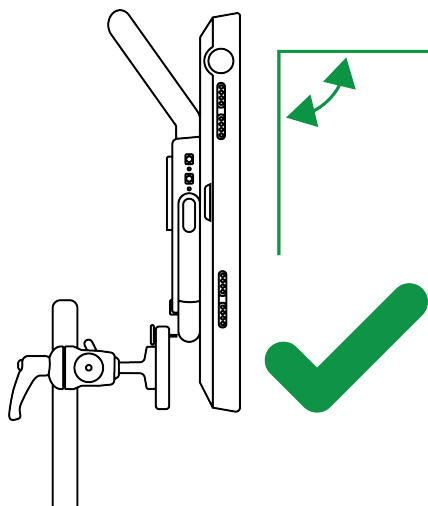

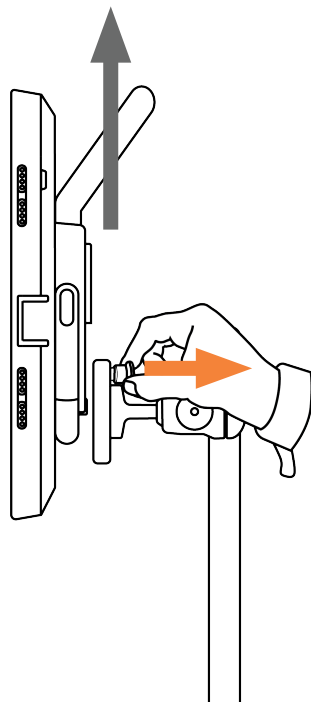

Porte og forbindelser

Tilbehør, der er tilsluttet porte til SIGNAL INPUT/ OUTPUT, skal være i overensstemmelse med IECstandard 60601-1 eller 62368-1.



Beskadigelse af enheden

Hvis din enhed beskadiges, kan der muligvis falde små dele af. Disse kan udgøre en kvælningsfare. Unge børn og personer med kognitive handicap skal overvåges, når enheden anvendes. Der skal også holdes opsyn med dem, når enheden pakkes ud, da indpakningen kan udgøre en kvælningsfare.

Under ekstreme omstændigheder kan skader på enhedens frontskærm resultere i skarpe kanter. Under disse omstændigheder må enheden ikke anvendes.



Ikke steril

Din enhed er ikke steril. Betjen den ikke med åbne sår eller hvis du er under gennemgribende medicinske behandlinger.



Advarsel om epilepsi

Some people with photosensitive epilepsy are susceptible to seizures when exposed to certain lights or light patterns. If you feel odd or nauseous when in front of your device, move away from the device and consult a medical professional.




Reparationer og vedligeholdelse

Din enhed kan ikke serviceres af brugeren. Hvis din enhed skal repareres, skal du kontakte din lokale forhandler.

Forstyrrelse af medicinsk udstyr.

Denne Grid Pad Go 10 indeholder magneter, som kan forstyrre medicinsk udstyr. Tal med din læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få information, som er specifik for dit medicinske udstyr, samt om du skal holde en sikker afstand mellem dit medicinske udstyr og denne enhed eller noget af tilbehøret dertil (150mm). Hvis du har en mistanke om, at denne enhed forstyrrer dit medicinske udstyr, så hold op med at anvende din enhed.

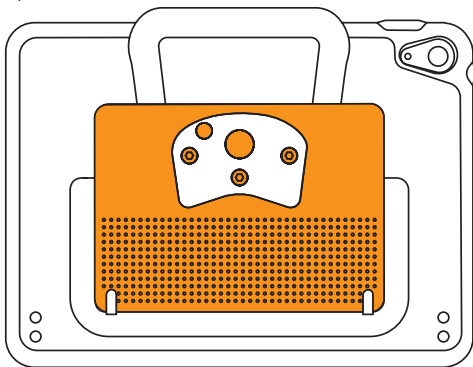

Kvælningsrisiko

Enheden leveres med en strop. Hvis der er en risiko for, at brugeren kan blive kvælt af stroppen, så brug ikke stroppen.

Din enhed leveres med et strømkabel og kan bruges sammen med tilbehør, der kan have kabler. Disse kan udgøre en kvælningsfare.

Fejlfinding og kundesupport

Kontakt supporten på: hub.thinksmartbox.com

Sørg for at have dit serienummer klar. Dette kan findes under din enheds stativ.

Renovering

Hvis enheden skal repareres, før den genbruges, bedes du kontakte din lokale forhandler.

Før enheden genbruges, skal du sikre dig, at rengørings- og raddekontamineringsproceduren er blevet udført.

Du vil måske også behøve at fjerne eventuelle personlige data fra enheden. Kontakt Smartbox for at få support og råd.

Hændelser

Hvis en alvorlig hændelse forekommer i forbindelse med enheden, så rapportér det til Smartbox (repairs@thinksmartbox.com) samt den korrekte myndighed i dit land/stat.

Tilbehør

Enheden er kompatibel med en række tilbehør, som kan kombineres for at justere dens funktion som VOCA.

For at få information om kompatibelt tilbehør, som for tiden er tilgængeligt, skal du besøge:
hub.thinksmartbox.com/topic/grid-pad-go/

Bortskaffelse

Bortskaf venligst i overensstemmelse med lokale regler for elektronisk affald.

Datasikkerhed

Enheden inkorporerer elektroniske, programmerbare systemer og software.

For at opnå den bedste ydelse anbefaler vi, at du holder operativsystemet og den leverede software opdaterede med de seneste sikkerhedsløsninger og -funktioner.

Du skal sikre dig, at adgangskoder og koder opbevares sikkert for at forhindre ikke-autoriseret betjening.

Enheden har funktioner, som kræver internetforbindelse. Adgang til disse tjenester kan begrænses som en del af enhedens setup eller gennem netværksadministration.

EU / CE Erklæring

Hermed erklærer Smartbox Assistive Technology Ltd., at dette produkt lever op til 2017/745 EU-direktivet for medicinsk udstyr, 2014/53/EU RED, 2011/65/EU RoHS og (EU) 2015/863.

Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig her:

hub.thinksmartbox.com/topic/downloads-grid-pad-go/

Gældende standarder

ISO 14971:2019 Anvendelse af risikostyring i forbindelse med medicinsk udstyr er gældende for Grid Pad Go 10.



Dette produkt og - hvis gældende - det leverede tilbehør er mærket med »CE« og overholder derfor de gældende, harmoniserede, europæiske standarder, som er opført under EMS-direktiv 2014/30/EU, LVD-direktiv 2014/35/EU, RoHS-direktiv 2011/65/EU, Wi-Fi-enhed: RE-direktiv 2014/53/EU.



Dette produkt og - hvis gældende - det leverede tilbehør er mærket med »UKCA« og overholder dermed de følgende direktiver: Direktiverne om elektrisk kompatibilitet fra 2016 om elektronisk udstyr (sikkerhed) samt direktiverne fra 2012 om begrænsning af brug af visse farlige materialer i elektrisk og elektronisk udstyr 2012, Wi-Fi-enhed: Direktiver fra 2017 om radioudstyr.



Direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter, som er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald i EU. For at sikre korrekt genbrug skal du returnere dette produkt til din lokale forhandler, når du køber noget tilsvarende nyt udstyr; ellers skal du bortskaffe det på anviste indsamlingssteder. For at få mere information kan du tjekke: www.recyclethis.info.

Ifølge direktiverne fra 2013 om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr: Produkter, som er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald i Storbritannien. For at sikre korrekt genbrug skal du returnere dette produkt til din lokale forhandler, når du køber noget tilsvarende nyt udstyr; ellers skal du bortskaffe det på anviste indsamlingssteder. For at få mere information kan du tjekke: www.recyclethis.info

FCC- og ISCED Canada-overholdelse

C-erklæring

Indeholder: FCC ID: XCO-QCC3031

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Brug er underlagt de følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
- (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift.



BEMÆRK Dette udstyr er testet og fundet at overholde grænserne for en digital enhed af klasse B i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er

installeret og brugt i henhold til instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens til radioeller tv-modtagelse, som kan fastlægges ved at slå udstyret til og fra, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen med en eller flere af følgende forholdsregler:

- Omdiriger eller flyt den modtagende antenne.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbind udstyret til en stikkontakt eller et kredsløb, som ikke er det samme som det, modtageren er forbundet med.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

 **BEMÆRK** Producenten er ikke ansvarlig for nogen radio- eller tv-interferens forårsaget af ikkeautoriserede modifikationer af dette udstyr. Sådanne modifikationer kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

RF-eksponering

Dette udstyr overholder FCCgrænserne for stråleeksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr bør installeres og betjenes med en minimal afstand på 0 cm mellem strålingskilden og din krop. Denne sender må ikke befinde sig det samme sted eller fungere i forbindelse med nogen anden antenne eller sender.

ISED Canada-overholdelse

Til brug i Canada

Indeholder: IC: 7756A-QCC3031

Denne enhed overholder CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B). Denne enhed indeholder en licensfritaget/-de sender(e) / sender(e), som overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfritaget/-de RSS(er). Betjening er underlagt de følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage interferens.

(2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempt (s) de licence qui sont conformes aux RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 0 cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.

PSU

PD45W Wall Charger

Model No: S-TR-182D

Model: 34-0-000516S

Specifications

Input: 100V-240V, 50/60Hz, 1.2A Max

Type-C1/Type-C2 Output: 5.0V 3A, 9.0V 3A,
12.0V 3A, 15.0V 3A, 20.0V 2.25A, 45W

Type-C1/Type-C2 Output: 25.0W+20.0W

Total output: 45.0W Max

Working temperature

Max: 35°C

Size: 80x43.85x31mm

Average active efficiency: 85.92%

No-load power consumption (W): 0.254W

Sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL: Hvis du ikke overholder disse instruktioner, kan det medføre brand, elektrisk chok, sår eller skader på brugeren, produktet eller anden ejendom.

1. Forbind produktet til stikkontakt, som er tæt på og let at koble fra kilden.
2. Gør dette indendørs og et tørt sted; undgå at oplade tæt på varmeog fugtkilder.
3. Hold produktet væk fra alle væsker eller fugt.
4. Tag produktet ud af AC-stikket, når det ikke er i brug.
5. Opbevar ikke din enhed på meget varme eller meget kolde steder. Det anbefales at bruge din enhed ved stuetemperatur.
6. Brug ikke produktet, hvis synlige defekter kan observeres på det.
7. Du må hverken skille produktet ad eller ombygge det på nogen måde.
8. Vær omhyggelig med at bruge PSU'en på steder, hvor børn sandsynligvis vil være til stede.



Grid Pad Go 10 (ST10E - SS10E) Manual and Safety, DK_A
GB-IT3744