

xBand Urtilstand

Denne vejledning fokuserer på funktioner, der er specifikke for brug af xBand i urtilstand.

Oversigt over xBand

xBand har to knapper:

- **Alarmknap:** Markeret med en cirkel med en hævet prik i midten.
- **Tidsknap:** Markeret med en glat cirkel.

Grundlæggende funktioner

Se "Kom godt i gang"-vejledningen for oplysninger om grundlæggende funktioner som at tænde/slukke for xBand og tilslutte det til en telefon.

Indstil klokkeslæt

Automatisk (med forbindelse)

Klokken på xBand synkroniseres automatisk med din telefon, når den er tilsluttet.

Manuel (uden forbindelse)

Hold tidsknappen nede, indtil vibrationsfeedbacken stopper. Når du slipper, vil du mærke en svag, kontinuerlig vibration – dette betyder, at du er i tid-redigeringstilstand. Du skal nu indtaste fire cifre i 24-timers format.

Indtast et ciffer ved at trykke på tidsknappen det tilsvarende antal gange. For eksempel fire gange for 4, otte gange for 8, eller ingen gange for 0.

Bekræft hvert ciffer med ét tryk på alarmknappen og gentag for alle fire cifre. Bekræft det sidste ciffer med alarmknappen. Når alle fire cifre er indstillet, stopper redigeringsvibrationen, og tiden bekræftes med vibration.

Tjek tiden

- Ét tryk på tidsknappen: aktuelle **minutter**.
- To hurtige tryk: **timer og minutter**.

Eksempel: Klokken er 13:57

- Ét tryk: xBand vibrerer 57.
- To tryk: xBand vibrerer 13 57.

Tidsrepræsentation

Tiden vibreres som fire cifre i 24-timers format: to cifre for timer og to for minutter.

Hvert ciffer repræsenteres som kort(●) og lang(■) vibration:

- 1: én kort
- 2: to korte
- 3: tre korte
- 4: fire korte
- 5: én lang
- 6: én lang, én kort
- 7: én lang, to korte
- 8: én lang, tre korte
- 9: én lang, fire korte
- 0: to lange

Eksempel: 13:07

Vibrationssekvens: én kort, pause, tre korte, længere pause, to lange, pause, én lang + to korte.

Skift til 12-timers format

Når xBand er forbundet til en telefon, kan du i appen vælge 12-timers format. Det påvirker dog kun de **tidspunktsbeskeder**, du modtager – ikke indstilling af klokkeslæt og alarmer, som stadig skal angives i 24-timers format.

Eksempel: 14:57 vibreres som 2:57 i 12-timers format.

Indstil en alarm

Hold alarmknappen nede, indtil du mærker korte vibrationer – hver vibration svarer til en alarm (1, 2, 3 eller 4). Slip knappen, når du har nået det ønskede alarmnummer.

Efter slip aktiveres redigeringstilstand (svag konstant vibration). Indtast tiden i fire cifre ligesom ved manuel tidsindstilling.

- Indtast hvert ciffer med tidsknappen.
- Bekræft med alarmknappen.

Alarmtyper

- **Alarm 1:** Éngangs-alarm. Slettes automatisk efter afspilning.
- **Alarm 2, 3 og 4:** Gentages dagligt, indtil de slettes.

Slet en alarm

Gå ind i redigeringstilstand for den ønskede alarm. Hold tidsknappen nede, indtil vibrationerne stopper. En lang vibration bekræfter, at alarmen er slettet.

Tjek en alarm

Tryk på alarmknappen det antal gange, der svarer til alarmnummeret (fx tre tryk for alarm 3).

- Hvis alarmen er indstillet, vibrerer xBand den indstillede tid.
- Hvis alarmen **ikke** er indstillet: én lang vibration.

Snooze/Sluk for alarm

Når alarmen går i gang, vibrerer xBand alarmnummeret gentagne gange.

- **Tryk kort** på en knap: Snooze i 9 minutter.
- **Hold en knap nede** til vibration stopper: Sluk alarmen.
- **Alarm 1** slettes automatisk.
- **Alarm 2–4** gentages næste dag på samme tidspunkt.

Tjek batteriniveau

Tryk på tidsknappen fem gange. Batteriniveauet vibreres som to cifre i procent, efter samme princip som ved tidsangivelse.

App

xBand er designet til at fungere uden telefon, men du kan tilslutte den for ekstra funktioner:

- Indstil vibrationsstyrke, hastighed og pause mellem cifre.
- Administrér alarmer.
- Læs vejledninger og få hjælp.

Skift til Morse-tilstand

Morse Mode giver mulighed for at læse notifikationer og sende beskeder i morsekode. Tid og alarm fungerer lidt anderledes i denne tilstand.

For at aktivere Morse Mode:

- Forbind xBand med din telefon via appen.
- Gå til indstillinger og slå Morse Mode til.

Support

Oplever du problemer med forbindelse eller andet, så læs fejlsøgningsvejledningen.

Har du brug for hjælp eller feedback, kontakt os i appens hjælpemenu eller på

 support@xtactor.com