



Sternumsele Mand	
Art.nr.	Størrelse
5.71012.0	XS
5.71012.1	S
5.71001.1	Junior
5.71012.2	M
5.71012.3	L

Kinetic Balance

Sternumsele Mand

BRUGERVEJLEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB Sternumsele
Mand # 5.71012.X
Junior # 5.71001.1

Indhold

4 rørklemmer
4 stropholdere
4 klemmespænder
4 bæltespænder
1 brystsele
1 brugervejledning

Brug

Sele til bækkenpositionering.

Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt før brug.

Advarsel

Dette er ikke en sikkerhedssele! Dette produkt bør ikke bruges som sikkerhedssele under transport. Brug altid sternumsele sammen med en hoftesele! Åben altid selen før du åbner hofteselen.

Montering

Montering og justering må kun udføres af autoriserede personer.

Monteringsvejledning

1. Sørg for at bruge det rigtige produkt i den rigtige størrelse.
2. Læs instruktionerne i pakken omhyggeligt.
3. Kontroller, at produktet er komplet.
4. Juster klemmernes position. Tilpas afstanden mellem de øverste bæltter, så de krydser midt på skuldrene uden at berøre nakken.
Bemærk: ikke alle stole er udstyret med fastspændingspunkter. Brug evt. rørklemmerne. Dette produkt skal installeres af en autoriseret person.
4a. Rørklemmen er velegnet til runde rør med en diameter på 19 til 15 mm. Brug indsatsgummiet for at opnå den korrekte diameter. Fastgør klemmen til røret samtidig med fastgørelse af klemmen.
5. Juster placeringen af de øverste stropper, så polstringen hviler mod skuldrene.
6. Juster de nederste stropper.
7. Undgå ubehageligt tryk, og aflast trykket med jævne mellemrum. Hvis brugeren lider af hjerte-/karsygdomme eller nedsat følsomhed, bør selen ikke bruges, eller konsulter en læge. Undgå at trykke katetetre eller brugerens mave ind.
8. Brug stropholderne til at holde stropenderne på plads. Sørg for, at stropperne ikke er i vejen for bevægelige dele af sædet eller kørestolen.
9. Kontroller regelmæssigt produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele samt at stropperne er korrekt fastgjort og strammet.
10. Under brug kan selen åbnes og fastgøres ved hjælp af spænderne med sideudløser på produktet.

Vedligeholdelse

Skal vaskes i hånden i max. 30°C. Må ikke tørretumbles. Kontroller produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele ugentligt. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.



Sunrise Medical ApS
Mærkærvej 5-9
2630 Taastrup
T: 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.sunrisemedical.dk