



HUMANTECHNIK



DK

Brugervejledning

Shake:up Bluetooth® pudevibrator

Apple, Apple-logoet, iPhone og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Android™, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC. Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker foregår under licens til Humanteknik. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Introduktion

Denne brugervejledning fortæller dig, hvordan du bruger din nye trådløse pudevibrator. Husk at læse brugervejledningen grundigt. Dette vil hjælpe dig med at få mest mulig gavn af produktet.

Shake:up er ideel, hvis man ønsker at bruge sin smartphone som vækkeur, men vibrationerne i telefonen ikke er kraftige nok. Pudevibratoren forbindes trådløst med din smartphone og giver kraftige vibrationer, så du vågner.

Shake:up har Bluetooth® og fungerer med en app, der gratis kan hentes til iOS og Android smartphones.

Pudevibratorens kraftige vibrationer kan indstilles til forskelle intensiteter. Pudevibratoren vibrerer, når alarmen aktiveres.

Via appen kan der indstilles flere forskellige alarmer, tillades notifikationer om fx telefonopkald og sms-beskeder.


Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:

- Shake:up pudevibrator med strop
- Usb-c til usb-a ladekabel
- Brugervejledning

Kontakt din forhandler, hvis nogle af disse dele mangler.

Overzicht

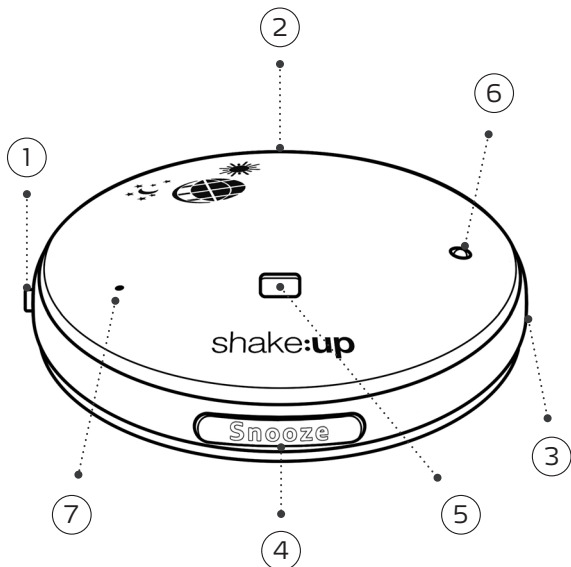

1 Tænd/sluk-knap

2 Hul til strop

3 Usb-c strømstik

4 Snooze-knap

5 LED blinklys

6 LED statusindikator

7 Indgang til nulstilling

Opladning

Oplad pudevibratoren helt, inden du bruger den første gang.

- a) Sæt usb-a-stikket på ladekablet til en egnet strømforsyning.
- b) Sæt usb-c stikket i strømstikket på pudevibratoren (3).
- c) Under opladning lyser statusindikatoren (6) rødt.
- d) Når pudevibratoren er fuldt opladet lyser statusindikatoren (6) grønt.

Afhængig af strømkilden, bør enheden være fuldt opladet efter ca. 2-3 timer. Du kan tjekke batteristatus i øverste højre hjørne i appen HT-Connect.

Opsætning af app

Pudevibratoren fungerer med appen "HT-Connect", der gratis kan hentes til iOS og Android smartphones i de respektive app stores.

- a) Download appen HT-Connect fra Google Play eller App Store.
- b) Aktiver Bluetooth på din smartphone eller tablet.
- c) Åbn appen HT-Connect.
- d) Følg instrukserne for opsætning i appen.

Når ændringerne gemmes, bekræftes det med et hvidt lys i LED statusindikatoren (6).

Giv appen de nødvendige tilladelser under indstillinger for at anvende alle funktioner.


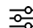
I appen kan du skifte sproget til dansk:


- a) Tryk på de tre prikker nederst til højre på startsideen i appen.
- b) Tryk på pilen ved "Language", og vælg "Danish", og gå tilbage til startsideen i appen.

Sådan indstiller du en alarm

I appen HT-Connect kan du indstille flere alarmer alt efter behov.

Sådan indstiller du en alarm:

- a) Vælg Shake:up på startsideen i appen.
- b) Tryk på + i bunden af skærmen.
- c) Vælg tidspunkt.
- d) Vælg evt. om alarm skal gentages.
Bemærk: Under "Brugerdefineret" kan du vælge ugedag for alarm.
- e) Tryk gem.
- f) Tryk på ikonet  for at justere vibrationsstyrken. Vælg "Indstilling af vækningstidspunkt", og vælg mellem de fem vibrationsstyrkeniveauer.
- g) Tryk på ikonet  for at aktiver LED blinklys, som ekstra alarm. Vælg "Indstilling af vækningstidspunkt", og aktiver "LED-advarselslampe".

h) Tryk på ikonet  for at vælge snooze-interval. Vælg "Tidsindstilling", og vælg mellem de fire intervaller.

Når du har indstillet dine alarmer, fungerer de uafhængigt af din smartphone og tablet. Pudevibratoen fungerer, selv om din smartphone ikke er tændt eller har forbindelse til pudevibratoren, da alarmindstillingerne gemmes i pudevibratoren.

Sådan slukker du for en alarm

- a) Tryk en gang på snooze-knappen (4), hvis du vil udsætte en alarm. Alarmen gentager sig automatisk med det tidsinterval, du har valgt i appen.
- b) Hold snooze-knappen inde i 3 sekunder for at slukke alarmen.
- c) Du kan også slukke for pudevibratoren og derved alarmen, ved at skubbe tænd/sluk-knappen (1) mod venstre, så den røde side af knappen bliver synlig.

Husk at tænde for pudevibratoren igen, ved at skubbe tænd/sluk-knappen (1) mod højre, så den grønne side af knappen bliver synlig, næste gang du skal bruge pudevibratoren.

Få besked om telefonopkald, sms-beskeder og notifikationer

I appen HT-Connect kan du vælge, om pudevibratoren også skal vibrere, når din smartphone ringer, eller du modtager en sms-besked eller notifikation fra dine apps.

BEMÆRK

Din smartphone skal være tændt og have forbindelse via Bluetooth til pudevibratoren, for at pudevibratoren kan registrere telefonopkald, sms-beskeder og notifikationer.

Husk at tillade notifikationer fra den pågældende app under "Indstillinger" på din smartphone.

Vær opmærksom på, at ikke alle apps virker sammen med pudevibratoren.

Oversigt over LED statusindikatorer

Ved opladning

Konstant rødt lys: Lader op

Konstant grønt lys: Er fuldt opladet

Øvrige statusindikationer

Blinker grønt 3 gange: Pudevibratoren tændes

Blinker hvidt 3 gange: Pudevibratoren slukkes

Hurtigt blått blink: Bluetooth-parring

Blått blink hvert 25. sekund: Pudevibratoren er forbundet til telefonen via Bluetooth

Et hvidt blink: Bekræftelse af programmering

Rødt blink hvert 5. sekund: Lavt batteriniveau

Et grønt blink: Tidssynkronisering med telefonen

Gendan fabriksindstillinger

Fungerer pudevibratoren ikke korrekt, kan du prøve en af følgende muligheder.

Genstart

- Tryk enden af en papirclips eller lignende ind i indgangen til nulstilling (7) et kort øjeblik. Pudevibratoren genstarter.

Gendan fabriksindstillinger

- Sluk for pudevibratoren.
- Hold snooze-knappen (4) inde, imens du tænder for pudevibratoren igen.
- Hold Snooze-knappen inde i ca. 10 sekunder, indtil statusindikatoren blinker rødt 3 gange.

BEMÆRK

Når du gendanner fabriksindstillinger slettes alle forbindelser og indstillinger.

Fejlsøgning

Fungerer din pudevibrator ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere disse fejlmuligheder:

Jeg har tændt for pudevibratoren, men den har ikke forbindelse til min smartphone:

- Tjek, om batteriet er løbet tør for strøm i appen HT-Connect. Oplad batteriet.
- Tjek, at Bluetooth er aktiveret på din smartphone.

Pudevibratoren vibrerer ikke, når telefonen ringer:

- Tjek, at mobiltelefonen og pudevibratoren har forbindelse via Bluetooth.
- Tjek, at telefonopkaldsvibration er aktiveret i appen HT-Connect.

Pudevibratoren vibrerer ikke, når jeg modtager en sms eller en notifikation:

- Tjek, at din smartphone og pudevibrator har forbindelse via Bluetooth.
- Tjek, at app-notifikationsvibration er aktiveret i appen HT-Connect.
- Tillad notifikationer fra den pågældende app under "Indstillinger" på din smartphone.

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

Rengøring

Rengør pudevibratoren med en blød og fugtig klud. Brug aldrig stærke rengøringsmidler, sprit, fortyndere eller andre organiske opløsningsmidler. Bærestroppen kan tages af og rengøres separat.

Test og godkendelser

Dette produkt lever op til kravene i følgende EU-direktiver:

- 2011 / 65 / EF RoHS-direktivet
- 2012 / 19 / EF WEEE-direktivet
- 2014 / 53 / EF RED-direktivet

Overholdelsen af direktiverne anført ovenfor bekræftes af CE-mærket på produktet. Erklæringer vedr. opfyldelse af CE-krav kan findes på www.humantechnik.com



Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydset skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad garantien dækker

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlsens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil det blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad garantien ikke dækker

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse enheder er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter, som ikke er tilsluttet, brugt eller installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Producenten forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte enheder.

Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven.

Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Phonic Ear for yderligere information og rådgivning.

Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel

Genopladeligt Litium-ion-batteri indeni. Fare for brand, eksplosion og alvorlige forbrændinger, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Må ikke skilles ad, opvarmes til over 100 °C, forbrændes eller udsættes for vand eller direkte sollys.

For at forhindre kortslutning skal du sørge for, at metalgenstande ikke kommer i berøring med batteriet.

Lad være med at adskille, ændre eller udsætte dette produkt for tryk, så der kan opstå skader på elektroniske kredsløb, hvilket kan medføre en svækkelse af produktets sikkerhedsforanstaltninger.

Vigtig bemærkning

Genopladelige Litium-ion-batterier må ikke åbnes eller forbrændes. Udsættelse for stoffer indeholdt i produktet eller opstået i forbindelse med afbrænding heraf vil kunne medføre personskade.

Batteriet er godkendt til lufttransport.

Forhandler

 **Phonic Ear**[®]

Phonic Ear

Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 4445 2530
E-mail: mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk

Producent

Humantechnik GmbH

Im Wörth 25
D-79576 Weil am Rhein
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-0
E-mail: info@humantechnik.com
www.humantechnik.com



HUMANTECHNIK