

A photograph of three teenagers sitting on a graffiti-covered wall. On the left, a young woman with blonde hair in a ponytail, wearing a denim jacket and jeans, is sitting in a blue Quickie wheelchair. In the center, a young man in a black t-shirt and jeans is sitting on the wall. On the right, a young woman with long dark hair, wearing a pink t-shirt and jeans, is sitting on the wall. They are all smiling and looking towards the right. The background is a clear blue sky.

LIFET & LIFE RT

MATCHER EN TEENAGERS

AKTIVE LIV

TO KØRESTOLE – ÉN FAMILIE

Lev livet fuldt ud! Ses du med vennerne i shoppingcenteret? Hænger I ud i parken? Uanset hvilke planer du har for dagen, er LIFE RT og LIFE T to kørestole, der helt perfekt matcher de krævende behov hos en aktiv teenager.

Fastrammekørestolen LIFE RT er stabil og pålidelig og giver den støtte du har brug for, når du deltager i alle mulige fede aktiviteter. Har du brug for en sammenklappelig krydsrammekørestol? LIFE T er ikke kun nem at transportere, men den er også en perfekt allrounder i din dagligdag. Begge stole er designet til en teenagers kropsstørrelse og behov. Uanset om du ønsker en stol med fast forramme (RT - vælg mellem lige, abduction eller indsnævring af forrammen) eller du foretrækker en swing-away version med aftagelige benstøtter (T), er du sikker på at finde en LIFE, der passer til dig.

COOL, STILFULD, MODERNE





LIFE T

DEN FOLDBARE

Krydsrammekørestol
fast- & swing-away forramme



LIFE RT

DEN SPORTY

Fastrammekørestol
fast- & swing-away forramme





→ **Lås din fodplade med én hånd**

Denne fodplade forbliver altid i sin position, selv når du kører i ujævnt terræn.

LIFE T & LIFE RT – ET UDTRYK FOR EN TEENAGERS PERSONLIGHED

Tilpas din kørestol til din personlige smag og behov. Definer din stil med et valg blandt mere end 22 rammefarver, tre forskellige stilpakker til forgaffel og drivhjulsophæng, og det fulde udvalg af smarte egerbeskyttere. Vælg mellem en lang række sidestykker, armlæn, benstøtter og fodplader. Du kan endda yderligere tilpasse din kørestol med sporty cambring, stilfulde hjul og drivringe eller fantastiske carbon-dele.

→ **Bredt cambringsinterval for LIFE T og LIFE RT**

Cambringen forbedrer kørestolens stabilitet sideværts og beskytter fingrene, når man passerer snævre døråbninger. Cambringen giver dig samtidig et mere sporty look. Begge kørestole har mulighed for op til 60 cambring i trin på 1°.





// INDIVIDUEL TILPASNING

Definer din stil med et valg mellem tre forskellige anodiserede stilpakker til gaffel- og akselpladen.



// ANODISEREDE 24" DRIVHJUL

Fremhæv dine farver yderligere ved at matche drivringen og navet på dit 24" drivhjul med 3 anodiserede farvevalg.

LEENJAGER'S LIFE



→ LIFE RT – Den Sporty



→ LIFE T – Den Foldbare

Valgmuligheder og ekstraudstyr til LIFE T og LIFE RT - Konfigurer din kørestol til dine specifikke behov.

→ Til LIFE T & LIFE RT



// ABDUKTIONS RAMME

Denne rammevariant giver 25 mm abduktion i hver side. Abduktionen starter allerede under sædepolsteret.



// CARBON PLATFORM-FODPLADE

Let og stilfuld fodplade. Dybde- og vinkeljusterbar.



// DEN OVERBEVISENDE SAFARI-BREMSE

Med sin intuitive betjening vil den sidestykke-integrerede Safari-bremse, hjælpe dig med at bremse hurtigt og sikkert.



// SÆDEHØJDE JUSTERBAR I 7 POSITIONER

Med cambrng fra 0° to 6° og 4 positioner for tyngdepunkt (fra den meget aktive 83 mm til den mere stabile 23 mm).

→ Til LIFE RT



// VINKELINDSTILLELIG RYG

Denne vinkelindstillelige ryg giver justeringsmuligheder fra 78° to 98° i trin på 4°.



// ERGONOMI I FOKUS

Skubbebjølen kan let justeres i vinkel og højde for en forbedret ergonomisk position.



// DYBDEJUSTERBAR SÆDEPOLSTER

Dybdejusterbart sædepolster - kombineret med en lang ramme - giver voksemulighed.

→ Til LIFE T



// VINKELINDSTILLELIG RYG

Let og nem at justere. Giver vinkeljusterbarhed fra 78° to 102° i trin på 4°.

TEKNISKE DATA

	Life T	Life RT
Maks. brugervægt	/03 ie(	/03 ie(
Rammeversion og vinkel på forramme	Fast forramme: 75° (lige & abduktion) // 85° (lige & indsnævring) Sving Away forramme: 90°/80°/70°	Fast forramme: 75° (lige & abduktion) // 85° (lige & indsnævring) Sving Away forramme: 90°/80°/70°
Sædebredde	06. + 3. . k k	06. + 26. k k
Sædedybde	10. + 24. k k	10. + 24. k k
Sædehøjde fortil	2. . + 31. k k	14. + 3. . k k
Sædehøjde bagtil	2. . + 3. . k k	14. + 23. k k
Ryghøjde	03. + 253 k k	03. + 23. k k
Ryg vinkel	56E + / . 0E	56E + 76E
Cambring	.E- /E-0E-1E-2E-3E-4E	.E- /E-0E-1E-2E-3E-4E
Total bredde // længde // højde	50. k k -- / .53 k k -- 75. k k	50. k k -- / .53 k k -- 73. k k
Maks. vendebredde	64. k k	5. . k k
Maks. sikker hældning	7° (ved brug af parkeringsbremsen)	7° (ved brug af parkeringsbremsen)
Svinghjul // Drivhjul	2- -3- -4- -5- -- 00- -02-	2- -3- -4- -5- -- 00- -02-
Kørestolens vægt	øpa / . *3 ie	øpa / . ie
Afmonteret vægt	fra 5 ie	fra 6 ie
Vægt på tungeste del	Drivhjul /*/ ie	Drivhjul /*/ ie
Aftagelige dele	Drivhjul* benstøtter \$ sidestøtter & kun til transport'	Drivhjul, benstøtter & sidestøtter (kun til transport)
Farver	00 farver	22 farver
Crashtestet	Ja (godkendt til transport i et køretøj i henhold til ISO 7176-19)	
Transport uden bruger	Fastgør kørestolen sikkert i køretøjet (f.eks. bil eller fly)	
Tilsigtet brug og miljø	Til personer med begrænset mobilitet (børn og voksne); selvkørende eller skubbet af en hjælper, til indendørs og udendørs brug.	

*Hvis der vælges protonhjul eller abduktionsramme er den maksimale vægt 100 kg.

VIGTIG INFORMATION

På grund af en nylig opdatering afspejler de viste farver muligvis ikke den aktuelle tilgængelighed. For det mest opdaterede udvalg, se venligst den seneste orderform eller kontakt din lokale Sunrise Medical konsulent.

Sunrise Medical ApS

Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Tlf.: +45 70 22 43 49
E-Mail: info@sunrisemedical.dk

For yderligere information om specifikationer, valgmuligheder og tilbehør, kontakt venligst Sunrise Medical. Alle informationer kan ændres uden forudgående varsel.



Hvis du er synshandicappet kan du se dette dokument som PDF på www.SunriseMedical.dk eller alternativt på anmodning i stort tekstformat.

