

Halvsejl, net

Teknisk Data


Max. belastning:
Materiale:

275 kg.
Polyester

Vaskeanvisning:



Størrelser	Sæde	Højde
XS	38 cm	30 cm
S	48 cm	32 cm
M	58 cm	34 cm
L	52 cm	36 cm
XL	65 cm	38 cm
XXL	75 cm	38 cm

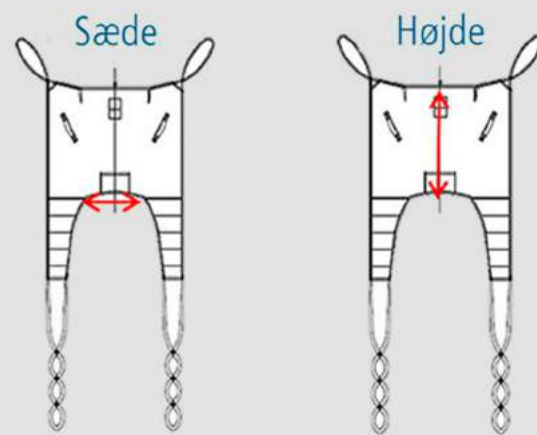

Løfting af personer med kontrol over hoved,
men nedsat kontrol over overkrop.

Rehab-Care.dk
Avnvej 10
7400 Herning
Tel: 69 15 30 00
Mail: mg@rehab-care.dk

rehab-care®
- gør en forskel

Anvendelse

Sejlet anvendes til at løfte eller forflytte en person med funktionsnedsættelse på sygehuse, plejeboliger, genoptræningscentre, svømmehaler og i det private.

Sejlet er udviklet til både mobile personløftere, lofthejssystemer e.l. og den er ideelt til at løfte en person til og fra siddende stilling.

Sejlet er lavet til løft af en person, med nedsat funktion i overkrop, hoftelid og lårben, men med kontrol over hoved

Betingelser for brug af sejl

- Sejlet anvendes af uddannet personale eller personer, der har modtaget instruktion i det aktuelle sejls brug.
- Der anvendes den korrekte størrelse sejl.
- Max løftekapacitet på 275 kg aldrig overskrides.
- Sejlet anvendes ved løft af en person i såvel siddende som halvliggende stilling.
- Hjælperen er opmærksom på brugerens velbefindende ved løft i sejlet.
- Sejlets mærkelast må aldrig overskrides.
- Før ibrugtagning af et sejl skal det kontrolleres (se tjekliste)
- Der må aldrig anvendes et sejl, der er for stort til brugeren.
- Reparationer må kun udføres af fabrikanten.



Rehab-care fraskriver sig ansvar for fejl eller ulykker, der opstår, fordi løfte-sejlet ikke anvendes korrekt eller på grund af manglende agtpågivenhed fra hjælper eller bruger.



Tjek inden brug

Tjek sejlet for manglende eller ulæselige mærkater. Mangler mærkaten, er det ikke muligt at definere sejlets type, sejlets funktion og/eller vægtbegrænsning.

- Tjek for ødelagte eller slidte syninger
- Tjek for knuder på stropperne
- Tjek for flænger eller flosser
- Tjek for huller, flænger eller snit
- Tjek for fremmedlegemer i stoffet eller på stropperne (fx metalsplinter e.l.)

Har sejlet stadig den originale størrelse og længde uden brug af knuder, nåle, tape eller andre metoder, der kan ændre formen og gøre sejlet kortere eller længere?

Hvis sejlet har mangler, skader e.l., skal det kasseres uanset vægten af brugeren, som skal løftes.

Sikkerhedseftersyn

I henhold til international standard EN/ISO 10535 "Hoist for overførsel af handicappede – Krav og prøvningsmetoder" skal der gøres et sikkerhedseftersyn mindst hvert halve år. Proceduren for sejleftersynene skal være grundig, systematisk og vedvarende. En praktisk og visuel gennemgang er anbefalet.

Visse former for skader er langt lettere at opdage gennem praktisk gennemgang end blot ved visuel gennemgang.



eksempelvis kan: stivhed i stoffet, defekte stropper og tyndslidt stof nævnes. Disse kan findes gennem fysisk kontakt med sejlet. Visuelle eftersyn afslører typisk ikke alle former for sejlskader.

Anvendelse af løftebøjle 2 og 4 punkt

Vær opmærksom når du placerer sejlstropperne på løftebøjlen. Kontroller at sejlstropperne er placeret korrekt i krogen på løftebøjlen.

Når der trykkes på 'pil op' knappen på håndbetjeningen tjek igen at sejlstropperne forbliver i den korrekte position i løftebøjles krog.

2 punkts bøjle

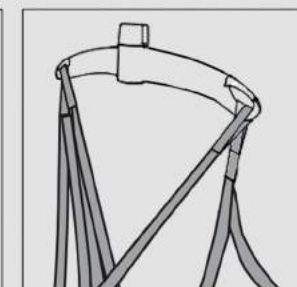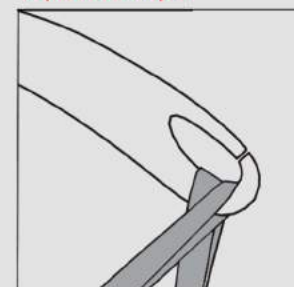

4 punkts bøjle

