

ZITZI STARFISH PRO






Zitzi Starfish Pro

En kombineret bade- og toiletstol. Stærk konstruktion med mange justeringsmuligheder for at give en suveræn støtte og positionering.

Trin 1. Bækken- & benpositionering

Kombinationen af et korrekt indstillet sidde-system, sædebrønd, effektivt hoftebælte og en god støtte til sacrum giver forudsætningerne for at mindske fremadskridning, hvilket fordrer aktivitet og postural kontrol. Siddesystemet er trinløst indstillelig i sædedybden og i abduktion/adduktion, hvilket muliggør optimal individuel siddestilling og samtidigt lader brugeren vokse med siddesystemet.

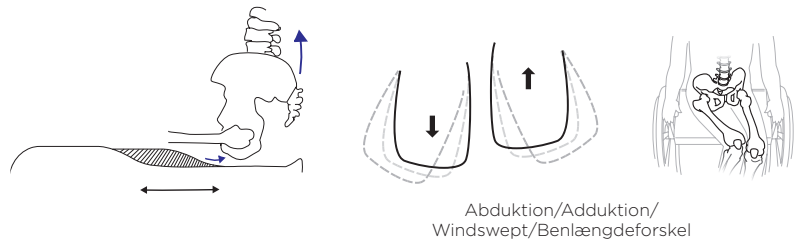

Abduktion/Adduktion/
Windswept/Benlængdeforskel

Trin 2. Hoftebæltets placering

Et korrekt monteret positioneringsbælte giver forudsætning for at positionere bækkenet og mindske risikoen for fremadskridning.


Vi tilbyder positioneringsbælter i forskellige materialer, modeller og størrelser




2-punktsbælte
Et fastgørelsespunkt på hver side.



4-punktsbælte
2 fastgørelsespunkter på hver side.

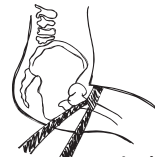


Antirotationsbælte
2 fastgørelsespunkter på hver side

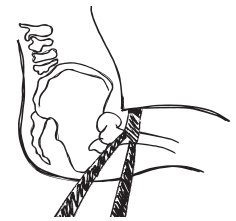

Trækretning

Trin 3. Trepunktspositionering

Justerbare kropsstøtter sammen med f.eks. hoftestøtte skaber gode forudsætninger for at optimere positionering af kroppen. God postural kontrol leder til bedre hovedkontrol og øger mulighederne for aktivitet og årvågenhed. Vi har mulighed for både at korrigere og bibeholde positionen

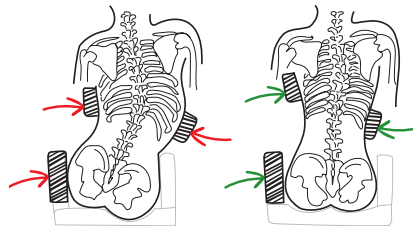

Positioneringsseler

Sammen med hoftebæltet er H-seler eller sternumseler med til at holde overkroppen mod ryglænet. Selerne modvirker rotation af overkroppen og er i mange tilfælde altafgørende for en god hovedkontrol.



Sternumstøtte

- Giver koncentreret støtte over sternum
- Modvirker fremadfald




H-sele

- Giver støtte til både skulderparti og overkrop samt modvirker rotation
- Passer også godt til borgere, som bruger sonde

Trin 4. Hoftevinkeljustering

Dynamisk støtte giver bevægelsesfrihed, variation samt en beroligende effekt ved extensionsspasticitet. Ryggen er stilbar i hoftevinklen, hvilket kan bryde spasticiteten og flexledet bevarer den gode siddestilling.

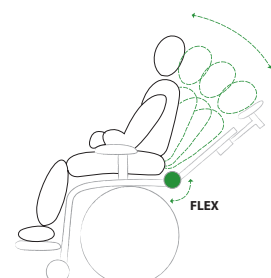

Manuelt stel

Hovedstøtte

Den tre-leddet hovedstøttestang giver optimale justeringsmuligheder. Hovedstøtten er også højdejusterbar.

Billedet viser:

Zitzi Starfish Pro størrelse 1-2 (delt sidde-
del) med justerbar ryg og kørehåndtag.

Positionering

Justerbare beslag til montering af sele.

Kropsstøtter

Individuelt justerbare kropsstøtter.

Højdejusterbar ryg

Til opnåelse af postural kontrol.

Hele konstruktionen er
rustfri.

Manuel justerbar højde
af sædedelen.

Fodstøtte

Mange forskellige fodstøtteva-
rianter tilbydes som tilbehør.




Multi-Justerbar ryg

Muliggør bedre postural kontrol, hvilket mindsker risikoen for fejlstillinger samt øger mulighederne for aktivitet. Vi har her mulighed for både at korrigere samt bibeholde positioneringen ud fra de rette siddestillingsmæssige principper.



Indstillelig tilt og hoftevinkel

Fast støtte er nødvendig for at positionere brugeren og skabe en funktionel siddestilling. Ryggen kan enkelt indstilles i en ønsket vinkel.

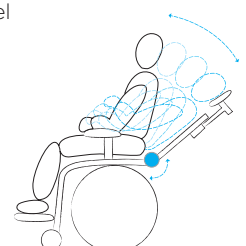






Tekniske data

Passer brugerhøjde	Størrelse 1 ca. 120-145 cm	Størrelse 2 140-175 cm	Størrelse 3 170-200 cm
Stel med hel sædedel	Sædedel hel str. 1	Sædedel hel str. 2	Sædedel hel str. 3
Sædedybde (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Sædebredde (med betræk) (B)	365-395 mm	435-465 mm	495-525 mm
Størrelse hygiejnehul (C)	80-110 mm	100-130 mm	125-155 mm
Stel med delt sædedel	Sædedel delt str. 1	Sædedel delt str. 2	Sædedel delt str. 3
Sædedybde (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Sædebredde (B)*	350-480 mm	380-510 mm	390-520 mm
Bredde bændel m betræk (D)	165 mm	185 mm	200 mm
Størrelse hygiejnehul (C)	50-180 mm	40-170 mm	30-160 mm
Frigang toilet, Man. stel	41-51 cm	41-51 cm	41-51 cm
Frigang toilet, Hydraulisk/EI	41-66 cm	41-66 cm	41-66 cm
Sædehøjde, Man. stel**	50-63 cm	50-63 cm	50-63 cm
Sædehøjde, Hydraulisk/EI**	50-78 cm	50-78 cm	50-78 cm
Tilt	-5° til +30°	-5° til +30°	-5° til +30°
Hofte-/rygvinkel	-10° til +35°	-10° til +35°	-10° til +30°
Stel, bredde (H)	540 mm	540 mm	590 mm
Stel, længde (I)	690 mm	690 mm	790 mm
Hjul	100 mm	100 mm	100 mm
Frigang	65 mm	65 mm	65 mm
Ca. vægt inkl. hovedstøtte, fodstøtte, armlæn	31 kg	33 kg	35 kg
Max brugervægt Man. stel:	150 kg	150 kg	150 kg
Max brugervægt Hydraulisk/EI:	150 kg	150 kg	150 kg

* Max sædebredde fås, når sædedelene er monteret i yderspor på sædepladen

** ekskl. betræk

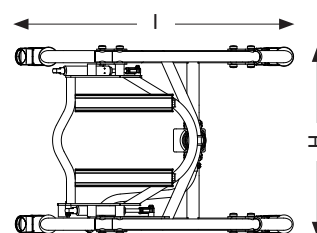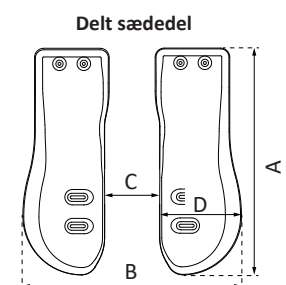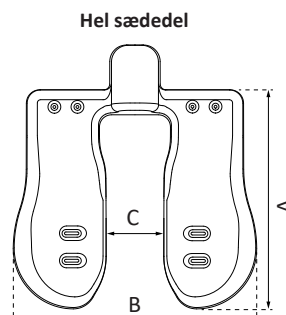

	RYG Højde (E)	Kropsstøtte (mm)		
		Bredde (F)	Dybde (G)	Højde (H)
Str. 1	460 mm	210-300	140	210
Str. 2	560 mm	240-340	170	230
Str. 3	660 mm	300-400	200	260

Kropsstøttesjustering +/- 85 mm

BORD	Mål			
Bord std.	A	B	C	D
Str. 1	480 x 450 x 240 x 250 mm			
Str. 2	540 x 515 x 260 x 290 mm			
Str. 3	570 x 570 x 280 x 340 mm			
Str. 4	660 x 600 x 320 x 385 mm			
Str. 5	660 x 650 x 320 x 435 mm			
Støttebord	A	B	C	D
Str. 1	380 x 450 x 230 x 260 mm			
Str. 2	430 x 510 x 260 x 300 mm			
Str. 3	490 x 580 x 300 x 340 mm			
Str. 4	540 x 640 x 330 x 380 mm			

Fodstøtte	mål B x D
Helt str. 1	345 x 225 mm
Helt str. 2	380 x 255 mm
Helt str. 3	380 x 310 mm
Delt str. 1	160 x 220 mm
Delt str. 2	180 x 255 mm
Delt str. 3	180 x 305 mm

Højdejusterbart stel

Hovedstøtte

Den tre-leddet hovedstøttestang giver optimale justeringsmuligheder. Hovedstøtten er også højdejusterbar.

Billedet viser:

Zitzi Starfish Pro størrelse 1-2 (delt sidedel) med justerbar ryg og kørehåndtag.

Positionering

Justerbare beslag til montering af sele.

Kropsstøtter

Individuelt justerbare kropsstøtter.

Højdejusterbar ryg

Til opnåelse af postural.

Hele konstruktionen er rustfri.

Justerbar højde på sædedelen ved hjælp af pumpe eller el.

Fodstøtte


Mange forskellige fodstøttevarianter tilbydes som tilbehør.

Polster/betræk

Zitzi Starfish Pro serien har et trykafastende polster/betræk. Denne form for polster er special fremstillet til hygiejnesituationer og er både væske- og smudsafvisende samtidig med at det føles behageligt mod kroppen.

Justerbare bendele

Man kan vælge sædedel, hvor man trinløst kan abducere eller adducere bendelene. Sædet kan justeres i dybden, for at opnå en så optimal understøttelsesflade i siddestillingen som mulig, og samtidig lade brugeren vokse med hjælpemidlet. Muligheden tilbydes nu også til kateterisering, eftersom der er bedre plads mellem bendelene.

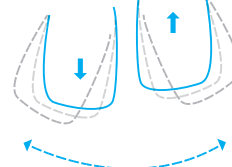


Tilbehør Starfish Pro



Hovedstøtte




Hovedstøtte lang

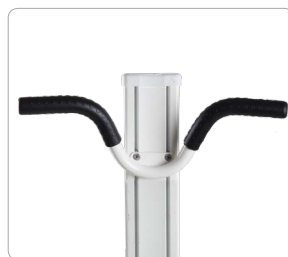

Kørebøjle



Justerbar ryg/Justerbare kropsstøtter

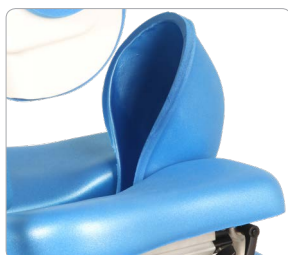

Urinskjold



Potte



Øvre monteringsbeslag



Bord



Fodstøtte



Delt fodstøtte kugleledsadapter



Lægstøtte og polstring



Hjul



Sternumstøtte



H-sele



Hoftebælte



Antirotationsbælte



Armbind




Ankelbespænding




Armstøtteplade str. 1



Armstøtteplade str. 2

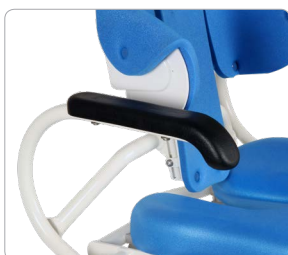

Vipbart armlæn

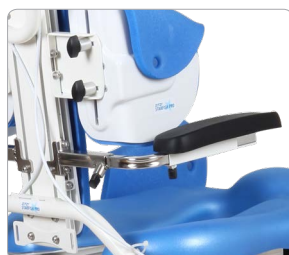

Armlæn rygprofil



Abduktions-/adduktionsstøtte

ZITZI™ STARFISH PRO

Individuelle tilpasningsmuligheder giver et godt udgangspunkt for at opnå en god siddestilling i en bad- og toiletstol, og Zitzi Starfish Pro tilbyder unikke muligheder for individuel tilpasning, uden at gå på kompromis med støtte og siddestilling.



Få balance i kroppen

med



Anatomic SITT A/S

Viengevej 4
8240 Risskov

Telefon 86 17 01 74

Fax 86 17 01 75

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

Web www.anatomicsitt.com

www.facebook.com/AnatomicSITT.dk

youtube.com/anatomicsitt