

Severo Elektrisk Pilleknuser V3,1



- Hurtig og effektiv knusning af medicin
- Undgår udsættelse for medicin støv
 - Lille og bærbart design
 - Let at rengøre
 - Næsten lydsvag drift
 - Genopladeligt batteri
-

Pris 2.500 DDK Eks moms og fragt

Vare Nr. JB 0830-2017

Severo Elektrisk Pilleknuser v3.1

Specifikationer:

Pille knusning: Knuser flere standard piller ad gangen

Kop volumen: 30 ml.

Formalingstid: 8 sekunder for standard piller

Lydstyrke: 52 dB (lav lydstyrke)

Batteri levetid: 2 timer

Pris pr knusning: Ca.43 øre (udregnet med kopper og rondeller)

Kontakter: Tænd/Sluk

Indikator: Batteri niveau

Garanti: 2 år på enheden (1 år på Batteri Inkludere ikke brugerfejl)



Alle priser er gældende i 2019

Tilbehør til Severo Elektrisk Pilleknuser V3,1

 Engangskopper i hård plast	Beskrivelse Severo Kopper 2.100 stk. Specifikationer: Bægeret har en øvre diameter på 4,7cm og er 2,9 cm højt, og kan indeholde 30 ml. Bunden har en takket kant, så bægeret kan stå fast i Severo pilleknuser.	Vare Nr: JB MED-020	Vejl.pris / Pr.stk 525,00 DDK Minimum Salg 2.100 stk
	Severo Låg 2.000 stk. Specifikationer: Engangslåg i hård plast	JB ME2-000	630,00 DDK Minimum Salg 2.000 stk
	Rondeller/Pilleknuser 2.100 stk Rondellerne er ekstra holdbare cellofanark, der placeres ovenpå Severo-koppen før pillerne knuses. Brugen af disse rondeller sørger for at holde pilleknuseren ren, så den er klar til brug med det samme. Hver – gang	JB MED-003	195,00 DDK Minimum Salg 2.100 stk
	Severo, ekstra metalstempel til tabletknusning Specifikationer: Fremstillet i rustfast stål	JB 3000001	375,00 DDK

Severo elektrisk Pilleknuser v3.1

Manual!

Et effektivt redskab i forbindelse med medicin håndtering

Severo elektriske pilleknuser er et enkelt og effektivt redskab til knusning af piller/tabletter. Pillerne knuses på 8 sekunder til et fint pulver.

Severo pilleknuser knuser medicinen direkte ned i det medicinbæger, der skal anvendes ved patienten, og tabletterne kan efter knusning også let dispenseres via en tynd ventrikelsonde. Ved arbejdsprocessen går der ikke noget medicin tabt, så den doserede medicin gives korrekt.

Knusning af piller/tabletter sker i et lukket system, så der ikke sker forurening til miljøet. Herved undgås risiko for inhalation af medicinstøv og hudkontakt med medicinen. De enkelte dele af pilleknuseren kommer ikke i berøring med den medicin, der bearbejdes, så pilleknuseren er efter knusning af piller/tabletter straks klar til bearbejdning af medicinen til næste patient uden forsinkende rengøring.

Brugen af Severo pilleknuser er enkel:

1. Anbring pillerne i et medicinbæger (**Ikke for mange ad gangen**)
2. Sæt medicinbægeret i pilleknuseren
3. Anbring plastikrondel oven på medicinbægeret (forhindrer støv til miljøet og undgår kontakt med pilleknuserens stempel)
4. Luk plastikrondellen med metalstemplet ned i medicinbægeret
5. Luk låget på pilleknuseren (pilleknuseren begynder automatisk at arbejde og er færdig på 8 sekunder)
6. **Løft først låget når maskinen er færdig med at køre programmet, metalstemplet skal være helt i bund** og tag medicinbægeret ud med de knuste piller (Pilleknuseren er nu klar til næste forarbejdning af piller)

Severo tabletknuser er en yderst effektiv måde at knuse tabletter på uden risiko for overbelastning af brugerens hånd og arm.

Manuel knusning af piller gentagne gange kan betyde stor belastning af specielt hænder og håndled.

Severo pilleknuser er udført i et lille og bærbart design og har et indbygget genopladeligt batteri, så den kan anvendes uafhængig af adgang til strøm.

Arbejdsprocessen er støjsvag (52dB)