



Sense Sortiment

Ro | Trivsel | Sansestimulation



Zibo Athene
...gør en forskel

Sortiment

Zibo Athene A/S – mere end blot et samarbejde	3
Sansestimulerende hjælpemidler	4

Tyngdehjælpemidler og taktil stimulation

Kædedyne®	5
Kædedyne® Sensitive	6
Kædetæppe	7
Kædetæppe Active	8
Kædevest	9
Tyngdekrave	10
Terapeutisk vægtbælte	11

Øvrige hjælpemidler til taktil stimulation/kropsafgrænsning

Stimulite® 3-Zone madras	12
Stimulite® sansehandske	13
Stimulite® kvadrater	14
Sansemadras m/indbygget massage	15

Vestibulær stimulation

Traumschwinger®	16
-----------------------	----

Musikintervention

Dreampad musikpude m/bone conductor	17
AudioCura M2 mobilafspiller	18

Øvrige sansestimulerende hjælpemidler

Akva Vandseng (med mulighed for indbygget massage og lyd)	19
Akva hovedpude m/vand	20
Curo Cell S. A. C. siddepude	21
Yogibo Bean Bags	22



Zibo Athene A/S

Mere end blot et samarbejde ...

Hos Zibo Athene står vi altid klar til at hjælpe dig. Herunder finder du kontaktinformation på de konsulenter, der er tilknyttet Sense. Har du spørgsmål, brug for hjælp eller produktrelateret undervisning så tag endelig kontakt.

Seminarer og skræddersyede projektforsøb

Vi tilbyder desuden afholdelse af seminarer eller skræddersyede projektforsøb. Alt sammen efter dine ønsker. Lad os tage en snak om det, så vi finder den rette løsning til dig. Ønsker du at afprøve et givent produkt, stiller vi det gerne til rådighed ifm. afprøvning.

Vi ser frem til et givende samarbejde ... og sætter en ære i at gøre en forskel for dig.

Kontaktinformation

Kundeservice

Louise og Nina er klar til at hjælpe på:

Tlf.: 76 900 407

E-mail: post@ziboathene.dk

Tina Skaarup
Ergoterapeut

**Sales- and Product
Manager**

40 78 10 94
tsb@ziboathene.dk

Heidi R. Lilholm
Fysioterapeut

**Key Account
Manager**
Syddanmark

91 89 03 44
hrl@ziboathene.dk

Ditte Kjeld Storm
Ergoterapeut

**Key Account
Manager**
Midt- og Nordjylland

40 78 04 16
dks@ziboathene.dk

Lene Reinhold
Ergoterapeut

**Key Account
Manager**
Hovedstaden

(+45) 91 89 54 99
lr@ziboathene.dk

Marian Fyrkilde
Ergoterapeut

**Key Account
Manager**
Sjælland

(+45) 30 73 48 06
mf@ziboathene.dk



Sense

Sansestimulerende hjælpemidler

Vores sansestimulerende hjælpemidler kan medvirke til at afhjælpe forskellige sanseforstyrrelser. Mennesket har i alt 7 sanser, hvoraf de tre basale sanser (berørings-, ligevægts- samt muskel- og ledsansen) hæmmende og fremmende effekt påvirker brugen af de øvrige sanser (syns-, høre-, smags- og lugtesans) og hermed vores evne til at samordne sanseindtryk.

Er der af forskellige årsager uorden i sansesystemet, kan det føre til aktivitetsproblemer i hverdagen af lettere eller svære grad. Når vores sanser er tilpas stimulerede, skabes øgede forudsætninger for mestring af fysiske, kognitive, psykiske og psykosociale aktiviteter, øget selvhjulpenhed og dermed trivsel i hverdagen.

Vores SENSE-produkter anvendes af mennesker med forskellige udfordringer – herunder:

- Psykiske lidelser
 - Depression
 - Angst
 - ADHD og relaterede problemer
 - Skizofreni
 - Spiseforstyrrelser
- Autisme-spektrum
- Sensoriske forstyrrelser
- Præmaturitet
- Udviklingsforstyrrelser
- Demens
- Andre neurologiske forstyrrelser – herunder spasticitet, ataksi, pareser mv.
- Smerteproblematikker
- Kroplig uro
- Kognitive- samt indlæringsvanskeligheder
- Generelle søvn- og indsovningsproblematikker

Vores ergoterapeuter giver gerne faglig sparring og rådgivning i forhold til valg af sansestimulerende hjælpemiddel – målrettet den enkelte borger eller brugergruppe.

Tekniske data

Baby

1,5 Kg | 100x70 cm
HMI nr.: 62432
Varenr.: KD 600554

Junior

3,4 Kg | 100x140 cm
HMI nr.: 55706
Varenr.: KD 600540

5 Kg | 100x140 cm
HMI nr.: 69444
Varenr.: KD 600541

Voksen

4 Kg | 200x140 cm
HMI nr.: 55701
Varenr.: KD 600510

6 Kg | 200x140 cm
HMI nr.: 79275
Varenr.: KD 600537

8 Kg | 200x140 cm
HMI nr.: 55703
Varenr.: KD 600530

10 Kg | 200x140 cm
HMI nr.: 55704
Varenr.: KD 600535

12 Kg | 200x140 cm
HMI nr.: 73036
Varenr.: KD 600536

14 Kg | 200x140 cm
HMI nr.: 100896
Varenr.: KD600561

Kædedyne® er CE-mærket. Patenteret. Kædedyne® produceres i Sverige af Somna og Zibo Athene A/S er eneforhandler i Danmark.



Kædedyne®

Beroligende og kropsafgrænsende sansestimuli

Kædedynen er en sansestimulerende tyngdedyne, syet i lange kanaler, hvori der ligger kæder. Kæderne stimulerer til ro, tryghed og kropsafgrænsning. Dermed opnås hurtigere indsovning og færre opvågninger. Kæderne er fastgjorte i kanalernes ender, hvilket gør dynen lydløs ved brug. Kædedynen er åndbar og håndtérbar og findes i adskillige varianter. Kæderne er coated stål og tekstilmaterialet er Trevira; brand- og flammehæmmende. Kædedynens smalle kanaler gør, at dynen falder tæt omkring kroppen.

Vendbar for forskellige grader af stimuli

Da den ene side er mere polstret end den anden, giver det brugeren mulighed for to forskellige grader af taktile og proprioceptive stimuli i én og samme dyne.

Kædedyne® Sensitive – ekstra polstret

Ønsker man en blødere kædedyne, med større forskel på de to sider end i denne variant, anbefales kædedyne® Sensitive. Den har dobbelt så meget polstring på kædedynens polstrede side, sammenlignet med den almindelige Kædedyne®.

Anvendelsesmuligheder

- Søvnproblemer – f.eks. forårsaget af stress
- Psykiske lidelser – f.eks. depression, angst, skizofreni, spiseforstyrrelser

- Neurologiske lidelser – f.eks. demenssygdomme
- Udviklingsforstyrrelser – f.eks. autisme, Aspergers syndrom
- Opmærksomhedsforstyrrelser – f.eks. ADHD, ADD

Vaskeanvisning

Kædedynen kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60 grader på skåneprogram, ilagt den medfølgende vaskepose. De tungeste varianter er delbare. Der kan købes hygiejnebetræk, som kan vaskes ved 90 grader.

Leveres med både vaskepose og transporttaske.

Ved anvendelse til suicidale og retsanbragte patienter, kan ekstra sikret variant af kædedyne anvendes. Kontakt vores Sense-afdeling for nærmere information herom.

Tilbehør

**Hygiejnebetræk junior
m/ lynlås på 3 sider**

HMI nr.: 81534
Varenr.: KD 600420

Hygiejnebetræk voksen

HMI nr.: 81535
Varenr.: KD 600410

Tekniske data

Junior

3,4 kg | 100x140 cm

HMI nr.: 105487

Varenr.: KDS 600542

5 kg | 100x140 cm

HMI nr.: 105488

Varenr.: KDS 600544

Voksen

5 kg | 140x205 cm

HMI nr.: 101107

Varenr.: KDS 600562

7 kg | 140x205 cm

HMI nr.: 101109

Varenr.: KDS 600563

9 kg | 140x205 cm

HMI nr.: 101357

Varenr.: KDS 600565

11 kg | 140x205 cm

HMI nr.: 101108

Varenr.: KDS 60056

Kædedyne® Sensitive er CE-mærket. Patenteret.
Kædedyne® Sensitive produceres i Sverige af Somna
og Zibo Athene A/S er eneforhandler i Danmark.



Kædedyne® Sensitive

Blød og lun – som almindelig dyne

Kædedynen er en sansestimulerende tyngdedyne, syet i lange kanaler, hvori der ligger kæder. Kæderne stimulerer brugeren til ro, tryghed og kropsafrænsning. Kæderne er fastgjorte i kanalernes ender, og dynen er dermed lydløs ved brug.

Kædedynen er åndbar og håndtérbar.

Vendbar for forskellige grader af stimuli

Da den ene side er mere polstret end den anden, giver det brugeren mulighed for to forskellige grader af taktile og proprioceptive stimuli i én og samme dyne.

Kædedyne® Sensitive – ekstra polstret

Kædedyne Sensitive er en blødere kædedyne end den almindelige Kædedyne®, da den har dobbelt så meget polstring på den polstrede side. Dette giver en varmere og blødere dyne, der via dynens tyngde, stadig giver dyb proprioceptiv stimulation. Kædedyne® Sensitive vælges ofte af brugere, der ønsker en vægtdyne, der både giver mulighed for graduering af stimuli, er blød som en helt almindelig dyne og dejlig varm.

Anvendelsesmuligheder

- Søvnproblemer – f.eks. forårsaget af stress
- Psykiske lidelser – f.eks. depression, angst, skizofreni, spiseforstyrrelser

- Neurologiske lidelser – f.eks. demenssygdomme
- Udviklingsforstyrrelser – f.eks. autisme, Aspergers syndrom
- Opmærksomhedsforstyrrelser – f.eks. ADHD, ADD
- Smerteproblematikker

Vaskeanvisning

Kædedynen kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60 grader på skåneprogram, ilagt den medfølgende vaskepose. De tungeste varianter er delbare. Der kan købes hygiejnebetæk, som kan vaskes ved 90 grader.

Leveres med både vaskepose og transporttaske.

Ved anvendelse til suicidale og retsanbragte patienter, kan ekstra sikret variant af kædedyne anvendes. Kontakt vores Sense-afdeling for nærmere information herom.

Tilbehør

Hygiejnebetæk junior m/ lynlås på 3 sider

HMI nr.: 81534

Varenr.: KD 600420

Hygiejnebetæk voksen

HMI nr.: 81535

Varenr.: KD 600410



Tekniske data

4 Kg | 70x125 cm
HMI nr.: 71516
Varenr.: KV 600660

7 Kg | 70x205 cm
HMI nr.: 85072
Varenr.: KV 600661

5 Kg | 70x205 cm
HMI nr.: 86501
Varenr.: KV 600663

15 Kg | 140x205 cm
HMI nr.: 85073
Varenr.: KV 600662

Kædetæppe™ er CE-mærket. Patenteret.
Kædetæppe™ produceres i Sverige af Somna
og Zibo Athene A/S er eneforhandler i Danmark.



Kædetæppe™

Ro og tryghed i dagtimerne

Kædetæppet kan anvendes i både dag- og nattetimer, alt efter behov. Anbefales ved kraftig uro, angst, sensoriske problematikker og ved behovet for kropsafgrænsning.

Uanede anvendelsesmuligheder

Det praktiske stof gør at det kan anvendes uden betræk. Kædetæppet er således ideelt i både sofaen, på stolen, under transport, i klasseværelset eller steder, hvor der kan være behov for at øge fornemmelsen af ro, tryghed og bedre koncentrationsevne.

Taktil og proprioceptiv stimulation

Kædetæppets sider er forskellige – den ene side er mere polstret end den anden. Dette giver brugeren mulighed for at graduere graden af den taktile og proprioceptive påvirkning. Kæderne, som ligger indsyet i kanaler, giver både taktil og proprioceptiv stimulation. Kanalerne holder på kæderne, så tæppet ligger roligt og trygt omkring brugeren. Kædetæppet er desuden lydløst, så brugeren ikke oplever støj ved brug.

Topkvalitet i flere størrelser

Tæppet er syet i kraftigt, praktisk og smudsafvisende tekstilmateriale, som er både åndbart og brandhæmmende.

Tæppet findes i følgende størrelser:

Størrelse	Vægt
70 x 125 cm	4 kg
70 x 205 cm	5 kg
70 x 205 cm	7 kg
140 x 205 cm	15 kg

Markedets mest proprioceptive tæppe

Det tungeste kædetæppe på 15 kg er markedets mest proprioceptive tæppe og kan ligeledes anvendes som sansestimulerende/beroligende dyne, idet det så blot lægges i et dynebetræk. Det er desuden delbart med lynlås, så vask kan foregå i almindelig vaskemaskine.

Vaskeanvisning

Kædetæppet kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60 grader på skåneprogram.

Leveres med både vaskepose og transporttaske.



Tilbehør: omkredsforlænger

Tekniske data

Junior (store børn, mindre voksne)

4 Kg | 56x82 cm

HMI nr.: 102649

Varenr.: KV600664

Senior

5,5 Kg | 81x104 cm

HMI nr.: 102650

Varenr.: KV600665



Kædetæppe™ Active

Bedre kropsfornemmelse, ro og koncentration

Kædetæppe™ Active stimulerer berøringssansen og muskelledsansen, mens det ligger på lår og knæ. Det er udviklet med henblik på brug i siddende stilling, f.eks. i skolen, på job eller under transport, i enhver siddende situation, hvor opmærksomhed, fokus og ro er ønskeligt.

Behageligt, dybt tryk

Kæderne i de langsgående kanaler samt granulatyldet på siderne gør, at kædetæppet lægger sig tæt omkring kroppen, og giver et behageligt, dybt tryk.

Design der tilgodeser flere målgrupper

Kædetæppe™ Active er designet, så det når omkring livet på bruger og lukkes bagpå med velcrolukning. Dette design gør, at tæppet bliver liggende ved f.eks. lettere aktivitet og faldrisikoen minimeres.

Praktisk lomme

En centralt placeret lomme på forsiden giver mulighed for ro til hænderne, idet tyngden henover lommen bidrager med taktile og proprioceptive stimuli. Samtidig kan lommen anvendes til opbevaring af f.eks. små sansestimulerende og beskæftigende redskaber.

Anvendelsesmuligheder

- Koncentrationsvanskeligheder.
- Ufrivillige bevægelser.
- Demenstilstande.
- Generel motorisk og mental uro.

Vaskeanvisning

Tæppet kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60 grader på skåneprogram, ilagt den medfølgende vaskepose.

Leveres med både vaskepose og transporttaske.

Kædetæppe™ Active er CE-mærket. Patenteret. Det produceres i Sverige af Somna og Zibo Athene A/S er eneforhandler i Danmark.



Tekniske data

Barn/junior

110/120 | 2,40 kg*

HMI nr.: 77303

Varenr.: KV600705

128/140 | 3,00 kg*

HMI nr.: 71511

Varenr.: KV600640

146/152 | 3,25 kg*

HMI nr.: 71512

Varenr.: KV600650

*Den angivne vægt er totalvægt, inkl. aftagelig krave.
Voksenkrave: 2,2 kg
Barn/juniorkrave: 1,2 kg

Voksen

Small | 4,80 kg*

HMI nr.: 71513

Varenr.: KV600610

Medium | 5,40 kg*

HMI nr.: 71514

Varenr.: KV600620

Large | 5,65 kg*

HMI nr.: 71515

Varenr.: KV600630

X-Large | 6,60 kg*

HMI nr.: 87466

Varenr.: KV600705



Kædevest™

Som en omfavnelser – tyngde og stimuli for ro og koncentration

Kædevest™ er et sansestimulerende og beroligende hjælpemiddel, som er syet i kraftigt materiale med kanaler, hvori der er kæder.

Brugervenlig og komfortabel

Vesten lukkes nemt med bælte og to bånd, så den sidder tæt til kroppen. Vestens tyngde og omslutning af kroppen giver velvære, bedre kropsfølelse og ro. Vesten fylder ikke mere, end at den kan bæres under tøjet.

Ro og koncentration

Vesten er god at bruge i dagtimerne, hvor der er brug for at kunne samle sig, finde ro og koncentration. Det kan f.eks. være i skolen, i hjemmet, under transport eller i situationer, som kan være overstimulerende.

Tyngdekrave inklusiv

Kædevest™ leveres med Tyngdekrave™, som kan anvendes sammen med vesten eller separat.

Den findes til både børn, unge og voksne i følgende størrelser:

Kategori

Størrelse

Voksen	Small Medium Large X-Large
Barn/junior	110/120 128/140 146/152

Vesten anvendes blandt andet ved

- Psykiske lidelser som f.eks. angst
- Motorisk eller psykisk uro
- Koncentrationsproblemer
- Dårlig kropsfølelse
- Opmærksomhedsforstyrrelser som f.eks. ADHD og ADD
- Demenssygdomme
- Mistrivsel

Vaskeanvisning

Kædevesten kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60 grader på skåneprogram. Vesten leveres med vaskepose som altid bør anvendes.

Leveres med både vaskepose og transporttaske.

Kædevest™ er CE-mærket. Patenteret. Det produceres i Sverige af Somna og Zibo Athene A/S er eneforhandler i Danmark.



Tekniske data

Voksen

2 Kg

Varenr.: TK001
HMI: 86787

Junior

1,00 kg

Varenr.: TK003
HMI: 88732

2,5 Kg

Varenr.: TK002
HMI: 86788



Tyngdekrave™

Reducering af uro

Tyngdekrave™ reducerer uro og anspændthed. Den giver samtidig et jævnt og stabilt tryk, som bidrager til en øget kropsfornemmelse samt højere grad af ro og tryghed.

Forbedret koncentration

Ved brug ses forbedret evne til koncentration og fokus, mere kropslig ro og en følelse af tryghed.

Fri bevægelighed

Udformningen gør, at kraven ligger godt ned bag skuldrene, uden at begrænse brugerens bevægelighed. Den kan anvendes både stillesiddende og ved aktivitet.

Tyngdekrave™ findes i 3 vægtkategorier:

Kategori	Størrelse
Voksen	2,00 kg 2,50 kg
Junior	1,00 kg

FylDET er giftfrit, flammesikret granulat.

Vaskeanvisning

Kraven er vaskbar i vaskemaskine på skåneprogram – max 60 grader.

Leveres med både vaskepose og transporttaske.

Tyngdekrave™ er CE-mærket. Patenteret. Den produceres i Sverige af Somna og Zibo Athene A/S er eneforhandler i Danmark.

Tilbehør

Betræk voksen

Grå

2,0 kg | Varenr.: TK001B

2,5 kg | Varenr.: TK002B

Betræk junior

Grå/grøn/rosa

1,0 kg | Varenr.: TK003B

Tekniske data

Miracle Belt

0,45 Kg | Small
Varenr.: MB101

0,90 kg | Medium
Varenr.: MB202

1,36 kg | Large
Varenr.: MB303

Sensory Belt

1,8 Kg | Small
Varenr.: SB404

2,2 Kg | Medium
Varenr.: SB505

2,7 Kg | Large
Varenr.: SB606

Thera Belt

0,40 Kg | Baby
Varenr.: TB101

0,90 kg | Barn
Varenr.: TB202

1,30 kg | Small
Varenr.: TB303

1,80 Kg | Medium
Varenr.: TB404

2,20 kg | Large
Varenr.: TB505

2,70 kg | X-large
Varenr.: TB606

24 kg | Terapisæt - 6 stk.
(til terapier/hospitaler)



Terapeutisk vægtbælte

Tyngdehjælpemiddel

Et terapeutisk vægtbælte er et tyngdehjælpemiddel, som bidrager til øget ro, balance og kropsfornemmelse. De kan anvendes både hjemme, i skole, på job og i forbindelse med træning. Bæltets tyngde giver brugeren proprioceptiv feedback og dermed en øget sensorisk bevidsthed. Følelsen af jordforbindelse giver de bedste betingelser for fokusering, koncentration og læring. Ved regelmæssig brug ses reducere af hyperaktivitet, uro og forbedret koordination.

Miracle Belt

Miracle Belt er et pædiatrisk hjælpemiddel og special-designet til helt små børn, som vejer mindre end 34 kg. Se yderligere specifikationer på bagsiden.

Sensory Belt

Sensory Belt er et lidt større vægtbælte, udviklet til børn, unge og voksne, som vejer mere end 34 kg. Se yderligere specifikationer på bagsiden.

Thera Belt

Thera Belt er et vægtbælte med aftagelige tyngdepos. Dette er specielt velegnet til terapeutisk træning, da vægten kan gradueres efter behov. Se yderligere specifikationer på bagsiden.

Vores terapibælter er amerikanske og anvendes i alle amerikanske stater med stor succes.

Vi anbefaler brug af bælterne ved. f.eks.

- Motorisk uro
- Nedsat koordination og balance
- Sanseforstyrrelser
- Hjerneskade
- Udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser
- Demenstilstande

Regulérbare og langtidssikrede

Alle bælter er regulérbare og kan dermed vokse med barnet. Der kan desuden tilkøbes stropforlænger ved behov. Thera Belt-varianten er forsynet med lynlås, så bæltets indlagte vægtposer kan tages ud/ind efter behov.

Stor fleksibilitet med sæt

Til terapi- eller træningssteder kan vi anbefale køb af hele sættet, for både besparelse og fleksibilitet.

Rengøring

Materialet er neopren og kan ikke maskinvaskes, men aftørres med en fugtig klud.



Tekniske data

6 Kg | 85x200x7 cm
HMI nr.: 84708
Varenr.: GSR 00067



Stimulite® 3-Zone madras

Optimal trykaflastnings- og sansestimulerende madras

Stimulite® 3-Zone madras anvendes forebyggende og behandlende ved sårkategori 1-4 samt i forbindelse med sansestimulation.

Unik bikubestruktur sikrer varme- og fugtregulering

Madrassen er lavet i termoplastisk polyuretan, der består af perforerede celler i bikubestruktur som gør, at luften kan cirkulere. Dermed undgås, at huden bliver varm og fugtig. Madrassen former sig efter kroppen, så den giver optimal stabilitet, trykfordeling og -aflastning.

3 zoner

Stimulite® 3-Zone madras er opbygget, så hovedenden er 9% blødere og fodenden er 32% blødere end den bærende, midterste del. Dette gør, at den er meget skånsom. Madrassen kræver ikke særlig instruktion, og vægten på ca. 6 kg gør den samtidig let at transportere og håndtere.

Optimale egenskaber i forhold til sansestimulering

Madrassens bikubeceller giver brugeren taktile og proprioceptive sanseindtryk. I kombination med en kædedyne, vil brugeren opnå en unik "sandwich-effekt".

Den massive stimulation omkring hele kroppen, giver brugeren optimal kropsafgrænsning. Madrassen bruges derfor ofte i forbindelse med behov for øget kropsfornemmelse, ro, grounding og i sanseintegrationsbehandling.

Vaskeanvisning

Madrassen tåler maskinvask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max 85 grader i 10 minutter. Tørretumbling ved kold luft. Inkontinensbetræk medfølger. Betrækket tåler vask ved max 95 grader og kold tørretumbling.

Brugervægt

Max 225 kg



Tekniske data

One Size

HMI nr.: 73057

Varenr.: BATHMITT



Stimulite® Sansehandske

Sansestimulerende handske

Sansehandsken er god til taktil stimulering. Den er meget brugervenlig og kan bruges både tør og i bad.

Taktil stimulering

Taktil stimulering kan blandt andet foregå ved hjælp af børste, handske eller forskellige former for massage. Den kan anvendes af både patient/borger selv, eller af fagperson/personale. Ved taktil skyhed kan den evt. anvendes udenpå tøj.

Unikt materiale

Sansehandsken er fremstillet i Stimulite® materiale – den unikke bikubekonstruktion med en kombination af tynde og tykke vægge i bikuberne. Denne specielle konstruktion er velegnet til at give en god, stimulerende effekt.


Anvendelse

- Sansestimulation
- Taktile stimuli; blide strøg
- Proprioceptive stimuli; dybe tryk
- Massage
- Hygiejne/ADL

- Som daglig stimulation for at skærpe sanser før evt. aktivitet
- For at skabe øget tolerance over for berøringsindtryk
- For at øge evne til at registrere og identificere berøringsindtryk
- Både i våd og tør tilstand, f.eks. før/under bad, hårvask, påklædning
- Selv-stimulation
- For at reducere udadreagerende adfærd f.eks. ifm. hygiejne-situationer, ofte kan borger selv få den på og hjælpe til.

Kan vaskes og genbruges

Sansehandsken er hygiejnisk, kan vaskes i vaskemaskine ved 80 grader og genbruges utallige gange. Tåler også 85 grader i vaskeautomat i 10 minutter, men bliver dog mere blød efter vask ved høje temperaturer.

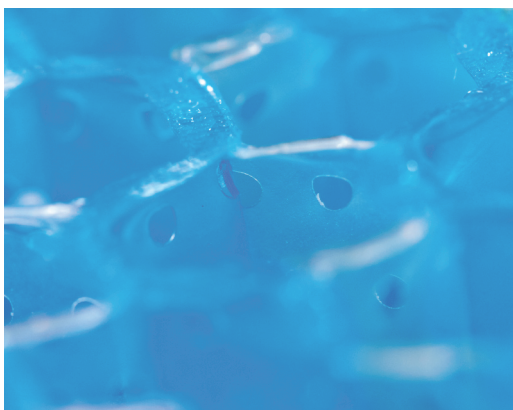

Tekniske data

60x60x1,25 cm
HMI nr.: 72343
Varenr.: SBS1

60x60x2,50 cm
HMI nr.: 72345
Varenr.: SBS3

60x60x1,25 cm
HMI nr.: 72344
Varenr.: SBS2

60x60x2 cm
HMI nr.: 72346
Varenr.: SBS4



Stimulite® kvadrater

Sansestimulerende og trykaflastende materiale til mange formål

Stimulite® er et trykaflastende materiale med en cellekonstruktion i bikubestruktur. Kvadraterne er perforerede for at luft skal minimere dannelsen af varme og fugtighed.

Stykkerne kan anvendes som aflastning i f.eks.

- Bade- og toiletstole
- Nakkestøtter
- Armlæn
- Armstole
- Fodstøtter

Desuden kan Stimulite® anvendes til sansestimulering, f.eks.

- Sansebane
- Siddepude
- Trædeflise
- Træningsunderlag
- Bademåtte

Stimulite® fås i kvadrater, som skæres til efter mål.

Vaskeanvisning

Stimulite® tåler maskinvask ved 80 grader eller vaske-automat ved max 85 grader i 10 minutter. Tørretumbling ved kold luft.

Brugervægt

Max 125 kg



Tekniske data

63x180x5 cm
HMI nr.: 84515
Varenr.: mas1000



Sansemadrass m/indbygget massage

Velvære, ro og afslapning

Sansemadrassen er et sansestimulerende hjælpemiddel, som kan anvendes på seng, sofa eller gulv.

Stimuli til ethvert behov

Madrassen tilbyder en række forprogrammerede stimuli-, massage- og mindfulnessprogrammer, som nemt betjenes med den medfølgende manuelle håndbetjening.

De mange programmer gør, at der altid vil være den form for stimuli, der matcher behovet hos bruger for f.eks. at øge eller dæmpe hjernens arousalniveau.

Mange formål

Sansemadrassen henvender sig til borgere med psykiske og fysiske gener samt enhver, der har lyst til at give sig selv en *time-out*, hvor kroppen kan lade op og genfinde energi.

Anvendelse

Sansemadrassen er handy og nem at flytte fra stue til stue på f.eks. bosted, plejecenter og institution.

Sansemadrassen er særlig god ved

- Stress og utryghed
- Muskelspændinger samt høj/lav tonus
- Psykiske lidelser; angst, depression, skizofreni
- Motorisk uro
- Autisme Spektrum forstyrrelser
- Spiseforstyrrelser
- Demens
- Kroniske smerter

Rengøring

Madrassen kan afsprittes.

Brugervægt	Max 240 kg
Vægt	3 kg
Garanti	2 år



Tekniske data

Baby ekskl. futon

85x80 cm

HMI nr.: 80059

Varenr.: Traum001

Barn

M | 85x65 cm

HMI nr.: 80060

Varenr.: Traum002

Voksen

L | 100x90 cm

HMI nr.: 80061

Varenr.: Traum003

XL | 120x98cm

HMI nr.: 80062

Varenr.: Traum004

XXL | 130x130 cm

HMI nr.: 80063

Varenr.: Traum005

XXL XL | 152x152 kg

HMI nr.: 80065

Varenr.: Traum006



Traumschwinger®

Hængekøje/-stol i lækkert design med unikke funktioner

Traumschwingeren består af økologisk bomuld og smukt forarbejdet tysk egetræ. Den særlige elasticitet i bomulds-trådenes vævning gør, at Traumschwingeren pakker brugeren trygt ind. Samtidig støttes brugeren til en optimal siddestilling, hvor der ikke sker belastning af ryg og lænd. Siderne afskærmer brugeren for stimuli udefra og skaber et rum, hvori brugeren kan stimuleres. Arousalniveauet kan dæmpes eller øges, afhængigt af anvendelse og behov.

Unikt og enkelt system

Traumschwingeren er ét-punktsophængt og giver dermed brugeren mulighed for en total vestibulær stimulation. Det unikke og helt enkle hejsesystem gør, at indstignings-højden kan reguleres. Hermed kan en Traumschwinger anvendes både med og uden gulvkontakt og af brugere med forskellige behov.

Anvendelse

Anvendes både til almindelig afslapning samt til brugere med særlige behov, i institutioner, på plejecentre, i stuen, haven, skolen mv.

Bredt udvalg

Traumschwingeren fås i seks forskellige størrelser. De største modeller kan anvendes af flere brugere samtidig. Den mindste anvendes med en futonpude og kan bruges helt fra spædbarnsalderen. Konstruktionen gør det let at hænge Traumschwingeren op af en væg/ind til siden, så den kun fylder i rummet, når den er i brug.

Variant	Målgruppe	Belastning	Ophængshøjde
Baby	0 - 5 års alderen	max 75 kg	1,80 m
Barn M	3-10 års alderen	max 75 kg	1,50 m
Voksen L	10 år og opefter	max 150 kg	1,80 m
Voksen XL	10 år og opefter +1 ekstra	max 150 kg	2,00 m
Voksen XXL	Voksne, store unge	max 150 kg	2,20 m
Voksen XXL XL	Voksne m/børn, store voksne, flere børn	max 150 kg	2,40 m



Tekniske data

48x37 cm
Dreampad Slim
 HMI nr.: 100873
 Varenr.: Dreampad Slim

60x45 cm
Dreampad Soft
 HMI nr.: 100874
 Varenr.: Dreampad Soft



Dreampad

Innovationsteknologi til bedring af hverdagsproblematikker

For lidt søvn eller for ringe søvnkvalitet er i dag årsag til en række problemer i hverdagen for mange mennesker. Nedsat koncentration, irritabilitet, humørsvingninger, et svækket immunsystem og generel dårlig trivsel bliver en følge af manglende eller dårlig søvn. Kroppen udløser stresshormoner når den er i søvnunderskud, som igen gør søvn vanskeligt – og et dårligt søvn mønster er sat i gang.

Bedre søvnkvalitet

En Dreampad er en hovedpude, der hjælper til bedre søvnkvalitet, ro og afslapning. Den er derfor god ved stress, angst, depression, ADHD, PTSD, smerter og generelle søvnproblemer.

Intrasound Teknologi™

Dreampads har indbygget såkaldt "Intrasound Teknologi"™ der gør, at brugeren har mulighed for at lytte til specialproduceret musik, som gennem vibrationer til kranieknoglerne føres til det indre øre – og kun kan høres af den, som hviler sit hoved på puden. De blide toner bidrager til ro, både mentalt og motorisk. En tilstand der er blevet beskrevet som ren "massage til nervesystemet".

Produktudvalg

Dreampads fås hos os i 2 varianter:

Variant	Størrelse
Dreampad Slim	48 x 37 cm
Dreampad Soft	60 x 45 cm

Anvendelse

Ved ibrugtagning installeres en app på en smartphone, tablet eller iPod. Via app'en vælges mellem 5 forskellige musikmuligheder og ønsket lydstyrke.

Dreampads anvendes i almindelige pudebetræk eller i hygiejnebetræk.

Materiale og vask

Dreampads indeholder elektronisk udstyr og må derfor ikke vaskes. Materialet er hypoallergent og giftffrit.

Tilbehør

Blue Tooth sæt
 Dreampad Blue Tooth sæt

Pudebetræk Slim
 Bomuldsbetræk
 hygiejnebetræk

Pudebetræk Soft
 Bomuldsbetræk



Tekniske data

One size | 52x25x18
HMI nr.:
Varenr.: AudioCura M2



AudioCura M2 mobilafspiller

Musikintervention til lindring og reducere af smerter og angst

AudioCura M2 er en meget brugervenlig og enkel mobil højttaler. Den kan anvendes i sengen ved hovedpuden eller i en hvilestol, hvor den kan placeres på et ryglæn. Den leveres med musik fra Niels Eje's MusiCure "Relaxation" på et tilhørende SD-kort.

Studier viser gode resultater

Adskillige studier verden over viser, at musik er godt for rigtig mange ting, set i et sundhedsmæssigt perspektiv. Det viser bl.a. at musik har en direkte, målbar effekt på oplevelsen af smerte – både akutte og kroniske smerter. Når mennesker kan reducere brugen af medicin mod smerter, forbedres livskvaliteten, da bivirkninger kan undgås. Musikken bidrager til, at smerte opleves mindre ubehageligt og mindre intenst.

Mange anvendelsesmuligheder

Beroligende musik kan reducere smerte og angst før operation samt ved behandling af cancer. Den kan desuden dæmpe gener ved depression, stress og søvnløshed.

Fordele ved musikintervention i sundhedssektoren

- Omkostningerne er lave
- Det er let at integrere
- Det kan skræddersyes individuelt, afhængigt af bruger og formål
- Det skaber glæde og velvære

- Der er ingen bivirkninger
- Det kan lindre og reducere smerter og angst

Hvad er det, musikken kan

- Nydelsesfuld musik kan gøre, at der frigives de såkaldte "opioider" i hjernen. Opioider er kroppens egen "morfin" og det kan forklare, hvordan musik kan mindske smerteoplevelse og reducere behovet for smertestilende medicin.
- Smertelindrende effekt af musik kan også skyldes, at musik er utroligt effektivt til at fange vores opmærksomhed, så vi bliver mindre opmærksomme på smerter eller vores smerteoplevelse distraheres.


Rengøring

Højttaleren er meget hygiejnisk, da den er let at rengøre og kan afsprittes.

Tilbehør

Der kan tilkøbes yderligere SD-kort med andre af MusiCures Cd'ere, lagt på SD-kort.

- **MusiCure "Recovery"**
- **MusiCure "Inducing Sleep"**

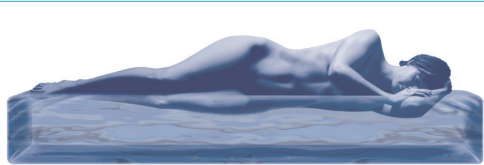

Tekniske data

Udæmpet

Varenr.: VS1000

Dæmpet | 3 lag

Varenr.: VS 1001



Akva vandseng

For søvn og sanseoplevelser

Vi tilbyder et bredt sortiment af vandsenge – alle ordreproduceret hos dansk kvalitetsproducent med mangeårig specialisterfaring.

Helt særlige egenskaber

En vandseng forener trykafledning, komfort og velvære med bløde, beroligende bevægelser, lun og behagelig temperatur samt vandets unikke, lydtransporterende egenskaber.

Ekstraordinær sanseoplevelse

Så hvad enten du søger en vandseng til et sanserum, hvor vandets sanselige fundament skal bidrage til en ekstraordinær sanseoplevelse, eller om du søger en vandseng til forbedret søvnkvalitet, finder vi frem til den løsning, der matcher netop jeres behov.

Vandsenge kan i dag fås både udæmpede og dæmpede i forskellige grader.

Til terapi- og sanserum

Her anbefaler vi oftest de udæmpede, da der oftest er behov for og ønske om at drage udnyttelse af vandets bevægelse. Samtidig anbefaler vi fx en dobbeltseng, udæmpet, med massesystem i den ene side og lydsystem i den anden side. På denne måde kan flere brugeres behov tilgodeses.

Til søvn og hvile

Til gengæld ønskes der ofte en grad af dæmpning, når der er tale om en seng til brug til søvn og hvile. Dette for at vandmadrassen ikke bliver for "levende" og urolig. Her er der mulighed for at dæmpe i hele 7 forskellige grader.

Ved dobbeltseng til to personer, kan hver bruger have sin egen madras, uden at sengen opleves som "opdelt". Samtidig kan hver bruger have sin egen grad af dæmpning – alt efter ønsker og behov.

Vask

Betrækket er aftageligt og vaskbart ved op til 90 grader.



Tekniske data

Lille | 60x40 cm

Varenr.: Vandpude lille

Stor | 80 x 40 cm

Varenr.: Vandpude stor



Akva hovedpude m/vand

Optimal komfort og aflastning

Hovedpude med kerne af vand giver optimal komfort og aflastning. Afhængig af vandmængde, kan hovedpuden tilpasses individuelt.

Vandets mange fordele

At ligge på vand føles både afstressende, nærværende og aflastende. Vandet støtter og bærer, samtidig med at puden hele tiden følger hovedets bevægelser – helt lydløst.

Anvendelse

Ved brug i seng, får vandet stuetemperatur og føles behageligt – uanset om man ligger på maven, ryggen eller siden. Bruges puden i vandseng, bliver vandets temperatur tempereret.

Anvendes i almindeligt pudebetræk eller hygiejnebetræk, efter behov. Overfladen er uigennemtrængelig og derfor optimal for støvmideallergikere.

Materiale Allergivenlig ftalatfri vinyl

Certificering Øko-Text standard 100

Anbefales ved

- Spændingshovedpine
- Skulder- og nakkesmerter
- Spændinger i kæbeparti
- Uro
- Søvnproblemer
- Stress
- Tankemylder

Vask

Yderbetrækket kan vaskes ved 60 grader. Medfølger.

Tilbehør

Hygiejnebetræk kan tilkøbes. Tåler 90 grader i vask.



Tekniske data

45 x 45 cm

HMI nr.: 77137

Varenr.: PDST1000

50 x 50 cm

HMI nr.: 77138

Varenr.: PDST1100



Curo Cell S.A.C. siddepude

Trykaflastende og sansestimulerende luftpude

Denne multifunktionelle luftpude giver både trykaflastning og sansestimuli.

Forebyggelse og træning

Den kan således anvendes både i forbindelse med forebyggelse af trykskader, til aflastning samt for at skabe både mere komfort og bevægelse i den siddende stilling. Samtidig trænes balance på en rolig og behagelig måde.

Aktiv siddestilling

Mange vælger også at anvende den for at øge koncentration og indlæring, da den aktive siddestilling øger input til krop og hjerne.

Anbefales ved bl.a.

- Længerevarende siddestillinger
- Lænde- og rygproblemer
- Motorisk uro
- Demenstilstande
- ADHD/ADD
- Koncentrations- og indlæringsvanskeligheder

Bruger- og rengøringsvenlig pude

Puden er meget enkel, både at anvende og rengøre. Den er slidstærk og kan bruges såvel som siddepude og som lænde- og rygstøtte.

Fordele

- Klar til brug
- Passer til alle stole
- Nem at bruge
- Slidstærkt materiale
- Reducerer trykskader
- Rengøringsvenlig

Rengøring


Aftørres med rengørings- eller desinfektionsmiddel.

Tilbehør

Betræk kan tilkøbes.

Brugervægt

Max 160 kg

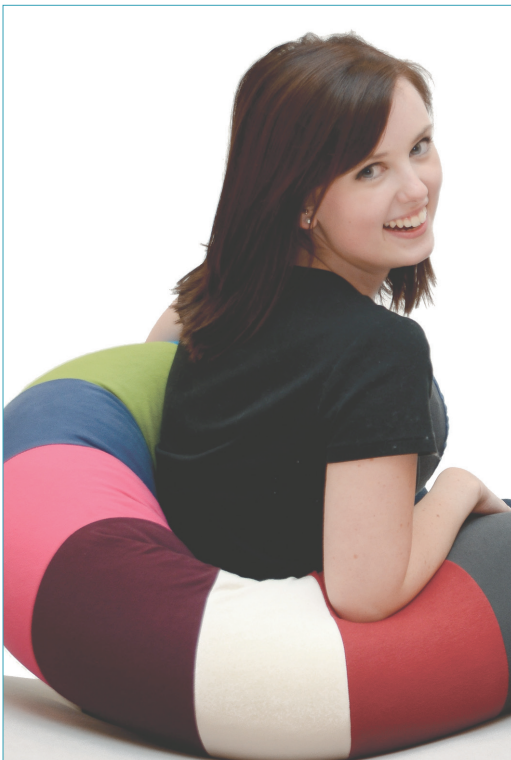

Yogibo Bean Bags

Byg et sansestimulerende miljø efter dit behov

Yogibo multipuder er et spændende sortiment af unikke sansepuder til mange forskellige formål.

Puder til enhver anledning

Puderne kan anvendes til alle aldre og målgrupper. Funktion og formål tilpasses individuelle behov, uanset om der er tale om lejrning, terapi og træning eller afslappende og alternativ indretning i hjem eller institutioner.

Genialt redskab

Yogibo er geniale redskaber til at opnå sensoriske stimuli og anvendes med succes af både forældre til børn med særlige behov, pædagoger og plejepersonale samt terapeuter.

Brug i træningsøjemed

Puderne kan også bruges i træning. Eksempelvis til at skubbe/puffe med, trække med og bokse på. Der kan hoppes på og i dem – og børn kan kravle helt ind i de store puder og sidde afgrænset i deres egen lille "hule".

Herved opnås dybe tryk, kompression og kropsafgrænsning, da puderne former sig efter kroppen.

Komfort i særklasse

Komforten ved Yogibo puderne er i særklasse, både i sidde- og hvilestilling. Puderne kan kombineres på kryds og tværs – kun fantasien sætter grænser.

Strækbar inderpose sikrer ekstra holdbarhed og sikkerhed. Genfyldning er muligt.

Vaskeanvisning

Materialet er vaskbart og holdbart. Yderbetrækket vaskes ved 60 grader. Ved behov for vask af inderposen med fyld, kontakt vores Rent & Service afdeling.

Materiale	Bomuld, polyester og spandex.
Fyld	EPS-kugler.
Garanti	1 år på lynlåse og sømme.

Yogibo sortiment



Yogibo Multipude Mini



Yogibo Multipude Midi



Yogibo Multipude Maxi



Yogibo Roll



Yogibo Caterpillar



Yogibo Support



Yogibo Krammefigur



Yogibo Pyramide



Yogibo Pod



Yogibo Cube



Zibo Athene
...gør en forskel