

Somna Hygienöverdrag

Somna Hygienöverdrag är avsedd att ge täcken skydd mot fukt och smuts.

Passar tyngdprodukt

Somna Kedjetäcke


Somna Kedjetäcke Junior

Somna Kedjetäcke Sensitive




Använd Somna Hygienöverdrag


⚠ VARNING: Ta hänsyn till kvävningsrisk. Somna Hygienöverdrag är gjord av ett tätt material.

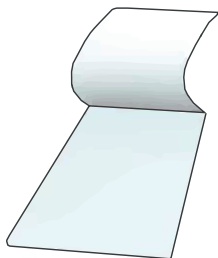


1. Öppna överdraget på tre sidor.

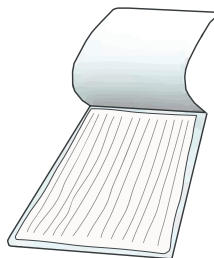

2. Lägg täcket i överdraget.

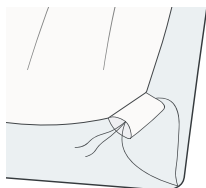

3. Om täcket har öglor, fäst knytbanden i öglorna.

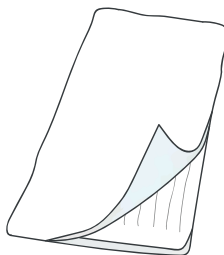

4. Stäng överdraget.

Skötsel

 **FÖRSIKTIGHET:** Använd medföljande tvättpåse. Om tvättpåsen inte används kan Somna Hygienöverdrag gå sönder.



Högst 60°C – skonsamt tvättprogram



Tål ej strykning



Tål ej blekmedel



Tål ej kemtvätt



Tål ej torktumling

Produktspecifikationer

Yttertåg i flamsäkert material.

Textil: 50% Polyuretan, 50% Polyester.